

Snabbstartguide

Vibio Bluetooth® sängvibrator

SVENSKA


Träffa Vibio.

Detta behöver du

- En mobiltelefon eller läsplatta med iOS 8 / Android 4.4 eller senare.
- En USB-strömadapter, max 12W.


I förpackningen

- 1 Laddkabel
- 2 Sängvibrator

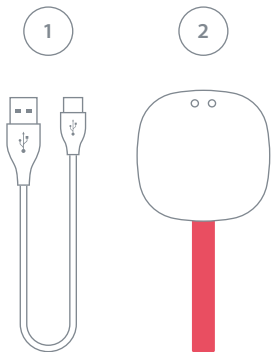

Tolka de blinkande ögonen

- **Vit** betyder att den är aktiverad eller kommunicerar med din mobiltelefon.
- **Blå** betyder att den är klar att anslutas.
- **Grön** betyder att den laddar.
- **Gul** betyder att du får ett samtal eller meddelande.
- **Röd** betyder att batterinivån är låg.

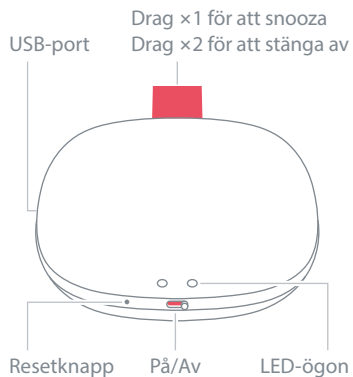

Klara. Färdiga. Gå.

Installera appen

Ladda ner Vibio-appen från App Store® eller Google Play™ och följ de enkla stegen som beskrivs.

Det tar bara ett par minuter.



DESIGN FOR EARS™

Bellman & Symfon
Södra Långebergsgatan 30
421 32 Västra Frölunda
Tel 031 68 28 20
E-post info@bellman.com
bellman.com

BE1220_024MAN003

© och TM 2017 Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehålls.

