

DESIGN FOR EARS™



Bellman Chill Bruksanvisning

bellman.com

Tack för att du har valt formgjutna hörselskydd från Bellman & Symfon.

Tänk på att även med hörselskydd så blir det aldrig helt tyst eftersom vi också tar upp ljud genom kroppen. Bellman Chill dämpar ca 30 dB (beroende på frekvens) men släpper igenom varningssignaler som t ex brandlarm.

Isättning

Kontrollera att hörselskydden är rena före användning. Avlägsna eventuell vax eller smuts (se under *Skötsel*).

- 1 Höger hörselskydd är märkt med **R** och vänster med **L**. Håll respektive hörselskydd mellan tumme och pekfinger med märkningen pekande framåt. Om du är osäker kan du använda en spegel.
- 2 Sätt in skyddet i hörselgången med en lätt vridande rörelse. Om det är svårt kan det underlätta att dra lite försiktigt uppåt i ytterörat med den andra handen samtidigt som du sätter i det.

Skötsel

Rengör dina hörselskydd regelbundet så håller de längre. Observera att hörselskydden kan skadas av vissa kemikalier. Använd därför endast vatten och en mild tvällösning vid rengöring. Förvara hörselskydden i sitt etui när du inte använder dem.

