

# Visit portabel mottagare

BE1450/BE1452



 Bellman & Symfon®



## Egenskaper

### Kraftfullt ljud

Går att justera upp till 93 dB

### Tydliga signaler

Med blixtn och färgade lysdioder

### Lång batteritid

Håller upp till tre år

### Sängvibrator eller ljudutgång

För nattlarm eller förstärkt ljud

### Enkel att sätta upp

Använd den direkt ur paketet

## Håller dig uppdaterad.

Den portabla mottagaren från Bellman & Symfon är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Med ljud och blixtnar talar den om när dörren eller telefonen ringer, när din bebis behöver uppmärksamhet eller om en brand skulle inträffa.

Den portabla mottagaren är mycket enkel att använda. Den är helt trådlös, så du kan ta med den ut på verandan eller balkongen, och har en batterilivslängd på upp till tre år.

### Klara och tydliga larm

Den bärbara mottagaren producerar en ljudsignal på upp till 93 dB och har ett stort, ergonomiskt vred som gör det enkelt att justera volymen precis som du vill. Den använder olika färgade lysdioder och individuella ljud för att särskilja Visitsignalerna.

Du kan dessutom ansluta en sängvibrator och vakna upp till vibrationer om något skulle hända medan du sover.



# Teknisk information




## Mått och vikt

Höjd	165 mm
Bredd	130 mm
Djup	36 mm
Vikt	590 g (inkl. batteri)



## Knappar och reglage

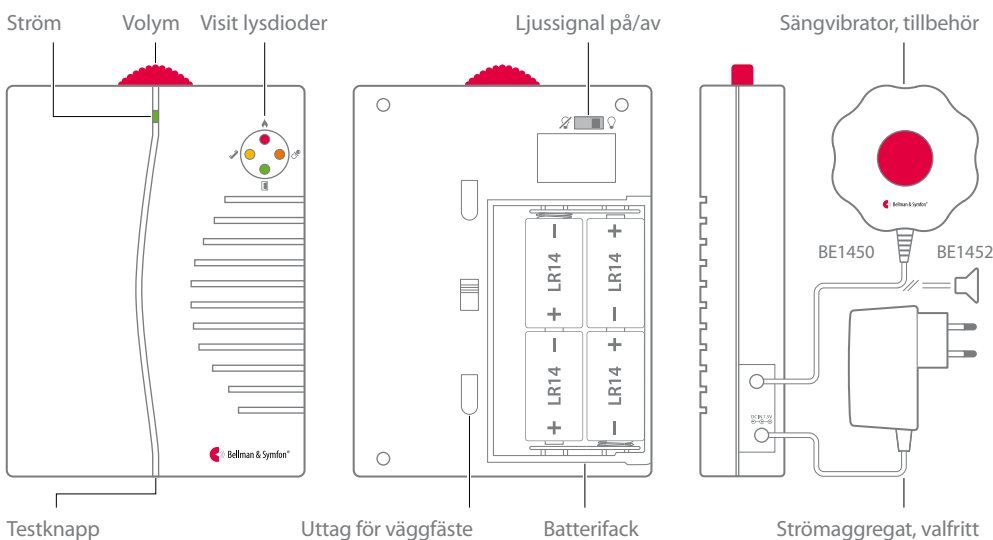

## Egenskaper

- Justerbar ljudsignal  
Max 93 dBA @ 1 m, frekvensomfång: 500-1000 Hz
- Tydlig signalidentifiering  
Färgade lysdioder och individuella ljudsignaler
- Lång batteritid  
Upp till 3 års batterilivslängd
- Uttag sängvibrator: 2.0 – 4.0 VDC (BE1450)  
Uttag högtalare: 10 kΩ, 0 – 4 V (BE1452)

## Ström och batteri

- Batterityp  
4 x 1.5V LR14 alkaliska batterier
- Strömförsörjning  
7.5 V DC / 1000 mA med valfritt strömaggregat
- Strömförbrukning  
Aktiv: 1000 mA, viloläge: 0.1 mA
- Drifttid  
2 – 3 år med alkaliska batterier

## Visit lysdioder

Lysdioderna visar i vanliga fall följande:

- Orange lysdiod med en nappsymbol  
Visit Babymonitor har aktiverats
- Grön lysdiod med en dörrsymbol  
Visit dörrsändare har aktiverats
- Gul lysdiod med en telefonsymbol  
Visit telefonsändare har aktiverats
- Röd lysdiod med en eldsymbol  
Visit Brandvarnare har aktiverats

## Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

## I paketet

- E1450 Visit portabel mottagare
- 4 x 1.5V LR14 batterier
- Väggfäste med skruv och plugg

## Tillbehör

- BE1270 sängvibrator
- BE9201 Strömaggregat

## Omgivning

- För inomhusbruk.
- Arbetstemperatur: 15°-35° C
- Relativ luftfuktighet: 5% -95% ej kondenserande

## Regulatoriska krav

- Uppfyller följande regulatoriska krav:  
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne punkt



© 2016, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1450\_001DAS002

[bellman.com](http://bellman.com)