


Sängvibrator



BE1270

Anslutningar

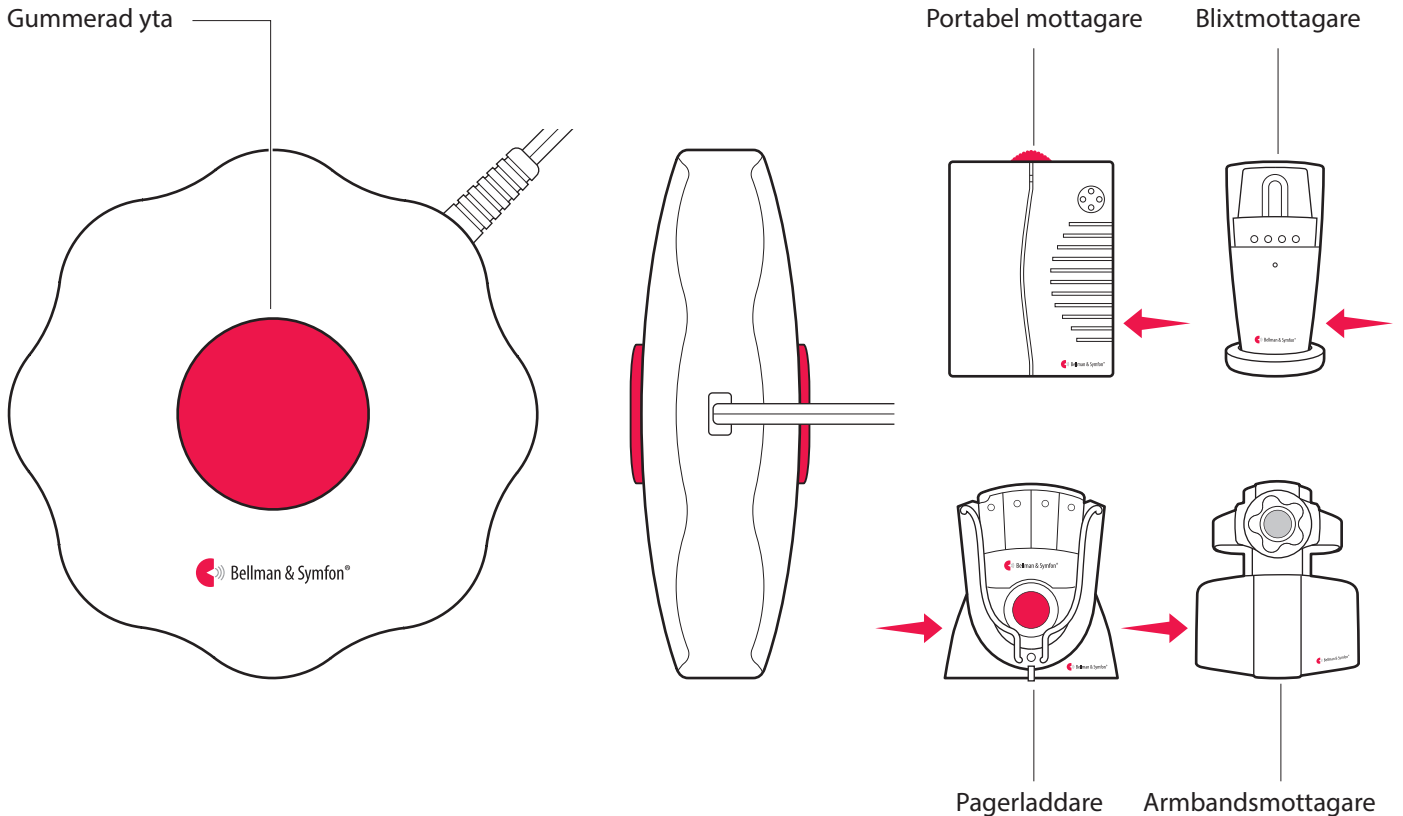

Teknisk information

Egenskaper

Sängvibratoren väcker dig med vibrationer under huvudkudden eller madrassen. Den behöver inget batteri och kan anslutas till de flesta Visitmottagare och laddartillbehör.

I förpackningen

- BE1270 Sängvibrator

Strömförsörjning

- Driftspänning
2,0 – 4,0 V DC från en mottagare
- Strömförbrukning
250 – 750 mA

Kablar och kontakter

- Kabellängd: 2 meter
- Kontakt: 3,5 mm mono

Storlek och vikt

- Höjd: 88 mm
- Bredd: 88 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° – 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% – 90%
Icke-kondenserande

Underhåll och rengöring

- Rengör endast med en torr trasa
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel

Anpassningar

Sängvibratoren kan anslutas till följande Visitmottagare och laddartillbehör:

Visitmottagare

- BE1450 Visit portabel mottagare
- BE1441 Visit blixtmottagare
- BE1442 Visit blixtmottagare med reservbatteri
- BE1570 laddare för
BE1560 Visit armbandsmottagare

Tillbehör

- BE1260 Pagerladdare för
BE1470 Visitpager

Sängvibrator

Information om medicinteknisk utrustning

Tack för att du valt en produkt från Bellman & Symfon, ett världsledande företag inom varseblivning med huvudkontor i Göteborg. Läs denna information noga för att vara säker på att du förstår och får ut det mesta av din Bellman & Symfon-produkt. Hör av dig till din audionom om du vill veta mer om produktens funktioner och fördelar.

Om Sängvibratorm

Avsedd användning


Syftet med sängvibratorm är att ge en notifiering i form av vibrationer under madrassen eller huvudkudden och på så vis väcka dig som har en mild till grav hörselskada eller är döv när en Visitmottagare aktiveras.

Så fungerar sängvibratorm

Sängvibratorm ansluts till en Visitmottagare eller laddare och placeras normalt under madrassen eller huvudkudden. När Visitmottagaren aktiveras väcker sängvibratorm dig med vibrationer.

Avsedd användare

Sängvibratorm är utvecklad för dig som har en mild till grav hörselskada eller är döv och som har behov av en taktill förstärkning av signaler i hemmet.

 Enheten återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte en hörselnedsättning eller dövhet som beror på organiska förhållanden.

Driftsförhållanden

Använd enheten i en torr miljö och inom de temperatur- och luftfuktighetsgränser som anges i denna information. Om enheten blir våt eller utsätts för fukt bör den inte längre betraktas som pålitlig och ska därför bytas ut.

Rengöring

Koppla ur eventuella kablar innan du rengör enheten. Använd en mjuk, luddfri trasa. Låt inte fukt komma in i öppningarna. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprej, lösningsmedel, alkohol, ammoniak, slipmedel eller tryckluft. Enheten kräver ingen sterilisering.


Service och support


Om produkten verkar skadad eller inte fungerar korrekt, följ instruktionerna i bruksanvisningen. Om enheten fortfarande inte fungerar som avsett, kontakta din audionom för information om service och garanti.


Viktig säkerhetsinformation


Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftsförhållanden. Behåll bruksanvisningen för framtida användning. Om du enbart installerar enheten ska du ge bruksanvisningen till personerna som bor i hushållet.

Varningar

 Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna kan medföra kroppsskada eller orsaka elektriska stötar, brand, skador på enheten eller annan egendom.

 Förvara alltid Visitmottagaren utom räckhåll för barn under 3 år.

 Observera att du kan missa notifieringar om reservbatterierna i mottagaren eller laddaren är urladdade.

 Använd eller förvara inte enheten nära värmekällor som öppna lågor, värmeelement, ugn eller andra värmeavgivande enheter.

Sängvibrator

- ⚠ Enheten ska inte användas som den enda säkerhetsåtgärden i livshotande situationer.
- ⚠ Skydda kablar från eventuella skador som kan uppkomma.
- ⚠ Försök inte att manipulera enheten på något sätt. Använd endast originaltillbehör från Bellman & Symfon Annars finns en risk för elstötar!

- ⚠ Ta inte isär eller modifiera enheten, det finns risk för elstötar! Manipulering eller demontering av enheten upphäver garantin.
- ⚠ Skydda enheten mot stötar under förvaring och transport.
- ⚠ Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Enheten får inte utsättas för fukt.

Information om produktsäkerhet

- ⓘ Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till skador på enheten och upphäva garantin.
- ⓘ Tappa inte enheten. Om den tappas på en hård yta kan enheten skadas.
- ⓘ Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- ⓘ Enheten får endast repareras hos ett auktoriserat servicecenter.
- ⓘ Om en allvarlig händelse inträffar i anknötning till den här enheten, kontakta tillverkaren och relevant myndighet.
- ⓘ Om du stöter på andra problem med din enhet, kontakta inköpsstället, din lokala Bellman & Symfon-representant eller tillverkaren. Besök bellman.com för kontaktinformation.
- ⓘ Denna enhet får inte användas på flygplan annat än om tillåtelse ges av flygplanets besättning.

Överensstämmelse

Bellman & Symfon försäkrar härmed att denna produkt i Europa uppfyller de väsentliga kraven i förordningen om medicinteknisk utrustning, EU 2017/745 samt nedanstående direktiv och förordningar. Den fullständiga texten i försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfon eller lokal Bellman & Symfon-representant. Besök bellman.com för kontaktinformation.

EU 2017/745	Förordning om medicinteknisk utrustning (MDR)
2014/35/EU	Direktiv om lågspänning (LVD)
2014/30/EU	Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2015/863/EU	Direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS)
EC1907/2006	REACH-förordningen

ISO-certifiering för tillverkare

Bellman är certifierade i överensstämmelse med SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 13485


SS-EN ISO 9001 certifieringsnummer: CN19/42071
SS-EN ISO 13485 certifieringsnummer: CN19/42070


Certifieringsorgan


SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park
Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN
Storbritannien


Sängvibrator


Symbolförklaring


 Med den här symbolen bekräftar Bellman & Symfon att produkten uppfyller de väsentliga kraven i förordningen om medicinteknisk utrustning, EU 2017/745.

 Den här symbolen anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras. Symbolen finns på produkten och förpackningen.


 Den här symbolen anger tillverkarens katalognummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras. Symbolen finns på produkten och förpackningen.


 Den här symbolen anger tillverkaren av medicinteknisk utrustning, enligt EU-direktiven 90/385/EEC, 93/42/EEC och 98/79/EC.


 Den här symbolen indikerar att du bör läsa bruksanvisningen.

 Den här symbolen indikerar att det är viktigt att du uppmärksammar relevanta varningsmeddelanden.

 Den här symbolen indikerar viktig information för hantering och produktsäkerhet.


 Temperatur vid transport och förvaring: -10° till 50° C
Drifttemperatur: 0° till 35° C

 Luftfuktighet vid transport och förvaring: $<90\%$, ej kondenserande
Luftfuktighet vid drift: 15% till 90% , ej kondenserande

 Atmosfäriskt tryck vid drift, transport och förvaring: 700 till 1060 hpa

Driftsförhållanden Den här enheten är tillverkad så att den fungerar utan problem eller begränsningar om den används som avsett, såvida inte annat anges i bruksanvisningen eller detta häfte.

 Med CE-symbolen bekräftar Bellman & Symfon att produkten uppfyller EU:s standarder för hälsa, säkerhet och miljöskydd.

 Den här symbolen indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Lämna din gamla eller oanvända produkt på därtill avsedd samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning eller ta med den till din audionom för lämplig bortskaffning. Genom att se till att denna produkt bortskaffas på rätt sätt hjälper du till att förhindra skador på miljön och människors hälsa.



Tillverkare

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim, Sverige
Telefon: 031 68 28 20
E-post: info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1270_056MAN001-SE
Utgivningsdatum: 2020-05-05

TM och © 2020 Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.