


# Visit mobiltelefonsändare



## Knappar och anslutningar

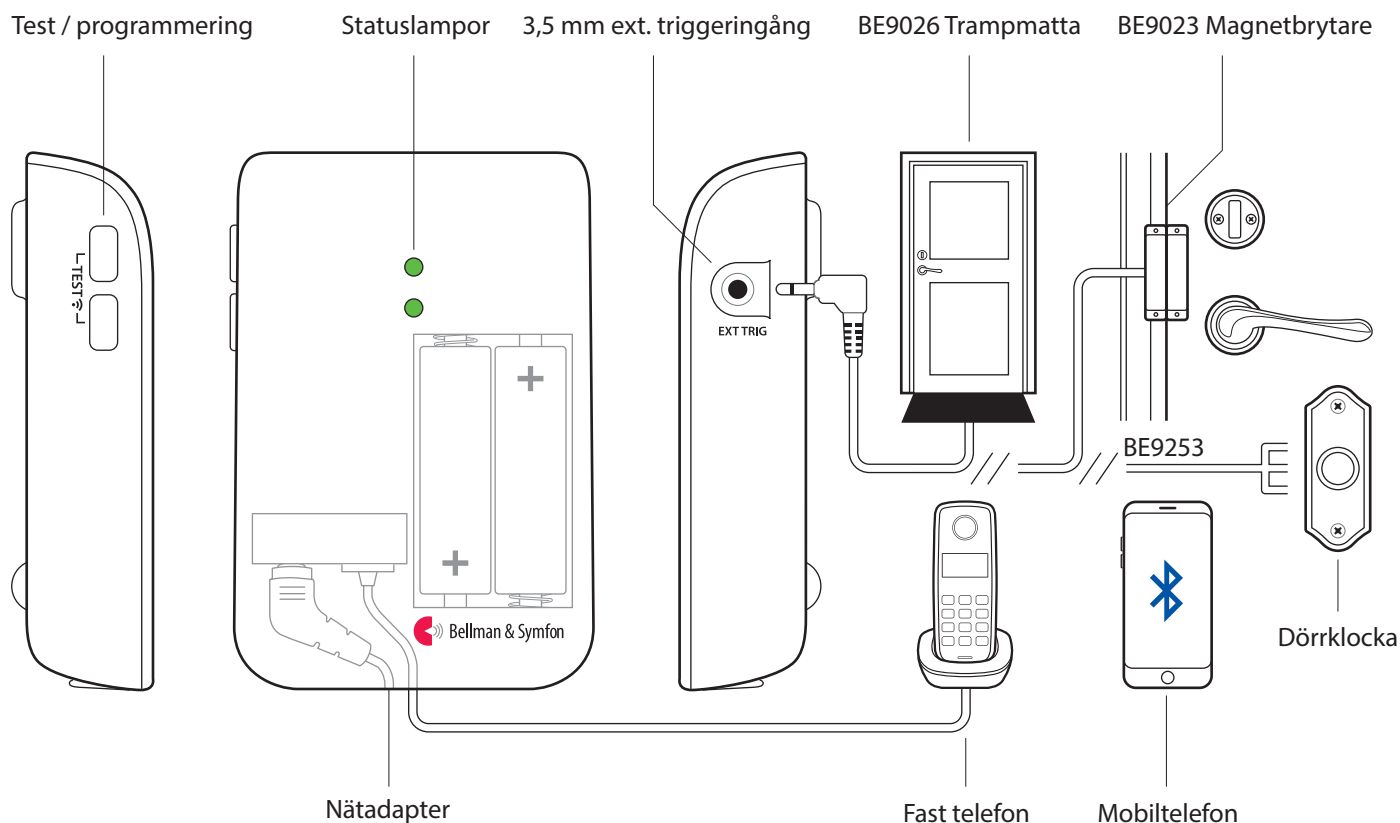

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1432 Visit mobiltelefonsändare
- Nätadapter och strömkabel
- 2 × 1.5V AA Alkaliska batterier
- Förmonterad telefonkabel
- Mellanpropp
- Skruv och plugg

### Kompatibilitet

- iOS11 eller senare  
Android 4.4 eller senare
- iPhone 6S eller senare  
Moderna Androidtelefoner

### Ström och batteri

- Strömförsörjning: 5 V DC / 1000 mA
- Batterier: 2 × 1.5 V AA, Alkaliska

### Storlek och vikt

- 100 mm x 65 mm x 27 mm
- Vikt: 120 g med batterier

### Aktivering

- Via mobiltelefon (över Bluetooth)
- Via fast telefon
- Via ett anslutet tillbehör

### Anslutningar

- RJ11 analog telefoningång
- 3,5 mm extern triggerringång
- Uttag för nätadapter
- Bluetooth 5.0

### Frekvens och räckvidd

- 868.30 MHz, upp till 250 m
- 2402 – 2480 MHz, upp till 50 m

### Anpassningar

Sändaren kan användas med följande Visitmottagare och originaltillbehör:

### Visitmottagare

- BE1450 Visit portabel mottagare
- BE1441 Visit blyxtmottagare
- BE1442 Visit blyxtmottagare
- BE1580 Visit väckarklocka
- BE1470 Visit pager
- BE1560 Visit armbandsmottagare

### Tillbehör

- BE9023 Magnetbrytare
- BE9026 Trampmatta
- BE9253 Extern triggerringångskabel 3,5 mm

# Visit mobiltelefonsändare

---

## Information om medicinteknisk utrustning

Tack för att du valt en produkt från Bellman & Symfon, ett världsledande företag inom varseblivning med huvudkontor i Göteborg. Läs denna information noga för att vara säker på att du förstår och får ut det mesta av din Bellman & Symfon-produkt. Hör av dig till din audionom om du vill veta mer om produktens funktioner och fördelar.

## Om Visit mobiltelefonsändare

### Avsedd användning


Den här enheten är en del av Visitsystemet. Systemets syfte är att uppmärksamma döva och hörselskadade personer på viktiga signaler hemmet. Sändaren aktiveras när en fast telefon eller mobiltelefon ringer eller tar emot ett meddelande. Den signalerar då din Visitmottagare som börjar ljuda, blixtra eller vibrera, beroende vilken mottagare du har. Sändaren används tillsammans med mobilapplikationen **Visit**.

### Avsedd användare

Visitsystemet är utvecklat för dig som har en mild till grav hörselskada eller är döv och som har behov av ljud, syn- eller känsel förstärkning i hemmet.

### Så fungerar Visitsystemet

Visitsystemet består av en uppsättning trådlöst anslutna sändare och mottagare som är utplacerade i hemmet. När en sändare registrerar en aktivitet, signalerar den mottagaren som notifierar dig med ljud, blyxtljus eller vibrationer. För att kunna använda Visitsystemet behöver du ha minst en sändare och en mottagare.

 Visitsystemet återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte en hörselnedsättning eller dövhet som beror på organiska förhållanden.

## Driftsförhållanden

Använd enheten i en torr miljö och inom de temperatur- och luftfuktighetsgränser som anges i denna information. Om enheten blir våt eller utsätts för fukt bör den inte längre betraktas som pålitlig och ska därför bytas ut.

## Rengöring


Koppla ur eventuella kablar innan du rengör enheten. Använd en mjuk, luddfri trasa. Låt inte fukt komma in i öppningarna. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprej, lösningsmedel, alkohol, ammoniak, slipmedel eller tryckluft. Enheten kräver ingen sterilisering.


## Service och support


Om produkten verkar skadad eller inte fungerar korrekt, följ instruktionerna i bruksanvisningen. Om enheten fortfarande inte fungerar som avsett, kontakta din audionom för information om service och garanti.


## Viktig säkerhetsinformation

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftsförhållanden. Behåll bruksanvisningen för framtida användning. Om du enbart installerar enheten ska du ge bruksanvisningen till personerna som bor i hushållet.

 Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna kan medföra kroppsskada eller orsaka elektriska stötar, brand, skador på enheten eller annan egendom.

 Förvara alltid Visitmottagaren utom räckhåll för barn under 3 år.

 Observera att du kan missa larm och notifieringar om batterierna laddats ur.

 Använd eller förvara inte enheten nära värmekällor som öppna lågor, värmeelement, ugn eller andra värmeavgivande enheter.

# Visit mobiltelefonsändare

- ⚠ Använd endast den typ av strömadapter och batteri som anges i bruksanvisningen.
- ⚠ Skydda enheten mot stötar under förvaring och transport.
- ⚠ Enheten är endast avsedd för inomhusbruk och får inte utsättas för fukt.
- ⚠ Ta inte isär eller modifiera enheten, det finns risk för elstötar! Manipulering eller demontering av enheten upphäver garantin.

- ⚠ Försök inte att manipulera enheten på något sätt. Använd endast originaltillbehör från Bellman & Symfon. Annars finns en risk för elstötar!
- ⚠ Batterier är giftiga. De får inte sväljas! Förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur. Om batterierna sväljs, uppsök läkare omedelbart!
- ⚠ Enheten genererar, använder och kan utstråla radioenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation.

## Information om produktsäkerhet

- ⓘ Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till skador på enheten och upphäva garantin.
- ⓘ Utsätt inte enhetens batterier för öppen eld eller direkt solljus.
- ⓘ Tappa inte enheten. Om den tappas på en hård yta kan enheten skadas.
- ⓘ Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- ⓘ Enheten får endast repareras hos ett auktoriserat servicecenter.
- ⓘ Skydda elkablar från eventuella skador som kan uppkomma.
- ⓘ Om en allvarlig händelse inträffar i anknötning till den här enheten, kontakta tillverkaren och relevant myndighet.
- ⓘ Om du stöter på andra problem med din enhet, kontakta inköpsstället, din lokala Bellman & Symfon-representant eller tillverkaren. Besök [bellman.com](http://bellman.com) för kontaktinformation.
- ⓘ Denna enhet får inte användas på flygplan annat än om tillåtelse ges av flygplanets besättning.

## Överensstämmelse

Bellman & Symfon försäkrar härmed att denna produkt i Europa uppfyller de väsentliga kraven i förordningen om medicinteknisk utrustning, EU 2017/745 samt nedanstående direktiv och förordningar. Den fullständiga texten i försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfon eller lokal Bellman & Symfon-representant. Besök [bellman.com](http://bellman.com) för kontaktinformation.

2014/53/EU	Direktiv om radioutrustning (RED)
EU 2017/745	Förordning om medicinteknisk utrustning (MDR)
2014/35/EU	Direktiv om lågspänning (LVD)
2014/30/EU	Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2015/863/EU	Direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS)
EC1907/2006	REACH-förordningen

## ISO-certifiering för tillverkare

Bellman är certifierade i överensstämmelse med SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 13485

SS-EN ISO 9001 certifieringsnummer: CN19/42071  
SS-EN ISO 13485 certifieringsnummer: CN19/42070

## Certifieringsorgan


SGS United Kingdom Ltd  
Rossmore Business Park  
Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN  
Storbritannien

# Visit mobiltelefonsändare

## Installera appen

### 1 Slå på Bluetooth®


Svep för att öppna Kontrollcenter / Snabbinställningar och tryck på Bluetooth-ikonen.

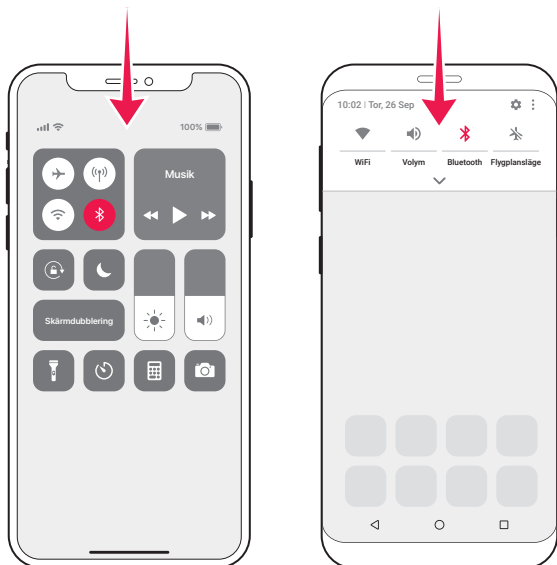

### 2 Installera Visitappen



Ladda ner **Bellman Visit**-appen från App Store® eller Google Play™ och följ anvisningarna för att komma igång.

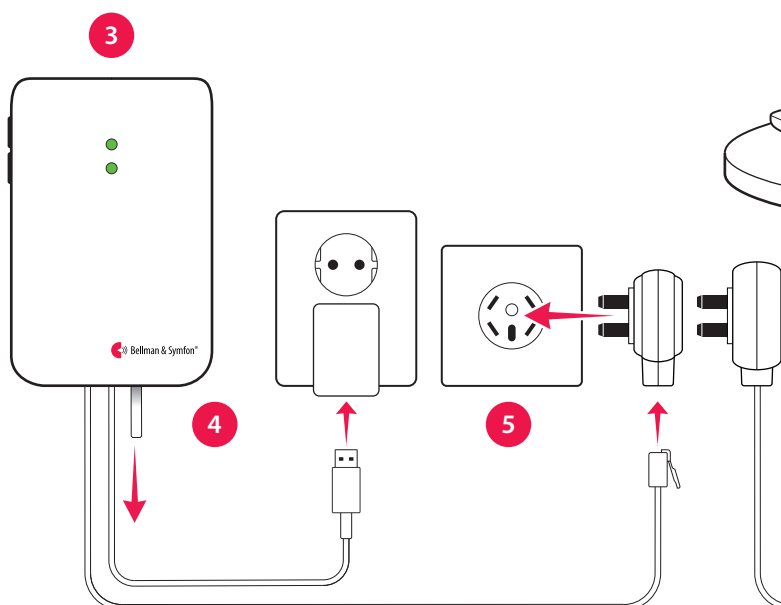

## Installera sändaren

### 3 Montera

Ta bort skyddsfilm från kardborren på sändarens baksida och fäst den på väggen. Du kan istället använda medföljande skruv och plugg.

### 4 Starta

Dra bort batterilappen för att starta sändaren. Statuslamporna lyser i grönt för att visa att den är på.

### 5 Anslut


Anslut USB-kontakten i nätadaptern. Snäpp fast el-kontakten och koppla in adaptern i vägguttaget. Om du har fast telefon ansluter du den med hjälp av medföljande mellanpropp enligt bilden.

### 6 Testa anslutningen till mobilen

Be någon ringa till din mobiltelefon. Den gula lampan på Visitmottagaren blinkar gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).

### 7 Testa anslutningen till den fasta telefonen

Ring till din fasta telefon. Den gula lampan på Visitmottagaren lyser gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).

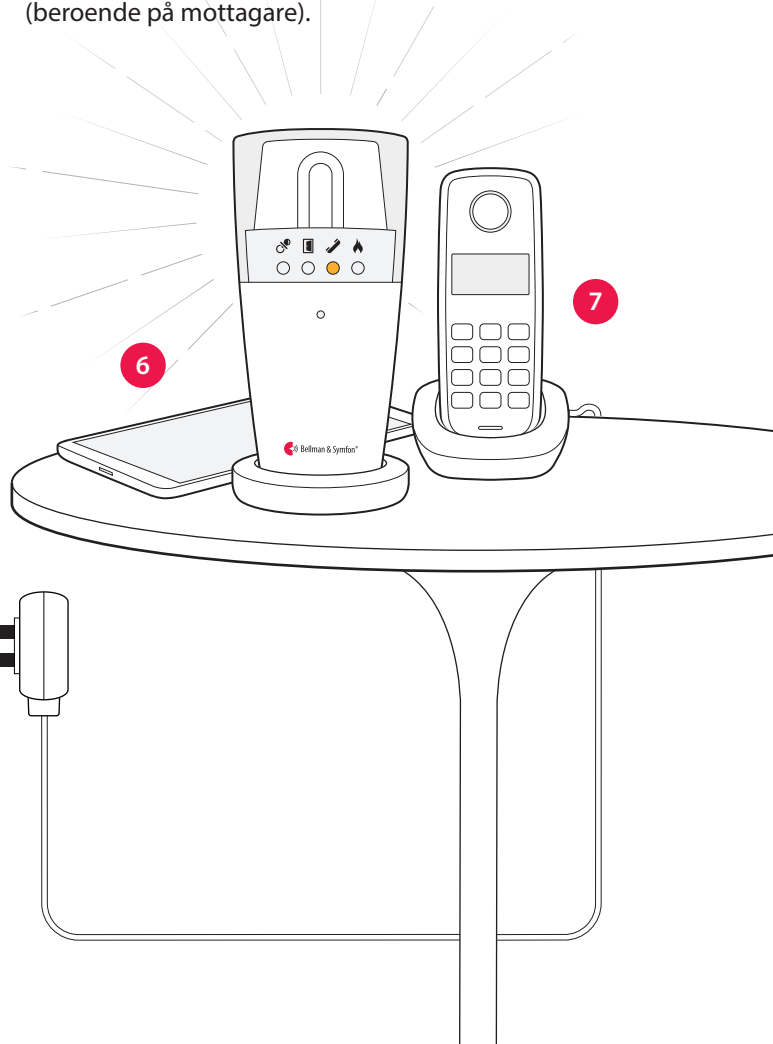

# Visit mobiltelefonsändare

## Använda appen

Det finns stunder på dagen då man inte vill bli störd av en massa signaler. Genom att välja en **Aktivitet** i appen kan du enkelt bestämma vad som skall resultera i en Visit-notifiering.



### God morgon

Visit notifierar för både samtal och meddelanden under denna aktivitet. Välj den på dagen när du inte vill missa något.



### Godnatt

Alla Visitnotifieringar är avstängda under denna aktivitet. Välj den när du går och lägger dig, så att du kan sova ostört.




### Filmkväll

Visit notifierar endast för samtal under aktiviteten. Välj den när du tittar på TV, så att du slipper bli störd av Visit-signaler mitt i ditt favoritprogram.



### Middagsdags

Visit notifierar endast för meddelanden under aktiviteten. Välj den t.ex. vid middagen, så att du inte behöver tala i telefon med mat i munnen.

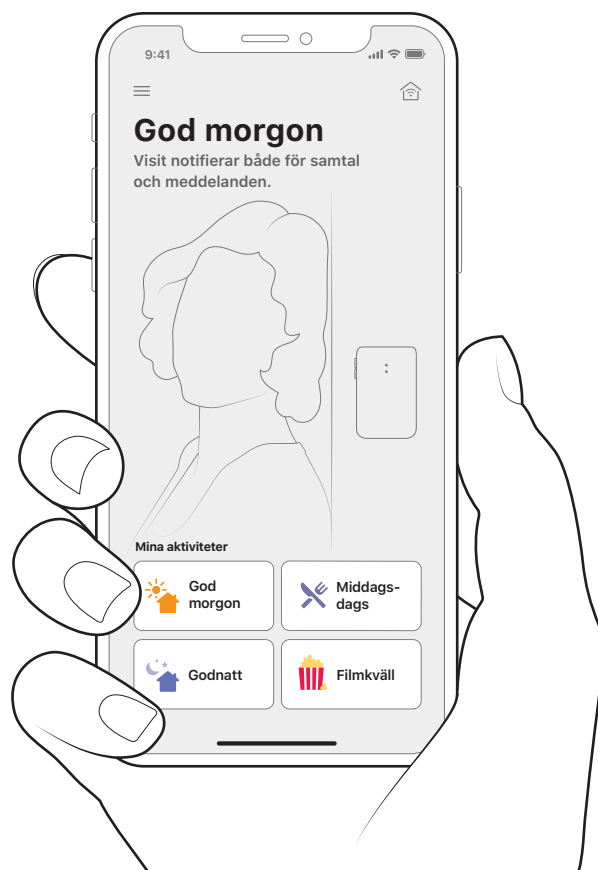

## Förinställt signalmönster

När mobiltelefonsändaren aktiveras av ett inkommande samtal, meddelande eller ett anslutet tillbehör händer följande:

- 1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att sändaren skickar en radiosignal till mottagaren.
- 2 En Visitlampa på mottagaren tänds och den börjar ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Sändaren och de anslutna tillbehören styr signalmönstret och förinställningen är:

## Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplarna enligt tabellen i avsnittet **Byta signalmönster** för BE1431.

## Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter, se avsnittet **Byta radionyckel** för BE1431.

### Sändare

### Signalmönster, mottagare

Källa	Statuslampa	Visitlampa	Ljud	Vibration	Blixt
▪ Fast telefon	Grön, övre	Lyser gult	1 × ringsignal, mörk ton	Mellan ■□□□	Ja
▪ Mobiltelefon	Grön, övre	Blinkar gult	2 × ringsignal, ljus ton	Mellan ■□□□	Ja
▪ Tillbehör	Grön, undre	Lyser grönt	1 × dörrsignal, mörk ton	Långsam ■□□□	Ja













# Visit mobiltelefonsändare

## Felsökning

Om	Gör så här
Sändarens statuslampa blinkar rött en gång i minuten	Det betyder att sändaren saknar strömförsörjning och att reservbatteriet är svagt. Prova att: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Se till att strömkabeln är ansluten till nätadaptorn och att adaptorn sitter i vägguttaget.</li><li>▪ Öppna locket på sändaren och byt batterier. Använd endast 1.5 V AA alkaliska batterier.</li></ul>
Visitmottagaren notifierar inte när den fasta telefonen ringer eller när ett tillbehör aktiveras	Börja med att trycka på testknapparna på sändaren för att skicka en signal till Visitmottagaren. <b>Om sändarens statuslampa lyser grönt, prova följande:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom radoräckvidd.</li><li>2 Kontrollera att din Visitmottagare är elansluten och/eller att eventuella batterier inte är urladdade.</li><li>3 Se till att alla sladdar mellan telefonsändaren och tillbehören sitter ordentligt fast.</li><li>4 Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b> för BE1431.</li></ol> <b>Om telefonsändarens statuslampa inte lyser grönt, prova följande:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera att nätadaptorn är ansluten till vägguttaget och telefonsändaren. Kontrollera även att reservbatterierna inte är svaga. Om statuslampan fortfarande inte lyser grönt, kontakta din återförsäljare för mer information om garanti och service.</li></ul>
Visitmottagaren notifierar inte när mobiltelefonen ringer eller tar emot ett meddelande.	Börja med att kontrollera att den aktivitet du valt i appen inte filtrerar bort samtal eller meddelanden, se avsnittet <b>Använda appen</b> . Prova sedan att trycka in telefonsändarens båda testknappar samtidigt. <b>Om telefonsändarens statuslampa lyser grönt, prova följande:</b> Börja med att kontrollera Bluetooth-anslutningen i appen. Om husikonen längst upp till höger är röd och överstruken, prova följande: <ol style="list-style-type: none"><li>1 Flytta mobilen närmare telefonsändaren för att vara säker på att den är inom räckvidd.</li><li>2 Svep för att öppna Kontrollcenter / Snabbinställningar och tryck på Bluetooth-ikonen för att stänga av och sätta på Bluetooth, se <b>Slå på Bluetooth</b> i avsnittet <b>Installera appen</b>.</li><li>3 Avsluta appen och starta om den igen. <b>Notera:</b> Det räcker inte med att bara stänga appen.</li><li>4 Använder du tredjepartsapplikationer som t ex. Messenger, Skype, WhatsApp, WeChat eller Line? Beroende på telefonmodell kan din mobil missa att vidarebefordra notifieringar från dessa till ditt Visitsystem. Testa därför alltid appen först. Det gör du enklast genom att be någon ringa eller skicka ett meddelande via appen. Om Visitnotifieringen uteblir (trots att den valda aktiviteten ska vidarebefordra notifieringen), kan telefonmodellen eller den aktuella app-versionen vara inkompatibel.</li></ol> <b>Om Visitmottagaren fortfarande inte notifierar, prova följande:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom radoräckvidd.</li><li>2 Kontrollera att din Visitmottagare är elansluten och/eller att eventuella batterier inte är urladdade.</li><li>3 Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b> för BE1431.</li></ol> <b>Om telefonsändarens statuslampa inte lyser grönt, prova följande:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera att nätadaptorn är ansluten till vägguttaget och sändaren. Om statuslampan fortfarande inte lyser grönt, kontakta din återförsäljare för info om garanti och service.</li></ul>
Visitmottagaren notifierar utan anledning	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Börja med att kontrollera om aktiviteten i appen genererar Visitsignaler som du inte vill ha, se avsnittet <b>Använda appen</b>.</li><li>2 Om det inte är fallet, kan det finnas ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt i så fall radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b> för BE1431.</li></ol>

# Visit mobiltelefonsändare

## Symbolförklaring

-  Med den här symbolen bekräftar Bellman & Symfon att produkten uppfyller de väsentliga kraven i förordningen om medicinteknisk utrustning, EU 2017/745.
-  Den här symbolen anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras. Symbolen finns på produkten och förpackningen.
-  Den här symbolen anger tillverkarens katalognummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras. Symbolen finns på produkten och förpackningen.
-  Den här symbolen anger tillverkaren av medicinteknisk utrustning, enligt EU-direktiven 90/385/EEC, 93/42/EEC och 98/79/EC.
-  Den här symbolen indikerar att du bör läsa bruksanvisningen.
-  Den här symbolen indikerar att det är viktigt att du uppmärksammar relevanta varningsmeddelanden.
-  Den här symbolen indikerar viktig information för hantering och produktsäkerhet.
-  Temperatur vid transport och förvaring:  $-10^{\circ}$  till  $50^{\circ}$  C  
Drifttemperatur:  $0^{\circ}$  till  $35^{\circ}$  C
-  Luftfuktighet vid transport och förvaring:  $<90\%$ , ej kondenserande  
Luftfuktighet vid drift:  $15\%$  till  $90\%$ , ej kondenserande
-  Atmosfäriskt tryck vid drift, transport och förvaring: 700 till 1060 hpa
- Driftsförhållanden** Den här enheten är tillverkad så att den fungerar utan problem eller begränsningar om den används som avsett, såvida inte annat anges i bruksanvisningen eller detta häfte.
-  Med CE-symbolen bekräftar Bellman & Symfon att produkten uppfyller EU:s standarder för hälsa, säkerhet och miljöskydd, samt RED-direktivet för radioutrustning 2014/53 / EU.
-  Den här symbolen indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Lämna din gamla eller oanvända produkt på därtill avsedd samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning eller ta med den till din audionom för lämplig bortskaffning. Genom att se till att denna produkt bortskaffas på rätt sätt hjälper du till att förhindra skador på miljön och människors hälsa.
-  Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning tillhörande Bellman & Symfon är licensierade. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.



### Tillverkare

Bellman & Symfon Group AB  
Södra Långebergsgatan 30  
436 32 Askim, Sverige  
Telefon: 031 68 28 20  
E-post: info@bellman.com  
**bellman.com**



Revision: BE1432\_080MAN001-SE  
Utgivningsdatum: 2020-05-05

TM och © 2020 Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.