

# Visit CO-melder

## BE1555



## Bescherm uw huis en gezin.

De CO-melder van Bellman & Symfon maakt deel uit van het smarthome-systeem Visit, waarmee u uw huis in de gaten kunt houden. De CO-melder detecteert gevaarlijke concentraties koolmonoxide en stuurt direct een melding naar uw Visit-ontvanger, zodat u uzelf en uw gezin op tijd in veiligheid kunt brengen.


### Zo werkt het

Als de CO-melder een gevaarlijk CO-gehalte detecteert, wordt uw Visit-

ontvanger meteen geactiveerd. Deze slaat onmiddellijk alarm met geluid, licht en trillingen (afhankelijk van de ontvanger).

Zo kunnen u en uw gezin met een gerust gevoel naar bed.

De Visit CO-melder gebruikt een geavanceerde elektrochemische sensor om koolmonoxide te detecteren. De melder is verbonden met het Visit-systeem via een ingebouwde Visit-radiomodule.

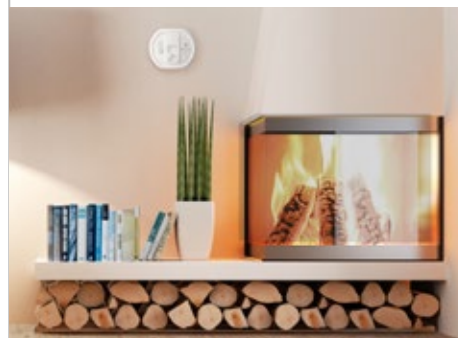

### Kenmerken

**Veilige detectie**  
Elektrochemische sensor

**Betrouwbaar radiosignaal**  
Bereik in het hele huis

**Afgesloten batterij**  
Levensduur van 10 jaar, hetzelfde als het product

**Dempfunctie**  
Om het alarm tijdelijk te dempen

**Uitzendfunctie**  
Stuur het alarm door naar alle Visit-ontvangers






## Afmetingen en gewicht

- Hoogte: 105 mm  
 Breedte: 120 mm  
 Diepte: 40 mm  
 Gewicht: 195 g, incl. batterij



## Knoppen en bediening

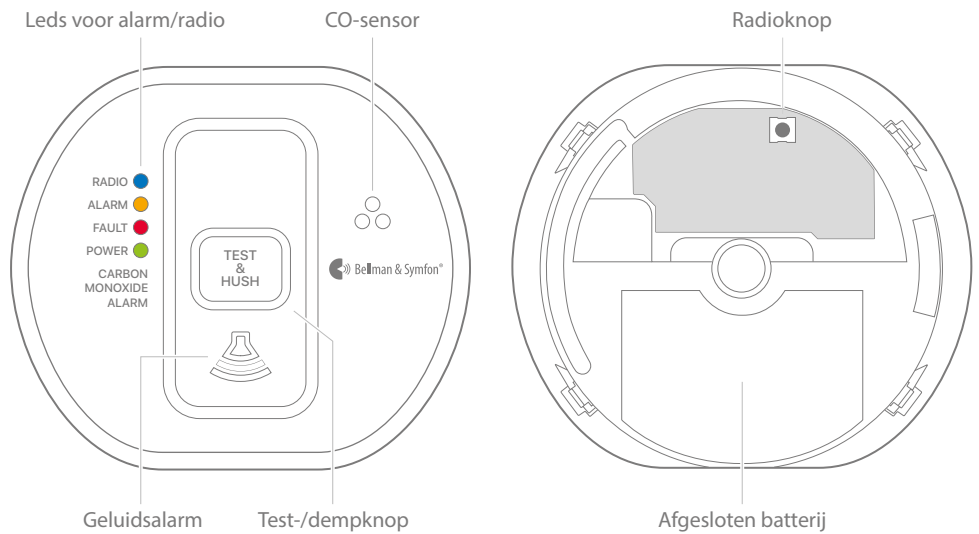

## Kenmerken

- Sensortype  
Elektrochemische sensor
- CO-gevoeligheid  
Voldoet aan BS EN 50291-1:2018 en BS EN 50291-2:2019
- Geluidsalarm  
Minimaal 85 dB(A) op 3 m afstand
- Radioverbinding  
De koolmonoxidemelder bevat een aparte radiomodule.
- Waarschuwing voor lage batterij  
Stuurt het alarm door naar alle Visit-ontvangers binnen bereik (vereist dezelfde radiozenderinstellingen).
- Uitzendfunctie  
Stuurt het alarm door naar alle Visit-ontvangers binnen bereik (onafhankelijk van radiozenderinstellingen).
- Dempfunctie  
Dempt het geluidsalarm 4 minuten. Bij een CO-gehalte van meer dan 150 ppm kan het apparaat niet worden gedempt.
- Activatie
  - Met de test-/dempknop (Controleert de batterijen van de koolmonoxidemelder, de elektronica en het geluidsalarm.)
  - Door koolmonoxide
- Levensduur van het product  
10 jaar

## Voeding en batterij

- Batterij  
Bevat een ingebouwde, onvervangbare lithium-batterij die de gehele levensduur meegaat.
- Batterij  
10 jaar. Hetzelfde als de levensduur van het product.

## Omgevingseisen

- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Gebruikstemperatuur: -10 tot 40 °C
- Luchtvochtigheid: 15% tot 95% RV (niet-condenserend)

## Frequentie en bereik

- Radiofrequentie: 868,30 MHz
- Bereik: Tot 200 m met een directe zichtlijn. Het bereik wordt verminderd door muren, grote voorwerpen en andere radiozenders zoals televisies en mobiele telefoons.

## In de doos

- BE1555 CO-melder
- Schroeven en pluggen
- Gebruikershandleiding



## CO-alarm

- De melder reageert op de volgende koolmonoxidegehaltenes:
 

CO-gehalte/fout	Geluidsalarm
>43 ppm	Activeert binnen 60-90 min.
>80 ppm	Activeert binnen 10-40 min.
>150 ppm	Activeert binnen 2 min.
Batterij laag	Elke minuut 1 piepje
Apparaat defect	Elke minuut 2 piepjes
Einde levensduur	Elke minuut 3 piepjes

© en TM 2023, Bellman & Symfon AB

Bellman en Bellman & Symfon zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB, alle rechten voorbehouden. Alle productontwerpen zijn gepatenteerd. Deze brochure is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

BE1555\_015DSH1.0-NL

[bellman.com](http://bellman.com)