


Wekker Pro



Visit: 001ART006-NL

Knoppen en bedieningselementen

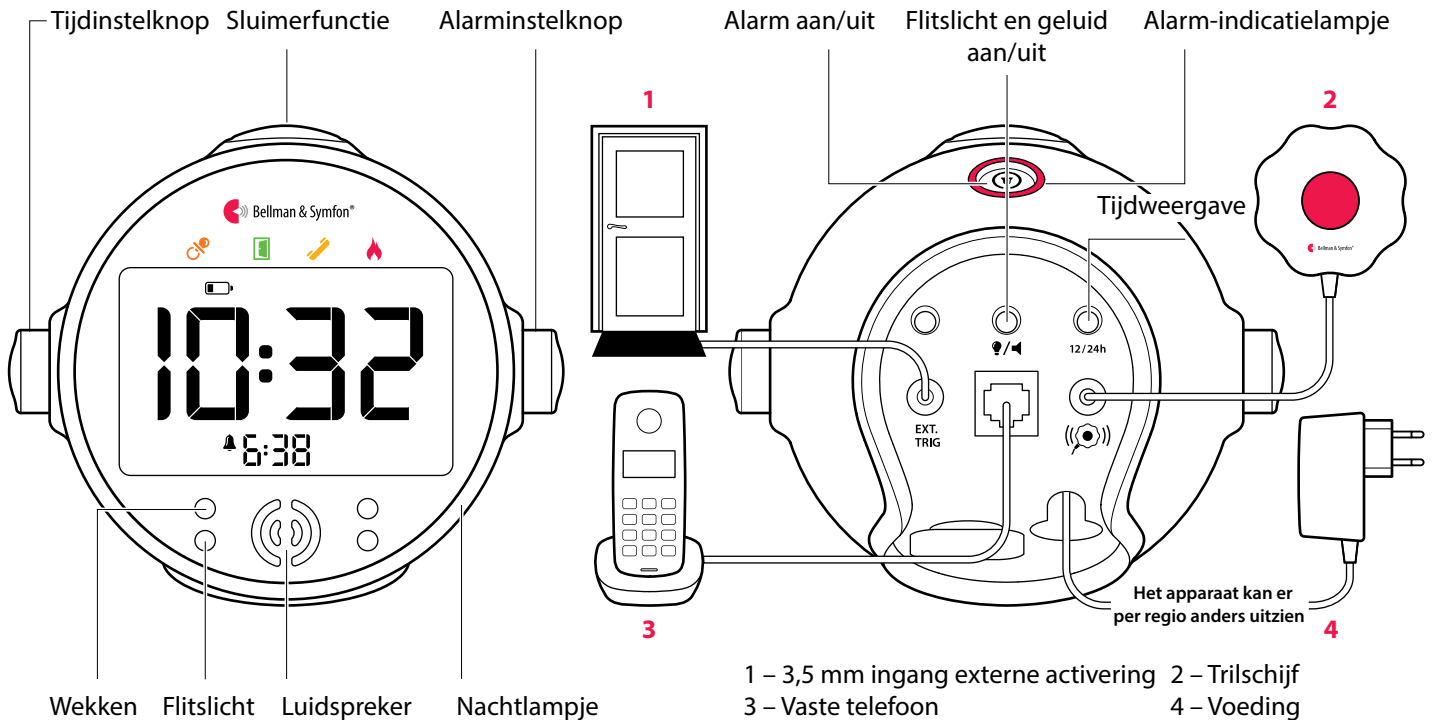

Technische specificaties

In de doos

- BE1370 Wekker Pro
- BE1270 Trilschijf
- Voeding
- 4 × 1,2 V AAA NiMH-batterijen

Voeding en batterij

- Netvoeding: 7,5 V DC / 1,5 A Unit voor externe voeding
- Backupbatterijen: 4 × 1,2 V AAA oplaadbare NiMH-batterijen
- Gebruiksdur backupbatterijen ~ 24 uur wanneer volledig opgeladen
- Oplaadtijd backupbatterijen ~ 10 uur wanneer volledig leeg

Accessoires

- BE9026 Contactmat
- BE9105 Telefoonkabel

Afmetingen en gewicht

- Hoogte: 109 mm
- Breedte: 121 mm
- Diepte: 91 mm
- Gewicht: 390 g inclusief batterijen

Beeldscherm

- Type: Twisted Nematic LCD
- Instelbare achtergrondverlichting in 5 stappen
- Uitschakeling beeldscherm: 8 seconden

Alarm- en sluimerfunctie

- Uitschakeling alarm: 20 minuten
- Afnemend interval sluimertijd: 9-2 min
- Uitschakeling sluimerfunctie: 20 min

Uitvoersignalen

- Geluid: 100 dB @ 10 cm, 950 Hz – 3 kHz
- Vier fel knipperende ledlampjes
- Voeding trilschijf: 2,0 – 4,0 V DC

Nachtlampje

- Ingebouwd nachtlampje dat u terug geleidt naar uw bed met een zacht blauw licht
- Type: Electro Luminescent-licht (EL)
- Uitschakeling nachtlampje
Op netvoeding: 1 uur
Op backupbatterij: 15 minuten

Omgevingsvereisten

- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Temperatuur: 0 tot 35 °C
- Relatieve vochtigheid: 15% tot 90% Niet condenserend


Wekker Pro



visit_001ART006-NL

Aan de slag gaan


- 1 Trek aan het batterijlipje onderop de wekker.
- 2 Sluit de trilschijf aan op de achterzijde van de wekker.
- 3 Sluit de voeding aan op de wekker en het stopcontact.
- 4 Schuif de trilschijf onder het kussen of matras en plaats de wekker op het nachtkastje.

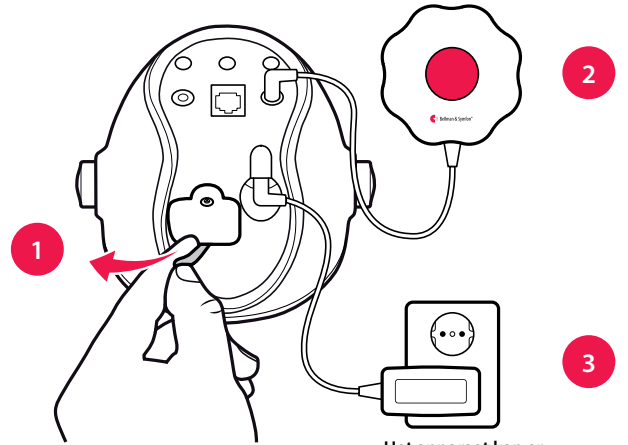

Het apparaat kan er per regio anders uitzien


De tijd instellen

Druk op de **linker** instelknop en draai deze om de uren in te stellen. Om de minuten in te stellen, drukt u nogmaals op deze instelknop en draait u deze. Druk nogmaals op de knop om uw instellingen op te slaan.

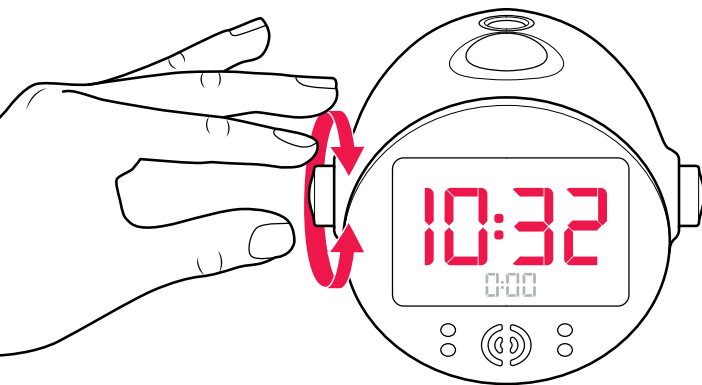


Het alarm instellen

Druk op de **rechter** instelknop en draai deze om de uren in te stellen. Om de minuten in te stellen, drukt u nogmaals op deze instelknop en draait u deze. Druk nogmaals op de knop om uw instellingen op te slaan.

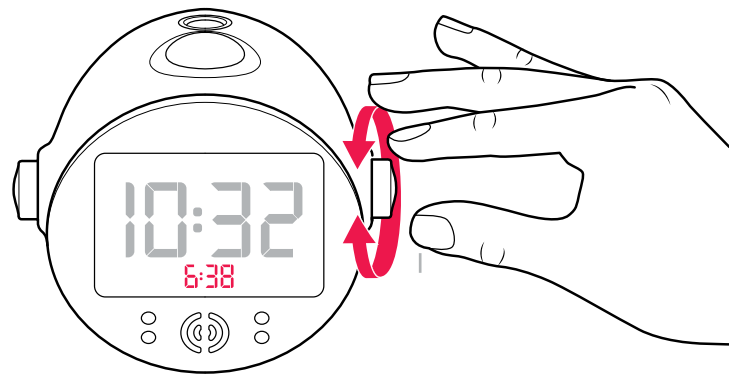


Het alarm activeren

Druk op de knop alarm aan/uit om het alarm te activeren. Het alarm-indicatielampje gaat rood branden. Druk nogmaals op deze knop om het alarm uit te schakelen.

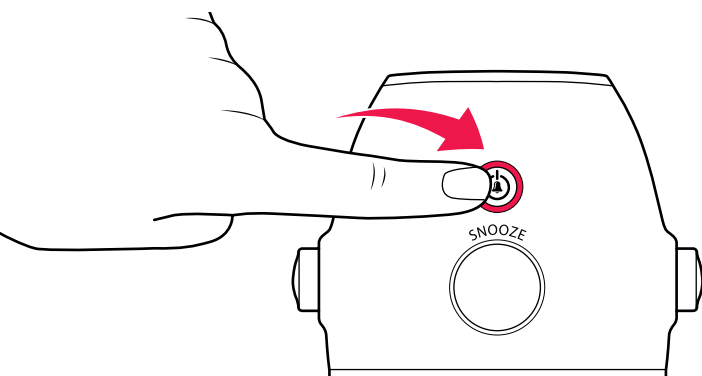

Gebruik van de sluimerfunctie en het nachtlampje


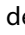

Druk kort op de sluimerknop om het alarm korte tijd uit te stellen. Houd de sluimerknop 3 seconden ingedrukt om het nachtlampje aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om het nachtlampje uit te zetten.

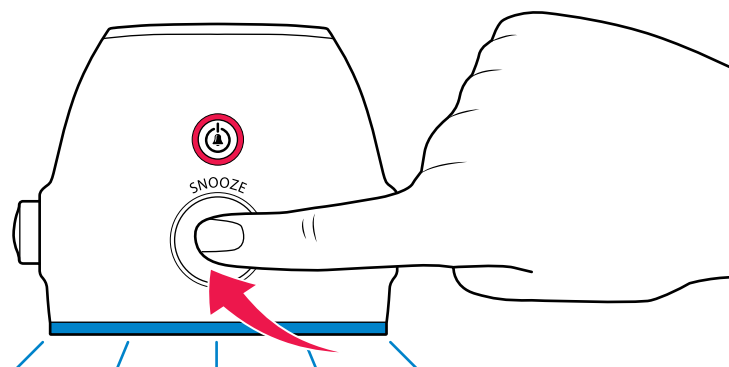


Wekker Pro

Instellingen

Flitslicht en geluid aan/uit

Druk herhaaldelijk op knop voor het aan/uit zetten van flitsen en geluid die is gemarkeerd met  achterop de wekker om te schakelen tussen de opties. Er verschijnt een  symbool op de wijzerplaat wanneer het flitslicht is uitgeschakeld en een  symbool wanneer het geluid wordt gedempt.

Achtergrondverlichting van het beeldscherm

Druk herhaaldelijk op de knop gemarkeerd met  om de intensiteit in 4 stappen aan te passen. **Stap 5 resulteert in permanente achtergrondverlichting.**

Tijdweergave

Druk op de tijdweergaveknop gemarkeerd met **12/24h** achterop de wekker om te schakelen tussen de 24 uurs- en de 12 uursinstelling.

Accessoires bij de wekker


De wekker kan worden aangevuld met de volgende accessoires:

■ BE9026 Contactmat




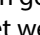
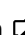
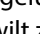

Sluit de mat aan op de ingang voor externe activering, zodat u wordt gewaarschuwd wanneer iemand uit bed stapt.

■ BE9105 Telefoonkabel

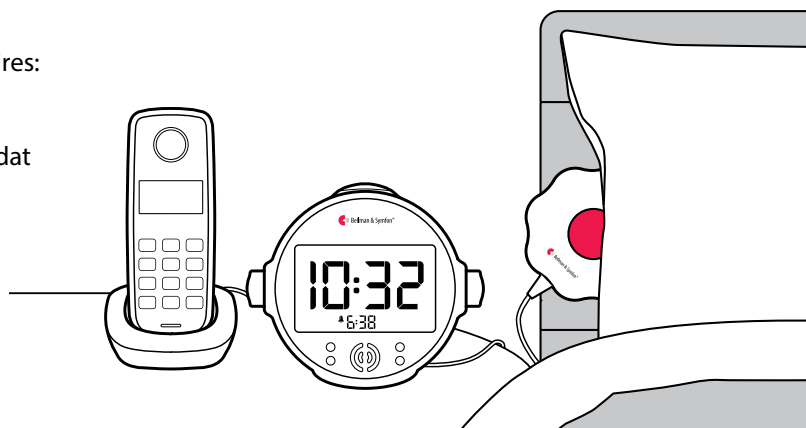Gebruik deze kabel om de vaste telefoon aan te sluiten op de RJ11-ingang van de wekker, zodat u wordt gewaarschuwd wanneer de telefoon gaat.



Problemen oplossen

| Als | Probeer dit |
|--|--|
| De wekker lijkt te zijn uitgeschakeld | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de voeding correct is aangesloten, zie Aan de slag gaan. Laad de backupbatterijen enkele uren op. |
| Het  symbool op de wijzerplaat gaat knipperen | <ul style="list-style-type: none"> De voeding is losgekoppeld en de backupbatterijen zijn bijna leeg. Sluit de voeding aan en laad de backupbatterijen enkele uren op. |
| Er verschijnt een  symbool op de wijzerplaat | <ul style="list-style-type: none"> De wekker detecteert geen backupbatterijen. Trek aan het batterijlipje, zie Aan de slag gaan. Als het probleem aanhoudt, controleer dan de backupbatterijen. |
| Er verschijnt een  symbool op de wijzerplaat | <ul style="list-style-type: none"> Het flitslicht is uitgeschakeld. Druk op de knop flitslicht en geluid aan/uit, gemarkeerd met  tot het symbool verdwijnt als u het weer aan wilt zetten. |
| Er verschijnt een  symbool op de wijzerplaat | <ul style="list-style-type: none"> Het geluid wordt gedempt. Druk op de knop flitslicht en geluid aan/uit, gemarkeerd met  tot het symbool verdwijnt als u het weer aan wilt zetten. |
| Het beeldscherm is te helder of te donker of ik wil dat het permanent verlicht is | <ul style="list-style-type: none"> Druk herhaaldelijk op de knop gemarkeerd met  om de intensiteit in 4 stappen aan te passen. Kies stap 5 die resulteert in permanente achtergrondverlichting. |
| De trilschijf trilt niet | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de trilschijf correct is aangesloten op de wekker, zie Aan de slag gaan. |
| Het alarmvolume is te zacht | <ul style="list-style-type: none"> Het volume neemt geleidelijk toe en gaat over de 100 dB. |