


Visit dörrsändare



Knappar och anslutningar

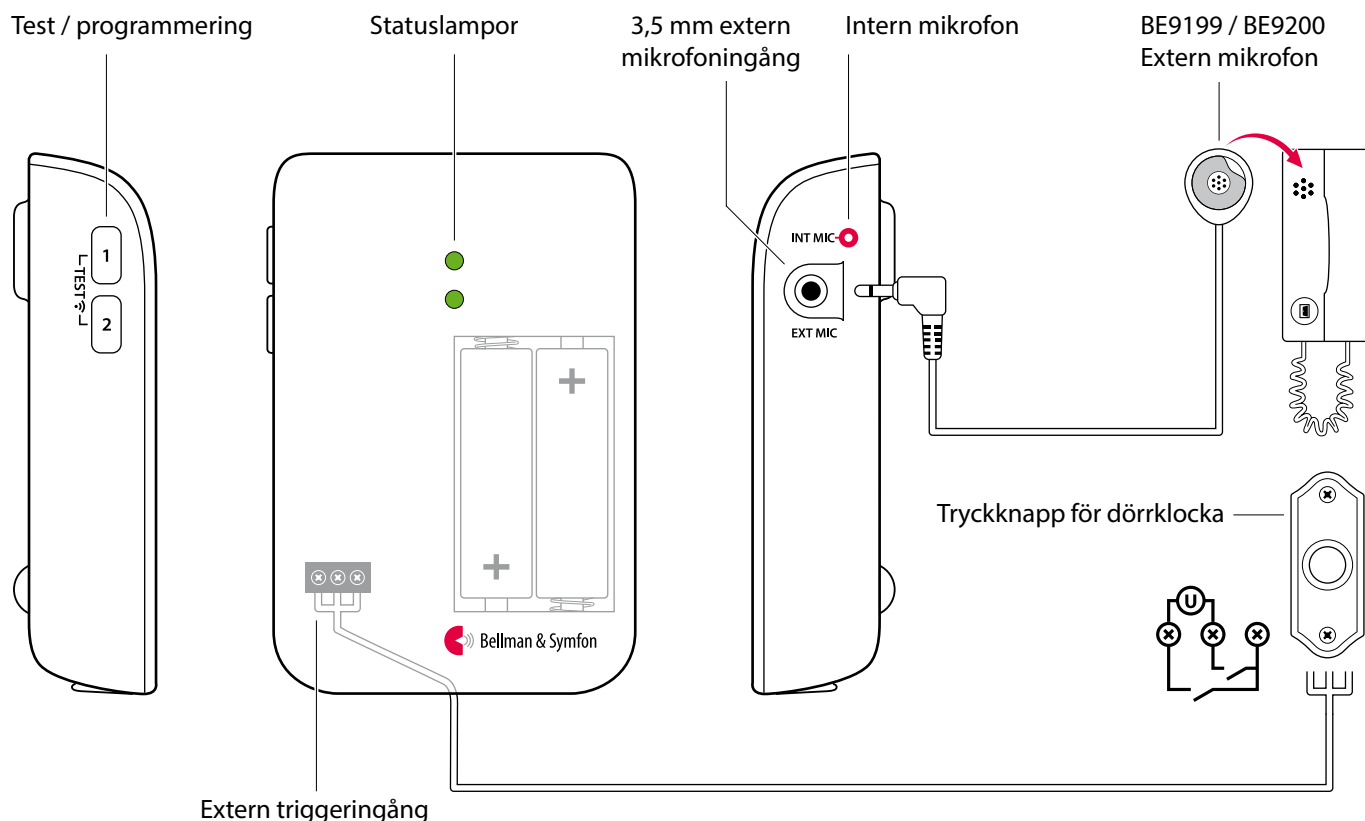

Teknisk information

I förpackningen

- BE1411 Visit dörrsändare
- 2×1,5 V AA alkaliska batterier
- Kardborreband för montering
- Skruv och plugg

Storlek och vikt

- Höjd: 100 mm
- Bredd: 65 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g, inkl. batterier

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
Arbetstemperatur
0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet
15% till 90%, icke-kondenserande

Ström och batteri

- Batterityp
2×1,5 V AA litium eller
alkaliska batterier
- Strömförbrukning
Aktiv < 70 mA
Viloläge < 15 µA
- Drifttid
Alkaliska batterier ~ 5 år
Litiumbatterier ~ 10 år

Aktivering

- Via mikrofonen och testknapparna
- Via den elektromagnetiska detektorn
- Via en extern mikrofon (tillbehör)
- Via en befintlig dörrklocka ansluten till den externa triggeringen

Ingångar

- 3,5 mm extern mikrofoningång
- Extern triggergång (plint)

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens
868,3 MHz
- Räckvidd
50 - 250 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning

Tillbehör


Dörrsändaren kan kompletteras med:

- BE9199 Extern mikrofon 2,5 m
- BE9200 Extern mikrofon 0,75 m

Visit dörrsändare

Installation – endast en ljudkälla


- 1 Dra bort batterifliken för att starta sändaren.
Rengör väggen med med-följande våtservett och ta bort skyddsfilm från kardborrebandet.
- 2 Klistra upp dörrsändaren t.v. om dörrklockans ljudkälla så nära som möjligt.
Du kan istället använda medföljande skruv och plugg.

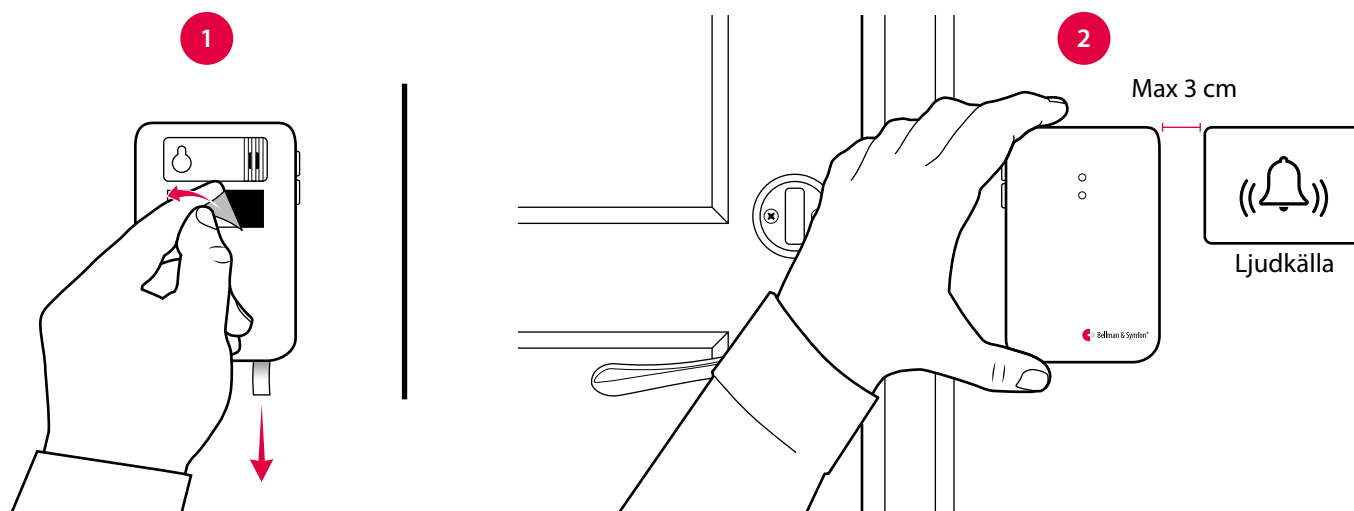

Alternativ installation – endast en ljudkälla

Använd en extern mikrofon (tillbehör)

- 1 Anslut den externa mikrofonen (säljs separat) till dörrsändaren.
Ta bort skyddsfilm på mikrofonen och fäst den över porttelefonens högtalare.
- 2 Dra bort batterifliken för att starta dörrsändaren. Ta bort skyddsfilm från kardborrebandet och montera sändaren på väggen.
- 3 Inom 2 min, tryck 10 ggr på den nedre knappen för att inaktivera den interna mikrofonen. Lysdioderna blinkar 3 ggr i rött.
Notera: Om du överstiger 2 minuter, behöver du starta om dörrsändaren genom att ta ur och montera batterierna igen.

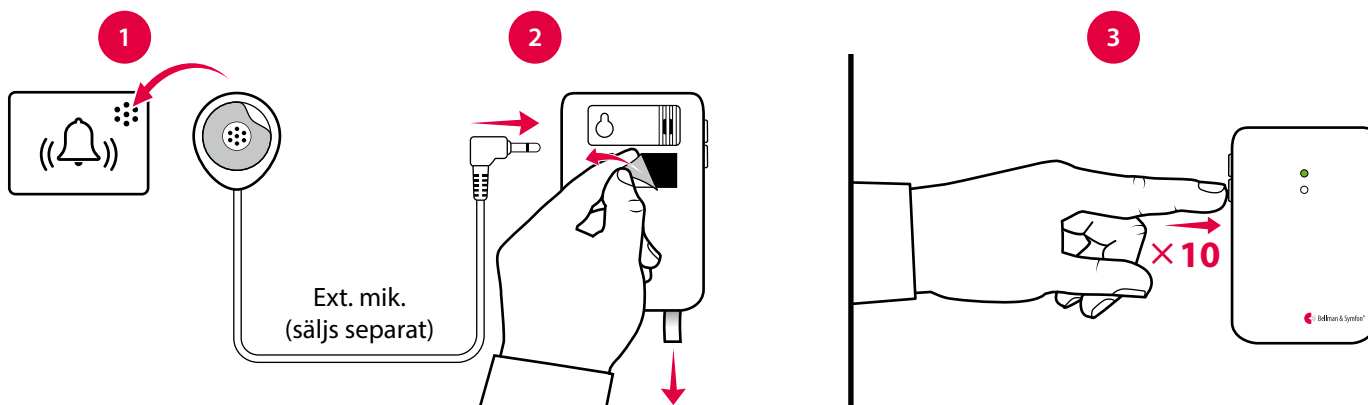

Återaktivera den interna mikrofonen


Starta om dörrsändaren genom att ta ur och montera batterierna igen. Inom 2 minuter, tryck 10 gånger på den nedre knappen för att återaktivera den interna mikrofonen. Lysdioderna blinkar 3 gånger i grönt för att visa att mikrofonen är på.

Visit dörrsändare



Installation – porttelefon och elektrisk dörrklocka


- 1 Anslut den externa mikrofonen (säljs separat) i dörrsändaren.
Ta bort skyddsfilm från mikrofonen och fäst den på porttelefonens högtalare.
- 2 Dra bort batterifliken för att starta sändaren.
Rengör väggen med våtservett och ta bort skyddsfilm från kardborrebandet.
- 3 Klistra upp dörrsändaren t.v. om dörrklockans ljudkälla så nära som möjligt.
Notera: Avståndet mellan porttelefon och dörrklocka måste vara minst 25 cm för att undvika ljudstörningar.

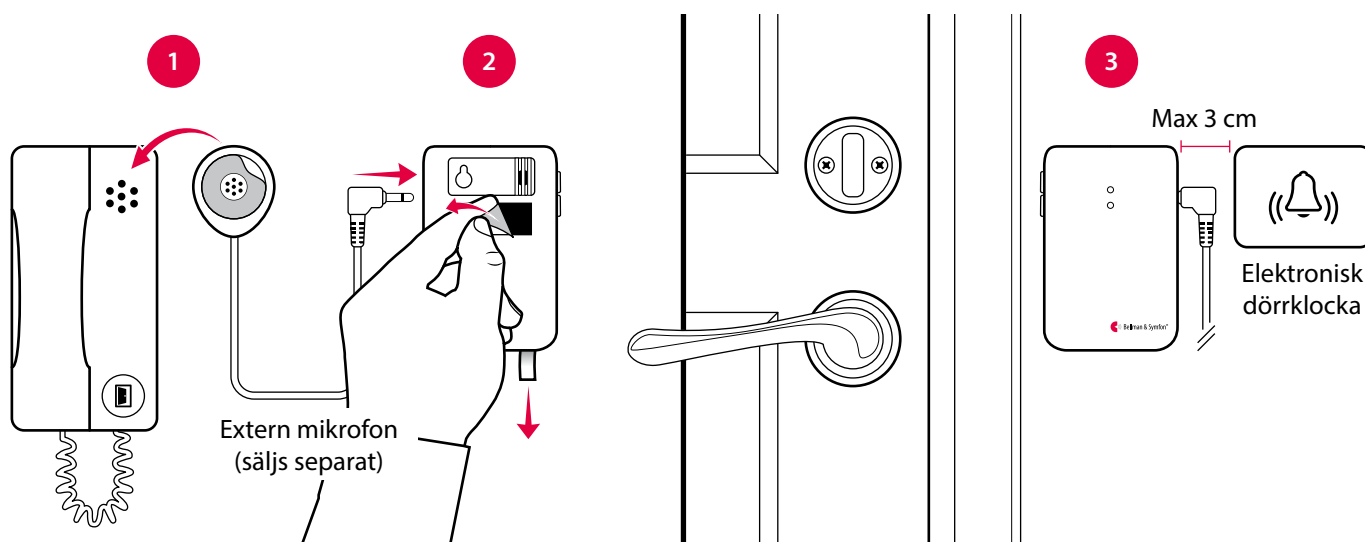

Installation – porttelefon och mekanisk dörrklocka

Om du har en mekanisk dörrklocka och porttelefon kan du behöva två dörrsändare, dvs en för respektive ljudkälla. Så här monterar du dem.

- 1 Dra bort batterifliken för att starta respektive dörrsändare.
Rengör väggytan med medföljande våtservett och ta bort skyddsfilm från kardborrebandet.
- 2 Klistra upp den ena dörrsändaren t.v. om dörrklockan och den andra t.v. om porttelefonens högtalare, så nära ljudkällorna som möjligt.

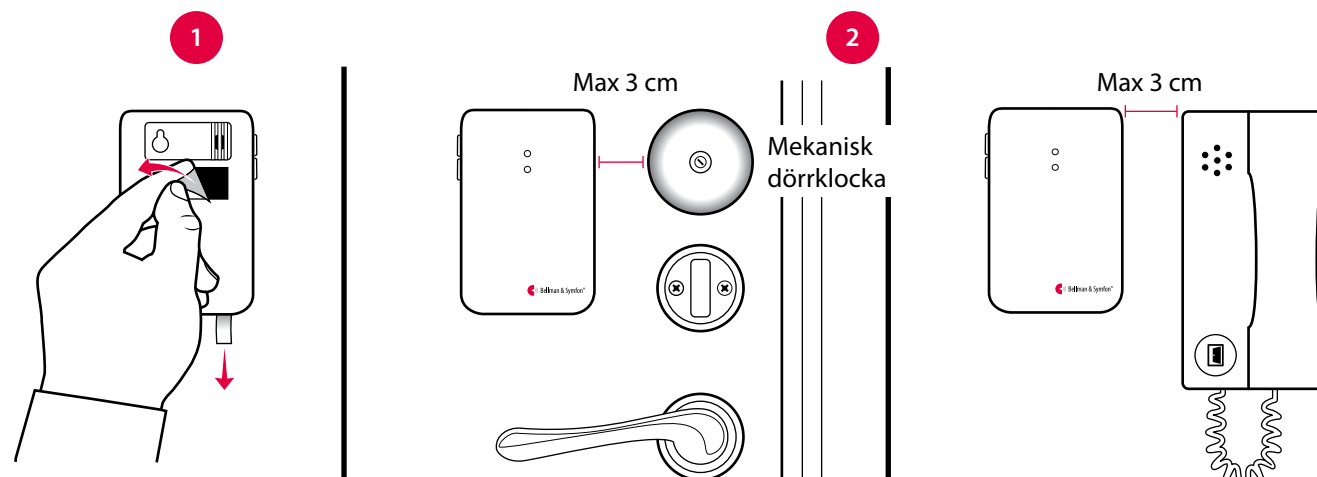



Visit dörrsändare



Visit_001ART012-SE

Installation – trådbunden dörrklocka

- 1 Dra bort batterifliken för att starta dörrsändaren.
Inom 2 min, tryck 10 ggr på den nedre knappen för att inaktivera den interna mikrofonen. Lysdioderna blinkar 3 ggr i rött.
- 2 Öppna locket på sändaren för att komma åt skruvplinten. Det finns tre anslutningsmöjligheter:
 - Använd anslutningspunkt 1 och 2 för att koppla in en **aktiv** brytare, som t.ex ett strömrelä.
 - **Notera:** Strömmen måste vara 2 – 30 VDC, polaritetsoberoende eller 2 – 24 VAC 5 – 150 Hz.
 - Använd 2 och 3 för att koppla in en **passiv** mekanisk brytare, som t.ex en dörrklockas tryckknapp.
- 3 Snäpp fast luckan igen, rengör väggen med en våtservett, ta bort skyddsfilm från kardborrebandet och fäst dörrsändaren på väggen.

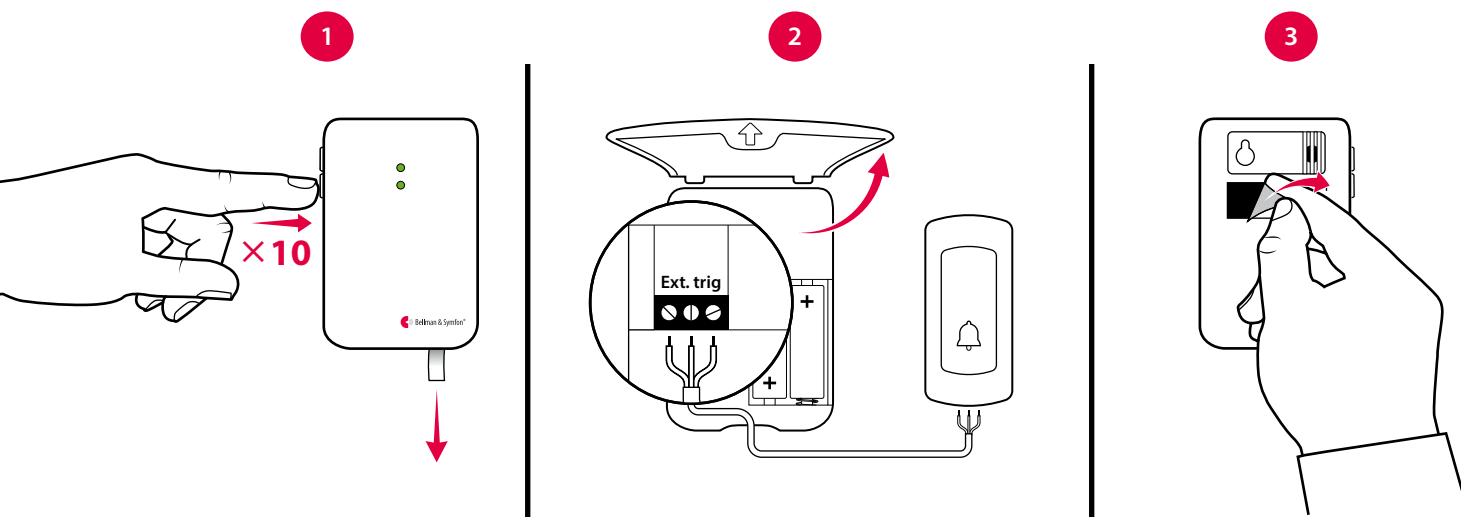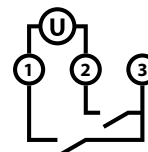

Använda elektromagnetisk avkänning

Sändaren kan ställas in så att den känner av elektromagnetiska fält från elektriska dörrklockor. Så här gör du:

- **Aktivera elektromagnetisk avkänning:** Flytta signalomkopplare nr 4 uppåt (På).
- **Inaktivera elektromagnetisk avkänning:** Flytta signalomkopplare nr 4 nedåt (Av).



Visit dörrsändare




Visit_001ART012-SE

Optimera identifiering av dörrklockan

Nästa steg är att lära sändaren känna igen dörrklockan.

- 1 Håll in knapp 1 ända tills den översta lysdioden börjar blinka. Släpp knappen för att börja spela in.
 - 2 **Dörrklocka med summerljud:** Håll in knappen på dörrklockan i minst 8 sekunder.
Dörrklocka med klockljud: Tryck på dörrklockan minst 8 gånger.
 - 3 Tryck på knapp 1 på sändaren för att avsluta inspelningen. Om lysdioden lyser med rött sken måste steg 1 och 2 upprepas. Använd samma metod för att spela in ljudet från porttelefonen/extern mikrofon med knapp 2.
- Notera:** För att ta bort alla inspelade ljud, tryck och håll nere sändarens testknappar i 5 sekunder. Inställningar för radionyckel och signalmönster påverkas inte.

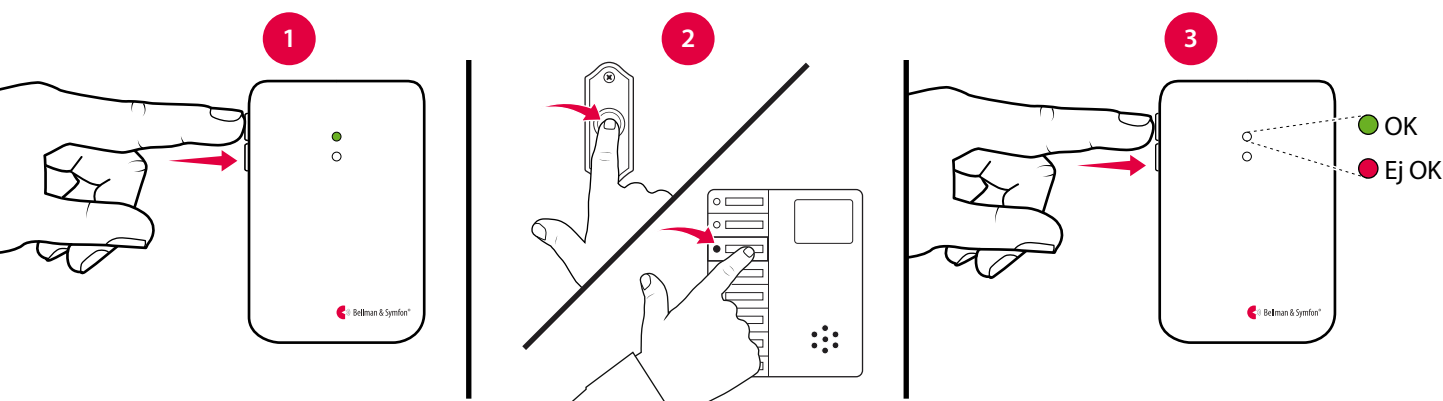


Testa anslutningen

Med testknapparna

- 1 Tryck samtidigt på dörrsändarens testknappar. Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den skickar en radiosignal.
- 2 Den gröna Visittlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.


Notera: Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

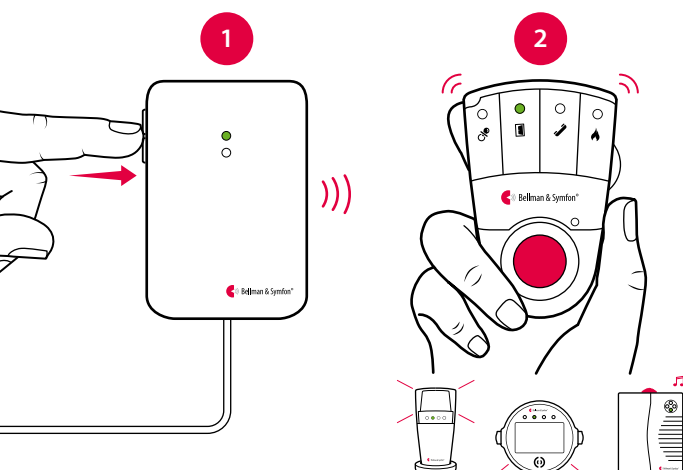

Med dörrklocka eller porttelefon

- 1 Tryck på dörrklockan eller porttelefonen. Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den aktiveras av ljudet och skickar en radiosignal.
- 2 Den gröna Visittlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

Notera: Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

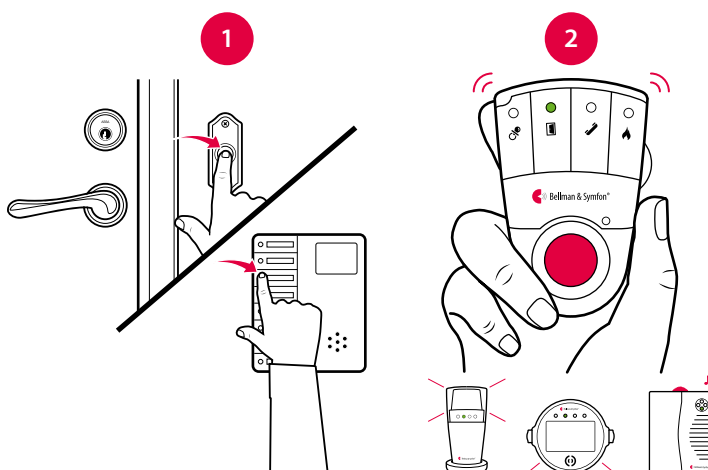

Visit dörrsändare

Förinställt signalmönster

När dörrsändaren aktiveras händer följande:

- 1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att sändaren skickar en radiosignal till mottagaren.
- 2 Den gröna Visittlampan på mottagaren tänds och den börjar ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Sändaren och de anslutna tillbehören styr signalmönstret och förinställningen är:

Sändare

Signalmönster, mottagare

Källa	Statuslampan	Visittlampan	Ljud	Vibration	Blixt
■ Intern mikrofon	Grön, övre	Fast grönt ljus	1 × dörrklocka, mörk	Långsam ■□□□	Ja
■ Extern mikrofon	Grön, nedre	Blinkar grönt	2 × dörrklocka, ljus	Långsam ■□□□	Ja
■ Ansluten dörrklocka	Grön, övre	3 × blinkar grönt	1 × dörrklocka, ljus	Långsam ■□□□	Ja

Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplarna enligt tabellen nedan:



Sändare

Signalmönster, mottagare

Inställning	Källa	Visittlampan	Ljud	Vibration	Blixt
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	Fast grönt ljus Blinkar grönt 3 × blinkar grönt	1 × dörrklocka, mörk 2 × dörrklocka, ljus 1 × dörrklocka, ljus	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Långsam ■□□□	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	2 × blinkar grönt 3 × blinkar grönt Blinkar grönt	2 × dörrklocka, mörk 1 × dörrklocka, ljus 2 × dörrklocka, ljus	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Långsam ■□□□	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	3 × blinkar grönt 2 × blinkar grönt 3 × blinkar orange	1 × dörrklocka, ljus 2 × dörrklocka, mörk Babymelodi	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Snabb ■■■■■■	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	Blinkar grönt Fast grönt ljus Blinkar orange	2 × dörrklocka, ljus 1 × dörrklocka, mörk Babymelodi	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Snabb ■■■■■■	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	Fast grönt ljus 3 × blinkar grönt 2 × blinkar grönt	1 × dörrklocka, mörk 1 × dörrklocka, ljus 2 × dörrklocka, mörk	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Långsam ■□□□	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	Fast grönt ljus Blinkar grönt Blinkar gult	1 × dörrklocka, mörk 2 × dörrklocka, ljus 2 × ringsignal, ljus	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Mellan ■□■□	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	3 × blinkar grönt Fast grönt ljus Rött + orange ljus	1 × dörrklocka, ljus 1 × dörrklocka, mörk VMA-signal	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Lång ■■■□	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	Blinkar grönt 2 × blinkar grönt Blinkar rött	2 × dörrklocka, ljus 2 × dörrklocka, mörk Brandlarm	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Lång ■■■□	Ja Ja Ja

Visit dörrsändare





Visit_001ART012-SE

Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under sändarens lock.

Så här byter du radionyckel:

- 1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Alla radioomkopplare är från början positionerade nedåt (av).
- 2 Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på sändarens testknappar inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

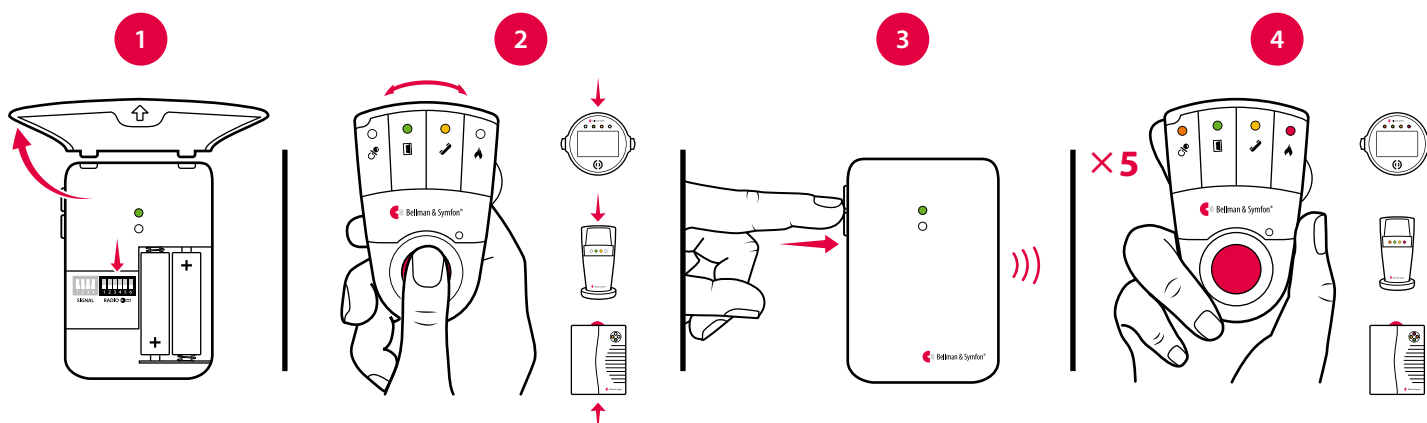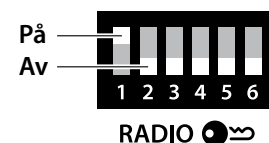

Felsökning

Om	Gör så här
Statuslampan blinkar orange en gång i minuten	▪ Byt batterier. Använd enbart 1.5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.
Statuslampan blinkar orange en gång i sekunden	▪ Det finns andra ljudkällor som stör dörrsändaren. Stäng av dem eller sänk ljudet. ▪ Koppla ur den externa mikrofonen för att säkerställa att den inte är trasig.
Statuslampan tänds när jag ringer på dörrklockan eller porttelefonen men mottagaren aktiveras inte	▪ Kontrollera sändarens och mottagarens batterier och anslutningar. ▪ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att dörrsändaren och mottagaren har samma radionyckel, se Byta radionyckel.
Statuslampan tänds inte när jag ringer på dörrklockan eller porttelefonen	▪ Ring på dörrklockan samtidigt som du flyttar dörrsändaren närmare / längre bort från ljudkällan. Rekommenderat avstånd är mindre än 3 cm. ▪ Lär dörrsändaren ljudet från din dörrklocka, se Programmera sändaren. ▪ Om signalen varierar mycket i styrka och ton, byt till elektromagnetisk avkänning. ▪ Om dörrsändaren fortfarande inte aktiveras, tryck och håll nere testknapparna i 5 sekunder för att ta bort de inspelade ljuden, se Radera inspelade ljud.
Mottagaren aktiveras utan anledning	▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se Byta radionyckel.