

Visit [installationsguide](#)







# Allt du behöver veta om Visit.

## Sändare

|                    |    |
|--------------------|----|
| Dörrsändare        | 5  |
| Tryckknappssändare | 13 |
| Telefonsändare     | 17 |
| Mobilsändare       | 21 |
| Babyvakt           | 27 |
| Brandvarnare       | 31 |
| Kolmonoxidvarnare  | 41 |

## Mottagare

|                    |    |
|--------------------|----|
| Blixtmottagare     | 45 |
| Portabel mottagare | 49 |
| Pager              | 53 |
| Armbandsmottagare  | 57 |
| Väckarklocka       | 61 |

## Tillbehör

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Magnetisk monteringssats     | 36 |
| Pagerladdare                 | 65 |
| Sängvibrator                 | 67 |
| Väggfäste för blixtmottagare | 68 |
| Magnetbrytare                | 69 |
| Trampmatta                   | 69 |
| Extern mikrofon              | 70 |
| Extern triggerkabel          | 70 |



# Systemöversikt

## Pålitligt och flexibelt

Visitsystemet är mycket flexibelt och kan enkelt anpassas för brukarens hemmiljö och livsstil.

Visit erbjuder tillförlitlig och robust dörr- och telefondetektering, babyövervakning samt brandskydd med hög säkerhet.



**1 Dörrsändare**  
Detekterar dörrklockan




**2 Brandvarnare**  
Upptäcker rök och eld



**3 Babyvakt**  
Vakar över barnen



**4 Mobilsändare**  
Detekterar dina mobila enheter

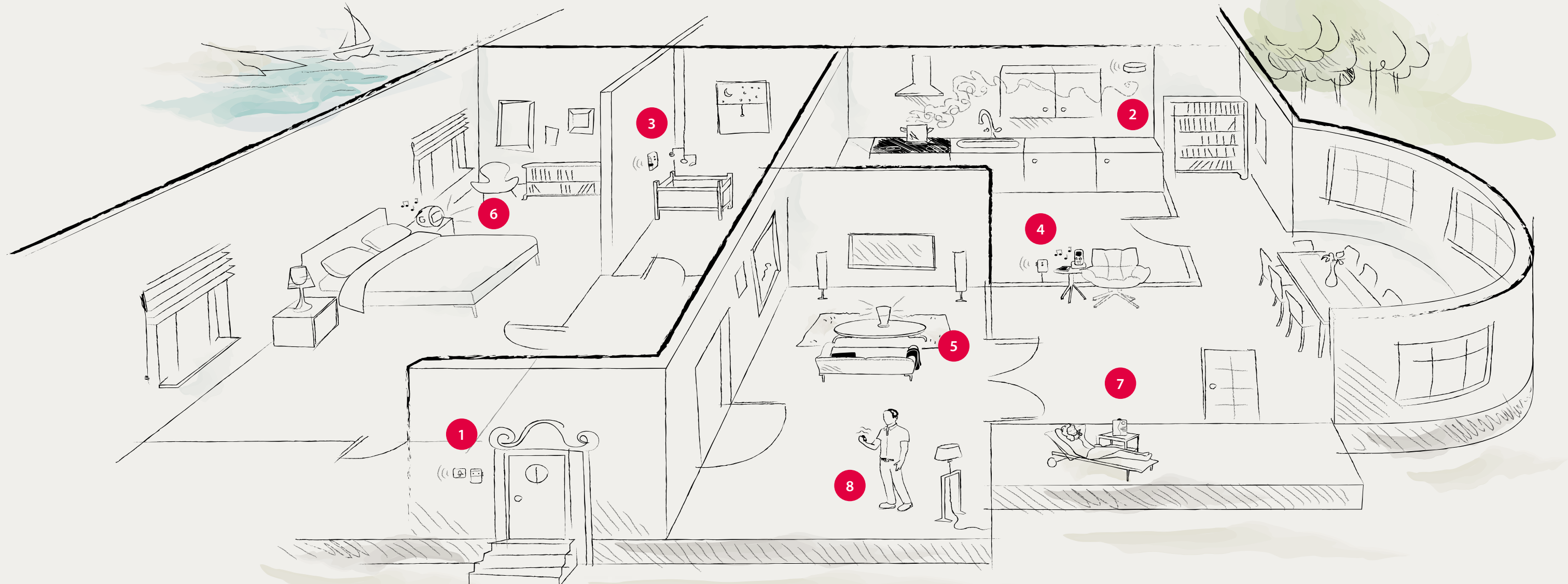

**5 Blixtmottagare**  
Blixtrar med klart ljus



**6 Väckarklocka**  
Använder ljud, ljus & vibrationer



**7 Portabel mottagare**  
Avger en kraftfull ljudsignal



**8 Pager**  
Använder milda vibrationer



QR CODE

### Enkel tillgång till supportmaterial


Använd produktens QR-kod i din telefon eller surfplatta för att komma direkt till produktinformation och installationsfilmer på vår webbplats.

# Visit dörrsändare



BE1411

## Knappar och anslutningar

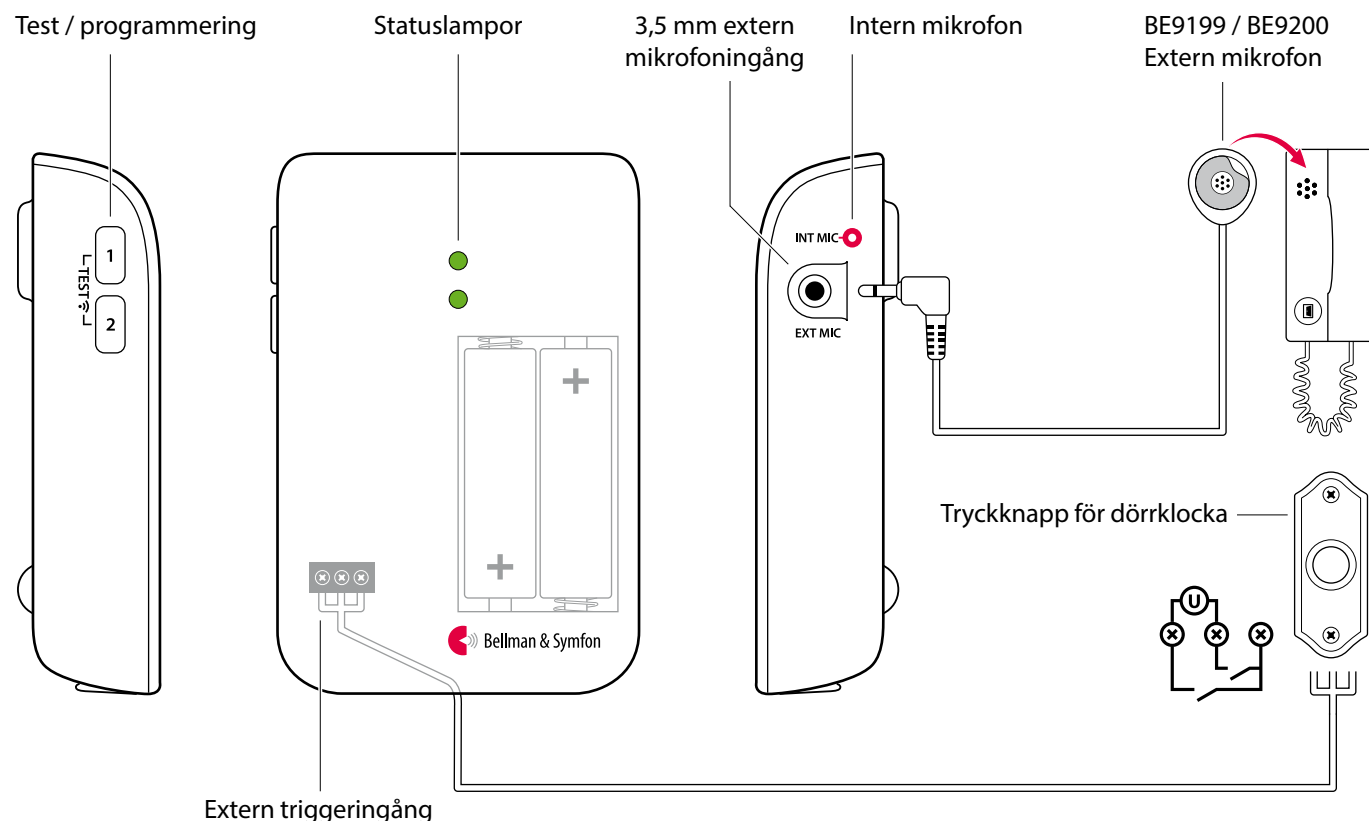

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1411 Visit dörrsändare
- 2 x 1,5 V AA alkaliska batterier
- Kardborreband för montering
- Skruv och plugg

### Ström och batteri

- Batterityp  
2 x 1,5 V AA litium eller alkaliska batterier
- Strömförbrukning  
Aktiv < 70 mA  
Viloläge < 15 µA
- Drifttid  
Alkaliska batterier ~ 5 år  
Litiumbatterier ~ 10 år

### Storlek och vikt

- Höjd: 100 mm
- Bredd: 65 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g, inkl. batterier

### Aktivering

- Via mikrofonen och testknapparna
- Via den elektromagnetiska detektorn
- Via en extern mikrofon (tillbehör)
- Via en befintlig dörrklocka ansluten till den externa triggerengången

### Ingångar

- 3,5 mm extern mikrofoningång
- Extern triggerengång (plint)

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk  
Arbetstemperatur  
0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet  
15% till 90%, icke-kondenserande

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens  
868,3 MHz
- Räckvidd  
50 - 250 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning


### Tillbehör

Dörrsändaren kan kompletteras med:

- BE9199 Extern mikrofon 2,5 m
- BE9200 Extern mikrofon 0,75 m

## Installation – endast en ljudkälla


- 1 Dra bort batterifliken för att starta sändaren. Rengör väggen med medföljande våtservett och ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet.
- 2 Klistra upp dörrsändaren t.v. om dörrklockans ljudkälla så nära som möjligt. Du kan istället använda medföljande skruv och plugg.

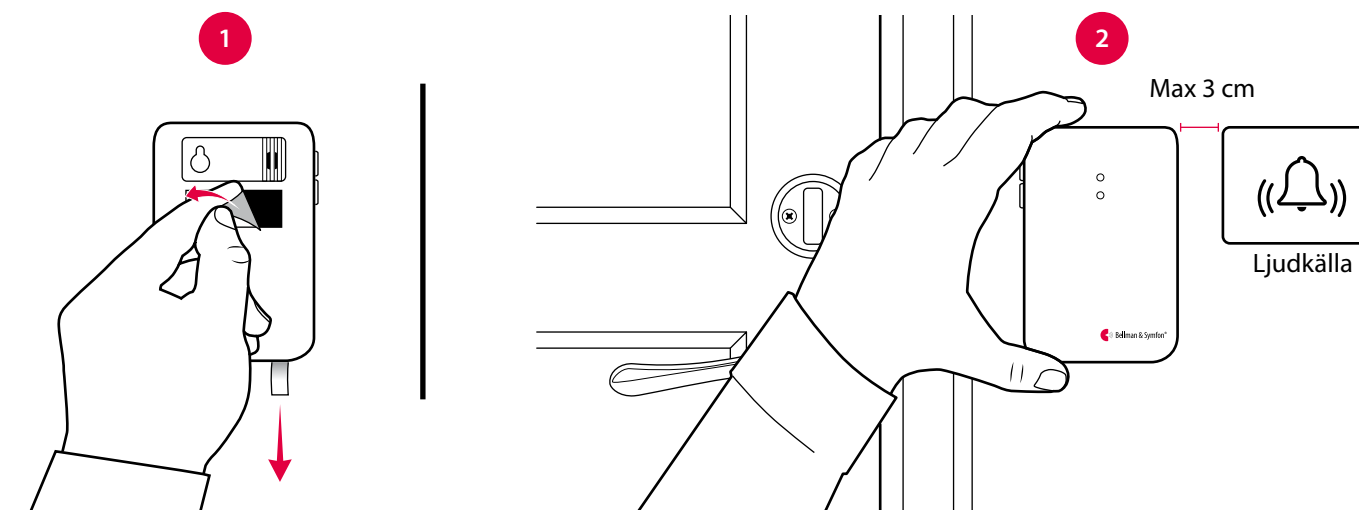

## Alternativ installation – endast en ljudkälla

### Använd en extern mikrofon (tillbehör)

- 1 Anslut den externa mikrofonen (säljs separat) till dörrsändaren. Ta bort skyddsfilmen på mikrofonen och fäst den över porttelefonens högtalare.
- 2 Dra bort batterifliken för att starta dörrsändaren. Ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet och montera sändaren på väggen.
- 3 Inom 2 min, tryck 10 ggr på den nedre knappen för att inaktivera den interna mikrofonen. Lysdioderna blinkar 3 ggr i rött.  
**Notera:** Om du överstiger 2 minuter, behöver du starta om dörrsändaren genom att ta ur och montera batterierna igen.

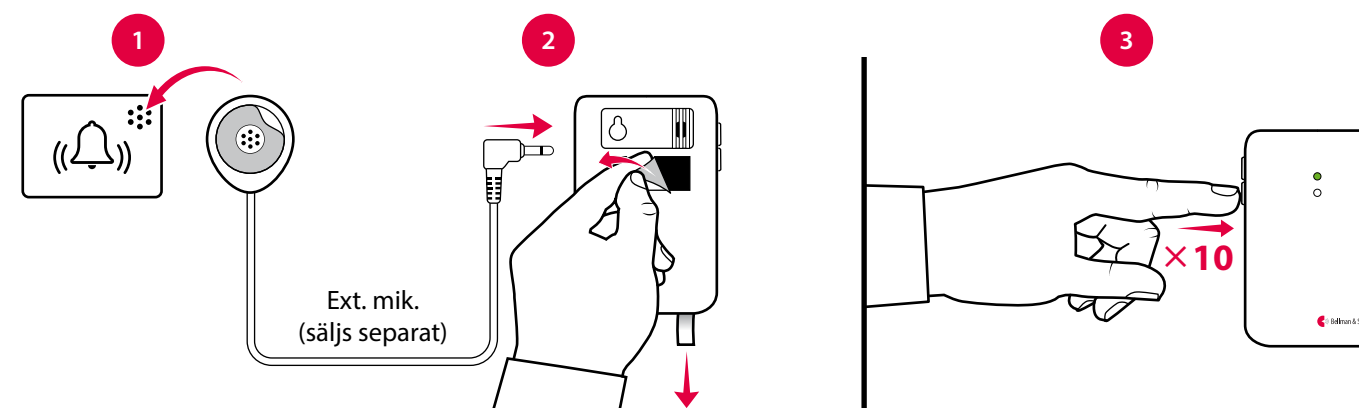

## Återaktivera den interna mikrofonen


Starta om dörrsändaren genom att ta ur och montera batterierna igen. Inom 2 minuter, tryck 10 gånger på den nedre knappen för att återaktivera den interna mikrofonen. Lysdioderna blinkar 3 gånger i grönt för att visa att mikrofonen är på.



# Visit dörrsändare

## Installation – porttelefon och elektrisk dörrklocka


- 1 Anslut den externa mikrofonen (säljs separat) i dörrsändaren.  
Ta bort skyddsfilm från mikrofonen och fäst den på porttelefonens högtalare.
- 2 Dra bort batterifliken för att starta sändaren.  
Rengör väggen med våtservett och ta bort skyddsfilm från kardborrebandet.
- 3 Klistra upp dörrsändaren t.v. om dörrklockans ljudkälla så nära som möjligt.  
**Notera:** Avståndet mellan porttelefon och dörrklocka måste vara minst 25 cm för att undvika ljudstörningar.

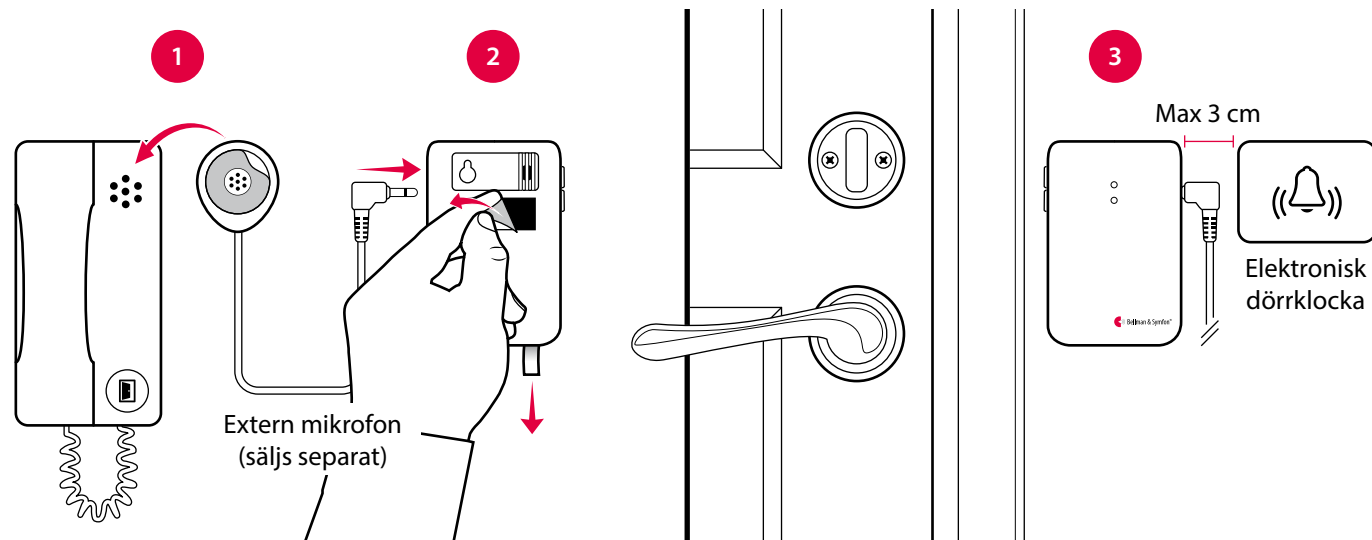

## Installation – porttelefon och mekanisk dörrklocka



Om du har en mekanisk dörrklocka och porttelefon kan du behöva två dörrsändare, dvs en för respektive ljudkälla. Så här monterar du dem.

- 1 Dra bort batterifliken för att starta respektive dörrsändare.  
Rengör väggytan med medföljande våtservett och ta bort skyddsfilm från kardborrebandet.
- 2 Klistra upp den ena dörrsändaren t.v. om dörrklockan och den andra t.v. om porttelefonens högtalare, så nära ljudkällorna som möjligt.

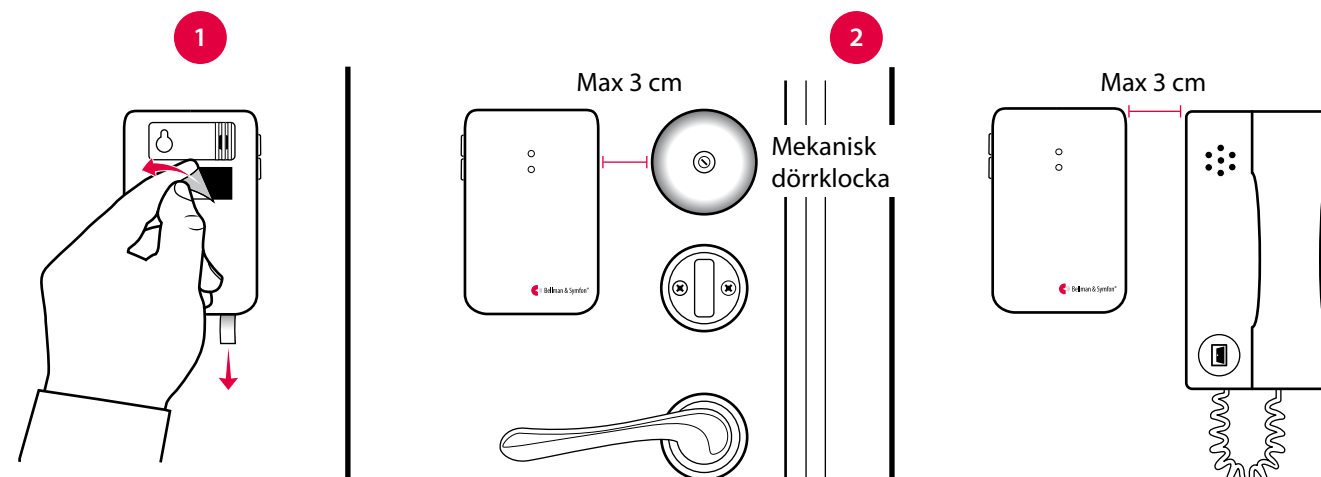

## Installation – trådbunden dörrklocka

- 1 Dra bort batterifliken för att starta dörrsändaren.  
Inom 2 min, tryck 10 ggr på den nedre knappen för att inaktivera den interna mikrofonen. Lysdioderna blinkar 3 ggr i rött.
- 2 Öppna locket på sändaren för att komma åt skruvplinten. Det finns tre anslutningsmöjligheter:
  - Använd anslutningspunkt 1 och 2 för att koppla in en **aktiv** brytare, som t.ex ett strömrelä.
  - Använd 2 och 3 för att koppla in en **passiv** mekanisk brytare, som t.ex en dörrklockas tryckknapp.**Notera:** Strömmen måste vara 2 – 30 VDC, polaritetsoberoende eller 2 – 24 VAC 5 – 150 Hz.
- 3 Snäpp fast luckan igen, rengör väggen med en våtservett, ta bort skyddsfilm från kardborrebandet och fäst dörrsändaren på väggen.

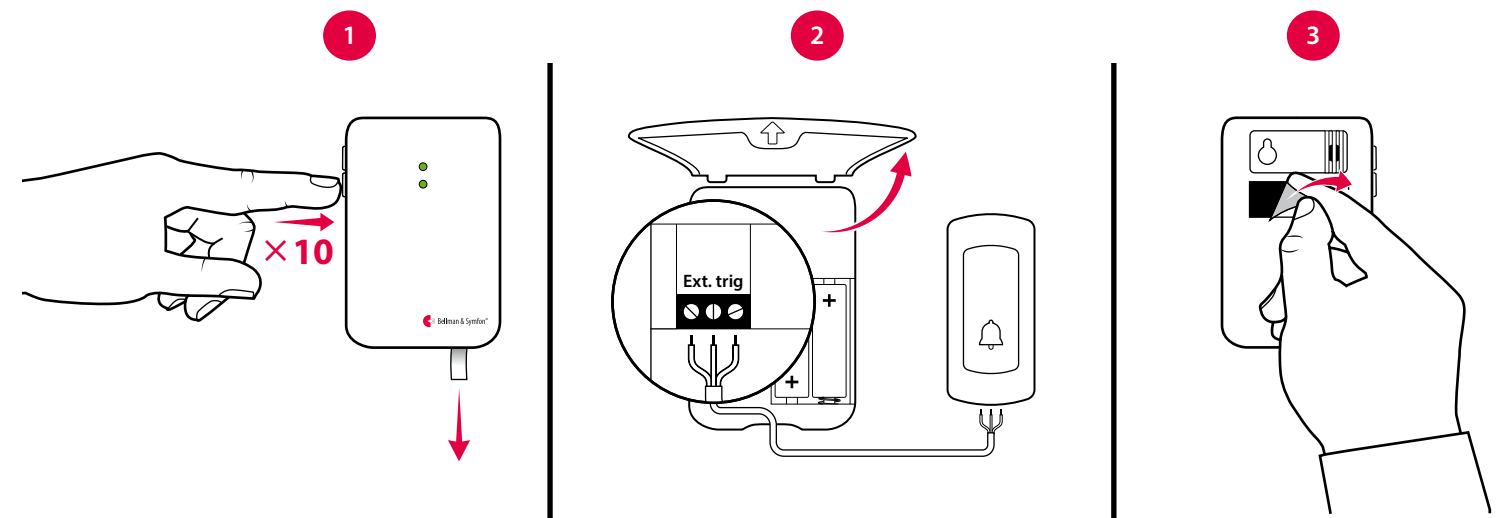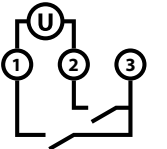

## Använda elektromagnetisk avkänning

Sändaren kan ställas in så att den känner av elektromagnetiska fält från elektriska dörrklockor. Så här gör du:

- **Aktivera elektromagnetisk avkänning:** Flytta signalomkopplare nr 4 uppåt (På).
- **Inaktivera elektromagnetisk avkänning:** Flytta signalomkopplare nr 4 nedåt (Av).




# Visit dörrsändare



## Optimera identifiering av dörrklockan

Nästa steg är att lära sändaren känna igen dörrklockan.


- 1 Håll in knapp 1 ända tills den översta lysdioden börjar blinka. Släpp knappen för att börja spela in.
- 2 **Dörrklocka med summerljud:** Håll in knappen på dörrklockan i minst 8 sekunder.  
**Dörrklocka med klockljud:** Tryck på dörrklockan minst 8 gånger.
- 3 Tryck på knapp 1 på sändaren för att avsluta inspelningen. Om lysdioden lyser med rött sken måste steg 1 och 2 upprepas. Använd samma metod för att spela in ljudet från porttelefonen/extern mikrofon med knapp 2.
- Notera:** För att ta bort alla inspelade ljud, tryck och håll nere sändarens testknappar i 5 sekunder. Inställningar för radionyckel och signalmönster påverkas inte.

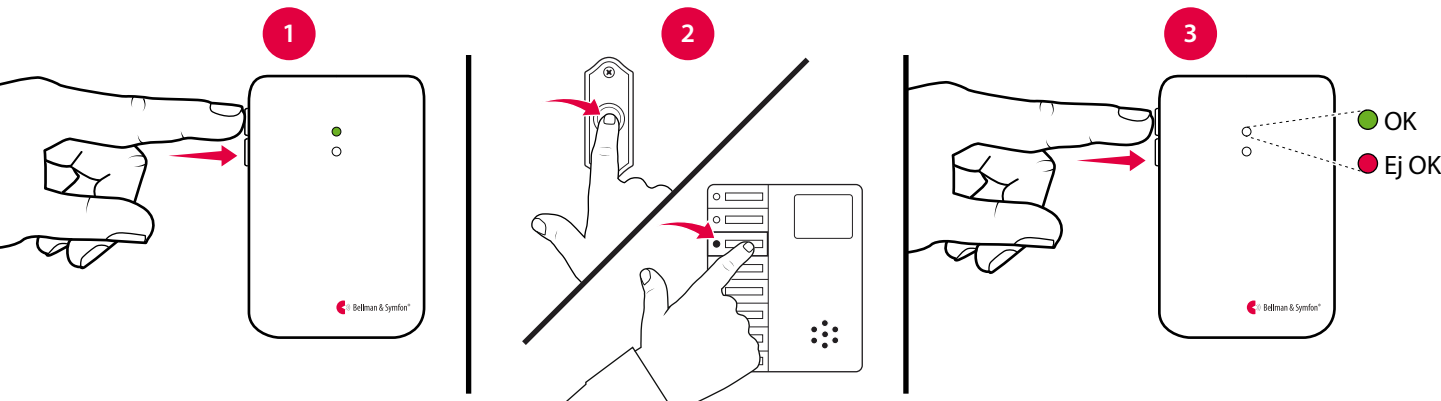

## Testa anslutningen


### Med testknapparna

- 1 Tryck samtidigt på dörrsändarens testknappar. Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den skickar en radiosignal.
- 2 Den gröna Visittlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.
- Notera:** Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

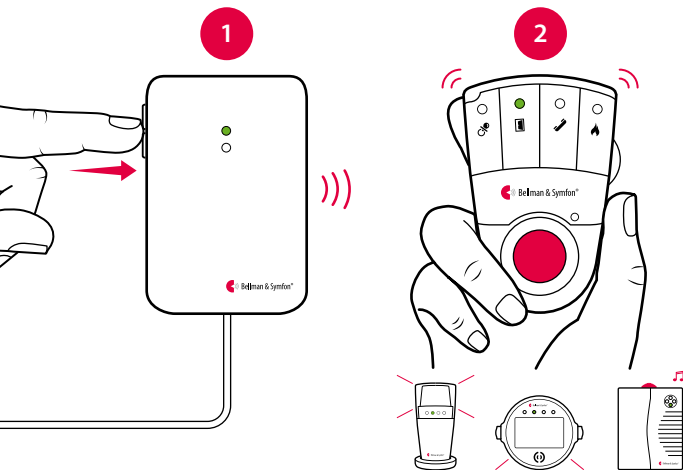

### Med dörrklocka eller porttelefon

- 1 Tryck på dörrklockan eller porttelefonen. Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den aktiveras av ljudet och skickar en radiosignal.
- 2 Den gröna Visittlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.
- Notera:** Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

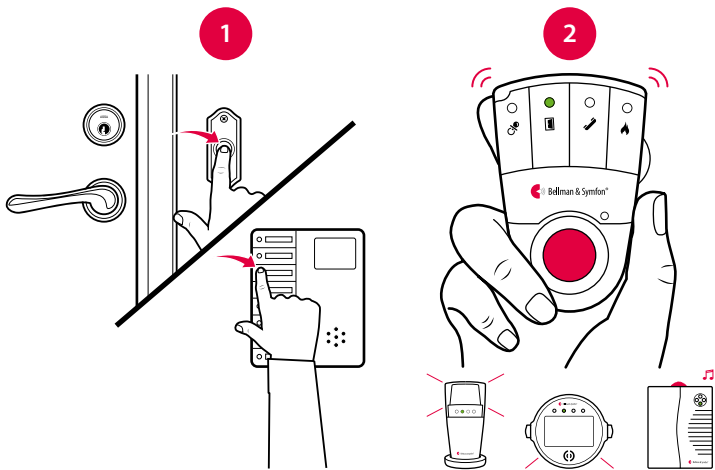

## Förinställt signalmönster

När dörrsändaren aktiveras händer följande:

- 1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att sändaren skickar en radiosignal till mottagaren.
- 2 Den gröna Visittlampan på mottagaren tänds och den börjar ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Sändaren och de anslutna tillbehören styr signalmönstret och förinställningen är:

| Sändare               | Signalmönster, mottagare |                 |                    |           |         |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------|
| Källa                 | Statuslampa              | Visittlampan    | Ljud               | Vibration | Blixt   |
| ■ Intern mikrofon     | Grön, övre               | Fast grönt ljus | 1×dörrklocka, mörk | Långsam   | ■□□□ Ja |
| ■ Extern mikrofon     | Grön, nedre              | Blinkar grönt   | 2×dörrklocka, ljus | Långsam   | ■□□□ Ja |
| ■ Ansluten dörrklocka | Grön, övre               | 3×blinkar grönt | 1×dörrklocka, ljus | Långsam   | ■□□□ Ja |

## Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplarna enligt tabellen nedan:



| Sändare     | Signalmönster, mottagare                                                                 |                                                          |                                                                |                               |                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Inställning | Källa                                                                                    | Visittlampan                                             | Ljud                                                           | Vibration                     | Blixt                           |
| 1 2 3 4     | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | Fast grönt ljus<br>Blinkar grönt<br>3×blinkar grönt      | 1×dörrklocka, mörk<br>2×dörrklocka, ljus<br>1×dörrklocka, ljus | Långsam<br>Långsam<br>Långsam | ■□□□ Ja<br>■□□□ Ja<br>■□□□ Ja   |
| 1 2 3 4     | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | 2×blinkar grönt<br>3×blinkar grönt<br>Blinkar grönt      | 2×dörrklocka, mörk<br>1×dörrklocka, ljus<br>2×dörrklocka, ljus | Långsam<br>Långsam<br>Långsam | ■□□□ Ja<br>■□□□ Ja<br>■□□□ Ja   |
| 1 2 3 4     | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | 3×blinkar grönt<br>2×blinkar grönt<br>3×blinkar orange   | 1×dörrklocka, ljus<br>2×dörrklocka, mörk<br>Babymelodi         | Långsam<br>Långsam<br>Snabb   | ■□□□ Ja<br>■□□□ Ja<br>■■■■■■ Ja |
| 1 2 3 4     | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | Blinkar grönt<br>Fast grönt ljus<br>Blinkar orange       | 2×dörrklocka, ljus<br>1×dörrklocka, mörk<br>Babymelodi         | Långsam<br>Långsam<br>Snabb   | ■□□□ Ja<br>■□□□ Ja<br>■■■■■■ Ja |
| 1 2 3 4     | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | Fast grönt ljus<br>3×blinkar grönt<br>2×blinkar grönt    | 1×dörrklocka, mörk<br>1×dörrklocka, ljus<br>2×dörrklocka, mörk | Långsam<br>Långsam<br>Långsam | ■□□□ Ja<br>■□□□ Ja<br>■□□□ Ja   |
| 1 2 3 4     | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | Fast grönt ljus<br>Blinkar grönt<br>Blinkar gult         | 1×dörrklocka, mörk<br>2×dörrklocka, ljus<br>2×ringsignal, ljus | Långsam<br>Långsam<br>Mellan  | ■□□□ Ja<br>■□□□ Ja<br>■□□□ Ja   |
| 1 2 3 4     | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | 3×blinkar grönt<br>Fast grönt ljus<br>Rött + orange ljus | 1×dörrklocka, ljus<br>1×dörrklocka, mörk<br>VMA-signal         | Långsam<br>Långsam<br>Lång    | ■□□□ Ja<br>■□□□ Ja<br>■■■□ Ja   |
| 1 2 3 4     | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | Blinkar grönt<br>2×blinkar grönt<br>Blinkar rött         | 2×dörrklocka, ljus<br>2×dörrklocka, mörk<br>Brandlarm          | Långsam<br>Långsam<br>Lång    | ■□□□ Ja<br>■□□□ Ja<br>■■■□ Ja   |



# Visit dörrsändare





## Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under sändarens lock.

### Så här byter du radionyckel:

- 1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Alla radioomkopplare är från början positionerade nedåt (av).
- 2 Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på sändarens testknappar inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

**Notera:** Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

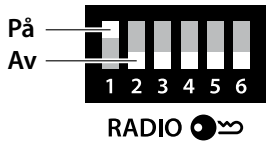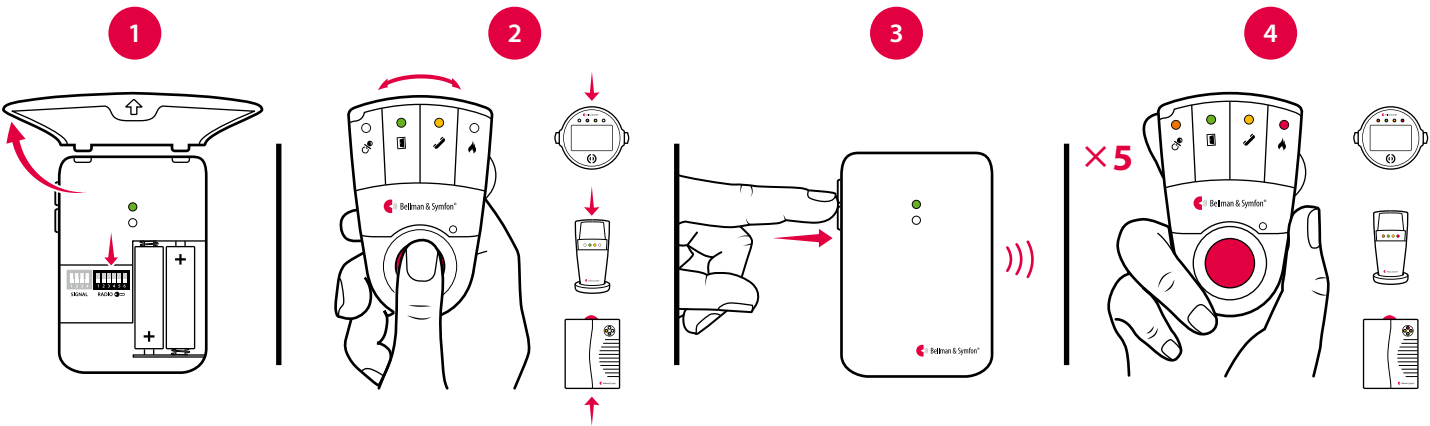


## Felsökning

| Om                                                                                                 | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statuslampan blinkar orange en gång i minuten                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Byt batterier. Använd enbart 1.5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Statuslampan blinkar orange en gång i sekunden                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Det finns andra ljudkällor som stör dörrsändaren. Stäng av dem eller sänk ljudet.</li><li>Koppla ur den externa mikrofonen för att säkerställa att den inte är trasig.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Statuslampan tänds när jag ringer på dörrklockan eller porttelefonen men mottagaren aktiveras inte | <ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera sändarens och mottagarens batterier och anslutningar.</li><li>Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.</li><li>Kontrollera att dörrsändaren och mottagaren har samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Statuslampan tänds inte när jag ringer på dörrklockan eller porttelefonen                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Ring på dörrklockan samtidigt som du flyttar dörrsändaren närmare / längre bort från ljudkällan. Rekommenderat avstånd är mindre än 3 cm.</li><li>Lär dörrsändaren ljudet från din dörrklocka, se <b>Programmera sändaren</b>.</li><li>Om signalen varierar mycket i styrka och ton, byt till elektromagnetisk avkänning.</li><li>Om dörrsändaren fortfarande inte aktiveras, tryck och håll nere testknapparna i 5 sekunder för att ta bort de inspelade ljuden, se <b>Radera inspelade ljud</b>.</li></ul> |
| Mottagaren aktiveras utan anledning                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Visit tryckknappssändare

## Knappar och anslutningar

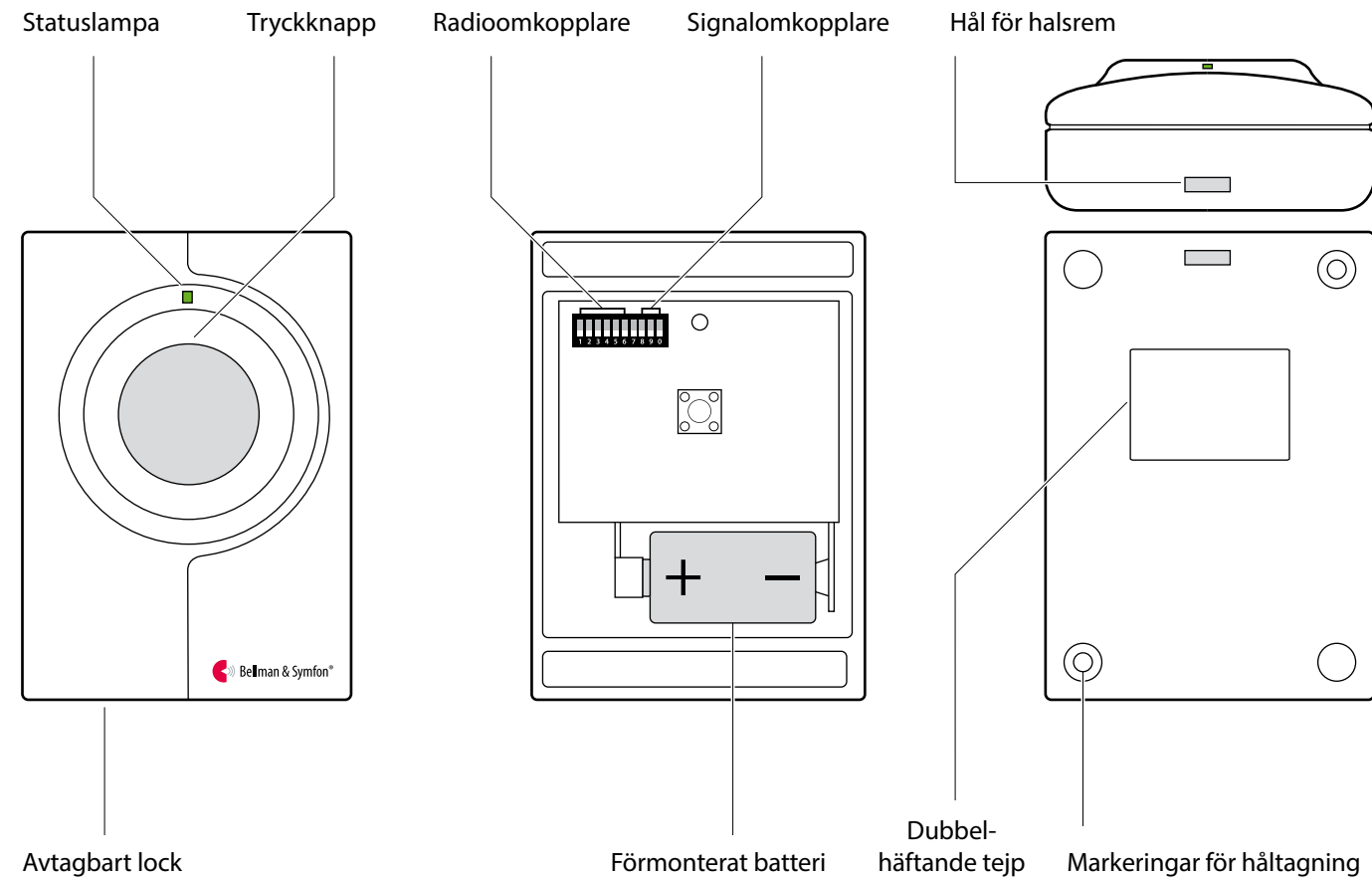

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1420 Visit tryckknappssändare med förmonterat alkaliskt batteri
- Halsrem med säkerhetslås
- Tejp, skruv och plugg

### Ström och batteri

- Batterityp  
1×6 V PX28G/PX28M alkaliskt eller  
1×6 V PX28L litiumbatteri
- Strömförbrukning  
Aktiv < 35 mA  
Viloläge < 0,05 µA
- Driftstid  
Alkaliskt batteri ~ 2 år  
Litiumbatteri ~ 5 år

### Storlek och vikt

- Höjd: 66 mm
- Bredd: 48 mm
- Djup: 23 mm
- Vikt: 50 g, inkl. batteri

### Aktivering

- Via tryckknappen på framsidan

### Skötsel och rengöring

- Underhållsfri  
Rengör med en torr trasa
- Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, tryckluft, aerosolsprayer, lösningsmedel, ammoniak eller slipmedel

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens  
868,3 MHz
- Räckvidd  
50 - 250 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning

### Omgivning


- För inomhus- och utomhusbruk i skyddat läge.  
Ej vattentät. (IP42)
- Arbetstemperatur  
-10° till 40° C
- Relativ luftfuktighet  
15% till 90%, icke-kondenserande

## Använda den som larmknapp

Sändaren kan bäras hängande runt halsen och användas som en trådlös larmknapp.

### Så här använder du den:

- Fäst halsremmen i sändaren.
- Häng sändaren runt halsen.

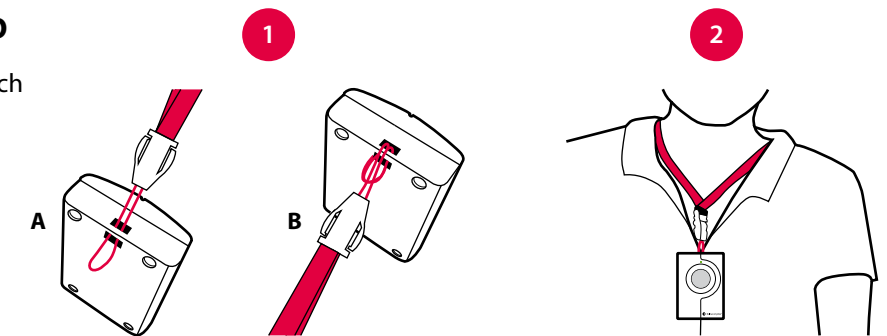


## Använda den som dörrklocka

Sändaren kan också användas som en trådlös dörrklocka. Så här sätter du upp den:


### Montera med skruv

- Avlägsna försiktigt sändarens lock och gör två hål vid markeringarna.
- Fäst enheten på väggen med de medföljande skruvarna och sätt på locket igen.

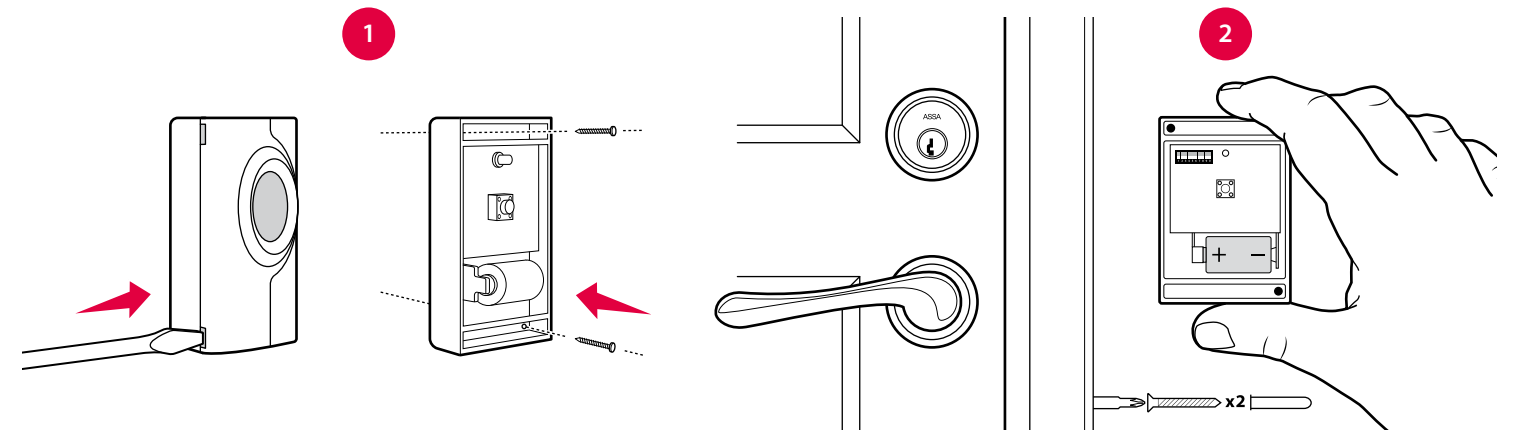

### Montera med dubbelhäftande tejp

- Fäst den dubbelhäftande tejpens på baksidan av sändaren. Rengör ytan med våtservett och avlägsna skyddsfilm från tejpens.
- Montera enheten vid ytterdörren. Se till att den är skyddad från fukt.

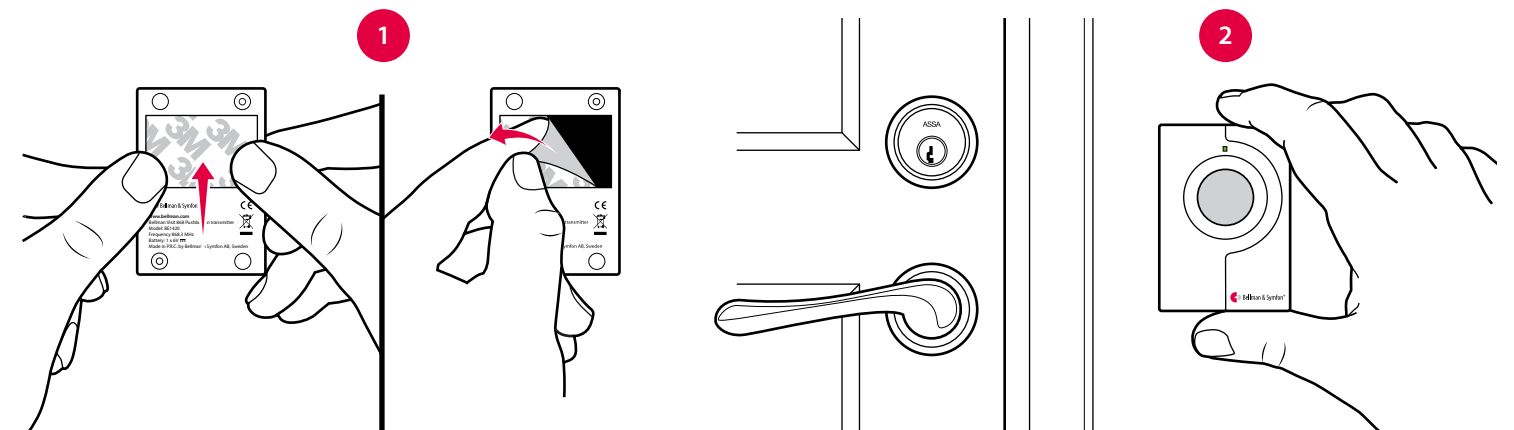

# Visit tryckknappssändare




## Testa anslutningen

### Med tryckknappen

- Tryck på sändarens knapp. Sändarens statuslampa tänds för att visa att en radiosignal skickas.
- Den gröna Visitlempen på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster.

Det är sändaren som styr signalmönstret och förinställningen är:

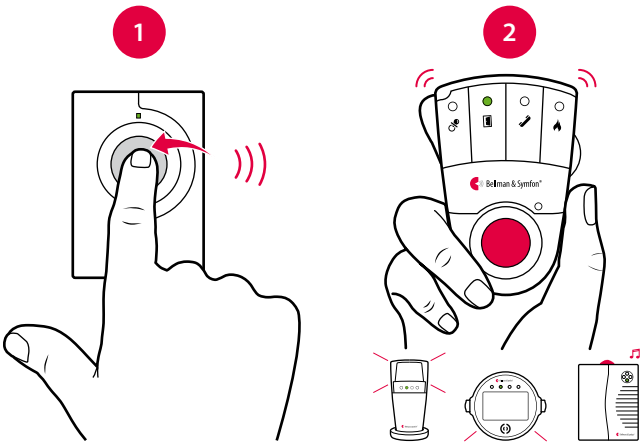

## Förinställt signalmönster

### Sändare | Signalmönster, mottagare

| Statuslampa  | Visitlempa      | Ljud                 | Vibration    | Blixt |
|--------------|-----------------|----------------------|--------------|-------|
| ■ Grönt ljus | Fast grönt ljus | 1 × dörrklocka, mörk | Långsam ■□□□ | Ja    |

## Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplare nummer 8, 9 och 0 enligt tabellen nedan:

### Sändare | Signalmönster, mottagare

| Inställning | Visitlempa        | Ljud                 | Vibration    | Blixt |
|-------------|-------------------|----------------------|--------------|-------|
|             | Fast grönt ljus   | 1 × dörrklocka, mörk | Långsam ■□□□ | Ja    |
|             | 2 × blinkar grönt | 2 × dörrklocka, mörk | Långsam ■□□□ | Ja    |
|             | 3 × blinkar grönt | 1 × dörrklocka, ljus | Långsam ■□□□ | Ja    |
|             | Blinkar grönt     | 2 × dörrklocka, ljus | Långsam ■□□□ | Ja    |
|             | Fast orange ljus  | Babymelodi           | Snabb ■■■■■■ | Ja    |
|             | Blinkar orange    | Babymelodi           | Snabb ■■■■■■ | Ja    |
|             | Fast gult ljus    | 1 × ringsignal, mörk | Mellan ■□■□  | Ja    |
|             | Blinkar gult      | 2 × ringsignal, ljus | Mellan ■□■□  | Ja    |





## Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under sändarens lock.

### Så här byter du radionyckel:

- Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Alla radioomkopplare är från början positionerade nedåt (av).
- Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlempen blinkar växelvis. Släpp knappen.
- Tryck på sändarens knapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- Visitlemporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

**Notera:** Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

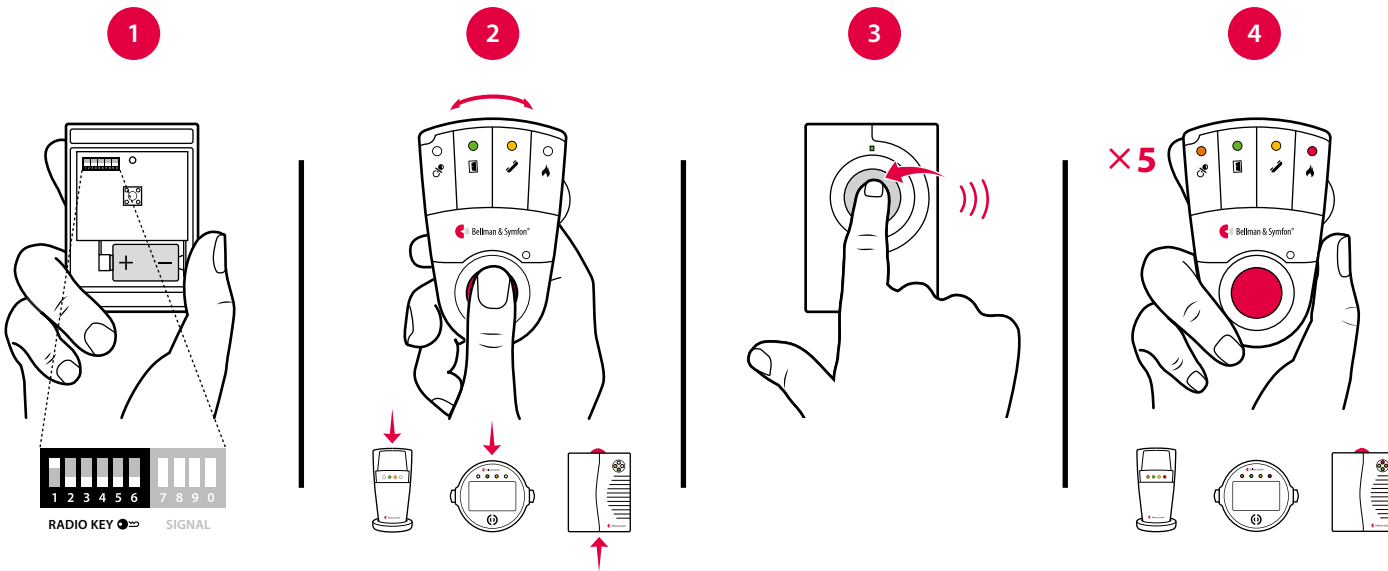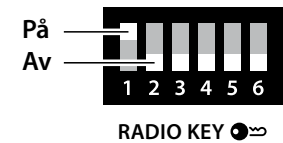

## Felsökning

| Om                                                                                  | Gör så här                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statuslampan tänds i gult när jag trycker på knappen                                | ■ Batteriet är nästan tomt.<br>Ersätt det med ett alkaliskt PX28A eller ett litium PX28L batteri                                                                                                                               |
| Statuslampan tänds inte när jag trycker på knappen                                  | ■ Kontrollera att batteriet är korrekt monterat.<br>■ Ersätt batteriet med ett alkaliskt PX28A eller ett litium PX28L batteri                                                                                                  |
| Statuslampan tänds i grönt när jag trycker på knappen men mottagaren aktiveras inte | ■ Kontrollera mottagarens batterier och anslutningar.<br>■ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.<br>■ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b> . |
| Mottagaren aktiveras utan anledning                                                 | ■ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare.<br>Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b> .                                                                          |




# Visit telefonsändare



BE1431

## Knappar och anslutningar

Test / programmering    Statuslampor    3,5 mm extern triggeringång    BE9026 Trampmatta    BE9023 Magnetbrytare

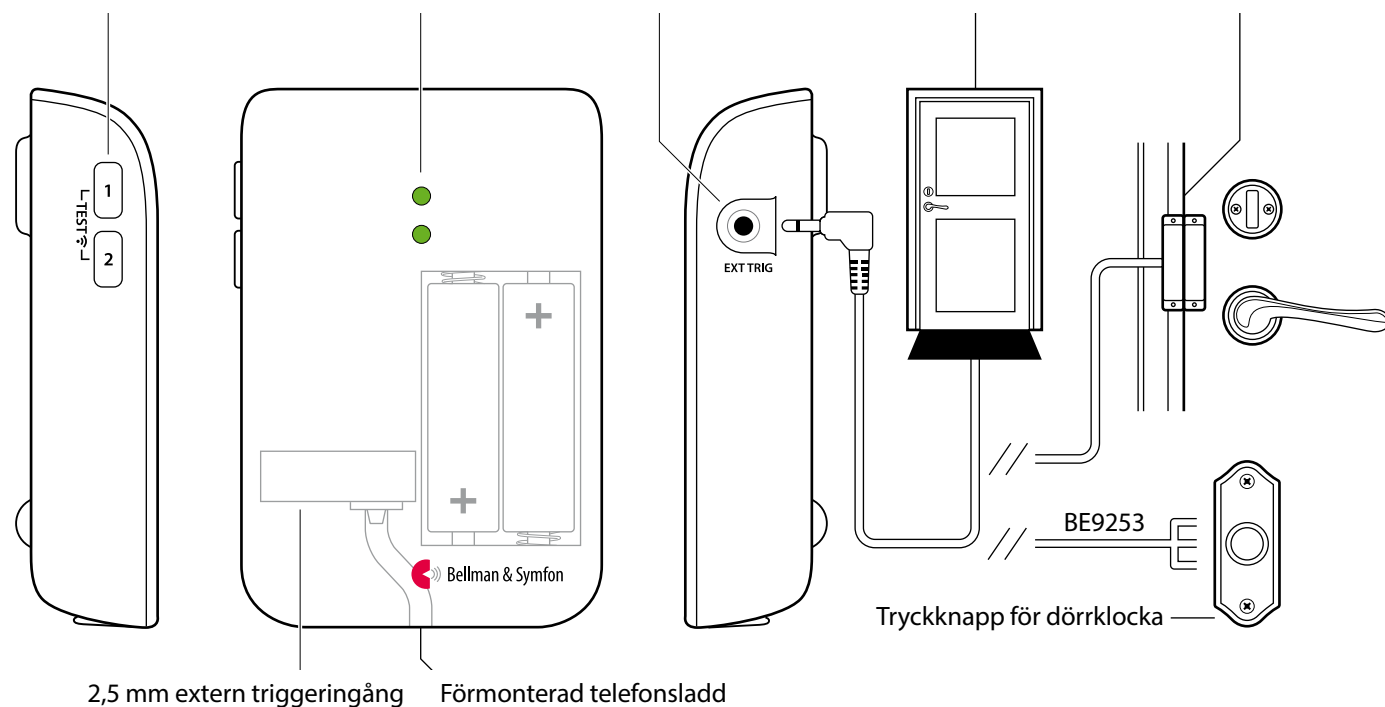

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1431 Visit telefonsändare
- 2 x 1,5 V AA alkaliska batterier
- Telefonsladd och mellanpropp
- Skruv och plugg

### Ström och batteri

- Batterityp  
2 x 1,5 V AA litium eller alkaliska batterier
- Strömförbrukning  
Aktiv < 70 mA  
Viloläge < 15 µA
- Drifttid  
Alkaliska batterier ~ 5 år  
Litiumbatterier ~ 10 år

### Storlek och vikt

- Höjd: 100 mm
- Bredd: 65 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g, inkl. batterier

### Aktivering

- Via testknapparna
- Via en fast telefon
- Via en trampmatta / magnetbrytare
- Via en ansluten dörrklocka

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Temperatur: 0 till 35 °C  
Relativ luftfuktighet: 15% till 90%, icke-kondenserande

### Tillbehör

- BE9023 Magnetbrytare
- BE9026 Trampmatta
- BE9253 Extern triggerkabel 3,5 mm

### Ingångar


- RJ11 analog telefoningång
- 2,5 mm extern triggeringång
- 3,5 mm extern triggeringång

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens  
868,3 MHz
- Räckvidd  
50 - 250 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning

## Sätta upp sändaren

- 1 Dra bort batterifliken för att starta enheten. Rengör ytan med våtservett och ta bort skyddsfilm från kardborrebandet.
- 2 Montera sändaren på väggen. Du kan också använda medföljande skruv och plugg.
- 3 Anslut mellanproppen enligt bilden nedan.

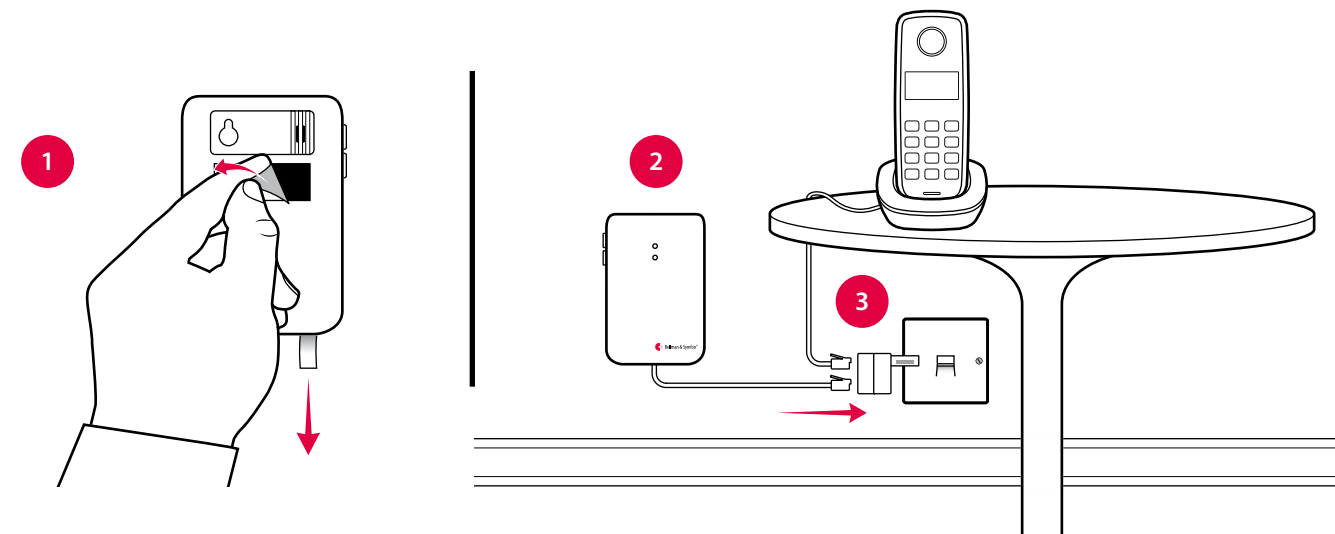

## Testa anslutningen

### Med testknapparna


- 1 Tryck samtidigt på telefonsändarens testknappar. Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den skickar en radiosignal.
- 2 Den gula Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

**Notera:** Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

### Med mobiltelefon

- 1 Använd t.ex en mobiltelefon för att ringa till den fasta telefonen. Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den aktiveras och skickar en radiosignal.
- 2 Den gula Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

**Notera:** Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

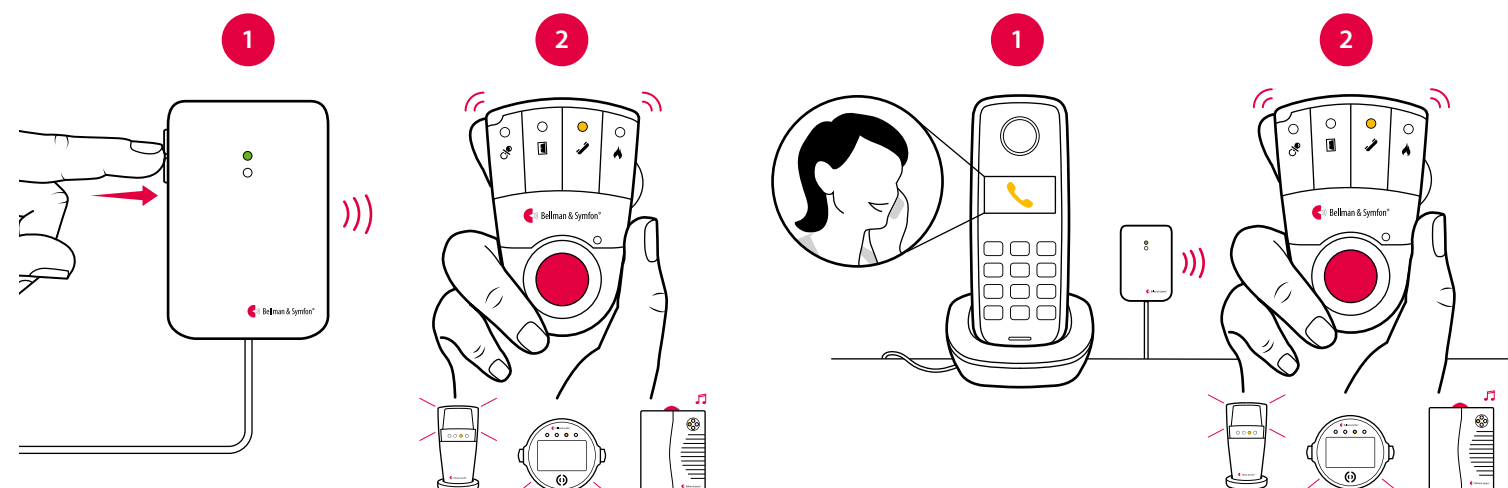

# Visit telefonsändare



## Förinställt signalmönster

När telefonsändaren aktiveras av ett inkommande samtal eller anslutet tillbehör händer följande:

- 1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att sändaren skickar en radiosignal till mottagaren.
- 2 Den gröna Visittlampan på mottagaren tänds och den börjar ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Sändaren och de anslutna tillbehören styr signalmönstret och förinställningen är:

| Sändare         |             | Signalmönster, mottagare |                    |           |       |    |
|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------|----|
| Källa           | Statuslampa | Visittlampa              | Ljud               | Vibration | Blixt |    |
| Fast telefon    | Grön, övre  | Fast gult ljus           | 1×ringsignal, mörk | Mellan    | ■□■□  | Ja |
| Annat tillbehör | Grön, nedre | Fast grönt ljus          | 1×dörrsignal, mörk | Långsam   | ■□□□  | Ja |

## Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplarna enligt tabellen nedan:

| Sändare  |                            | Signalmönster, mottagare |                     |           |        |    |
|----------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|----|
| Position | Källa                      | Visittlampa              | Ljud                | Vibration | Blixt  |    |
|          | Fast telefon / testknappar | Fast gult ljus           | 1×ringsignal, mörk  | Mellan    | ■□■□   | Ja |
|          | Annat tillbehör            | Fast grönt ljus          | 1×dörrklocka, mörk  | Långsam   | ■□□□   | Ja |
|          | Fast telefon / testknappar | Fast gult ljus           | 1×ringsignal, mörk  | Mellan    | ■□■□   | Ja |
|          | Annat tillbehör            | 2×blinker grönt          | 2×dörrklocka, mörk  | Långsam   | ■□□□   | Ja |
|          | Fast telefon / testknappar | Fast gult ljus           | 1×ringsignal, mörk  | Mellan    | ■□■□   | Ja |
|          | Annat tillbehör            | 3×blinker gult           | 1×ringsignal, ljus  | Mellan    | ■□■□   | Ja |
|          | Fast telefon / testknappar | Fast gult ljus           | 1×ringsignal, mörk  | Mellan    | ■□■□   | Ja |
|          | Annat tillbehör            | 2×blinker orange         | Babymelodi          | Snabb     | ■■■■■■ | Ja |
|          | Fast telefon / testknappar | 2×blinker gult           | 2×ringsignal, mörk  | Mellan    | ■□■□   | Ja |
|          | Annat tillbehör            | 3×blinker orange         | Babymelodi          | Snabb     | ■■■■■■ | Ja |
|          | Fast telefon / testknappar | 2×blinker gult           | 2×ring signal, mörk | Mellan    | ■□■□   | Ja |
|          | Annat tillbehör            | Blinkar grönt            | 2×dörrklocka, ljus  | Långsam   | ■□□□   | Ja |
|          | Fast telefon / testknappar | Blinkar orange           | Babymelodi          | Snabb     | ■■■■■■ | Ja |
|          | Annat tillbehör            | 2×blinker grönt          | 2×dörrklocka, mörk  | Långsam   | ■□□□   | Ja |
|          | Fast telefon / testknappar | 3×blinker gult           | 1×ringsignal, ljus  | Mellan    | ■□■□   | Ja |
|          | Annat tillbehör            | Blinkar grönt            | 2×dörrklocka, ljus  | Långsam   | ■□□□   | Ja |





## Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under sändarens lock.

### Så här byter du radionyckel:

- 1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Alla radioomkopplare är från början positionerade nedåt (av).
- 2 Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visittlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på sändarens testknappar inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visittlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

**Notera:** Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

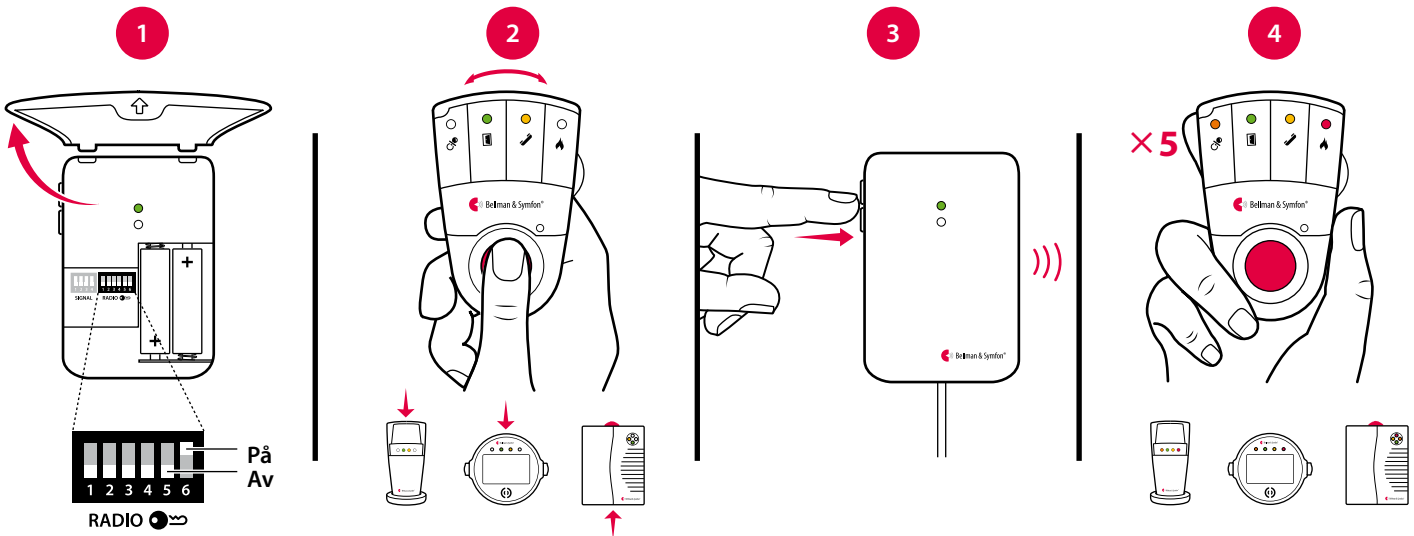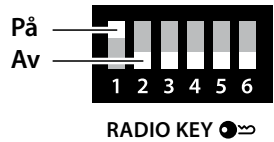


## Felsökning

| Om                                                                                      | Gör så här                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statuslampan blinkar orange                                                             | Byt batterier. Använd enbart 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.                                                                                                                                                          |
| Statuslampan tänds i grönt men mottagaren aktiveras inte                                | Kontrollera sändarens och mottagarens batterier och anslutningar.<br>Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.<br>Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b> . |
| Statuslampan tänds inte när telefonen ringer eller när ett anslutet tillbehör aktiveras | Tryck på sändarens testknappar. Om statuslampan tänds, kontrollera alla anslutningar. Om statuslampan inte tänds, byt batterier. Använd enbart 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.                                        |
| Statuslampan tänds inte när jag trycker på testknapparna                                | Byt batterier. Använd enbart 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier. Om statuslampan fortfarande inte tänds, kontakta din leverantör för service.                                                                             |
| Mottagaren aktiveras utan anledning                                                     | Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b> .                                                                                       |

# Visit Mobilsändare



## Knappar och anslutningar

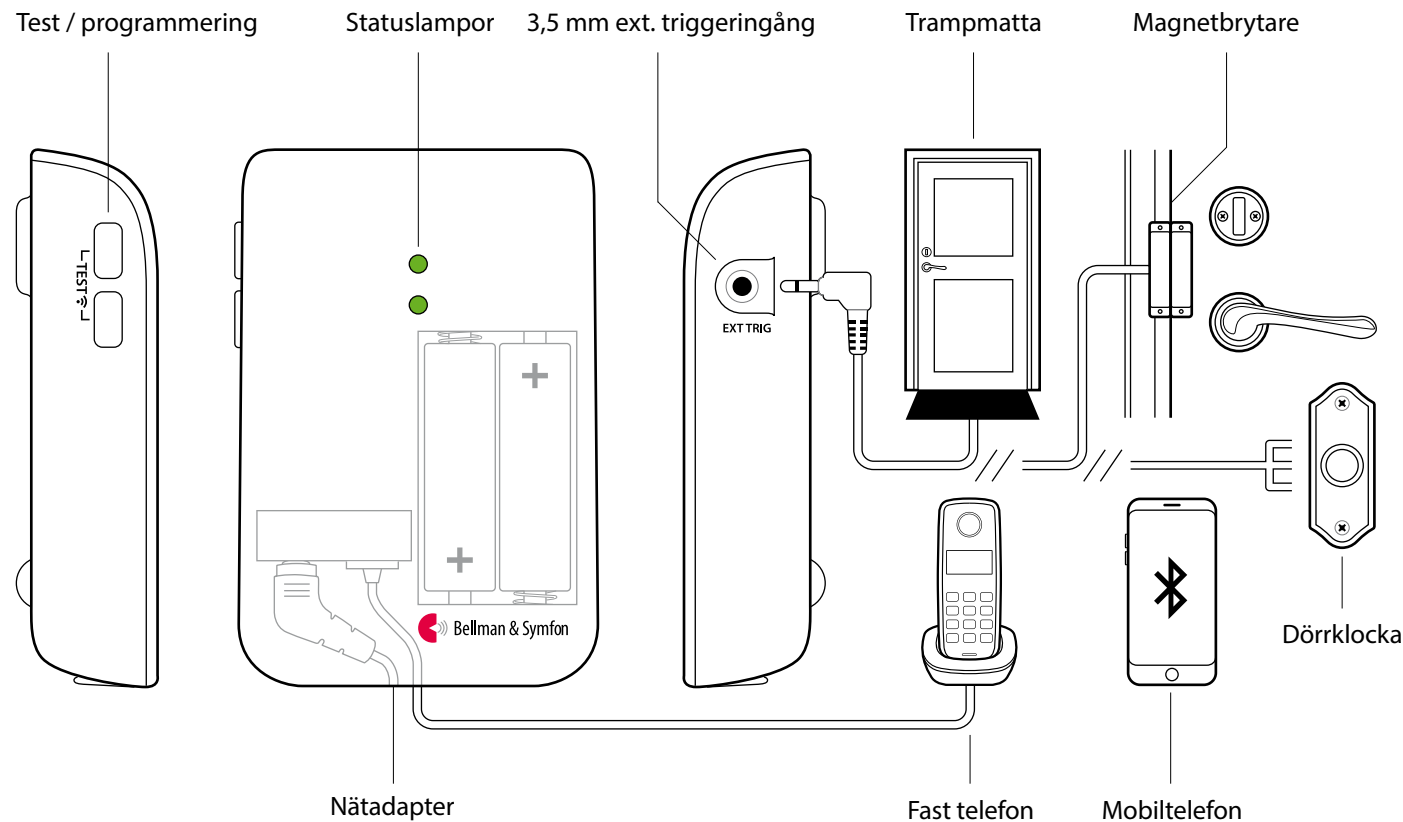

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1433 Visit Mobilsändare
- Nätadapter och strömkabel
- 2×1.5V AA Alkaliska batterier
- Förmonterad telefonkabel
- Mellanpropp
- Skruv och plugg

### Kompatibilitet

- iOS11 eller senare  
Android 6 eller senare
- iPhone 6S eller senare  
Moderna Androidtelefoner

### Ström och batteri

- Strömförsörjning:  
5 V DC / 1000 mA
- Reservbatterier:  
2×1.5 V AA, Alkaliska

### Storlek och vikt

- Höjd: 100 mm
- Bredd: 65 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g, inklusive batterier

### Aktivering

- En mobil enhet via Bluetooth
- Via fast telefon
- Via en trampmatta / magnetbrytare
- Via en ansluten dörrklocka
- Via testknapparna

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Temperatur: 0 till 35 °C
- Relativ luftfuktighet: 15% till 90%

### Anslutningar

- RJ11 analog telefoningång
- 3,5 mm extern triggerport
- Uttag för nätadapter
- Bluetooth 5.0

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Radioräckvidd: Upp till 250 m
- Bluetoothfrekvens: 2400 – 2483.5 MHz
- Bluetoothräckvidd: Upp till 250 m


### Tillbehör

- BE9023 Magnetbrytare
- BE9026 Trampmatta
- BE9253 Extern triggerkabel 3,5 mm

## Installera appen


### 1 Slå på Bluetooth®

Svep nedåt från skärmens överkant och tryck på Bluetooth-ikonen.

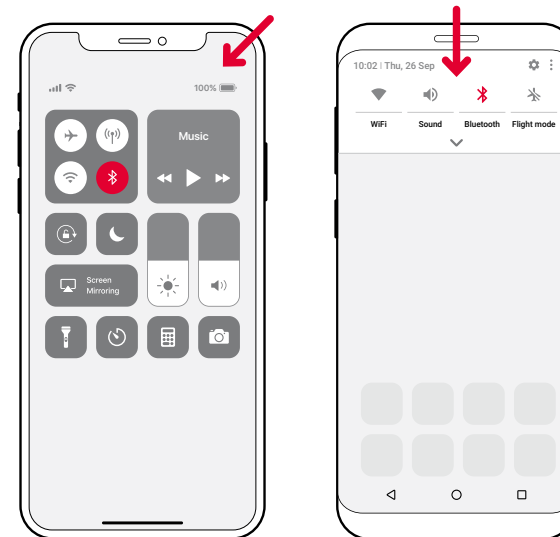

### 2 Installera Visitappen

Ladda ner **Bellman Visit**-appen från App Store® eller Google Play™ och följ anvisningarna för att komma igång.

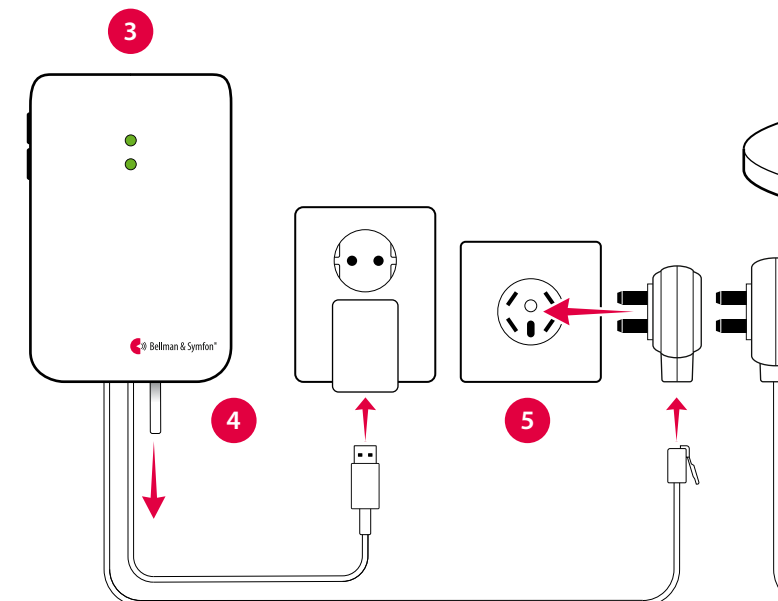

## Installera sändaren

### 3 Montera

Ta bort skyddsfilm från kardborren på sändarens baksida och fäst den på väggen.

### 4 Starta

Dra bort batterilappen för att starta sändaren. Statuslamporna lyser i grönt för att visa att den är på.

### 5 Anslut


Anslut USB-kontakten i nätadaptern. Snäpp fast elkontakten och koppla in adaptorn i vägguttaget. Om du har fast telefon ansluter du den med hjälp av medföljande mellanpropp enligt bilden.

### 6 Testa mobilen

Be någon ringa till din mobil. Den gula lampan på Visitmottagaren blinkar gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).

### 7 Testa telefonen

Ring till din fasta telefon. Den gula lampan på Visitmottagaren lyser gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).

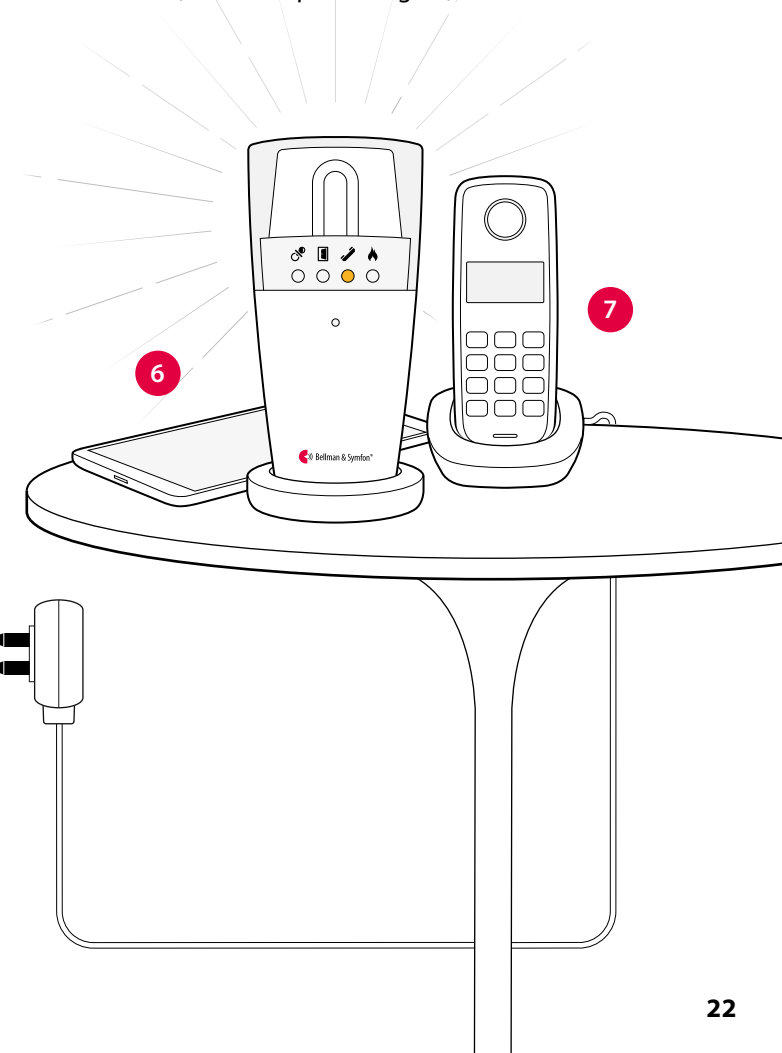




# Visit Mobilsändare



## Använda appen

När du har installerat appen kommer du att få Visitnotiser på din mobiltelefon. Dessutom aktiveras dina Visitmottagare när mobilen ringer eller tar emot ett meddelande. Både notiser och enheter hanteras enkelt i appen. Så här gör du:

- **Anpassa notiser**  
Aktivera, inaktivera eller ta bort en notis med ett enkelt tryck.
- **Kontrollera enheter**  
Få en översikt över dina enheter. Tryck på + för att lägga till en ny.
- **Se historik**  
Se dina senaste notiser, sorterade efter datum och tid.
- **Lär dig mer**  
Tryck på **Bruksanvisning** i menyn för att lära dig fler funktioner i appen.

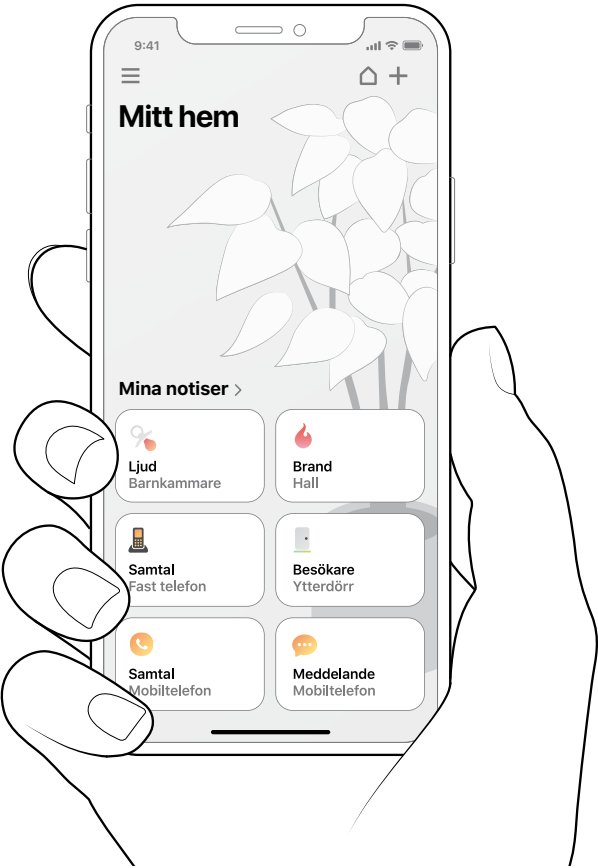

## Förinställt signalmönster

När mobilsändaren aktiveras av ett inkommande samtal, meddelande eller ett anslutet tillbehör händer följande:

- 1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att sändaren skickar en radiosignal till mottagaren.
- 2 En Visitlampa på mottagaren tänds och den börjar ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Sändaren och de anslutna tillbehören styr signalmönstret och förinställningen är:

| Sändare        |             | Signalmönster, mottagare |                          |              |       |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| Källa          | Statuslampa | Visitlampa               | Ljud                     | Vibration    | Blixt |
| ▪ Fast telefon | Grön, övre  | Lyser gult               | 1 × ringsignal, mörk ton | Mellan ■□■□  | Ja    |
| ▪ Mobiltelefon | Grön, övre  | Blinkar gult             | 2 × ringsignal, ljus ton | Mellan ■□■□  | Ja    |
| ▪ Tillbehör    | Grön, undre | Lyser grönt              | 1 × dörrsignal, mörk ton | Långsam ■□□□ | Ja    |

## Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplarna enligt tabellen i avsnittet **Byta signalmönster** för BE1431 eller i appens Bruksanvisning.

## Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. Detta betyder att du bör byta radionyckel på alla enheter, se avsnittet **Byta radionyckel** för BE1431 eller i appens Bruksanvisning.

## Felsökning

De flesta problemen med mobilsändaren kan enkelt lösas genom att följa anvisningarna nedan.

| Om                                                                                                               | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sändarens lysdioder blinkar gult när enheten sätts igång                                                         | Detta innebär att reservbatterinivån är låg. Testa följande: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Byt batterier</b><br/>Öppna luckan på sändaren och byt ut batterierna. Använd endast 1,5V AA-batterier (LR6).</li><li>▪ <b>Anslut till strömkälla</b><br/>Se till att strömkabeln är ansluten till strömadaptern och att adaptern är ansluten till elnätet.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sändarens lysdioder blinkar rött en gång i minuten                                                               | Detta betyder att reservbatterierna nästan är urladdade. Testa följande: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Byt batterier</b><br/>Öppna luckan på sändaren och byt ut batterierna. Använd endast 1,5V AA-batterier (LR6).</li><li>▪ <b>Anslut till strömkälla</b><br/>Se till att strömkabeln är ansluten till strömadaptern och att adaptern är ansluten till elnätet.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Visitmottagaren aktiveras inte när det ringer i den fasta telefonen eller när ett anslutet tillbehör sätts igång | Detta kan ha flera orsaker. Tryck ned och släpp upp båda testknapparna på sändaren för att skicka en signal till Visitmottagaren. <p><b>Om sändarens lysdiod lyser grönt, testa följande:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Kontrollera batterinivån</b><br/>Se till att batterierna i Visitmottagaren inte är urladdade och att den är ansluten till elnätet (om tillämpligt).</li><li>2. <b>Kontrollera radionyckeln</b><br/>Se till att enheterna är inställda på samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b>.</li><li>3. <b>Flytta inom räckvidden för Visit</b><br/>Flytta Visitmottagaren närmare sändaren så att den är inom radioräckvidden för Visit.</li></ol> <p><b>Om sändarens lysdiod inte lyser grönt, testa följande:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Kontrollera strömförsörjningen och batterierna</b><br/>Se till att strömadaptern är ansluten och att reservbatterierna inte är urladdade. Om lysdioden fortfarande inte lyser grönt, kontakta din återförsäljare för information om garanti och service.</li></ul> <p><b>Om Visitmottagaren svarar när du trycker på testknapparna:</b></p> <p>Detta betyder att anslutningen mellan ditt tillbehör och sändaren är felaktig.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Kontrollera anslutningarna</b><br/>Se till att kablarna mellan sändaren och tillbehören är korrekt anslutna.</li></ul> |

Mobiltelefonen mottar ingen notis när en Visitsändare aktiveras

Detta kan ha flera orsaker. Se först till att Visitappen är öppen eller körs i bakgrunden. Kontrollera sedan att notiskortet för sändaren eller det anslutna tillbehöret på appens startskärm är aktiverat på din enhet, se Bruksanvisning > Anpassa notiser för mer information.

### Kontrollera anslutningen mellan sändaren och mobilsändaren

Tryck ned och släpp upp testknappen/knapparna på sändaren. Den nedre lysdioden på mobilsändaren lyser grönt för att bekräfta att enheterna kommunicerar.

# Visit Mobilsändare




| Om                                                                                    | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <p>Om lysdioden inte tänds, läs i sändarens bruksanvisning för mer vägledning. Om mobilen fortfarande inte tar emot notiser, testa följande:</p> <p><b>Kontrollera anslutningen mellan mobilsändaren och mobiltelefonen</b></p> <p>Tryck ned och släpp upp båda testknapparna på sändaren för att skicka en notis till din mobiltelefon. Lysdioden högst upp på sändaren lyser grönt för att bekräfta.</p> <p><b>Om lysdioden inte tänds:</b></p> <p>Det betyder att batterierna är urladdade och att du behöver byta ut dem.</p> <p><b>Om lysdioden tänds men du inte får någon notis på din mobiltelefon:</b></p> <p>Börja med att kontrollera Bluetooth-anslutningen på appens startskärm. Om husikonen längst upp till höger är röd, testa följande:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1.Se till att Bluetooth är aktiverat på din mobiltelefon</b><br/>Svep för att öppna meddelandecenter/panelen och tryck på Bluetooth-ikonen för att aktivera.</li><li><b>2.Stäng av och slå på Bluetooth</b><br/>Svep för att öppna meddelandecenter/panelen och tryck på Bluetooth-ikonen för att stänga av och sedan slå på Bluetooth.</li><li><b>3.Tvångsavsluta Bellman Visitappen</b><br/>Testa att tvångsavsluta appen och öppna den igen. Observera att det inte räcker med att endast stänga appen.</li><li><b>4.Kontrollera att mobilsändaren visas som en parkopplad enhet i inställningsmenyn för Bluetooth</b><br/>Om den inte finns med i listan öppnar du Meny &gt; Mina enheter, tryck på "Ersätt" på enhetskortet för mobilsändaren och följ instruktionerna för att koppla sändaren till mobilen.</li></ol> |
| Visitmottagaren aktiveras inte när mobiltelefonen ringer eller mottar ett meddelande. | <p>Detta kan ha flera orsaker. Se först till att Visitappen är öppen eller körs i bakgrunden. Kontrollera sedan att mobiltelefonens notiskort för meddelanden och telefonsamtal på appens startskärm är aktiverat på din enhet, se Bruksanvisning &gt; Anpassa notiser för mer information. Tryck ned och släpp upp båda testknapparna på sändaren.</p> <p><b>Om sändarens lysdiod inte lyser grönt, testa följande:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Kontrollera strömförsörjningen och batterierna</b><br/>Se till att strömadaptern är ansluten och att reservbatterierna inte är urladdade. Om lysdioden fortfarande inte lyser grönt, kontakta din återförsäljare för information om garanti och service.</li></ul> <p><b>Om Visitmottagaren svarar och en notis visas på din mobil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Kontrollera telefonens inställningar</b><br/>Vissa telefoninställningar kan förhindra att samtal och meddelanden vidarebefordras till sändaren. Följ steg-för-steg-guiden för att ändra inställningarna.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Om                                                      | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p><b>Om Visitmottagaren svarar men ingen notis visas på din mobil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Kontrollera Bluetooth-anslutningen</b><br/>Börja med att kontrollera Bluetooth-anslutningen på appens startskärm. Om husikonen längst upp till höger är röd, testa följande:</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1.Se till att Bluetooth är aktiverat på din mobiltelefon</b><br/>Svep för att öppna meddelandecenter/panelen och tryck på Bluetooth-ikonen för att aktivera.</li><li><b>2.Stäng av och slå på Bluetooth</b><br/>Svep för att öppna meddelandecenter/panelen och tryck på Bluetooth-ikonen för att stänga av och sedan slå på Bluetooth.</li><li><b>3.Tvångsavsluta Bellman Visitappen</b><br/>Testa att tvångsavsluta appen och öppna den igen. Observera att det inte räcker med att endast stänga appen.</li><li><b>4.Kontrollera kompatibiliteten med app från tredje part</b><br/>Använder du appar från tredje part såsom Facebook Messenger, Skype, WhatsApp, WeChat eller Google Hangouts? Beroende på modell kanske din mobiltelefon i vissa fall inte vidarebefordrar notiser om samtal och meddelanden till ditt Visitsystem. Vi föreslår att du testar appen genom att be någon ringa eller skicka ett meddelande via appen. Om Visitmottagaren inte svarar (även om mobilens notiskort för meddelanden och telefonsamtal är aktiverade) kan det bero på att tredjepartsappen inte är kompatibel.</li></ol> <p><b>Om Visitmottagaren inte svarar, testa följande:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1.Kontrollera batterinivån</b><br/>Se till att batterierna i Visitmottagaren inte är urladdade och/eller att den är ansluten till elnätet.</li><li><b>2.Kontrollera radionyckeln</b><br/>Se till att enheterna är inställda på samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b>.</li><li><b>3.Flytta inom räckvidden för Visit</b><br/>Flytta Visitmottagaren närmare sändaren så att den är inom radioräckvidden för Visit.</li></ol> |
| Visitmottagaren aktiveras utan någon uppenbar anledning | <p>Det kan finnas ett annat Visitsystem i närheten som utlöser ditt system. Ändra radionyckeln på alla Visit enheter för att undvika radiostörningar, se <b>Byta radionyckel</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Visit babyvakt

## Knappar och anslutningar

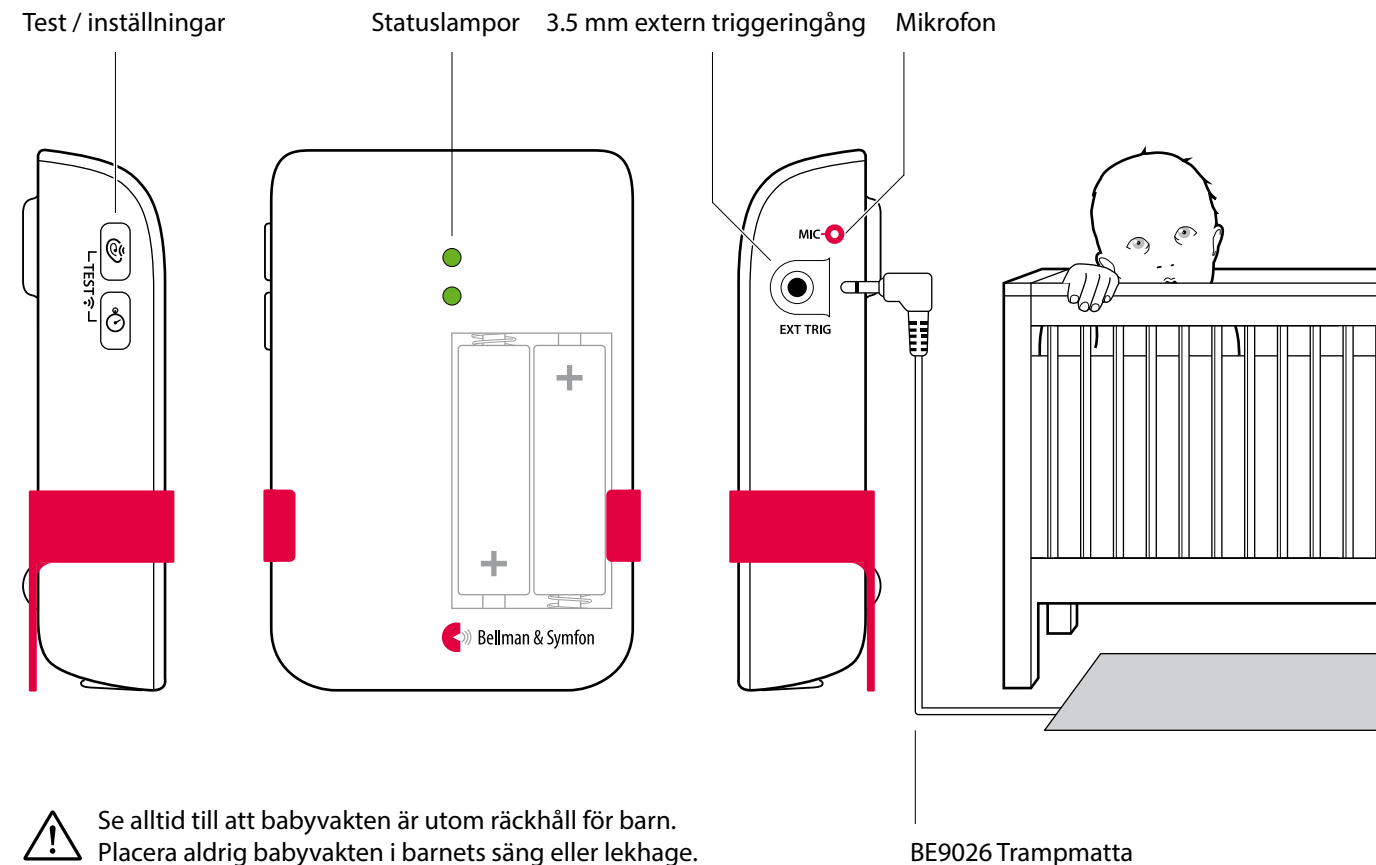

⚠ Se alltid till att babyvakten är utom räckhåll för barn.  
Placera aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhage.

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1491 Visit babyvakt
- 2 × 1,5 V AA alkaliska batterier
- Förmonterat bordsställ
- Skruv och plugg

### Ström och batteri

- Batterityp  
2 × 1,5 V AA litium eller alkaliska batterier
- Strömförbrukning  
Aktiv < 70 mA  
Viloläge < 400 µA
- Drifttid  
Alkaliska batterier ~ 6 mån  
Litiumbatterier ~ 1 år

### Storlek och vikt

- Höjd: 100 mm
- Bredd: 65 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 118 g, inkl. batterier

### Aktivering

- Via mikrofonen och testknapparna
- Via en trampmatta (tillbehör)

### Inställningar

- Känslighet  
65 dB, 75 dB, 85 dB
- Fördröjning  
30 s, 10 s, 1 s

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens  
868,3 MHz
- Räckvidd  
50 - 250 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning

### Omgivning


- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur  
0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet  
15% till 90%, icke-kondenserande

### Tillbehör

- BE9026 Trampmatta

## Sätta upp babyvakten

- 1 Dra bort batterifliken för att starta enheten.  
(Du kan hålla nere båda testknapparna i 3 sekunder för att sätt på / stänga av den).
- 2 Ställ babyvakten på sängbordet eller sätt upp den på väggen med medföljande skruv och plugg.  
Det rekommenderade avståndet är 0,5 – 2 m, utom räckhåll för barnet.

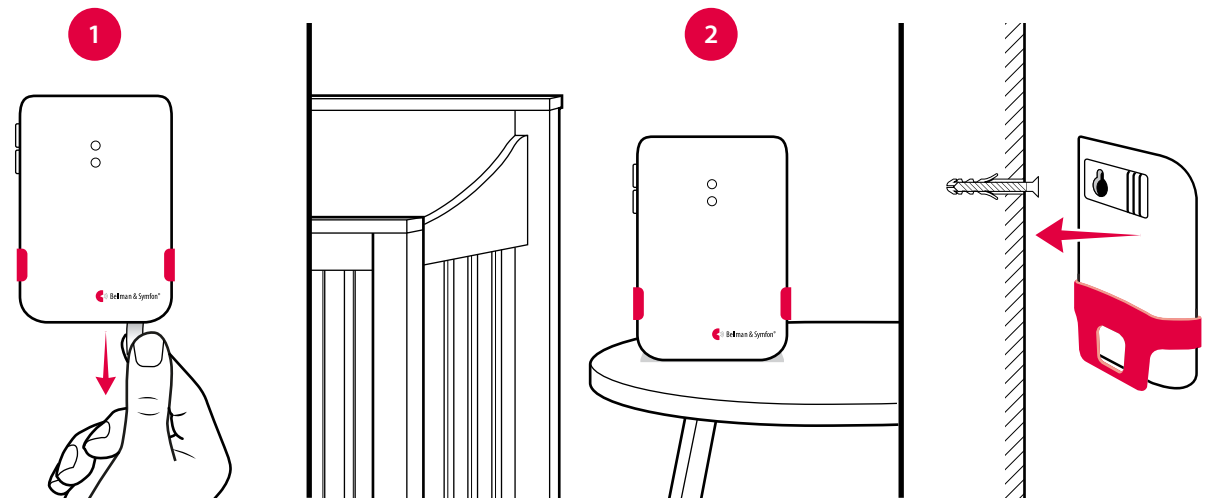


## Testa anslutningen

### Med testknapparna

- 1 Tryck samtidigt på babyvaktens testknappar.  
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den skickar en radiosignal.
- 2 Den orangea Visittlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.


**Notera:** Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

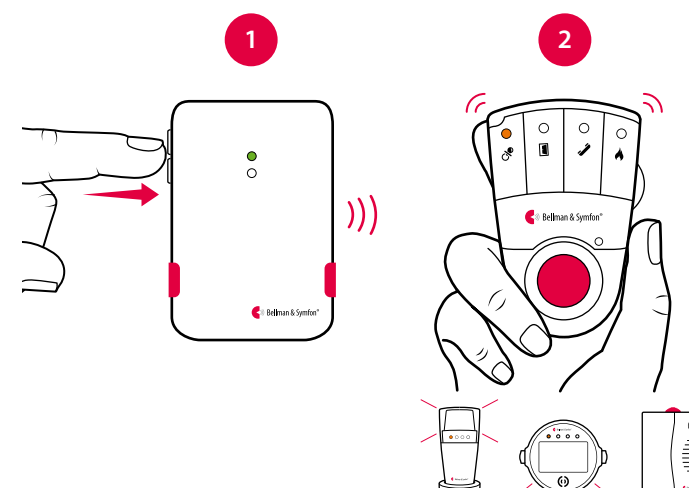

### Med hjälp av din röst

- 1 Ställ dig i närheten av babyvakten och för lite ljud.  
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den aktiveras av ljudet och skickar en radiosignal.
- 2 Den orangea Visittlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

**Notera:** Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

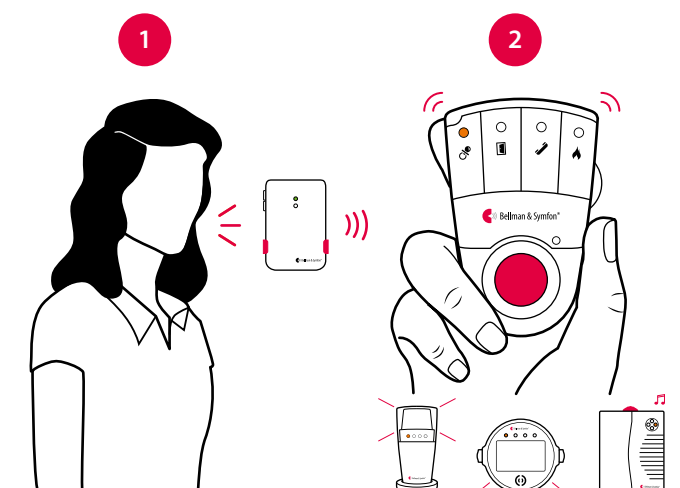



# Visit babyvakt



## Ändra inställning

Knapparna för känslighet och fördröjning sitter på babyvaktens vänstra sida. När du trycker på knappen visas först din nuvarande inställning. Tryck upprepade gånger på knappen för att ändra inställning.


- Om babyvakten inte aktiveras när barnet gråter – öka känsligheten.
- Om babyvakten aktiveras för lätt – minska känsligheten.
- Om babyvakten aktiveras för tidigt eller för sent – justera fördröjningen.

### Inställningar, känslighet

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | 65 dB | Röd    |
|  | 75 dB | Orange |
|  | 85 dB | Grön   |

### Inställningar, fördröjning

|  |      |        |
|--|------|--------|
|  | 30 s | Röd    |
|  | 10 s | Orange |
|  | 1 s  | Grön   |

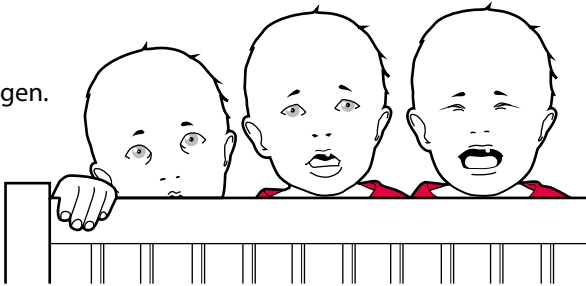

## Förinställt signalmönster

När babyvakten aktiveras av barnets röst eller en ansluten trampmatta händer följande:

- Statuslampan tänds i grönt för att visa att babyvakten skickar en radiosignal till mottagaren.
- Den orangea Visittlampan på mottagaren tänds och den börjar att ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Babyvakten och trampmattan styr signalmönstret och förinställningen är:

### Babyvakt

### Signalmönster, mottagare

| Källa        | Statuslampa | Visittlampa      | Ljud               | Vibration    | Blixt |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|-------|
| ■ Babyröst   | Grön, övre  | Fast orange ljus | Babymelodi         | Snabb ■■■■■■ | Ja    |
| ■ Trampmatta | Grön, undre | Fast grönt ljus  | 1×dörrklocka, mörk | Långsam ■■■■ | Ja    |

## Byta signalmönster

Om du har mer än ett barn kan du ställa in ett individuellt signalmönster för varje babyvakt. Öppna locket och flytta någon av signalomkopplarna uppåt (på). Var noga med att de andra signalomkopplarna är nere (av).

### Babyvakt

### Signalmönster, mottagare

| Inställning | Källa        | Visittlampa      | Ljud       | Vibration    | Blixt |
|-------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------|
|             | Babyvakt 1   | Fast orange ljus | Babymelodi | Snabb ■■■■■■ | Ja    |
|             | Trampmatta 1 | Fast grönt ljus  | Babymelodi | Snabb ■■■■■■ | Ja    |
|             | Babyvakt 2   | 2×blinker orange | Babymelodi | Snabb ■■■■■■ | Ja    |
|             | Trampmatta 2 | 2×blinker grönt  | Babymelodi | Snabb ■■■■■■ | Ja    |
|             | Babyvakt 3   | 3×blinker orange | Babymelodi | Snabb ■■■■■■ | Ja    |
|             | Trampmatta 3 | 3×blinker orange | Babymelodi | Snabb ■■■■■■ | Ja    |
|             | Babyvakt 4   | Blinkar orange   | Babymelodi | Snabb ■■■■■■ | Ja    |
|             | Trampmatta 4 | Blinkar orange   | Babymelodi | Snabb ■■■■■■ | Ja    |





## Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under babyvaktens lock.

### Så här byter du radionyckel:

- Ta försiktigt bort bordsstället från babyvakten och öppna locket. Flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel.
- Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visittlamporna blinkar växelvis. Släpp knappen.
- Tryck på babyvaktens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- Visittlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

**Notera:** Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

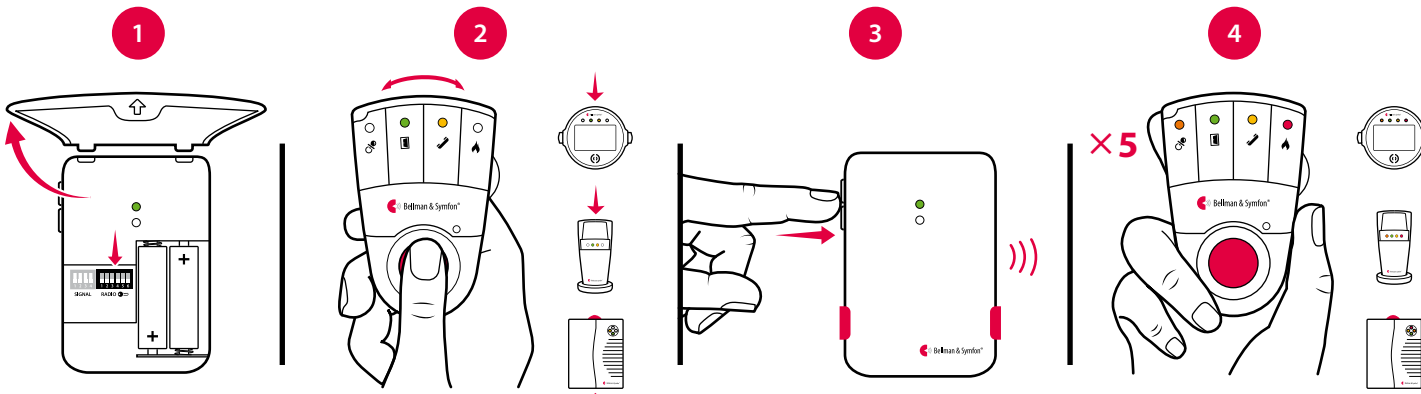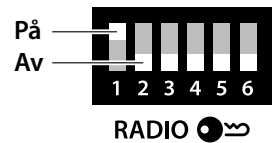

## Felsökning

### Om


### Gör så här

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statuslampan blinkar orange                              | ■ Byt batterier. Använd enbart 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.                                                                                                                                                                   |
| Statuslampan tänds i grönt men mottagaren aktiveras inte | ■ Kontrollera sändarens och babyvaktens batterier och anslutningar.<br>■ Flytta mottagaren närmare babyvakten för att säkerställa att den är inom räckvidd.<br>■ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b> .    |
| Statuslampan tänds inte trots att babyn gråter           | ■ Flytta babyvakten närmare barnet eller öka mikrofonens känslighet, se avsnittet <b>Ändra inställningar</b> .<br><b>Notera:</b> Se alltid till att babyvakten är utom räckhåll för barn. Placera aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhage. |
| Babyvakten aktiveras för lätt                            | ■ Minska mikrofonens känslighet eller flytta babyvakten längre bort från spjäsängen, se <b>Ändra inställningar</b> .                                                                                                                              |
| Babyvakten aktiveras för snabbt                          | ■ Öka fördröjningen, se <b>Ändra inställningar</b> .                                                                                                                                                                                              |
| Babyvakten aktiveras för sent                            | ■ Minska fördröjningen, se <b>Ändra inställningar</b> .                                                                                                                                                                                           |
| Mottagaren aktiveras utan någon anledning                | ■ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b> .                                                                                                |



# Visit optisk-termisk brandvarnare

## Knappar och anslutningar

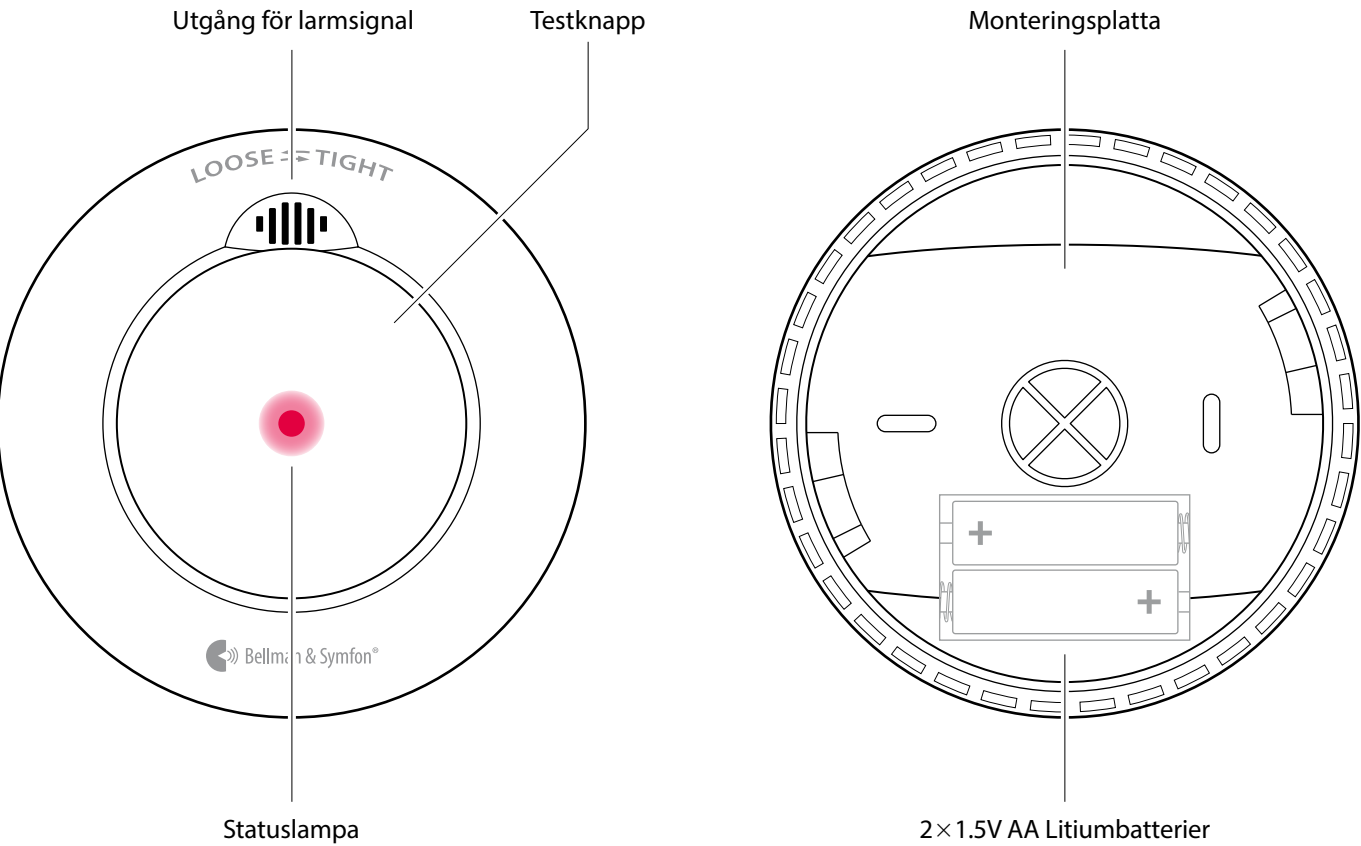

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1481 Visit brandvarnare
- 2×1.5V AA batterier
- Monteringsplatta
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning

### Ström och batteri

- Batterityp  
2×1.5V AA Energizer litium L91
- Strömförbrukning  
Aktiv < 75 mA  
Viloläge < 15 µA
- Drifttid  
Minimum 5 år

### Mått och vikt

- Diameter: 120 mm
- Djup: 37 mm
- Vikt: 165 g, inkl. batterier

### Sensortyp

- Optisk-termisk sensor med larm på > 85 dB(A) @ 3m, Frekvens: 3.2 kHz

### Aktivering

- Via testknappen
- Via rökdetektorn  
Rökkänslighet:  
0.115 – 0.168 dB/m
- Via temperatursensorn:  
Temperaturkänslighet:  
54 till 70 °C

### Frekvens och räckvidd


- Radiofrekvens:  
868,3 MHz
- Räckvidd:  
Upp till 200 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur:  
4 till 40 °C
- Relativ luftfuktighet  
15% till 95% icke-kondenserande

## Sätta upp brandvarnaren


- 1 Ta bort monteringsplattan från brandvarnaren genom att vrida den moturs och sätt i medföljande batterier för att starta enheten.
- 2 Fäst monteringsplattan i taket med medföljande skruv och plugg. Montera den minst 50 cm från väggar och andra utstickande delar, se **Placering av brandvarnare**. För alternativ montering, se **Magnetisk monteringsatts** på sid 34.
- 3 Fäst brandvarnaren på monteringsplattan genom att vrida den medurs.

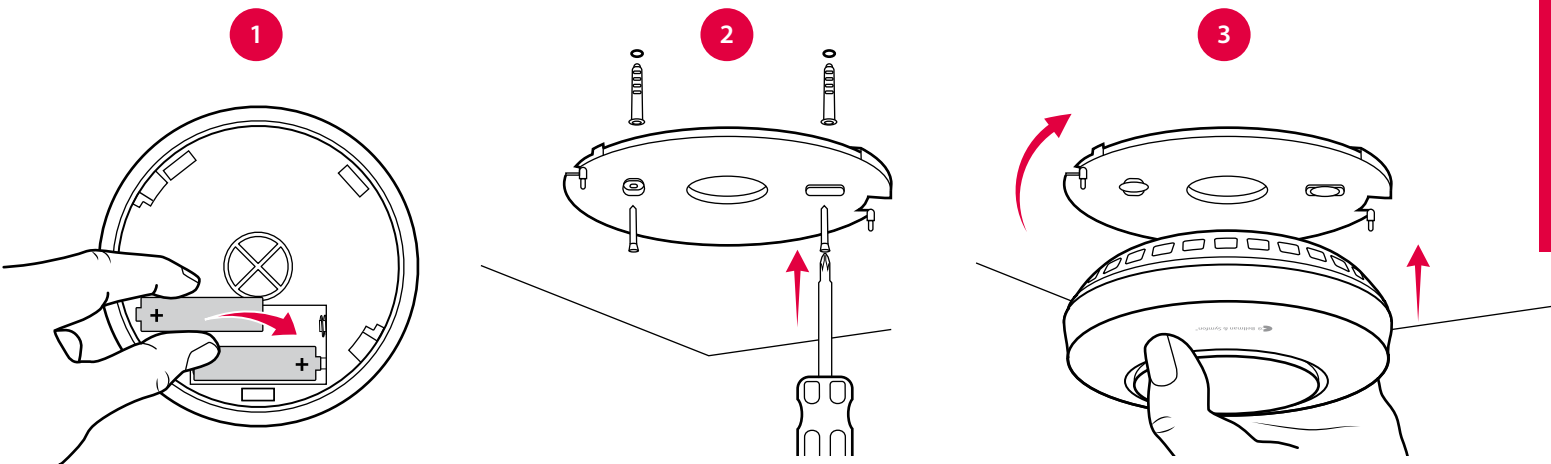

## Placering av brandvarnare

Placera brandvarnaren i mitten av taket utanför sovrummen, minst 50 cm från närmsta vägg. Om sovrummen är i olika delar av huset rekommenderas flera brandvarnare. I bostäder med fler än en våning installeras minst en brandvarnare per våning.

Undvik kök, öppna spisar eller garage eftersom ånga och avgaser kan orsaka falsklarm. Den bör inte heller installeras i fuktiga miljöer, nära fläktar eller i jordbruksfastigheter.

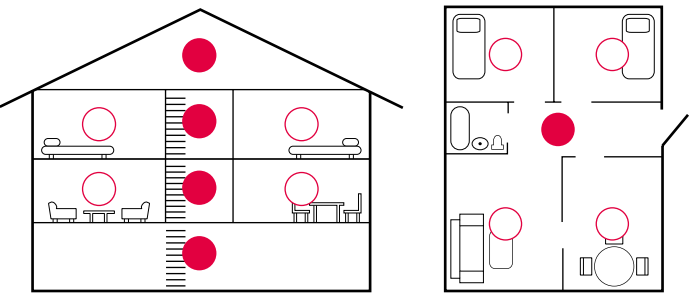


- = Minimum,
- = Extra brandvarnare

## Testa anslutningen

- 1 Tryck och håll in testknappen på brandvarnaren tills den börjar pipa och blinka. Brandvarnaren skickar då en radiosignal till Visitmottagaren.
- 2 Den röda Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

**Notera:** När du släpper testknappen tystnar brandvarnaren och Visitmottagaren slutar signalera inom 1 minut.

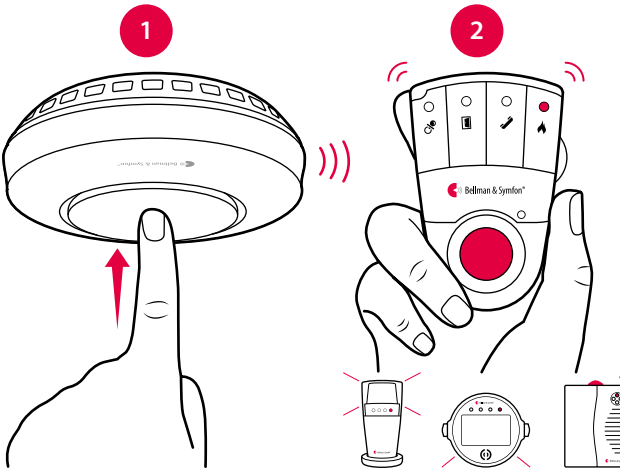

# Visit optisk-termisk brandvarnare



## Signalmönster

Brandvarnarens statuslampa blinkar rött var 50:e sekund för att visa att den fungerar som den skall. Signalmönstret varierar beroende på larmets orsak enligt tabellen nedan:

| Brandlarm        |                |              | Signalmönster, mottagare |           |           |       |
|------------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-------|
| Orsak            | Statuslampa    | Ljud         | Visitlampa               | Ljud      | Vibration | Blixt |
| ▪ Rök            | Blinkar snabbt | ■■■■□        | Blinkar rött             | Brandlarm | Lång      | Ja    |
| ▪ Värme          | Blinkar snabbt | ■■■■■■■      | Blinkar rött             | Brandlarm | Lång      | Ja    |
| ▪ Svagt batteri  | 1 blink / 50 s | 1 pip / 50 s | Blinkar rött             | –         | –         | –     |
| ▪ Fel på enheten | 1 blink / 50 s | 1 pip / 50 s | –                        | –         | –         | –     |

## Broadcastläge

Om du vill att brandlarmet skall skickas vidare till **alla** mottagare inom radioräckvidd kan du aktivera broadcastläge. Det fungerar oavsett vilken radionyckel enheterna är inställda på.

### Aktivera broadcastläge

- Tryck på testknappen tre gånger i snabb följd. Brandvarnaren larmar och statuslampan blinkar tre gånger för att visa att broadcastläget är aktiverat. Varning för svagt batteri kommer endast att skickas till enheter med samma radionyckel.
- Notera:** I broadcastläge kan larm inte aktiveras med testknappen. Använd istället rökdetektorspray.

### Avaktivera broadcastläge

- Tryck på brandvarnarens testknapp tre gånger i snabb följd. Brandvarnaren larmar och statuslampan lyser i 2 sekunder för att visa att broadcastläget är avaktiverat. Brandvarnaren återgår då till senast sparade radionyckel.

## Pausfunktion

### Använda pausfunktionen

- Om brandvarnaren larmar i onödan, tryck och håll in testknappen i 2 s för att starta pausläget. Statuslampan blinkar rött var 16:e sekund när pausläget är aktiverat. **Notera:** Pausläget upphör automatiskt efter 10 minuter av säkerhetsskäl.

## Test och underhåll

Testa brandvarnaren regelbundet, helst varje vecka, men minst en gång per månad. Brandvarnaren skall även testas omedelbart efter en längre tids frånvaro, som till exempel efter semestern. Rengör endast med en fuktig trasa. Dammsug den med en mjuk borste efter att du bytt batteri. Måla aldrig över brandvarnaren.

| Om                                                                                     | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inget händer när jag trycker på brandvarnarens testknapp                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera att batterierna sitter i ordentligt.</li><li>▪ Byt batteri i brandvarnaren. Använd endast AA Energizer litium L91 batterier.</li><li>▪ Kontrollera brandvarnarens utgångsdatum på etiketten under "Replace by".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| Brandvarnaren larmar när jag trycker på testknappen men Visitmottagaren aktiveras inte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera brandvarnarens batteri och mottagarens ström och batteri.</li><li>▪ Flytta mottagaren närmare brandvarnaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.</li><li>▪ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                              |
| Visitmottagaren aktiveras utan någon anledning                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera om rök eller ånga från kök eller badrum orsakar falsklarmet.</li><li>▪ Byt brandvarnarens batteri om mottagaren indikerar lågt batteri, se <b>Signalmönster</b>.</li><li>▪ Om problemet kvarstår finns det troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b>.</li><li>▪ Kontrollera om det finns ett annat system i närheten som har broadcastläge aktivt.</li></ul> |
| Brandvarnaren larmar utan anledning                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Avlägsna eventuell spindelväv eller damm. Byt ut enheten om problemet kvarstår.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Byta radionyckel


Om ditt system aktiveras utan anledning så kan det finnas ett närliggande Visitsystem som stör. Du bör då byta radionyckel på alla enheter. Förfarandet beror på vilken typ av sändare du har i ditt visitsystem.

### System med olika typer av sändare

Börja med att byta radionyckel på alla **övriga** sändare i systemet genom att flytta valfri radioomkopplare, se respektive sändares bruksanvisning. **Notera:** Alla sändare måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

#### Steg 1: Byt radionyckel på BE1481 brandvarnare

- 1 Ta ur ett batteri för att stänga av brandvarnaren och vänta i minst 30 s. Tryck och håll in testknappen samtidigt som du sätter tillbaka batteriet. Fortsätt hålla in testknappen tills statuslampan börjar blinka. Nu kan du släppa knappen. Statuslampan börjar då pulsera snabbt för att visa att brandvarnaren är redo att ta emot en ny radionyckel.
- 2 Tryck på testknappen på någon av de **övriga** sändarna inom 25 s för att skicka den nya radionyckeln.
- 3 Brandvarnarens statuslampa lyser med ett fast sken för att visa att radionyckeln har mottagits. Tryck på brandvarnarens testknapp för att spara den nya radionyckeln och lämna programmeringsläget.

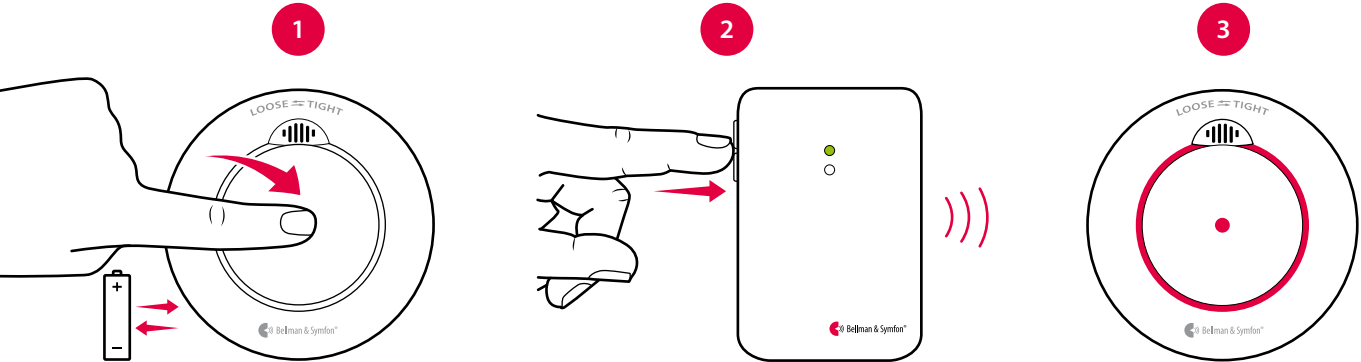

#### Steg 2: Byt radionyckel på Visitmottagaren

- 1 Tryck och håll in testknappen på Visitmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 2 Tryck på testknappen på en valfri sändare inom 25 s för att skicka den nya radionyckeln.
- 3 Alla Visitlampor på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har mottagits.



# Visit optisk-termisk brandvarnare



BE1481


## Byta radionyckel

### System med endast BE1481 brandvarnare

#### Steg 1: Byt radionyckel på BE1481 brandvarnare

- 1 Ta ur ett batteri för att stänga av brandvarnaren och vänta i minst 30 s. Tryck och håll in testknappen samtidigt som du sätter tillbaka batteriet. Fortsätt hålla in testknappen och släpp den först när statuslampan övergår från att blinka till att flimra.
- 2 Brandvarnaren återställs till radionyckel 0 och statuslampan lyser med ett fast sken.
- 3 Inom 4 s, tryck och håll in knappen tills lampan släcks för att stega till nästa radionyckel. Radionyckel 1 är nu vald och lampan tänds igen för att bekräfta. Tryck igen inom 4 s för att stega till nästa radionyckel. Det finns totalt 9 radionycklar att välja bland. Om du stegar förbi radionyckel 9 återställer brandvarnaren radionyckeln till 0.
- 4 Efter 4 s lämnar brandvarnaren automatiskt programmeringsläget och statuslampan släcks.

**Notera:** Följ stegen ovan för att byta radionyckel på övriga BE1481 brandvarnare i ditt Visitsystem.

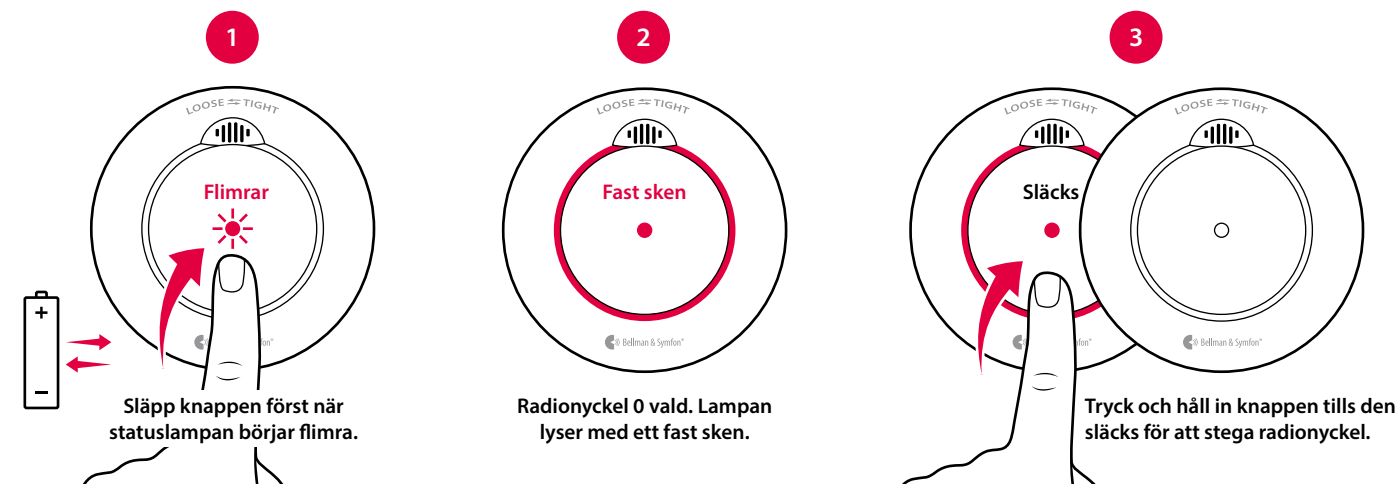

#### Steg 2: Byt radionyckel på Visitmottagaren

- 1 Tryck och håll in testknappen på Visitmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 2 Tryck på testknappen på en valfri sändare inom 25 s för att skicka den nya radionyckeln.
- 3 Alla Visitlampor på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har mottagits.



# Magnetisk monteringssats



BE9175

## För enkel montering av brandvarnare

Den magnetiska monteringssatsen erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ till skruv och plugg vid montering av brandvarnare. Den består av två självhäftande plattor - en som du fäster i taket och en som du fäster på brandvarnaren.


**Notera:** Monteringsytan måste vara ren från damm och fett. Om ytan inte rengörs ordentligt riskerar enheten att falla ner i förtid. Använd inte rengöringsmedel som våtservetter eller spray eftersom de kan lämna en hal yta. Satsen är inte lämplig för vinyltapeter, anti-adhesiva ytor, kraftigt strukturerade ytor, silikonbelagda eller teflonbelagda ytor. Brandvarnarens diameter får inte vara mindre än 70 mm

### Så använder du monteringsatsen

- 1 Torka försiktigt av ytan med rengöringsprit.
- 2 Dra av skyddstejpen på takmonteringsplattan.
- 3 Fäst plattan i taket och håll den på plats i 10 s.
- 4 Dra av skyddstejpen på den magnetiska plattan och fäst den på brandvarnaren. Håll den på plats i 10 s.
- 5 Sätt fast brandvarnaren på takmonteringsplattan.

### Teknisk information


- Diameter 7 mm
- Vikt 25 g
- Färg Vit
- Miljö Endast för inomhusbruk

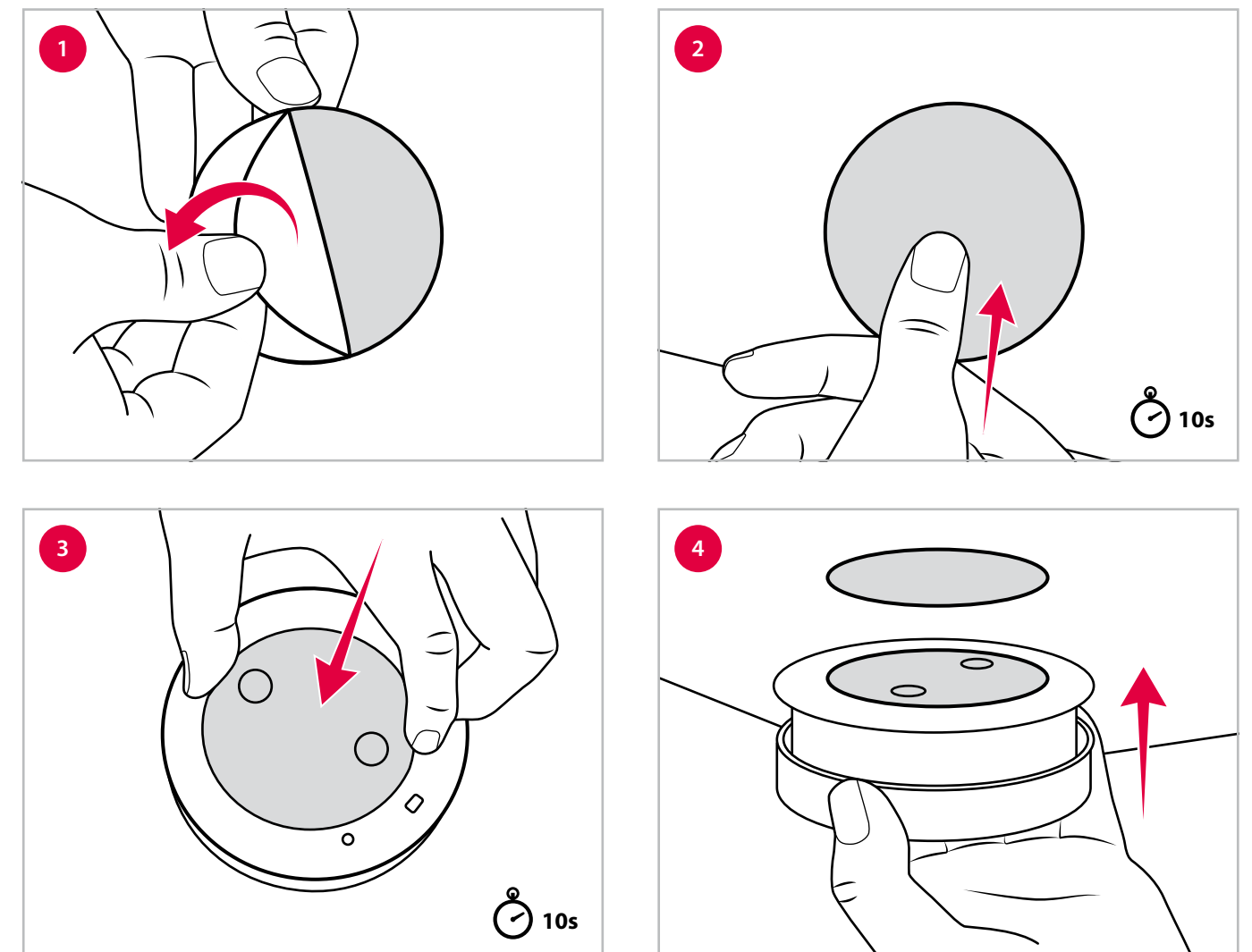



# Visit joniserande brandvarnare

## Översikt

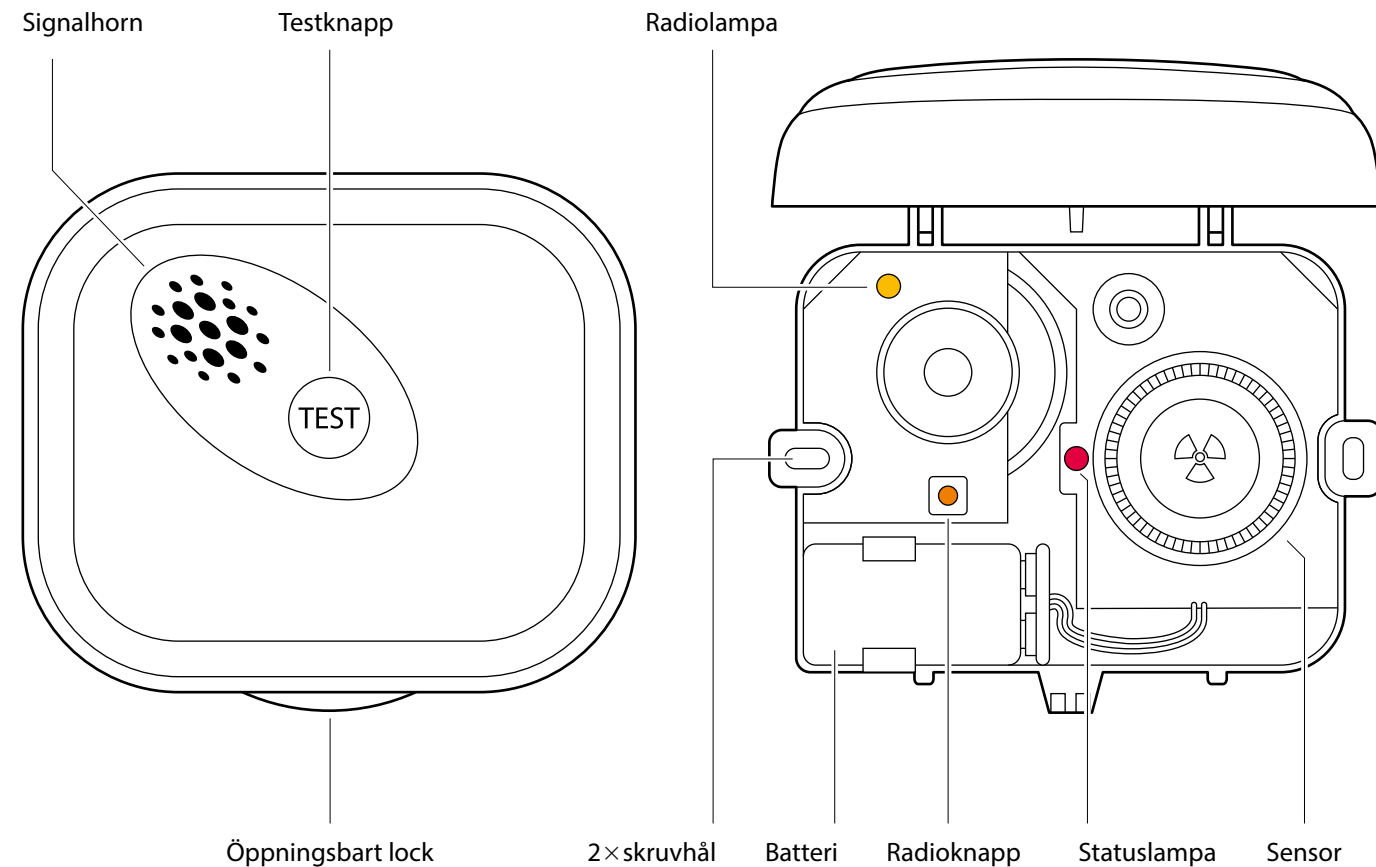

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1551 Visit brandvarnare
- 1×9V alkaliskt batteri
- 2×skruv och plugg
- Bruksanvisning

### Ström och batteri

- Batterityp  
9V alkaliskt batteri
- Strömförbrukning  
Viloläge < 15 µA
- Batterilivslängd  
Minst 3 år

### Sensortyp

- Joniserande rökdetektor

### Storlek och vikt

- Höjd: 118 mm
- Bredd: 140 mm
- Djup: 42 mm
- Vikt: 200 g inkl. batteri

### Alarmsignal

- Min. 85 dB(A) @ 3m, 2,6 kHz

### Aktivering

- Via testknappen
- Via den inbyggda rökdetektorn

### Tillbehör

- Magnetisk monteringsats BE9175

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens  
868,3 MHz
- Räckvidd: Upp till 200 m fritt fält.  
Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare.

### Omgivning


- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur  
4° till 40° C
- Relativ luftfuktighet  
15% till 95%, icke-kondenserande

### Rökkänslighet

- Uppfyller kraven för BS EN 14604:2005

## Sätta upp brandvarnaren


- 1 Ta av locket genom att vrida det bakåt och anslut batteriet för att starta enheten. Brandvarnaren piper till under uppstart.
- 2 Markera borrhålen med en penna och fäst brandvarnaren i taket med medföljande skruv och plugg. Montera den minst 30 cm från väggar och andra utstickande delar, se **Placering av brandvarnare** nedan.
- 3 Sätt tillbaka locket på brandvarnaren genom att trycka försiktigt tills det snäpper fast.

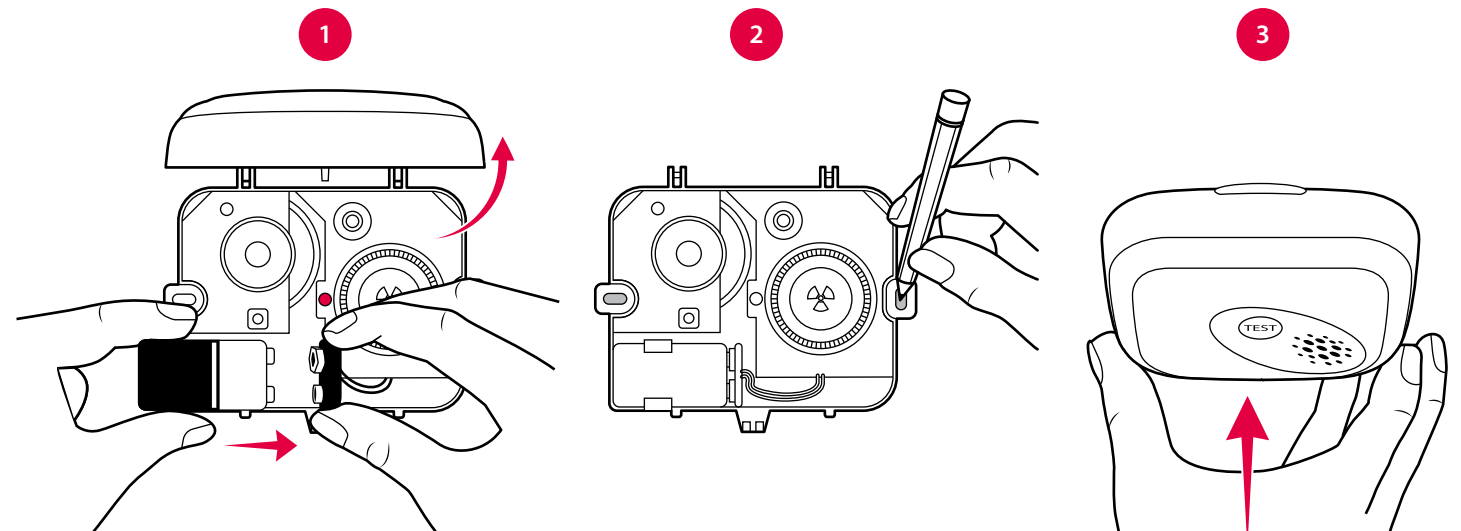

## Placering av brandvarnare

Placera brandvarnaren i mitten av taket utanför sovrummen, minst 30 cm från närmsta vägg. Om sovrummen är i olika delar av huset, rekommenderas flera brandvarnare. I bostäder med fler än en våning installeras minst en brandvarnare per våning.

Undvik kök, öppna spisar eller garage eftersom ånga och avgaser kan orsaka falsklarm. Den bör inte heller installeras i fuktiga miljöer, nära fläktar eller i jordbruksfastigheter.

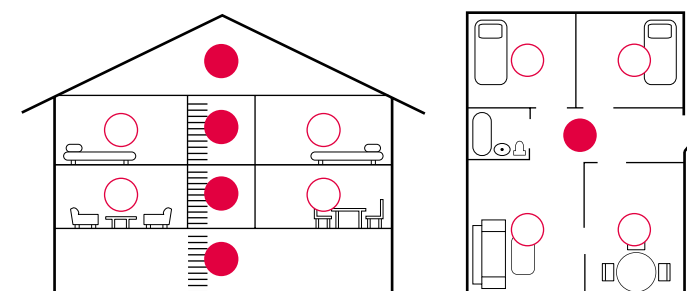


- = Minimum,
- = Extra brandvarnare

## Testa anslutningen

- 1 Tryck och håll nere testknappen på brandvarnaren tills den börjar larma (OBS! Högt ljud). Brandvarnaren skickar då en radiosignal till Visitmottagaren.
- 2 Den röda Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

**Notera:** När du släpper testknappen tystnar brandvarnaren omedelbart och Visitmottagaren slutar signalera efter ca 30 s.

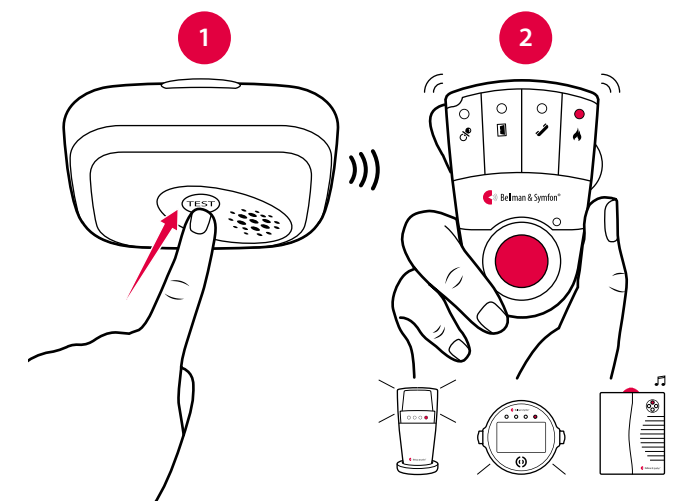

# Visit joniserande brandvarnare



## Signalmönster

Brandvarnarens statuslampa blinkar rött en gång per minut för att visa att den fungerar som den skall. Signalmönstret varierar beroende på larmets orsak enligt tabellen nedan.

| Brandvarnare   |                    |                   | Signalmönster, mottagare |           |                                        |       |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|-------|
| Orsak          | Statuslampa        | Ljud              | Visitlampa               | Ljud      | Vibration                              | Blixt |
| ■ Brand        | Blinkar rött       | Brandlarm         | Blinkar rött             | Brandlarm | Lång <div><div></div><div></div></div> | Ja    |
| ■ Lågt batteri | 1 rött blink / min | 1 kort larm / min | Blinkar rött / 5 s       | Kort larm | Kort <div><div></div><div></div></div> | Nej   |

**Notera:** När brandvarnaren indikerar lågt batteri har du minst 30 dagar på dig att byta batteri. Sängvibrator ansluten till BE1580 Väckarklocka och BE1441/BE1442 Blixtmottagare avger ingen vibration för att indikera lågt batteri.

## Använda broadcast

Om du vill att brandlarmet skall skickas till **alla** mottagare inom radioräckvidd kan du aktivera broadcastläge. Det fungerar oavsett vilken radionyckel enheterna är inställda på.

Så här aktiverar du broadcastläge:

- 1 Öppna brandvarnarens lock för att komma åt radioknappen, se **Översikt**.
- 2 Tryck på radioknappen tre gånger i snabb följd. Radiolampan pulserar 3 gånger i gult för att visa att broadcastläget är aktiverat.

**Notera:** Batterivarning kommer endast att skickas till enheter med samma radionyckel. Om du vill avaktivera broadcast, så behöver du välja en ny radionyckel, se **Byta radionyckel** på följande sida.

## Test och underhåll

Testa brandvarnaren regelbundet, helst varje vecka, men minst en gång per månad. Brandvarnaren skall även testas omedelbart efter en längre tids frånvaro, som till exempel efter semestern. Rengör endast med en fuktig trasa. Dammsug den med en mjuk borste efter du bytt batteri. Måla aldrig över brandvarnaren.

## Felsökning

| Om                                                                                     | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inget händer när jag trycker på brandvarnarens testknapp                               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera att batteriet snäpper fast ordentligt i batterikontakten.</li><li>■ Byt batteri i brandvarnaren. Använd endast ett Duracell MN1604 alkaliskt batteri.</li><li>■ Kontrollera åldern på brandvarnaren, se "Replace by"-etikett på sidan av enheten.</li></ul>       |
| Brandvarnaren larmar när jag trycker på testknappen men Visitmottagaren aktiveras inte | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera brandvarnarens batteri och mottagarens batteri och anslutningar.</li><li>■ Flytta mottagaren närmare brandvarnaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.</li><li>■ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul> |
| Visitmottagaren aktiveras utan någon anledning                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Byt batteri om mottagaren indikerar för lågt batteri, se <b>Signalmönster</b>.</li><li>■ Om problemet kvarstår finns det troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>      |
| Brandvarnaren larmar utan någon anledning                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera om rök eller ånga från kök eller badrum orsakar falsklarm. Avlägsna eventuell spindelväv eller damm. Byt ut brandvarnaren om problemet kvarstår.</li></ul>                                                                                                        |

## Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter.

### System med olika typer av sändare

Börja med att byta radionyckel på alla **övriga** sändare i systemet genom att flytta valfri radioomkopplare, se respektive sändares bruksanvisning. **Notera:** Alla sändare måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

### Byta radionyckel på BE1551 brandvarnare

- 1 Öppna locket på brandvarnaren för att komma åt radioknappen, se **Översikt**. Tryck och håll nere radioknappen tills radiolampan blinkar långsamt i gult. Släpp knappen.
- 2 Tryck på testknappen på någon av de **övriga** sändarna inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln.
- 3 Radiolampan på brandvarnaren lyser med ett fast gult sken för att visa att radionyckeln har mottagits.

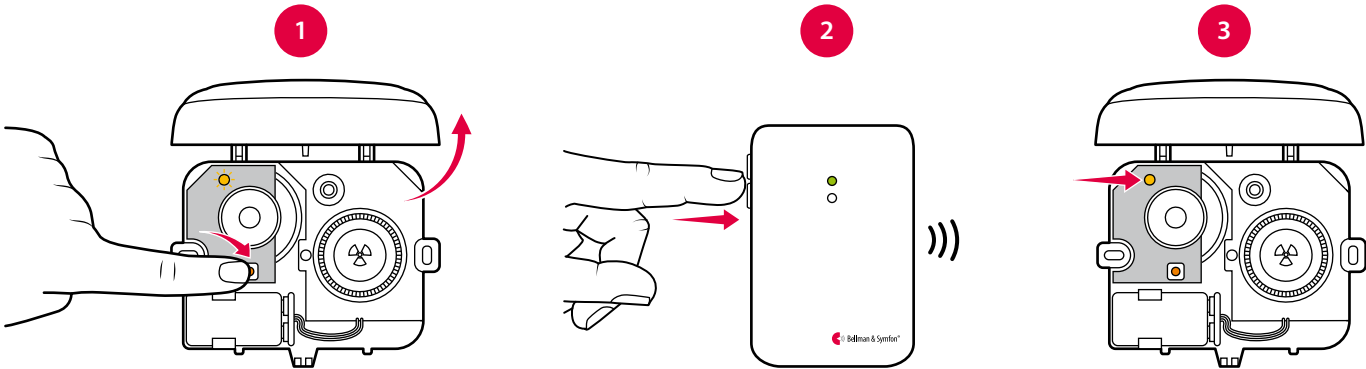

### Byta radionyckel på en Visitmottagare

- 1 Tryck och håll nere testknappen på Visitmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 2 Tryck på testknappen valfri sändare inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln.
- 3 Alla Visitlampor på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har mottagits.

### System med endast BE1551 brandvarnare

#### Byta radionyckel på dina brandvarnare

Välj ut en BE1551 brandvarnare som kommer att fungera som **huvudenhet**. Den andra BE1551 brandvarnaren kommer då att fungera som **slavenhet**. Öppna locket på bägge brandvarnare för att komma åt radioknappen, se **Översikt**.

- 1 Tryck och håll nere radioknappen på **huvudenheten** tills radiolampan blinkar långsamt i gult. Tryck och håll nere knappen igen för att generera en ny radionyckel. Radiolampan ändrar blinkmönster för att bekräfta bytet.
- 2 Tryck och håll nere radioknappen på **slavenheten** tills radiolampan blinkar långsamt i gult.
- 3 Tryck och håll nere testknappen på **huvudenheten** inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln. Den börjar då larma.
- 4 Radiolampan på **slavenheten** lyser med ett fast gult sken för att visa att radionyckeln har mottagits.

**Notera:** Repetera steg 2 - 4 för att byta radionyckel på nästa BE1551 brandvarnare.


#### Byta radionyckel på en Visitmottagare

- 1 Tryck och håll nere testknappen på Visitmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 2 Tryck på testknappen på valfri brandvarnare inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln.
- 3 Alla Visitlampor på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har mottagits.

# Visit kolmonoxidvarnare (CO)



## Knappar och anslutningar

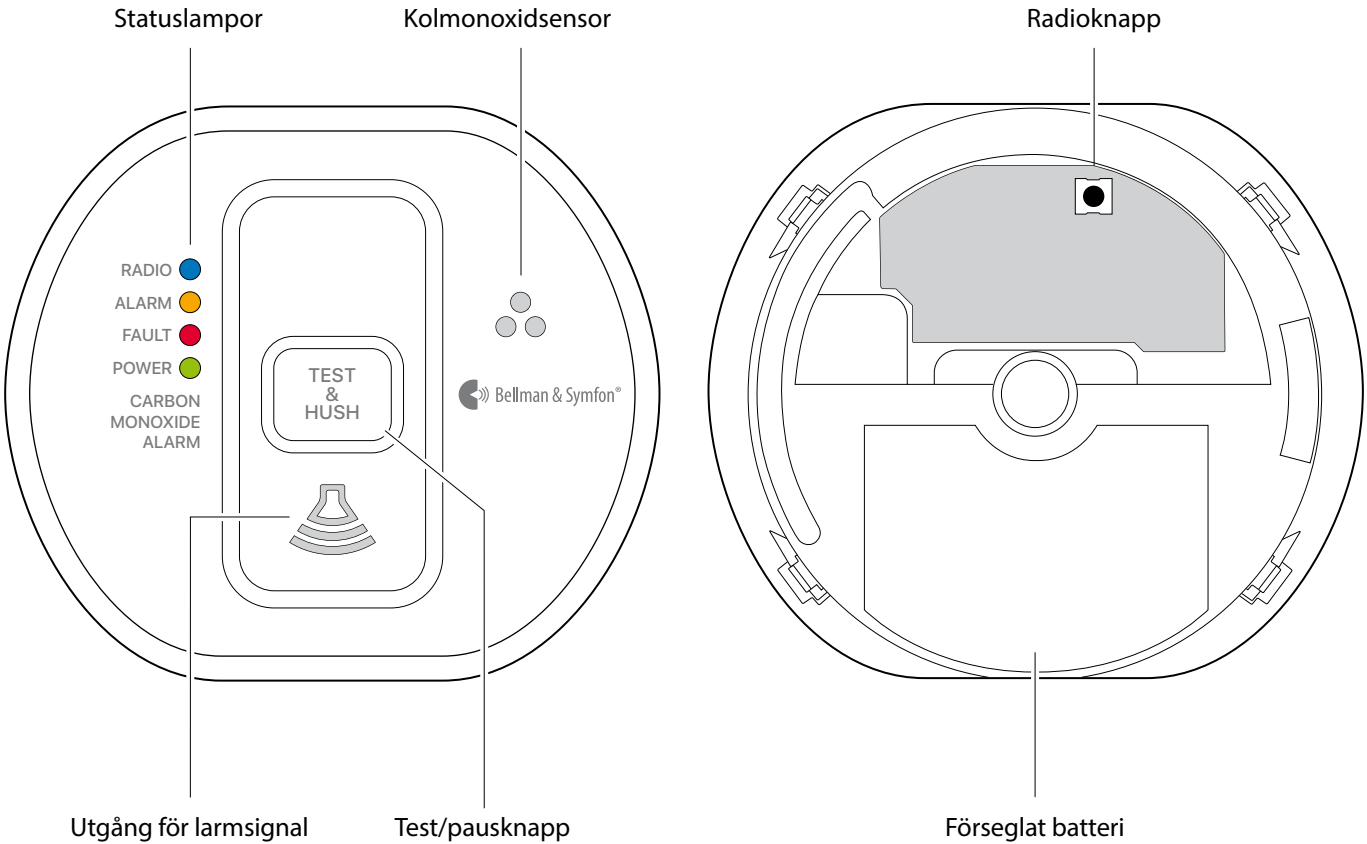

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1555 Visit kolmonoxidvarnare
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning

### Ström och batteri

- Batteri: Inbyggd strömförsörjning från förseglat litiumbatteri.
- Batterilivslängd: 10 år. Samma som produktens livslängd.

### Aktivering

- Via test/pausknapp
- Via kolmonoxidsensorn

### Storlek och vikt

- Höjd: 105 mm
- Bredd: 120 mm
- Djup: 40 mm
- Vikt: 195 g inkl. batteri

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk.
- Arbetstemperatur -10° till 40° C
- Relativ luftfuktighet: 15% till 95%, icke-kondenserande

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens : 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 200 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning.


### CO-varnare

- BE1555 aktiveras av följande nivåer av kolmonoxid (CO):

| CO-nivå/fel    | Alarmsignal          |
|----------------|----------------------|
| > 43 ppm       | På inom 60 – 90 min. |
| > 80 ppm       | På inom 10 – 40 min. |
| > 150 ppm      | På inom 2 minuter    |
| Svagt batteri  | 1 pip varje minut    |
| Fel på enheten | 2 pip varje minut    |
| Utgången       | 3 pip varje minut    |

## Sätta upp CO-varnaren


- 1 Ta bort monteringsplattan från CO-varnaren genom att vrida det moturs.
- 2 Fäst monteringsplattan i taket eller på väggen med medföljande skruv och plugg och var noga med att undvika befintlig elinstallation. Montera den minst 30 cm från väggar, se **Placering av CO-varnare** nedan.
- 3 Fäst CO-varnaren i monteringsplattan genom att vrida det medurs tills det klickar fast. Den röda, gula och gröna statuslampan tänds efter varandra för att visa att CO-varnaren är på.

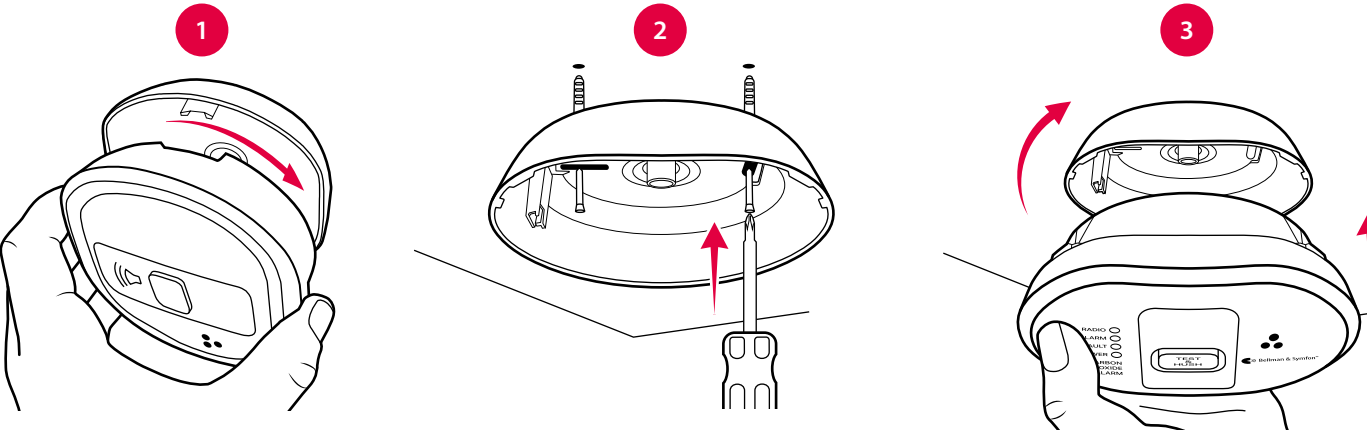

## Placering av CO-varnare

Placera en CO-varnare i alla sovrum, rum i olika delar av huset där boende spenderar mycket tid, samt i nära anslutning till rum med eldstad eller värmepanna. Montera larmen i taket eller på väggen, minst 30 cm från väggar och utstående delar.


Undvik kök, öppna spisar eller garage eftersom ånga och avgaser kan orsaka falsklarm. CO-varnaren bör inte heller installeras i fuktiga miljöer, nära fläktar eller i jordbruksfastigheter.

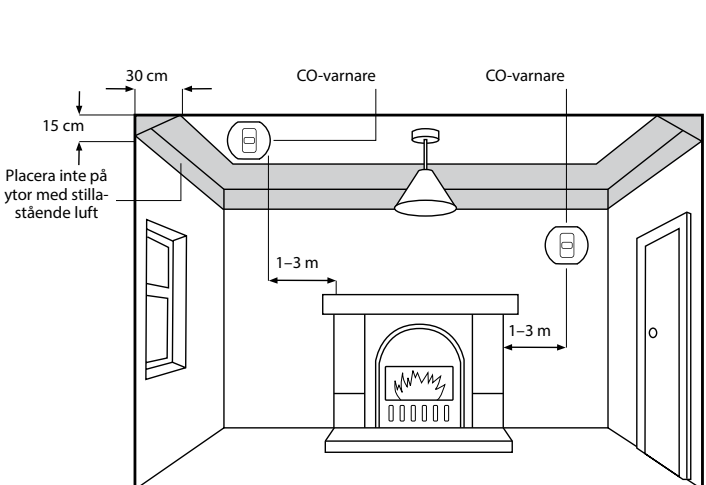

## Testa anslutningen

- 1 Vänta i 15 s. Tryck och håll in test/pausknappen tills larmet ljuder. CO-varnaren skickar då en radiosignal till Visitmottagaren.
- 2 Den röda och den orange Visitlampan på mottagaren tänds växelvis för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

**Notera:** När du släpper testknappen tystnar CO-varnaren och Visitmottagaren slutar signalera inom 1 minut.

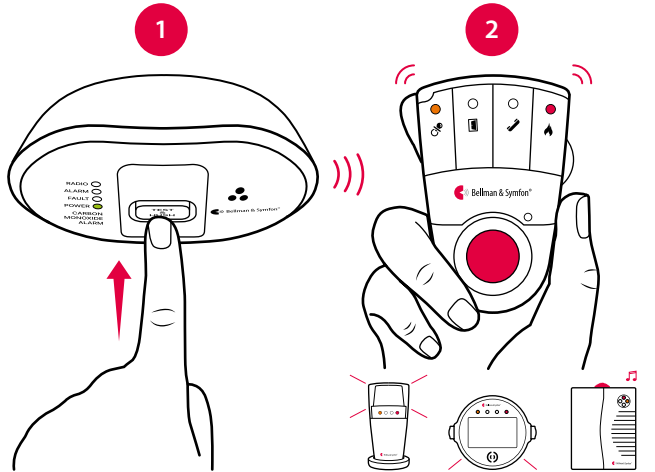

# Visit kolmonoxidvarnare (CO)



## Signalmönster

När larmet upptäcker över 43 ppm kolmonoxid, börjar den röda statuslampan blinka enligt tabellen nedan. Larmet kan aktiveras av till exempel matlagning på gasspis eller grill, bilmotorer, cigarettrök och aerosoler. Var uppmärksam på om larmet fortsätter ljuda och källan till kolmonoxidutsläppet är okänd. Signalmönstret varierar beroende på larmets orsak enligt tabellen nedan:

| Kolmonoxidnivå / fel | Statuslampa              | Alarmsignal          | Visitmottagare       |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| ▪ > 43 ppm           | Blinkar rött varannan s. | På inom 60 – 90 min. | På inom 60 – 90 min. |
| ▪ > 80 ppm           | 2×röd blink varannan s.  | På inom 10 – 40 min. | På inom 10 – 40 min. |
| ▪ >150 ppm           | 4×röd blink varannan s.  | På inom 2 minuter    | På inom 2 minuter    |
| ▪ Svagt batteri      | Blinkar gult varje minut | 1 pip varje minut    | Blinkar rött         |
| ▪ Fel på enheten     | 2×gul blink varje minut  | 2 pip varje minut    | —                    |
| ▪ Utgången enhet     | 3×gul blink varje minut  | 3 pip varje minut    | —                    |

**Notera:** När BE1555 för första gången varnar för låg batterinivå, har du ca 30 dagar att byta ut enheten. Du kan trycka på test / pausknappen för att tillfälligt stänga av larmsignalen för svagt batteri under 24 timmar.

## Aktivera broadcastläge

Om du vill att brandlarmet skall skickas vidare till **alla** mottagare inom radoräckvidd kan du aktivera broadcastläge. Det fungerar oavsett vilken radionyckel enheterna är inställda på.

- För att aktivera broadcastläge, ta först ner CO-varnaren från monteringsplattan för att komma åt radioknappen, se **Knappar och anslutningar**. Tryck sedan på radioknappen tre gånger i snabb följd. Den blå statuslampan blinkar tre gånger för att visa att broadcastläget är aktiverat.

## Pausfunktion

- Du kan tillfälligt stänga av alarmsignalen på din CO-varnare genom att trycka på test/pausknappen. Statuslampan fortsätter att blinka rött när pausläget är aktiverat och larmet ljuder igen efter ca 4 minuter. CO-varnaren kan endast tystas en gång under ett larm. Vid kolmonoxidnivåer över 150 ppm kan pausfunktionen inte aktiveras.

## Test och underhåll

Testa CO-varnaren och Visitanlutningen regelbundet, minst en gång per månad. Genomför alltid en test efter semester eller en längre tids frånvaro. Rengör endast med en fuktig trasa. Undvik luftrenare, hårspray, färg eller andra aerosoler nära CO-varnaren. Måla aldrig över CO-varnaren.

## Felsökning

| Om                                                                                        | Gör så här                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CO-varnaren aktiveras utan någon anledning                                                | ▪ Följ anvisningarna under sektionen <b>Vad gör jag när larmet ljuder?</b> i CO-varnarens bruksanvisning.                                                                                                                |
| Visitmottagaren aktiveras utan någon anledning                                            | ▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b> .                                                                       |
| Inget händer när jag trycker på CO-varnarens test/pausknapp                               | ▪ Kontrollera att CO-varnaren sitter säkert fast i monteringsplattan. Vänta 15 s innan du trycker på test/pausknappen igen.<br>▪ Kontrollera CO-varnarens utgångsdatum på etiketten under "Replace by"                   |
| CO-varnaren ljuder när jag trycker på test/pausknappen men Visitmottagaren aktiveras inte | ▪ Kontrollera mottagarens ström och batteri.<br>▪ Flytta mottagaren närmare CO-varnaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.<br>▪ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b> . |

## Byta radionyckel


Om ditt system aktiveras utan anledning så kan det finnas ett närliggande Visitsystem som stör. Du bör då byta radionyckel på alla enheter. Förfarandet beror på vilken typ av sändare du har.

### System med olika typer av sändare

Börja med att byta radionyckel på alla **övriga** sändare i systemet genom att flytta valfri radioomkopplare, se respektive sändares bruksanvisning. **Notera:** Alla sändare måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

#### Steg 1: Byt radionyckel på BE1555 CO-varnare

- 1 Ta först loss CO-varnaren från monteringsplattan för att komma åt radioknappen, se **Knappar och anslutningar**. Tryck sedan och håll nere radioknappen tills radiolampan blinkar långsamt i blått. Släpp knappen.
- 2 Tryck på testknappen på en **annan** sändare inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln.
- 3 Radiolampan på CO-varnaren lyser med ett fast blått sken för att visa att radionyckeln har mottagits.

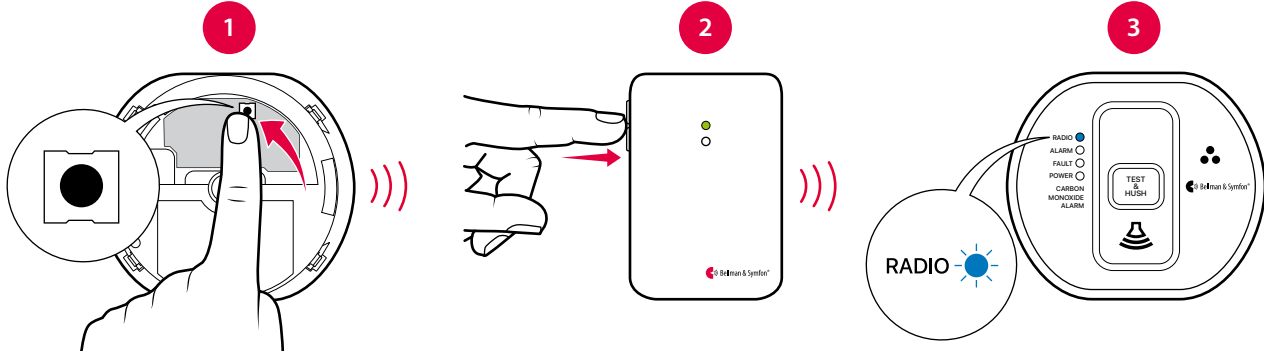

### System med enbart Visit CO-varnare


#### Steg 1: Byt radionyckel på BE1555 CO-varnare

Välj ut en BE1555 CO-varnare som kommer att fungera som **huvudenhet**. Den andra BE1555 CO-varnaren kommer då att fungera som **slavenhet**. Öppna locket på bägge enheter för att komma åt radioknappen, se **Knappar och anslutningar**.

- 1 Tryck och håll nere radioknappen på **huvudenheten** tills radiolampan blinkar långsamt i blått. Tryck och håll nere knappen igen för att generera en ny radionyckel. Radiolampan ändrar blinkmönster för att bekräfta bytet.
- 2 Tryck och håll nere radioknappen på **slavenheten** tills radiolampan blinkar långsamt i blått.
- 3 Tryck och håll nere testknappen på **huvudenheten** inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln. Den börjar då larma.
- 4 Radiolampan på **slavenheten** lyser med ett fast blått sken för att visa att radionyckeln har mottagits. Repetera steg 2 - 4 för att byta radionyckel på nästa BE1555 CO-varnare.

#### Steg 2: Byt radionyckel på Visitmottagaren

- 1 Tryck och håll in testknappen på Visitmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 2 Tryck på test/pausknappen inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 3 Alla Visitlampor på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har mottagits.

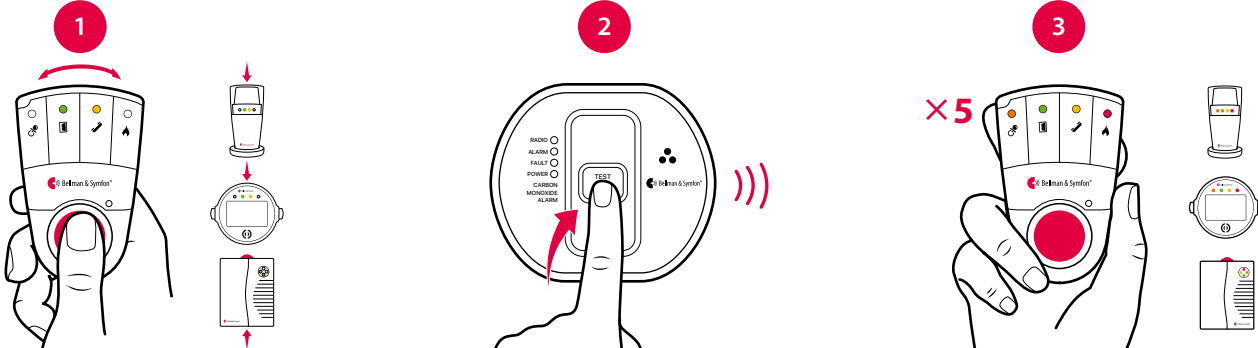




# Visit blyxtmottagare



BE1441 | BE1442

## Knappar och reglage

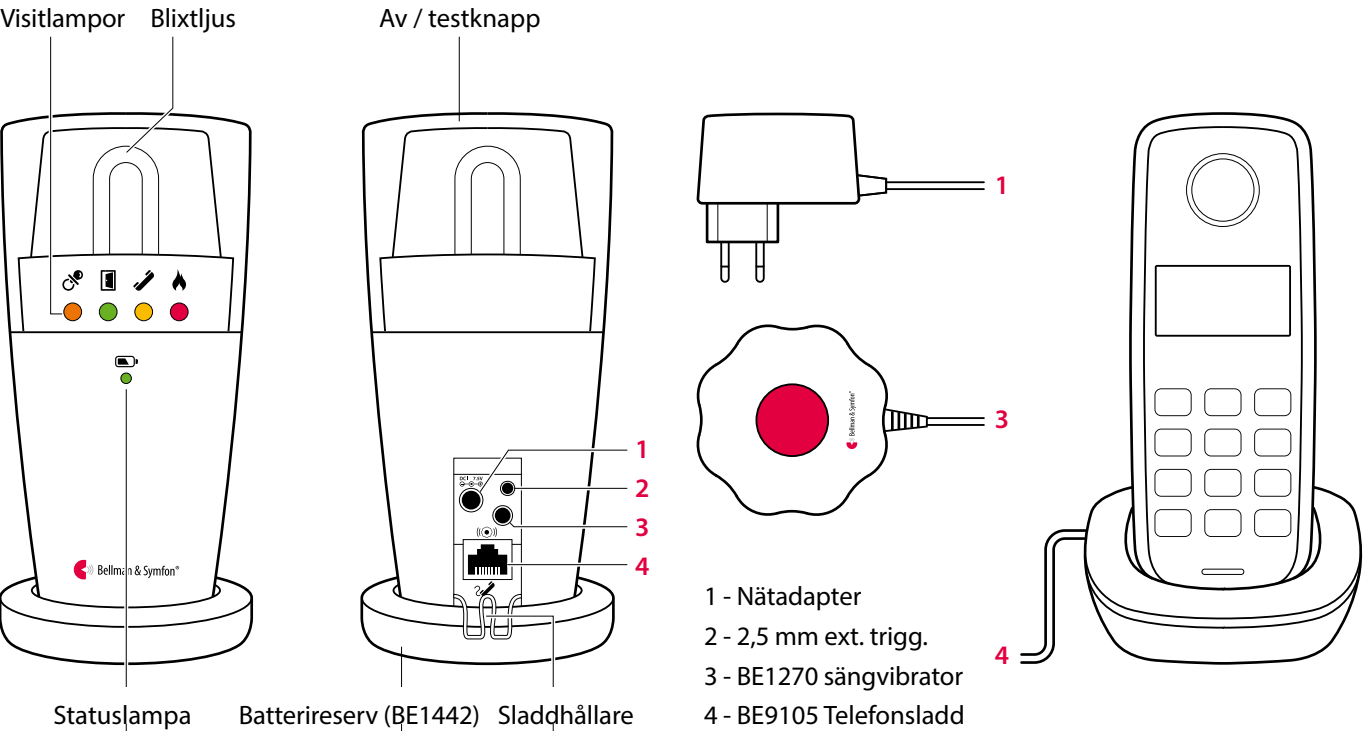

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1441 Blyxtmottagare
- BE1442 Blyxtmottagare m. batterireserv
- Nätadapter
- 4 x 1,2 V AAA NiMH-batterier (Endast BE1442)

### Storlek och vikt

- Höjd BE1441: 140 mm  
BE1442: 155 mm
- Diameter BE1441: 70 mm  
BE1442: 78 mm
- Vikt 308 g

### Tillbehör

- BE9075 Väggfäste
- BE1270 Sängvibrator
- BE9105 Telefonsladd

### Ström och batteri

- Strömförsörjning: 7,5 V DC / 1500 mA  
Extern nätadapter
- Strömförbrukning: Aktiv: 900 mA  
viloläge: 10 mA
- Batterireserv (endast BE1442)  
4 x 1,2 V AAA NiMH  
uppladdningsbara batterier
- Drifttid, batterireserv  
~ 48 h vid fullt laddat batteri

### Visitlampor

- Visitlamporna indikerar normalt följande:
- Orange lampa, nappsymbol  
Babyvakten är aktiverad
- Grön lampa, dörrsymbol  
Dörrsändaren är aktiverad
- Gul lampa, telefonsymbol  
Telefonsändaren är aktiverad

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens  
868,3 MHz
- Räckvidd:  
50 - 250 m beroende på  
byggnadens egenskaper och  
kombinationen av sändare  
och mottagare.

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk.  
Arbetstemperatur -10° till 40° C
- Relativ luftfuktighet  
15% till 95%, icke-kondenserande

- Röd lampa, brandsymbol  
Brandvarnaren är aktiverad
- Orange och röd LED blinkar växelvis  
CO-larmet är aktiverat.

### Blyxtsignal


- Inbyggd ~ 30 Candela Xenon-blyxt



**Varning!**  
Blyxtljus kan orsaka epilepsianfall

## Komma igång

- Anslut nätadaptern till mottagaren och väggutaget. Dra bort batterifliken på undersidan av mottagaren (endast BE1442). Ställ den på ett plant underlag eller sätt upp den på väggen (BE9075 väggfäste krävs).
- För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.
- En Visitlampa tänds på mottagaren och den börjar blixtra. Om en sängvibrator är ansluten börjar den vibrera. Tryck på testknappen om du vill se den senaste händelsen. Om mottagaren inte reagerar, se **Felsökning**.

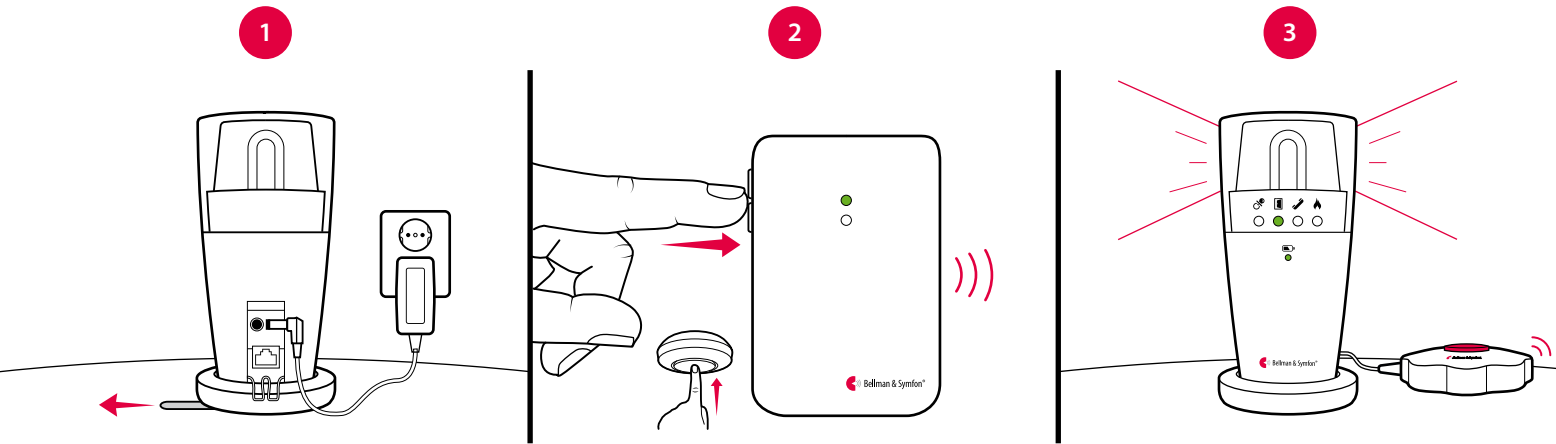

## Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras börjar mottagaren blixtra och sängvibratören att vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

| Sändare                           | Blyxtmottagare |       | Sängvibrator |
|-----------------------------------|----------------|-------|--------------|
| Aktiverad källa                   | Visitlampa     | Blyxt | Vibration    |
| Dörrsändare / tryckknappssändare  | Grön           | Ja    | Långsam ■■■■ |
| Telefonsändare / ansluten telefon | Gul            | Ja    | Mellan ■■■■  |
| Babyvakt                          | Orange         | Ja    | Snabb ■■■■   |
| Brandvarnare                      | Röd            | Ja    | Lång ■■■■    |
| Kolmonoxidvarnare                 | Orange och röd | Ja    | Lång ■■■■    |

## Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

## Statuslampa för ström och batteri

När blyxtmottagaren är nätansluten lyser statuslampan i grönt. Modell BE1442 är utrustad med batterireserv och statuslampan betyder följande:

### Statuslampa

- Fast grönt ljus
- Blinkar grönt
- Fast rött ljus
- Blinkar rött

### Status

Blyxtmottagaren är nätansluten och reservbatterierna fungerar.  
Blyxtmottagaren är nätansluten men reservbatterierna fungerar ej.  
Blyxtmottagaren går på reservbatteri.  
Reservbatterierna är nästan urladdade.

# Visit blixtmottagare



BE1441 | BE1442



## Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplare sitter på **sändarna**.

### Så här byter du radionyckel:

- 1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
- 2 Tryck och håll nere testknappen på ovansidan av mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.


**Notera:** Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

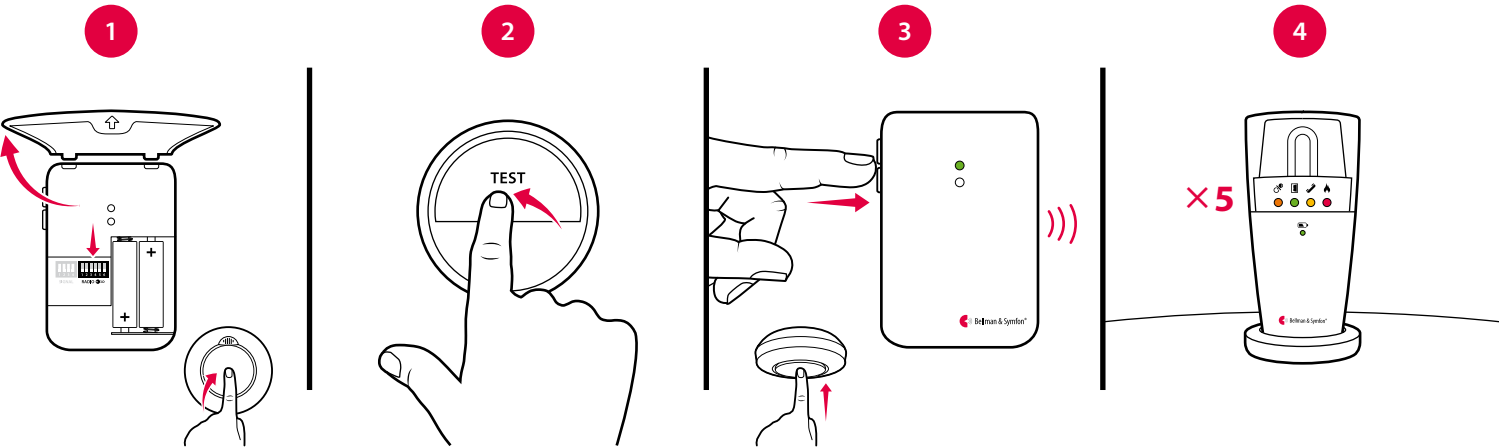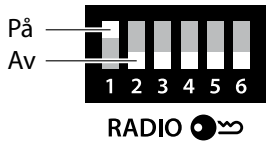

## Tillbehör

Blixtmottagaren kan kompletteras med följande tillbehör:

- **BE1270 Sängvibrator**  
Väcker dig med vibrationer under kudden eller madrassen.
- **BE9105 Telefonsladd**  
Använd den för att ansluta din fasta telefon till mottagaren så blixtrar den när telefonen ringer.
- **BE9075 Väggfäste**

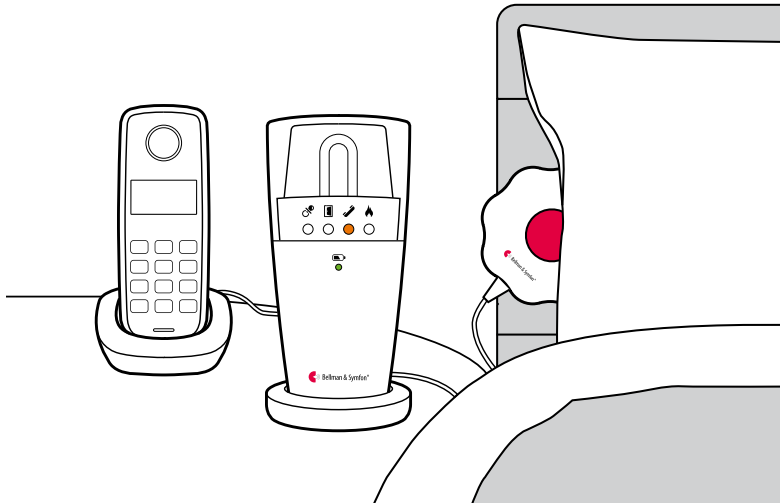

## Rikta blyxtljuset

Blixtmottagaren har en roterbar överdel som gör det enkelt att rikta ljuset. Om du t.ex tycker att ljuset är för starkt kan du rikta det mot en vägg. Det finns även ljusdämpande silikonöverdrag i ett flertal färger (art.nr. BE9164 – BE9167).

## Avancerad programmering

Med avancerad programmering kan du styra mottagarens ljudsignal och vibrationsmönster för en specifik sändare och händelse. Då paras enheterna via sitt serienummer istället för radionyckeln. Notera att beteende för brandlarm och kolmonoxidvarnare inte kan ändras av säkerhetsskäl.

**Notera:** Sändaren måste aktiveras på det sätt den är tänkt att användas. Detta innebär att du inte alltid kan aktivera den med testknappen (se **Förinställt signalmönster** för respektive sändare).

### Så här programmerar du blixtmottagaren:

- 1 Tryck och håll nere testknappen på mottagaren. Den gröna och gula Visitlampan börjar blinka växelvis. Fortsätt att hålla knappen nedtryckt samtidigt som du aktiverar den aktuella sändaren. Släpp testknappen.
- 2 Bläddra mellan de olika **Visitlamporna** genom att trycka på testknappen på mottagaren. Välj den du vill ha genom att hålla nere testknappen tills mottagarens statuslampa släcks och tänds igen.
- 3 Bläddra mellan de olika **vibrationsmönstren** genom att trycka på testknappen (sängvibrator krävs). Välj den du vill ha genom att hålla nere testknappen tills statuslampan släcks och tänds igen.
- 4 Mottagaren kommer nu att visa den valda Visitlampan och vibrationsmönstret. Tryck på testknappen för att avsluta demonstrationen. Därefter återgår den till normalläge.

## Radera avancerad programmering

Följ stegen nedan för att radera den avancerade programmeringen:

- 1 Tryck och håll nere testknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 2 Tryck på testknappen 3 gånger i följd.
- 3 Alla Visitlampor tänds i 2 sekunder för att visa att programmeringen är raderad.

## Felsökning


De flesta problem med blixtmottagaren kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:

| Om                                                                                           | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mottagaren verkar vara avstängd                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten.</li><li>▪ Ladda reservbatterierna i minst 24 timmar (endast BE1442).</li></ul>                                                                                                                                                       |
| Statuslampan blinkar rött                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nätadaptern är inte ansluten och reservbatterierna är nästan urladdade. Anslut nätadaptern och ladda reservbatterierna i minst 24 timmar.</li></ul>                                                                                                                                   |
| Statuslampan blinkar grönt                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mottagaren detekterar inga reservbatterier. Dra bort batterifliken, se <b>Komma igång</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| Mottagaren reagerar inte när en sändare aktiveras, men fungerar när jag använder testknappen | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar.</li><li>▪ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.</li><li>▪ Kontrollera att mottagaren har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul> |
| Mottagaren aktiveras utan någon anledning                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>                                                                                                                             |
| Blyxtljuset är för starkt                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rikta ljuset mot en vägg eller använd ett ljusdämpande silikonöverdrag.</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |



# Visit portabel mottagare

## Knappar och reglage

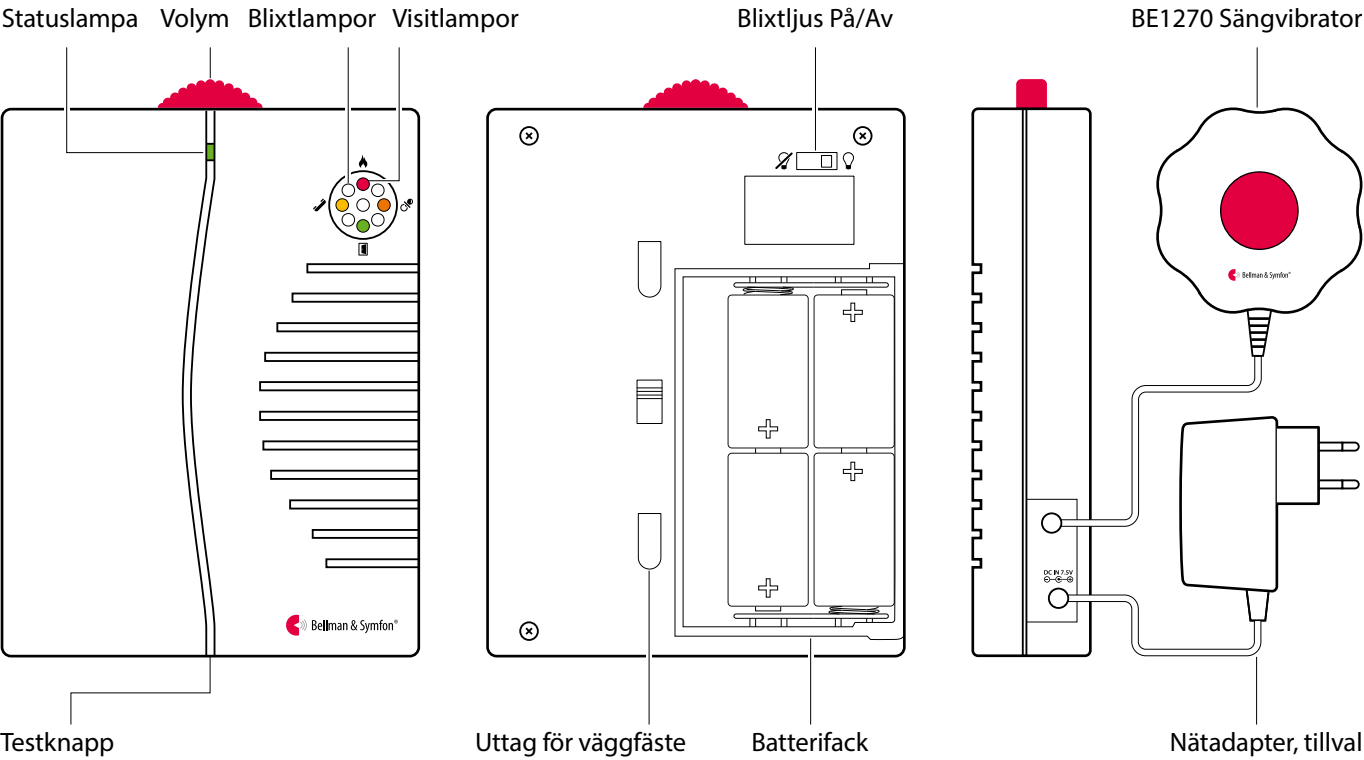

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1450 Portabel mottagare
- 4×1,5V LR14 batterier
- Väggfäste
- Skruv och plugg

### Ström och batteri

- Strömförsörjning: 7,5 V DC / 1500 mA  
Nätadapter finns som tillval, Artikelnummer: BE9201
- Batterityp: 4×1,5 V LR14 alkaliska batterier
- Drifttid:  
Aktiv: 1000 mA, viloläge: 0,1 mA
- Strömförbrukning: 2 – 3 år med alkaliska batterier

### Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator
- Bellman & Symfon nätadapter

### Storlek och vikt

- Höjd: 165 mm
- Bredd: 130 mm
- Djup: 36 mm
- Vikt: 590 g, inkl. batterier

### Visitlampor

- Visitlamporna indikerar normalt följande:
- Orange lampa, nappsymbol  
Babyvakten är aktiverad
  - Grön lampa, dörrsymbol  
Dörrsändaren är aktiverad
  - Gul lampa, telefonsymbol  
Telefonsändaren är aktiverad
  - Röd lampa, brandsymbol  
Brandvarnaren är aktiverad
  - Orange och röd LED blinkar växelvis  
CO-larmet är aktiverat.

### Utsignaler

- Justerbar ljudsignal  
Max 93 dBA @ 1 m  
Frekvensomfång: 500 – 1000 Hz
- Uttag för sängvibrator: 2,0 – 4,0 VDC

### Frekvens och räckvidd


- Radiofrekvens  
868,3 MHz
- Räckvidd  
50 - 250 m beroende på byggnadens egenskaper och kombinationen av sändare och mottagare.

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk.
- Arbetstemperatur 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet  
15% till 95%, icke-kondenserande

## Komma igång

- Öppna batteriluckan, sätt i batterierna och stäng luckan igen. Ställ mottagaren på ett plant underlag eller montera den på väggen med väggfästet.
- För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.
- En Visitlampa tänds på mottagaren och den börjar blixtra och ljuda. Om en sängvibrator är ansluten börjar den vibrera. Tryck på testknappen om du vill se den senaste händelsen. Om mottagaren inte reagerar, se **Felsökning**.

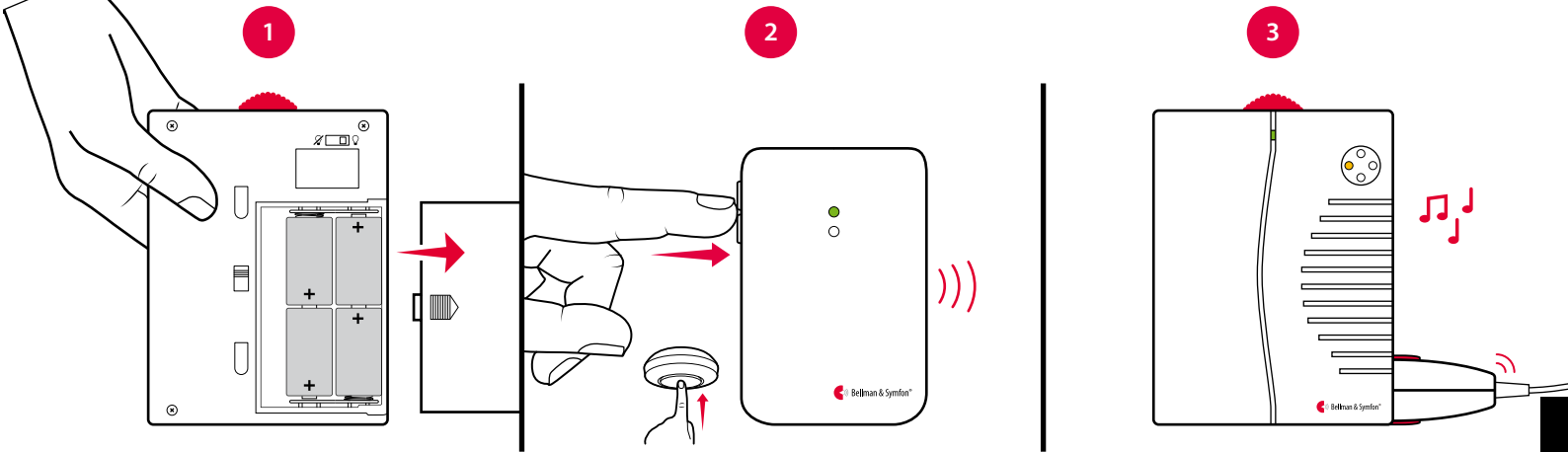

## Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras börjar mottagaren blixtra och ljuda och sängvibratören vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

| Sändare                          | Portabel mottagare |            |       | Sängvibrator |
|----------------------------------|--------------------|------------|-------|--------------|
| Aktiverad källa                  | Visitlampa         | Ljud       | Blixt | Vibration    |
| Dörrsändare / tryckknappssändare | Grön               | Dörrklocka | Ja    | Långsam ■■■■ |
| Telefonsändare                   | Gul                | Ringsignal | Ja    | Mellan ■■■■  |
| Babyvakt                         | Orange             | Babymelodi | Ja    | Snabb ■■■■   |
| Brandvarnare                     | Röd                | Brandlarm  | Ja    | Lång ■■■■    |
| Kolmonoxidvarnare                | Orange och röd     | VMA-signal | Ja    | Lång ■■■■    |

## Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

## Justera volym och blixtljus

Justera volymen med det röda vredet på ovansidan av mottagaren. Den kan justeras från 0 till 93 dBA @ 1 m och frekvensomfånget är 500 – 1000 Hz. Använd På/Av-knappen på baksidan av mottagaren för att sätta på eller stänga av blixtljuset.

## Byta batterier

Om statuslampan lyser gult när mottagaren aktiveras är batterierna nästan slut. Så här byter du batterier:

- Öppna batteriluckan och ersätt de gamla batterierna med fyra nya 1,5 V LR14 alkaliska batterier, se monteringsanvisning i batterifacket. Stäng luckan igen.

# Visit portabel mottagare





## Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter på **sändarna**.

### Så här byter du radionyckel:

- 1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
- 2 Tryck och håll nere testknappen på undersidan av mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

**Notera:** Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

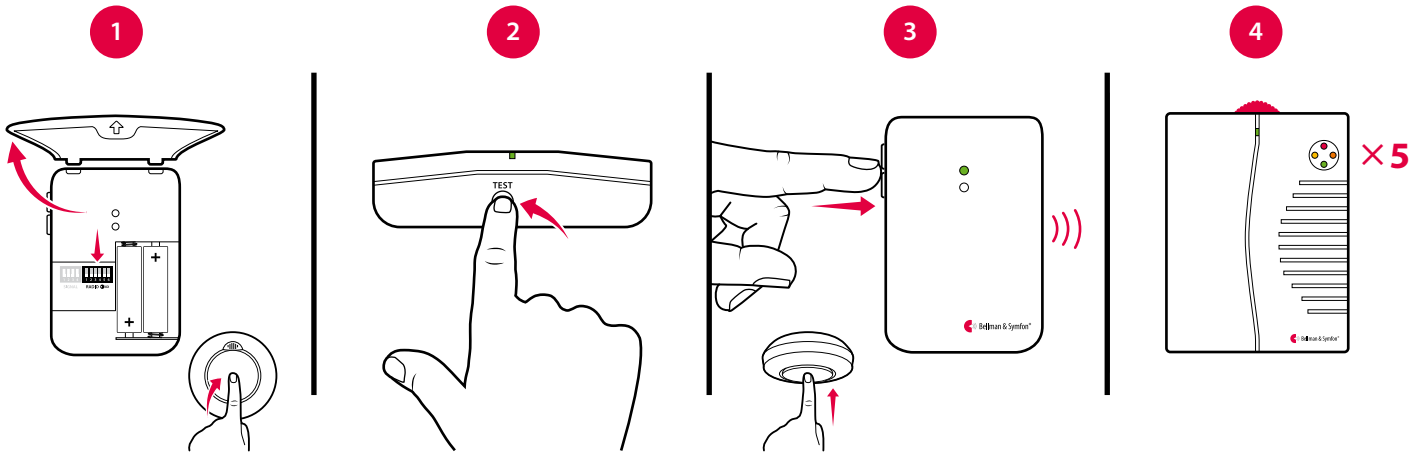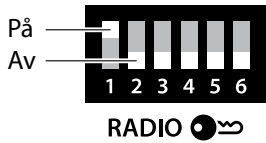

## Tillbehör


Den portabla mottagaren kan kompletteras med följande tillbehör:

### BE1270 Sängvibrator

Väcker dig med vibrationer om något skulle hända medan du sover. Anslut den till mottagaren och lägg den under huvudkudden eller madrassen.

### Bellman & Symfon nätadapter

Om din mottagare har en fast plats i hemmet kan du nätsluta den istället för att behöva använda batterier.

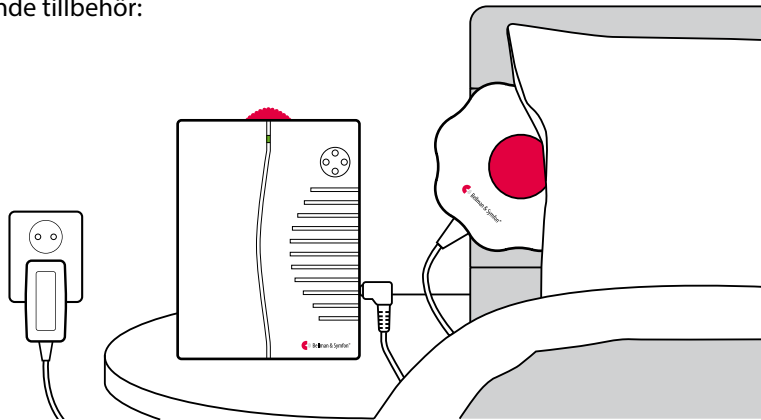

## Avancerad programmering

Med avancerad programmering kan du styra mottagarens ljudsignal och vibrationsmönster för en specifik sändare och händelse. Då paras enheterna via sitt serienummer istället för radionyckeln. Notera att beteende för brandlarm inte kan ändras av säkerhetsskäl.

**Notera:** Sändaren måste aktiveras på det sätt den är tänkt att användas. Detta innebär att du inte alltid kan aktivera den med testknappen (se **Förinställt signalmönster** för respektive sändare).

### Så här programmerar du den portabla mottagaren:

- 1 Tryck och håll nere testknappen på mottagarens undersida. Den gröna och gula Visitlampan börjar blinka växelvis. Fortsätt att hålla knappen nedtryckt samtidigt som du aktiverar den aktuella sändaren. Statuslampan på mottagaren tänds i gult för att visa att du är i programmeringsläge. Släpp testknappen.
- 2 Bläddra mellan de olika **Visitlamporna** genom att trycka på testknappen på mottagaren. Välj den du vill ha genom att hålla nere testknappen tills mottagarens statuslampa släcks och tänds igen.
- 3 Bläddra mellan de olika **ljudsignalerna** genom att trycka på testknappen. Välj den du vill ha genom att hålla nere testknappen tills statuslampan släcks och tänds igen.
- 4 Bläddra mellan de olika **vibrationsmönstren** genom att trycka på testknappen (sängvibrator krävs). Välj den du vill ha genom att hålla nere testknappen tills statuslampan släcks och tänds igen.
- 5 Mottagaren kommer nu att visa den valda Visitlampan, ljudsignalen och vibrationsmönstret. Tryck på testknappen för att avsluta demonstrationen. Därefter återgår den till normalläge.

## Radera avancerad programmering

Följ stegen nedan för att radera den avancerade programmeringen:

- 1 Tryck och håll nere testknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 2 Tryck på testknappen 3 gånger i följd.
- 3 Alla Visitlampor tänds i 2 sekunder för att visa att programmeringen är raderad.

## Felsökning


| Om                                                                                           | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mottagaren verkar vara avstängd                                                              | ▪ Batterierna är slut. Ersätt dem med 4×1,5V LR14 alkaliska batterier.                                                                                                                                                                                               |
| Statuslampan lyser gult när mottagaren aktiveras                                             | ▪ Batterinivån är låg. Ersätt dem med 4×1,5V LR14 alkaliska batterier.                                                                                                                                                                                               |
| Mottagaren reagerar inte när en sändare aktiveras, men fungerar när jag använder testknappen | ▪ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar.<br>▪ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.<br>▪ Kontrollera att mottagaren har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se <b>Byta radionyckel</b> . |
| Mottagaren aktiveras utan någon anledning                                                    | ▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b> .                                                                                                                   |
| Ljudet är för lågt                                                                           | ▪ Höj volymen med det röda vredet på mottagarens ovansida.                                                                                                                                                                                                           |
| Mottagaren blixtrar inte                                                                     | ▪ Kontrollera att knappen för blixtljus på baksidan av mottagaren är påslagen.                                                                                                                                                                                       |



# Visit pager



## Knappar och reglage

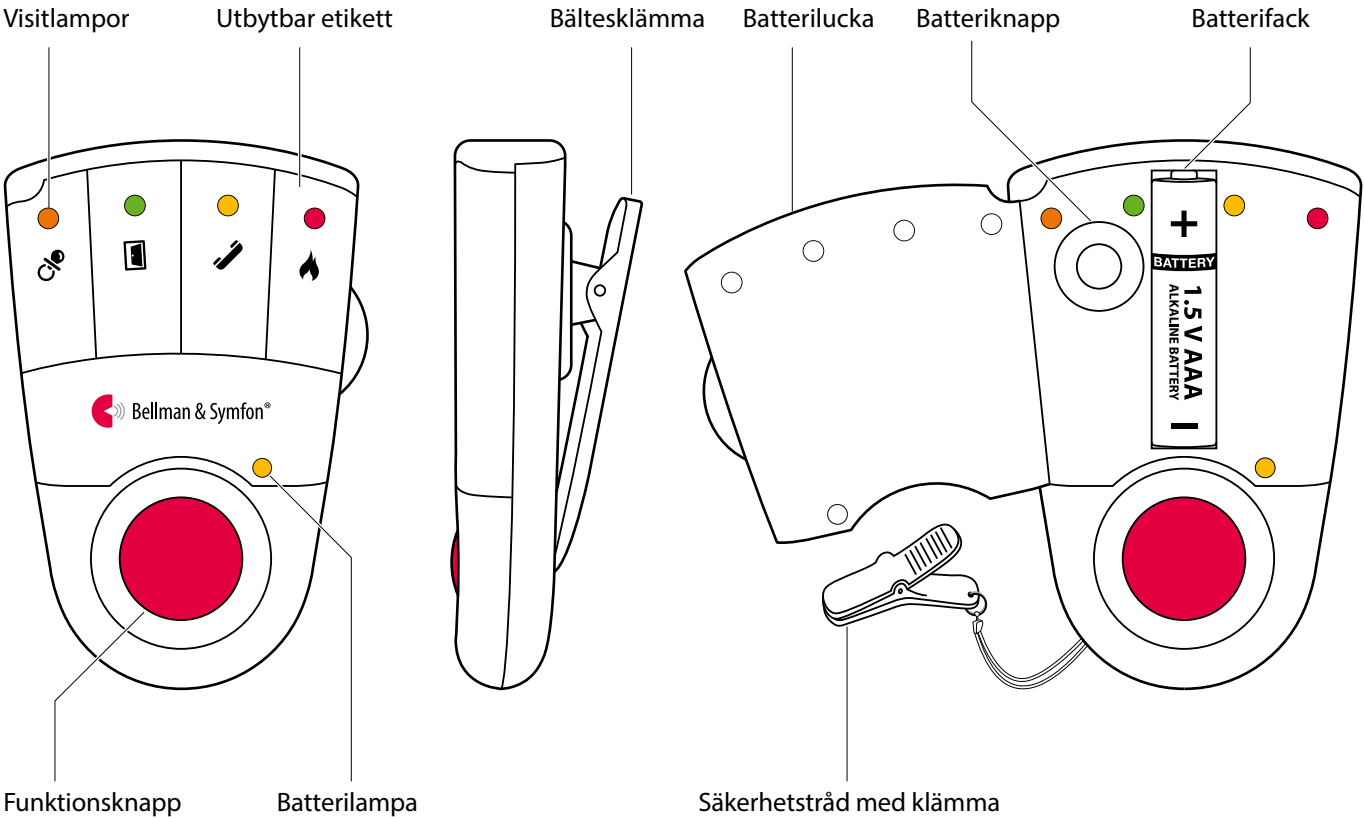

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1470 Visit pager
- Säkerhetstråd med klämma
- Extra etikett

### Ström och batteri

- Strömförsörjning  
7,5 V DC 1500 mA via pagerladdaren
- Batterityp  
1 × 1,5 V AAA alkaliskt batteri eller  
1 × 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbart
- Batterilivslängd  
Alkaliskt batteri: 2 – 3 veckor  
NiMH batteri: ~1 vecka
- Strömförbrukning  
Aktiv: 220 mA, Viloläge: ≤ 1 mA

### Storlek och vikt

- Höjd: 86 mm
- Bredd: 57 mm
- Djup: 29 mm
- Vikt: 70 g, inkl. batteri

### Visitlampor

- Visitlamporna indikerar normalt följande:
- Orange lampa, nappsymbol  
Babyvakten är aktiverad
  - Grön lampa, dörrsymbol  
Dörrsändaren är aktiverad
  - Gul lampa, telefonsymbol  
Telefonsändaren är aktiverad
  - Röd lampa, brandsymbol  
Brandvarnaren är aktiverad
  - Orange och röd LED blinkar växelvis  
CO-larmet är aktiverat.

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet  
15% till 90%, icke-kondenserande

### Frekvens och räckvidd


- Radiofrekvens  
868,3 MHz
- Räckvidd  
50 - 250 m beroende på  
byggnadens egenskaper och  
kombinationen av sändare  
och mottagare.

### Tillbehör

- BE1260 Pagerladdare
- BE1270 Sängvibrator

## Komma igång

- Öppna batteriluckan, sätt i batteriet och stäng luckan igen. Sätt fast pagern på bältet med hjälp av bältesklämmen. För extra säkerhet kan du fästa pagern med medföljande tråd och klämma.
- För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.
- En Visitlampa tänds på pagern och den börjar vibrera. Om en sängvibrator är ansluten medan pagern laddas, börjar den vibrera istället. Om pagern inte reagerar, se **Felsökning**.

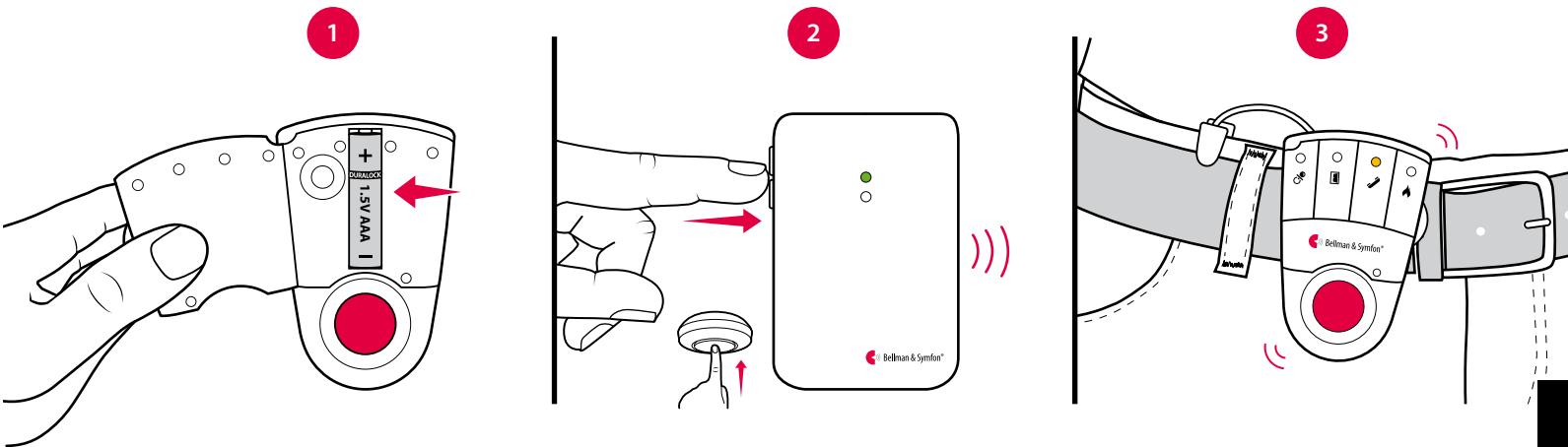

## Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras tänds en Visitlampa på pagern och den börjar vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

### Aktiverad sändare

- Dörrsändare
- Tryckknappssändare
- Telefonsändare
- Babyvakt
- Brandvarnare
- Kolmonoxidvarnare

### Visitlampa, pager

- Grön
- Grön
- Gul
- Orange
- Röd
- Orange och röd

### Vibration, pager eller sängvibrator

- Långsam ■□□□
- Långsam ■□□□
- Mellan ■□■□
- Snabb ■■■■■■
- Lång ■■■■□
- Lång ■■■■□

## Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

## Byta etikett

Om du vill använda Visit för ett annat syfte så kan du själv skriva på den bifogade extraetiketten. Så här byter du etikett:

- Öppna batteriluckan och ersätt originaletiketten med den bifogade extraetiketten. Stäng luckan igen.

## Byta batteri

När batterilampan börjar blinka gult är batteriet nästan slut. Så här byter du batteri:

- Öppna batteriluckan och tryck på batteriknappen för få ut batteriet. Sätt i ett 1,5 V AAA alkaliskt batteri, eller ett 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbart batteri om du använder pagerladdaren (tillbehör).

# Visit pager





## Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter på **sändarna**.

### Så här byter du radionyckel:

- 1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
- 2 Tryck och håll nere funktionsknappen på pagern tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visitlamporna på pagern blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

**Notera:** Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

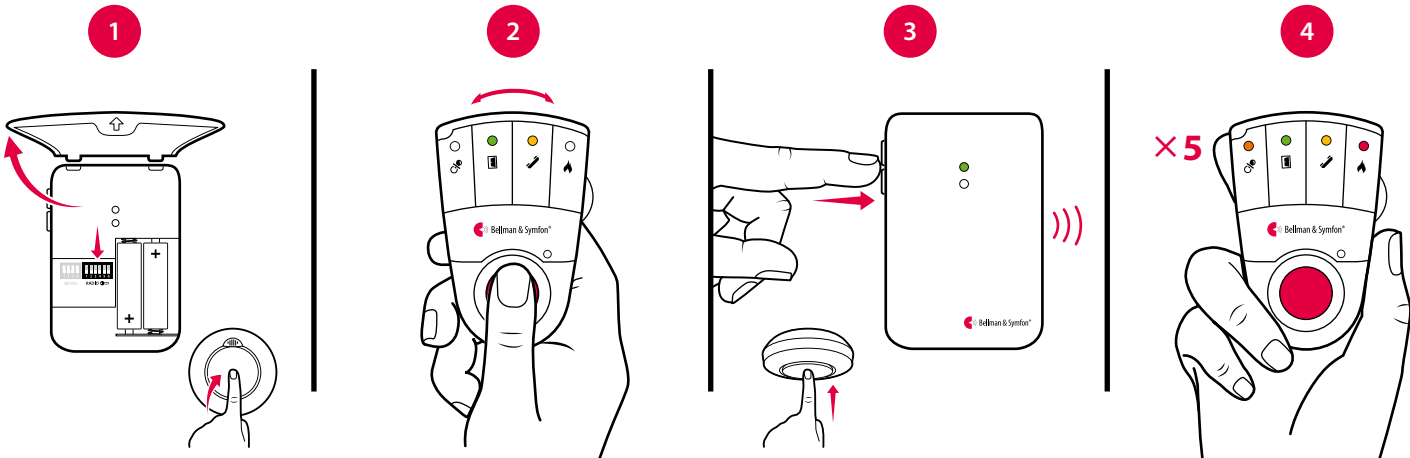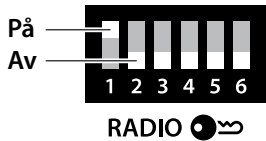

## Pagertillbehör

Pagern kan kompletteras med följande tillbehör:


### ■ BE1260 Pagerladdare

Laddar din pager under natten. Placera den på sängbordet och anslut upp till två sängvibratorer.

**Notera:** Pagern vibrerar inte när den laddas men Visitlamporna fungerar som vanligt.

### ■ BE1270 Sängvibrator

Väcker dig med vibrationer om något skulle hända när du sover. Anslut den till laddaren och lägg den under kudden eller madrassen.

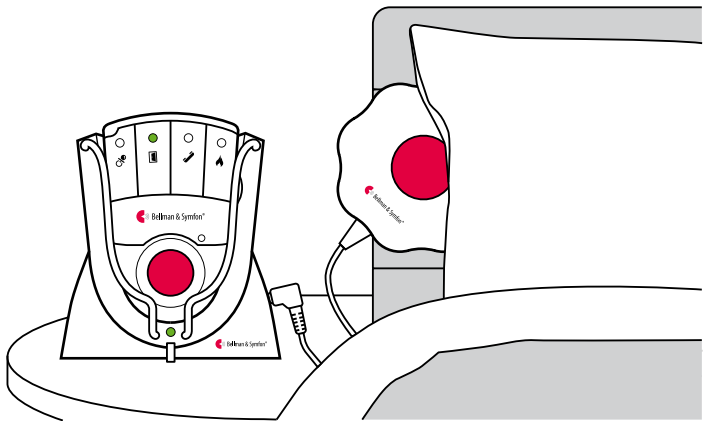

**Varning!** När pagerladdaren används skall **ENDAST UPPLADNINGSBARA NiMH BATTERIER** användas i pagern. Standardbatterier kan börja läcka om de placeras i laddaren och kommer då att förstöra elektroniken. Den typen av skada täcks inte av garantin.

## Avancerad programmering

Med avancerad programmering kan du styra mottagarens ljudsignal och vibrationsmönster för en specifik sändare och händelse. Då paras enheterna via sitt serienummer istället för radionyckeln. Notera att beteende för brandlarm inte kan ändras av säkerhetsskäl.

**Notera:** Sändaren måste aktiveras på det sätt den är tänkt att användas. Detta innebär att du inte alltid kan aktivera den med testknappen (se **Förinställt signalmönster** för respektive sändare).

### Så här programmerar du pagern:

- 1 Tryck och håll nere funktionsknappen på pagern. Den gröna och gula Visitlampan börjar blinka växelvis. Fortsätt att hålla knappen nedtryckt samtidigt som du aktiverar den aktuella sändaren. Batterilampan på pagern tänds i gult för att visa att du är i programmeringsläge. Släpp knappen.
- 2 Bläddra mellan de olika **Visitlamporna** genom att trycka på funktionsknappen på mottagaren. Välj den du vill ha genom att hålla nere knappen tills pagerns batterilampa släcks och tänds igen.
- 3 Bläddra mellan de olika **vibrationsmönstren** genom att trycka på funktionsknappen. Välj den du vill ha genom att hålla nere knappen tills pagerns batterilampa släcks och tänds igen.
- 4 Pagern kommer nu att visa den valda Visitlampan och vibrationsmönstret. Tryck på funktionsknappen för att avsluta demonstrationen. Därefter återgår den till normalläge.

## Radera avancerad programmering

Följ stegen nedan för att radera den avancerade programmeringen:

- 1 Tryck och håll nere funktionsknappen på pagern tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 2 Tryck på funktionsknappen 3 gånger i följd.
- 3 Alla Visitlampor tänds i 2 sekunder för att visa att programmeringen är raderad.

## Felsökning


De flesta problem med pagern kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:

| Om                                            | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagern verkar vara avstängd                   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Batteriet är slut. Ersätt det med ett 1,5 V AAA alkaliskt batteri.</li></ul> <p><b>Viktigt!</b> Använd endast ett uppladdningsbart 1,2 V AAA NiMh batteri i pagern om du har en pagerladdare.</p>                                                                             |
| Batterilampan blinkar gult                    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Batterinivån är låg. Ersätt det med ett 1,5 V AAA alkaliskt batteri.</li></ul> <p><b>Viktigt!</b> Använd endast ett uppladdningsbart 1,2 V AAA NiMh batteri i pagern om du har en pagerladdare.</p>                                                                           |
| Pagern reagerar inte när en sändare aktiveras | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar.</li><li>■ Flytta pagern närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.</li><li>■ Kontrollera att pagern har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul> |
| Pagern aktiveras utan någon anledning         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din pager. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>                                                                                                                         |

# Visit armbandsmottagare



## Knappar och reglage

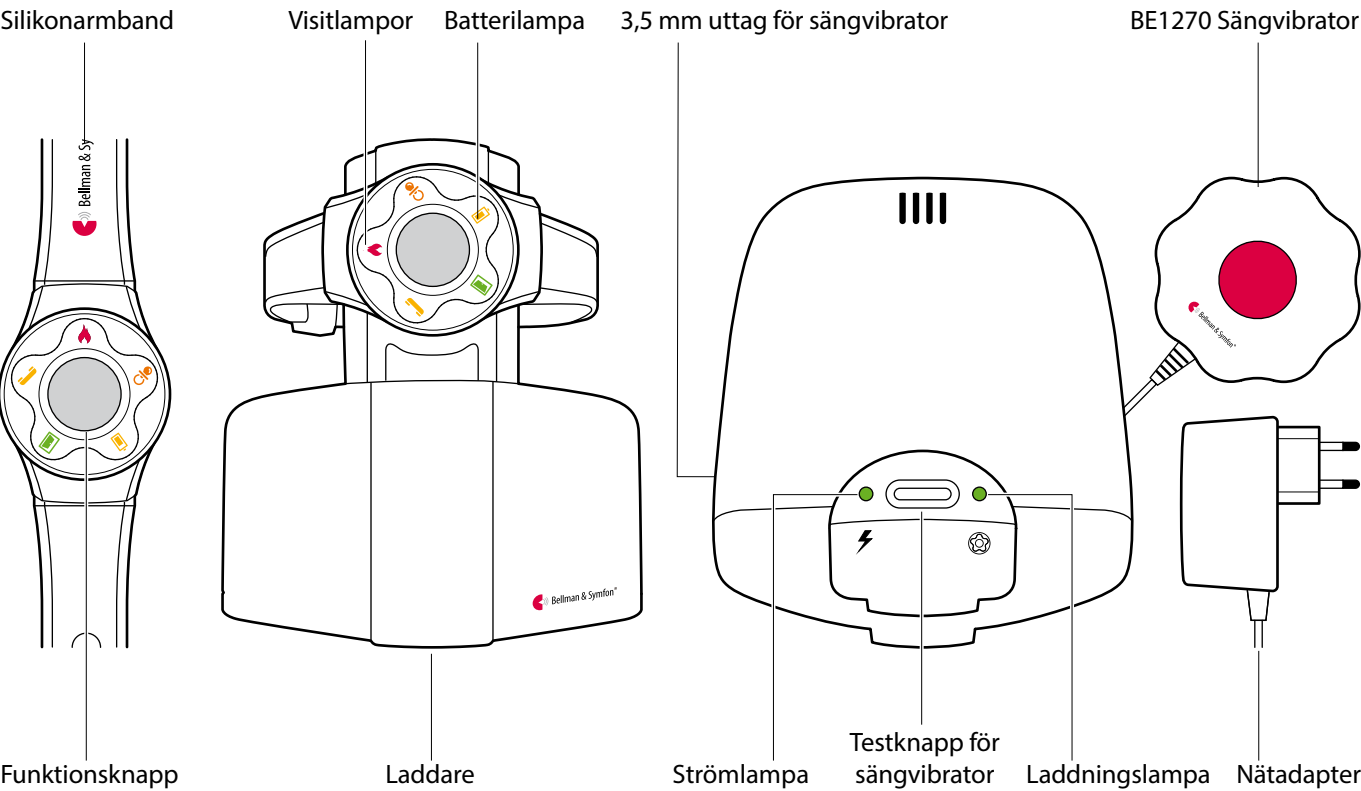

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1560 Visit armbandsmottagare
- BE1570 Laddare
- Extra armband (elastiskt)
- Nätadapter

### Ström och batteri

- Strömförsörjning: 7,5 V DC/1500 mA
- Strömförbrukning  
Mottagare: Aktiv: 100 mA, vila: 3 mA  
Laddare: Aktiv: 650 mA, vila: 70 mA
- Batterityp  
Mottagare: 1x1,2V uppladningsbart  
Laddare: 4x1,2V NiMH uppladningsbara
- Drifttid och laddningstid  
Mottagare: ~30 h  
Laddningstid: ~ 10 h  
Laddningstid för reservbatteri: ~ 24 h

### Storlek och vikt

|       | Mottagare | Laddare |
|-------|-----------|---------|
| Höjd  | 49 mm     | 100 mm  |
| Bredd | 38 mm     | 95 mm   |
| Djup  | 12 mm     | 117 mm  |
| Vikt  | 30 g      | 300 g   |

### Visitlampor

- Visitlamporna indikerar normalt följande:
- Orange lampa, nappsymbol  
Babyvakten är aktiverad
  - Grön lampa, dörrsymbol  
Dörrsändaren är aktiverad
  - Gul lampa, telefonsymbol  
Telefonsändaren är aktiverad
  - Röd lampa, brandsymbol  
Brandvarnaren är aktiverad
  - Orange och röd LED blinkar växelvis  
CO-larmet är aktiverat.

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur  
0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet  
15% till 90%, icke-kondenserande

### Frekvens och räckvidd


- Radiofrekvens  
868,3 MHz
- Räckvidd  
50 - 100 m beroende på byggnadens egenskaper och kombinationen av sändare och mottagare.

### Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator

## Komma igång

- Dra bort batterifliken på laddaren och anslut nätadaptern till vägguttaget. Strömlampan tänds i grönt. Sätt armbandsmottagaren i laddaren och vänta minst 2 timmar innan du använder den. Laddningslampan lyser grönt när den laddar.
- För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.
- En Visitlampa tänds på mottagaren och den börjar vibrera. Om en sängvibrator är ansluten medan mottagaren laddas, börjar den vibrera istället. Om den inte reagerar, se **Felsökning**.

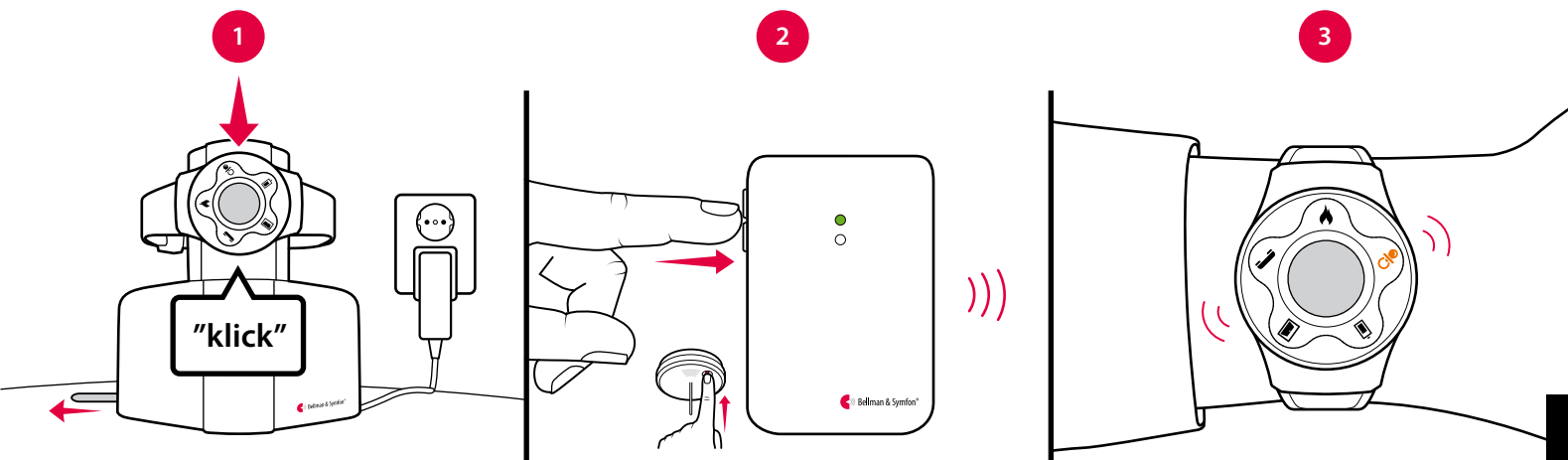

## Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras tänds en Visitlampa på armbandsmottagaren och den börjar vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

### Aktiverad sändare

- Dörrsändare
- Tryckknappssändare
- Telefonsändare
- Babyvakt
- Brandvarnare
- Kolmonoxidvarnare

### Visitlampa, mottagare

- Grön
- Grön
- Gul
- Orange
- Röd
- Orange och röd

### Vibration, mottagare eller sängvibrator

- Långsam
- Långsam
- Mellan
- Snabb
- Lång
- Lång

## Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

## Lampa för ström- och laddningsstatus

När batteriet i armbandsmottagaren nästan är tomt börjar batterilampan blinka gult. Det tar upp till 8 timmar att ladda batteriet. Laddaren har en batterireserv och statuslamporna betyder följande:

### Statuslampa

- Laddningslampa
- Strömlampa
- Strömlampa

### Indikation

- Fast grönt ljus
- Fast grönt ljus
- Blinkar grönt

### Status

- Armbandsmottagarens batteri laddas.
- Laddaren är nät driven.
- Laddaren går på reservbatteri.

# Visit armbandsmottagare





## Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter på **sändarna**.

### Så här byter du radionyckel:

- 1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
- 2 Tryck och håll nere funktionsknappen på armbandsmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

**Notera:** Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

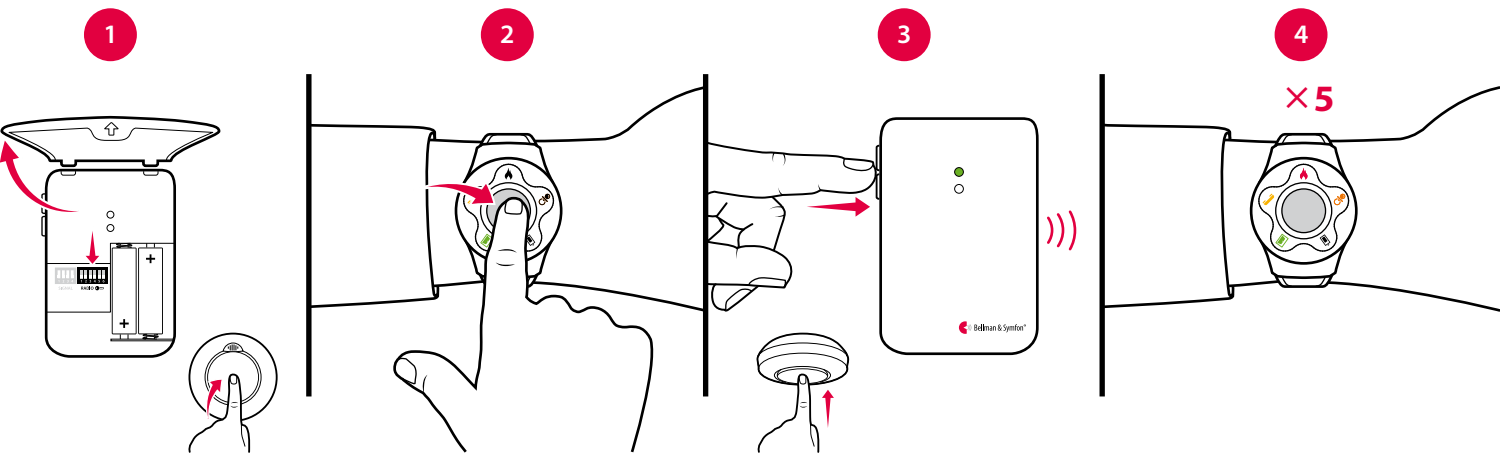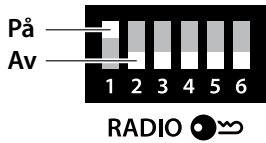

## Tillbehör


Armbandsmottagaren kan kompletteras med följande tillbehör:

### BE1270 Sängvibrator

Väcker dig med vibrationer om något skulle hända när du sover. Anslut den till laddaren och lägg den under kudden eller madrassen.

**Notera:** Sängvibratoren vibrerar endast när mottagaren sitter i laddaren. Armbandsvibratoren vibrerar inte medan den laddas men Visitlamporna lyser som vanligt.

Tryck på testknappen för sängvibratoren på ovansidan av laddaren för att kontrollera att den vibrerar.

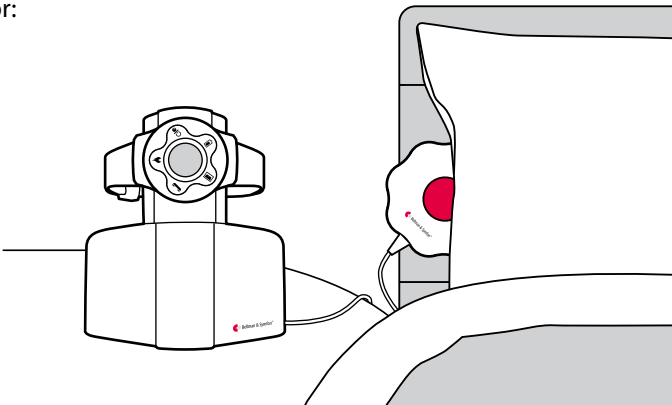

**Varning!** Använd **ENDAST UPPLADNINGSBARA NiMH BATTERIER** i armbandsmottagaren och laddaren. Standardbatterier kan börja läcka om de placeras i enheterna och kommer då att förstöra elektroniken. Den typen av skada täcks inte av garantin.

## Avancerad programmering

Med avancerad programmering kan du styra mottagarens ljudsignal och vibrationsmönster för en specifik sändare och händelse. Då paras enheterna via sitt serienummer istället för radionyckeln. Notera att beteende för brandlarm inte kan ändras av säkerhetsskäl.

**Notera:** Sändaren måste aktiveras på det sätt den är tänkt att användas. Detta innebär att du inte alltid kan aktivera den med testknappen (se **Förinställt signalmönster** för respektive sändare).

### Så här programmerar du armbandsmottagaren:

- 1 Tryck och håll nere funktionsknappen på mottagaren. Den gröna och gula Visitlampan börjar blinka växelvis. Fortsätt att hålla knappen nedtryckt samtidigt som du aktiverar den aktuella sändaren. Batterilampan på mottagaren tänds i gult för att visa att du är i programmeringsläge. Släpp knappen.
- 2 Bläddra mellan de olika **Visitlamporna** genom att trycka på funktionsknappen på mottagaren. Välj den du vill ha genom att hålla nere knappen tills mottagarens batterilampa släcks och tänds igen.
- 3 Bläddra mellan de olika **vibrationsmönstren** genom att trycka på funktionsknappen. Välj den du vill ha genom att hålla nere knappen tills mottagarens batterilampa släcks och tänds igen.
- 4 Armbandsmottagaren kommer nu att visa den valda Visitlampan och vibrationsmönstret. Tryck på funktionsknappen för att avsluta demonstrationen. Därefter återgår den till normalläge.

## Radera avancerad programmering

Följ stegen nedan för att radera den avancerade programmeringen:

- 1 Tryck och håll nere funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 2 Tryck på funktionsknappen 3 gånger i följd.
- 3 Alla Visitlampor tänds i 2 sekunder för att visa att programmeringen är raderad.

## Felsökning

De flesta problem med armbandsmottagaren kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:


| Om                                                        | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mottagaren verkar vara avstängd                           | ▪ Batteriet är slut. Ladda eller ersätt det med ett VARTA V40H NiMH-batteri.                                                                                                                                                                                         |
| Batterilampan blinkar gult                                | ▪ Batterinivån är låg. Ladda eller ersätt det med ett VARTA V40H NiMH-batteri.                                                                                                                                                                                       |
| Armbandsmottagaren laddar inte                            | ▪ Kontrollera att mottagaren är korrekt placerad i laddaren och att nätadaptern är ansluten till vägguttaget. Ström- och laddningslampan skall lysa grönt.<br>▪ Ladda eller ersätt reservbatterierna med 4 x 1,2 V NiMH uppladdningsbara batterier.                  |
| Armbandsmottagaren reagerar inte när en sändare aktiveras | ▪ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar.<br>▪ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.<br>▪ Kontrollera att mottagaren har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se <b>Byta radionyckel</b> . |
| Armbandsmottagaren aktiveras utan någon anledning         | ▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b> .                                                                                                                   |
| Sängvibratoren vibrerar inte                              | ▪ Kontrollera att sängvibratoren är ansluten och att mottagaren är placerad i laddaren.                                                                                                                                                                              |



# Visit väckarklocka



## Knappar och reglage

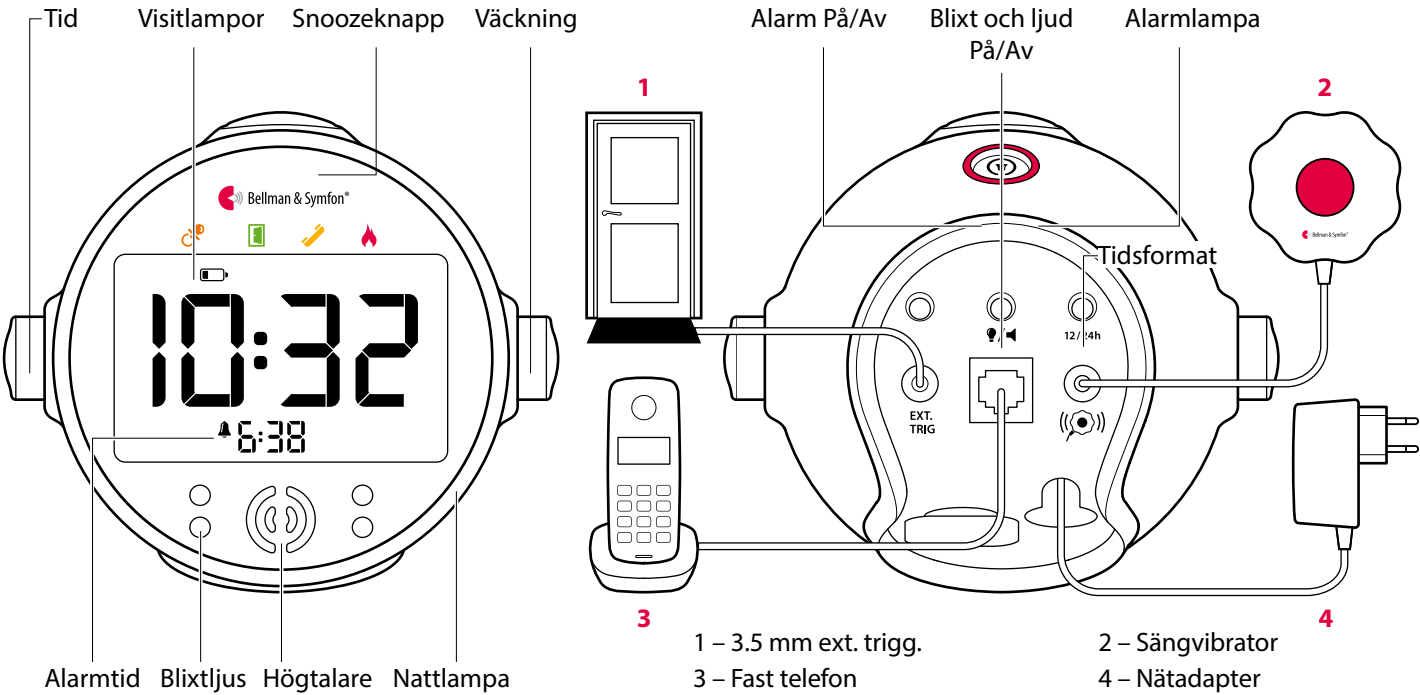

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1580 Visit väckarklocka
- BE1270 Sängvibrator
- Nätadapter
- 4 × 1,2 V AAA NiMH-batterier

### Ström och batteri

- Strömförsörjning: 7,5 V DC / 1,5 A Extern nätadapter
- Batterireserv: 4 × 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbara batterier
- Drifttid, batterireserv: ~ 24 h vid fullt laddat batteri
- Laddningstid, batterireserv: ~ 10 h vid helt urladdat batteri

### Signaler

- Ljudsignal: 100 dB @ 10 cm, 950 Hz – 3 kHz
- Fyra högintensiva LED-blixtar
- Vibratorstyrka: 2,0 – 4,0 VDC

### Storlek och vikt

- Höjd: 108 mm
- Bredd: 121 mm
- Djup: 92 mm
- Vikt: 390 g, inkl. batterier

### Visittlampor

Visittlamporna indikerar normalt följande:

- Orange lampa, nappsymbol Babyvakten är aktiverad
- Grön lampa, dörrsymbol Dörrsändaren är aktiverad
- Gul lampa, telefonsymbol Telefonsändaren är aktiverad
- Röd lampa, brandsymbol Brandvarnaren är aktiverad
- Orange och röd LED blinkar växelvis CO-larmet är aktiverat.

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens 868.3 MHz
- Räckvidd 50 - 250 m beroende på byggnadens egenskaper och kombinationen av sändare och mottagare.

### Omgivning


- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet 15% till 90%, icke-kondenserande

### Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator
- BE9105 Telefonsladd
- BE9023 Magnetbrytare
- BE9026 Trampmatta

## Komma igång

- Dra bort batterifliken och anslut nätadaptern till väckarklockan och vägguttaget. Anslut sängvibratören, lägg den under kudden eller madrassen och ställ väckarklockan på nattduksbordet.
- För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.
- En Visittlampa tänds på väckarklockan och den börjar ljuda och blixtra. Sängvibratören vibrerar under kudden. Om ingenting händer, se **Felsökning**.

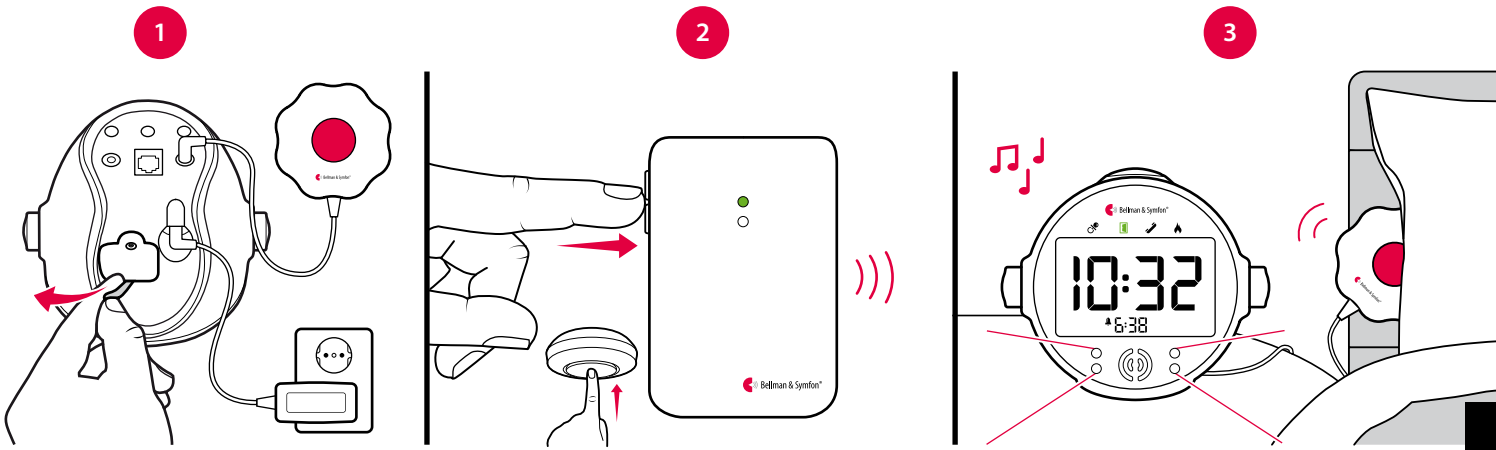

## Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras börjar väckarklockan ljuda och blixtra och sängvibratören vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

| Sändare                           | Väckarklocka   |            |       | Sängvibrator |
|-----------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|
| Aktiverad källa                   | Visittlampa    | Ljud       | Blixt | Vibration    |
| Dörrsändare/ tryckknappssändare   | Grön           | Dörrklocka | Ja    | Långsam ■■■■ |
| Telefonsändare / ansluten telefon | Gul            | Ringsignal | Ja    | Mellan ■■■■  |
| Babyvakt                          | Orange         | Babymelodi | Ja    | Snabb ■■■■   |
| Brandvarnare                      | Röd            | Brandlarm  | Ja    | Lång ■■■■    |
| Kolmonoxidvarnare                 | Orange och röd | VMA-signal | Ja    | Lång ■■■■    |

## Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

## Inställningar

### Blixt och Ljud På/Av

Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med på baksidan av väckarklockan för att växla mellan alternativen. När blixtljuset är avstängt ser du en -symbol på urtavlan. När ljudet är avstängt syns en -symbol.

### Bakgrundsbelysning

Tryck på knappen markerad med för att justera ljuset i 4 steg. **Steg 5 resulterar i att klockdisplayen lyser permanent.**

### Tidsformat


Tryck på knappen markerad med **12/24h** på klockans baksida för att växla mellan 24-timmars och 12-timmars visning.

# Visit väckarklocka




## Ställa tiden

Tryck på det **vänstra** vredet och vrid för att ställa in timmar. Tryck och vrid igen för att ställa in minuter. Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.

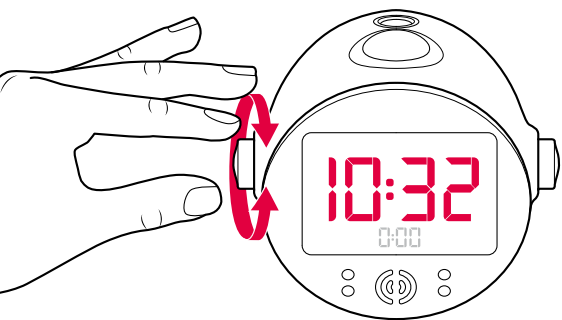


## Ställa alarmet

Tryck på det **högra** vredet och vrid för att ställa in timmar. Tryck och vrid igen för att ställa in minuter. Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.

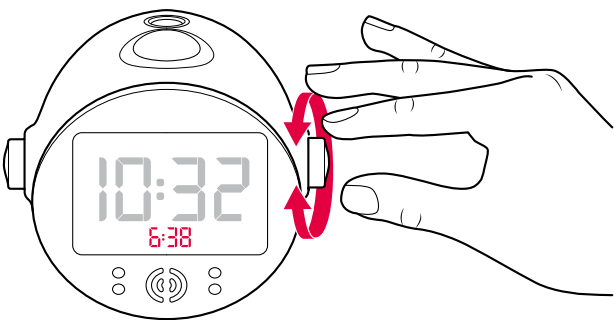


## Aktivera alarmet

Tryck på alarmknappen för att aktivera alarmet. Alarmlampan tänds i rött. För att stänga av alarmet, tryck på knappen igen.

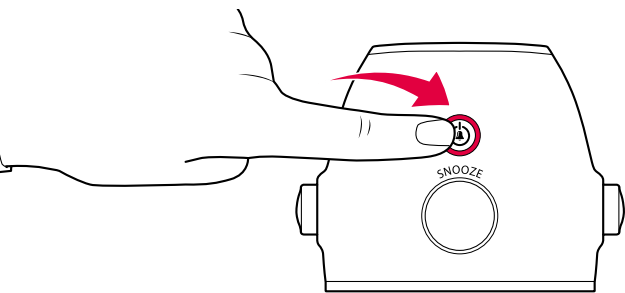

## Använda snooze och nattlampa


Tryck på snooze-knappen för att snooza. (Brandlarm kan inte snoozas av säkerhetsskäl). Tryck och håll nere snooze-knappen i 3 s för att tända nattlampan. För att släcka den, tryck på knappen igen.

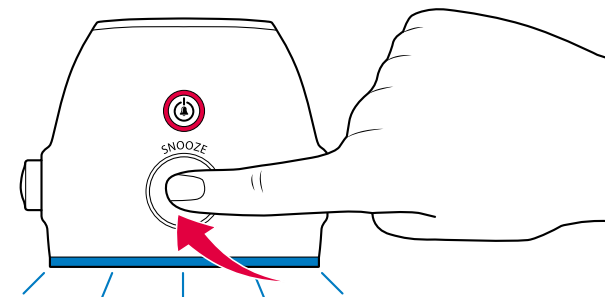

## Tillbehör

Väckarklockan kan kompletteras med följande tillbehör:

- **BE1270 Sängvibrator**  
Anslut den till ext. trig. ingången och placera den under kudden för att vakna med hjälp av vibrationer om väckarklockan blir aktiverad.
- **BE9026 Trampmatta**  
Anslut trampmattan till väckarklockan så väcker den dig om din partner kliver ur sängen.
- **BE9105 Telefonsladd**  
Använd den för att ansluta din fasta telefon till väckarklockan så väcker den dig när telefonen ringer.

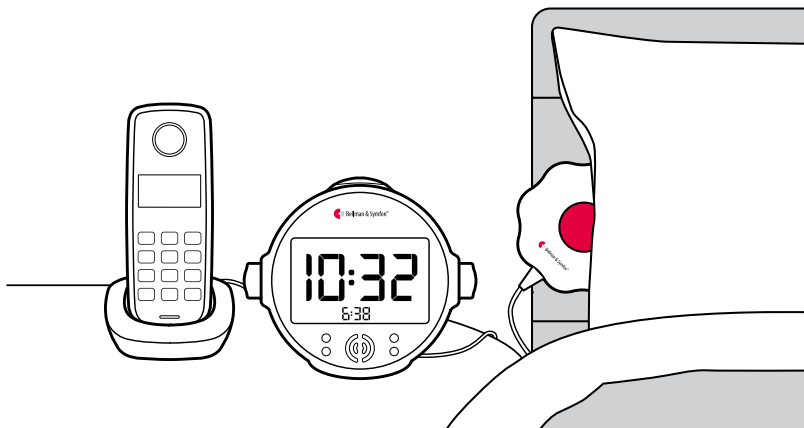



## Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter på **sändarna**.

**Så här byter du radionyckel:**

- 1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
- 2 Tryck och håll nere snooze-knappen på väckarklockan tills den gröna och gula Visittlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visittlamporna på klockan blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

**Notera:** Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

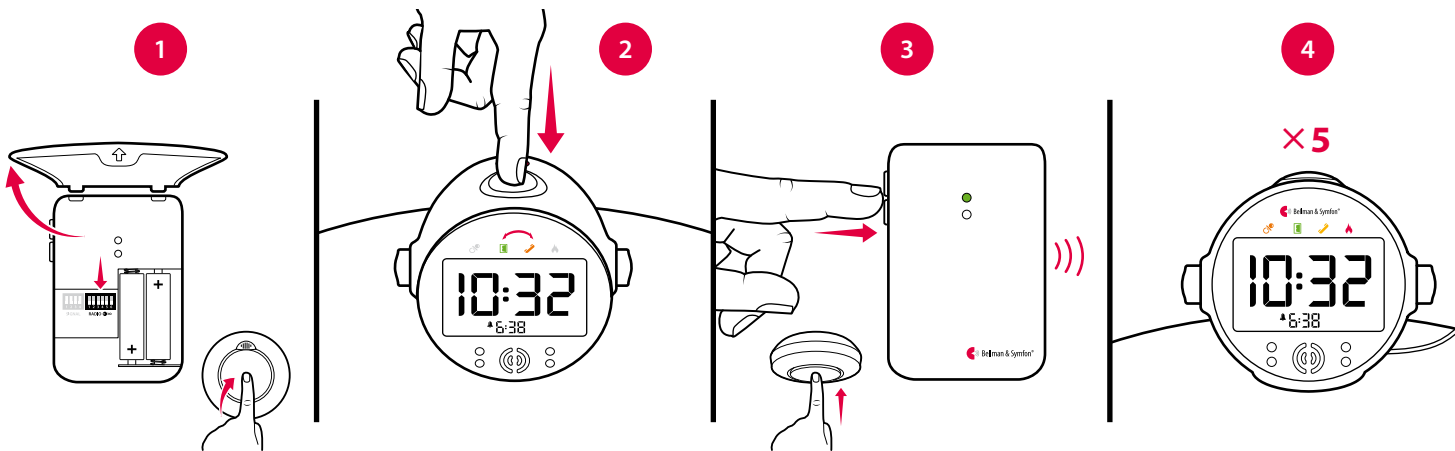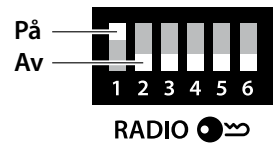


## Felsökning

| Om                                                   | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väckarklockan verkar vara avstängd                   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera att nätadapern är ansluten i väggutaget.</li><li>■ Ladda reservbatterierna i ett par timmar.</li></ul>                                                                                                                                                                          |
| Urtavlans  -symbol börjar blinka                     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nätadapern är urkopplad och reservbatterierna är nästan helt urladdade. Anslut nätadapern i väggutaget och ladda reservbatterierna i ett par timmar.</li></ul>                                                                                                                              |
| En  -symbol tänds på urtavlan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Väckarklockan detekterar inga resevbatterier. Dra bort batterifliken, se <b>Komma igång</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                      |
| Väckarklockan reagerar inte när en sändare aktiveras | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar.</li><li>■ Flytta väckarklockan närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.</li><li>■ Kontrollera att väckarklockan har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul> |
| Väckarklockan aktiveras utan någon anledning         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din väckarklocka. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>                                                                                                                                |
| Ljudet för väckning är för lågt                      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Volymen ökar gradvis och når över 100 dB.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                         |

# Pagerladdare



## Knappar och reglage

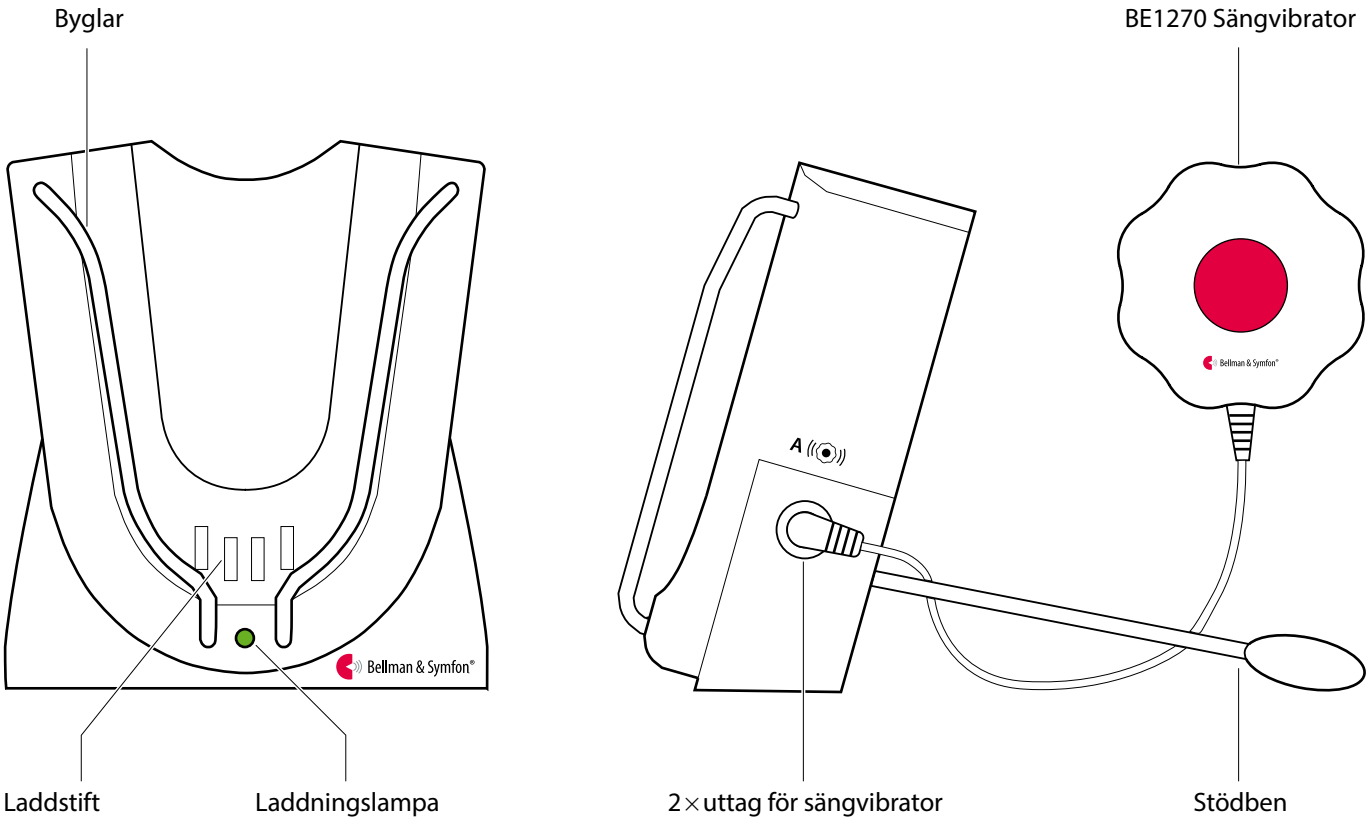

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1260 Pagerladdare med förmonterade reservbatterier
- Nätadapter
- 1 x 1,2 V NiMH uppladdningsbart batteri för pagern
- Stödben samt skruv och plugg

### Statuslampan

- Tänd:** Pagern laddas
- Släckt:** Pagern är fulladdad eller nätadaptern är inte korrekt ansluten

### Ström och batteri

- Strömförsörjning: 7,5 VDC / 1500 mA
- Batterireserv: 2 x 1,2 V NiMH uppladdningsbara
- Notera:** Batterierna får endast bytas av auktoriserad servicepersonal.

- Laddningstid, pager  
Normal laddningstid: ~ 6 h  
Vid helt urladdat batteri: ~ 24 h
- Vibratorstyrka: 2,0 – 4,0 VDC

### Storlek och vikt

- Höjd: 79 mm
- Bredd: 88 mm
- Djup: 43 mm
- Vikt: 200 g, inkl. batterier och adapter

### Omgivning


- Endast för inomhusbruk

### Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator  
Laddaren har uttag för upp till två sängvibratorer

## Komma igång

- Viktigt!** Ersätt det alkaliska batteriet i pagern med det bifogade 1,2 V NiMH uppladdningsbara batteriet.
- Skruva fast de två stödbenen på baksidan av laddaren och ställ den på en plan yta. Du kan också hänga den på väggen med medföljande skruv och plugg.
- Anslut nätadaptern till vägguttaget och sätt pagern i laddaren. Laddningslampan lyser grönt när pagern laddas och släcks när den är fulladdad. Anslut sängvibratoren (tillbehör) och lägg den under kudden eller madrassen.

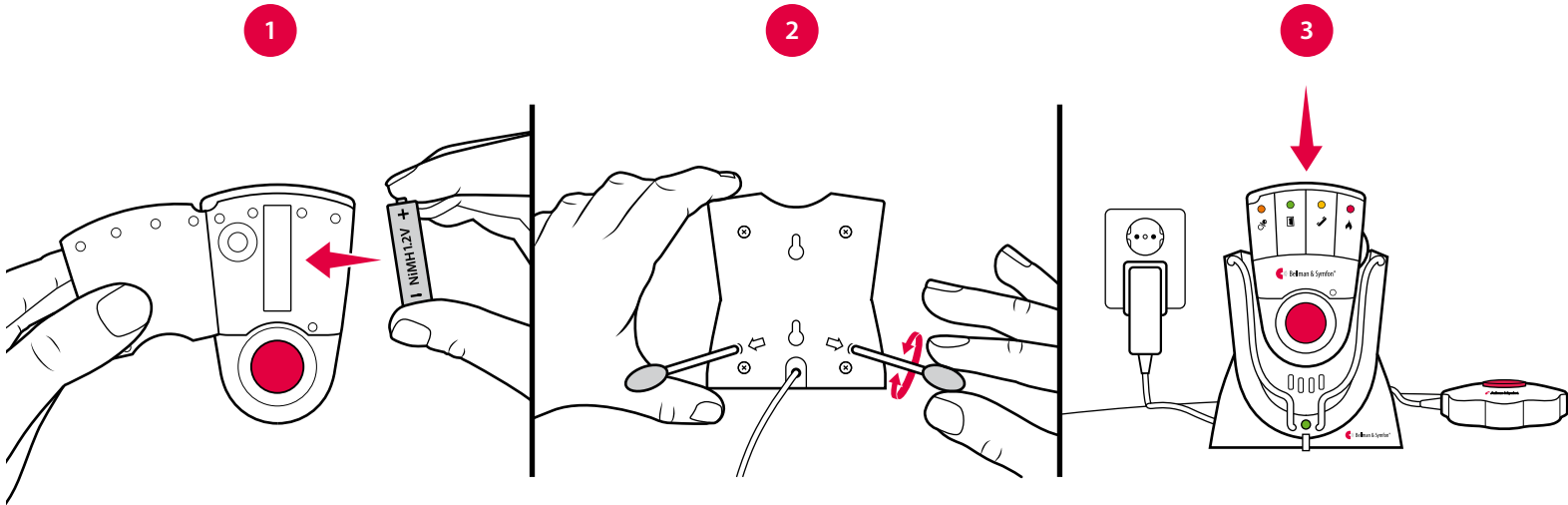

## Testa anslutningen

**Notera:** Ladda reservbatteriet i minst 24 timmar innan du använder laddaren med en sängvibrator.

- För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp (se Testa anslutningen för respektive sändare).
- Om pagern sitter i laddaren, tänds en Visitlampa på pagern och sängvibratoren börjar vibrera. Om ingenting händer, se **Felsökning**.

## Felsökning

De flesta problem med pagerladdaren kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:

### Om

Pagern laddas inte trots att den sitter i laddaren

### Gör så här

- Kontrollera att pagern är korrekt placerad i laddaren. Laddningslampan tänds i grönt för att visa att pagern laddar.
- Om laddningslampan inte tänds kan reservbatterierna vara urladdade. Anslut nätadaptern i vägguttaget för att ladda reservbatterierna.

Sängvibratoren vibrerar inte när pagern aktiveras

- Kontrollera att sängvibratoren är korrekt ansluten till pagerladdaren.
- Kontrollera att pagern är korrekt placerad i laddaren. Laddningslampan tänds i grönt för att visa att pagern laddar.
- Om laddningslampan inte tänds kan reservbatterierna vara urladdade. Anslut nätadaptern i vägguttaget för att ladda reservbatterierna.




**Varning!** När pagerladdaren används skall **ENDAST UPPLADDNINGSBARA NiMH BATTERIER** användas i pagern. Standardbatterier kan börja läcka om de placeras i laddaren och kommer då att förstöra elektroniken. Den typen av skada täcks inte av garantin.

# Sängvibrator



BE1270

## Anslutningar

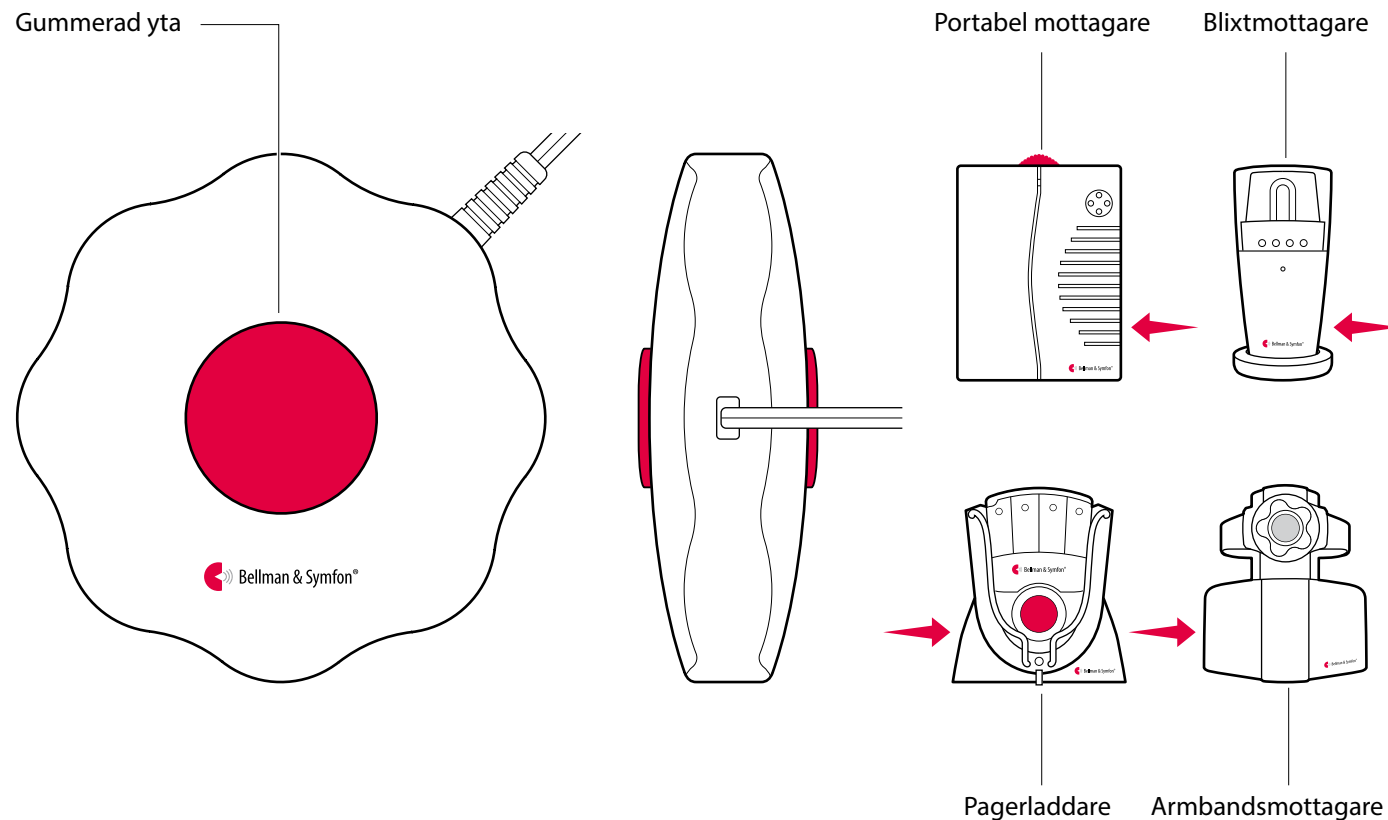

## Teknisk information

### Funktion

Väcker dig med vibrationer under kudden eller madrassen. Behöver inget batteri och kan anslutas till de flesta Visit mottagare, laddartillbehör och väckarklockor.

### I förpackningen

- BE1270 Sängvibrator

### Strömförsörjning

- Driftspänning  
2,0 – 4,0 V DC från en mottagare
- Strömförbrukning  
250 – 750 mA

### Kablar och kontakter

- Kabellängd: 2 meter
- Kontakt: 3,5 mm mono

### Storlek och vikt

- Höjd: 88 mm
- Bredd: 88 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% till 90%  
Icke-kondenserande

### Underhåll och rengöring

- Rengör endast med en torr trasa
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel

### Kompatibilitet

Sängvibratoren kan anslutas till följande produkter och laddartillbehör:

- BE1450 Visit portabel mottagare
- BE1441 Visit blixtmottagare
- BE1442 Visit blixtmottagare med reservbatteri
- BE1580 Visit väckarklocka
- BE1350 Väckarklocka classic
- BE1370 Väckarklocka pro
- BE1260 Pagerladdare för BE1470 Visitpager
- BE1570 laddare för BE1560 Visit armbandsmottagare

# Väggfäste för blixtmottagare




BE9075

## Montera blixtmottagare

### BE1441


- 1 Använd bormallen för att göra hål för skruv och plugg.
- 2 Använd en insexnyckel för att ta loss foten från undersidan av blixtmottagaren.
- 3 Sätt upp väggfästet på väggen. Skruva fast foten och montera blixtmottagaren på väggfästet.

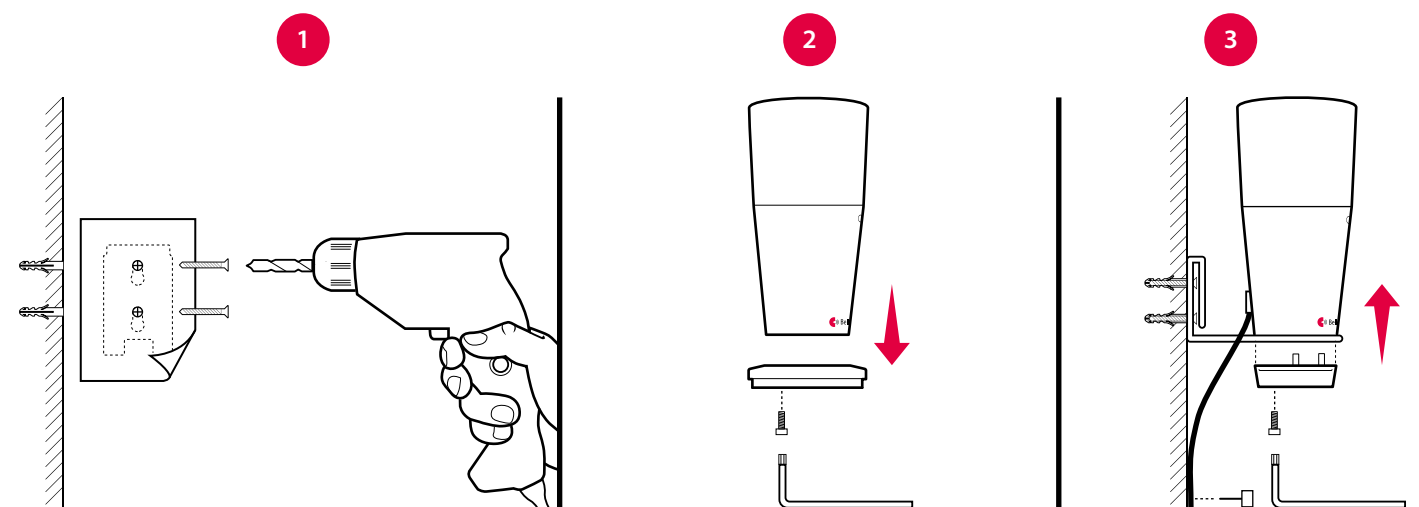

## Montera blixtmottagare med batterireserv

### BE1442/BE1444

- 1 Använd bormallen för att göra hål för skruv och plugg.
- 2 Ta loss skruven markerad i rött på undersidan av blixtmottagaren.
- 3 Sätt upp väggfästet på väggen. Sätt fast skruven för att montera blixtmottagaren på väggfästet.

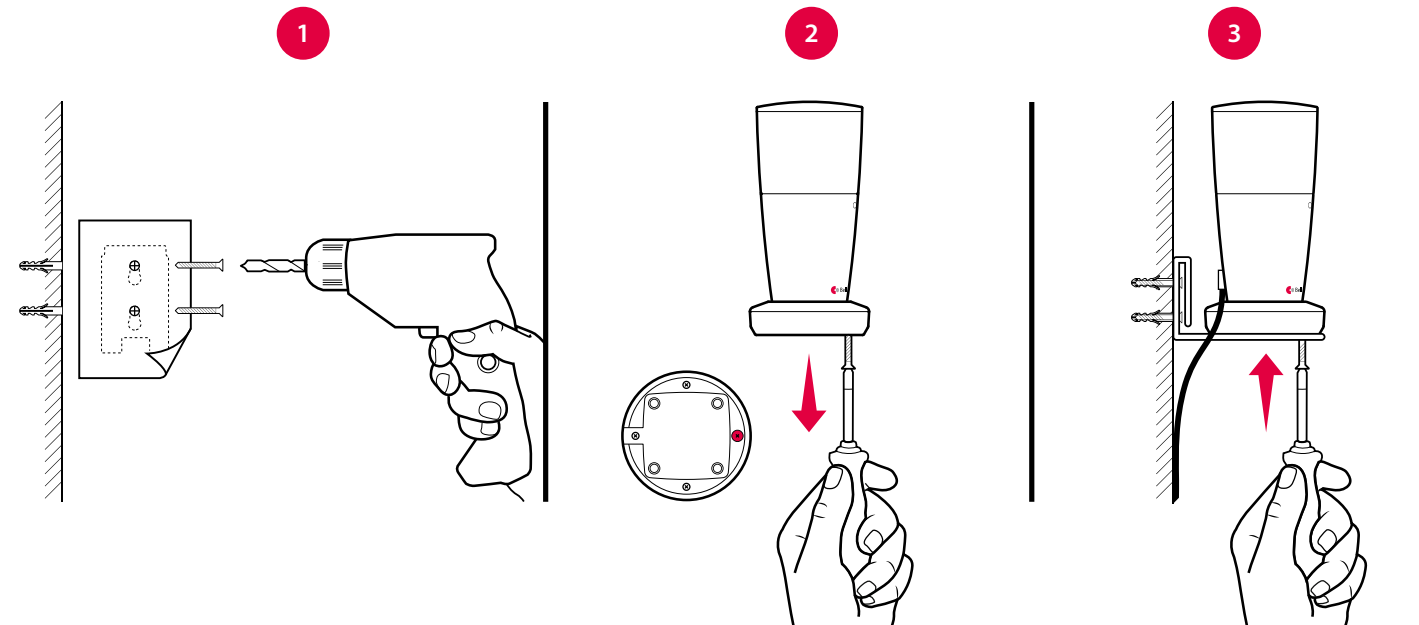



# Övriga Visittillbehör


## Magnetbrytare

### Håller koll på dina fönster och dörrar

Montera magnetbrytaren på dörr- eller fönsterkarmen och anslut den till telefonsändaren. När magneterna separeras, signalerar sändaren till din Visitmottagare som ljuder, blixtrar eller vibrerar beroende på mottagare.

### Teknisk information

- Storlek 25×62×13 mm
- Vikt 25 g
- Kontakt 3,5 mm mono
- Kabellängd 0,5 m
- Kontaktbrytare
  - Öppen: På > 2 cm från magnet
  - Sluten: Av < 1 cm från magnet
- Färg Vit
- Omgivning Endast för inomhusbruk

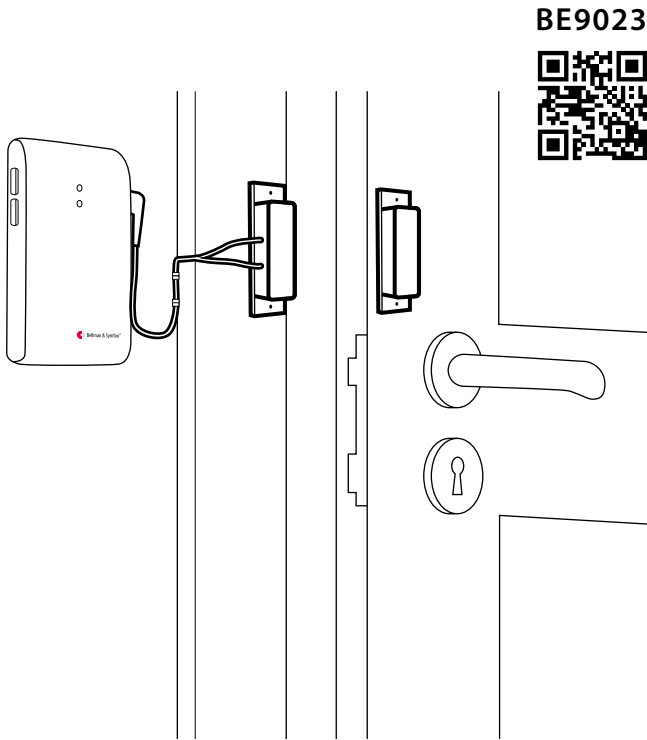

## Trampmatta

### Håller koll på alla som kommer och går


Placera trampmattan vid ytterdörren eller nedanför sängen och anslut den till telefonsändaren eller babyvakten för att få reda på när någon rör sig i ditt hem.

### Teknisk information

- Storlek 540×395×4,6 mm
- Vikt 255 g
- Kontakt 3,5 mm mono
- Kabellängd 200 cm
- Dammtät och uppfyller IP65 skyddsklass

### Funktioner

- Kontakt N/O normalt öppen
- Motstånd <100 Ω (beroende på tryck)
- Normalt tryck >5 kg över en yta på 50 mm i diameter
- Arbetstemperatur -15 till 65 °C

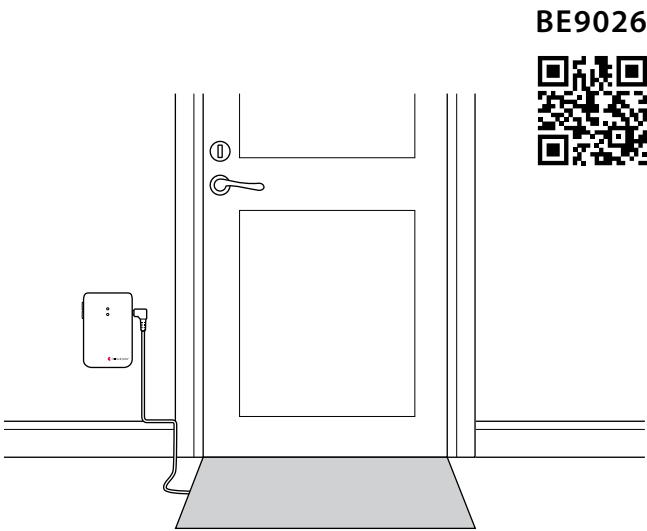

### Maxklassificering

- Kontaktspänning Max 10 VA
- Kopplingsspänning Max 25 VDC
- Kopplingsström Max 0,25 A DC resistiv
- Bärande ström Max 0,25 A DC resistiv

## Extern mikrofon


### När ljudkällan befinner sig långt bort

En extern mikrofon kan anslutas till dörrsändaren när dörrklockans ljudkälla befinner sig för långt bort ifrån sändarens interna mikrofon.

Den kan också användas när du vill ha olika signaler för dörrklocka och porttelefon.

### Teknisk information

- Storlek 33×36×4 mm
- Vikt 15 g
- Kontakt 3,5 mm mono
- Kabellängd BE9199: 2,5 m  
BE9200: 0,75 m
- Mikrofontyp Piezoelektrisk
- Färg Vit
- Omgivning Endast för inomhusbruk

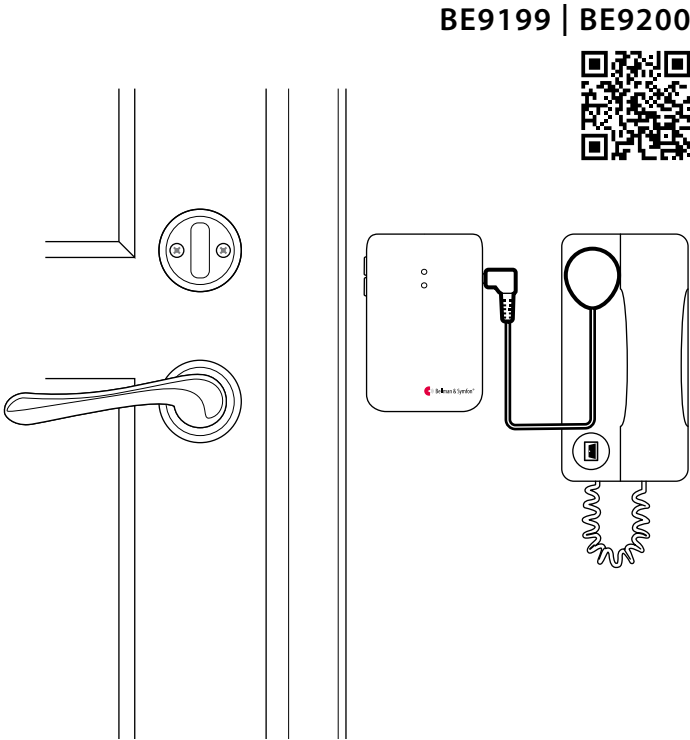

## Extern triggerkabel

### Ansluter Visit till en extern trigger

Används för att ansluta en Visitprodukt till en extern trigger. Anslut till exempel en befintlig dörrklocka till telefonsändaren för att få reda på när någon ringer på dörrklockan.


### Teknisk information

- Vikt 25 g
- Kontakt 3,5 mm stereo
- Kabellängd 0,5 m
- Färg Vit

### Spänning

- Ⓢ 2 – 30 VDC
- 3 – 24 VAC

Se relevant Visitprodukt för ytterligare information.

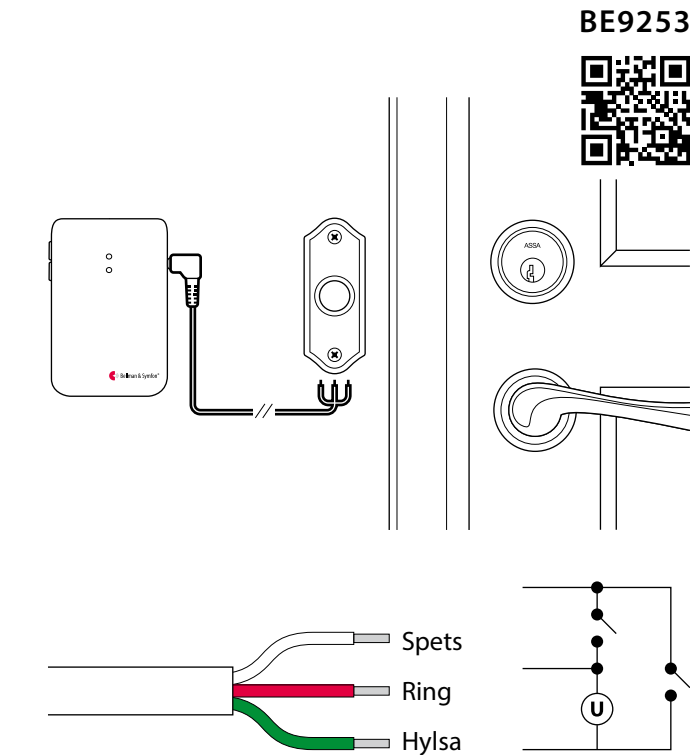



## Vi brinner för din hörsel.

Vårt uppdrag är att göra skillnad för hörselskadade och döva. Vi gör detta genom att erbjuda lösningar som ger människor möjlighet att känna sig trygga, oberoende och socialt aktiva. Vårt globala huvudkontor finns i Göteborg och vi representeras av regionala kontor och ett kvalificerat partnernätverk i Europa, Asien och Nordamerika.



### Tillverkare

Bellman & Symfon Group AB  
Södra Långebergsgatan 30  
436 32 Askim  
Tel 031-68 28 20  
E-post [info@bellman.com](mailto:info@bellman.com)  
[bellman.com](https://bellman.com)



Revision: Visit\_001ART013\_SE  
Utgivningsdatum: 2023-06-01  
TM och © 2023 Bellman & Symfon AB.  
Alla rättigheter förbehålles.



[bellman.com](https://bellman.com)