

# Visit-Druckknopf-Sender

BE1420-868



 Bellman & Symfon®



## Eigenschaften

**Einfache Handhabung**  
Großer Knopf zur Bedienung

**Leicht und robust**  
Für den täglichen Gebrauch

**Zuverlässige Signalübertragung**  
Bis zu 200 m Reichweite

**Langanhaltende Leistung**  
Batterielaufzeit ca. 2 Jahre

**MD**

Medizinisches Gerät mit CE-Kennzeichnung gemäß EU-MDR 2017/745

## Ihr flexibles Zuhause.

Der Druckknopfsender von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über Ihr Zuhause haben. Der Sender kann entweder als mobile Ruftaste um den Hals getragen oder als drahtlose Türklingel in der Nähe der Eingangstür befestigt werden.

### Leicht und robust

Er ist für den täglichen Gebrauch konzipiert, praktisch wartungsfrei und benötigt so wenig Energie, dass er über Jahre mit nur einer Batterie betrieben werden kann.

### Verwendung als Ruftaste

Bitten Sie Ihren Partner den Sender um den Hals zu tragen. So sind Sie stets erreichbar, wenn etwas passiert, dass Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Wenn die Ihnen nahestehende Person in einem Notfall die Taste drückt, wird das Signal sofort an den Visit-Empfänger gesendet, der Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) benachrichtigt.

### Verwendung als Türklingel

Der Druckknopfsender kann auch als drahtlose Türklingel verwendet werden. Bringen Sie ihn einfach wie eine normale Türklingel an der Eingangstür an und schon sind Sie jederzeit über das Geschehen in Ihrem Zuhause auf dem Laufenden.

Wenn ein Besucher die Taste drückt, wird das Signal an den Visit-Empfänger gesendet, der Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) über den Besuch informiert.


# Technische Daten

## Abmessungen und Gewicht

Höhe: **66 mm**  
 Breite: **48 mm**  
 Tiefe: **23 mm**  
 Gewicht: **50 g**



## Produktübersicht

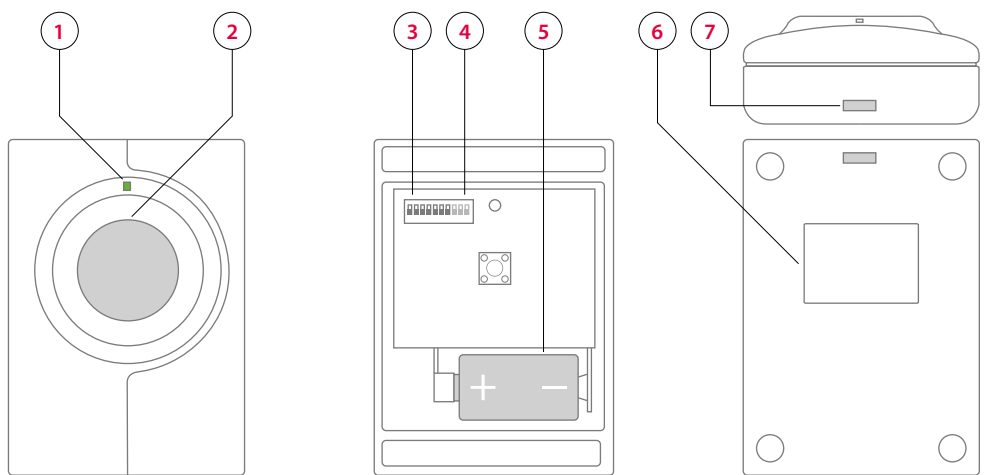

## Strom und Batterie

- Batterietyp  
6 V PX28A Alkaline oder 6 V PX28L Lithium
- Stromverbrauch  
Aktiv < 35 mA, Ruhezustand < 0,05 µA
- Betriebsdauer  
ca. 2 Jahre

## Anzahl Funkfrequenzen

- 64 (Standard). Bis zu 256 mit optionaler Software.

## Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 200 m (freies Feld). Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

## Zulassungen



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).

## Tasten und Steuerelemente

- 1 Status-LED
- 2 Drucktaste
- 3 Frequenzbandschalter
- 4 Signalschalter
- 5 Batteriefach
- 6 Klebeband für Wandbefestigung
- 7 Öffnung für Trageband

## Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.
- Nicht wiederverwendbar.

## Umweltbestimmungen

- Für den Innengebrauch. Für den Außengebrauch nur an einem geschützten Ort. Das Gerät ist nicht gegen Wasser bzw. Regen geschützt. (IP42)
- Temperatur: -10° zu 40° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 % (nicht kondensierend)

## Lieferumfang

- BE1420-868 Visit Druckknopf-Sender
- Alkaline-Batterie (6 V; PX28A)
- Trageband mit Sicherheitsverschluss
- Schrauben und Dübel
- Doppelseitiges Klebeband
- Bedienungsanleitung



© 2025 Bellman & Symfon AB.  
**Alle Rechte vorbehalten.**

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1420-868\_050DSH1.0\_DE

[bellman.com](https://bellman.com)