

Visit Flitsontvanger

BE1441-868 / BE1442-868



Functies

Heldere flitsen
30 Candela Xenon-lampen

Duidelijke signaalidentificatie
Door middel van gekleurde ledlampen

Roterende bovenkant
Makkelijk om het flitslicht te richten

Meervoudige verbindingen
Uitgang voor telefoon en trilalarm

Batterijback-up (BE1442-868)
Werkt tijdens stroomuitval

MD

Medisch apparaat met CE-markering volgens EU MDR 2017/745

Waarschuwt met flitsen.

De flitsontvanger van Bellman & Symfon maakt deel uit van het Visit smart home-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden. Hij waarschuwt u met felle flitsen wanneer de deurbel of de telefoon overgaat, wanneer uw baby u nodig heeft of wanneer er brand ontstaat.

Krachtig en draagbaar


De flitsontvanger is heel eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Sluit hem aan op het lichtnet en plaats hem op een tafel of plank. U kunt hem ook aan de muur bevestigen met een muurbeugelaccessoire.

De flitsontvanger produceert heldere flitsen die zelfs in grote gebieden merkbaar zijn en gebruikt gekleurde iconen om de Visit signalen te onderscheiden. Daarnaast maakt de roterende bovenkant het gemakkelijk om het licht te richten.

De flitsontvanger heeft aparte ingangen voor vaste en mobiele telefoons. Bovendien kunt u een trilschijf aansluiten en wakker worden met trillingen als er iets zou gebeuren terwijl u slaapt. Het BE1442-868 model is ook uitgerust met een batterijback-up.



Technische specificaties


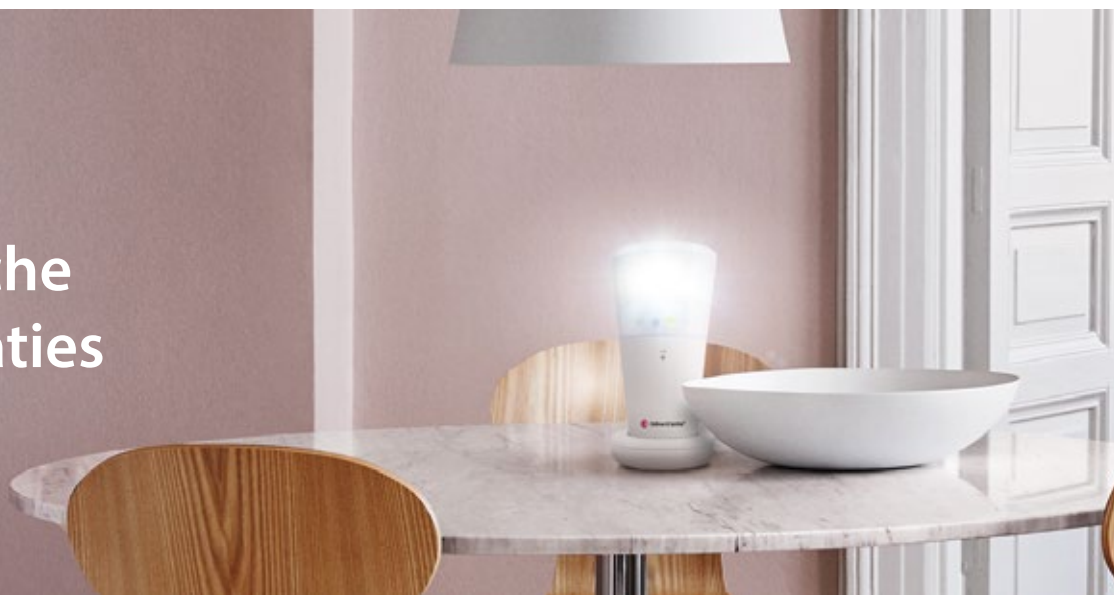


Afmetingen en gewicht

Hoogte	BE1441: 140 mm, 5,5" BE1442: 155 mm, 6,1"
Diameter	BE1441: 70 mm, 2,7" BE1442: 78 mm, 3,1"
Gewicht	310 g, 10,9 oz.



Knoppen en bedieningselementen

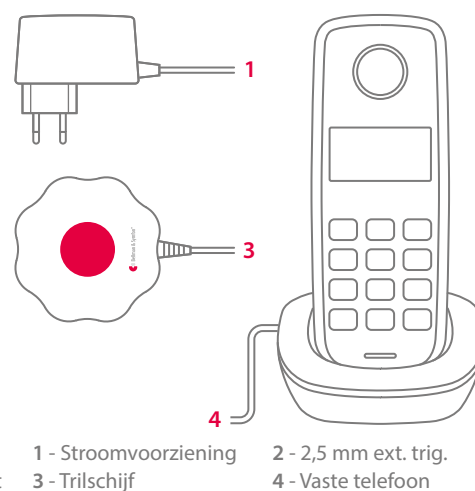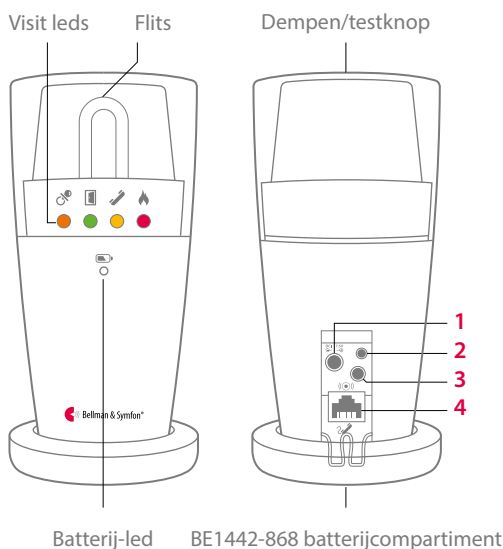

Functies

- Modellen
BE1441-868 en BE1442-868 inclusief batterijback-up
- Waarschuwingssignaal
Ingebouwde flitser ~30 Candela Xenon-licht
Waarschuwing! Flitsen kunnen epileptische aanvallen veroorzaken.
- Activering
 - Via de Visit zenders
 - Via het analoge telefoonnetwerk

Stroom en batterij

- Netstroom
7,5 V DC / 1500 mA met voedingseenheid
- Stroomverbruik
Actief: 1250 mA, inactief: 10 mA
- Back-upbatterijen (alleen BE1442-868) 4 x 1,2 V AAA (HR03) NiMH oplaadbare batterijen
Gebruikstijd:
~ 48 uur indien volledig opgeladen

Visit indicatoren

De Visit leds geven normaal gesproken het volgende aan:

- Oranje led, fopspeensymbool
De babyfoon is geactiveerd
- Groene led, deursymbool
De deurzender is geactiveerd
- Gele led, telefoonsymbool
De telefoonzender is geactiveerd
- Rode led, vuursymbool
De rookmelder is geactiveerd
- Oranje en rode leds knipperen afwisselend
De CO-melder is geactiveerd

Frequentie en dekking

- Radiofrequentie: 868,3 MHz
- Dekking: 50 – 250 m, afhankelijk van de kenmerken van het gebouw

In de doos

- BE1441-868 Visit Flitsontvanger of BE1442-868 Visit Flitsontvanger met batterijback-up
- 7,5 V DC / 1500 mA oplader
- 4 x 1,2 V AAA NiMH-batterijen (alleen model BE1442-868)

Accessoires

- BE9075 Flitslampsteun
- BE1270-P02 Trilalarm
- BE9105 Telefoonkabel

Goedkeuringen



Dit product is een medisch apparaat dat voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 (Verordening betreffende medische hulpmiddelen).

Milieuvereisten

- Temperatuur tijdens gebruik: 0 ° tot 35 °C
- Relatieve vochtigheid: 15% tot 90% (niet-condenserend)

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1441-868-1442-868_186DSH1.0-NL

bellman.com