

Visit blitsmottaker

BE1441/BE1442



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

Høyintensivt blitslys
30 Candela Xenon-blitser

Ulike farger på lysdiodene
Lett å skille mellom signalene

Roterbar topp
Lett å rette blitslyset til en bestemt retning

Multiple tilkoblinger
Tilkoble telefon og sengevibrator

Batteriereserve (BE1442)
Tar over ved strømbrudd

Se hva du ikke hører.

Blitsmottakeren fra Bellman & Symfon er en del av Visits løsninger for smarte hjem og hjelper deg å holde styr på signalene hjemme. Med klare blitser forteller den når døren eller telefonen ringer, når din baby behøver oppmerksomhet eller om en brann skulle inntreffe.

Kraftig og bærbar

Blitsmottakeren er meget lett å bruke. Koble den i strømuttaket og plassér den på en hylle eller et bord. Du kan også henge den opp med tilbehøret for veggmontering.

Blitsmottakeren gir et høyintensivt blitslys som synes t.o.m. i godt belyst rom og bruker ulike fragerde lysdioder for å skille mellom signalene. Det er enkelt å rette blitsen i en bestemt retning med hjelp av den roterende toppen.

Blitsmottakeren har separate tilkoblinger for fast- og mobiltelefon. Dessutom kan du tilkoble en sengevibrator og våkne opp til vibrasjoner om noe skulle skje mens du sover. BE1442 er også utstyrt med batteriereserve som tar over ved strømbrudd.




Teknisk informasjon

Mål og vekt

Høyde	BE1441: 140 mm BE1442: 155 mm
Diameter	BE1441: 70 mm BE1442: 78 mm
Vekt	308 g



Knapper og kontroller

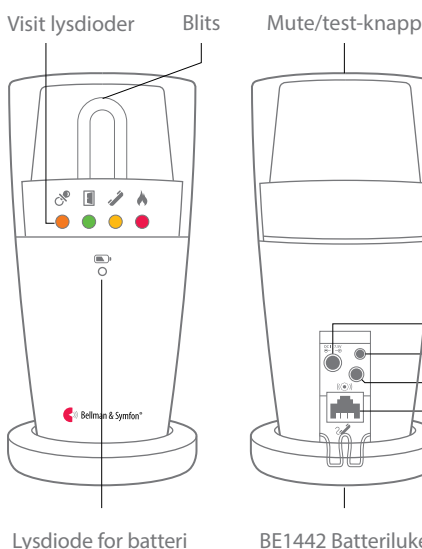

Egenskaper

- Modeller
BE1441 och BE1442 med batterireserve
- Signal
Innebygd ~30 Candela Xenon-blits
Advarsel! Blitslys kan forårsake epileptisk anfall.
- Aktivering
 - Via Visitsender
 - Via fast telefon (analog telenett)

Strøm og batteri

- Strømførsyning
7.5 V DC / 1500 mA med nettaggregat
- Strømforbruk
Aktiv: 750 mA, standby: 8 mA
- Batterier (kun BE1442):
4× 1.2 V AAA (LR03) NiMH oppladbare
Driftstid: ~48 h ved fulltadet batteri

Visit lysdioder

Lysdiodene viser følgende:

- Oransje lysdiode med et smokksymbol
Visit Babymonitor er blitt aktivert
- Grønn lysdiode med et dørsymbol
Visit dørsender er blitt aktivert
- Gul lysdiode med et telefonsymbol
Visit telefonsender er blitt aktivert
- Rød lysdiode med et flammesymbol
Visit Brannvarsleren er blitt aktivert
- Oransje og rød LED-lys blinker vekselvis.
CO-alarmen er aktivert.

Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 250 m fritt felt. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og andre radiosendere som TV og mobiltelefon.

Tilbehør

- BE9075 veggfeste
- BE1270 sengevibrator
- BE9105 telefonledning

Omgivelser

- For innendørsbruk
- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfuktighet:
15% til 90%, ikke kondenserende

I esken

- BE1441 / BE1442
Blitsmottaker + strømaggregat
- 4× 1.2 V AAA NiMH batterier
(kun BE1442)

© 2022 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1441_188DSH1.0-BE1441-BE1442-NO

bellman.com