


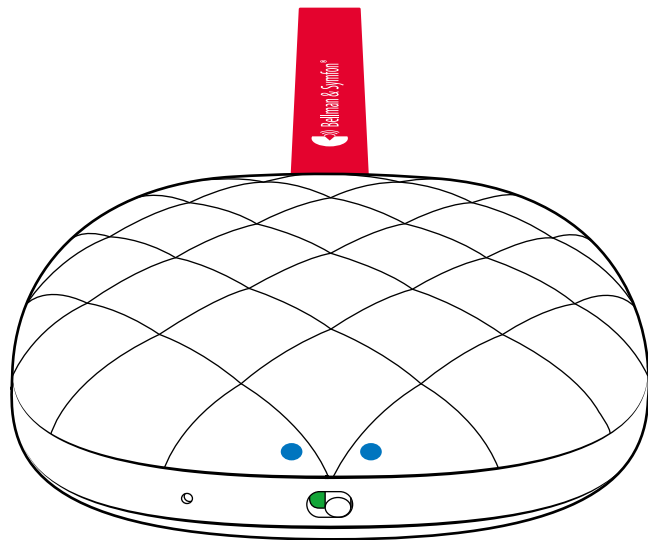

BE1221-P02 Vibio Bed Shaker



BE1221-P02 Vibio Bed Shaker

4	User manual
14	Bedienungsanleitung
24	Brugervejledning
34	Manual del usuario
44	Käyttöopas
54	Mode d'emploi
64	Manuale d'uso
74	Gebruikshandleiding
84	Brukermanual
94	Instrukcja obsługi
104	Bruksanvisning
114	Používateľská príručka

EN

DE

DK

ES

FI

FR

IT

NL

NO

PL

SE

SK

Lisez d'abord ceci

Ce livret vous explique comment utiliser et entretenir votre nouveau vibreur de lit Vibio. Veuillez à lire attentivement ce livret, y compris la section **Avertissements**. Si vous avez d'autres questions, contactez votre audioprothésiste.

À propos du Vibio BE1221-P02 Vibreur de lit

Objectif visé

Le vibreur de lit Vibio est destiné à réveiller et à alerter les personnes sourdes et malentendantes d'une alarme programmée.

Principe de fonctionnement

Le vibreur de lit Vibio est généralement placé sous l'oreiller ou le matelas et l'alarme est réglée dans l'application pour téléphone mobile Vibio. Lorsque l'alarme se déclenche, le vibreur de lit vibre sous l'oreiller ou le matelas pour réveiller l'utilisateur. Une fois l'alarme réglée, le vibreur de lit fonctionne de manière autonome.

Groupe d'utilisateurs prévu

Le groupe d'utilisateurs visé est constitué de personnes de tous âges souffrant d'une

perte auditive ou d'une surdité légère à sévère et ayant besoin d'une amplification audio, visuelle ou sensorielle.

Utilisateur prévu

L'utilisateur prévu est une personne souffrant d'une perte auditive légère à sévère ou de surdité.



L'appareil ne rétablit pas une audition normale et ne prévient ni n'améliore une déficience auditive ou une surdité résultant de conditions organiques.


Bonjour!

Ce dont vous avez besoin

- Un portable fonctionnant sous iOS15/Android 8 ou une version plus récente.
- Un adaptateur secteur USB

Contenu de la boîte


- 1 Câble de charge
- 2 Coussin vibrant Vibio

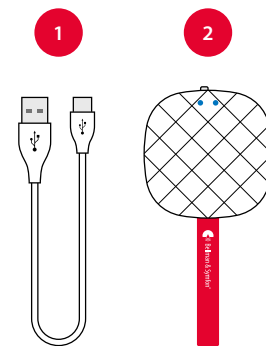

BE1221-P02 Coussin Vibrant Vibio

À propos des voyants lumineux

- La couleur **blanche** signifie que le dispositif est activé par une alarme ou qu'il communique avec votre téléphone portable.
- La couleur **bleue** signifie qu'il est prêt pour l'appairage.
- La couleur **verte** signifie qu'il est en charge.
- La couleur **jaune** signifie que vous recevez un appel ou que vous avez un message.
- La couleur **rouge** signifie que le niveau de la batterie est faible.

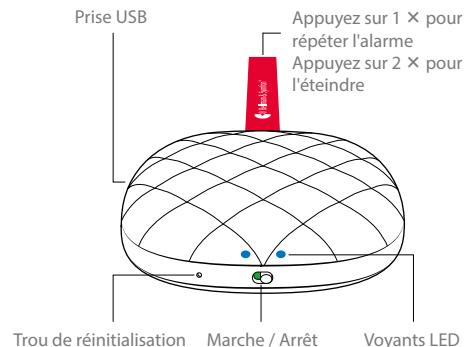


l'installation de Vibio

1 Charge-le

Connectez le câble de chargement à votre Vibio et reliez le connecteur à un adaptateur secteur USB ou à la prise USB d'un ordinateur.

2 Allumer

Glissez l'interrupteur marche/arrêt à droite et maintenez votre Vibio à proximité de votre téléphone.

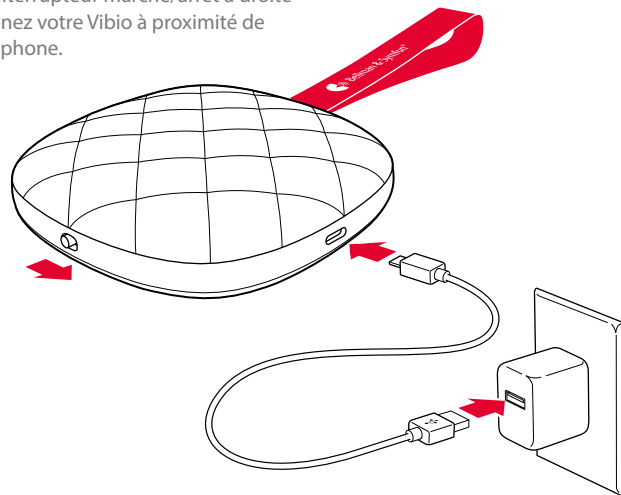

3 Installer l'application



Téléchargez l'application **Vibio** app à partir de l'App Store® ou de Google Play™ et suivez les instructions de configuration.



Utiliser l'application

Gestion des alarmes


- + Ajouter.** Touchez le bouton plus pour ajouter une nouvelle alarme.
- ✎ Modifier.** Touchez le bouton représentant un crayon pour modifier une alarme.
- Supprimer.** Touchez le bouton moins pour supprimer une alarme.
- ON** **On/Off.** Touchez le bouton ON ou OFF pour activer ou désactiver une alarme.

Suivi Vibio

- Connexion.** L'icône Vibio indique le statut de la connexion.
- Batterie.** L'icône de la batterie indique le niveau de batterie restant.

En savoir plus

- ≡ Aide.** Allez dans Menu > Aide pour en savoir plus à propos de l'application.

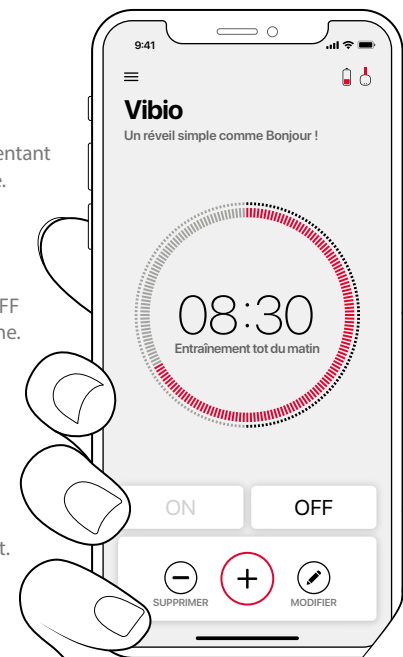

Informations importantes en matière de sécurité

Cette section contient des informations importantes sur la sécurité, la manipulation et le fonctionnement. Conservez cette notice pour une utilisation ultérieure. Si vous venez d'installer l'appareil, cette notice doit être remise au propriétaire de la maison.

Avertissements de danger

- Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres blessures ou dommages à l'appareil ou à d'autres biens.
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Sachez que les alarmes et les notifications peuvent être manquées si les piles sont déchargées.
- N'utilisez pas et ne rangez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des flammes nues, des radiateurs, des fours ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- N'utilisez que les adaptateurs secteur et les types de piles spécifiés dans cette notice.
- Protégez les câbles de toute source potentielle de dommage.
- Ne démontez pas l'appareil, il y a un risque d'électrocution. L'altération ou le démontage de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. N'exposez pas l'appareil à l'humidité.
- Protégez l'appareil des chocs pendant le stockage et le transport.
- Ne confiez un produit endommagé ou défectueux qu'à un personnel de service qualifié.

Informations sur la la sécurité des produits

- Le non-respect de ces instructions peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- N'exposez pas les piles au feu ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas tomber votre appareil. Une chute sur une surface dure peut l'endommager.
- N'utilisez pas l'appareil dans les zones où les équipements électroniques sont interdits.
- En cas d'incident grave lié à cet appareil, contactez le fabricant et l'autorité compétente.
- Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre appareil, contactez le point de vente, votre bureau local Bellman & Symfon ou le fabricant. Visitez le site bellman.com pour obtenir les coordonnées des personnes à contacter.
- Les piles rechargeables doivent être complètement chargées avant la première utilisation de l'appareil. Ne chargez les piles qu'à une température comprise entre 0° et 35° C.
- Les piles rechargeables ne doivent être remplacées que par Bellman & Symfon ou un centre de service agréé. Il y a un risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à bord d'un avion, sauf autorisation expresse du personnel navigant.

Options de configuration

Ce vibreur de lit peut être utilisé avec les modèles de téléphones mobiles et les systèmes d'exploitation suivants :

- iPhone 6S et versions ultérieures ou appareils Android modernes
- iOS15 ou Android 8 et versions ultérieures.

Conditions de fonctionnement

Utilisez l'appareil dans un environnement sec, dans les limites de température et d'humidité indiquées dans cette brochure. Si le produit est mouillé ou exposé à l'humidité, il ne doit plus être considéré comme fiable et doit donc être remplacé.

Nettoyage

Débranchez tous les câbles avant de nettoyer votre appareil. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. Évitez de faire pénétrer de l'humidité dans les ouvertures. N'utilisez pas de nettoyants ménagers, d'aérosols, de solvants, d'alcool, d'ammoniaque, d'abrasifs ou d'air comprimé.

Service et assistance

Si le produit semble endommagé ou ne fonctionne pas correctement, suivez les instructions du mode d'emploi et de ce dépliant. Si le produit ne fonctionne toujours pas comme prévu, contactez votre audioprothésiste local pour obtenir des informations sur le service et la garantie.

Conditions de garantie

Bellman & Symfon garantit ce produit (à l'exclusion de la batterie) pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat contre tout défaut dû à un vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique qu'aux conditions normales d'utilisation et de service, et n'inclut pas les dommages résultant d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un démontage non autorisé ou d'une contamination, quelle qu'en soit la cause.

Cette garantie exclut les dommages accessoires et indirects. En outre, la garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États ou juridictions n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur. La garantie ci-dessus ne peut être modifiée que par un écrit signé par les deux parties.

Explication du symbole

	Indique qu'il s'agit d'un dispositif médical.
	Indique un transporteur qui contient des informations sur l'identifiant unique de l'appareil.
	Indique que le produit ne doit pas être jeté comme un déchet non trié, mais doit être envoyé dans des installations de collecte séparée pour être récupéré et recyclé.
	Indique le numéro de série du fabricant afin de permettre l'identification d'un dispositif médical spécifique.
	Indique le numéro de catalogue du fabricant afin de permettre l'identification du dispositif médical.
	Indique le fabricant du dispositif médical.
	Ce symbole indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.
	Ce symbole indique qu'il faut être prudent lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé, ou que la situation actuelle nécessite une prise de conscience ou une action de la part de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables.
	Identifier un lieu où l'on peut trouver des informations, notamment en cas d'urgence.
	Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.
	Indique la plage d'humidité à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.

Résolution des problèmes

Si	Essayez la procédure suivante
Les LED rouges clignotent	Le niveau de la batterie est faible. Rechargez votre Vibio à l'aide du câble fourni.
Les LED ne s'allument pas	La batterie est vide. Rechargez votre Vibio pendant une heure et demi environ.
Le dispositif Vibio ne se connecte pas à mon téléphone portable	Vérifiez tout d'abord la connexion Bluetooth sur l'écran d'accueil de l'application. Si l'icône Vibio est rouge et barré d'une croix, procédez comme suit : Placez-vous à portée de l'appareil. Placez votre téléphone portable plus près du Vibio. Éteignez et rallumez la fonction Bluetooth. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle/Panneau de configuration rapide de votre téléphone portable et touchez l'icône Bluetooth. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devez réinitialiser et reconnecter manuellement le vibreur de lit Vibio et l'appli. Essayez ce qui suit : Forcez la fermeture de l'application. Remarque : la simple fermeture de l'application n'est pas suffisante. Déconnectez le Vibio. Allez dans Paramètres > Bluetooth. Touchez les icônes ⓘ / ⓘ et l'option Oublier cet appareil pour déconnecter le "Vibio". Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée. Réinitialisez le Vibio. Tirez la sangle sans la relâcher pour que les LED commencent à clignoter. Relâchez et tirez à nouveau pour que les LED commencent à « clignoter » en bleu. Configurez le Vibio. Redémarrez l'application Vibio et suivez les instructions.

Informations sur la conformité

Par la présente, Bellman & Symfon déclare qu'en Europe, ce produit est conforme aux exigences essentielles du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux et de la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques. Le texte intégral de la déclaration de conformité peut être obtenu sur le site internet de Bellman & Symfon bellman.com.

Spécifications techniques

Dimensions	27 × 94 × 94 mm
Poids	153 g, 5.4 oz.
Alimentation et batterie	Puissance de la batterie : 1 × 3.7 V AA Lithium-ion Consommation électrique : < 1000 mA, Au repos :< 100 µA Durée de fonctionnement : Jusqu'à 40 jours / charge Temps de charge : Jusqu'à 1,5 heure à 500mA Courant de charge : Jusqu'à 500 mA, 5V DC
Câbles et connexions	Longueur du câble : 1 m Contacts : USB type A vers USB Micro-B
Compatibilité	iOS15 / Android 8 et versions ultérieures iPhone 6S et versions ultérieures / Appareils Android modernes
Fréquence et couverture	■ Fréquence Bluetooth : 2402 - 2480 MHz ■ Puissance de sortie : Max 2.5mW (4dBm) ■ Couverture : Jusqu'à 30 m, 33 yd, champ libre. ■ Connectivité : Bluetooth® 5
Température pendant le transport et le stockage	-10° to 50° C
Température pendant le fonctionnement	0° to 35° C
Humidité pendant le fonctionnement	15% à 95%, sans condensation
Pression atmosphérique pendant le fonctionnement, le transport et le stockage	700 hpa à 1060 hpa
Dans la boîte	■ BE1221-P02 Coussin Vibrant Vibio ■ Câble de chargement USB

Lees dit eerst

Dit boekje helpt u bij het gebruik en onderhoud van uw nieuwe Vibio trilkussen. Zorg ervoor dat u dit boekje zorgvuldig doorleest, inclusief het gedeelte **Waarschuwingen**. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw audicien.

Over BE1221-P02 Vibio Trilalarm

Beoogd doel

Het doel van het Vibio trilalarm is doven en slechthorenden te wekken en te waarschuwen voor een ingesteld alarm.

Werkingprincipe

Het Vibio trilalarm wordt meestal onder het kussen of de matras geplaatst en het alarm wordt ingesteld in de applicatie van de mobiele telefoon van Vibio. Als het alarm afgaat, trilt het trilkussen onder het kussen of de matras om de gebruiker wakker te maken. Zodra het alarm is ingesteld, werkt het trilkussen onafhankelijk.

Beoogde gebruikersgroep

De beoogde gebruikersgroep bestaat uit mensen van alle leeftijden met een licht tot ernstig gehoorverlies of doofheid die audio-, visuele of sensorische versterking nodig hebben.

Beoogde gebruiker

De beoogde gebruiker is een persoon met licht tot ernstig gehoorverlies of doofheid.



De beoogde gebruiker is een persoon met licht tot ernstig gehoorverlies of doofheid.

Het apparaat herstelt het normale gehoor niet en voorkomt of verbetert gehoorverlies of doofheid als gevolg van organische aandoeningen niet.

Welkom!

Wat je nodig hebt


- Een mobiele telefoon of tablet met iOS15/Android 8 of hoger.
- Een USB-stroomadapter

In de verpakking


- 1 Oplaadkabel
- 2 Vibio Bed Shaker

De knipperende lampjes bekijken

- Wit betekent dat de Vibio wordt geactiveerd door een alarm of met je telefoon communiceert.
- Blauw betekent dat de Vibio klaar is om te koppelen.
- Groen betekent dat de Vibio wordt opgeladen.
- Geel betekent dat je een oproep of bericht ontvangt.
- Rood betekent dat de batterij bijna leeg is.

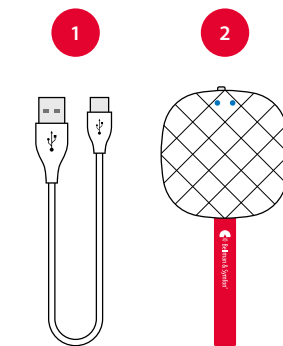

BE1221-P02 Vibio Trilalarm

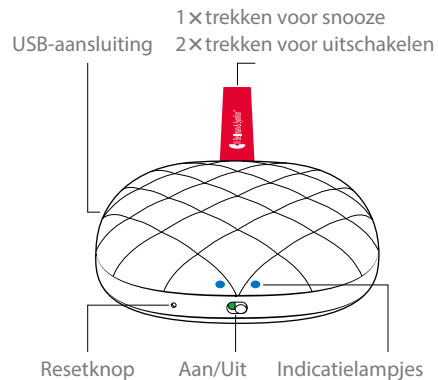


Vibio installeren

1 Opladen

Verbind de laadkabel met de Vibio en sluit de connector aan op een USB adapter of een USB-computeruitgang.

2 Aanzetten

Schuif de Aan / Uit-schakelaar naar rechts en houd de Vibio in de buurt van je mobiel.

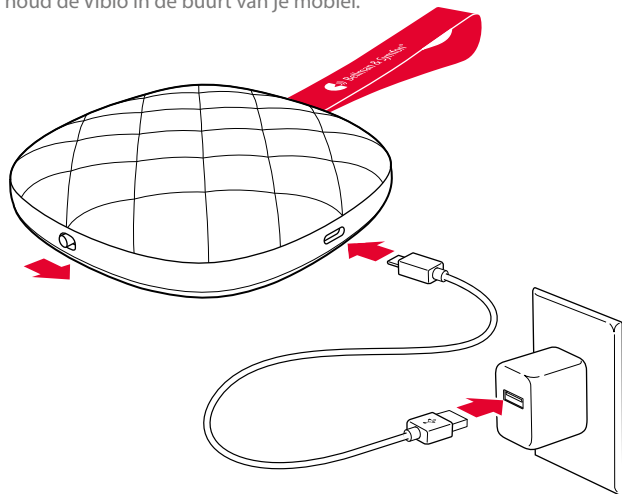

3 De app Visit installeren



Download de **Vibio** app vanuit de App Store® of Google Play™ en volg de installatie-instructies.



De APP gebruiken

Alarmbeheer



Toevoegen. Tik op de plusknop om een nieuw alarm toe te voegen.



Bewerken. Tik op de potloodknop om een alarm te bewerken.



Verwijderen. Tik op de min-knop om een alarm te verwijderen.



Aan/uit. Tik op de aan/uit knop om een alarm in of uit te schakelen.

Vibio monitoren



Verbinding. Het Vibio-pictogram toont de verbindingstatus.




Accu. Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer.

Meer leren



Help. Tik op Menu > Help voor meer informatie over de app.

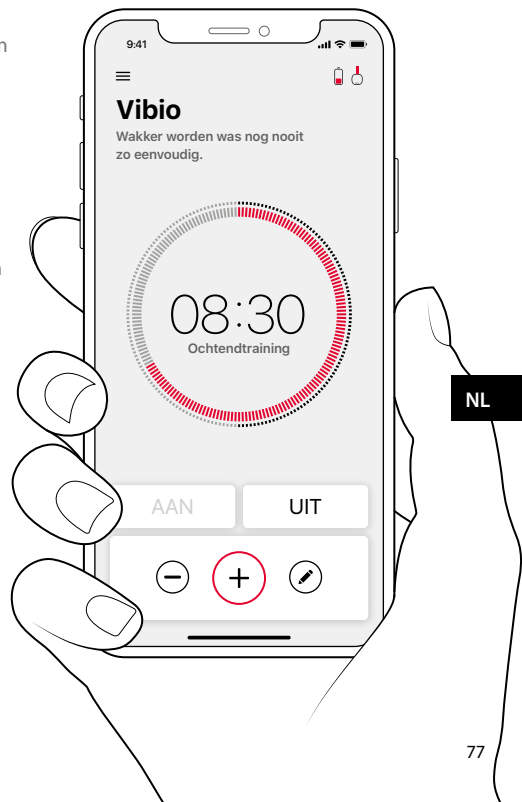

Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over veiligheid, bediening en gebruik. Bewaar deze folder voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat alleen installeert, moet u deze bijsluiter aan de huiseigenaar geven.

Gevarenwaarschuwingen

- Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of ander letsel of schade aan het apparaat of andere eigendommen.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
- Houd er rekening mee dat alarmen en notificaties gemist kunnen worden als de batterijen leeg raken.
- Gebruik of bewaar dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals open vuur, radiatoren, ovens of andere apparaten die warmte produceren.
- Gebruik alleen opladers en batterijtypen die in deze bijsluiter worden gespecificeerd.
- Bescherm de kabels tegen mogelijke schadebronnen.
- Demonteer het apparaat niet; er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Als u knoeit met het apparaat of het uit elkaar haalt, vervalt de garantie.
- Haal het apparaat niet uit elkaar; er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Als u knoeit met het apparaat of het uit elkaar haalt, vervalt de garantie.
- Bescherm het apparaat tegen schokken tijdens opslag en transport.
- Geef een beschadigd of defect product alleen door aan gekwalificeerd servicepersoneel.

Informatie over productveiligheid

- Als u deze instructies niet opvolgt, kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.
- Stel batterijen niet bloot aan vuur of direct zonlicht.
- Laat uw apparaat niet vallen. Als u het op een hard oppervlak laat vallen, kan het beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet in gebieden waar elektronische apparatuur verboden is.
- Neem contact op met de fabrikant en de relevante autoriteit als er zich een ernstig incident met betrekking tot dit apparaat voordoet.
- Als u andere problemen ondervindt met uw apparaat, neem dan contact op met het verkooppunt, uw plaatselijke Bellman & Symfon kantoor of de fabrikant. Visit bellman.com voor contactinformatie.
- Oplaadbare batterijen moeten volledig worden opgeladen voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Laad batterijen alleen op bij een temperatuur tussen 0°- 35° C.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden vervangen door Bellman & Symfon of een erkend servicecentrum. Er bestaat explosiegevaar als de batterijen niet op de juiste manier worden vervangen.
- Dit apparaat mag niet in vliegtuigen worden gebruikt, tenzij dit specifiek is toegestaan door het vluchtpersoneel.

Configuratie-opties

Dit trilkussen kan met de volgende modellen mobiele telefoons en besturingssystemen worden gebruikt:

- iPhone 6S en later of moderne Android apparaten
- iOS15 of Android 8 en hoger.

Bedrijfsomstandigheden

Gebruik het apparaat in een droge omgeving binnen de temperatuur- en vochtigheidslimieten die in deze bijsluiter worden vermeld. Als het product nat wordt of wordt blootgesteld aan vocht, mag het niet langer als betrouwbaar worden beschouwd en moet het daarom worden vervangen.

Reiniging

Koppel alle kabels los voordat u uw apparaat schoonmaakt. Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in de openingen komt. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak, schuurmiddelen of perslucht.

Service en ondersteuning

Als het product beschadigd lijkt te zijn of niet naar behoren functioneert, volg dan de instructies in de gebruiksaanwijzing en deze folder. Als het product nog steeds niet naar behoren functioneert, neem dan contact op met uw audicien voor informatie over service en garantie.

Garantievoorwaarden

Bellman & Symfon garandeert dit product (exclusief de batterij) gedurende twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum tegen defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor normale gebruiks- en serviceomstandigheden en omvat geen schade als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd gebruik, ongeoorloofde demontage of verontreiniging door welke oorzaak dan ook.

Deze garantie sluit incidentele schade en gevolgschade uit. Verder dekt de garantie geen overmacht, zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. Sommige staten of rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade of beperkingen van de duur van een impliciete garantie niet toe, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten als consument. De bovenstaande garantie kan niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk ondertekend door beide partijen.

Symbool uitleg



Geeft aan dat het artikel een medisch apparaat is.



Geeft een drager aan die unieke informatie over apparaatidentificatie bevat.



Geeft aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar naar aparte inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor terugwinning en recycling.



Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.



Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medische apparaat geïdentificeerd kan worden.



Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan.



Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.



Dit symbool geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat of de bediening in de buurt van waar het symbool is geplaatst, of dat de huidige situatie vraagt om oplettendheid of actie van de operator om ongewenste gevolgen te voorkomen.



Een plaats aanduiden waar informatie kan worden gevonden, vooral in noodgevallen.



Geeft de temperatuurlimieten aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.



Geeft het bereik van de vochtigheid aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.

Probleemoplossen

Indien

Probeer dit

De LED's rood knipperen

Het batterijniveau is laag. Laad de Vibio op met behulp van de meegeleverde kabel.

De LED's niet branden

De batterijen zijn leeg. Laad de Vibio ongeveer 1,5 uur op.

Vibio geen verbinding maakt met mijn mobiele telefoon

Start door de Bluetooth-verbinding op het startscherm van de app te controleren. Als het Vibio-pictogram rood is en is doorgehaald, probeert u het volgende:

- 1 Verplaats binnen bereik.** Verplaats uw mobiele telefoon dichterbij de Vibio.
- 2 Schakel Bluetooth uit en weer in.** Veeg om het deelvenster Bedieningspaneel / Snelle instellingen op uw mobiel te openen en tik op het Bluetooth-pictogram.

Als het nog steeds niet werkt, dient u de Vibio-bedshaker en de app handmatig opnieuw in te stellen en opnieuw aan te sluiten. Probeer het volgende:

- 1 Sluit de app geforceerd.** Graag uw aandacht dat het niet genoeg is om de app alleen te sluiten.
- 2 Koppel de Vibio los.** Ga naar Instellingen > Bluetooth. Tik op ⓘ / ⚙️ en vergeet dit apparaat om "Vibio" los te koppelen. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld.
- 3 Reset de Vibio.** Trek aan de riem en houd hem vast tot de LED begint te fllikkeren. Laat los en trek het opnieuw totdat de LED's blauw beginnen op te lichten.
- 4 Stel Vibio in.** Start de Vibio-app opnieuw en volg de instructies.

Nalevingsinformatie

Hierbij verklaart Bellman & Symfon dat dit product in Europa voldoet aan de essentiële eisen van de Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen en de Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de Bellman & Symfon website bellman.com.

Technische specificaties

Afmetingen	27 × 94 × 94 mm
Gewicht	153 g
Stroom en batterij	Batterijvoeding: 1 × 3.7 V AA Lithium-ion Stroomverbruik: < 1000 mA, Inactief: < 100 µA Bedrijfstijd: Tot 40 dagen / opladen Opladtid: Tot 1,5 uur @ 500mA Charging current: Up to 500 mA, 5V DC
Kabels en aansluitingen	Kabellengte: 1 m Contacten: USB type A naar USB Micro-B
Compatibiliteit	iOS15 / Android 8 en hoger iPhone 6S en later / Moderne Android apparaten
Frequentie en dekking	■ Bluetooth frequentie: 2402 - 2480 MHz ■ Uitgangsvermogen: Max 2,5mW (4dBm) ■ Dekking: Tot 30 m, 33 yd, vrij veld. ■ Connectiviteit: Bluetooth® 5
Temperatuur tijdens transport en opslag	-10° tot 50° C
Temperatuur tijdens bedrijf	0° tot 35° C
Vochtigheid tijdens gebruik	15% tot 95%, niet-condenserend
Atmosferische druk tijdens gebruik, transport en opslag	700 hpa tot 1060 hpa
In de doos	■ BE1221-P02 Vibio Trilalarm ■ USB oplaadkabel

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warmington,
Peterborough, PE8 6UT, UK



Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1221_019MAN3.0

Date of issue: 2024-11-14

TM and © 2024 Bellman & Symfon AB. All rights reserved.