




BE1221-P02 Vibio Bed Shaker

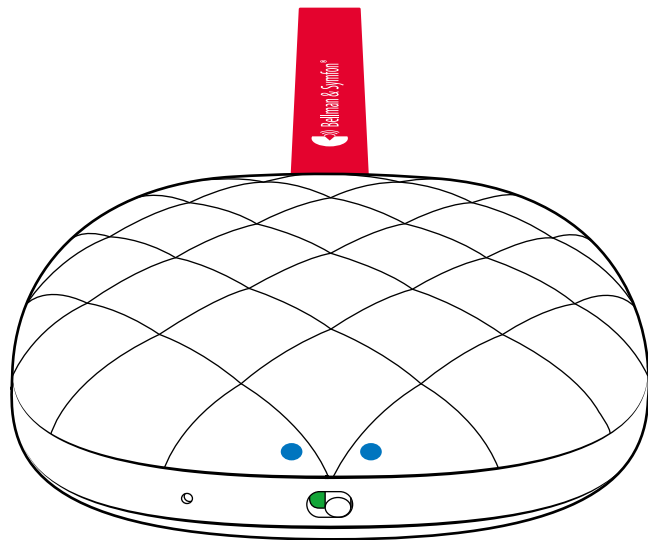

BE1221-P02 Vibio Bed Shaker

4	User manual
14	Bedienungsanleitung
24	Brugervejledning
34	Manual del usuario
44	Käyttöopas
54	Mode d'emploi
64	Manuale d'uso
74	Gebruikshandleiding
84	Brukermanual
94	Instrukcja obsługi
104	Bruksanvisning
114	Používateľská príručka

EN

DE

DK

ES

FI

FR

IT

NL

NO

PL

SE

SK

Les dette først

Dette heftet gir deg veiledning i hvordan du bruker og vedlikeholder din nye Vibio sengevibrator. Sørg for at du leser dette heftet nøye, inkludert avsnittet **Advarsler**. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte audiografen din.

Om BE1221 Vibio sengevibrator P02

Tiltenkt formål

Vibio sengevibrator er beregnet på å vekke og varsle døve og hørselshemmede personer om en innstilt alarm.

Prinsipp for drift

Vibio sengevibrator plasseres vanligvis under puten eller madrassen, og alarmen stilles inn i Vibio-applikasjonen på mobiltelefonen. Når alarmen går, vibrerer sengevibratoren under puten eller madrassen for å vekke brukeren. Når alarmen er innstilt, fungerer sengevibratoren på egen hånd.

Tiltenkt brukergruppe

Den tiltenkte brukergruppen består av personer i alle aldre med mildt til alvorlig hørselstap eller døvhets som trenger lyd-, syns- eller sanseforsterkning.

Tiltenkt bruker

Den tiltenkte brukeren er en person med mildt til alvorlig hørselstap eller døvhets som skyldes organiske forhold.



Enheten vil ikke gjenopprette normal hørsel og vil ikke forhindre eller forbedre en hørselsnedsettelse eller døvhets som skyldes organiske forhold.


Velkommen!

Du trenger

- En mobiltelefon med iOS15 / Android 8 eller nyere.
- En USB-strømadapter

I esken


- 1 Ladekabel
- 2 Vibio sengevibrator

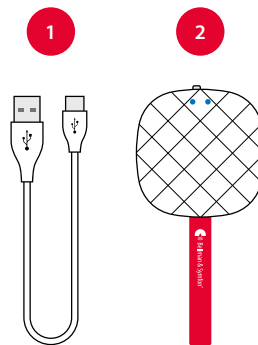

BE1221-P02 Vibio sengevibrator

Se etter de blinkende LED-lysene

- Hvitt betyr at den er aktivert av en alarm eller kommuniserer med mobiltelefonen.
- Blått betyr at den er klar til å pares.
- Grønt betyr at den lader.
- Gult betyr at du har et innkommende anrop eller en melding.
- Rødt betyr at batterinivået er lavt.

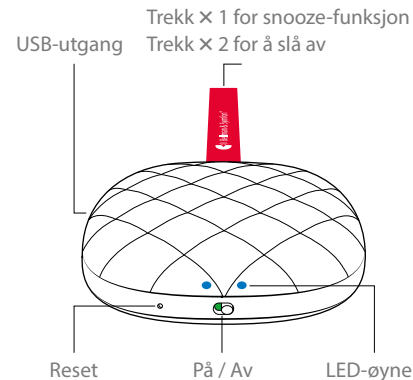

NO


Installer Vibio

1 Koble til strøm

Koble ladekabelen til Vibio og koble kontakten til en USB-strømadapter eller en USB-utgang på datamaskinen.

2 Slå den på

Skyv av/på-bryteren mot høyre og hold Vibio nær telefonen.

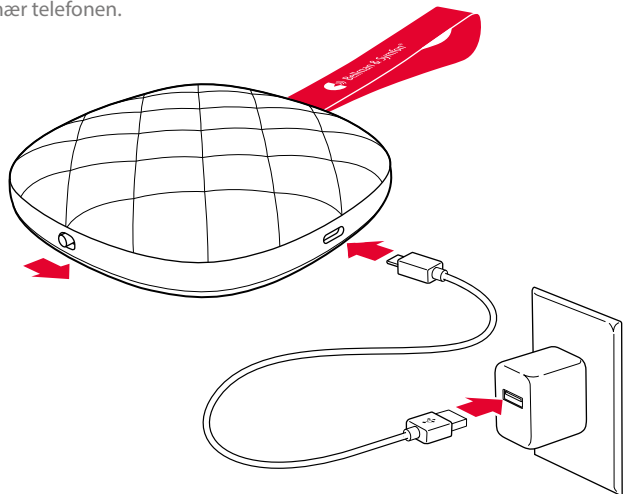

3 Installer appen



Last ned **Vibio** app fra App Store® eller Google Play™ og følg konfigurasjonsinstruksjonene.



Bruke appen

Administrere alarmer



Legge til. Trykk på pluss-knappen for å legge til en ny alarm.



Redigere. Trykk på blyant-knappen for å endre en alarm.



Slett. Trykk på minus-knappen for å slette en alarm.



På / Av. Trykk på av/på-knappen for å aktivere eller deaktivere en alarm.

Overvåking Vibio



Tilkobling. Vibiosymbolet viser tilkoblingsstatus.




Batteri. Batterisymbolet viser Vibios batterinivå.

Lære mer



Hjelp. Trykk på Meny > Hjelp for å lære mer om Appen.

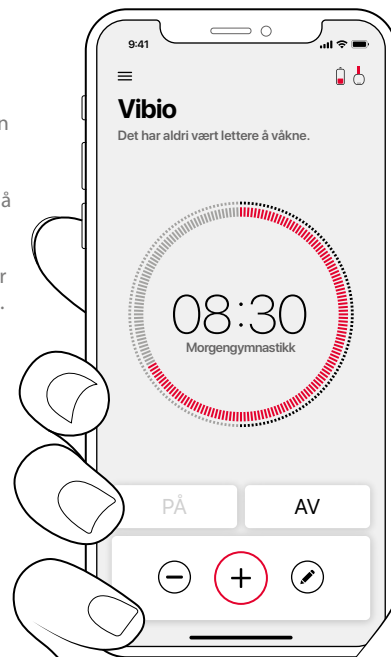

Viktig sikkerhetsinformasjon

Dette avsnittet inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering og bruk. Ta vare på denne brosjyren for fremtidig bruk. Hvis du bare skal installere enheten, må denne brosjyren gis til huseieren.



Advarsler om farer

- Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen personskade eller skade på enheten eller annen eiendom.
- Oppbevar denne enheten utilgjengelig for barn under 3 år.
- Vær oppmerksom på at alarmer og varsler kan utebli hvis batteriene tar slutt.
- Ikke bruk eller oppbevar denne enheten i nærheten av varmekilder som åpen ild, radiatorer, ovner eller andre enheter som produserer varme.
- Bruk bare strømadaptere og batterityper som er spesifisert i denne brosjyren.
- Beskytt kablene mot potensielle skadekilder.
- Ikke demonter enheten; det er fare for elektrisk støt. Garantien bortfaller hvis enheten manipuleres eller demonteres.
- Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Enheten må ikke utsettes for fuktighet.
- Beskytt enheten mot støt under lagring og transport.
- Beskytt enheten mot støt under lagring og transport.



Informasjon om produktsikkerhet

- Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade på enheten og gjøre garantien ugyldig.
- Batteriene må ikke utsettes for ild eller direkte sollys.
- Ikke slipp enheten din fra deg. Hvis du mister den på en hard overflate, kan den bli skadet.
- Ikke bruk enheten i områder der elektronisk utstyr er forbudt.
- Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, må du kontakte produsenten og relevante myndigheter.
- Hvis du får andre problemer med enheten din, må du kontakte kjøpsstedet, ditt lokale Bellman & Symfon-kontor eller produsenten. Besøk bellman.com for kontaktinformasjon.
- Oppladbare batterier bør lades helt opp før enheten tas i bruk for første gang. Lad batteriene kun i en temperatur mellom 0° og 35° C.
- Oppladbare batterier skal kun skiftes av Bellman & Symfon eller et autorisert serviceverksted. Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke skiftes ut på riktig måte.
- Denne enheten skal ikke brukes på fly med mindre flypersonalet har gitt spesiell tillatelse.

Konfigurasjonsalternativer

Denne senge vibratoren kan brukes med følgende modeller av mobiltelefoner og operativsystemer:

- iPhone 6S og nyere eller moderne Android-enheter
- iOS15 eller Android 8 og nyere.

Driftsforhold

Bruk enheten i tørre omgivelser innenfor de temperatur- og fuktighetsgrensene som er angitt i denne brosjyren. Hvis produktet blir vått eller utsettes for fuktighet, er det ikke lenger å anse som pålitelig og bør derfor skiftes ut.

Rengjøring

Koble fra alle kabler før du rengjør enheten. Bruk en myk, løfri klut. Unngå å få fuktighet inn i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk, slipemidler eller trykkluft.

Service og støtte

Hvis produktet ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som det skal, følger du instruksjonene i brukerhåndboken og denne brosjyren. Hvis produktet fortsatt ikke fungerer som tiltenkt, kan du kontakte din lokale audiograf for informasjon om service og garanti.

Garantibetingelser

Bellman & Symfon garanterer dette produktet (unntatt batteriet) i to (2) år fra kjøpsdato mot eventuelle defekter som skyldes feil i materialer eller utførelse. Denne garantien gjelder kun ved normal bruk og service, og omfatter ikke skader som følge av uhell, forsømmelse, misbruk, uautorisert demontering eller forurensning, uansett årsak.

Denne garantien omfatter ikke tilfældige skader og følgeskader. Garantien dekker heller ikke naturkatastrofer som brann, oversvømmelse, orkaner og tornadoer. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat. Noen stater eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfældige skader eller følgeskader, eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, slik at begrensningen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Ovennevnte garanti kan ikke endres, med mindre den er skriftlig undertegnet av begge parter.

NO

Symbolforklaring

	Indikerer at enheten er en medisinsk enhet.
	Indikerer en bærer som inneholder unik informasjon om enhetens identifikator.
	Indikerer at produktet ikke skal kastes som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.
	Angir produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.
	Angir produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
	Angir produsenten av den medisinske enheten.
	Dette symbolet indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen.
	Dette symbolet indikerer at det er nødvendig med forsiktighet ved bruk av enheten eller kontrollenheten i nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever at operatøren er oppmerksom på eller handler for å unngå uønskede konsekvenser.
	Å identifisere et sted hvor man kan finne informasjon, spesielt i en nødsituasjon.
	Angir temperaturrensene som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.
	Angir fuktighetsområdet som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.

Feilsøking

Hvis	Prøv dette
LED-lys blinker rødt	Batterinivået er lavt. Lade Vibio med medfølgende ladekabel.
LED-lysene lyser ikke	Batteriene er tomme. Lad Vibio i ca. 1,5 time.
Vibio kan ikke kobles til mobiltelefonen min	Start med å kontrollere Bluetooth-tilkoblingen på appens startside. Hvis Vibio -ikonet er rødt og overstreket kan du prøve følgende: 1 Beveg deg innen rekkevidde. Flytt mobilen nærmere Vibio. 2 Slå Bluetooth av og på. Sveip for å åpne kontrollsenteret / hurtiginnstillingspanelet på mobilen og trykk på Bluetooth-ikonet. Hvis den fremdeles ikke virker, må du nullstille og starte Vibio Bed Shaker og appen manuelt. Prøv følgende: 1 Tving appen til å avslutte. Merk at det er ikke nok å bare lukke den. 2 Koble fra Vibio. Gå til Innstillinger > Bluetooth. Trykk på ⓘ / ⚙ og Glem denne enheten for å koble fra "Vibio". Sørg for at Bluetooth er på. 3 Nullstill Vibio. Trekk og hold i stroppen til LED-lysene begynner å flimre. Slipp og trekk på nytt til LED-lysene begynner å pulsere i blått. 4 Konfigurerer Vibio. Start Vibio -appen igjen og følg instruksjonene.

NO

Samsvarsinformasjon

Bellman & Symfon erklærer herved at dette produktet i Europa er i samsvar med de grunnleggende kravene i Medical Device Regulation (EU) 2017/745 og Radio Equipment Directive 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen kan hentes fra Bellman & Symfon-nettstedet bellman.com.

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner	27 × 94 × 94 mm
Vekt	153 g
Strøm og batteri	Batteristrom: 1 × 3,7 V AA Litium-ion Strømforbruk: < 1000 mA, Inaktiv: < 100 µA Driftstid: Opptil 40 dager/ladning Ladetid: Opptil 1,5 time ved 500 mA Ladestrom: Opptil 500 mA, 5 V likestrøm
Kabler og tilkoblinger	Kabellengde: 1 m Kontakter: USB type A til USB Micro-B
Kompatibilitet	iOS15 / Android 8 og nyere iPhone 6S og nyere / Moderne Android-enheter
Frekvens og dekning	■ Bluetooth-frekvens: 2402 - 2480 MHz ■ Utgangseffekt: Maks. 2,5 mW (4 dBm) ■ Dekning: Opp til 30 m, 33 yard, fritt felt. ■ Tilkoblingsmuligheter: Bluetooth® 5
Temperatur under transport og lagring	-10° til 50° C
Temperatur under drift	0° til 35° C
Luftfuktighet under drift	15 % til 95 %, ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk under drift, transport og lagring	700 hpa til 1060 hpa
I esken	■ BE1221-P02 Vibio sengevibrator ■ USB-ladekabel

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warmington,
Peterborough, PE8 6UT, UK



Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1221_019MAN3.0

Date of issue: 2024-11-14

TM and © 2024 Bellman & Symfon AB. All rights reserved.