



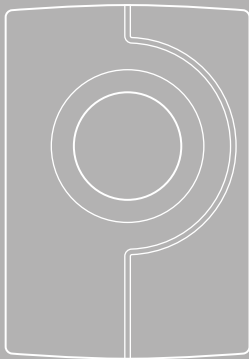

BE1420-868

Visit Pushbutton Transmitter

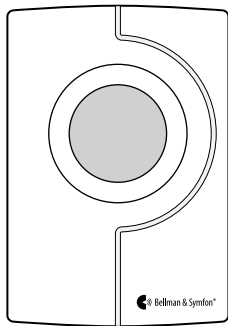



04	User manual
14	Bedienungsanleitung
24	Brugervejledning
34	Manual del usuario
44	Käyttöopas
54	Mode d'emploi
64	Manuale d'uso
74	Gebruikshandleiding
84	Brukermanual
94	Instrukcja obsługi
104	Bruksanvisning
114	Používateľská príručka

EN
DE
DK
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PL
SE
SK

Les dette først

Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder din nye Visit Trykknappsender. Sørg for at du leser den nøye, inkludert delen **Advarsler**. Hvis du har flere spørsmål, kontakt din audiograf.

Tiltenkt formål Visit varslings-systemet er ment å varsle døve og hørselshemmede om viktige signaler i hjemmet.

Tiltenkt bruker Den tiltenkte brukeren er en person med mild til alvorlig hørselstap.

Tiltenkt brukergruppe Den tiltenkte brukergruppen består av mennesker i alle aldre med mild til alvorlig hørselstap som trenger lyd, visuell eller sensorisk forsterkning.


Prinsipp for drift Visit varslings-system består av et sett sendere og mottakere som er trådløst sammenkoblet og plassert i hele hjemmet. Når en sender oppdager en aktivitet, sender den et signal til Visit-mottakeren som varsler brukeren med lyd, blinking eller vibrasjoner. For å bruke systemet må du minimum ha en sender og en mottaker.

Bruke den som dørklokke

Montering med skruer

- 1 Fjern frontdekselet på senderen og lag to hull på markeringene.
- 2 Fest enheten til veggen med de medfølgende skruene, og sett på dekselet igjen.


Mouting med tape. Du kan i stedet velge å bruke den medfølgende teipen. Fest den på baksiden av senderen, og monter den på et værbeskyttet sted.

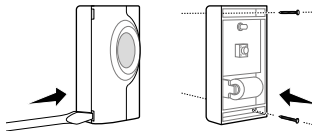

Bruke den som en oppringingsknapp

Senderen kan bæres rundt halsen og brukes som en trådløs oppringingsknapp.

Slik bruker du den: Fest snoren til det øverste hullet på senderen, og heng den rundt halsen.

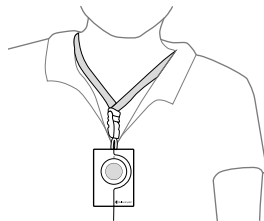


NO

Testing av signalet

Bruke testknappene

- 1 Trykk på frontknappen på senderen. LED-lampen lyser grønt for å vise at et radiosignal overføres.
- 2 Den grønne Visit LED-lampen på mottakeren lyser for å vise at signalet ble mottatt. I tillegg begynner den å lyde, blinke eller vibrere, avhengig av mottaker.

Merk: Hvis du har endret signalmønsteret, vil det reagere i samsvar med signaltabellene som du finner på nettstedet vårt.

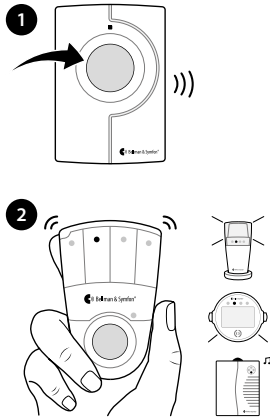

Generelle advarsler

Denne delen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering og driftsforhold. Oppbevar dette heftet for fremtidig bruk. Hvis du kun installerer enheten, må dette heftet gis til bruker.



Advarsler om fare

- Hvis man ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen skade på apparatet eller annen eiendom.
- Sørg for å holde dette apparatet utenfor rekkevidde for barn under 3 år.
- Merk at du kan gå glipp av alarmer og varsler dersom batteriene slutter å fungere.
- Bruk kun batterityper som er spesifisert i denne brosjyren.
- Dette apparatet er ment for innendørs- og utendørs bruk på et beskyttet sted. Det tåler ikke vann eller regn.
- Beskytt enheten mot støt under lagring og transport.
- Du må ikke bruke eller oppbevare dette apparatet i nærheten av varmekilder som åpen ild, radiatorer, ovner eller andre apparater som produserer varme.

- Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Den må derfor installeres og brukes i samsvar med brukerveiledningen, siden det kan forårsake forstyrrelser på radiokommunikasjonen.
- Du må ikke ta fra hverandre apparatet; det finnes risiko for elektrisk støt. Dersom man forsøker å endre på eller demontere apparatet, vil det gjøre garantien ugyldig.
- Du må ikke foreta endringer eller modifiseringer av dette apparatet. Bruk kun originalt tilbehør fra Bellman & Symfon for å unngå elektrisk feil.
- Batterier er giftige. Ikke svelg dem! Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hvis de svelges, må du umiddelbart kontakte lege!

- i Informasjon om produktsikkerhet**
- Hvis man ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade på apparatet og at garantien blir ugyldig.
 - Ikke utsett batteriene for brann eller for direkte sollys.
 - Ikke slipp apparatet i bakken. Apparatet kan ta skade hvis det slippes ned på en hard overflate.
 - Ikke bruk enheten i områder der bruk av elektronisk utstyr er forbudt.
 - Apparatet må kun repareres av et autorisert servicesenter.

- Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med bruk av dette apparatet, må du kontakte produsenten eller en annen relevant instans.
- Hvis det oppstår problemer med apparatet ditt, må du kontakte stedet der du kjøpte apparatet, ditt lokale Bellman & Symfon-kontor eller produsenten. Besøk **bellman.com** for kontaktinformasjon.
- Har ingen selskaper, foretak eller brukere lov til å endre frekvensen, forbedre sendekraften eller endre de opprinnelige egenskapene eller ytelsen på en godkjent lavfrekvent radiofrekvens-enhet.
- Dette apparatet skal ikke brukes på fly med mindre det er spesifikt tillatt av flypersonell.

Driftsforhold

Bruk apparatet i et tørt miljø innenfor det temperaturområdet og de fuktighetsgrensene som er angitt i denne brosjyren. Dersom produktet blir vått eller blir utsatt for fuktighet, bør det ikke lenger regnes som pålitelig og må derfor erstattes.

Rengjøring

Koble fra alle kabler før du rengjør apparatet. Bruk en myk klut som ikke loer. Unngå at fuktighet kommer inn i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler, aerosolspray, løsemidler, alkohol, ammoniakk, slipemidler eller trykkluft.

Service og support

Hvis apparatet ser ut til å være skadet eller ikke fungerer korrekt, må du følge instruksjonene i dette heftet. Hvis produktet fremdeles ikke fungerer som det skal, må du kontakte din hørselsspesialist for informasjon om service og garanti.

Garantibetingelser

Bellman & Symfon tilbyr garanti for dette produktet (unntatt batteriet) i to (2) år fra kjøpsdatoen mot alle defekter som skyldes feil på materialer eller konstruksjonsfeil. Denne garantien gjelder kun for vanlige bruksforhold og service, og omfatter ikke skade som skyldes ulykke, vanskjøtsel, feilaktig bruk, uautorisert demontering eller kontaminering, uansett hvordan dette er oppstått. Denne garantien omfatter ikke tilfeldig eller indirekte skade. Videre dekker ikke garantien force majeure, slik som brann, oversvømmelse, orkaner og tornadoer. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan også ha andre rettigheter som varierer i forhold til hvor du bor. Enkelte land og jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfeldige eller indirekte skader, eller begrensninger på hvor lenge en implisitt garanti varer, derfor er det mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker. Garantien ovenfor kan ikke endres med mindre begge parter samtykker i dette skriftlig.

Forklaring av symboler



Indikerer at enheten er en medisinsk enhet.



Indikerer en bærer som inneholder unik informasjon om enhetens identifikator.



Indikerer at produktet ikke skal kastes som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.



Angir produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.



Angir produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.



Angir produsenten av den medisinske enheten.



Dette symbolet indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen.



Dette symbolet indikerer at det er nødvendig med forsiktighet ved bruk av enheten eller kontrollenheten i nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever at operatøren er oppmerksom på eller handler for å unngå uønskede konsekvenser.



Å identifisere et sted hvor man kan finne informasjon, spesielt i en nødsituasjon.



Angir temperaturgrensene som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.



Angir fuktighetsområdet som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.

Feilsøking

Hvis	Prøv dette
LED-lampen lyser gult når jeg trykker på knappen	▪ Batteriet er nesten utladet. Bytt ut med et nytt batteri (se Tekniske spesifikasjoner).
LED-lampen lyser ikke når jeg trykker på knappen	▪ Kontroller at batteriet er riktig plassert. ▪ Bytt ut med et nytt batteri (se Tekniske spesifikasjoner).
LED-lampen lyser grønt, men mottakeren er ikke aktivert	▪ Kontroller mottakerens batterier og tilkoblinger. ▪ Flytt mottakeren nærmere senderen for å sørge for at den er innenfor radiorekkevidde. ▪ Kontroller at enhetene er innstilt på samme radionøkkel, se Endre radionøkkel på vår nettside.
Mottakeren aktiveres uten noen åpenbar grunn	▪ Det er sannsynligvis et annet Visit system installert i nærheten som utløser systemet ditt. Endre radionøkkel på alle enheter, se Endre radionøkkel på vår nettside.

Tekniske spesifikasjoner

Mål	66×48×23 m
Vekt	50 g, inkludert batteri
Strøm og batteri	Batteri: 1×6 V Alkalisk PX28M/IEC-4LR44 eller PX28L Litium Strømforbruk: Aktiv 35 mA, ledig posisjon 0,05 µA Driftstid: Alkalisk ~ 2 år, litium ~ 4 år
Maks utgang	-0.9dBm
Aktivering	Via frontknappen
Radiofrekvens	868.30MHz
Dekning	50 - 250 m avhengig av bygningens egenskaper.
Drift	Temperatur: -10° til 40° C, Luftfuktighet: 15 % - 90 %, ikke-kondenserende
Konfigurasjon	Denne senderen kan brukes med alle Visit mottakere.
Antall radiotaster	64 som standard. Opptil 256 med valgfri programvare.
I esken	▪ BE1420-868 Visit Trykknappsender ▪ Snor med sikkerhetslås ▪ Selvklebende tape, skruer og plugg

Informasjon om samsvar

Bellman & Symfon erklærer herved at dette produktet i Europa er i samsvar med de grunnleggende kravene i Medical Device Regulation (EU) 2017/745 og Radio Equipment Directive 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen kan hentes fra Bellman & Symfon-nettstedet **bellman.com**.

Nettsted:



NO

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warmington,
Peterborough, PE8 6UT, UK



Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone: +46 31 68 28 20
E-mail: info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1420_082MAN3.0

Date of issue: 2025-01-24

TM and © 2024 Bellman & Symfon AB.

All rights reserved.