




BE1481/ BE1481-DE
Visit Smoke Alarm

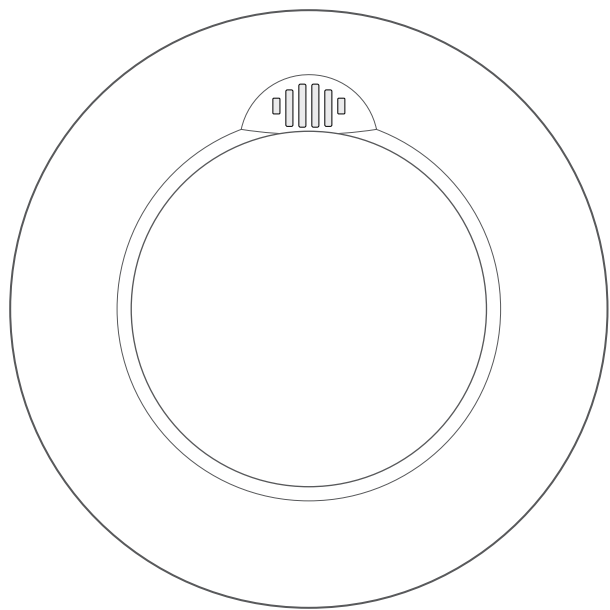



Visit Smoke Alarm

4	User manual
26	Bedienungsanleitung
48	Brugervejledning
70	Manual del usuario
92	Käyttöopas
114	Mode d'emploi
136	Manuale d'uso
158	Gebruikshandleiding
180	Brukermanual
202	Instrukcja obsługi
224	Bruksanvisning
246	Používateľská príručka

EN

DE

DK

ES

FI

FR

IT

NL

NO

PL

SE

SK

Les dette først

Dette heftet gir deg veiledning i hvordan du bruker og vedlikeholder din nye Visit røykvarsler. Sørg for at du leser dette heftet nøye, inkludert avsnittet Advarsler. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte audiografen din.

Om BE1481/-DE Visit Røykvarsler

Tiltenkt formål

Visit Smoke og CO Alarm-enhetene er ment å oppdage røyk og ulmende brann eller karbonmonoksid på et tidlig stadium og overføre et signal direkte til mottakerne av Visit Alerting-systemet.

Tiltenkt brukergruppe

Den tiltenkte brukergruppen er personer i alle aldre med mildt til alvorlig hørselstap og som trenger ekstra varslingssystem for å oppdage brann- eller CO-alarmer innendørs.

Tiltenkt bruker

Den tiltenkte brukeren av røyk- og CO-alarm-enhetene er en person med mildt til alvorlig hørselstap, som har behov for forsterkede brann- eller CO-varsler og som bruker audio/visuell/sensorisk varsling innendørs.


Prinsipp for drift

Brann- og CO-alarmene er deler av Visit-varslingssystemet. Visit-varslingssystemet består av forskjellige sendere, som trådløst kommuniserer med en rekke mottakere. Når den utløses, sender senderen et trådløst signal til de tilkoblede mottakerne som, avhengig av hvilken funksjon enheten har, vil bruke blinkende lys-, lyd- eller vibrasjonsmønstre for å varsle brukeren. Brann- eller CO-alarmer oppdager røyk, ulmende brann eller karbonmonoksid på et tidlig tidspunkt og sender alarmer direkte til Visit-mottakerne.

⚠ En røykvarsler er et apparat for tidlig varsling. Når apparatet brukes riktig kan det gi deg og familien din verdifull ekstra tid til å flykte. Når alarmer høres, må du straks evakuere lokalene før du begynner å enhver undersøkelse.

⚠ Apparatet vil ikke gjenopprette normal hørsel, forhindre eller forbedre en hørselshemming eller døvhhet som skyldes organiske forhold.

Oversikt

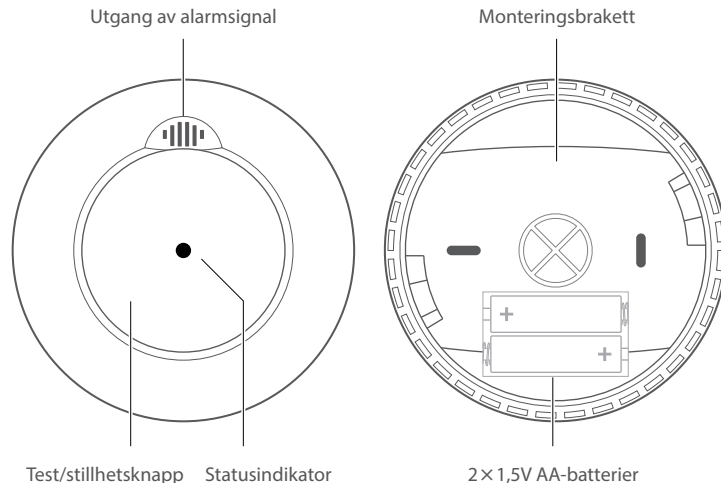


NO

Installasjon

Sette opp røykvarsleren


- 1 Fjern festebraketten fra røykvarsleren ved å vri den mot klokken. Sett inn batteriene som er inkludert for å starte apparatet.
- 2 Fest monteringsbraketten til taket ved hjelp av skruer og plugger. Forsikre deg om at den er plassert minst 50 cm (20") fra vegger og andre hindringer, se **Plassering og posisjonering**.
- 3 Sett røykvarsleren på bracketten ved å vri den med klokken til den klikker på plass.

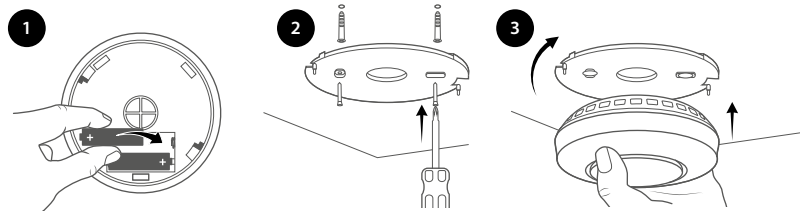

Test av tilkoblingen

- 1 Trykk og hold testknappen på røykvarsleren til alarmen lyder og statusindikatoren begynner å blinke. Røykvarsleren sender et radiosignal til mottakeren.
- 2 Rød besøks-LED på mottakeren lyser opp for å vise at signalet ble mottatt. I tillegg vil det komme lyd, blinke eller vibrere avhengig av mottakeren.

- i** Røykvarsleren vil slutte å komme med lyd kort tid etter at knappen er sluppet og Visit mottakeren vil avbrytes på mindre enn et minutt.

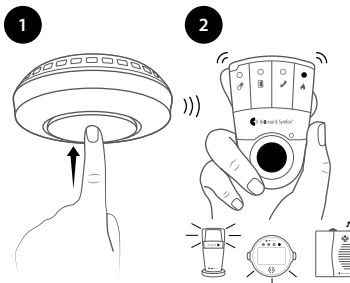

Signalmønster

Statusindikatoren for røykvarsler blinker rødt en gang hvert 50. sekund for å vise at den fungerer som den skal. Avhengig av årsaken til alarmen, er signalmønstrene følgende:

Årsak	Lyd	Statusindikator	Visit mottaker
▪ Aktivert av røyk	■ ■ ■ ■ □	Blinker raskt	Brannalarm
▪ Aktivteres av varme	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Blinker raskt	Brannalarm
▪ Lavt batteri	Kvitrer hvert 50 sek.	Blinker hvert 50 sek.	Blinkende rød LED
▪ Feil apparat	Kvitrer hvert 50 sek.	Blinker hvert 50 sek.	–

- i** Når det kommer en advarsel om lavt batteri for første gang, har du minst 30 dager på å bytte den. Du kan trykke på testknappen for å midlertidig skjule advarselen om lavt batteri i 10 timer.

Bruker kringkasting

Dersom du vil at røykvarslings-signalet skal overføres til **alle** Visit mottakere innenfor radioområdet, så kan du aktivere kringkastingsmodus. Dette vil overstyre innstillingene for radiotasten.

For å aktivere kringkastingen, trykk tre ganger på testknappen til røykvarsleren etter hverandre. Røykvarsleren kvitrer og blinker tre ganger for å vise at sendemodus er aktivert.

- !** Advarsler med lavt batteri og alarmtester ved bruk av testknappen, blir kun overført til mottakere med samme radiotast.

For å deaktivere kringkasting, trykk tre ganger på testknappen etter hverandre. Røykvarsleren kommer med en jevn lyd og lys i 2 sekunder. Røykvarsleren har nå returnert til den siste lagrede radiotasten.

Stillhetsmodus

Hvis du opplever falske alarmer, trykk og hold inne testknappen i 2 sekunder for å stille alarmen midlertidig. Status-LED blinker hvert 16. sekund for å vise at alarmen er taus.

- i** Stillhetsmodusen avbrytes automatisk etter 10 minutter.

NO

Bytte radiotast

Dersom Visit systemet er aktivert uten grunn, så er det sannsynligvis et nærliggende system som utløser ditt. For å unngå radioforstyrrelser, må du bytte radiotast på alle apparatene. Prosedyren er forskjellig avhengig av systemoppsettet.


Systemer med *forskjellige* typer sendere

Først må du endre radiotasten på alle **andre** sendere i systemet ved å flytte på noen av radiotastbryterne, se den tilhørende brukermanual for sender. Merk at alle sendere må være satt til samme radiotast for å fungere som en gruppe.




Trinn 1: Bytt radiotast på røykvarsleren

- 1 Fjern et av batteriene for å slå av røykvarsleren og vent minst 30 sekunder. Trykk og hold inne testknappen når du setter batteriet inn igjen. Fortsett å trykke på testknappen til statusindikatoren begynner å blinke. Nå kan du slippe knappen. Statusindikatoren vil blinke raskt for å vise at røykvarsleren er klar til å motta den nye radiotasten.
- 2 Trykk på testknappen på en **annen** sender innen 25 sekunder for å overføre den nye radiotasten.
- 3 Statusindikatoren for røykvarsleren sender ut et konstant lys for å vise at radiotasten er endret. Trykk på testknappen for å lagre den nye radiotasten og avslutte sammenkoblings-modusen.

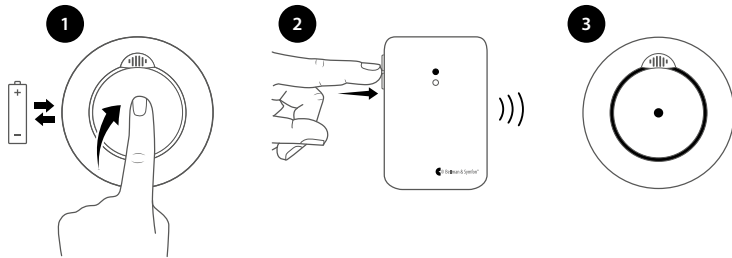

Trinn 2: Bytt radiotast på mottakeren

- 1 Trykk og hold test/funksjonsknappen inne på mottakeren til grønne og gule besøks-LED som blinker vekselvis. Slipp knappen.
- 2 Trykk på testknappen på en hvilken som helst sender innen 25 sekunder for å overføre den nye radiotasten.
- 3 Alle besøks-LED på mottakeren blinker 5 ganger for å vise at radiotasten er endret.

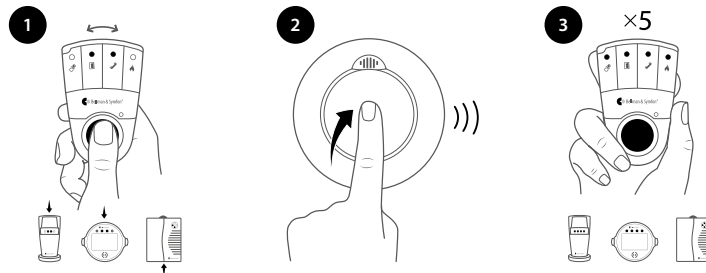

NO


Bytte radiotast

Systemer *kun med* BE1481/-DE Visit Røykvarslerer

Trinn 1: Bytt radiotast på røykvarsleren


- 1 Fjern et av batteriene for å slå av røykvarsleren og vent minst 30 sekunder.. Trykk og hold inne testknappen mens du setter inn batteriet igjen og fortsett å holde den inne til status-LED går fra sakte til raske blink. Slipp knappen for å gå inn i programmeringsmodus.
- 2 Røykvarsleren tilbakestilles til radiotast 0 og status-LED lyser for å bekrefte.
- 3 **I løpet av 4 sekunder**, må du trykke og hold testknappen inne til LED slukker, for å velge neste radiotast. Nå er radiotast 1 valgt og status-LED lyser for å bekrefte. Følg denne fremgangsmåten for å gå videre til neste radiotast. Det er 9 radiotaster tilgjengelig. Hvis du fortsetter utover radiotast 9, tilbakestilles enheten til radiotast 0.
- 4 Etter 4 sekunder går røykvarsleren automatisk fra programmeringsmodus og LED vil slukke for å bekrefte.

i Følg trinnene ovenfor for å endre radiotasten på alle BE1481/-DE røykvarsler i systemet. Alle Visit enheter må være satt til radiotast for å fungere som en gruppe

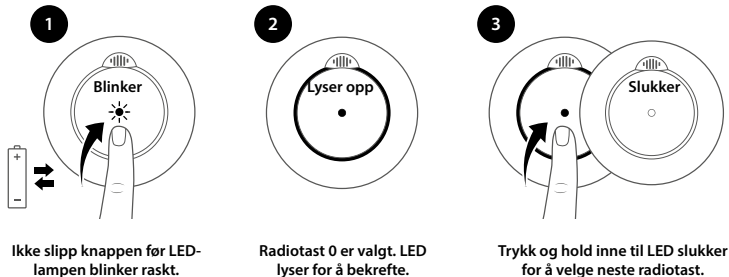

Trinn 2: Bytt radiotast på mottakeren

- 1 Trykk og hold test/funksjonsknappen inne på mottakeren til grønne og gule besøks-LED som blinker vekselvis. Slipp knappen.
- 2 Trykk på testknappen på en hvilken som helst sender innen 25 sekunder for å overføre den nye radiotasten.
- 3 Alle besøks-LED på mottakeren blinker 5 ganger for å vise at radiotasten er endret.

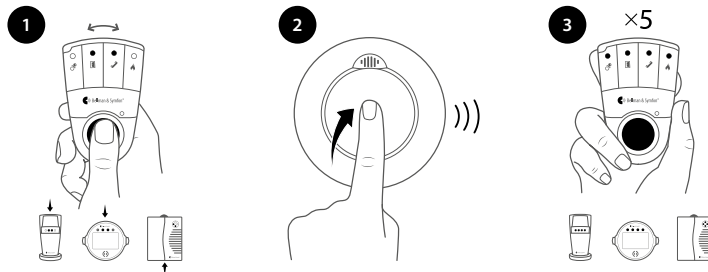

Plassering og posisjonering

Det må komme tilstrekkelig med røyk inn i røykvarsleren før den vil respondere. Røykvarsleren din må være innen 7,5 meter (25 ft.) fra brannen for å kunne reagere raskt. Røykvarslerne dine må også være plassert, slik at de kan høres i hele eiendommen og vekke deg og familien din i tide for at alle skal komme seg ut. En røykvarsler vil gi litt beskyttelse hvis den er riktig installert, men de fleste hjem vil kreve to eller flere for å sikre tidlige varsler. For anbefalt beskyttelse bør du installere en røykvarsler i alle rom der brann mest sannsynlig bryter ut (bortsett fra kjøkken og bad). Den første røykvarsleren din skal plasseres mellom soveområdet og de mest sannsynlige brannkildene (som for eksempel stue), men den skal ikke være mer enn 7,5 meter (25 ft.) fra døren til ethvert rom der brannen kan starte og blokkere at du kommer deg ut av huset.

NO

Bolig med en etasje

Dersom hjemmet ditt er på ett plan, bør du legge den første røykvarsleren din i en korridor eller gang mellom sove- og oppholdsarealene. Plasser den så nær boområdet som mulig, men pass på at du kan høre det høyt nok til at det vekker deg på soverommet, se **Figur 1**.

i Røykvarslerne bør fortrinnsvis kobles til en Visit mottaker for å gi en ekstra advarsel i hele eiendommen.

! Dersom hjemmet ditt er veldig stort og korridoren eller gangen er mer enn 15 meter (50 ft.) lang, så vil ikke en røykvarsler være tilstrekkelig. Dette er fordi at uansett hvor den befinner seg, så vil den være mer enn 7,5 meter (25 ft.) fra potensielle branner.

Minimum beskyttelsesnivå

- I hver etasje
- I hvert soveområde
- Hver 7,5 meter i gang og rom
- Innen 3 meter fra alle soveromsdører

I hus med mer enn et soverom, bør det plasseres røykvarsler mellom hvert soveområde og boareal, se **Figur 2**.

Boliger med flere etasjer

Dersom hjemmet ditt har mer enn en etasje, bør det monteres minst en røykvarsler i hver etasje, se **Figur 3**.

i Koble røykvarslerne til en eller flere Visit mottakere, for å være sikker på at alarmen blir lagt merke til i hele eiendommen.


Anbefalt beskyttelse

Brannmyndighetene anbefaler at du installerer en røykvarsler i eller i nærheten av alle rom der det mest sannsynlig vil bryte ut en brann (bortsett fra stedene du bør unngå, som nevnt nedenfor). Om natten er det mest sannsynlig at en brann starter i stuen, etterfulgt av kjøkkenet og deretter spisestuen.


Du bør også vurdere å sette en røykvarsler i alle soverom der det kan oppstå brann, for eksempel der det er et elektrisk apparat som et elektrisk teppe eller varmeovn, eller

Recommended protection level


- i** tillegg:
- I alle rom, unntatt bad og kjøkken

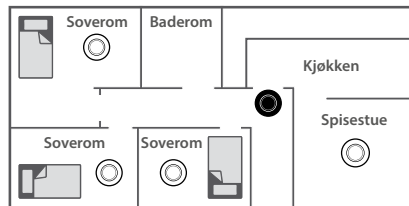

Figur 1 Bolig i en etasje

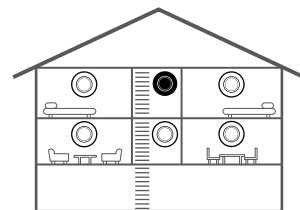

Figur 3 Bolig med flere etasjer

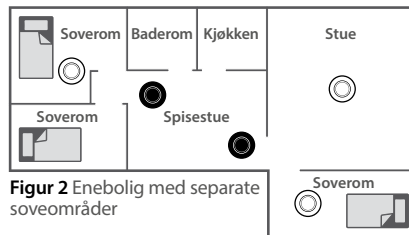

Figur 2 Enebolig med separate soveområder

hvor det er en beboer som røyker. Du kan også vurdere å sette en røykvarsler i alle rom der beboeren ikke er i stand til å respondere godt dersom det starter en brann i rommet, for eksempel en eldre eller syk person eller et veldig lite barn.

Kontroll av lyd på alarmene

Kontroller at alarmen høres på de tiltenkte stedene og kontroller at alarmen kan høres på hvert soverom med lukket dør og er høyere enn lyden fra TV/lydanlegg. TV/lydanleggene skal ha et rimelig høyt samtalenivå. Dersom du ikke kan høre alarmen over lyden til TV/lydanlegget, så er sjansen stor for at den ikke vil vekke deg.

i Koble røykvarslerne til en eller flere Visit mottakere, for å være sikker på at alarmen blir lagt merke til i hele eiendommen.

NO


Posisjonering

I et tak


Varm røyk stiger og sprer seg, så en sentral takposisjon er et anbefalt sted. Luften er "død" og beveger seg ikke i hjørner, derfor må du ikke montere røykvarslerer i hjørnene. Plasser enheten minst 0,5 m fra lysarmaturer eller dekorative gjenstander som kan hindre røyk i røykvarsleren. Plasser den minst 0,5 m fra vegger og hjørner, se **Figur 4**.

I et skrånende tak

I områder med skrått eller høyt tak installerer du røykvarsleren 0,9 m fra det høyeste punktet som er målt horisontalt, siden "død luft" på toppen kan forhindre at røyk når apparatet, se **Figur 5**.

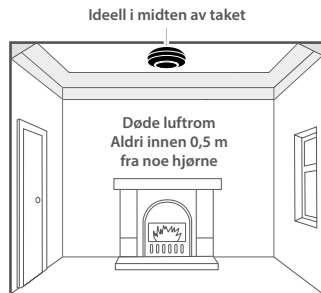

Figur 4

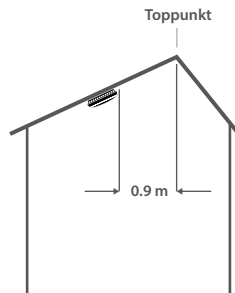

Figur 5



Steder å unngå

Ikke plasser røykvarsleren din i noen av følgende områder:

- Bad, kjøkken, dusjrom, garasjer eller andre rom der røykvarsleren kan utløses av damp, kondens, normal røyk eller røyk.
- Loft (uisolert) eller andre steder der ekstreme temperaturer kan forekomme (under 4 °C eller over 40 °C).

- I nærheten av en dekorativ gjenstand, dør, lysarmatur, vindusstøping osv. kan forhindre at røyk kommer inn i røykvarsleren.
- Overflater som normalt er varmere eller kaldere enn resten av rommet (for eksempel loftsluker, uisolerte yttervegger osv.). Temperaturforskjeller kan hindre røyk i å nå apparatet.
- Ved siden av eller direkte over varmeovner eller åpninger med luftkondisjonering, vinduer, veggventiler osv. som kan endre retning på luftstrømmen.
- Plasser den vekk fra veldig støvete eller skitne områder, siden oppbygging av støv i kammeret kan gjøre apparatet for følsomt og utløse alarm. Det kan også blokkere insektskjermen og forhindre røyk fra å komme inn i kammeret.
- I veldig høye eller vanskelige områder der det kan være vanskelig å nå alarmen for testing eller bytte av batteri.
- Plasser apparatet minst 1,5 meter fra armaturer med lysstoffrør, siden elektrisk "støy" og/eller flimring kan påvirke apparatet.
- Ikke plasser i områder som er infisert av insekter. Små insekter som kommer inn i kammeret kan forårsake intermitterende alarmer.

Testing og vedlikehold

Røykalarmen din er et redningsapparat og bør sjekkes regelmessig. Kontroller regelmessig at statusindikatoren på røykvarslerne blinker en gang i minuttet for å vise at apparatene er slått på. Bytt batteri dersom blinkingen stopper.

Manuell testing av røykvarsleren din

Det anbefales at du tester røykvarslerne dine etter installasjon og deretter minst en gang i uken for å sikre at apparatene fungerer. Det vil også hjelpe deg og familien din med å bli kjent med alarmlyden.

- Trykk og hold testknappen inne til alarmen lyder, se **Installasjon**. Alarmen vil slutte å lage lyd like etter at knappen slippes.
- Dersom du bruker en ekstra Visit mottaker, må du kontrollere at rød besøks-LED på mottakeren lyser og at den lager lyd, blinker eller vibrerer avhengig av mottakeren. Se **Installasjon** og den tilhørende brukermanualen til Visit mottakeren.
- Mottakeren avbryter i løpet av 40 sekunder.
- Gjenta denne prosedyren med alle de andre røykvarslerne i systemet.

Ikke test med flamme

Dette kan sette fyr på røykvarsleren og skade huset. Vi anbefaler ikke testing med røyk, siden resultatene kan være misvisende, med mindre det brukes spesielle apparater.

Når du trykker på testknappen, simulerer den effekten av røyk i røykvarsleren, som den kan oppleve ved en ekte brann. Det er derfor ikke nødvendig å teste røykvarsleren med røyk eller flamme.

Falske alarmer

Dersom det ikke er tegn på røyk, varme eller støy når alarmen går, som tyder på at det er brann, bør du først få familien til et trygt sted, før du begynner å undersøke.

- Sjekk huset nøye i tilfelle det er en liten brann som ulmer et sted.
- Sjekk om det er noen kilde til røyk eller sigaretter, for eksempel kokeapparater som trekkes forbi røykvarsleren av en avtrekker. I så fall kan du bare vifte vekk røyken med en avis eller lignende.
- Dersom årsaken til alarmen ikke er klar, må det antas at det skyldes en faktisk brann og boligen må evakueres umiddelbart.

 Dersom det er hyppige ordensforstyrrelser falske alarmer, kan det være nødvendig å plassere røykvarsleren vekk fra kilden til røyk. Vi anbefaler bruk av en varmealarm på kjøkkenområdet for å unngå slike falske alarmer.

Rengjør røykvarsleren din

Rengjør røykvarsleren din regelmessig. Bruk en myk børste eller børstestutstyret til støvsugeren for å fjerne støv og spindelvev fra sidene og spor der røyken kommer inn. Hold dekselet lukket mens du rengjør det.

 Ikke støvsug eller børst i røykvarsleren. Ikke mal røykvarsleren. Bortsett fra vedlikehold og rengjøring som er beskrevet i denne brosjyren, er det ikke nødvendig med noen annen service av dette produktet. Reparasjoner må utføres av produsenten når det er nødvendig.

Støv og insektforurensning

Alle røykvarsler er utsatt for støv og inntrenging av insekter, noe som kan forårsake falske alarmer. Det siste designet, materialene og produksjonsteknikkene har blitt

brukt i konstruksjonen av alarmene for å minimere effekten av forurensning. Det er derimot umulig å eliminere effekten av støv og insektforurensning helt. For å forlenge røykvarslerens levetid må du derfor sørge for at den holdes ren slik at overflødig støv ikke bygger seg opp.

-  Eventuelle insekter eller spindelvev i nærheten av røykvarsleren bør fjernes umiddelbart. Under visse omstendigheter, selv med regelmessig rengjøring, kan forurensning bygge seg opp i røyksensor-kammeret og forårsake at alarmen utløses. Hvis dette skjer, må alarmen sendes på service eller utskifting.
-  Forurensning er utenfor vår kontroll, den er helt uforutsigbar og regnes som normal slitasje. Av denne årsak dekkes ikke forurensning av garantien og det belastes en avgift for alle reparasjoner.

Bytte ut batteriene

Ferske litiumbatterier skal vare i over fem år. Når batteristrømmen er lav og utskifting er nødvendig, vil alarmen kvitre og det røde lyset vil blinke hvert 50. sekund i minst 30 dager. Deretter må batteriene byttes ut. Bytt også batteriene hvis alarmen ikke høres når du trykker på testknappen.

- For maksimal pålitelighet, må batteriet sjekkes minst en gang i året. Når du bytter batteri, må du trykke på testknappen for å kontrollere at alarmen fungerer som den skal.
- Bruk kun merke og batteritype som er spesifisert i instruksjonene. Å bruke et annet batteri kan føre til brann eller personskade.
- **Ikke legg batteriet i brann**
Batteriet skal kastes på en sikker og miljøvennlig måte i din lokale gjenvinningsstasjon. Kontakt din lokale myndighet for ytterligere råd.

Slutten på levetiden

Hele røykvarsleren må byttes dersom apparatet ble installert for mer enn 10 år siden (sjekk datoen for "erstatt med" merket på siden av apparatet).

- **Ikke legg røykvarsleren i brann**

Røykvarsleren skal kastes på en sikker og miljøvennlig måte i ditt lokale gjenvinningsstasjon. Kontakt din lokale myndighet for ytterligere råd.

Råd om brannsikkerhet

Når du bruker beskyttelsesutstyr i hjemmet, bør du alltid følge grunnleggende sikkerhetstiltak, inkludert de som er oppført nedenfor.

- Vennligst les alle instruksjonene.
- Ha planer for nødutgang, slik at alle hjemme vet hva de skal gjøre i tilfelle alarmen går.
- Bruk testknappen for røykvarsler for å gjøre familien kjent med alarmlyden og for å øve regelmessig på brannøvelser med alle familiemedlemmer. Tegn opp en gulvplan som vil vise hvert familiemedlem minst 2 rømningsveier fra hvert rom i huset. Barn har en tendens til å gjemme seg når de ikke vet hva de skal gjøre. Lær barna å rømme, åpne vinduer og sette opp brannstiger og stativer uten hjelp fra voksne. Forsikre deg om at de vet hva de skal gjøre hvis alarmen går.
- Konstant eksponering for høye eller lave temperaturer eller høy luftfuktighet kan redusere batteriets levetid.
- Falske alarmer kan raskt bli tause ved å vifte kraftig med en avis eller lignende for å fjerne røyken eller trykke på testknappen.
- Ikke prøv å fjerne, lade opp eller brenne batteriet, siden det kan eksplodere.
- Hvis det er nødvendig å fjerne batteriet for separat avfall, må du håndtere det forsiktig for å unngå mulige øyeskader eller hudirritasjon dersom batteriet har lekket eller korrodert.
- Ikke tukle med kammeret. Du kan trygt bytte batteri og rengjøre røykvarsleren ved å følge instruksjonene i denne brosjyren.
- For å opprettholde følsomhet for røyk, må du ikke male eller dekke til røykvarsleren på noen måte; ikke la det samle seg spindelvev, støv eller fett.
- Hvis røykvarsleren har blitt skadet på noen måte eller ikke fungerer som den skal, så må du ikke prøve å reparere den. Få service på røykalarmen din, se delen **Service og support**.
- Dette apparatet er KUN beregnet på lokaler som har et boligmiljø.
- Dette er ikke et bærbart produkt. Det må monteres etter instruksjonene i denne brosjyren.
- Røykvarslere er ikke en erstatning for forsikring. Leverandøren eller produsenten er ikke den som forsikrer deg.

Tips om brannsikkerhet

- Kast oljete eller brennbare filler.
 - Bytt ut slitte eller ødelagte stikkontakter, brytere, kabling til hjemmet, sprekker eller ødelagte elektriske ledninger og plugger.
 - Oppbevar bensin og andre brennbare materialer i riktige beholdere.
 - Bruk alltid en peisskjerm i metall og rengjør skorsteinene regelmessig.
 - Aldri røyk i sengen. I rom hvor du røyker, må du alltid sjekke under puter for ulmende sigaretter og aske.
 - Gjør regelmessig vedlikehold av sentralvarmesystemer.
 - Ikke overbelast elektriske kretser.
 - Hold fyrstikker unna barn.
 - Forsikre deg om at alle elektriske apparater og verktøy har et anerkjent godkjenningsmerke.
 - Dette apparatet kan ikke beskytte alle personer til enhver tid. Det beskytter kanskje ikke mot de tre vanligste årsakene til dødelige branner:
 - Røyking i sengen.
 - Å forlate barn alene hjemme.
 - Rengjøring med brennbare væsker, som for eksempel bensin.
- Du kan få mer informasjon fra Brann- og redningsetaten.

Planlegg rømningsveien

- 1 Sjekk dørene i hvert rom for varme eller røyk. Ikke åpne en varm dør. Bruk en alternativ rømningsvei. Lukk dørene bak deg når du drar.
- 2 Hvis røyken er tung, må du kripe ut og hold deg nær gulvet. Pust kort trekk hvis mulig, gjennom en våt klut eller hold pusten. Flere mennesker dør av røykinnåndning enn av flammer.
- 3 Kom deg ut så fort du kan. Ikke stopp for å ta med deg ting. Ha en forhåndsvalgt møteplass utenfor for alle familiemedlemmer. Sjekk at alle er der.
- 4 Ring brann- og redningsetaten fra huset til en nabo eller mobiltelefon. Husk å oppgi navn og adresse.
- 5 **GA ALDRI** inn igjen i et brennende hus.



NO

Alarmbegrensninger

Begrensninger i røykvarslere

Røykvarslere har bidratt betydelig til å redusere antallet omkomne i brann i land der de er mye installert. Uavhengige myndigheter har imidlertid uttalt at de kan være ineffektive under noen omstendigheter. Det er flere årsaker til dette:

- Røykvarslere fungerer ikke hvis batteriene er utladet eller de ikke er tilkoblet. Test regelmessig og erstatt hele røykvarsleren når den ikke fungerer.
- Røykvarslere vil ikke oppdage brann hvis ikke tilstrekkelig røyk når røykvarsleren.
- Røyk kan forhindres å nå røykvarsleren hvis brannen er for langt borte, for eksempel hvis brannen er i en annen etasje, bak en lukket dør, i en skorstein, i et hulrom i veggen eller hvis gjeldende luftretning bærer røyk eller varme vekk.
- Det anbefales å installere røykvarslere på begge sider av lukkede dører og mer enn en røykalarm som anbefalt i denne brosjyren, siden det sannsynligvis forbedrer muligheten for tidlig oppdagelse.
- Røykvarslerne høres kanskje ikke.
- Radiokoblingen til de supplerende Visit mottakerne fungerer kanskje ikke på grunn av forstyrrelser eller fordi signalet er blokkert av møbler, renoveringer osv.
- En røykvarslere vil kanskje ikke vekke en person som har tatt narkotika eller alkohol.
- Det kan hende at røykvarslerne ikke oppdager alle typer branner og gir tilstrekkelig tidlig advarsel. De er spesielt ineffektive når det gjelder: branner forårsaket av røyking i sengen, gasslekkasje, voldelige eksplosjoner, dårlig lagring av brennbare filler og/eller væsker, (for eksempel bensin, maling, brennevin osv.), overbelastede elektriske kretser, brannstiftning, barn som leker med fyrstikker.

Begrensninger i radiosignaler

BE1481/-DE Visit Røykvarslere fra Bellman & Symfon er svært pålitelig og er testet etter høye standarder. På grunn av den relativt lave sendekraften og det begrensede radioområdet (kreves av regulerende organer) er det derimot noen begrensninger som må vurderes:

- Røykvarslere varer ikke på ubestemt tid. Vi anbefaler utskifting etter 10 år som en forhåndsregel.

- Mottakere kan bli blokkert av radiosignaler som forekommer på eller i nærheten av driftsfrekvensene deres, uavhengig av radioinnstillinger.
- Radio-mottakerutstyr skal testes regelmessig, minst en gang i uken. Dette er for å avgjøre om det er kilder til forstyrrelser som forhindrer kommunikasjon, at radiostiene ikke har blitt forstyrret av flytting av møbler eller renovering og sørge for at de generelt beskytter mot disse og andre feil.
- Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installert og brukes i samsvar med instruksjonene, kan

det forårsake skadelig interferens for radio- og TV-mottak. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Dersom dette apparatet forårsaker en slik forstyrrelse, som kan verifiseres ved å slå apparatet av og på (ved å fjerne batteriet), oppfordres brukeren til å eliminere forstyrrelsen med et eller flere av følgende tiltak:

- Plassere eller flytte på apparatet.
- Øk avstanden mellom røykvarsleren og apparatet som blir berørt.
- Kontakt leverandøren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Service og support

Hvis apparatet ser ut til å være skadet eller ikke fungerer korrekt, må du følge instruksjonene i brukerveiledningen og i denne brosjyren. Hvis produktet fremdeles ikke fungerer som det skal, må du kontakte din hørsselsspesialist for informasjon om service og garanti.

Driftsforhold

Bruk apparatet i et tørt miljø innenfor det temperaturområdet og de fuktighetsgrensene som er angitt i denne brosjyren. Dersom apparatet blir vått eller blir utsatt for fuktighet, bør det ikke lenger regnes som pålitelig og må derfor erstattes.

Rengjøring

Bruk en myk klut som ikke loer. Unngå at fuktighet kommer inn i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler for husholdningsbruk, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler. Dette apparatet krever ikke sterilisering.

Garantibetingelser

Bellman & Symfon tilbyr garanti for dette produktet (unntatt batteriet) i to (2) år fra kjøpsdatoen mot alle defekter som skyldes feil på materialer eller konstruksjonsfeil. Denne garantien gjelder kun for vanlige bruksforhold og service, og omfatter ikke skade som skyldes ulykke, vanskjøtsel, feilaktig bruk, uautorisert demontering eller kontaminering, uansett hvordan dette er oppstått. Denne garantien omfatter ikke tilfeldig eller indirekte skade. Videre dekker ikke garantien force majeure, slik som brann, oversvømmelse, orkaner og tornadoer. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter avhengig av hvor du bor. Enkelte land og jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfeldige eller indirekte skader, eller begrensninger på hvor lenge en implisitt garanti varer, så derfor er det mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker. Garantien ovenfor kan ikke endres med mindre begge parter samtykker i dette skriftlig.

Modell, type og klassifisering

Informasjonen er tilgjengelig på baksiden av røykvarsleren.

Symbolforklaring

 MD	Indikerer at enheten er en medisinsk enhet.		Dette symbolet indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen.
 UDI	Indikerer en bærer som inneholder unik informasjon om enhetens identifikator.		Dette symbolet indikerer at det er nødvendig forsiktighet ved bruk av enheten eller kontrollenheten i nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever at operatøren er oppmerksom på eller handler for å unngå uønskede konsekvenser.
	Indikerer at produktet ikke skal kastes som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.		Å identifisere et sted hvor man kan finne informasjon, spesielt i en nødsituasjon.
 SN	Angir produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.		Angir temperaturgrensene som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.
 REF	Angir produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.		Angir fuktighetsområdet som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.
	Angir produsenten av den medisinske enheten.		

Feilsøking

Hvis

Det er ikke noe som skjer når jeg trykker på testknappen på røykvarsleren.

Prøv dette

- Sjekk at batterikontaktene er ordentlig tilkoblet.
- Bytt ut batteriene på røykvarsleren. Bruk kun AA Energizer Lithium L91.
- Kontroller røykvarslerens alder, se etiketten "erstatt med" på apparatet

Røykvarsleren piper når jeg trykker på testknappen, men Visit mottakeren svarer ikke.

- Kontroller mottakerbatteriene og tilkoblingene.
- Flytt mottakeren nærmere røykvarsleren for å sikre at den er innenfor radioområdet.
- Kontroller at apparatene er satt til samme radiotast, se **Bytte radiotast**.

Visit mottakeren er aktivert uten en åpenbar grunn.

- Sjekk for røyk, damp osv. fra kjøkkenet eller badet. Maling og annen røyk kan forårsake falske alarmer.
- Bytt batteri på røykvarsleren hvis rødt besøks-LED på mottakeren blinker hvert 400. sekund, se **Signalmønster**.
- Dersom problemet vedvarer, er det sannsynligvis et annet besøkssystem i nærheten som utløser ditt. Endre radiotast på alle apparater, se **Bytte radiotast**.

Røykvarsleren piper og kvitrer uten en åpenbar grunn

- Kontroller for tegn på forurensning, slik som spindelvev eller støv. Rengjør eventuelt alarmen, se **Rengjør røykvarsleren din**.
- Hvis problemet vedvarer, har røykvarsleren mangler og må byttes ut.

Tekniske spesifikasjoner

Funksjoner

Sensortype	Optical smoke detection and thermal detection
Røykfølsomhet	0.115 – 0.168 dB/m Oppfyller kravene til EN 14604:2005+AC:2008
Varmefølsomhet	62°C (+/- 8°C)
Hørbar alarm	Min 85 dB (A) @ 3m Frekvens: 3,2 kHz
Radioforbindelse	Har en separat radiomodul inne i røykvarsleren
Advarsel om lavt batteri	Videresender alarmsignalet til alle Visit mottakere med samme radiotast innenfor radioområdet.
Funksjon for kringkasting	Overfører røyk- og varmealarm til alle andre Visit mottakere innen rekkevidde, og tilsidesetter innstillingene for radiotasten.

Strømforsyning

Batteristrøm	2 × 1,5V AA Energizer Lithium L91
Strømforbruk	Ledig <15 µA, Aktiv <75 mA
Driftstid	5 år

Radiofunksjon

Radiofrekvens	868.30 MHz
Maks utgangseffekt	4.2 dBm
Dekning	Opptil 200 m, tydelig siktlinje. Området reduseres av vegger, store gjenstander og andre radiosendere som TV og mobiltelefoner.

Aktivering

Miljøkrav

Via røyk og/eller varme og via testknappen
Driftstemperatur: 4° til 40° C (39° til 104° F)
Fuktighetsområde: 15% til 95% RH (ikke kondenserende)

Størrelse og vekt

Mål: Ø 120 x 37 mm

Vekt: 150 g, inkludert batterier

Konfigurasjon

I esken

Denne senderen kan brukes med alle Visit mottakere

- BE1481/-DE Visit Røykvarsler
- Brakett
- Batterier
- Skruer

Nettstedet:



Denne røykvarsleren er utstyrt med en radiomodul som overfører radiosignaler til en eller flere supplerende Visit-mottakere. En Visit mottaker vil bidra til å sikre at alarmen blir lagt merke til i hele eiendommen. Varslings- og signalmønsteret for Visit-mottakeren er forklart i produktets brukermanual.

Informasjon om samsvar

Bellman & Symfon erklærer herved at dette produktet i Europa er i samsvar med de grunnleggende kravene i Medical Device Regulation (EU) 2017/745 og Radio Equipment Directive 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen kan hentes fra Bellman & Symfon nettstedet **bellman.com**.

Dette produktet er også i samsvar med byggeveireforordningen (EU) nr. 305/2011 for røykvarslere.

NO

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warmington,
Peterborough, PE8 6UT, UK

CH REP

Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1481_012MAN4.0
Date of issue: 2024-12-02

TM and © 2024 Bellman & Symfon AB. All rights reserved.