

BE9122-P02 Headphones

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| EN | Product information         |
| DE | Produktinformationen        |
| DK | Produktinformation          |
| ES | Información del producto    |
| FI | Tuotetiedot                 |
| FR | Informations sur le produit |
| IT | Informazioni sul prodotto   |
| NL | Productinformatie           |
| NO | Produktinformasjon          |
| PL | Informacje o produkcie      |
| SE | Produktinformation          |
| SK | Informácie o výrobku        |



NO Produktinformasjon

Les dette først

Denne brosjyren gir deg veiledning i hvordan du bruker og vedlikeholder dine nye hodetelefoner. Sørg for at du leser dette heftet nøye, inkludert avsnittet Advarsler. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte audiografen din.

Om BE9122-P02 Hodetelefoner

Tiltenkt formål

Det tiltenkte formålet med lydproduktfamilien er å forsterke volumet og forbedre taleforståeligheten under samtaler og TV-lytting. Den kan også brukes sammen med andre lydkilder.

Tiltenkt brukergruppe

Den tiltenkte brukergruppen består av personer i alle aldre med mildt til alvorlig hørselstap som har behov for lydforsterkning i ulike situasjoner.

Tiltenkt bruker

Den tiltenkte brukeren er en person med mildt til alvorlig hørselstap som trenger lydforsterkning.

Prinsipp for drift

Lydproduktfamilien består av flere forsterkere og sendere som er spesielt utviklet for å gi lydforsterkning selv i krevende situasjoner. Avhengig av hvilken funksjon den spesifikke forsterkeren eller lydsenderen er tildeelt, kan ulike mikrofoner brukes til å fange opp direkte lyd eller forbedre lyden fra omgivelsene.

- Denne enheten vil ikke gjenopprette normal hørsel og vil ikke forhindre eller forbedre en hørselsnedsettelse eller døvhets som skyldes organiske forhold.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Dette avsnittet inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering og driftsforhold. Ta vare på denne brosjyren for fremtidig bruk. Hvis du bare skal installere enheten, må denne brosjyren gis til husets eier.

Advarsler om farer

- Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen personskada eller skade på enheten eller annen eiendom.
- Oppbevar denne enheten utilgjengelig for barn under 3 år.
- Ikke bruk eller oppbevar denne enheten i nærheten av varmekilder som åpen ild, radiatorer, ovner eller andre enheter som produserer varme.
- Ikke demonter enheten; det er fare for elektrisk støt. Garantien bortfaller hvis enheten manipuleres eller demonteres.
- Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke utsett enheten for fuktighet.
- Beskytt enheten mot støt under lagring og transport.
- Beskytt kablene mot potensielle skadekilder.
- Ikke gjør endringer eller modifikasjoner på denne enheten. Bruk kun originalt Bellman & Symfon-tilbehør for å unngå elektrisk støt.
- Den tilkoblede lytteenheten har en svært kraftig forsterker, og lydnivået kan forårsake ubehag eller, i alvorlige tilfeller, sette hørselen i fare hvis produktet brukes uforsiktig. Skru alltid ned volumet til et lavt nivå før du tar på deg hodetelefonene!

Informasjon om produktsikkerhet

- Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade på enheten og gjøre garantien ugyldig.
- Ikke bruk enheten i områder der elektronisk utstyr er forbudt.
- Enheten må kun repareres av et autorisert servicesenter.
- Hvis du får andre problemer med enheten, må du kontakte kjøpsstedet, ditt lokale Bellman & Symfon-kontor eller produsenten. Visit bellman.com for kontaktinformasjon.
- Ikke slipp enheten din i gulvet. Hvis du mister den på en hard overflate, kan den bli skadet.
- Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, må du kontakte produsenten og relevante myndigheter.

Driftsforhold

Bruk enheten i et tørt miljø innenfor de temperatur- og fuktighetsgrensene som er angitt i denne brosjyren. Hvis enheten blir våt eller utsettes for fuktighet, er den ikke lenger å anse som pålitelig og bør derfor skiftes ut.

Rengjøring

Bruk en myk, lufri klut. Unngå at det kommer fuktighet inn i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler. Denne enheten krever ikke sterilisering.

Service og støtte

Hvis enheten ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som den skal, følger du instruksjonene i brukerhåndboken og denne brosjyren. Hvis produktet fortsatt ikke fungerer som tiltenkt, kan du kontakte din lokale audiograf for informasjon om service og garanti.

Garantibetingelser

Bellman & Symfon garanterer dette produktet i 90 dager fra kjøpsdato mot eventuelle defekter som skyldes feil i materialer eller utøvelse. Denne garantien gjelder kun ved normal bruk og service, og omfatter ikke skader som skyldes uhell, forsømmelse, misbruk, uautorisert demontering eller forurensning, uansett årsak. Denne garantien omfatter ikke tilfældige skader og følgeskader. Garantien dekker heller ikke naturkatastrofer som brann, oversvømmelse, orkaner og tornadoer.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer med territorium. Noen land eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfældige skader eller følgeskader, eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, slik at begrensningen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Ovennevnte garanti kan ikke endres, med mindre den er skriftlig undertegnet av begge parter.

Symbolforklaring

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indikerer at enheten er en medisinsk enhet.                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Indikerer en bærer som inneholder unik informasjon om enhetens identifikator.                                                                                                                                                                                            |
|  | Indikerer at produktet ikke skal kastes som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.                                                                                                                              |
|  | Angir produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.                                                                                                                                                                                     |
|  | Angir produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.                                                                                                                                                                                       |
|  | Angir produsenten av den medisinske enheten.                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Dette symbolet indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen.                                                                                                                                                                                                           |
|  | Dette symbolet indikerer at det er nødvendig med forsiktighet ved bruk av enheten eller kontrollenheten i nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever at operatøren er oppmerksom på eller handler for å unngå uønskede konsekvenser. |
|  | Å identifisere et sted hvor man kan finne informasjon, spesielt i en nødsituasjon.                                                                                                                                                                                       |
|  | Angir temperaturgrensene som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.                                                                                                                                                                                              |
|  | Angir fuktighetsområdet som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.                                                                                                                                                                                               |

Samsvarsinformasjon

Bellman & Symfon erklærer herved at dette produktet i Europa er i samsvar med de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen kan hentes fra Bellman & Symfon-nettstedet bellman.com.

Tekniske spesifikasjoner

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vekt:           | 57 g                                                                       |
| Frekvensområde: | 20 Hz - 20 kHz                                                             |
| Impedans:       | 32 Ω +/- 10%                                                               |
| Følsomhet:      | 109 dB/mW @ 1 kHz                                                          |
| Farge:          | Svart                                                                      |
| Kabellengde:    | 1,25 meter                                                                 |
| Forbindelse:    | 3,5 mm stereoplugg                                                         |
| Bruksområde:    | Temperatur: 0° til 35° C, luftfuktighet: 15 % til 90 %, ikke-kondenserende |
| Tilbehør:       | BE9150 BE9150 deksler til hodetelefoner                                    |
| I esken:        | BE9122-P02 Hodetelefoner                                                   |

Konfigurasjonsalternativer

Disse hodetelefonene kan konfigureres med alle Bellman & Symfon's personlige forsterkere og lyttesystemer.

- For detaljert produktinformasjon, se den tilhørende brukermanualen.

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited  
The Tack Room, Rectory Farm  
Offices, Warrington,  
Peterborough, PE8 6UT, UK

Audiocare AG  
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal  
Switzerland



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB  
Södra Långbergsgatan 30  
436 32 Askim Sweden  
Phone +46 31 68 28 20  
E-mail info@bellman.com  
bellman.com



Revision: BE9122\_023MAN3.0  
Date of issue: 2024-11-28  
© 2024 Bellman & Symfon AB.  
All rights reserved.