

BE9122-P02 Headphones

EN	Product information
DE	Produktinformationen
DK	Produktinformation
ES	Información del producto
FI	Tuotetiedot
FR	Informations sur le produit
IT	Informazioni sul prodotto
NL	Productinformatie
NO	Produktinformasjon
PL	Informacje o produkcie
SE	Produktinformation
SK	Informácie o výrobku



SE Produktinformation

Läs detta först

Den här broschyren beskriver hur du använder och underhåller dina nya hörlurar. Läs igenom den här broschyren noggrant, inklusive avsnittet Varningar. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din audionom.

Om BE9122-P02 Hörlurar

Avsedd användning

Den avsedda användningen av ljudproduktfamiljen är att förstärka volymen och förbättra talförståelsen under samtal och TV-tittande. Den kan också användas med andra ljudkällor.

Avsedd användargrupp

Den avsedda användargruppen består av personer i alla åldrar med mild till grav hörselnedsättning som behöver ljudförstärkning i olika situationer.

Avsedd användare

Den avsedda användaren är en person med mild till grav hörselnedsättning som behöver ljudförstärkning.

Funktionsbeskrivning

Audio-produktfamiljen består av flera förstärkare och sändare som har utvecklats speciellt för att ge ljudförstärkning även i krävande situationer. Beroende på vilken funktion som tilldelats den specifika förstärkaren eller sändaren kan olika mikrofoner användas för att fånga upp direktljud eller förstärka omgivningsljudet.



Den här enheten återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte hörselnedsättning eller dövhet som beror på organiska orsaker.

Viktig säkerhetsinformation

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftsförhållanden. Behåll denna broschyr för framtida bruk. Om du bara installerar enheten måste denna broschyr ges till hushållsägaren.



Varningar för faror

- Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan leda till brand, elektriska stötar eller andra personskador eller skador på enheten eller annan egendom.
- Förvara enheten oåtkomligt för barn under 3 år.
- Använd eller förvara inte enheten i närheten av värmekällor som öppen eld, element, ugnar eller andra enheter som alstrar värme.
- Ta inte isär enheten, det finns risk för elektriska stötar. Om enheten manipuleras eller demonteras upphör garantin att gälla.
- Den här enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt inte enheten för fukt.
- Skydda enheten från stötar under förvaring och transport.
- Skydda kablarna från alla potentiella skadekällor.
- Gör inga ändringar eller modifieringar på denna enhet. Använd endast originaltillbehör från Bellman & Symfon för att undvika elektriska stötar.
- Den anslutna lyssningsenheten har en mycket kraftfull förstärkare och ljudnivån kan orsaka obehag eller i allvarliga fall skada hörseln om enheten används ovarsamt. Vrid alltid ner volymen till en låg nivå innan du sätter på dig hörlurarna!



Information om produktsäkerhet

- Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till skador på enheten och göra garantin ogiltig.
- Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- Enheten får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Om du stötar på andra problem med din enhet ska du kontakta inköpsstället, ditt lokala Bellman & Symfon-kontor eller tillverkaren. Besök bellman.com för kontaktinformation.
- Tappa inte enheten. Om du tappar den på en hård yta kan den skadas.
- Om en allvarlig incident inträffar i samband med den här enheten ska du kontakta tillverkaren och berörda myndigheter.

Driftsförhållanden

Använd enheten i en torr miljö inom de temperatur- och fuktighetsgränser som anges i den här broschyren. Om enheten blir våt eller utsätts för fukt ska den inte längre betraktas som tillförlitlig och bör därför bytas ut.

Rengöring

Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik att få in fukt i öppningar. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel. Denna enhet kräver inte sterilisering.

Service och support

Om enheten verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska bör du följa anvisningarna i användarhandboken och den här broschyren. Om

produkten fortfarande inte fungerar som avsett kontakta du din lokala audionom för information om service och garanti.

Garantivillkor

Bellman & Symfon garanterar denna produkt i 90 dagar från inköpsdatum mot eventuella defekter som beror på felaktigt material eller utförande. Denna garanti gäller endast under normala användnings- och serviceförhållanden och omfattar inte skador till följd av olyckshändelse, försummelse, felaktig användning, obehörig demontering eller kontaminering, oavsett orsak. Denna garanti omfattar inte oförutsedda skador eller följdskador. Garantin omfattar inte heller naturkatastrofer som brand, översvämning, orkaner och tornados.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på territorium. Vissa länder eller jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av tillfälliga skador eller följdskador, eller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti är ett tillägg till dina lagstadgade rättigheter som konsument. Ovanstående garanti får inte ändras annat än skriftligen och undertecknat av båda parter.

Symbolförklaring

	Anger att enheten är en medicinteknisk enhet.
	Anger en bärare som innehåller information om unik identifiering av enheten.
	Anger att produkten inte får kasseras som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.
	Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras.
	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska enheten kan identifieras.
	Anger tillverkaren av den medicintekniska enheten.
	Denna symbol anger att användaren bör läsa bruksanvisningen.
	Denna symbol anger att försiktighet är nödvändig vid användning av enheten eller kontrollenheten i närheten av där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver att operatören är medveten om eller vidtar åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.
	Att identifiera en plats där information kan hittas, särskilt i en nödsituation.
	Anger de temperaturgränser som den medicintekniska enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.
	Anger det luftfuktighetsintervall som den medicintekniska enheten kan exponeras för på ett säkert sätt.

Information om överensstämmelse

Härmed försäkrar Bellman & Symfon att denna produkt i Europa överensstämmer med de väsentliga kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfons webbplats bellman.com.

Tekniska specifikationer

Vikt:	57 g
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	32 Ω 32 Ω +/- 10%
Känslighet:	109 dB/mW @ 1 kHz
Färg:	Svart
Kabellängd:	1,25 meter
Anslutning:	3,5 mm stereokontakt
Användning:	Temp: 0° till 35° C, Luftfuktighet: 15% till 90%, icke-kondenserande

Tillbehör för hörlurar:	BE9150 Skydd för hörlurar
I lådan:	BE9122-P02 Hörlurar

Alternativ för konfiguration

Dessa hörlurar kan konfigureras med alla Bellman & Symfon's personliga förstärkare och lyssningssystem.



För detaljerad produktinformation, se respektive användarmanual.

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warrington,
Peterborough, PE8 6UT, UK



Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långbergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE9122_023MAN3.0
Date of issue: 2024-11-28
© 2024 Bellman & Symfon AB.
All rights reserved.