


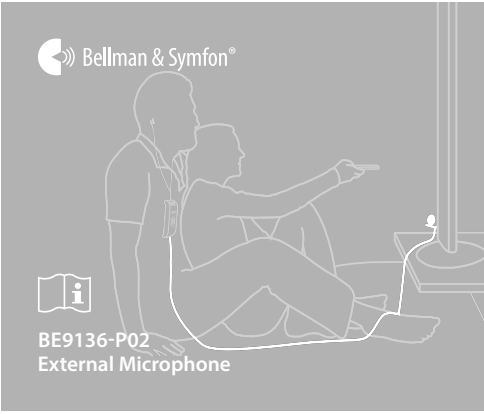

NO Produktinformasjon

Vennligst les dette først

Dette heftet vil veilede deg gjennom bruk og vedlikehold av din nye Eksterne Mikrofon. Les dette heftet nøye, inkludert avsnittet **Advarsler**. Hvis du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med audiografen din.

Om BE9136-P02 Ekstern Mikrofon

Tiltenkt formål

Det tiltenkte formålet med lydproduktfamilien er å forsterke volumet og forbedre taleforståeligheten under samtaler og når du lytter til TV. Den kan også brukes sammen med andre lydkilder.

Tiltenkt brukergruppe

Den tiltenkte brukergruppen består av personer i alle aldre med mildt til alvorlig hørselstap som trenger lydforsterkning i en rekke ulike situasjoner.

Tiltenkt bruker

Den tiltenkte brukeren er en person med mildt til alvorlig hørselstap som trenger lydforsterkning.

Tiltenkt brukergruppe

Lydproduktfamilien består av ulike lydforsterkere og sendere som er spesielt utviklet for å gi lydforsterkning selv i vanskelige situasjoner. Avhengig av hvilken funksjon som er tilordnet den spesifikke forsterkeren eller senderen, kan ulike mikrofoner brukes til å fange opp direkte lyd eller forbedre omgivelseslyden.

 Denne enheten gjenoppretter ikke normal hørsel og forhindrer eller forbedrer ikke hørselstap eller døvhets som skyldes organiske forhold.

Generelle advarsler

Dette avsnittet inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering og driftsforhold. Ta vare på dette heftet for fremtidig bruk. Hvis du installerer enheten, må dette heftet gis til hjemmets eier.

Advarsler om farer

- Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen personskafe eller skade på enheten eller annen eiendom.
- Oppbevar denne enheten utilgjengelig for barn under 3 år.
- Ikke bruk eller oppbevar denne enheten i nærheten av varmekilder som åpen ild, radiatorer, ovner eller andre enheter som produserer varme.
- Ikke demonter enheten; det er fare for elektrisk støt. Garantien bortfaller hvis du manipulerer eller demonterer enheten.
- Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke utsett enheten for fuktighet.
- Beskytt enheten mot støt under lagring og transport.
- Beskytt kablene mot potensielle skadegjelder.
- Ikke foreta noen modifikasjoner eller endringer på denne enheten. Bruk kun originalt Bellman & Symfon-tilbehør for å unngå elektriske støt.
- Den tilkoblede lytteenheden har en svært kraftig forsterker, og lydnivået kan forårsake ubehag eller, i alvorlige tilfeller, sette hørselen i fare hvis produktet brukes uforsiktig. Skru alltid ned volumet til et lavt nivå før du tar på deg den Eksterne Mikrofonen!

Informasjon om produktsikkerhet

- Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade på enheten og gjøre garantien ugyldig.
- Ikke bruk enheten i områder der det er forbudt å bruke elektronisk utstyr.
- Enheten må kun repareres av et autorisert serviceverksted.
- Hvis det skjer en alvorlig ulykke med denne enheten, må du kontakte produsenten og de relevante myndighetene.
- Hvis du opplever andre problemer med enheten, må du kontakte utsalgssedet, ditt lokale Bellman & Symfon-kontor eller produsenten. For kontaktinformasjon, besøk bellman.com.
- Ikke slipp enheten i gulvet. Hvis du mister den på en hard overflate, kan den bli skadet.

Driftsforhold

Bruk enheten i tørre omgivelser, innenfor de temperatur- og fuktighetsgrensene som er angitt i denne brosjyren. Hvis enheten blir våt eller utsettes for fuktighet, er den ikke lenger å anse som pålitelig og må derfor skiftes ut.

Rengjøring

Før du rengjør enheten, må du koble fra alle kabler. Bruk en myk, løfri Unga å fuktighet trenger inn i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler, spray, løsemidler, alkohol, ammoniakke eller slipemidler. Denne enheten krever ikke sterilisering.

Service og støtte

Hvis enheten ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som den skal, følger du instruksjonene i brukermanualen og denne brosjyren.

Hvis produktet fortsatt ikke fungerer som forventet, kan du kontakte audiografen din for å få informasjon om service og garanti.

Garantibetingelser

Bellman & Symfon garanterer dette produktet i 90 dager fra kjøpsdatoen mot enhver defekt som skyldes feil i materialer eller utførelse. Denne garantien gjelder kun for normal bruk og service, og omfatter ikke skader som skyldes uhell, forsømmelse, misbruk, uautorisert demontering eller forurensning, uansett årsak. Denne garantien omfatter ikke tilfeldige skader og følgeskader. I tillegg dekker ikke garantien naturkatastrofer som brann, flom, orkaner og tornadoer.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Noen land eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfeldige skader eller følgeskader, eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, slik at begrensningen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Ovennevnte garanti kan ikke endres, med mindre det gjøres skriftlig og signeres av begge parter.

Symbolforklaring

	Indikerer at enheten er en medisinsk enhet.
	Indikerer en bærer som inneholder unik informasjon om enhetens identifikator.
	Indikerer at produktet ikke skal kastes som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.
	Angir produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.
	Angir produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
	Angir produsenten av den medisinske enheten.
	Dette symbolet indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen.
	Dette symbolet indikerer at det er nødvendig med forsiktighet ved bruk av enheten eller kontrollenheten i nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever at operatoren er oppmerksom på eller handler for å unngå uønskede konsekvenser.
	Å identifisere et sted hvor man kan finne informasjon, spesielt i en nødsituasjon.
	Angir temperaturgrensene som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.
	Angir fuktighetsområdet som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.

Samsvarsinformasjon

Bellman & Symfon erklærer herved at dette produktet i Europa er i samsvar med de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen kan hentes fra Bellman & Symfon-nettstedet bellman.com.

Tekniske spesifikasjoner

Vekt	12 g
Kabellengde	1 m
Forbindelse	2,5 mm mono
Farge	Svart
Retningsbestemt	Omni-direksjonal
Følsomhet	-44 dB
S/N	>58 dB
Bruk	Temperatur 0 til 35 °C Luftfuktighet: 15 % – 90 %, ikke-kondenserende
Tilbehør	BE9408 Mikrofonforlengelseskabel Denne enheten kan konfigureres med følgende personlige forsterkere og lyttesystemer: Kompatible personlige forsterkere: BE2020-P02 BE2020 Maxi Personlig Forsterker BE2030-C Mino Personlig Forsterker BE2210 Domino Pro mottaker Kompatible lyttesystemer: BE8005 Domino Pro-lyttesystem

- I esken**
 - BE9136-P02 Ekstern Mikrofon
 - Tie-clip
 - Skumhette for Mikrofon

 For detaljert produktinformasjon, se den tilhørende brukermanualen.

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warrington,
Peterborough, PE8 6UT, UK





Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone: +46 31 68 28 20
E-mail: info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE9136_004MAN1.0
Date of issue: 2025-03-19
© 2025 Bellman & Symfon AB.
All rights reserved.