


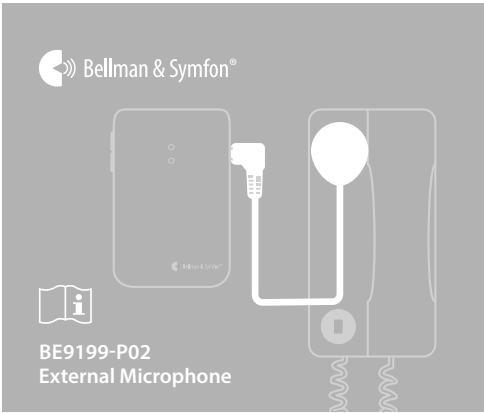

## NO Produktinformasjon

### Les dette først

Dette heftet gir deg veiledning i hvordan du bruker og vedlikeholder din nye Eksterne Mikrofon. Sørg for at du leser dette heftet nøye, inkludert avsnittet **Advarsler**. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte audiografen din.

### Om den BE9199-P02 Eksterne Mikrofonen

#### Tiltenkt formål

Det tiltenkte formålet med Visit-varslingsssystemet er å varsle døve og hørselshemmede om viktige signaler i hjemmet.

#### Tiltenkt brukergruppe

Den tiltenkte brukergruppen består av personer i alle aldre med mildt til alvorlig hørselstap eller døvhets som trenger lyd-, syns- eller sanseforsterkning.

#### Tiltenkt bruker

Den tiltenkte brukeren er en person med mildt til alvorlig hørselstap eller døvhets.

#### Prinsipp for bruk

Visit-varslingsssystemet består av et sett med trådløst tilkoblede sendere og mottakere som er plassert rundt omkring i hjemmet. Når en sender registrerer en aktivitet, sender den et signal til Visit-mottakeren som varsler brukeren med lyd, blink eller vibrasjoner. For å kunne bruke systemet trenger du minst én sender og én mottaker.

 Visit-varslingsssystemet vil ikke gjenopprette normal hørsel og vil ikke forandre eller forbedre en hørselsnedsettelse eller døvhets som skyldes organiske forhold.

### Generelle advarsler

Dette avsnittet inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering og driftsforhold. Ta vare på denne brosjyren for fremtidig bruk. Hvis du bare skal installere enheten, må denne brosjyren gis til huseieren.

#### Fareadvarsler

- Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen personskade eller skade på apparatet eller annen eiendom.
- Oppbevar dette apparatet utilgjengelig for barn under 3 år.
- Ikke bruk eller oppbevar dette apparatet i nærheten av varmekilder som åpen ild, radiatorer, ovner eller andre enheter som produserer varme.
- Ikke demonter enheten; det er fare for elektrisk støt. Garantien bortfaller hvis du manipulerer eller demonterer enheten.
- Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke utsett enheten for fuktighet.
- Beskytt enheten mot støt under lagring og transport.
- Ikke gjør endringer eller modifikasjoner på denne enheten. Bruk kun originalt Bellman & Symfon-tilbehør for å unngå elektrisk støt.
- Beskytt kablene mot potensielle skadekilder.

#### Informasjon om produktsikkerhet

- Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade på apparatet og gjøre garantien ugyldig.
- Ikke bruk apparatet i områder der det er forbudt å bruke elektronisk utstyr.
- Apparatet må kun repareres av et autorisert servicesenter.
- Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med dette apparatet, må du kontakte produsenten og de relevante myndighetene.
- Hvis du får andre problemer med enheten, må du kontakte kjøpsstedet, ditt lokale Bellman & Symfon-kontor eller produsenten. Besøk [bellman.com](http://bellman.com) for kontaktinformasjon.
- Ikke slipp enheten din i gulvet. Hvis du mister den på en hard overflate, kan den ta skade.

### Driftsforhold

Bruk enheten i et tørt miljø innenfor de temperatur- og fuktighetsgrensene som er angitt i denne brosjyren. Hvis enheten blir våt eller utsettes for fuktighet, er den ikke lenger å anse som pålitelig og bør derfor skiftes ut.

### Rengjøring

Koble fra alle kabler før du rengjør enheten. Bruk en myk, lufri klut. Unngå å få fuktighet inn i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler. Denne enheten krever ikke sterilisering.

### Service og support

Hvis enheten ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som den skal, følger du instruksjonene i brukerhåndboken og denne brosjyren. Hvis produktet fortsatt ikke fungerer som tiltenkt, kan du kontakte din lokale audiograf for informasjon om service og garanti.

### Garantibetingelser

Bellman & Symfon garanterer dette produktet i seks (6) måneder fra kjøpsdato mot eventuelle defekter som skyldes feil i materialer eller utførelse. Denne garantien gjelder kun under normale bruks- og serviceforhold, og omfatter ikke skader som følge av uhell, forsømmelse, misbruk, uautorisert demontering eller forurensning, uansett årsak. Denne garantien omfatter ikke tilfeldige skader og følgeskader. Garantien dekker heller ikke naturkatastrofer som brann, oversvømmelse, orkaner og tornadoer. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer med territorium. Noen land eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfeldige skader eller følgeskader, eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, slik at begrensningen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Ovennevnte garanti kan ikke endres, med mindre det gjøres skriftlig og undertegnes av begge parter.

### Symbolforklaring

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Indikerer at produktet er en medisinsk enhet.                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Indikerer en bærer som inneholder unik informasjon om enhetens identifikator.                                                                                                                                                                                      |
|    | Indikerer at produktet ikke skal kastes som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.                                                                                                                        |
|    | Angir produsentens serienummer, slik at et spesifikt medisinsk utstyr kan identifiseres.                                                                                                                                                                           |
|    | Angir produsentens katalognummer slik at det medisinske utstyret kan identifiseres.                                                                                                                                                                                |
|    | Angir produsenten av det medisinske utstyret.                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Dette symbolet indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen.                                                                                                                                                                                                     |
|   | Dette symbolet indikerer at det må utvises forsiktighet ved bruk av enheten eller kontrollenheten i nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever at operatøren er oppmerksom på eller handler for å unngå uønskede konsekvenser. |
|  | For å identifisere et sted hvor informasjon kan finnes, spesielt i en nødsituasjon.                                                                                                                                                                                |
|  | Angir temperaturgrensene som det medisinske utstyret trygt kan utsettes for.                                                                                                                                                                                       |
|  | Angir luftfuktigheten som det medisinske utstyret trygt kan utsettes for.                                                                                                                                                                                          |

### Samsvarsinformasjon

Bellman & Symfon erklærer herved at dette produktet i Europa er i samsvar med de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen kan hentes fra Bellman & Symfons nettsted [bellman.com](http://bellman.com).

### Tekniske spesifikasjoner

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vekt          | 15 g                                                                       |
| Dimensjoner   | 33×36×4 mm                                                                 |
| Farge         | Hvit                                                                       |
| Kabellengde   | 2,5 m                                                                      |
| Kontakt       | 3,5 mm monoplugg                                                           |
| Mikrofontype  | Piezoelektrisk                                                             |
| Bruk          | Temperatur: 0° til 35° C<br>Luftfuktighet: 15 % – 90 %, ikke-kondenserende |
| Konfigurasjon | Beregnet for BE1411-868 Visit Dørsender                                    |
| I esken       | BE9199-P02 Ekstern Mikrofon                                                |

 For detaljert produktinformasjon, se den tilhørende brukerhåndboken.

#### UKRP

Bellman & Symfon UK Limited  
The Tack Room, Rectory Farm  
Offices, Warrington,  
Peterborough, PE8 6UT, UK

CH REP

Audiocare AG  
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal  
Switzerland



Bellman & Symfon Group AB  
Södra Långebergsgatan 30  
436 32 Askim Sweden  
Phone: +46 31 68 28 20  
E-mail: [info@bellman.com](mailto:info@bellman.com)  
[bellman.com](http://bellman.com)



Revision: BE9199\_016MAN1.0  
Date of issue: 2025-03-24  
© 2025 Bellman & Symfon AB.  
All rights reserved.

