


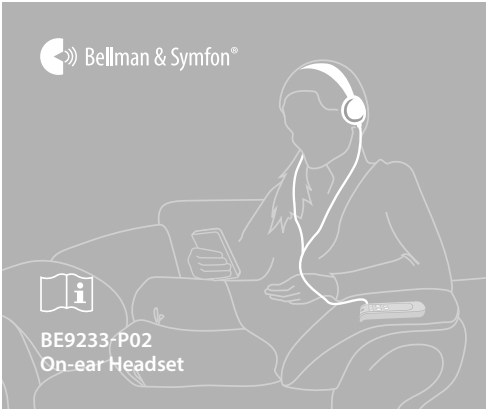

SE Information om produkten

Läs detta först

I den här broschyren får du information om hur du använder och underhåller ditt nya hörlurar med mikrofon. Läs igenom den här broschyren noggrant, inklusive avsnittet **Varningar**. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din audionom.

Om BE9233-P02 Hörlurar med mikrofon

Avsett syfte

Det avsedda syftet med ljudproduktfamiljen är att förstärka volymen och förbättra taluppfattbarheten under samtal och TV-tittande. Den kan också användas med andra ljudkällor.

Avsedd användargrupp

Den avsedda användargruppen består av personer i alla åldrar med mild till grav hörselnedsättning som behöver ljudförstärkning i olika situationer.

Avsedd användare

Den avsedda användaren är en person med mild till svår hörselnedsättning som behöver ljudförstärkning.

Funktionsbeskrivning

Audio-produktfamiljen består av flera förstärkare och sändare som har utvecklats speciellt för att ge ljudförstärkning även i krävande situationer. Beroende på vilken funktion som tilldelats den specifika förstärkaren eller sändaren kan olika mikrofoner användas för att fånga upp direktljud eller förstärka omgivningsljudet.

 Den här enheten återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte hörselnedsättning eller dövhet som beror på organiska orsaker.

Allmänna varningar

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftförhållanden. Behåll denna broschyr för framtida bruk. Om du bara installerar enheten måste denna broschyr överlämnas till husägaren.

Varningar för faror

- Om du inte följer dessa säkerhetsanvisningar kan det leda till brand, elektriska stötar eller andra personsador eller skador på enheten eller annan egendom.
- Förvara enheten ömtåmligt för barn under 3 år.
- Använd eller förvara inte enheten i närheten av värmekällor som öppen eld, element, ugnar eller andra enheter som alstrar värme.
- Ta inte isär enheten, det finns risk för elektriska stötar. Om enheten manipuleras eller demonteras upphör garantin att gälla.
- Den här enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt inte enheten för fukt.
- Skydda enheten från stötar under förvaring och transport.
- Skydda kablarna från alla potentiella skadekällor.
- Gör inga ändringar eller modifieringar på denna enhet. Använd endast original Bellman & Symfon tillbehör för att undvika elektriska stötar.
- Den anslutna lyssningsenheten har en mycket kraftfull förstärkare och ljudnivån kan orsaka obehag eller i allvarliga fall skada hörseln om enheten används ovarsamt. Vrid alltid ned volymen till en låg nivå innan du tar på dig headsetet!

Information om produktsäkerhet

- Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på enheten och göra garantin ogiltig.
- Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- Enheten får endast repareras av ett auktoriserat servicecenter.
- Om en allvarlig incident inträffar i samband med den här enheten ska du kontakta tillverkaren och relevant myndighet.
- Om du stötar på andra problem med din enhet, kontakta inköpsstället, ditt lokala Bellman & Symfon-kontor eller tillverkaren. Besök bellman.com för kontaktinformation.
- Tappa inte enheten. Om du tappar den på en hård yta kan den skadas.

Rengöring

Koppla bort alla kablar innan du rengör enheten. Använd en mjuk, ljudfri trasa. Undvik att få in fukt i öppningarna. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel. Den här enheten kräver inte sterilisering.

Service och support

Om enheten verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska följer du anvisningarna i användarhandboken och den här broschyren. Om produkten fortfarande inte fungerar som avsett kontaktar du din lokala audionom för information om service och garanti.

Villkor för garantin

Bellman & Symfon garanterar denna produkt i 90 dagar från inköpsdatum mot eventuella defekter som beror på felaktigt material eller utförande. Denna garanti gäller endast under normala användnings- och serviceförhållanden och omfattar inte skador till följd av olyckshändelse, försummelse, felaktig användning, obehörig demontering eller kontaminering, oavsett orsak. Denna garanti omfattar inte oförutsedda skador eller följdskador. Garantin omfattar inte heller naturkatastrofer som brand, översvämning, orkaner och tornados.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på territorium. Vissa länder eller jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av tillfälliga skador eller följdskador, eller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti är ett tillägg till dina lagstadgade rättigheter som konsument. Ovanstående garanti får inte ändras annat än skriftligen och undertecknat av båda parter.

Information om överensstämmelse

Härmed försäkrar Bellman & Symfon att denna produkt i Europa överensstämmer med de väsentliga kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745. Den fullständiga texten till försäkringen om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfons webbplats bellman.com.

Symbolförklaring

	Anger att enheten är en medicinteknisk enhet.
	Anger en bärare som innehåller information om unik identifiering av enheten.
	Anger att produkten inte får kasseras som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.
	Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras.
	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska enheten kan identifieras.
	Anger tillverkaren av den medicintekniska enheten.
	Denna symbol anger att användaren bör läsa bruksanvisningen.
	Denna symbol anger att försiktighet är nödvändig vid användning av enheten eller kontrollenheten i närheten av där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver att operatören är medveten om eller vidtar åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.
	Att identifiera en plats där information kan hittas, särskilt i en nödsituation.
	Anger de temperaturgränser som den medicintekniska enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.
	Anger det luftfuktighetsintervall som den medicintekniska enheten kan exponeras för på ett säkert sätt.

Tekniska specifikationer

Vikt	63 g
Frekvensområde	20 Hz - 20 kHz
Impedans	32 Ω +/- 10
Känslighet	113 dB/mW @ 1 kHz
Färg	Svart
Kabellängd	1,2 meter
Anslutning	3,5 mm stereokontakt
Tillbehör	BE9150 Skydd för hörlurar
Konfiguration	Detta headset kan konfigureras med följande följande personliga förstärkare: BE2021-C Maxi Pro Samtalsförstärkare
Användning	Temperatur: 0° till 35° C Luftfuktighet: 15 % - 90 %, icke-kondenserande
I lådan	BE9233-P02 Hörlurar med mikrofon

-  För detaljerad produktinformation, se motsvarande användarmanual.

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warrington,
Peterborough, PE8 6UT, UK

CH REP

Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långbergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE9233_013MAN1.0
Date of issue: 2025-02-20
© 2025 Bellman & Symfon AB.
All rights reserved.