

Erste Schritte

Vibio Bluetooth® Vibrationskissen

DEUTSCH


Vibio-Übersicht

Sie benötigen

- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 / Android 4.4 oder höher
- Einen USB-Netzadapter / max. 12W

Lieferumfang

- 1 Ladekabel
- 2 Vibrationskissen

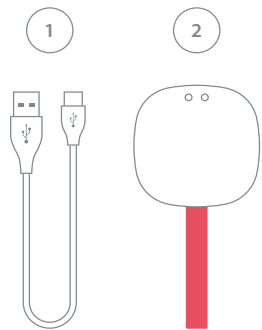

Farben der LEDs

- **Weiß:** Durch Alarm aktiviert oder Vibio kommuniziert mit Ihrem Smartphone / Tablet
- **Blau:** Vibio bereit zum verbinden (Pairing)
- **Grün:** Vibio wird geladen
- **Gelb:** Anruf oder Nachricht geht ein
- **Rot:** Akkuladestand niedrig



So geht's!

Vibio einrichten

Laden Sie die Vibio-App aus dem App Store® oder von Google Play™ herunter und folgen einfach den Anweisungen.

In wenigen Augenblicken ist der Vibio bereit.



DESIGN FOR EARS™

Bellman & Symfon Deutschland GmbH

Uelzener Str. 14

21335 Lüneburg

Hotline: 0800 7433338

E-mail info@bellman.de

bellman.com

BE1220_024MAN003

© und TM 2017 Bellman & Symfon AB

Alle Rechte vorbehalten

