

Installation der App

1 Bluetooth® aktivieren

Gehen Sie in die Smartphone Einstellungen und aktivieren Sie Bluetooth.



2 Installieren Sie die Visit App



Laden Sie die **Bellman Visit** App aus dem App Store® oder von Google Play™ herunter und folgen Sie einfach den Anweisungen.



Inbetriebnahme des Senders

3 Anbringen


Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klettverschluss auf der Rückseite des Senders und platzieren Sie ihn an der Wand. Ggf. Montage Set nutzen.

4 Aktivieren

Ziehen Sie die Batterieklappe heraus, um den Transceiver zu aktivieren. Die Status-LED am Visit Transceiver leuchtet grün auf, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist.

5 Anschließen

Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Netzteil. Stecken Sie anschließend das Netzteil in die Steckdose. Verbinden Sie zur Erkennung Ihres Festnetztelefons das mitgelieferte Kabel (ggf. mit TAE-Adapter) mit Ihrem Telefonanschluss/Router. Je nach Anschluss benötigen Sie evtl. einen Splitter.

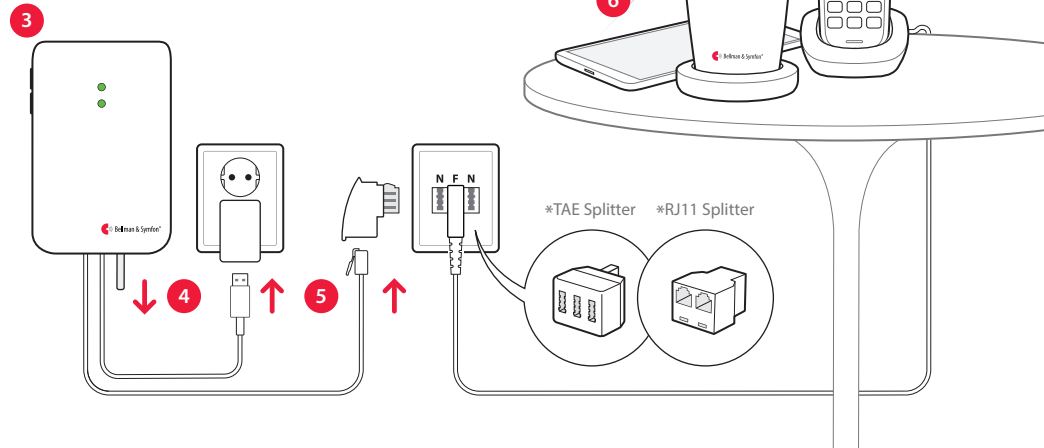

6 Smartphone-Anbindung testen


Bitte Sie jemanden auf Ihrem Smartphone anzurufen. Die gelbe LED an Ihrem Visit Empfänger beginnt zu blinken und er blitzt, vibriert und/oder gibt ein Tonsignal ab (je nach Empfänger).

7 Festnetz testen

Rufen Sie auf Ihrem Festnetzanschluss an. Die gelbe LED an Ihrem Visit Empfänger beginnt zu leuchten und er blitzt, vibriert und/oder gibt ein Tonsignal ab (je nach Empfänger).

Nutzung der App

Sobald Sie die Visit-App installiert haben, erhalten Sie Visit Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone. Darüber hinaus informieren die Visit Empfänger über Mobilanrufe und Mitteilungen. Sie können Ihr System ganz einfach in der App steuern.

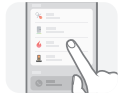

Mitteilungen verwalten

Mitteilungen mit nur einem Druck aktivieren, deaktivieren oder löschen.



Steuerung Ihrer Geräte

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre angeschlossenen Geräte und tippen Sie auf +, um ein neues Gerät hinzuzufügen.




Verlauf anzeigen

Rufen Sie die neusten Mitteilungen auf, sortiert nach Datum und Zeit.



Mehr erfahren

Tippen Sie auf **Bedienungsanleitung** im Menü, um mehr über die Funktionen zu erfahren.

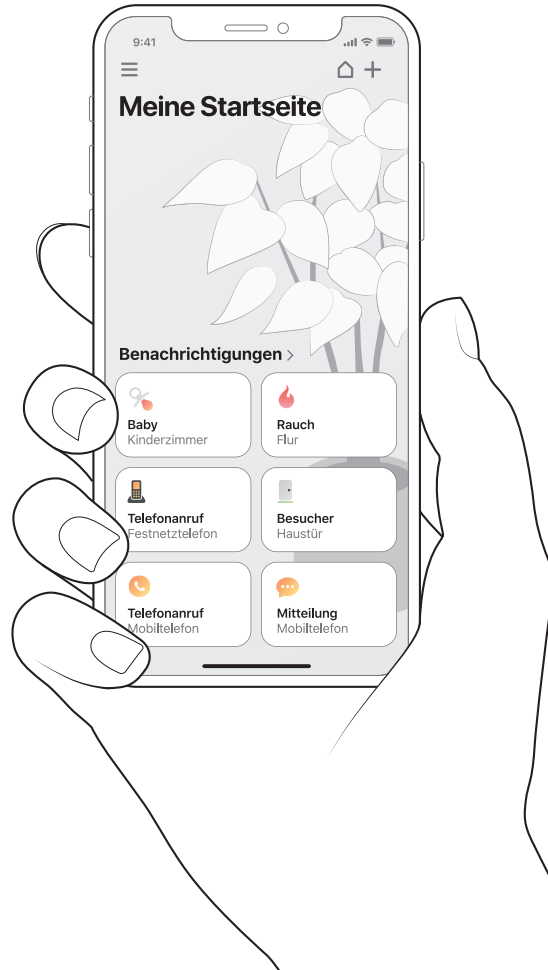

Willkommen!

Sie benötigen

- Ein Smartphone auf Basis von iOS 11 / Android 6 oder höher.

Lieferumfang

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Telefon-Transceiver BT | 4 Schraube und Dübel |
| 2 USB - Netzteilkabel | 5 TAE-Adapter |
| 3 Telefonkabel | 6 Netzteil |

