

De app installeren

1 Zet de Bluetooth® aan

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en tik op het Bluetooth-pictogram.



2 De app Visit installeren



Download de **Bellman Visit**-app vanuit de App Store® of Google Play™ en volg de installatie-instructies.



De zender installeren

3 Plaatsen


Verwijder de beschermlaag van de klittenband op de achterkant van de zender en plaats de zender op de wand. Of gebruik de meegeleverde schroef en plug.

4 Inschakelen

Trek aan het batterijlijpje om de zender te starten. De controlelampjes gaan groen branden om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.

5 Verbinden

Sluit de USB-kabel aan op de voedingsadapter. Steek de adapter in een stopcontact. Als u een vaste telefoonlijn hebt, sluit u deze met de meegeleverde splitter aan op de telefoonaansluiting.

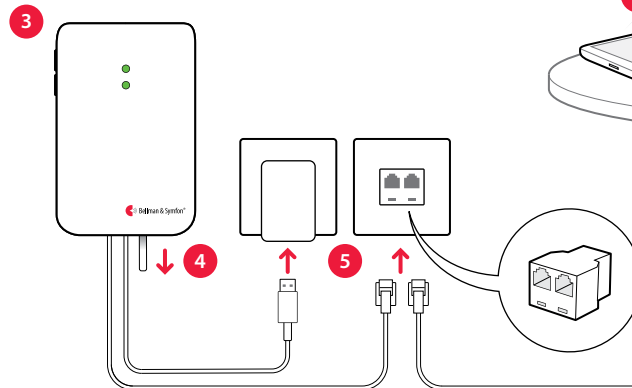


6 De mobiele telefoon testen

Laat u door iemand anders op uw mobiele telefoon bellen. Het gele lampje op de Visit-ontvanger brandt en gaat knipperen, maakt geluid of trilt (afhankelijk van de ontvanger).

7 De vaste telefoonlijn testen

Bel uw vaste telefoonlijn. Het gele lampje op de Visit-ontvanger gaat branden en gaat daarna knipperen, maakt geluid of trilt (afhankelijk van de ontvanger).

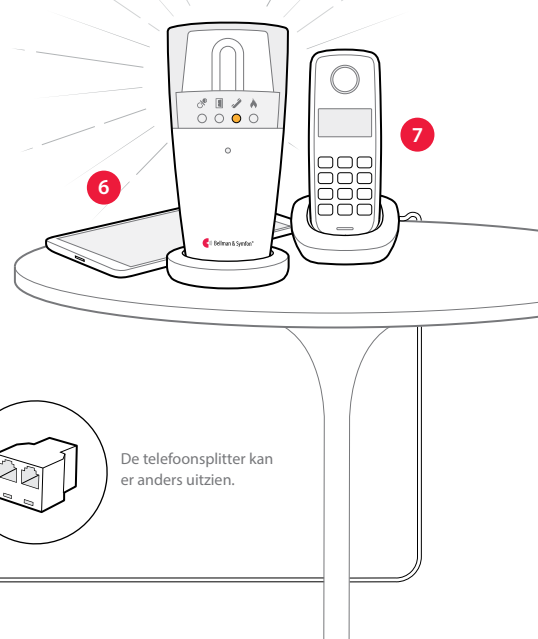

De app gebruiken

Soms zijn er momenten dat u niet wilt worden gestoord. De app heeft vier geprogrammeerde **Activiteiten** waarmee u de meldingen van Visit precies kunt instellen. Tik op een activiteit om deze te selecteren.

Goedemorgen

Visit geeft tijdens deze activiteit meldingen voor oproepen en berichten. Kies deze optie overdag, wanneer u niets wilt missen.

Welterusten

Alle Visit-meldingen zijn tijdens deze activiteit uitgeschakeld. Selecteer deze optie als u naar bed gaat, zodat u niet door meldingen wordt gewekt.

Filmavond

Visit geeft tijdens deze activiteit meldingen voor oproepen. Kies deze optie wanneer u televisie kijkt, zodat u niet wordt gestoord door het binnenkomen van berichten.

Etenstijd

Visit meldt alleen berichten tijdens deze activiteit. Kies deze optie tijdens het avondeten, zodat u tijdens het eten geen oproepen hoeft te beantwoorden.




Welkom!

Wat heeft u nodig?

- Een mobiele telefoon met iOS 11 / Android 4.4 of hoger

Wat zit er in de verpakking?

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1 Telefoonzender | 4 Schroef en plug |
| 2 Adapterkabel | 5 Telefoonsplitter |
| 3 Telefoonkabel | 6 Voedingsadapter |

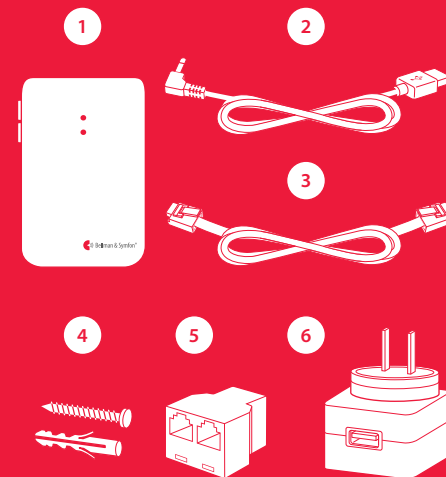

Ga voor technische informatie, geavanceerde instellingen en het oplossen van problemen naar het deel **Help** van de app.