

De app installeren

1 Zet de Bluetooth® aan

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en tik op het Bluetooth-pictogram.



2 De app Visit installeren



Download de **Bellman Visit**-app vanuit de App Store® of Google Play™ en volg de installatie-instructies.



De zender installeren

3 Plaatsen


Verwijder de beschermplaat van de klittenband op de achterkant van de zender en plaats de zender op de wand. Of gebruik de meegeleverde schroef en plug.

4 Inschakelen

Trek aan het batterijlijpje om de zender te starten. De controlelampjes gaan groen branden om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.

5 Verbinden

Sluit de USB-kabel aan op de voedingsadapter. Steek de adapter in een stopcontact. Als u een vaste telefoonlijn hebt, sluit u deze met de meegeleverde splitter aan op de telefoonaansluiting.

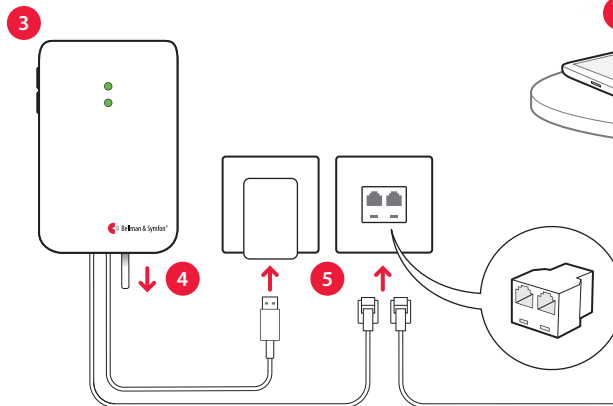


6 De mobiele telefoon testen

Laat u door iemand anders op uw mobiele telefoon bellen. Het gele lampje op de Visit-ontvanger brandt en gaat knipperen, maakt geluid of trilt (afhankelijk van de ontvanger).

7 De vaste telefoonlijn testen

Bel uw vaste telefoonlijn. Het gele lampje op de Visit-ontvanger gaat branden en gaat daarna knipperen, maakt geluid of trilt (afhankelijk van de ontvanger).

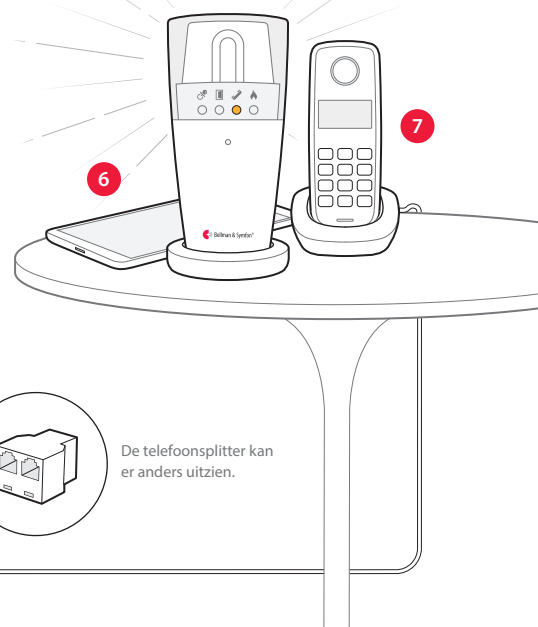

De telefoonsplitter kan er anders uitzien.

Gebruik van de app

Nadat u de Visit-app heeft geïnstalleerd, ontvangt u Visit-meldingen op uw mobiele telefoon. Daarnaast zal uw Visit-ontvanger u waarschuwen bij ontvangst van oproepen en berichten op uw mobiele telefoon. Uw systeem bedienen vanuit de app is eenvoudig. Dit kunt u doen:



Beheer meldingen

Schakel een melding in of uit en verwijder deze met een eenvoudige tik.



Bedien uw apparaten

Bekijk een overzicht van uw verbonden apparaten en tik op + om een nieuw apparaat toe te voegen.




Bekijk geschiedenis

Bekijk uw laatste meldingen, gesorteerd op datum en tijd.



Meer info

Tik op **Gebruiksaanwijzing** in het menu voor meer informatie over de functies.

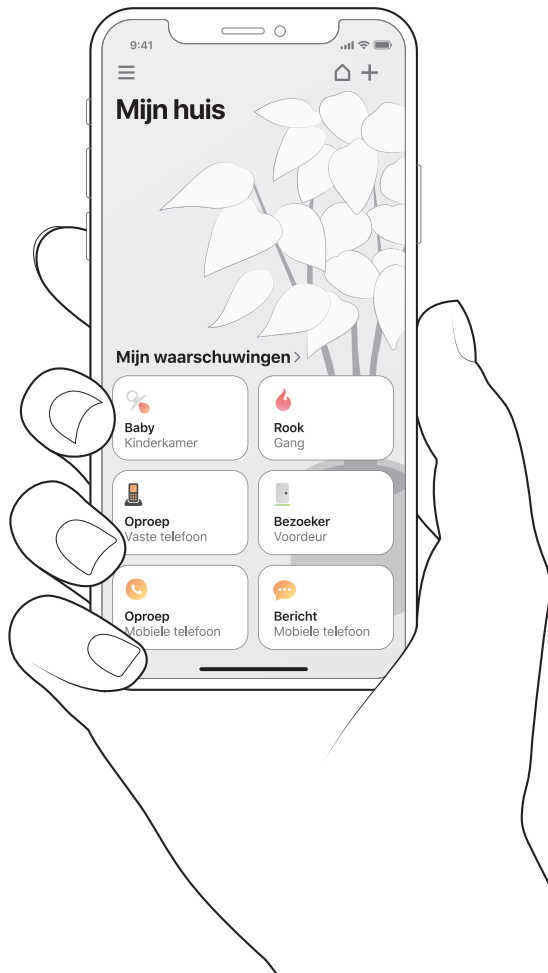


Welkom!

Wat heeft u nodig?

- Een mobiele telefoon met iOS 11 / Android 6 of hoger

Wat zit er in de verpakking?

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1 Zendontvanger mobiele telefoon | 4 Schroef en plug telefoon |
| 2 Adapterkabel | 5 Telefoonsplitter |
| 3 Telefoonkabel | 6 Voedingsadapter |

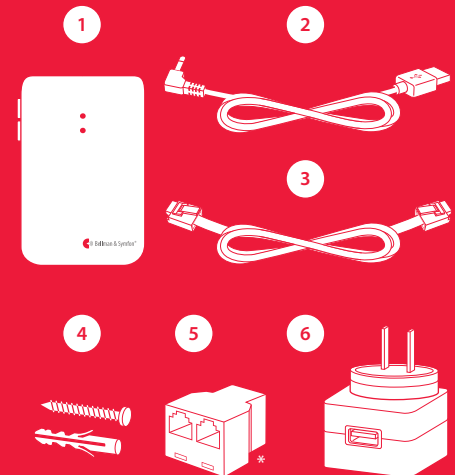

* De telefoonsplitter kaner anders uitzien.