

DESIGN FOR EARS™

Bellman Swim tillverkas av Bellman & Symfon Södra Långebergsgatan 30 421 32 Västra Frölunda  
Tel 031 68 28 20 Fax 031 68 28 90 Epost info@bellman.com

BE1810\_001MAN001



# Bellman Swim Bruksanvisning

[bellman.com](http://bellman.com)


## Isättning

Kontrollera att Bellman Swim simproppar är rena före användning. Avlägsna eventuell vax eller smuts (se under *Skötsel*).

- 1 Höger simpropp är **röd** och vänster **blå**. Håll respektive propp mellan tumme och pekfinger med serienumret pekande uppåt. Om du är osäker kan du använda en spegel.
- 2 Sätt i simproppen i hörselgången med en lätt bakåtvridande rörelse. Om det är svårt kan det underlätta att dra lite försiktigt uppåt i ytterörat med den andra handen samtidigt som du sätter i den.
- 3 Försäkra dig om att proppen sitter bekvämt på plats och sluter tätt. Kontrollera särskilt att överdelen kommer in ordentligt bakom "fliken" i örat.

## Skötsel

Bellman Swim är återanvändbara proppar som håller länge med regelbunden skötsel. Tvätta proppen med ljummet vatten och mild tvål.

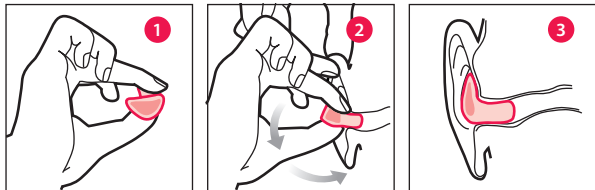

## Garanti

Garantin gäller i 2 år från dagen för köpet hos någon av våra återförsäljare. Garantianspråk kan endast göras hos återförsäljare mot uppvisande av originalkvitto. Garantin täcker inte normalt slitage eller skador orsakade av felaktig användning eller ljudläckage.

## Notera

- Använd alltid öronpropparna under hela tiden vid exponering för vatten.
- Förvara Bellman Swim i medföljande etui när du inte använder dem. Den här produkten kan innehålla smådelar och ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet att dina Bellman Swim fungerar som avsett. Notera att öronpropparnas effekt kan försämrans av felaktig användning eller försummat underhåll. Följ därför noga rekommendationerna i denna bruksanvisning.
- Produkten kan påverkas negativt av vissa kemikalier. Mer information kan fås av tillverkaren.

För mer information om Bellman Swim kontakta:

### Bellman & Symfon

Tel 031 68 28 20

Fax 031 68 28 20

Epost [info@bellman.com](mailto:info@bellman.com)

Webb [bellman.com/swim](http://bellman.com/swim)

