

個人交流器 Response 說明書

BE1053



感谢您选择瑞典Bellman & Symfon的产品！

使用说明

1 安装电池

把产品背面的电池扣(7)向右推, 然后向下推电池盖(6), 打开电池仓。

把1.5伏的碱性电池(LR03, AAA)放进电池仓, 关上电池盖(6), 锁上电池扣(7)。

2 把耳塞或耳机插进耳机接口(4)。

3 开机及关机

开机: 把开关钮(3)向上推至“1”位置。

关机: 把开关钮(3)向下推至“0”位置。

4 音量控制

增加音量: 顺时针逐级推动音量旋钮(1), 直到合适的音量。

降低音量: 逆时针逐级推动音量旋钮(1), 直到合适的音量。

5 谈话/电视模式

谈话模式: 通过内置麦克风聆听讲话, 请把谈话/电视切换钮(5)推至“M”位置。

电视模式:要收听电视,把 BE9022 电视转接线连接到耳机接口(4),然后把谈话/电视切换钮(5)推至“TV”位置。

BE9022电接转接线是选购配件,您可根据需要额外购买。

包装内含

- BE1053 交流器
- BE9124 立体声耳塞
- AAA 碱性电池
- 说明书

简答故障处理

故障	可能原因	处理方法
无声	<ul style="list-style-type: none">▪ 没有开机▪ “谈话/电视模式”设置错误▪ 电池电量太低	<ul style="list-style-type: none">▪ 将开关钮(3)推向“1”位置▪ 参照“使用说明”中“谈话/电视模式”设置▪ 更换电池
声音小	<ul style="list-style-type: none">▪ 音量设置太低	<ul style="list-style-type: none">▪ 调节音量旋钮(1)
杂音、声音断续	<ul style="list-style-type: none">▪ 电池电量不足	<ul style="list-style-type: none">▪ 更换电池

感謝您選擇瑞典 Bellman & Symfon 的產品！

使用說明

1 安裝電池

把產品背面的電池扣(7)向右推，然後向下推電池蓋(6)，打開電池倉。

把1.5伏的鹼性電池(LR03, AAA)放進電池倉，關上電池蓋(6)，鎖上電池扣(7)。

2 把耳塞或耳機插進耳機介面(4)。

3 開機及關機

開機：把開關鈕(3)向上推至“I”位置。

關機：把開關鈕(3)向下推至“O”位置。

4 音量控制

增加音量：順時針逐級推動音量旋鈕(1)，直到合適的音量。

降低音量：逆時針逐級推動音量旋鈕(1)，直到合適的音量。

5 談話/電視模式

談話模式：通過內置麥克風聆聽講話，請把談話/電視切換鈕(5)推至“M”位置。

電視模式：要收聽電視，把 BE9022 電視轉接線連接到耳機介面 (4)，然後把談話/電視 切換鈕 (5) 推至 “TV” 位置。




BE9022 電接轉接線是選購配件，您可根據需要額外購買。

包裝內含

- BE1053 交流器
- BE9124 立體聲耳塞
- AAA鹼性電池
- 說明書

簡答故障處理

故障	可能原因	處理方法
無聲	<ul style="list-style-type: none">▪ 沒有開機▪ “談話/電視模式” 設置錯誤▪ 電池電量太低	<ul style="list-style-type: none">▪ 將開關鈕 (3) 推向 “1” 位置▪ 參照 “使用說明” 中 “5 談話/電視模式” 設置▪ 更換電池
聲音小	<ul style="list-style-type: none">▪ 音量設置太低	<ul style="list-style-type: none">▪ 调节音量旋鈕 (1)
雜音、聲音斷續	<ul style="list-style-type: none">▪ 電池電量不足	<ul style="list-style-type: none">▪ 更換電池

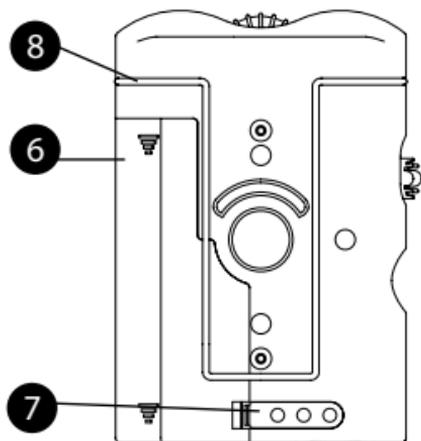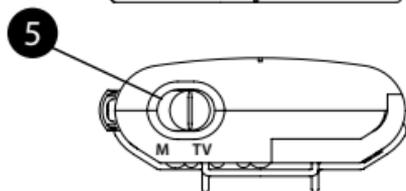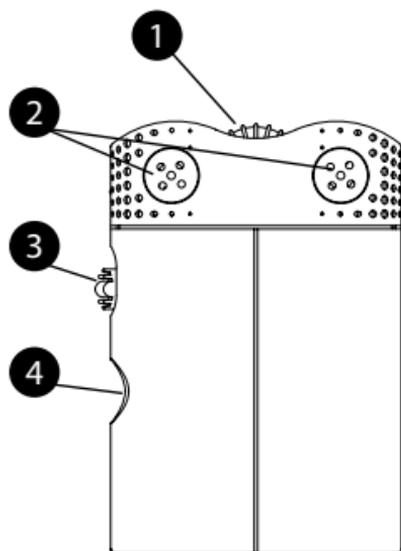

简

- | | | | |
|---|----------|---|-----|
| 1 | 音量旋钮 | 6 | 电池盖 |
| 2 | 麦克风 | 7 | 电池扣 |
| 3 | 开关钮 | 8 | 夹子 |
| 4 | 耳机接口 | | |
| 5 | 谈话/电视切换钮 | | |

繁

- | | | | |
|---|----------|---|-----|
| 1 | 音量旋鈕 | 6 | 電池蓋 |
| 2 | 麥克風 | 7 | 電池扣 |
| 3 | 開關鈕 | 8 | 夾子 |
| 4 | 耳機接口 | | |
| 5 | 談話/電視切換鈕 | | |

欧洲总部

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30,
436 32 Askim
Sweden
Phone +46 31 68 28 20
Fax +46 31 68 28 90
E-mail info@bellman.com

亚太分公司

Bellman & Symfon Asia Ltd.
广东省广州市越秀区环市东路 339 号
广东国际大厦主楼 1401-06 室
邮编: 510095
电话: 020 8318 2950
传真: 020 8333 5528
E-mail info.cn@bellman.com



DESIGN FOR EARS™



bellman.com

BE1053_010MAN007_CN