

简体中文

BE2022 Maxi Pro 电视伴侣



关于电视伴侣

Maxi Pro 与电视伴侣完美配合,通过蓝牙接收到全立体声,可使您以适合自己且不会影响他人的音量收听电视。(单独售卖)

包装清单

除了电视伴侣之外，还包含下列物品：

一根音频线



一根 RCA 转换线



一根光纤连接线




一根 USB 充电线



启动所需物件

为了设置电视伴侣您还需要：

一台带有 RCA，
耳机或光纤音频端口的电视机

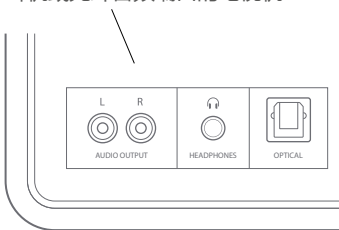

一台 Maxi Pro 个人辅听器
(专业版)



设置电视伴侣


第 1 步：连接音频

有许多方法可将电视伴侣连接至电视机。这取决于电视机配备的音频端口类型。

使用电视机的 RCA 输出

- 1 将音频线的一端连接至位于电视伴侣背部的音频输入。
- 2 将另一端连接至 RCA 转换线上。
- 3 RCA 插头连接至电视机上的音频输出。

注：您也可将音频线直接连接至电视机上的耳机输出。请注意，这有可能将某些型号电视机上的扬声器静音。

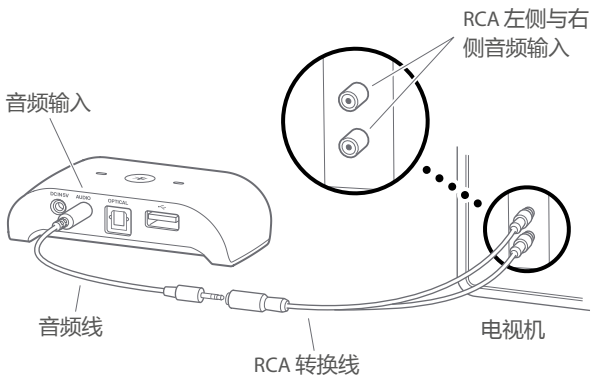


使用电视机的光纤输出

如果电视机上配备光纤输出，则可使用光纤连接线将电视伴侣连接至电视机。以下为连接方法：

- 1 将光纤连接线的一端连接至位于电视伴侣背部的光纤输入口。
- 2 将另一端连接至电视机上的光纤输出。


光纤连接线

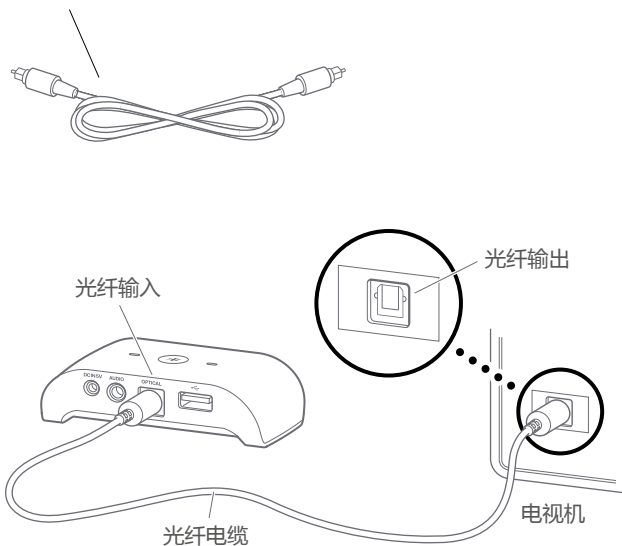

第 2 步：连接电源线

- 1 将电源线的圆形插头连接到电视伴侣的后面对应的电源插座上。
- 2 将电源线 USB 端连接到 Maxi Pro 电源适配器。
- 3 将适配器插头安装到电源适配器并将其连接到电源插座上，电视伴侣的电源指示灯就会亮起绿灯。

注：您也可以通过将电源线 USB 端连接到电视 USB 端口来为其供电。但是，这可能会在重连期间听不到电视声音。

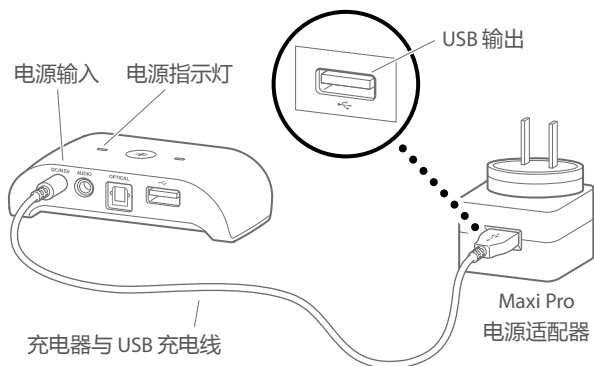

第 3 步：配对

注：如果购买来的 TV streamer 和 Maxi Pro 是在同一个包装盒内，则不需要再去配对。

- 1 在 TV streamer 端：按住蓝牙按键直到蓝色指示灯闪烁。
- 2 在 Maxi Pro 端：按下麦克风按键，然后按住蓝牙按键直到蓝色指示灯闪烁。
- 3 两盏蓝牙指示灯均将持续显示蓝色，这表明配对成功。

使用电视伴侣


只要您的电视伴侣连接着电源，它将会一直处于开机状态，当您回到蓝牙连接范围时将自动重连到您的 Maxi Pro。连接设备后，蓝牙指示灯都将亮起蓝灯。

注：如果您通过电视为您的电视伴侣充电，当您打开电视时，它将会自动开机并在 10 秒内重连到您的 Maxi Pro。

对 Maxi Pro 充电

您可使用电视伴侣对 Maxi Pro 进行充电：

- 1 将 Maxi Pro 充电线的 USB 端连接至位于电视伴侣背部的 USB 充电输出。
- 2 将另一端连接至以黄色标记的 Maxi Pro 充电器插孔。
- 3 充电时，Maxi Pro 电池指示灯闪烁绿色。在大约 3 小时后，将持续亮起绿灯，这表明已完全充好电。

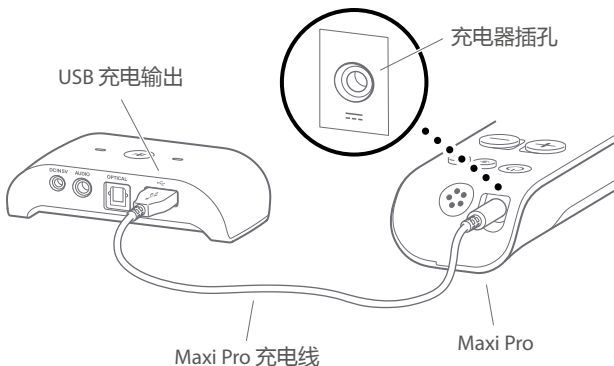

故障排除

可通过执行下方建议快速解决使用过程中出现的大多数问题。

问题	解决方法
按下蓝牙按键无反应。	<ul style="list-style-type: none">• 确保电视伴侣已与电源连接，请见连接电源线。
戴上耳机未听到电视机的声音。	<ul style="list-style-type: none">• 确保 Maxi Pro 在蓝牙连接范围内，并且与电视伴侣配对，请见配对。
当音频线连上耳机时，电视声音消失。	<ul style="list-style-type: none">• 这是一些型号电视机的特点。• 改用电视机上的 RCA 或光学输出，请见连接音频。

保养与维护

在温度始终介于 0° 和 35° C 之间的干燥环境中操作本产品。

使用一块柔软的无绒布清洁产品。避免开口进水。请勿使用玻璃清洁剂、家用清洁剂、气雾剂、溶剂、酒精、氨水或研磨剂。

如果产品出现损坏迹象或者无法正常工作，请遵循本手册中的使用说明。如果产品依旧无法正常运行，请联系您当地的经销商，了解保养与质保信息。

Bellman & Symfon Asia Ltd.
广东省广州市越秀区环市东路339号
广东国际大厦主楼1401-06室 邮编510095
电话: +86 20 8318 2950
传真: +86 20 8333 5528
邮箱: info.cn@bellman.com



CMIIT ID:2019DJ9373