

请先阅读

本手册指导您如何使用和维护本领夹麦克风。请务必仔细阅读本手册，包括**警告**部分。如果您有其他问题，请联系您的购买点。

关于 BE9136 领夹麦克风

目标用户群

所有年龄段的人。

目标用户

希望控制调谐和聆听音量的用户。

工作原理

音频产品系列由多个放大器和声音发射器组成，这些放大器和声音发射器专门用于在要求苛刻的情况下提供声音增强功能。根据特定放大器或声音发射器的指定功能，可以使用不同的麦克风拾取直接声音或增强环境声音。

 本设备不能恢复正常听力，也不能预防或改善因器质性病变导致的听力损伤或耳聋。

一般警告

本节包含有关安全、处理和操作条件的重要信息。请保留本宣传页，以备将来使用。如果只是安装设备，则必须将本手册交给户主。

危险警告

- 不遵守这些安全说明可能会导致火灾、触电或其他伤害，或损坏设备或其他财产。
- 请将本设备放在 3 岁以下儿童接触不到的地方。
- 请勿在任何热源（如明火、散热器、烤箱或其他发热设备）附近使用或存放本设备。
- 请勿拆卸设备；否则有触电的危险。篡改或拆卸设备将导致保修失效。
- 本设备仅供室内使用。请勿将设备暴露在潮湿环境中。
- 保护设备在存储和运输过程中免受冲击。
- 防止电缆受到任何潜在的损坏。
- 请勿对本设备进行任何更改或修改。仅使用 Bellman & Symfon 原装配件，以避免任何电击。
- 所连接的监听设备具有非常强大的放大器，如果不小心使用本产品，其音量可能会引起不适，严重时还会危及听力。在佩戴耳机之前，请务必将音量调低！

产品安全信息

- 不遵守这些说明可能会导致设备损坏并使保修失效。
- 请勿在禁止使用电子设备的区域使用设备。
- 该设备只能由授权服务中心维修。
- 如果您的设备出现问题，请联系购买点、当地 Bellman & Symfon 办事处或制造商。请访问 bellman.com 获取联系信息。
- 请勿将设备跌落。跌落到坚硬表面可能会损坏设备。

操作条件

请在干燥的环境中操作设备，温度和湿度不得超过本手册规定的范围。如果设备受潮或暴露在潮湿环境中，则不应再视为可靠设备，应予以更换。

清洁

清洁设备前，请断开所有连接线。使用柔软的无绒布。避免开口处受潮。请勿使用家用清洁剂、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水或研磨剂。本设备无需消毒。

服务和支持

如果设备出现损坏或无法正常工作，请按照用户指南和本手册中的说明进行操作。如果产品仍然不能正常工作，请联系当地的办事处或购买点，了解有关服务和保修的信息。

保修条件

Bellman & Symfon 保证本产品自购买之日起 90 天内不会出现因材料或工艺缺陷造成的任何瑕疵。本保证仅适用于正常的使用和服务条件，不包括因意外、疏忽、误用、未经授权的拆卸或污染而造成的损坏。本保修不包括意外和间接损失。此外，保修不包括天灾，如火灾、洪水、飓风和龙卷风。

本保证书赋予您特定的法律权利，您可能还拥有其他权利，这些权利因地区而异。某些国家或地区不允许限制或排除附带或间接损失，也不允许限制默示保修的期限，因此上述限制可能不适用于您。本保证是对您作为消费者的法定权利的补充。除非双方签署书面文件，否则不得更改上述保证。

符号解释

	表示产品的序列号，以便识别特定设备。
	表示设备制造商。
	该符号表示用户需要查阅使用说明。
	该符号表示在靠近该符号的位置操作设备或控制装置时需要格外小心，或者当前情况需要操作员注意或采取行动，以避免造成不良后果。
	用于标识信息的位置，特别是在紧急情况下。
	表示设备可以安全暴露的温度范围。
	表示设备可以安全暴露的湿度范围。

技术规格

重量	12 克
电缆长度	1 米
连接器	2.5 毫米单声道插头
颜色	黑色
指向性	全方向
灵敏度	-44 分贝
信噪比	>58 分贝
操作温度	温度：0 – 35°C 湿度：15% – 90%，无冷凝
配件	BE9408 用于麦克风的延长线
配置	本设备可与下列个人交流器和交流系统配合使用： 兼容的个人交流器： BE2020 个人交流器 Maxi BE2030 个人交流器 Mino BE2210 Domino Pro 接收器 兼容的个人交流系统： BE8005 个人交流系统 Domino Pro

- 包装清单**
- BE9136 领夹麦克风
 - 固定夹
 - 麦克风泡沫帽

 有关产品详细信息，请参阅相应的用户手册。