

疑難排除

問題	解決方法
LED 指示燈閃爍紅色	電池電量低。使用隨附的充電線對 Vibio 進行充電。
LED 指示燈不亮	電池已耗盡。給 Vibio 充電約 1.5 小時。
Vibio 未連接到手機	<p>請先檢查應用程式主畫面上的藍牙連接狀態。如果 Vibio 圖標為紅色並有刪除線，請嘗試以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 在藍牙範圍內移動。 將您的手機移動至更靠近 Vibio 的地方。 關閉藍牙後再開啟。 滑動以開啟手機上的控制中心/快速設定面板，然後點按藍牙圖標。 <p>如果仍然連接不上，您需要手動重設並重新連接 Vibio 無線振動器和應用程式。請嘗試以下步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 強制退出應用程式。 請注意，僅關閉是不夠的。 Vibio 斷開連接。 進入設定 > 藍牙。點選 Vibio 並點  / ，忽略此設備/取消配對。請確認藍牙已經開啟。 重設 Vibio。 拉住繩子，直到 LED 指示燈開始閃爍。放開後再次拉住，直到 LED 指示燈亮起藍色並緩慢閃爍。 設定 Vibio。 再次啟動 Vibio 應用程式並按照指示操作。

預期用途

Vibio 無線振動器裝置，可搭配手機應用程式喚醒您

電源和電池

電池電力：1 × 3.7 V AA 鋰離子電池
 電力消耗：以強度振動工作時：
 < 1000 mA，閒置：< 100 μA
 運作時間：最長 10 天/充電
 充電時間：最快 1.5 小時 @ 500mA
 充電電流：最高 500 mA, 5V DC

相容性

iOS11 / Android 4.4 及更高版本，
 iPhone 5S 及更高版本 / 現代 Android 裝置

尺寸及重量

尺寸：27 × 94 × 94 毫米，
 1.1 × 3.7 × 3.7 英寸
 重量：153 克，5.4 盎司

頻率和覆蓋範圍

藍牙頻率：2402 – 2480 MHz
 輸出功率：最大 2.5mW (4dBm)
 覆蓋範圍：空曠場地最遠 30 米、33 碼
 連線能力：藍牙 4.2

充電線和連接

充電線長度：1 米，39 英寸
 接頭：USB type A 轉 USB Micro-B

維護和清潔

免維護。用乾布清潔。請勿使用家用清潔劑、噴霧劑、酒精或研磨劑。

法規要求

符合 CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE, Der Grüne punkt

環境要求

僅供室內使用
 溫度：0°– 35° C, 32°– 95° F
 相對濕度：5% – 95%

安全和質保條款

請參閱單獨的文件

Bellman & Symfon Asia Ltd

廣東省廣州市越秀區環市東路 339 號

廣東國際大廈主樓 1401-06 室

電話：020-8318 2950

電子郵件：info.cn@bellman.com

© 和 TM 2020, Bellman & Symfon AB,

保留所有權利

BE1221_019AN003




您需要什麼

- iOS11/Android 4.4 或更高版本的手機
- USB 適配器

包裝盒的內容

- 1 充電線
- 2 Vibio 無線振動器

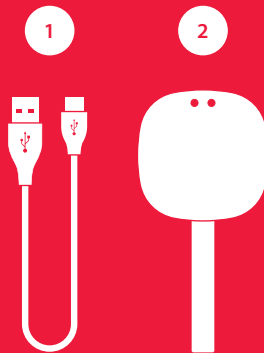

Vibio 無線振動器, BE1221

指示燈閃爍狀態

- 白色表示鬧鐘已激活，或正與您的手機連接
- 藍色表示已準備好配對
- 綠色表示正在充電
- 黃色表示您有來電或訊息
- 紅色表示電池電量低




安裝 Vibio

1 充電

連接充電線到您的 Vibio，並將充電線插入 USB 電源適配器或 USB 電腦插座。

2 打開開關

將開關滑到右側開機，然後將 Vibio 靠近手機。

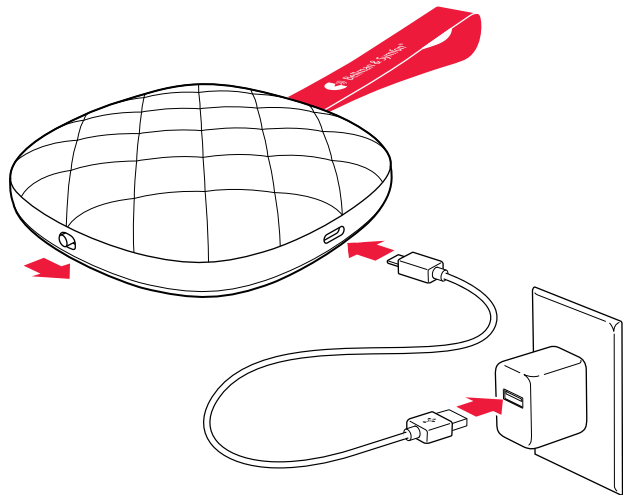

3 安裝應用程式



從 App Store® 或從 Google Play™、Bellman 中文官網下載 Vibio 應用程式，並按指示安裝。



使用應用程式


管理鬧鐘

-  **新增。** 點一下加號按鈕可新增鬧鐘
-  **編輯。** 按一下鉛筆按鈕可編輯鬧鐘
-  **刪除。** 按一下減號按鈕可刪除鬧鐘
-  **開/關。** 按一下「開」或「關」按鈕可啟用或禁用鬧鐘

監控 Vibio

-  **連接。** Vibio 圖標顯示連接狀態
-  **電池。** 電池圖標顯示目前的電池電量

了解更多

-  **幫助。** 點選「菜單」>「幫助」，以進一步了解該應用程式

