

請先閱讀

本單張教您如何使用和保養您的本帶麥克風耳機。請務必仔細閱讀本單張，包括**警告**部分。如果您有其他問題，請聯絡您的經銷商。

關於 BE9233 帶麥克風耳機

使用者群組

所有年齡層的人士。

預期使用者

想要控制調音和聆聽音量的使用者。

運作原理

音訊產品系列包含多種放大器和聲音傳送器，這些產品都是特別為了在嚴苛的環境下仍能提供聲音強化效果而開發。根據特定放大器或聲音發射器的指定功能，可使用不同的麥克風來擷取直接聲音或增強環境聲音。

本裝置無法恢復正常聽力，也無法預防或改善由器質性病變造成的聽力損傷或耳聾。

一般警告

本節包含有關安全、處理和操作條件的重要資訊。請妥善保存本說明書，以備日後使用。

危險警告

- 若未遵循這些安全說明，可能會導致火災、觸電或其他傷害，或損壞裝置或其他財產。
- 請勿讓 3 歲以下兒童接觸本裝置。
- 請勿在任何熱源附近使用或存放本裝置，例如明火、散熱器、烤箱或其他會產生熱能的裝置。
- 請勿拆卸本裝置，否則有觸電的危險。篡改或拆卸本裝置將導致保固失效。
- 請勿將本裝置暴露於濕氣中。
- 保護裝置在儲存和運輸過程中不受震動。
- 防止纜線受到任何可能來源的損害。
- 請勿對本裝置進行任何變更或修改。請僅使用 Bellman & Symfon 原廠配件，以避免任何電擊。
- 接的聆聽裝置具有非常強大的擴音器，如果不小心使用本產品，其音量可能會造成不適，嚴重時甚至會危及聽力。戴上耳機麥克風之前，請務必先將音量調低。

產品安全資訊

- 不遵守這些指示可能會導致裝置損壞，並使保固失效。
- 請勿在禁止使用電子設備的區域使用本裝置。
- 本裝置只能由授權的維修中心維修。
- 如果您的裝置遇到問題，請與購買點、當地的 Bellman & Symfon 辦公室或製造商聯繫。請造訪 **bellman.com** 以取得聯絡資訊。
- 請勿掉落您的裝置。掉落到硬表面可能會損壞裝置。

清潔

使用柔軟、不起毛的布。避免濕氣進入開口。請勿使用家用清潔劑、噴霧劑、溶劑、酒精、氨水或研磨劑。本裝置不需要消毒。

服務與支援

如果裝置出現損壞或無法正常運作，請按照使用者指南和本單張的指示操作。如果產品仍無法正常運作，請聯絡您當地的經銷商，以取得有關服務和保固的資訊。

保固條件

Bellman & Symfon 保證本產品自購買日起 90 天內，不會因材料或製造過程的錯誤而產生任何瑕疵。本保證僅適用於正常的使用和服務狀況，不包括因意外、疏忽、誤用、未經授權的拆卸或污染而造成的損壞，無論其原因為何。本保證不包括意外及間接損害。此外，保固不包括天災，例如火災、水災、颶風和龍捲風。

本保證賦予您特定的法律權利，您也可能擁有其他權利，這些權利因地區而異。某些國家或司法管轄區不允許限制或排除附帶或間接損害，或限制默示保證的期限，因此上述限制可能不適用於您。本保證是您作為消費者的法定權利的補充。上述保證不得更改，除非有本保證雙方簽署的書面文件。

符号解释

	表示制造商的序列号，以便识别特定设备。
	表示设备制造商。
	该符号表示用户需要查阅使用说明。
	该符号表示在靠近该符号的位置操作设备或控制装置时需要格外小心，或者当前情况需要操作员注意或采取行动，以避免造成不良后果。
	用于标识信息的位置，特别是在紧急情况下。
	表示设备可以安全暴露的温度范围。
	表示设备可以安全暴露的湿度范围。

技術規格

重量	63 克, 2.2 盎司
頻率範圍	20 Hz - 20 kHz
阻抗	32 Ω +/- 10%
靈敏度	113 dB/mW @ 1 kHz
顏色	黑色
線長	1.2 公尺
連接器	3.5 mm 立體聲插頭
配件	BE9150 耳機套
配置	此耳機可與下列個人交流器： BE2021 個人交流器 Maxi Pro
操作	溫度: 0° 至 35° C, 32° 至 95° F 濕度: 15% - 90%, 不凝結
包裝盒內	BE9233 帶麥克風耳機

 如需詳細的產品資訊，請參閱相對應的使用者手冊。