



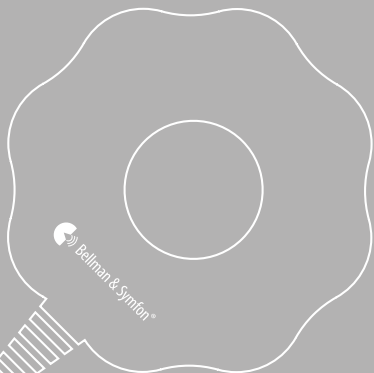

BE1270-P02
Bed Shaker



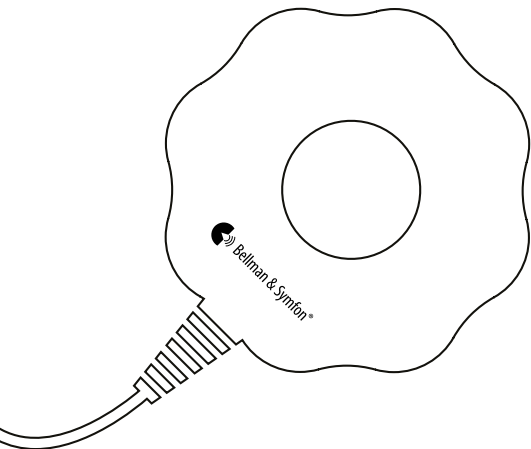

BE1270-P02 Bed Shaker

4	User manual
10	Bedienungsanleitung
16	Brugervejledning
22	Manual del usuario
28	Käyttöopas
34	Mode d'emploi
40	Manuale d'uso
46	Gebruikshandleiding
52	Brukermanual
58	Instrukcja obsługi
64	Bruksanvisning
70	Používateľská príručka

EN
DE
DK
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PL
SE
SK

Läs detta först

Den här broschyren innehåller anvisningar om hur du använder och underhåller din nya Sängvibrator. Läs igenom den här broschyren noggrant, inklusive avsnittet **Varningar**. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din audionom.

Avsett syfte Den avsedda användningen av Visitsystemet är att varna döva och hörselskadade personer om viktiga signaler i deras hem.

Avsedd användare Den avsedda användaren är en person med mild till svår hörselnedsättning eller dövhet.

Avsedd användargrupp Den avsedda användargruppen består av personer i alla åldrar med mild till svår hörselnedsättning eller dövhet som behöver ljud-, syn- eller känsel förstärkning.

Funktionsbeskrivning Placera Sängvibratoren under madrassen eller kudden och anslut den till någon av Bellman & Symfon mottagarna eller laddarna. Om någon av Visit-sändarna aktiveras kommer sängvibratoren att väcka användaren med vibrationer.




Visitsystemet återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte en hörselnedsättning eller dövhet som beror på organiska tillstånd.

Kom igång

Sängvibratoren kan du använda tillsammans med din Visit-laddare eller Visitmottagare. Den väcker dig med vibrationer under madrassen eller huvudkudden.

- 1 Anslut sängvibratoren genom att sätta i kontakten i sängvibrator-uttaget på laddaren eller mottagaren (se nedan).
- 2 Tryck på testknappen på någon av de sändare du har till Visitsystemet och kontrollera att sängvibratoren vibrerar.

Notera: När du ansluter sängvibratoren till pagerladdaren måste pagern sitta i laddaren för att sängvibratoren ska fungera.

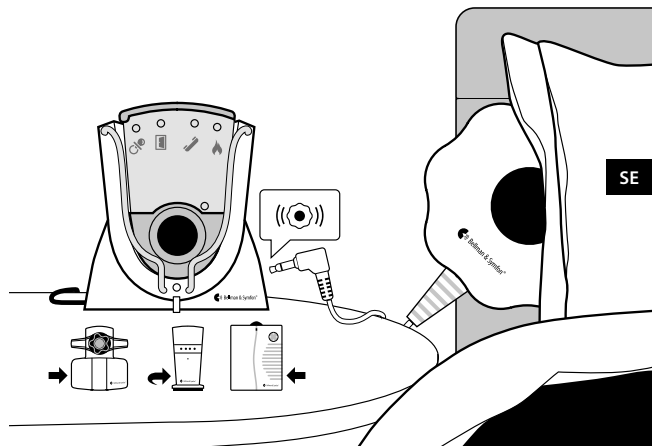

SE

Viktig säkerhetsinformation

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftsförhållanden. Behåll denna broschyr för framtida bruk. Om du bara installerar enheten måste denna broschyr ges till hushållsägaren.



Varningar för faror

- Om du inte följer dessa säkerhetsanvisningar kan det leda till brand, elektriska stötar eller andra personskador eller skador på enheten eller annan egendom.
- Förvara enheten oåtkomligt för barn under 3 år.
- Använd eller förvara inte enheten i närheten av värmekällor, t.ex. öppen eld, element, ugnar eller andra enheter som alstrar värme.
- Skydda enheten mot stötar under förvaring och transport.
- Denna enhet är endast avsedd för inomhusbruk. Enheten får inte utsättas för fukt.
- Enheten får inte demonteras; det finns risk för elektriska stötar. Om enheten manipuleras eller demonteras upphör garantin att gälla.
- Gör inga ändringar eller modifieringar av denna enhet. Använd endast originaltillbehör från Bellman & Symfon för att undvika elektriska stötar.
- Skydda kablarna från alla potentiella skadekällor.



Information om produktsäkerhet

- Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till skador på enheten och att garantin upphör att gälla.
- Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- Enheten får endast repareras av ett auktoriserat servicecenter.
- Om en allvarlig incident inträffar i samband med denna enhet ska du kontakta tillverkaren och relevant myndighet.

- Om du stöter på andra problem med din enhet ska du kontakta inköpsstället, ditt lokala Bellman & Symfon-kontor eller tillverkaren. Besök bellman.com för kontaktinformation.
- Tappa inte enheten. Om du tappar den på en hård yta kan den skadas.
- När du ansluter sängvibratortill pagerladdaren måste pagern sättas i för att den ska fungera.

Driftsförhållanden

Använd enheten i en torr miljö inom de temperatur- och fuktighetsgränser som anges i denna broschyr. Om enheten blir våt eller utsätts för fukt ska den inte längre betraktas som tillförlitlig och ska därför bytas ut.

Rengöring

Koppla bort alla kablar innan du rengör enheten. Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik att få in fukt i öppningarna. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel. Den här enheten kräver inte sterilisering.

Service och support

Om enheten verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska följer du instruktionerna i bruksanvisningen och denna broschyr. Om produkten fortfarande inte fungerar som avsett kontaktar du din lokala audionom för information om service och garanti.

Garantivillkor

Bellman & Symfon garanterar denna produkt under sex (6) månader från inköpsdatum mot eventuella defekter som beror på felaktigt material eller utförande. Denna garanti gäller endast under normala användnings- och serviceförhållanden och omfattar inte skador till följd av olyckshändelse, förfälskelse, felaktig användning, obehörig demontering eller kontaminering, oavsett orsak.

Denna garanti omfattar inte oförutsedda skador eller följdskador. Garantin omfattar inte heller naturkatastrofer som brand, översvämning, orkaner och tornados. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på territorium. Vissa länder eller jurisdiktioner

tillåter inte begränsning eller uteslutning av tillfälliga skador eller följdskador, eller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti är ett tillägg till dina lagstadgade rättigheter som konsument. Ovanstående garanti får inte ändras annat än skriftligen och undertecknat av båda parter.

Symbolförklaring



Anger att enheten är en medicinteknisk enhet.



Anger en bärare som innehåller information om unik identifiering av enheten.



Anger att produkten inte får kasseras som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.



Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras.



Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska enheten kan identifieras.



Anger tillverkaren av den medicintekniska enheten.



Denna symbol anger att användaren bör läsa bruksanvisningen.



Denna symbol anger att försiktighet är nödvändig vid användning av enheten eller kontrollenheten i närheten av där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver att operatören är medveten om eller vidtar åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.



Att identifiera en plats där information kan hittas, särskilt i en nödsituation.



Anger de temperaturgränser som den medicintekniska enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.



Anger det luftfuktighetsintervall som den medicintekniska enheten kan exponeras för på ett säkert sätt.

Tekniska specifikationer

Mått och dimensioner	88×88×27 mm
Vikt	120 g
Driftspänning	2,0 - 4,0 V DC från en Visit mottagare eller laddare
Strömförbrukning	250 - 750 mA
Färg	Vit med rött halskydd av gummi
Kabellängd	2 meter
Funktion	BE1270-P02 Sängvibrator är en vibrator för inomhusbruk som placeras i sängen för att väcka användarens uppmärksamhet med vibrationer.
Installation	Sängvibratorn placeras vanligtvis under en kudde eller under madrassen. Den ansluts till en rad Bellman & Symfon-produkter med vibratorutgångar.
Drift	Temperatur: 0° till 35° C Luftfuktighet: 15% till 90%, icke-kondenserande
Konfiguration	Denna enhet kan användas med alla Visit-mottagare
Skötsel och rengöring	Underhållsfri. Rengör med en mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel, lösningsmedel, ammoniak eller alkohol.
I lådan	■ BE1270-P02 Sängvibrator

SE

Överensstämmelse

Härmed försäkrar Bellman & Symfon att denna produkt i Europa överensstämmer med de väsentliga kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfons webbplats **bellman.com**.

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warmington,
Peterborough, PE8 6UT, UK



Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1270_056MAN1.0

Date of issue: 2024-11-19

TM and © 2024 Bellman & Symfon AB. All
rights reserved.