


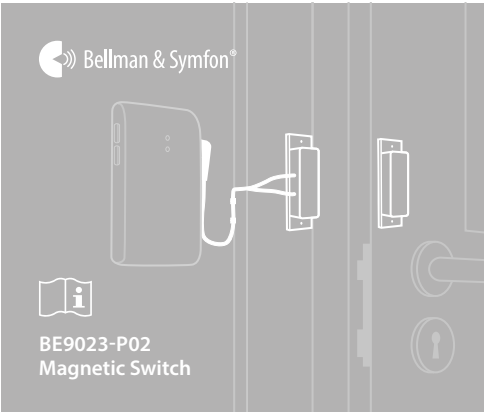

SE Produktinformation

Läs detta först

I denna broschyr får du information om hur du använder och underhåller din nya Magnetbrytare. Läs igenom den här broschyren noggrant, inklusive avsnittet **Varningar**. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din audionom..

Om BE9023-P02 Magnetbrytare

Avsedd användning

Den avsedda användningen av Visitsystemet är att varna döva och hörselskadade personer för viktiga signaler i hemmet.

Avsedd användargrupp

Den avsedda användargruppen består av personer i alla åldrar med mild till svår hörselnedsättning eller dövhet som behöver ljud-, syn- eller känsel förstärkning.

Avsedd användare

Den avsedda användaren är en person med mild till svår hörselnedsättning eller dövhet.

Funktionsbeskrivning

Visitsystemet består av en uppsättning trådlöst anslutna sändare och mottagare som är placerade i hela hemmet. När en sändare upptäcker en aktivitet signalerar den till Visit blixtmottagaren som varnar användaren med ljud, blixtar eller vibrationer. För att kunna använda systemet behöver du minst en sändare och en mottagare.

 Visitsystemet återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte en hörselnedsättning eller dövhet som beror på organiska tillstånd.

Allmänna varningar

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftsförhållanden. Behåll denna broschyr för framtida bruk. Om du bara installerar enheten måste denna broschyr ges till hushållsägaren.

Varningar för faror

- Om du inte följer dessa säkerhetsanvisningar kan det leda till brand, elektriska stötar eller andra personsador eller skador på enheten eller annan egendom.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn under 3 år.
- Använd eller förvara inte enheten i närheten av värmekällor som öppna eld, element, ugnar eller andra enheter som alstrar värme
- Ta inte isär enheten, det finns risk för elektriska stötar. Om enheten manipuleras eller demonteras upphör garantin att gälla.
- Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt inte enheten för fukt.
- Skydda enheten från stötar under förvaring och transport.
- Gör inga ändringar eller modifieringar på denna enhet. Använd endast original Bellman & Symfon tillbehör för att undvika elektriska stötar.
- Skydda kablarna från alla potentiella skadekällor.

Information om produktsäkerhet

- Om du inte följer dessa anvisningar kan enheten skadas och garantin upphöra att gälla.
- Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- Enheten får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Om du har andra problem med din enhet ska du kontakta försäljningsstället, ditt lokala Bellman & Symfon-kontor eller tillverkaren. Besök bellman.com för kontaktinformation.
- Om det inträffar en allvarlig incident med den här enheten ska du kontakta tillverkaren och den berörda myndigheten.
- Tappa inte enheten. Om du tappar den på en hård yta kan den skadas.

Driftsförhållanden

Använd enheten i en torr miljö inom de temperatur- och fuktighetsgränser som anges i den här broschyren. Om enheten blir våt eller utsätts för fukt ska den inte längre betraktas som tillförlitlig och bör därför bytas ut.

Rengöring

Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik att få in fukt i öppningar. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel. Denna enhet kräver inte sterilisering.

Service och support

Om enheten verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska ska du följa anvisningarna i användarhandboken och den här broschyren. Om produkten fortfarande inte fungerar som avsett kontakta du din lokala audionom för information om service och garanti.

Garantivillkor

Bellman & Symfon garanterar denna produkt i 90 dagar från inköpsdatum mot eventuella defekter som beror på felaktigt material eller utförande. Denna garanti gäller endast under normala användnings- och serviceförhållanden och omfattar inte skador till följd av olyckshändelse, försummelse, felaktig användning, obehörig demontering eller kontaminering, oavsett orsak. Denna garanti omfattar inte oförutsedda skador eller följskador. Garantin omfattar inte heller naturkatastrofer som brand, översvämning, orkaner och tornados.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på territorium. Vissa länder eller jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av tillfälliga skador eller följskador, eller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti är ett tillägg till dina lagstadgade rättigheter som konsument. Ovanstående garanti får inte ändras annat än skriftligen och undertecknat av båda parter.

Symbolförklaring

	Anger att enheten är en medicinteknisk enhet.
	Anger en bärare som innehåller information om unik identifiering av enheten.
	Anger att produkten inte får kasseras som sorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.
	Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras.
	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska enheten kan identifieras.
	Anger tillverkaren av den medicintekniska enheten.
	Denna symbol anger att användaren bör läsa bruksanvisningen.
	Denna symbol anger att försiktighet är nödvändig vid användning av enheten eller kontrollenheten i närheten av där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver att operatören är medveten om eller vidtar åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.
	Att identifiera en plats där information kan hittas, särskilt i en nödsituation.
	Anger de temperaturgränser som den medicintekniska enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.
	Anger det luftfuktighetsintervall som den medicintekniska enheten kan exponeras för på ett säkert sätt.

Information om överensstämmelse

Härmed försäkrar Bellman & Symfon att denna produkt i Europa överensstämmer med de väsentliga kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfons webbplats bellman.com.

Tekniska specifikationer

Vikt	25 g
Dimensioner	25 × 62 × 13 mm
Färg	Vit
Kabellängd	0,5 m
Anslutning	3,5 mm mono-kontakt
Användning	Temp: 0 °C till 35 °C Luftfuktighet: 15 % – 90 %, icke-kondenserande
Konfiguration	Denna tillbehörsdel kan användas med följande enheter: ▪ Alla Visit-enheter som har en extern ingång ▪ BE1370-C Väckarklocka Pro
I lådan	BE9023-P02 Magnetbrytare

-  För detaljerad produktinformation, se motsvarande användarmanual.

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warrington,
Petersborough, PE8 6UT, UK

CH REP

Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone: +46 31 68 28 20
E-mail: info@bellman.com
bellman.com

Revision: BE9023_007MAN2.0
Date of issue: 2025-03-11
© 2025 Bellman & Symfon AB.
All rights reserved.

