

请先阅读

本手册将指导您如何使用和维护本 Microset 耳麦。请务必仔细阅读本手册，包括“警告”部分。如果您还有其他疑问，请联系您的经销商。

关于BE9129 Microset™ 耳麦

目标用户群

所有年龄段的人。

目标用户

想要控制调音和聆听音量的用户。

工作原理

该音频产品系列包括多个交流器及声音发射器，专为在苛刻环境下提供声音增强而开发。根据特定放大器或声音发射器的指定功能，可使用不同的麦克风风来拾取直达声或增强环境声。

 该设备无法恢复正常的听力，也无法预防或改善因器质性病变导致的听力障碍或耳聋。

开始使用

使用 Microset 耳麦进行隐蔽监听。将 Mino 放在内袋中或使用皮带夹固定，将耳机塞入耳朵，使用翻领麦克风风拾取声音。



注意:为了获得最佳性能，请将翻领麦克风风安装在距下巴至少 30 厘米的位置。您的声音也会被放大，这是正常现象。

一般警告

本部分包含有关安全、操作和运行条件的重要信息。请妥善保管本手册，以备日后使用。如果您只是安装设备，则必须将本手册交给户主。

危险警告

- 若不遵守这些安全说明，可能会导致火灾、触电或其他伤害，或损坏设备或其他财产。
- 请将本设备放在 3 岁以下儿童接触不到的地方。
- 请勿在靠近任何热源（如火明火、散热器、烤箱或其他发热设备）的地方使用或存放本设备。
- 请勿拆卸设备，否则可能会导致触电。擅自改装或拆卸设备将导致保修失效。
- 本设备仅设计用于室内。请勿将设备暴露在潮湿环境中。
- 在存储和运输过程中，请保护设备免受冲击。
- 保护电缆免受任何潜在损坏源的影响。
- 请勿对本设备进行任何改动或修改。仅使用 Bellman & Symfon 原厂配件，以免发生触电。
- 连接的收听设备具有非常强大的放大器，如果使用不当，音量可能会导致不适，严重时甚至可能损害听力。戴上耳麦前，请务必将音量调低！

产品安全信息

- 若不遵守这些说明，可能会导致设备损坏，并导致保修失效。
- 请勿在禁止使用电子设备的区域使用本设备。
- 本设备只能由授权服务中心进行维修。
- 如果设备出现问题，请联系购买地点、当地的 Bellman & Symfon 办事处或制造商。请访问 **bellman.com** 获取联系信息。
- 请勿摔落设备。摔落在坚硬的表面上可能会损坏设备。

操作条件

请在干燥的环境中操作本设备，温度和湿度应符合本手册的规定。如果设备受潮或暴露在潮湿环境中，则应视为不可靠，并予以更换。

清洁

请使用柔软的无绒布。避免湿气进入开口。请勿使用家用清洁剂、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水或研磨剂。本设备无需消毒。

服务与支持

如果设备出现损坏或无法正常工作，请按照用户指南和本手册中的说明进行操作。如果产品仍然无法正常工作，请联系当地的经销商或办事处，了解服务和保修信息。

保修条件

Bellman & Symfon 保证本产品自购买之日起 90 天内不会出现材料和工艺缺陷。本保修仅适用于正常使用和维护，不包括因意外、疏忽、误用、未经授权的拆卸或污染而造成的损坏，无论其原因如何。本保修不包括意外和间接损失。此外，保修不包括不可抗力的情况，如火灾、洪水、飓风和龙卷风。

本保证书赋予您特定的法律权利，您可能还拥有其他权利，这些权利因地区而异。某些国家或地区不允许限制或排除附带或间接损失，也不允许限制默示保修的期限，因此上述限制可能不适用于您。本保修是对您作为消费者的法定权利的补充。只有经双方签署的书面文件才能更改上述保证。

符号解释

	表示制造商的序列号，以便识别特定设备。
	表示设备制造商。
	该符号表示用户需要查阅使用说明。
	该符号表示在靠近该符号的位置操作设备或控制装置时需要格外小心，或者当前情况需要操作员注意或采取行动，以避免造成不良后果。
	用于标识信息的位置，特别是在紧急情况下。
	表示设备可以安全暴露的温度范围。
	表示设备可以安全暴露的湿度范围。

技术规格

重量	17 克
线长	95 厘米
接头	3.5 毫米立体声插头
颜色	黑色
耳机规格	
灵敏度	113(± 3) dB/mW (@ 1kHz)
频率响应	50 Hz – 20 kHz
最大功率	10 mW
阻抗	32 Ω
麦克风规格	
类型	驻极体电容式麦克风
指向性	全向
灵敏度	-47 (±3) dB
频率响应	110 Hz 至 16 kHz
信噪比	>58 dB
偏置电压	最大 10 VDC
配置	该耳机可与以下个人交流器搭配使用：BE2030 Mino 个人交流器
操作	
温度：0 – 35 °C	
湿度：15% – 90%，无冷凝	
包装盒内	BE9129 Microset 耳麦

 如需了解详细的产品信息，请参阅相应的用户手册。