


# Wekker Classic



## Knoppen en bedieningselementen

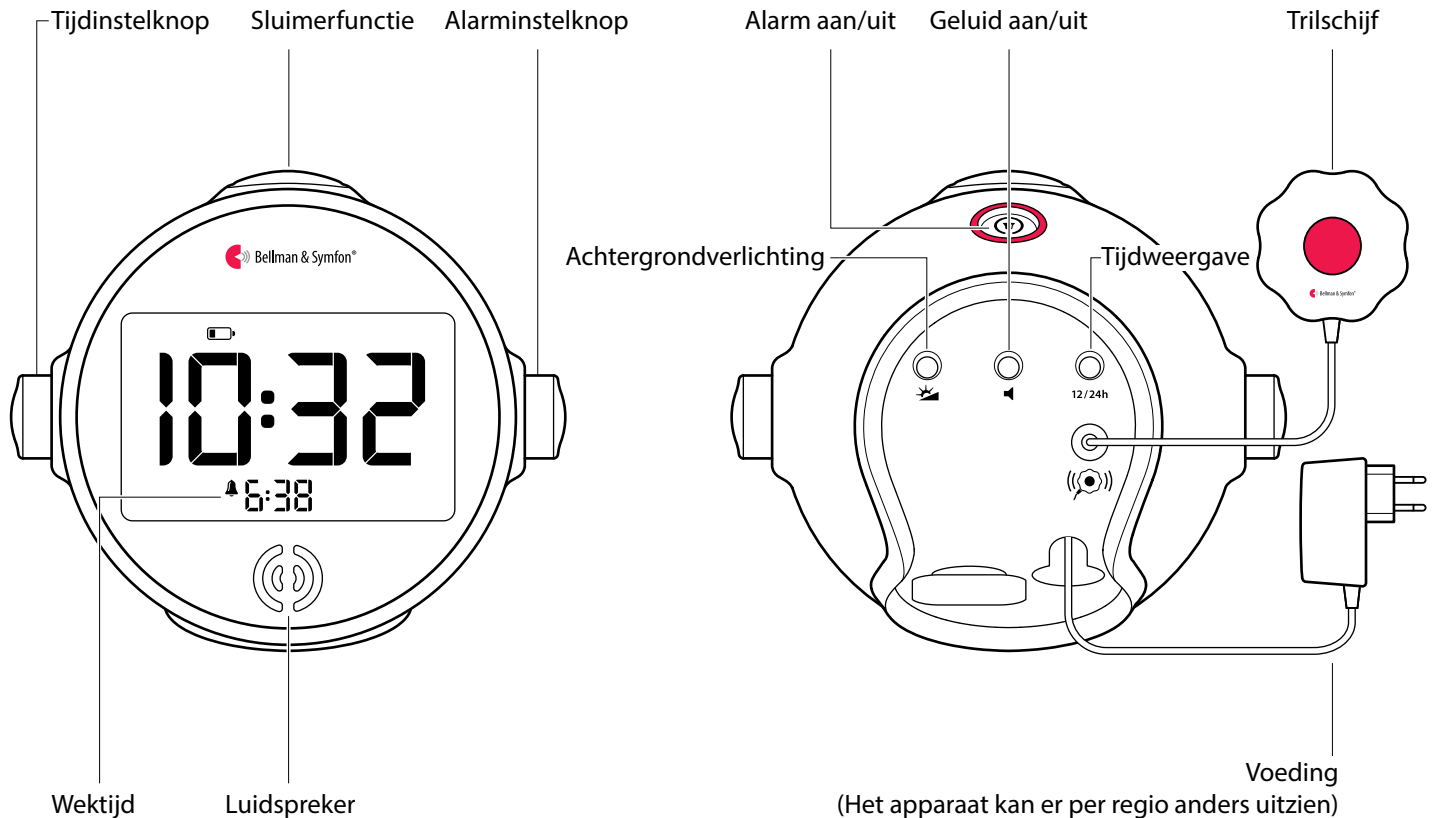

## Technische specificaties

### In de doos

- BE1350 Wekker Classic
- BE1272 Trilschijf met geluid
- Voeding
- Gebruikershandleiding

### Voeding en batterij

- Netvoeding  
7,5 V DC / 1000 mA  
Unit voor externe voeding
- Backupbatterijen  
4 × 1,2 V AAA oplaadbare NiMH-batterijen (niet meegeleverd)
- Gebruiksduur backupbatterijen  
~ 24 uur wanneer volledig opgeladen
- Oplaadtijd backupbatterijen  
~ 10 uur wanneer volledig leeg

### Afmetingen en gewicht

- Hoogte: 108 mm
- Breedte: 121 mm
- Diepte: 92 mm
- Gewicht: 300 g exclusief batterijen

### Alarm- en sluimerfunctie

- Uitschakeling alarm: 20 minuten
- Afnemend interval sluimertijd 9-2 min
- Uitschakeling sluimerfunctie: 20 min

### Beeldscherm

- Type: Twisted Nematic LCD
- Instelbare achtergrondverlichting in 5 stappen
- Uitschakeling beeldscherm: 8 seconden

### Uitvoersignalen

- Geluid  
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm  
Meerdere frequenties: 950 Hz - 3 kHz
- Trilschijf  
Trilvermogen: 2,0 - 4,0 V DC

### Omgevingsvereisten

- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Temperatuur: 0°-35° C
- Relatieve vochtigheid: 15% -90%  
Niet condenserend


### Accessoires

- BE1270 Trilschijf

# Wekker Classic

## Aan de slag gaan


- 1 Sluit de trilschijf aan op de achterzijde van de wekker.
- 2 Sluit de voeding aan op de wekker en het stopcontact om de trilschijf aan te zetten.
- 3 Schuif de trilschijf onder het kussen of matras en plaats de wekker op het nachtkastje.

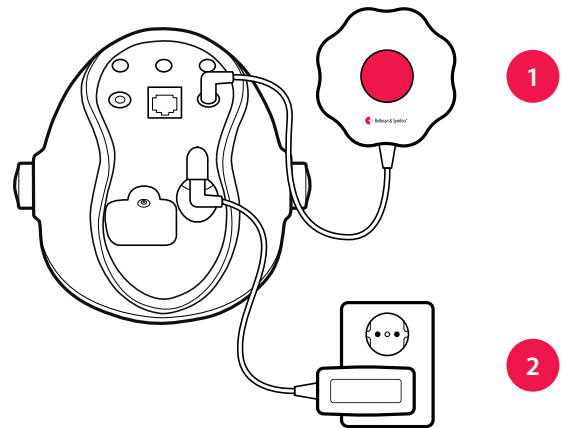

Het apparaat kan er per regio anders uitzien


## De tijd instellen

Druk op de **linker** instelknop en draai deze om de uren in te stellen. Om de minuten in te stellen, drukt u nogmaals op deze instelknop en draait u deze. Druk nogmaals op de knop om uw instellingen op te slaan.

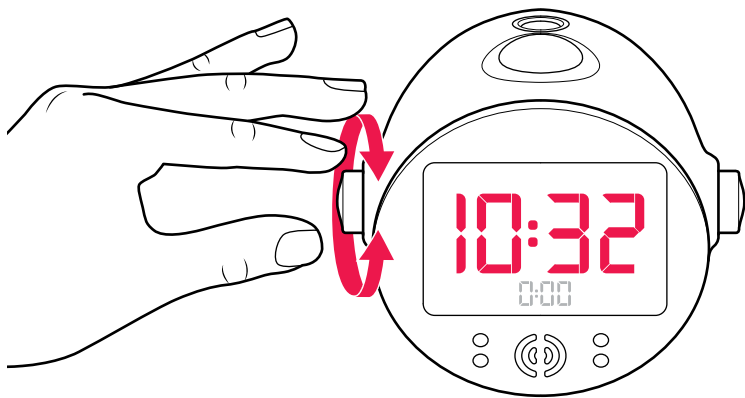


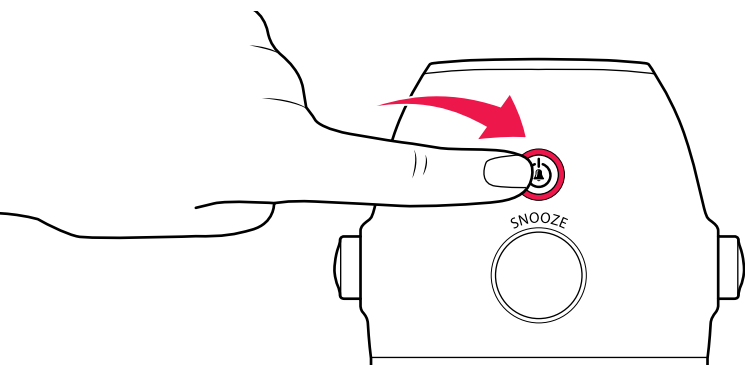
## Het alarm instellen

Druk op de **rechter** instelknop en draai deze om de uren in te stellen. Om de minuten in te stellen, drukt u nogmaals op deze instelknop en draait u deze. Druk nogmaals op de knop om uw instellingen op te slaan.

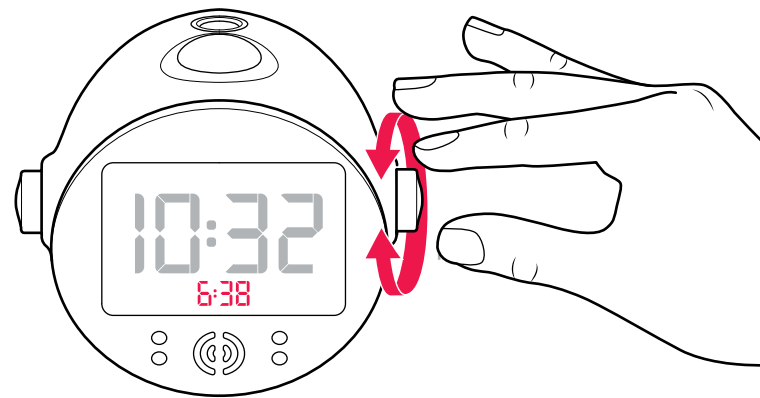


## Het alarm activeren

Druk op de knop alarm aan/uit om het alarm te activeren. Het alarmsymbool  verschijnt op de wijzerplaat. Druk nogmaals op deze knop om het alarm uit te schakelen.



## Gebruik van de sluimerfunctie

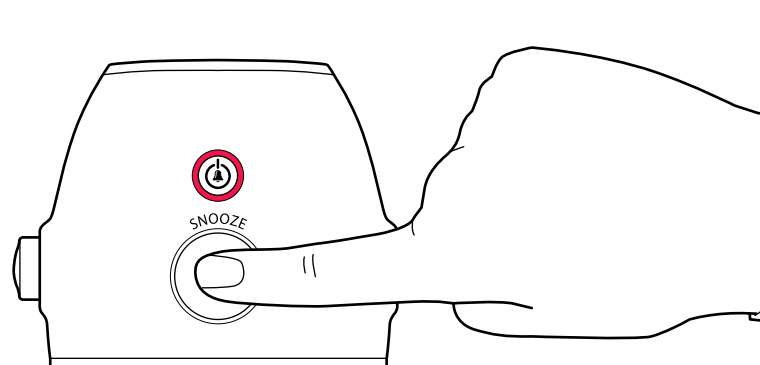

Druk kort op de sluimerknop om het alarm uit te stellen. De intervallen voor de sluimertijd nemen automatisch af van 9 naar 2 minuten in stappen van 2 minuten.




# Wekker Classic

## Instellingen

### Geluid aan/uit

Druk op de knop voor het aan/uit zetten van geluid die is gemarkeerd met  achterop de wekker om het geluid aan/uit te zetten. Er verschijnt een  symbool op de wijzerplaat wanneer het geluid wordt gedempt.

### Achtergrondverlichting van het beeldscherm

Druk herhaaldelijk op de knop gemarkeerd met  om de intensiteit in 4 stappen aan te passen. **Stap 5 resulteert in permanente achtergrondverlichting.**

### Tijdweergave


Druk op de tijdweergaveknop gemarkeerd met **12/24h** achterop de wekker om te schakelen tussen de 24 uurs- en de 12 uursinstelling.

## Gebruik van backupbatterijen

De wekker is voorzien van een backupfunctie met batterijen die wordt geactiveerd wanneer de stroom uitvalt. Hierdoor blijven de wekker en de trilschijf nog ongeveer 24 uur functioneren (wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen).

### U installeert de backupbatterijen als volgt:



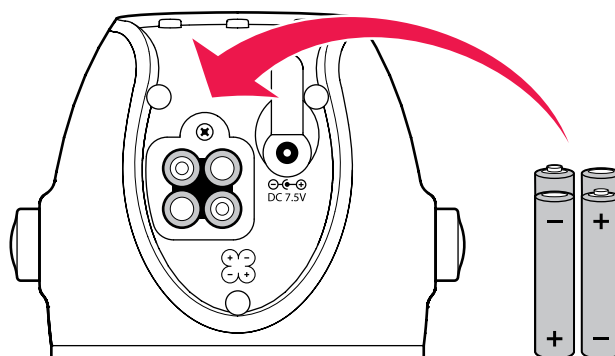


- 1 Verwijder het deksel van het batterijvakje onderop de wekker met behulp van een kruiskopschroevendraaier.
- 2 Plaats 4 x 1,2 V AAA oplaadbare NiMH-batterijen en plaats het deksel weer terug.



**Waarschuwing! GEBRUIK UITSLUITEND OPLAADBARE NiMH-BATTERIJEN.** Niet-oplaadbare batterijen gaan lekken en het batterijzuur zal de elektronica beschadigen. De resulterende schade valt niet onder de garantie.

## Problemen oplossen

De meeste problemen met de wekker kunnen snel worden opgelost door het onderstaande advies op te volgen.

Als	Probeer dit
De wekker lijkt te zijn uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Controleer of de voeding correct is aangesloten, zie <b>Aan de slag gaan</b>.</li><li>▪ Laad de backupbatterijen (niet inbegrepen) enkele uren op.</li></ul>
Het  symbool op de wijzerplaat gaat knipperen	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ De voeding is losgekoppeld en de backupbatterijen zijn bijna leeg. Sluit de voeding aan en laad de backupbatterijen enkele uren op.</li></ul>
Er verschijnt een  symbool op de wijzerplaat	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ De wekker detecteert geen backupbatterijen. Open het batterijdeksel en plaats vier 1,2 V AAA oplaadbare NiMH-batterijen.</li></ul>
Er verschijnt een  symbool op de wijzerplaat	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Het geluid wordt gedempt. Druk op de knop flitslicht en geluid aan/uit, gemarkeerd met  tot het symbool verdwijnt als u het weer aan wilt zetten.</li></ul>
Het beeldscherm is te helder of te donker of ik wil dat het permanent verlicht is	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Druk herhaaldelijk op de knop gemarkeerd met  om de intensiteit in 4 stappen aan te passen.</li><li>▪ Kies stap 5 die resulteert in permanente achtergrondverlichting.</li></ul>
De trilschijf trilt niet	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Controleer of de trilschijf correct is aangesloten op de wekker, zie <b>Aan de slag gaan</b>.</li></ul>
Het alarmvolume is te zacht	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Het volume neemt geleidelijk toe en gaat over de 100 dB.</li></ul>