

振动闹钟, 高级版

BE1370



 Bellman & Symfon®



特征

- 1 超大声音 100 分贝闹钟
递增的多音调信号
- 2 4 倍高强度闪光灯
即使在白天也有效
- 3 强大的振动器
用振动的方式唤醒您
- 4 夜灯
指引您回到床上
- 5 备用电池
可保证所有功能正常运行
- 6 智能贪睡功能
闹钟提醒间隔每次递减 2 分钟
- 7 监测电话
放大电话信号

* 100 dBA @ 10 cm, 4", 94 dBA @ 30 cm, 12"

醒来, 从此变得更容易

有了 Bellman & Symfon 的振动闹钟, 你再也不担心睡过头了。它通过特别响亮的铃声和在枕头下的振动器来叫醒你。即使你起床困难或有听力问题, 也能完美解决。

振动闹钟有很多独特的功能, 像夜光灯, 蓝色温和的灯在你起夜的时候指引你回到床上, 智能打盹功能, 将打盹间隔时间从 9 分钟缩减到 2 分钟。闹钟的声音涵盖了不同的频率,

即使您有听力损失, 例如: 高频听力损失, 您也不用担心听不见。

振动闹钟是非常容易上手的, 它有一个可调节背光的大液晶显示屏和两个单独的按压旋钮, 用于设置时间和闹钟。

此外, 您可以将闹钟连接到手机上以放大铃声信号。



技术规格

尺寸和重量

- 宽度: 121 mm
- 高度: 108 mm
- 厚度: 92 mm
- 重量: 390 g, 包括电池



连接

- 外部触发输入 3.5mm 立体接口
- 电话模块 RJ-11 接口模拟网络: 26-120 V RMS, 15-100 Hz

输出信号

- 声音
100 dBA @ 10 cm, 4", 94 dBA @ 30 cm, 12"
内置多频信号, 主频: 950 Hz - 3000 Hz
- 闪光
4 个高强度闪烁 LED 灯
警告! 闪烁可能会引起癫痫
- 振动器
振动器电源: 2.0 - 4.0 V DC

显示

- 类型: 扭曲向列型 (TN) 液晶显示器
背光强度可分 5 步调节
- 背光由贪睡按钮激活
- 背光颜色: 白色
- 显示超时: 8 秒

闹钟和暂停

- 闹钟超时: 20 分钟
- 暂停时间间隔从 9 分钟递减到 2 分钟
- 闹钟超时: 20 分钟

夜光灯

- 内置夜灯指示灯, 用温和的蓝光引导您回到床上
- 类型: 电致发光 (EL) 灯
- 用打盹按钮打开/关闭
- 超时: 主电源供电 1 小时, 电池供电 15 分钟

操作

- 独立的按键旋转表盘, 可轻松设置时间和闹钟
- 时间切换专用按钮, 可切换成 12 小时或 24 小时
- 背光强度切换专用按钮, 共设有五个等级
- 打开/关闭报警声音的专用按钮
- 监测和显示备用电池状态的电池监控
- 备用电池为声音、振动器、闪光灯和夜光灯供电

包装内容

- BE1370 闹钟
- BE1270 振动器
- 电源适配器, 7.5 VDC / 1.5 A
- 4 节可充电的 AAA 镍氢电池
- 说明书

配件

以下配件可以适用:

- BE9105 电话线
- 对应国家的电话适配器插头

按钮和控制



环境需求

- 操作温度: 0° ~ 35° C
- 相对湿度: 15% ~ 90% (无冷凝)

© 2023 and ™ Bellman & Symfon AB. 保留所有权利。

Bellman 和 Bellman & Symfon 是 Bellman & Symfon AB 所有的注册商标, 保留所有权利。

本小册子如有更改, 恕不另行通知。

BE1370_018DAS1.0_SICN

bellman.com