

Technische-Dokumentation

Visit Lichtsignalanlage



Alles, was Sie über Visit wissen müssen.

Sender

| | | |
|--------|------------------------|----|
| BE1411 | Tür-Sender | 5 |
| BE1420 | Druckknopf-Sender | 13 |
| BE1431 | Telefon-Sender | 17 |
| BE1433 | Telefon-Transceiver BT | 23 |
| BE1491 | Babyruf-Sender | 29 |
| BE1480 | Rauchmelde-Sender | 33 |
| BE1481 | Rauchmelde-Sender | 37 |

Empfänger

| | | |
|-----------------|---------------------|----|
| BE1441 BE1442 | Tischblitzlampe | 43 |
| BE1450 | Tragbarer Empfänger | 47 |
| BE1470 | Pager | 51 |
| BE8102 | Armband-Empfänger | 55 |
| BE1580 | Wecker Visit | 59 |

Zubehör

| | | |
|--------|-----------------------------------|----|
| BE1260 | Pager-Ladegerät | 63 |
| BE1270 | Vibrationskissen | 65 |
| BE9075 | Wandhalterung für Tischblitzlampe | 66 |
| BE9023 | Magnetschalter | 67 |
| BE9026 | Alarmtrittmatte | 67 |
| BE9199 | Externes Mikrofon | 68 |
| BE9253 | Kabel für externen Trigger | 68 |



Systemübersicht

Zuverlässig und flexibel

Das Visit-System ist äußerst flexibel und kann ganz einfach konfiguriert werden, um es individuell an das Zuhause und den Lebensstil des Kunden anzupassen.

Es bietet Türklingel- und Telefonerkennung sowie Raum- und Babyruf-überwachung und Brandschutz gemäß den höchsten Standards.



1 Tür-Sender
Überwacht die Türklingel




2 Rauchmelde-Sender
Erkennt Rauch und Feuer



3 Babyruf-Sender
Überwacht Ihr Kind



4 Telefon-Transceiver BT
Überwacht Telefone und Tablets

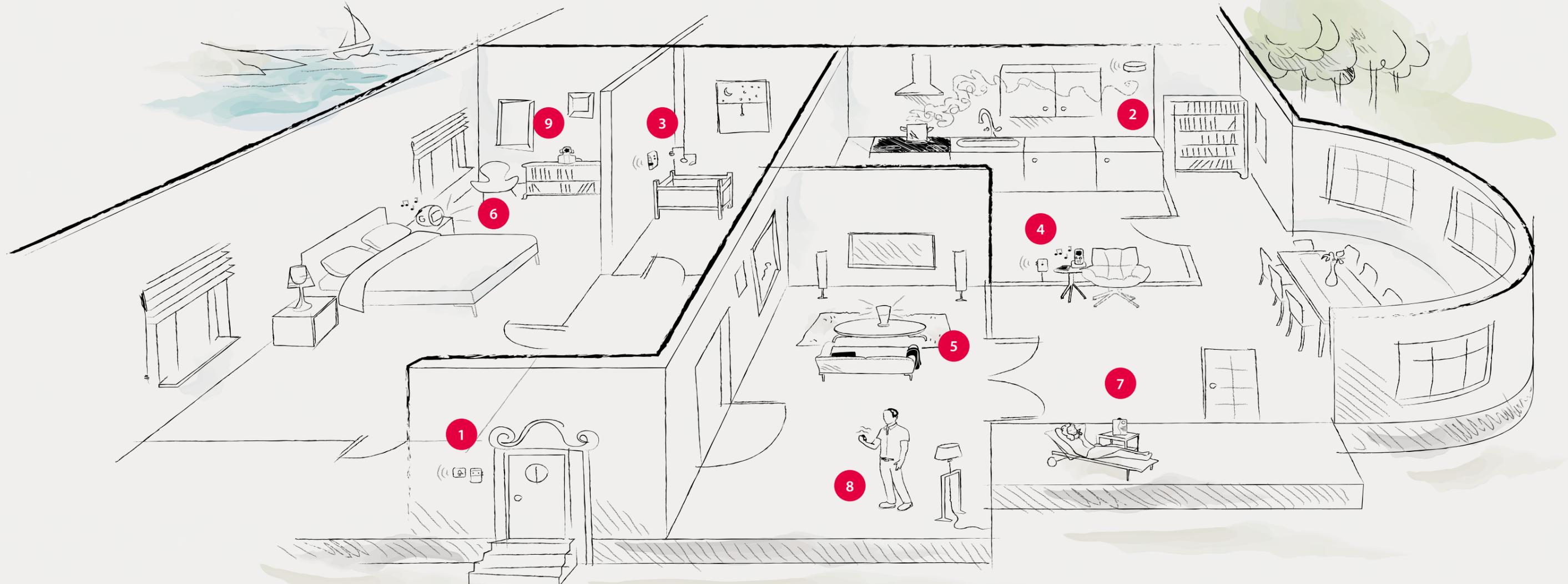

5 Tischblitzlampe
Benachrichtigt Sie mit hellen Lichtsignalen



6 Wecker Visit
Verwendet Ton-, Licht- und Vibrationssignale



7 Tragbarer Empfänger
Benachrichtigt Sie mit Licht- und Tonsignalen



8 Pager
Benachrichtigt Sie mit Vibrationssignalen



9 Armband-Empfänger
Benachrichtigt mit dezenter Vibration


Visit Tür-Sender



BE1411

HMV 13.99.04.0027

Tasten und Anschlüsse

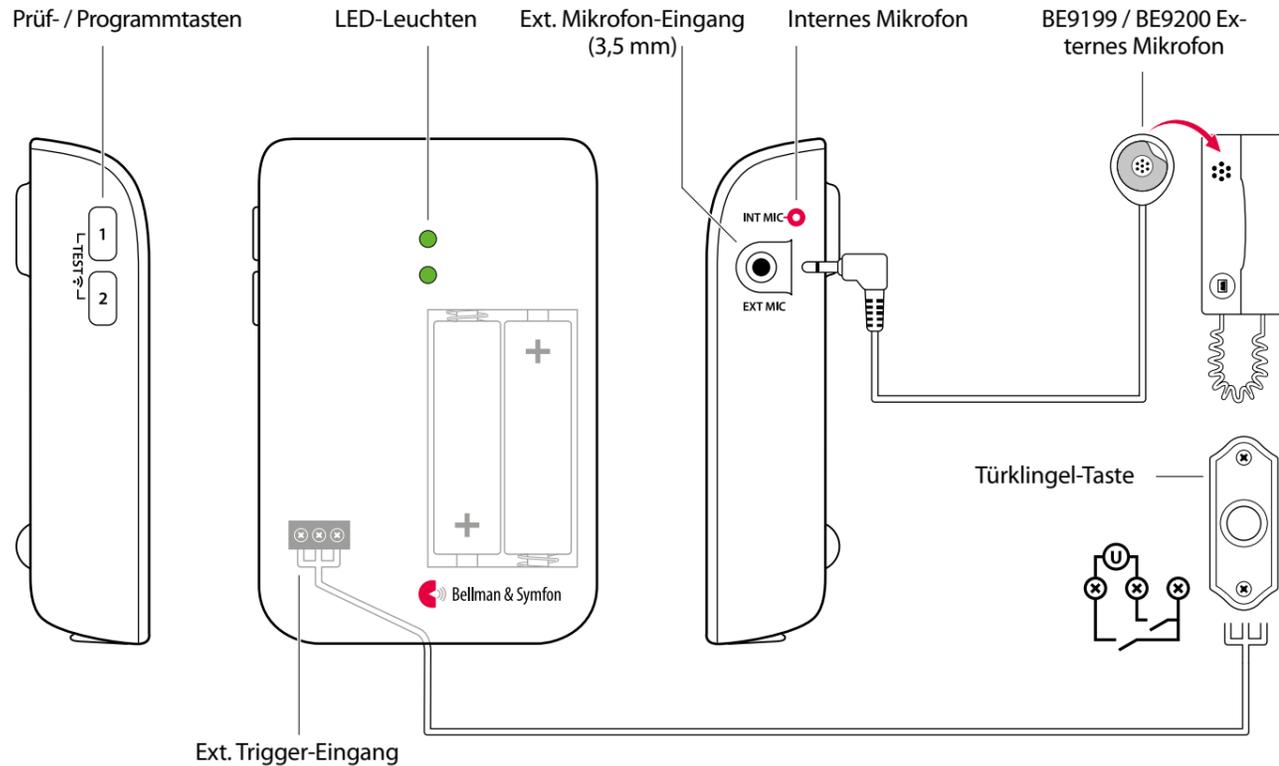

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- Visit Tür-Sender BE1411
- 2 × Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Klettverschluss für Wandbefestigung
- Schraube und Wanddübel

Strom und Batterie

- Batteriestrom:
2 × Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Stromverbrauch
Aktiv < 70 mA
Ruhezustand < 15 µA
- Betriebsdauer
Alkaline Batterien ca. 5 Jahre
Lithium-Batterien ca. 10 Jahre

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 100 mm
- Breite: 65 mm
- Tiefe: 27 mm
- Gewicht: 120 g, inkl. Batterien

Aktivierung

- Prüftasten und intern. Mik.
- Elektromagnetischer Detektor
- Externes Mikrofon
- Vorhandene, an externen Trigger-Eingang angeschlossene Türklingel

Eingänge

- Externer Mikrofon-Eingang (3,5 mm)
- Eingang für externen Trigger

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur:
0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit:
15% bis 90% (nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite

- Frequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: 50 - 250 m abhängig von den Eigenschaften des Gebäudes und der Kombination von Sendern und Empfängern.


Zubehör

- Folgendes Zubehör ist erhältlich:
- Externes Mikrofon BE9199 (2,5 mm)

Inbetriebnahme – automatische Türklingelerkennung

Standard Verwendung des internen Mikrofons

- 1 Ziehen Sie die Batterielasche heraus, um den Sender zu starten. Reinigen Sie die Wand mit dem Feuchttuch und entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klettverschluss.
- 2 Platzieren Sie den Türsender mit dem internen Mikrofon (roter Kreis) so nah wie möglich am Lautsprecher Ihrer bestehenden Klingelanlage.
- 3 Klingeln Sie und Ihre Visit Empfänger signalisieren. Inbetriebnahme abgeschlossen.

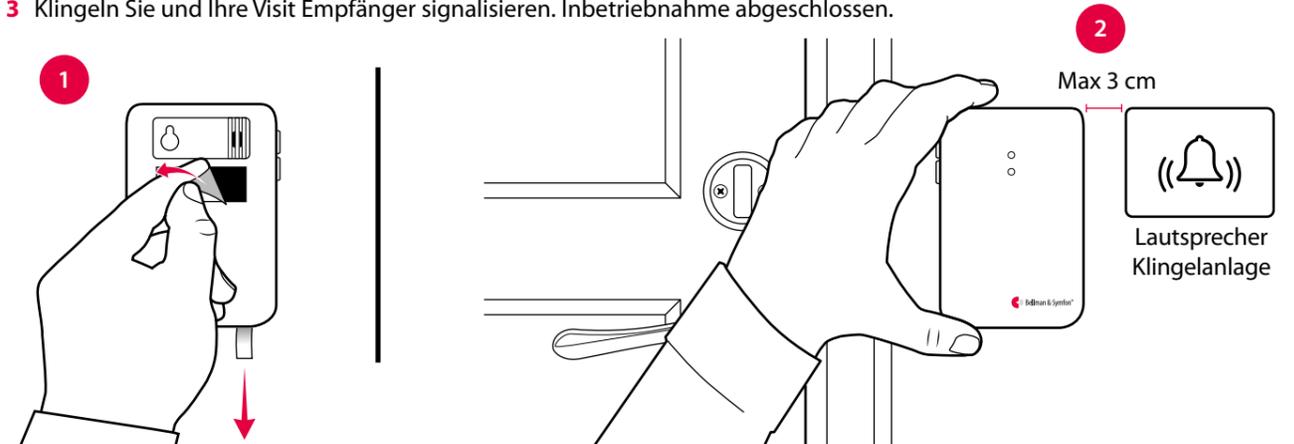

Erweiterte Inbetriebnahme mit externem Mikrofon


(Beachten Sie hier zusätzlich den Punkt - Anlernen von Türklingeltönen.)

Verwendung des externen Mikrofons bei baulichen Einschränkungen

- 1 Schließen Sie das separat erhältliche externe Mikrofon an den Tür-Sender, entfernen Sie den Schutzstreifen und kleben es auf den Lautsprecher der Klingelanlage oder einer zusätzlichen zweiten Schallquelle (z.B. Gegensprechanlage), siehe Seite 9.
- 2 Ziehen Sie den Batteriestreifen des Tür-Senders. Entfernen Sie den Schutzstreifen des Klettbands und bringen den Sender an der Wand an.

Optionale Deaktivierung des internen Mikrofons

- 3 Drücken Sie innerhalb der ersten zwei Minuten nach Start zehnmal hintereinander Taste 2, um das interne Mikrofon auszuschalten. Die LEDs blinken zur Bestätigung dreimal rot auf. **Hinweis:** Wenn Sie zwei Minuten überschreiten, muss der Sender durch Entnehmen und Einsetzen der Batterien neu gestartet werden.

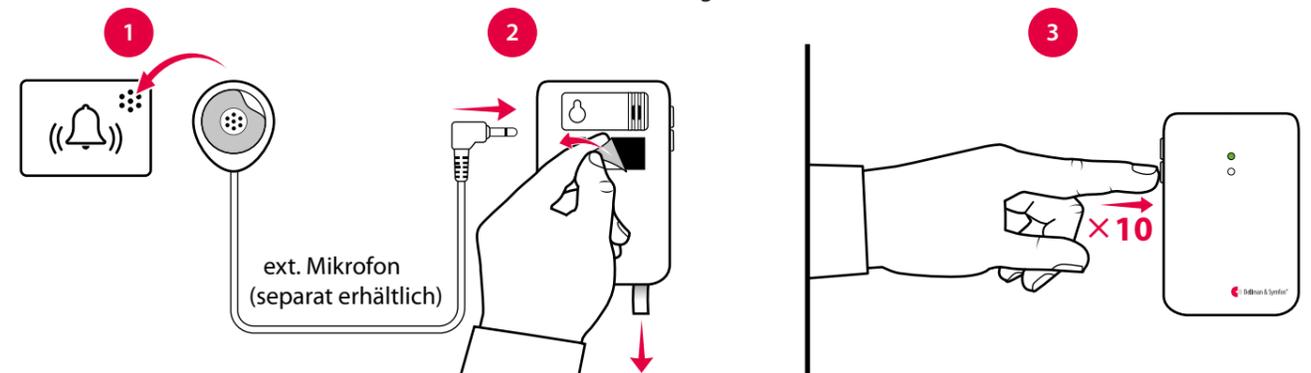

Internes Mikrofon wieder aktivieren

Starten Sie den Tür-Sender neu durch Entnehmen und Wiedereinsetzen der Batterien. Drücken Sie 10-Mal innerhalb der ersten 2 Minuten Taste 2. Die LEDs blinken grün zur Bestätigung.

Visit Tür-Sender

i Nutzen Sie immer erst die automatische Türklingelerkennung. Sollte Ihr Signal nicht verarbeitet werden, dann nutzen Sie die Anlernfunktion.



BE1411


HMV 13.99.04.0027

Anlernen von Türklingeltönen

Im nächsten Schritt lernt der Sender, Ihre Türklingel (bis zu 2 Töne) zu erkennen.

- 1 Drücken Sie Taste 1, bis die obere LED zu blinken beginnt. Lassen Sie die Taste los, um die Aufnahme zu starten. Die LED blinkt weiter (5-Minuten Aufnahmemodus).
- 2 **Für Türsummer:** Halten Sie die Türklingel mindestens acht Sekunden gedrückt. **Für Türgongs:** Betätigen Sie die Türklingel mindestens acht Mal.
- 3 Drücken Sie kurz die Taste 1 auf dem Sender, um die Aufnahme zu stoppen. Wenn die LED rot aufleuchtet, müssen Sie die Schritte 1 und 2 wiederholen. Zum Anlernen eines zweiten Tonsignals oder bei Verwendung eines externen Mikrofons befolgen Sie die Schritte 1 und 2 auf der Taste 2.

Hinweis: Zum Löschen aller aufgenommenen Töne, drücken und halten Sie Taste 1 und Taste 2 gleichzeitig für fünf Sekunden bis die LEDs dreimal orange aufblinken. Die Frequenzband- und Signaleinstellungen bleiben davon unberührt.

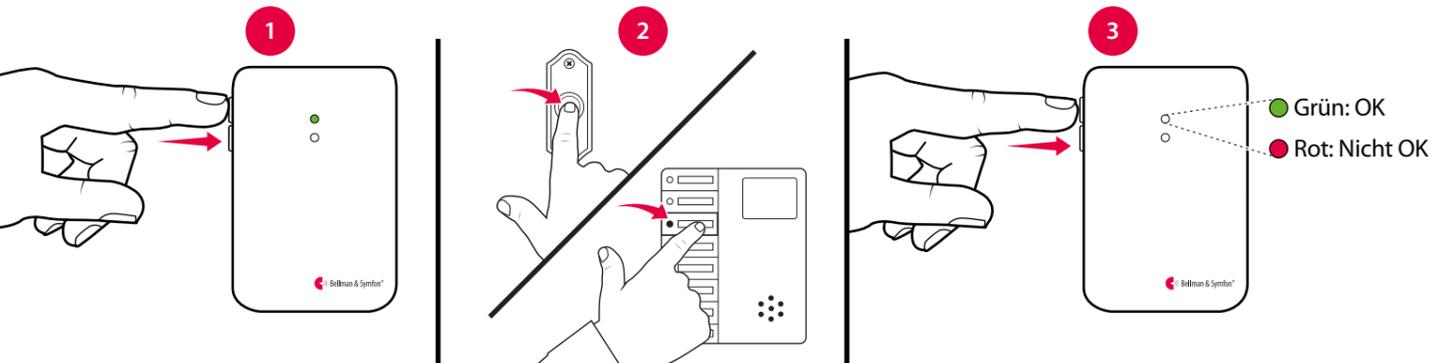

Prüfen der Verbindung

Mit der Prüftaste


- 1 Drücken Sie am Tür-Sender gleichzeitig beide Prüftasten kurz. Die obere LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass ein Funksignal übertragen wird.
- 2 Die grüne Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 10.

Verwendung der Türklingel oder der Gegensprechanlage

- 1 Drücken Sie die Taste der Türklingel oder Gegensprechanlage. Die LED des Senders leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass das Tonsignal erkannt wird.
- 2 Die grüne Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Funksignal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.



Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 10.

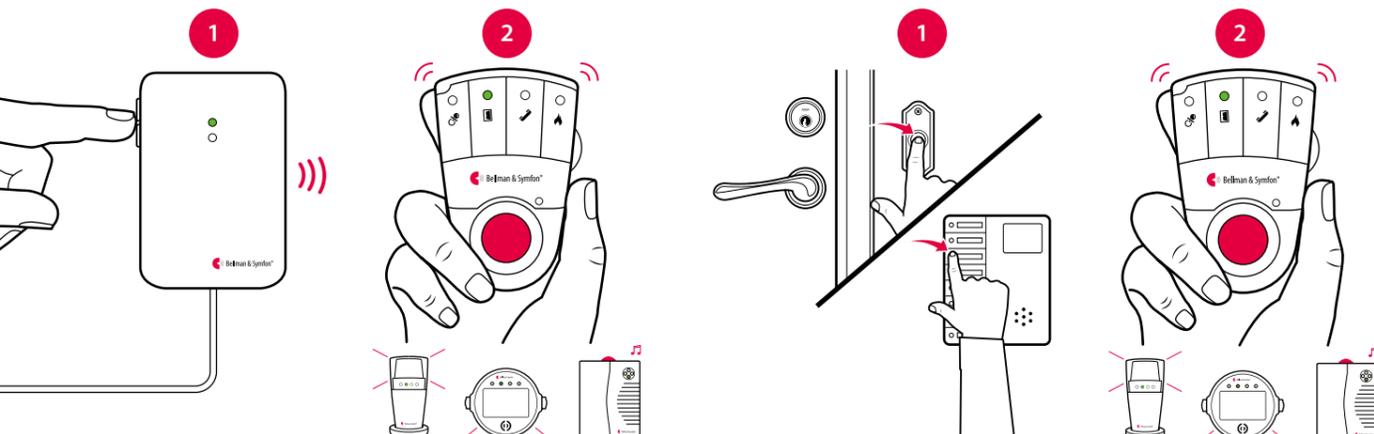

Galvanischer Anschluss

Optional, sofern Anschlussmöglichkeit an Türklingel/Gegensprechanlage gegeben.

- 1 Ziehen Sie den Batteriestreifen, um den Sender zu starten. Drücken Sie innerhalb der ersten 2 Minuten nach Start 10-Mal hintereinander Taste 2, um das interne Mikrofon auszuschalten.
- 2 Entfernen Sie den Batteriedeckel, um Zugang zur Schraubklemme zu bekommen. Drei Anschlusspunkte sind vorhanden.
 - Für den Anschluss eines **aktiven** Schalters, wie z.B. ein Strom führendes Relais, verwenden Sie die Anschlusspunkte 1 und 2.
 - **Hinweis:** Der Strom muss 2 bis 30 VDC betragen und polaritätsunabhängig sein oder 2 bis 24 VAC bei 5 bis 150 Hz betragen.
 - Für den Anschluss eines **passiven** mechanischen Schalters, wie z.B. einer Türklingeltaste, verwenden Sie die Anschlusspunkte 2 und 3.
- 3 Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an und entfernen den Schutzstreifen vom Klettsystem zur Anbringung an der Wand.

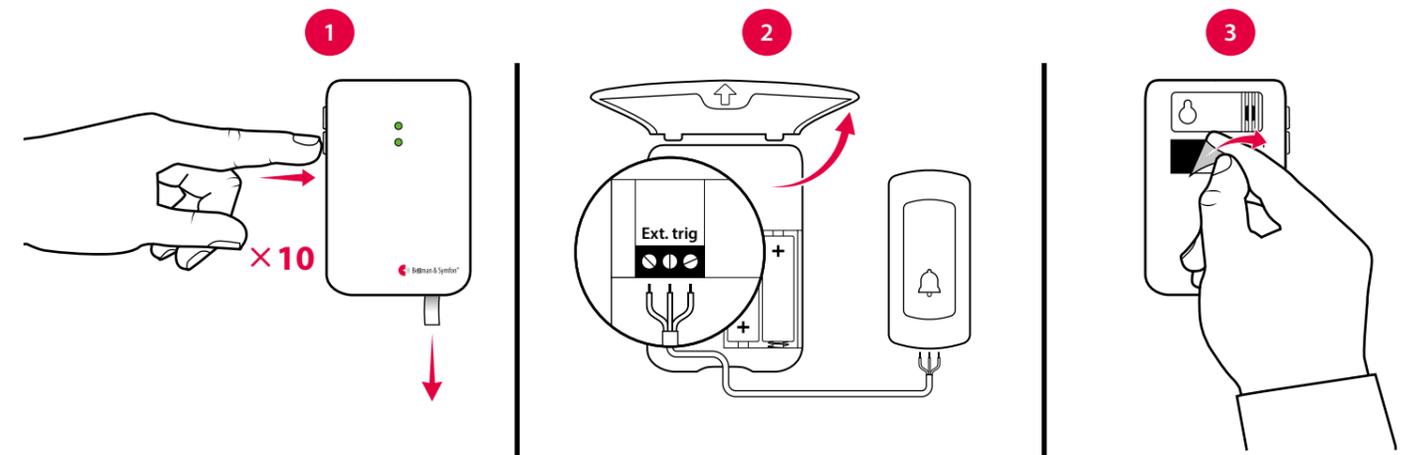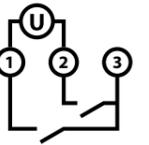

Verwendung der elektromagnetischen Erkennung

Der Tür-Sender kann elektromagnetische Felder erkennen, die von elektromechanischen Türklingeln abgegeben werden.

- **Aktivierung:** Schieben Sie Schalter 4 der Signal-DIPs nach oben.
- **Deaktivierung:** Schieben Sie Schalter 4 der Signal-DIPs nach unten.
- Weitere Informationen auf Seite 10.



Visit Tür-Sender




BE1411

HMV 13.99.04.0027


Inbetriebnahme - Gegensprechanlage und zusätzliche Türklingel

- Schließen Sie das externe Mikrofon an den Türsender an.
Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Mikrofon und befestigen Sie es an dem Lautsprecher der Gegensprechanlage.
- Ziehen Sie die Batterielasche heraus, um den Sender zu starten.
Reinigen Sie die Wand mit dem Feuchttuch und entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klettverschluss.
- Montieren Sie den Türsender so nah wie möglich auf der linken Seite des Türklingellautsprechers.

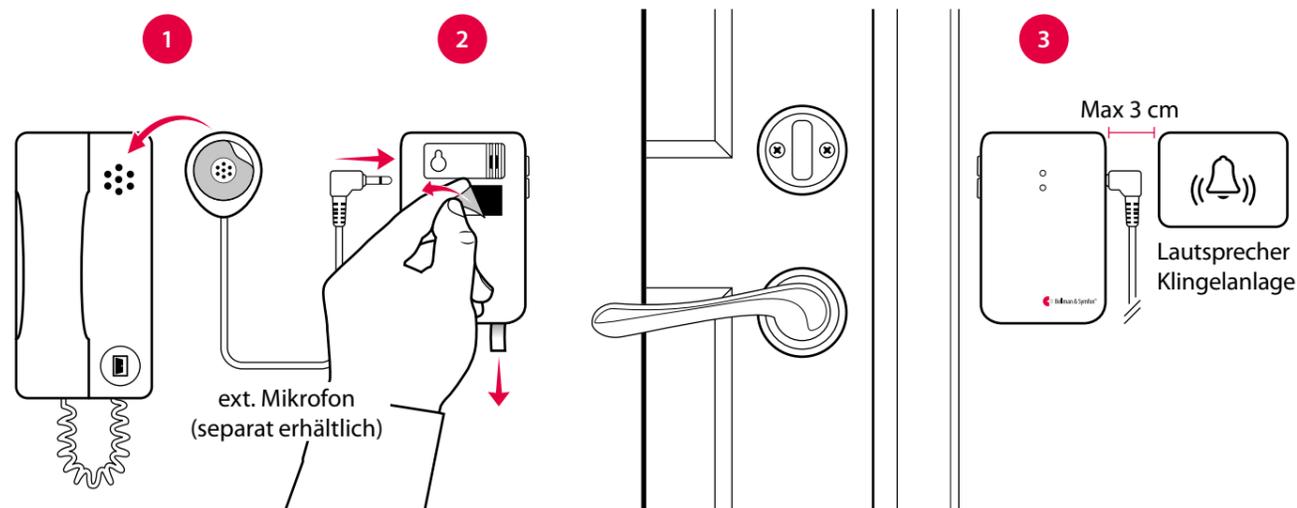

Wenn Sie eine Gegensprechanlage und eine mechanische Türklingel nutzen, müssen Sie möglicherweise zwei Türsender verwenden – d.h. einen für jede Klangquelle. Gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie die Batterielasche heraus, um den jeweiligen Tür-Sender zu starten. Reinigen Sie die Wandfläche mit dem Feuchttuch und entfernen Sie die Schutzfolie vom Klettband.
- Montieren Sie einen Tür-Sender auf der linken Seite der Türklingel und den anderen auf der linken Seite des Lautsprechers der Gegensprechanlage, jeweils möglichst nahe an der Schallquelle.

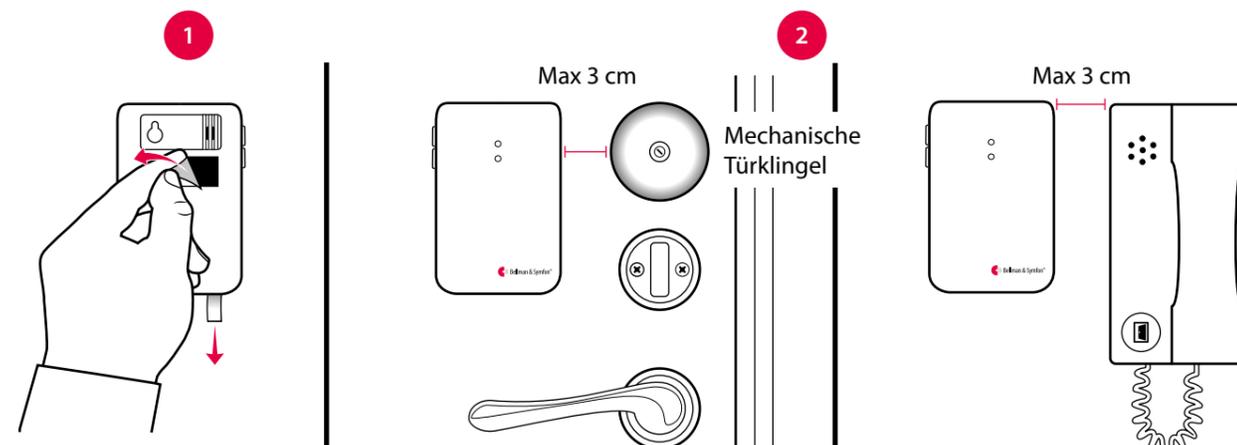

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn der Tür-Sender aktiviert wird, passiert Folgendes:

- Die LED des Senders leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass er an den Empfänger sendet.
- Die Visit-LED am Empfänger leuchtet grün auf und der Empfänger beginnt, in einer bestimmten Geschwindigkeit Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale auszusenden. Dies wird Signalmuster genannt. Das Signalmuster wird vom angeschlossenen Zubehör und dem Sender bestimmt. Standardmäßig ist es dieses Muster:

| Sender | Empfänger-Signalmuster | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------|-----------|------------|
| Quelle | LED | Ton | Vibration | Blitzlicht |
| Internes Mikrofon | Grün, oben | 1 × Türgong, tief | Langsam | ■□□□ Ja |
| Externes Mikrofon | Grün, unten | 2 × Türgong, hoch | Langsam | ■□□□ Ja |
| Angeschlossene Türklingel | Grün, oben | 3 × grünes Blinken | Langsam | ■□□□ Ja |

Signalmuster ändern

Das Signalmuster wird vom Sender vorgegeben. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Senders und stellen Sie für die Änderung des Signalmusters die Signalschalter gemäß den Angaben in der nachstehenden Tabelle um.



| Sender | Empfänger-Signalmuster | | | | |
|----------|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| Schalter | Quelle | LED | Ton | Vibration | Blitzlicht |
| 1 2 3 4 | Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel | Grünes Leuchten Grünes Blinken 3 × grünes Blinken | 1 × Türgong, tief 2 × Türgong, hoch 1 × Türgong, hoch | Langsam Langsam Langsam | ■□□□ Ja ■□□□ Ja ■□□□ Ja |
| 1 2 3 4 | Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel | 2 × grünes Blinken 3 × grünes Blinken Grünes Blinken | 2 × Türgong, tief 1 × Türgong, hoch 2 × Türgong, hoch | Langsam Langsam Langsam | ■□□□ Ja ■□□□ Ja ■□□□ Ja |
| 1 2 3 4 | Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel | 3 × grünes Blinken 2 × grünes Blinken 3 × orange Blinken | 1 × Türgong, hoch 2 × Türgong, tief Babymelodie | Langsam Langsam Schnell | ■□□□ Ja ■□□□ Ja ■■■■■■ Ja |
| 1 2 3 4 | Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel | Grünes Blinken Grünes Leuchten Oranges Blinken | 2 × Türgong, hoch 1 × Türgong, tief Babymelodie | Langsam Langsam Schnell | ■□□□ Ja ■□□□ Ja ■■■■■■ Ja |
| 1 2 3 4 | Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel | Grünes Leuchten 3 × grünes Blinken 2 × grünes Blinken | 1 × Türgong, tief 1 × Türgong, hoch 2 × Türgong, tief | Langsam Langsam Langsam | ■□□□ Ja ■□□□ Ja ■□□□ Ja |
| 1 2 3 4 | Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel | Grünes Leuchten Grünes Blinken Gelbes Blinken | 1 × Türgong, tief 2 × Türgong, hoch 2 × Klingelsignal, hoch | Langsam Langsam Mittel | ■□□□ Ja ■□□□ Ja ■□■□ Ja |
| 1 2 3 4 | Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel | 3 × grünes Blinken Grünes Leuchten Rotes + orange | 1 × Türgong, hoch 1 × Türgong, tief Alarm Signal | Langsam Langsam Lang | ■□□□ Ja ■□□□ Ja ■■■□ Ja |
| 1 2 3 4 | Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel | Grünes Blinken 2 × grünes Blinken Rotes Blinken | 2 × Türgong, hoch 2 × Türgong, tief Feueralarmsignal | Langsam Langsam Lang | ■□□□ Ja ■□□□ Ja ■■■□ Ja |



Visit Tür-Sender

Frequenzband ändern


Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich unter der Sender-Abdeckung.

So ändern Sie das Frequenzband:

- 1 Öffnen Sie die vordere Sender-Abdeckung und stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (Ein), um das Frequenzband zu ändern. Standardmäßig befinden sich alle Funkfrequenzschalter in der unteren Position (Aus).
- 2 Halten Sie die Prüf-/Funktionstaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender gleichzeitig beide Prüftasten, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.



Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dieselbe Frequenzband eingestellt sein.

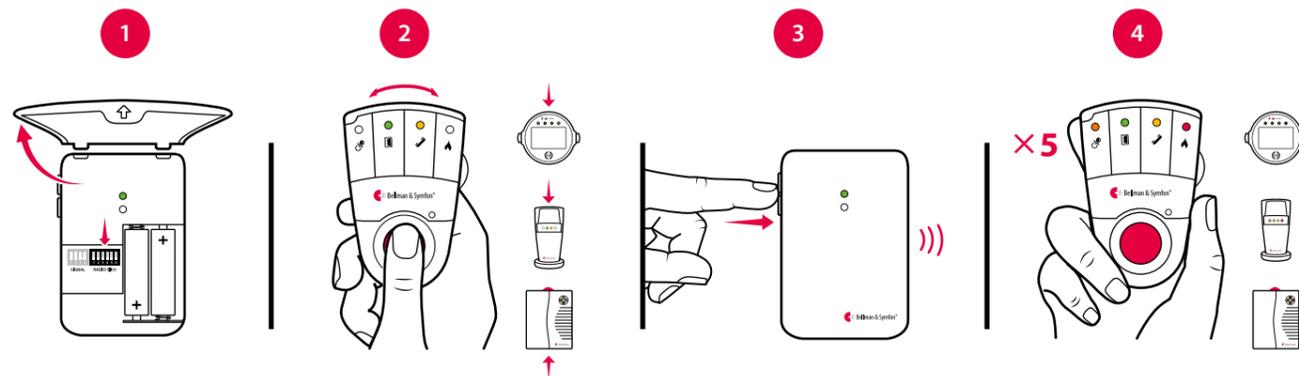

Fehlersuche


| Problem | Lösung |
|--|--|
| Die LEDs blinken einmal pro Minute orangefarben. | <ul style="list-style-type: none"> Ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA; LR6). |
| Die Empfänger-LEDs blinken einmal pro Sekunde orangefarben. | <ul style="list-style-type: none"> In der Umgebung des Tür-Senders befinden sich weitere, den Tür-Sender störende Schallquellen. Schalten Sie diese aus oder stellen Sie sie leiser. Trennen Sie das externe Mikrofonzubehör, um sicherzustellen, dass es nicht defekt ist. |
| Die Empfänger-LED leuchtet auf, wenn ich die Türklingel oder Gegensprechanlage betätige – aber der Empfänger wird nicht aktiviert. | <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Batterien von Sender und Empfänger sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. Stellen Sie sicher, dass der Tür-Sender und der Empfänger auf dasselbe Frequenzband eingestellt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Frequenzband ändern. |
| Die Sender-LED leuchtet nicht auf, wenn ich die Türklingel oder Gegensprechanlage betätige. | <ul style="list-style-type: none"> Betätigen Sie die Türklingel und verringern Sie dabei den Abstand des Senders zur Schallquelle. Der ideale Abstand beträgt weniger als 3 cm. Programmieren Sie den Sender darauf, den Ton der Türklingel zu erkennen. Siehe Anlernen von Türklingeltönen. Falls der Tür-Sender immer noch nicht aktiviert wird, halten Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig für fünf Sekunden gedrückt, um die aufgenommen Töne zu löschen und die obigen Schritte zu wiederholen. Falls die Signalstärke oder der Signalton stark variiert, wechseln Sie zur galvanischen Erkennung. |
| Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert. | <ul style="list-style-type: none"> Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern. |



Visit Druckknopf-Sender

Tasten und Verbindungen

Status-LED Vordere Taste Funkfrequenzschalter Signalschalter Loch für Trageband

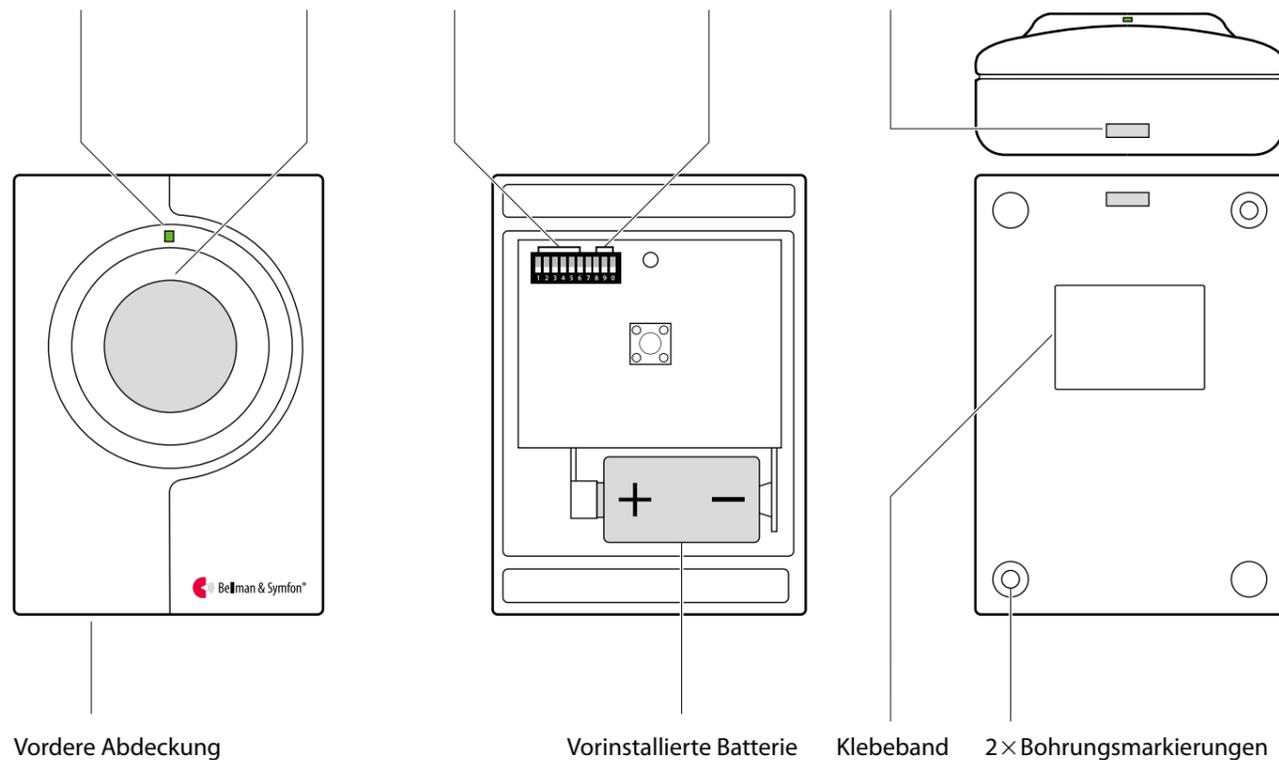

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1420 Visit Druckknopf-Sender mit Alkaline-Batterie
- Trageband mit Sicherheitsverschluss
- Klebeband, Schrauben und Dübel

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 66 mm
- Breite: 48 mm
- Tiefe: 23 mm
- Gewicht: 50 g, inkl. Batterien

Frequenz und Reichweite

- Frequenz 868,30 MHz
- Reichweite: 50 - 250 m abhängig von den Eigenschaften des Gebäudes und der Kombination von Sendern und Empfängern.

Strom und Batterie

- Batterietyp
1 × Alkaline (6 V, PX28G/PX28M) oder 1 × Lithium (6 V, PX28L)
- Stromverbrauch
Aktiv < 35 mA
Ruhezustand < 0,05 µA
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterien ca. 2 Jahre
Lithium-Batterien ca. 5 Jahre

Aktivierung

- Mit dem vorderen Druckknopf

Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei
Mit einem trockenen Tuch reinigen
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel

Umgebung


- Für den Innengebrauch. Für den Außengebrauch nur an einem geschützten Ort. Das Gerät ist nicht gegen Wasser bzw. Regen geschützt. (IP42)
- Betriebstemperatur -10 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit 15% bis 90% (nicht kondensierend)

Verwendung als Ruftaste

Der Sender kann als drahtlose Ruftaste um den Hals getragen werden.

So verwenden Sie ihn als Ruftaste:

- 1 Bringen Sie das Umhängeband am Sender an.
- 2 Hängen Sie sich den Sender um Ihren Hals.

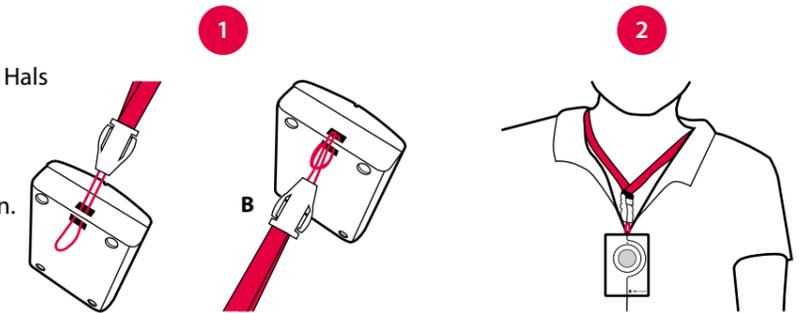


Verwendung als Türklingel

Der Sender kann auch als drahtlose Türklingel verwendet werden. So bringen Sie ihn an:


Montage mit Schrauben

- 1 Nehmen Sie vorsichtig die vordere Sender-Abdeckung ab und bohren Sie an den Markierungen zwei Löcher.
- 2 Befestigen Sie das Gerät mit den beiliegenden Schrauben an der Wand und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

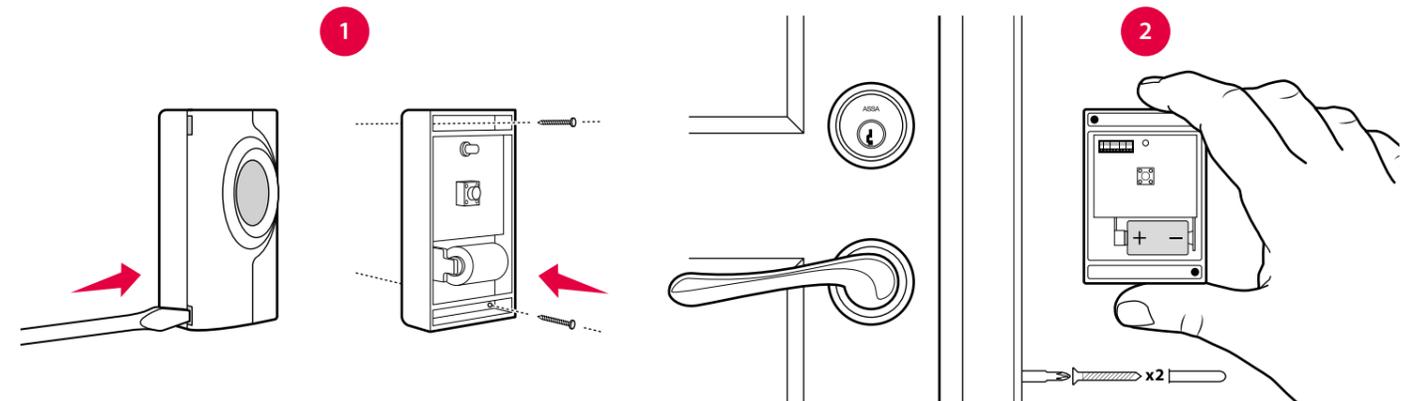

Montage mit Klebeband

- 1 Kleben Sie das beiliegende Klebeband auf die Rückseite des Senders. Reinigen Sie die Wand mit einem feuchten Tuch und ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ab.
- 2 Installieren Sie das Gerät wettergeschützt an der Eingangstür.

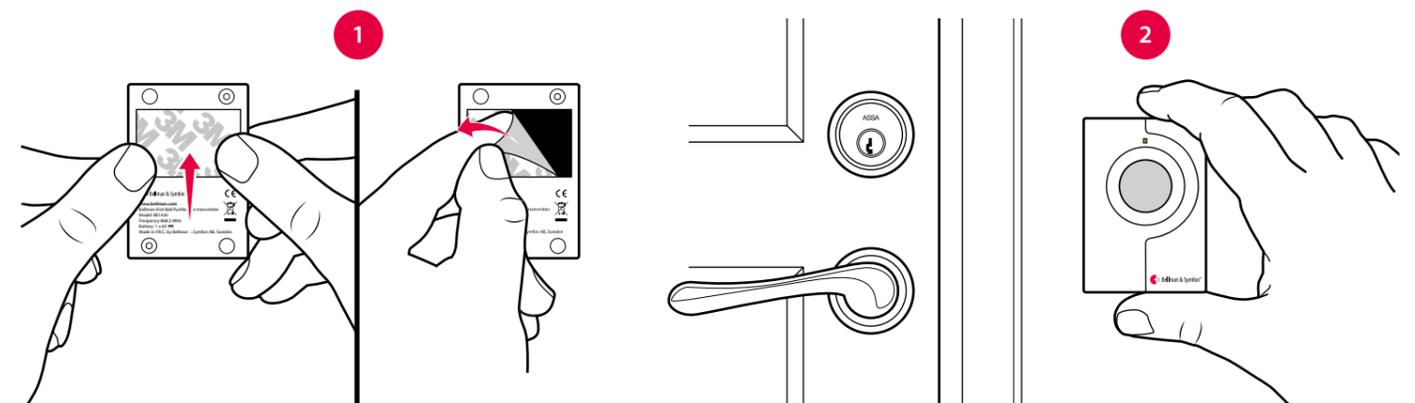




Visit Druckknopf-Sender

Prüfen der Verbindung

Mit dem vorderen Druckknopf

- 1 Drücken Sie die vordere Taste des Senders. Die LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass ein Funksignal übertragen wird.
- 2 Die grüne Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich beginnt der Empfänger, in einer bestimmten Geschwindigkeit Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale auszusenden. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, das standardmäßig wie folgt eingestellt ist:

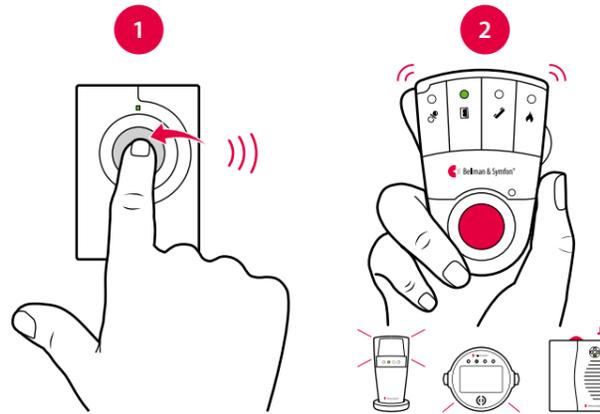

Standardmäßiges Signalmuster

| Sender | Empfänger-Signalmuster | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------|
| LED | LED | Ton | Vibration | Blitzlicht |
| ■ Grünes Leuchten | Grünes Leuchten | 1 × Türgong, tief | Langsam ■□□□ | Ja |

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann ganz einfach geändert werden. Öffnen Sie einfach die vordere Abdeckung des Senders und stellen Sie für die Änderung des Signalmusters die Signalschalter Nr. 8, 9 und 0 gemäß den Angaben in der nachstehenden Tabelle um:

| Sender | Empfänger-Signalmuster | | | |
|----------|------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Schalter | LED | Ton | Vibration | Blitzlicht |
| | Grünes Leuchten | 1 × Türgong, tief | Langsam ■□□□ | Ja |
| | 2 × grünes Blinken | 2 × Türgong, tief | Langsam ■□□□ | Ja |
| | 3 × grünes Blinken | 1 × Türgong, hoch | Langsam ■□□□ | Ja |
| | Grünes Blinken | 2 × Türgong, hoch | Langsam ■□□□ | Ja |
| | Oranges Leuchten | Babymelodie | Schnell ■□□□□ | Ja |
| | Oranges Blinken | Babymelodie | Schnell ■□□□□ | Ja |
| | Gelbes Leuchten | 1 × Klingelsignal, tief | Mittel ■□□□ | Ja |
| | Gelbes Blinken | 2 × Klingelsignal, hoch | Mittel ■□□□ | Ja |




Frequenzband ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich unter der Sender-Abdeckung.

So ändern Sie das Frequenzband:

- 1 Entfernen Sie die vordere Sender-Abdeckung und stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (Ein), um das Frequenzband zu ändern. Standardmäßig befinden sich alle Funkfrequenzschalter in der unteren Position (Aus).
- 2 Halten Sie die Prüf-/Funktionstaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender die vordere Taste, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

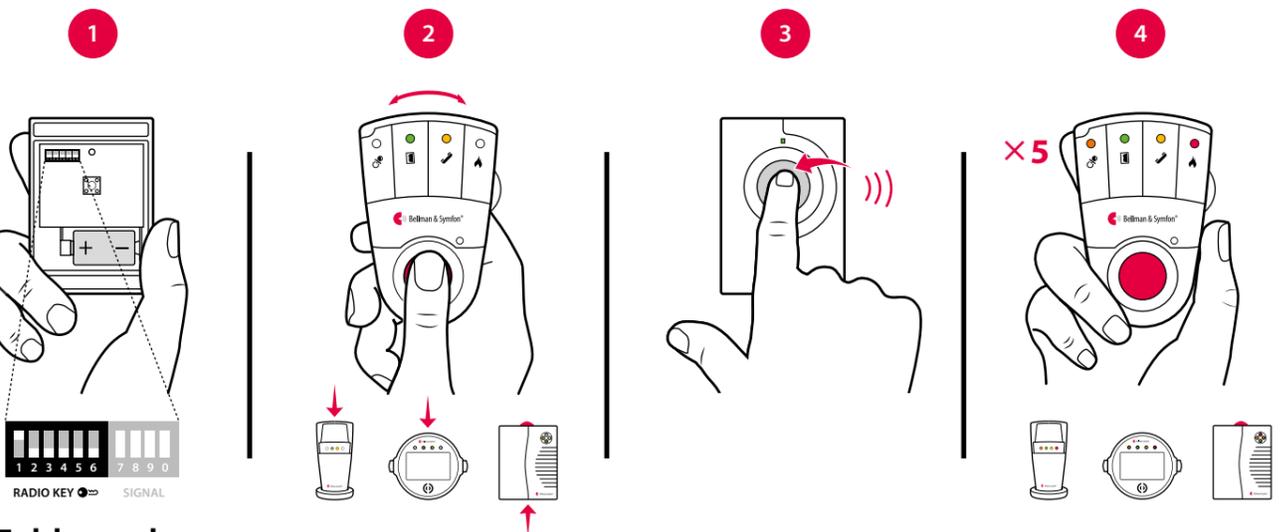

Fehlersuche

| Problem | Lösung |
|--|---|
| Die Sender-LED leuchtet gelb auf, wenn ich die Taste betätige. | <ul style="list-style-type: none"> Die Batterie ist fast leer. Ersetzen Sie die alte Batterie mit einer Alkaline-Batterie (PX28A) oder Lithium-Batterie (PX28L). |
| Die Sender-LED leuchtet nicht auf, wenn ich die Taste betätige. | <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig positioniert ist. Ersetzen Sie die alte Batterie mit einer Alkaline-Batterie (PX28A) oder Lithium-Batterie (PX28L). |
| Die Sender-LED leuchtet grün auf, aber der Empfänger wird nicht aktiviert. | <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Batterien des Senders und die Verbindungen bzw. Anschlüsse. Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. Stellen Sie sicher, dass die Geräte auf dasselbe Frequenzband eingestellt sind, siehe Frequenzband ändern. |
| Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert. | <ul style="list-style-type: none"> Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern. |


Visit Telefon-Sender



BE1431

HMV 13.99.04.0025

Tasten und Verbindungen

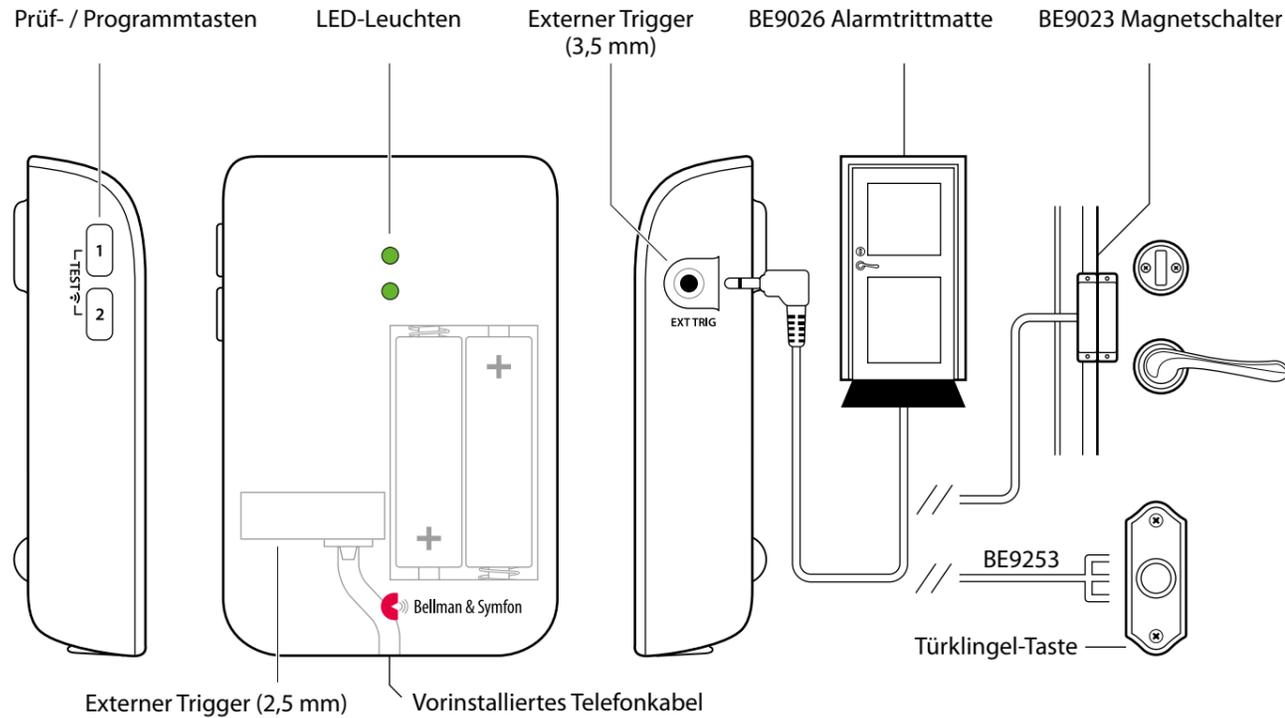

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1431 Visit Telefon-Sender
- 2 × Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Telefonkabel und Adapter
- Schraube und Wanddübel

Aktivierung

- Die Prüftasten
- Ein Festnetztelefon
- Eine Alarmtrittmatte oder ein Magnetschalter
- An externen Trigger angeschlossene Türklingel

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 90% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 100 mm
- Breite: 65 mm
- Tiefe: 27 mm
- Gewicht: 120 g, inkl. Batterien

Lieferumfang

- BE1431 Visit Telefon-Sender
- 2 × Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Telefonkabel und Adapter
- Schraube und Wanddübel

Frequenz und Reichweite

- Frequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: 50 - 250 m abhängig von den Eigenschaften des Gebäudes und der Kombination von Sendern und Empfängern.

Strom und Batterie

- Batteriestrom: 2 × Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Stromverbrauch: Aktiv < 70 mA
Ruhezustand < 15 µA
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterien ca. 5 Jahre
Lithium-Batterien ca. 10 Jahre

Eingänge


- RJ11-Analogeingang für Telefon
- Externer Trigger-Eingang (2,5 mm)
- Externer Trigger-Eingang (3,5 mm)

Zubehör

- BE9023 Magnetschalter
- BE9026 Alarmtrittmatte
- BE9253 Kabel für ext. Trigger (3,5 mm)

Inbetriebnahme des Senders

- Ziehen Sie die Batterielasche heraus, um das Gerät zu starten. Reinigen Sie die Wand mit einem feuchten Tuch und ziehen Sie die Schutzfolie vom Klettband ab.
- Installieren Sie den Sender an der Wand. Sie können dazu auch den beiliegenden Dübel und die Schraube verwenden.
- Schließen Sie den Telefonadapter wie unten gezeigt an.
Hinweis: Das Aussehen des Adapters kann ggf. je nach Region unterschiedlich ausfallen.

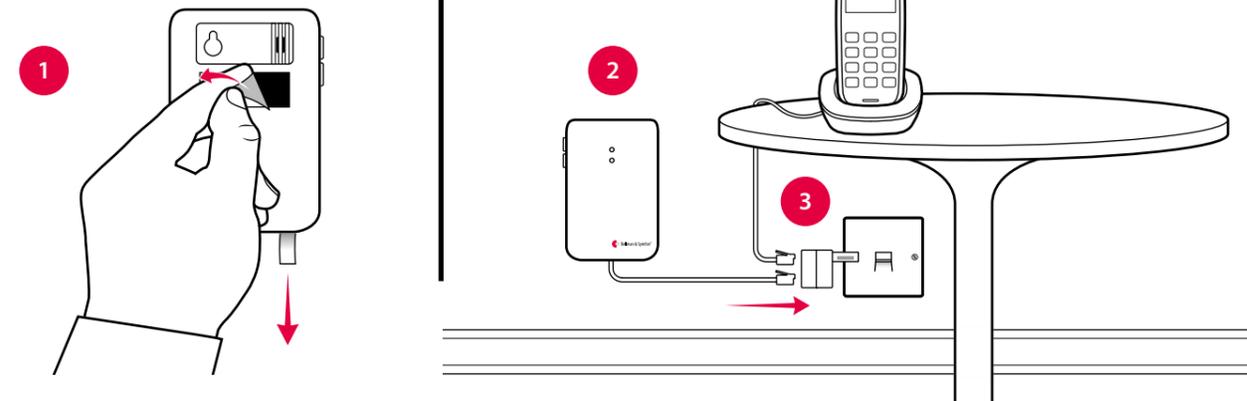


Prüfen der Verbindung

Mit der Prüftaste

- Drücken Sie am Telefon-Sender gleichzeitig beide Prüftasten. Die obere LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass ein Funksignal übertragen wird.
- Die gelbe Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.


Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 21.

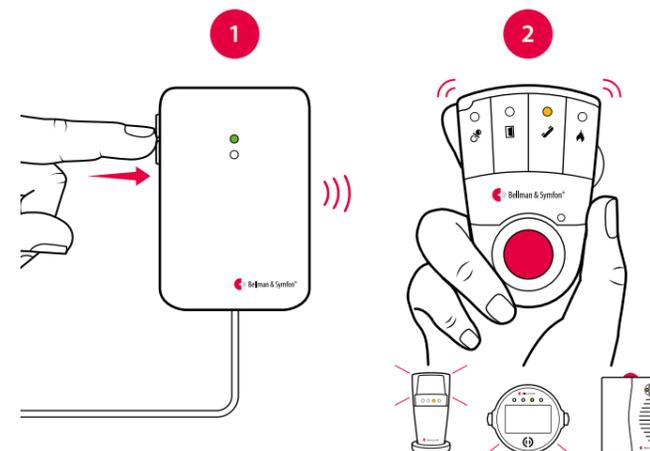

Mit einem Telefon

- Rufen Sie die Festnetznummer beispielsweise von einem Mobiltelefon an. Die obere LED des Senders leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass ein eingehender Anruf erkannt wird.
- Die gelbe Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Funksignal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 21.

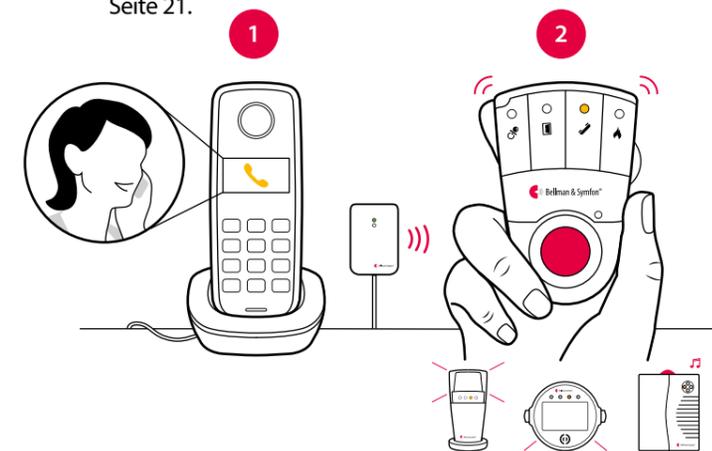




Anschluss an das Telefon


Variante 1

Zum einen können Sie den Telefon-Sender mit dem beiliegenden Kabel an die sogenannte TAE-Dose anschließen (rechts oder links):

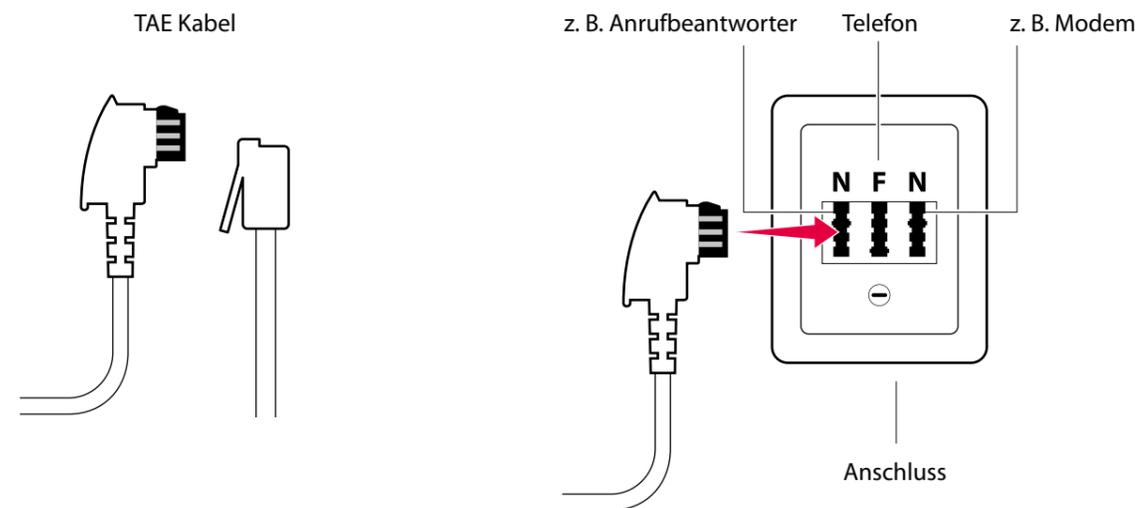


Variante 2

Sollte Ihnen nur der mittlere Anschluss zur Verfügung stehen, benötigen Sie zusätzlich einen Kabel/Adapter oder ein Y-Kabel (erhältlich im Elektrofachhandel):

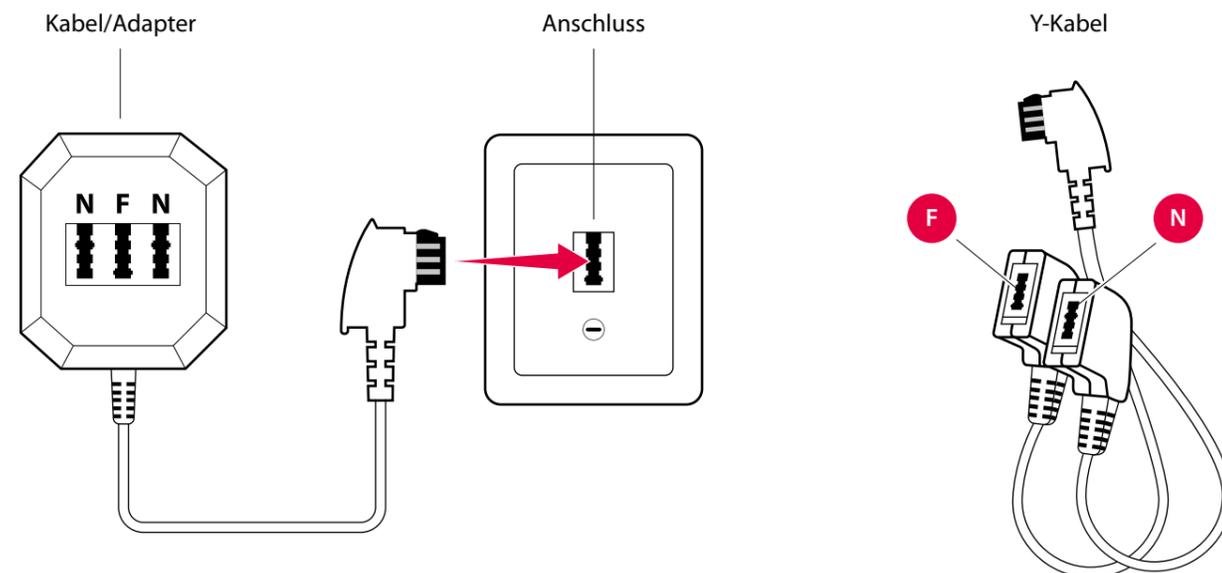


Variante 3

Sollten Sie Ihre Telefonie über einen Router/DSL Modem betreiben, ist das Anschließen des Telefon-Senders abhängig von dem bereits angeschlossenen Analog-Telefon. Sollte Ihr Telefon an einen dieser Anschlüsse angeschlossen sein, verfahren Sie bitte wie bei **Variante 2** dargestellt.

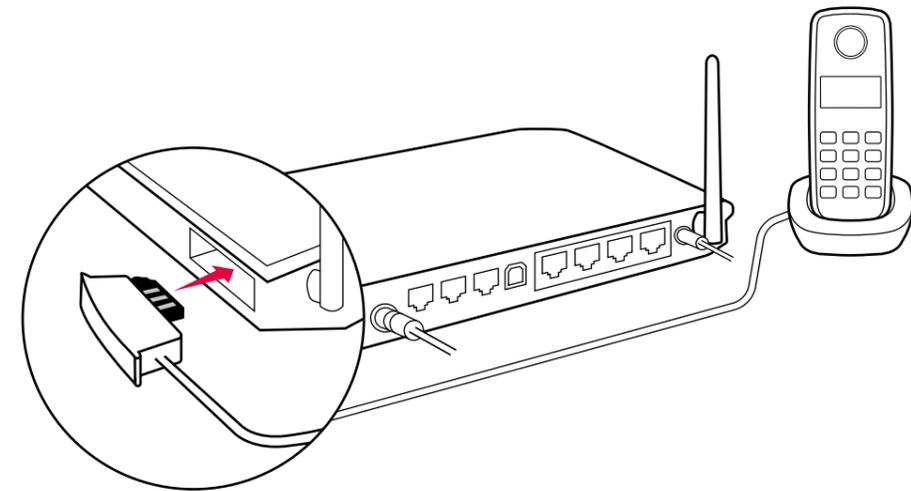

Variante 4

Ist Ihr Telefon am Router mit einem RJ11 (Westernstecker) Kabel verbunden, benötigen Sie neben dem beiliegenden Kabel, den zusätzlichen Splitter BE9005. Generell lässt sich natürlich der Visit Telefon-Sender auch an einen freien Anschluss des Routers oder DSL Modems anschließen. Dies setzt jedoch voraus, dass dieser über die jeweilige Software mit der entsprechenden Rufnummer (muss zwingend die gleiche wie am Telefon sein) belegt wurde.

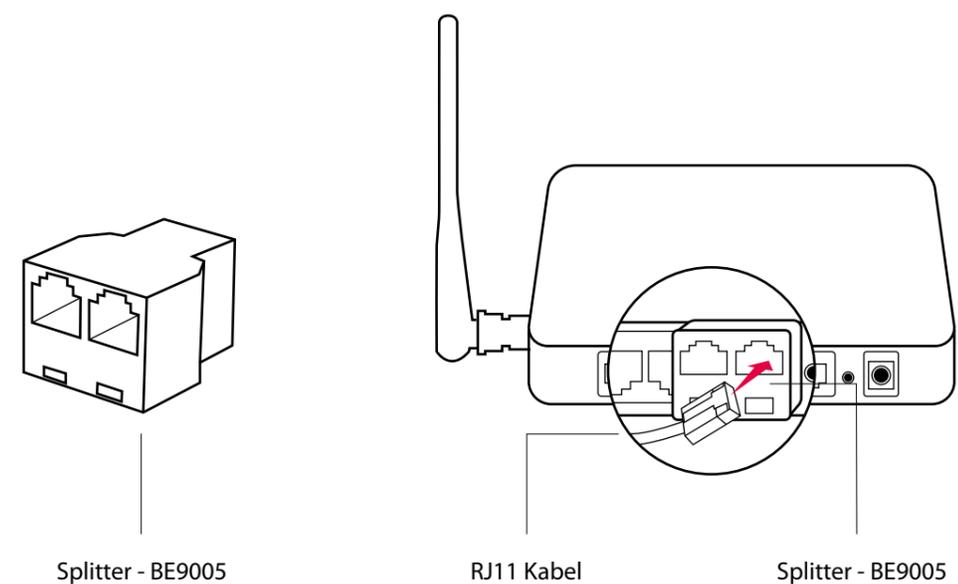



Visit Telefon-Sender

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn der Telefon-Sender von einem eingehenden Anruf oder von einem ausgelösten Zubehörgerät aktiviert wird, passiert Folgendes:

- 1 Die LED des Senders leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Sender an den Empfänger sendet.
- 2 Die Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und der Empfänger beginnt, in einer bestimmten Geschwindigkeit Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale auszusenden. Dies wird Signalmuster genannt. Das Signalmuster wird vom angeschlossenen Zubehör und dem Sender bestimmt. Standardmäßig ist es dieses Muster:

| Sender | | Empfänger-Signalmuster | | | |
|--------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| Quelle | LED | LED | Ton | Vibration | Blitzlicht |
| ■ Festnetztelefon | Grün, oben | Gelbes Leuchten | 1 × Klingelsignal, tief | Mittel | ■□■□ Ja |
| ■ Weiteres Zubehör | Grün, unten | Grünes Leuchten | 1 × Türgong, tief | Langsam | ■□□□ Ja |

Signalmuster ändern

Das Signalmuster wird vom Sender vorgegeben. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Senders und stellen Sie für die Änderung des Signalmusters die Signalschalter gemäß den Angaben in der nachstehenden Tabelle um.

| Sender | | Empfänger-Signalmuster | | | |
|----------|---|---|--|--------------------|----------------------|
| Schalter | Quelle | LED | Ton | Vibration | Blitzlicht |
| | Festnetztelefon / Prüftaste Weiteres Zubehör | Gelbes Leuchten Grünes Leuchten | 1 × Klingelsignal, tief 1 × Türgong, tief | Mittel Langsam | ■□■□ Ja ■□□□ Ja |
| | Festnetztelefon / Prüftaste Weiteres Zubehör | Gelbes Leuchten 2 × grünes Blinken | 1 × Klingelsignal, tief 2 × Türgong, tief | Mittel Langsam | ■□■□ Ja ■□□□ Ja |
| | Festnetztelefon / Prüftaste Weiteres Zubehör | Gelbes Leuchten 3 × gelbes Blinken | 1 × Klingelsignal, tief 1 × Klingelsignal, hoch | Mittel | ■□■□ Ja ■□■□ Ja |
| | Festnetztelefon / Prüftaste Weiteres Zubehör | Gelbes Leuchten 2 × oranges Blinken | 1 × Klingelsignal, tief Babymelodie | Mittel Schnell | ■□■□ Ja ■■■■■■ Ja |
| | Festnetztelefon / Prüftaste Weiteres Zubehör | 2 × gelbes Blinken 3 × oranges Blinken | 2 × Klingelsignal, tief Babymelodie | Mittel Schnell | ■□■□ Ja ■■■■■■ Ja |
| | Festnetztelefon / Prüftaste Weiteres Zubehör | 2 × gelbes Blinken Grünes Blinken | 2 × Klingelsignal, tief 2 × Türgong, hoch | Mittel Langsam | ■□■□ Ja ■□□□ Ja |
| | Festnetztelefon / Prüftaste Weiteres Zubehör | Oranges Blinken 2 × grünes Blinken | Babymelodie 2 × Türgong, tief | Schnell Langsam | ■■■■■■ Ja ■□□□ Ja |
| | Festnetztelefon / Prüftaste Weiteres Zubehör | 3 × gelbes Blinken Grünes Blinken | 1 × Klingelsignal, hoch 2 × Türgong, hoch | Mittel Langsam | ■□■□ Ja ■□□□ Ja |




Frequenzband ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich unter der Sender-Abdeckung.

So ändern Sie das Frequenzband:

- 1 Öffnen Sie die vordere Sender-Abdeckung und stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (Ein), um das Frequenzband zu ändern. Standardmäßig befinden sich alle Funkfrequenzschalter in der unteren Position (Aus).
- 2 Halten Sie die Prüf-/Funktionstaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender gleichzeitig beide Prüftasten, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dasselbe Frequenzband eingestellt sein.

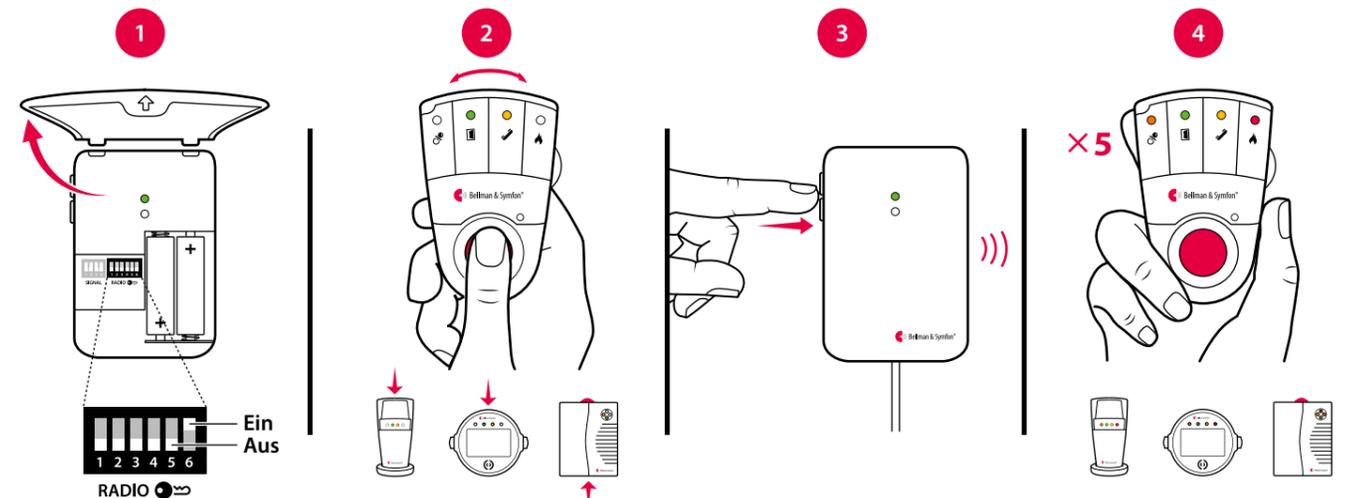

Fehlersuche

| Problem | Lösung |
|--|---|
| Die LEDs blinken einmal pro Minute orangefarben. | ■ Ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA; LR6). |
| Die Sender-LED leuchtet grün auf, aber der Empfänger reagiert nicht. | ■ Überprüfen Sie die Batterien von Sender und Empfänger sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. ■ Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ■ Stellen Sie sicher, dass die Geräte auf dasselbe Frequenzband eingestellt sind, siehe Frequenzband ändern. |
| Die Sender-LED leuchtet nicht auf, wenn das Telefon klingelt oder ein Zubehörgerät ausgelöst wird. | ■ Drücken Sie die Prüftasten des Senders. Prüfen Sie alle Verbindungen bzw. Anschlüsse, wenn die LED grün aufleuchtet. Wenn die LED nicht grün aufleuchtet, ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA; LR6). |
| Die Sender-LED leuchtet nicht auf, wenn ich die Prüftasten betätige. | ■ Ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA; LR6). Wenn die LED weiterhin nicht aufleuchtet, setzen Sie sich mit Ihrem Händler zwecks Service-Informationen in Verbindung. |
| Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert. | ■ Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern. |


Telefon-Transceiver BT



BE1433

HMV 13.99.04.5006

Tasten und Anschlüsse

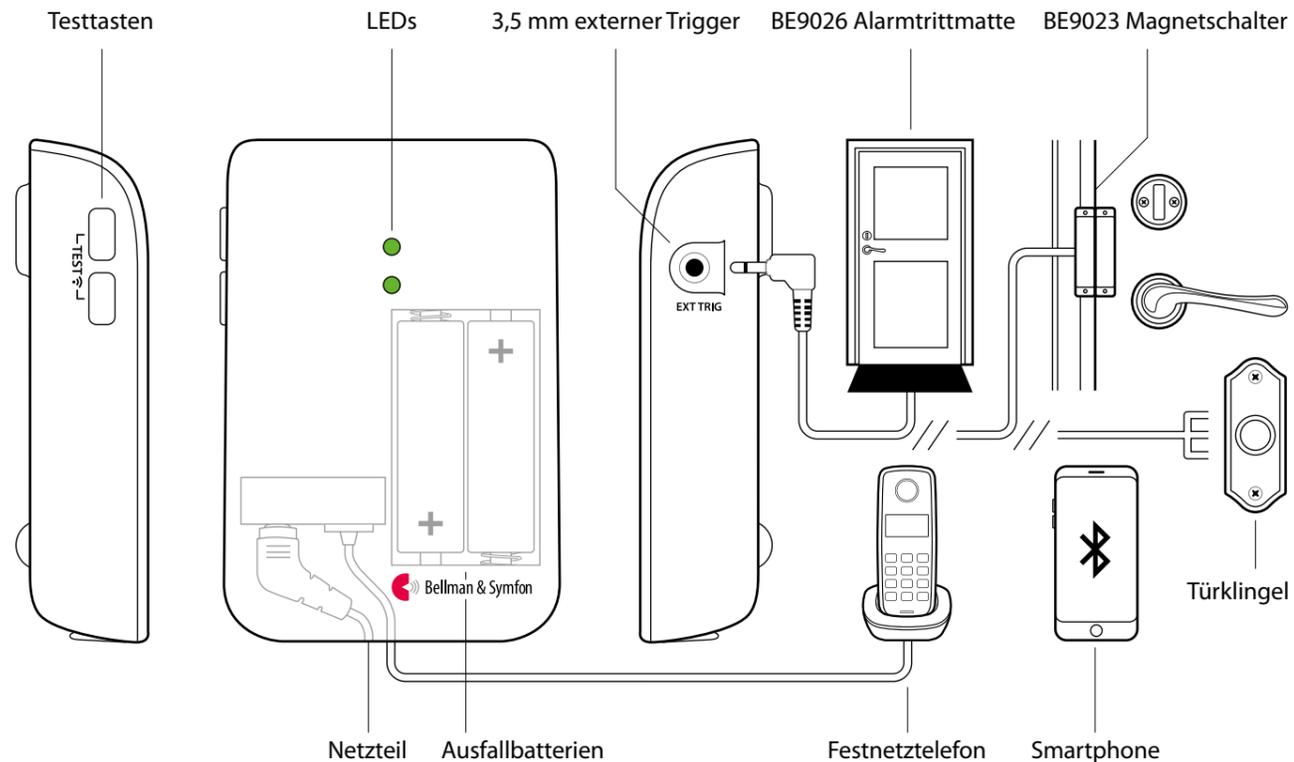

Technische Daten

Lieferumfang

- BE1433 Telefon-Transceiver BT
- Netzteil
- 2 × 1.5V AA Alkaline-Batterien
- RJ11 Anschlusskabel
- Schrauben und Dübel, Klettband zur Befestigung
- Erste Schritte Anleitung

Kompatibilität

- Ab iOS11 | ab Android 6
- iPhone 6S und höher
- moderne Android Geräte

Strom und Batterie

- Netzspannung: 5 V DC / 1000 mA
- Ausfall-Batterien: 2 × 1.5 V AA Alkaline-Batterien

Maße und Gewicht

- Höhe: 100 mm
- Breite: 65 mm,
- Tiefe: 27 mm
- Gewicht: 120 g, inkl. Batterien

Aktivierung

- Ein mobiles Gerät über Bluetooth
- Testtasten
- Festnetztelefon
- Klinkenanschluss

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 90% (nicht kondensierend)

Eingänge

- RJ11 Anschluss für analoges Telefonnetz
- 3.5 mm externer Triggereingang für Zubehör
- Netzteilbuchse
- Bluetooth 5.0

Frequenz und Reichweite

- Frequenzband: 868,30 MHz
- Reichweite: 50 - 250 m abhängig von den Eigenschaften des Gebäudes und der Kombination von Sendern und Empfängern.
- Bluetooth-Frequenz: 2400 – 2483.5 MHz
- Bluetooth-Reichweite: bis 200 m


Zubehör

- BE9023 Magnetschalter
- BE9026 Alarmtrittmatte
- BE9253 ext. Trig. Kabel

Installation der App

1 Bluetooth® aktivieren

Gehen Sie in die Smartphone Einstellungen und aktivieren Sie Bluetooth.

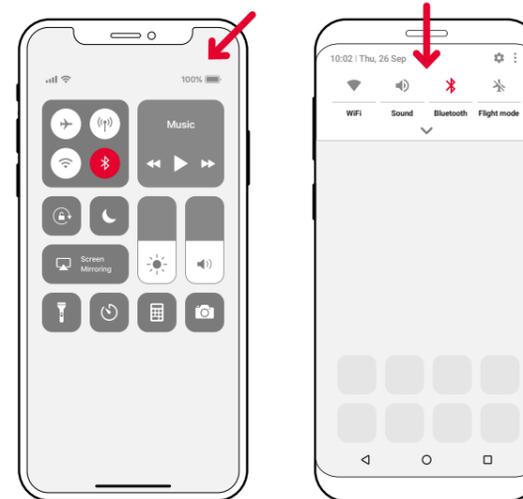

2 Installieren Sie die Bellman Visit App

Laden Sie die **Bellman Visit** App aus dem App Store® oder von Google Play™ herunter und folgen Sie einfach den Anweisungen.



Transceiver Inbetriebnahme

3 Anbringen

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klettverschluss auf der Rückseite des Senders und platzieren Sie ihn an der Wand. Ggf. Montage Schrauben-Set nutzen.

4 Aktivieren

Ziehen Sie die Batterielasche heraus, um den Transceiver zu aktivieren. Die Status-LED am Visit Transceiver leuchtet grün auf, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist.

5 Anschließen


Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Netzteil. Stecken Sie anschließend das Netzteil in die Steckdose. Verbinden Sie zur Erkennung Ihres Festnetztelefons das mitgelieferte Kabel mit Ihrem Telefonanschluss/Router. Je nach Anschluss benötigen Sie evtl. einen Splitter.

6 Smartphone-Anbindung testen

Bitten Sie jemanden auf Ihrem Smartphone anzurufen. Die gelbe LED an Ihrem Visit Empfänger beginnt zu blinken und er blitzt, vibriert und/oder gibt ein Tonsignal ab (je nach Empfänger).

7 Festnetz testen

Rufen Sie auf Ihrem Festnetzanschluss an. Die gelbe LED an Ihrem Visit Empfänger beginnt zu leuchten und er blitzt, vibriert und/oder gibt ein Tonsignal ab.

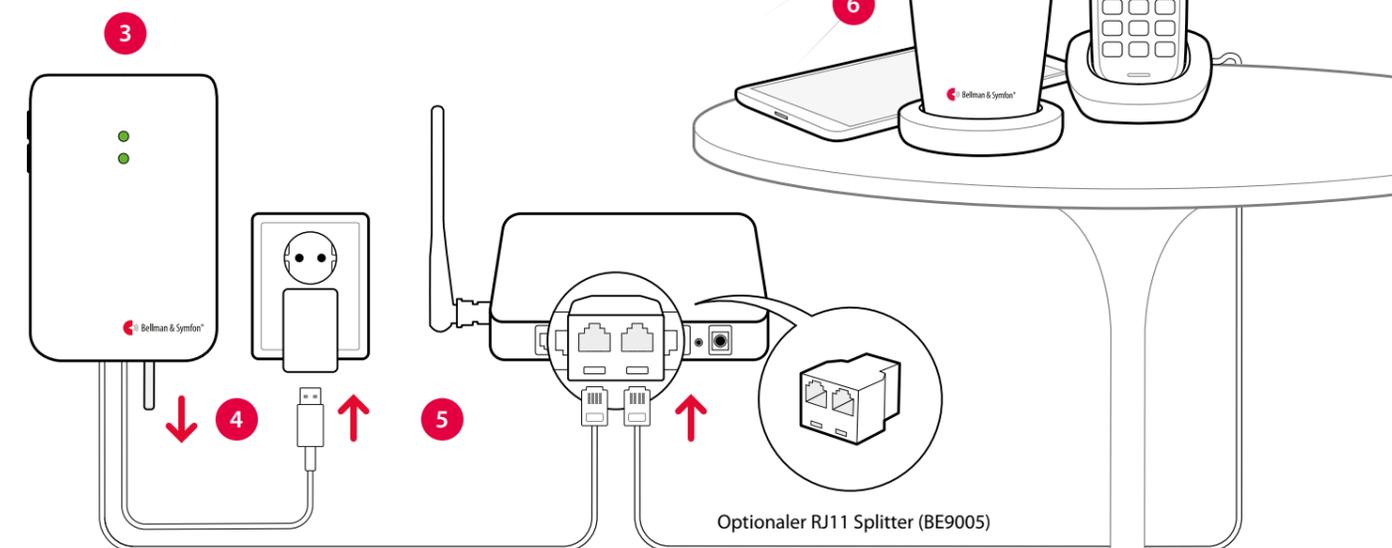



Telefon-Transceiver BT

Nutzung der App

Sobald Sie die **Bellman Visit** App installiert haben, erhalten Sie Visit Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone. Darüber hinaus informieren die Visit Empfänger über Mobilanrufe und Mitteilungen. Sie können Ihr System ganz einfach in der App steuern.



Mitteilungen verwalten

Mitteilungen mit nur einem Druck aktivieren, deaktivieren oder löschen.



Steuerung Ihrer Geräte

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre angeschlossenen Geräte und tippen Sie auf "+" um ein neues Gerät hinzuzufügen.




Verlauf anzeigen

Rufen Sie alle Mitteilungen auf, sortiert nach Datum und Zeit.



Mehr erfahren

Tippen Sie auf **Bedienungsanleitung** im Menü, um mehr über die Funktionen zu erfahren.

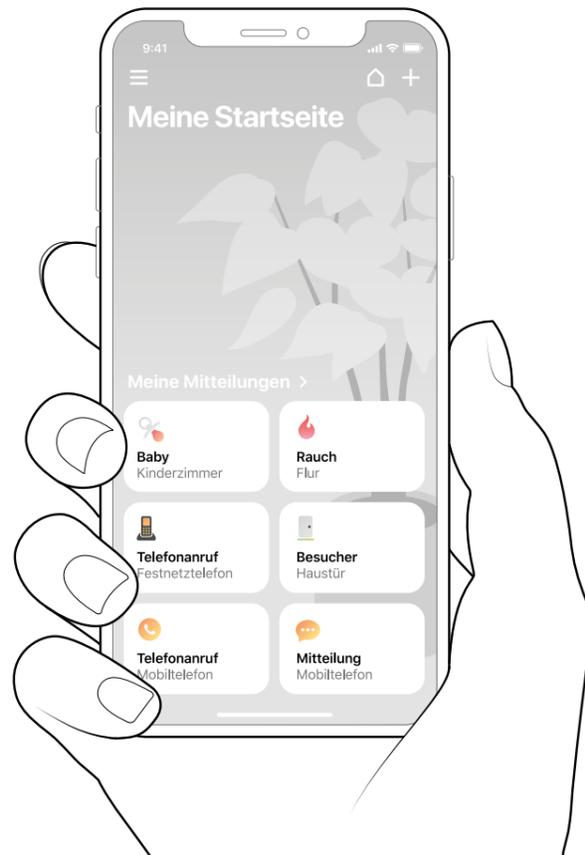

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn der Telefon-Transceiver BT durch einen eingehenden Anruf oder ein ausgelöstes Zubehörteil aktiviert wird, geschieht Folgendes:

- 1 Die LED am Transceiver leuchtet auf, um anzuzeigen, dass er den Empfängern ein Signal gibt.
- 2 Die Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und er beginnt in einem bestimmten Rhythmus, dem sogenannten Signalmuster, einen Ton, ein Blitzlicht und/oder Vibration abzugeben. Der Transceiver und das angeschlossene Zubehör bestimmen das Signalmuster. Die Standardeinstellung ist wie folgt:

Signalmuster ändern

Der Transceiver steuert das Signalmuster. Öffnen Sie die Frontabdeckung des Transceivers und verschieben Sie die Signalschalter, siehe **Signalmuster ändern** in BE1431 oder in der App-Bedienungsanleitung.

Frequenzband ändern

Wird Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert, ist vermutlich in der Nähe ein anderes Visit-System installiert. Das bedeutet, dass Sie das Frequenzband auf allen Geräten ändern müssen, siehe **Frequenzband ändern** in BE1431 oder in der App-Bedienungsanleitung.

| Transceiver | | Empfänger-Signalmuster | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| Quelle | LED | LED | Ton | Vibration | Blitzlicht |
| ▪ Festnetztelefon | Grün, oben | Gelbes Leuchten | 1 × Klingelsignal, tiefer Ton | Mittel | ■□■□ Ja |
| ▪ Smartphone | Grün, oben | Gelbes Blinken | 2 × Klingelsignal, hoher Ton | Mittel | ■□■□ Ja |
| ▪ Zubehör | Grün, unten | Grünes Leuchten | 1 × Türgong, tiefer Ton | Langsam | ■□□□ Ja |

Fehlersuche

Die meisten Unklarheiten mit dem Telefon-Transceiver BT können rasch mit Hilfe folgender Ratschläge gelöst werden.

| Problem | Lösung |
|---|--|
| Die LEDs am Transceiver blinken bernsteinfarben, wenn das Gerät ausgelöst wird | <p>Wenn die LEDs am Transceiver bernsteinfarben blinken, wenn das Gerät ausgelöst wird, bedeutet das, dass die Batterie fast leer ist. Probieren Sie Folgendes aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Batterien wechseln Öffnen Sie die Abdeckung des Transceivers und tauschen Sie die Batterien aus. Verwenden Sie nur 1,5 V AA (LR-6) Alkaline-Batterien. ▪ An Strom anschließen Achten Sie darauf, dass das Stromkabel an den Stromadapter angeschlossen ist, und dieser in der Steckdose eingesteckt ist. |
| Die Transceiver-LEDs blinken einmal pro Minute rot | <p>Wenn die LEDs des Transceivers einmal pro Minute rot blinken, bedeutet das, dass die Backup-Batterien fast leer sind. Probieren Sie Folgendes aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Batterien wechseln Öffnen Sie die Abdeckung des Transceivers und tauschen Sie die Batterien aus. Verwenden Sie nur 1,5 V AA (LR-6) Alkaline-Batterien. ▪ An Strom anschließen Achten Sie darauf, dass das Stromkabel an den Stromadapter angeschlossen ist, und dieser in der Steckdose eingesteckt ist. |
| Der Visit-Empfänger reagiert nicht, wenn das Festnetztelefon klingelt, oder wenn ein angeschlossenes Gerät ausgelöst wird | <p>Das kann mehrere Ursachen haben. Drücken Sie kurz beide Test-Tasten am Transceiver gleichzeitig, um ein Signal an Ihren Visit-Empfänger zu schicken.</p> <p>Wenn die LED des Transceivers grün aufleuchtet, probieren Sie Folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie die Batterieleistung Achten Sie darauf, dass die Batterien Ihres Visit-Empfängers nicht leer sind und dass er (gegebenenfalls) an das Stromnetz angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie die Funktaste Achten Sie darauf, dass die Geräte auf dasselbe Frequenzband eingestellt sind, siehe Frequenzband ändern. 3. Gehen Sie in Visit-Reichweite Bewegen Sie den Visit-Empfänger näher an den Transceiver, um sicherzugehen, dass er sich im Visit-Funkbereich befindet. <p>Wenn die LED des Transceivers nicht grün aufleuchtet, probieren Sie Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie den Strom und die Batterien Achten Sie darauf, dass der Stromadapter angeschlossen ist und dass die Backup-Batterien nicht leer sind. Wenn die LED nicht grün leuchtet, bitten Sie Ihren Händler um Informationen zu Garantie und Kundendienst. <p>Wenn der Visit-Empfänger reagiert, wenn Sie die Test-Tasten drücken: Das bedeutet, dass die Verbindung zwischen Ihrem Zubehör und dem Transceiver fehlerhaft ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie die Verbindungen Achten Sie darauf, dass alle Kabel zwischen dem Transceiver und dem Zubehör richtig angeschlossen sind. |
| Das Mobiltelefon erhält keine Mitteilung, wenn ein Visit-Transmitter ausgelöst wird | <p>Das kann mehrere Ursachen haben. Achten Sie zunächst darauf, dass die Visit-App offen ist oder im Hintergrund läuft. Überprüfen Sie dann, ob die Mitteilungskarte des Transmitters oder des angeschlossenen Zubehörs auf dem Startbildschirm der App auf Ihrem Gerät</p> |

Telefon-Transceiver BT



BE1433

HMV 13.99.04.5006


| Problem | Lösung |
|--|---|
| | <p>aktiviert wurde. Genauere Informationen dazu finden Sie unter Benutzerhandbuch > Mitteilungen verwalten.</p> <p>Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Transmitter und dem Transceiver des Mobiltelefons</p> <p>Halten Sie die Testtaste(n) auf dem Transmitter gedrückt. Die untere LED des Mobiltelefon-Transceivers leuchtet grün auf, was bedeutet, dass die Geräte kommunizieren. Wenn die LED nicht aufleuchtet, finden Sie im Benutzerhandbuch des Senders weitere Hilfe. Wenn das Mobilgerät noch immer keine Mitteilungen erhält, probieren Sie Folgendes aus:</p> <p>Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Transceiver und dem Mobiltelefon</p> <p>Halten Sie beide Test-Tasten am Transceiver gedrückt, um eine Mitteilung an Ihr Mobilgerät zu schicken. Die obere LED des Transceivers leuchtet zur Bestätigung grün auf.</p> <p>Wenn die LED nicht aufleuchtet: Dies bedeutet, dass die Batterien leer sind und ersetzt werden müssen.</p> <p>Wenn die LED aufleuchten, aber keine entsprechende Mitteilung auf Ihrem Mobilgerät erscheint: Überprüfen Sie zunächst die Bluetooth-Verbindung auf dem Startbildschirm der App. Wenn das Haus-Symbol oben rechts rot ist, probieren Sie folgendes aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktiv ist Wischen Sie, um das Mitteilungszentrum / Panel zu öffnen und tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol, um es einzuschalten. 2. Schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein Wischen Sie, um das Mitteilungszentrum / Panel zu öffnen und tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol, um es aus- und wieder einzuschalten. 3. Das Herunterfahren der Bellman Visit-App erzwingen Versuchen Sie, ein Herunterfahren der App zu erzwingen und starten Sie sie erneut. Bitte beachten Sie, dass es nicht ausreicht, die App einfach zu schließen. 4. Überprüfen Sie, ob der Telefon-Transceiver als gepaartes Gerät in den Bluetooth-Einstellungen aufgeführt wird Wenn er nicht aufgeführt ist, öffnen Sie Menü > Meine Geräte, tippen Sie auf "Ersetzen" auf der Telefon-Transceivervkarte und halten Sie sich an die Anweisungen zum paaren des Transceivers auf dem Mobilgerät. |
| Der Visit-Empfänger reagiert nicht, wenn das Mobiltelefon klingelt oder eine Mitteilung erhält | <p>Das kann mehrere Ursachen haben. Achten Sie zunächst darauf, dass die Visit-App offen ist oder im Hintergrund läuft. Überprüfen Sie dann auf der Startseite, ob auf den Mitteilungskarten des Mobiltelefons Mitteilungen oder Anrufe eingegangen sind, und ob dies auf Ihrem Gerät aktiviert wurde. Genauere Informationen dazu finden Sie unter Benutzerhandbuch > Mitteilungen verwalten. Drücken Sie beide Prüftasten auf dem Transceiver und lassen Sie wieder los.</p> <p>Wenn die LED des Transceivers nicht grün aufleuchtet, probieren Sie Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie den Strom und die Batterien Achten Sie darauf, dass der Stromadapter angeschlossen ist und dass die Backup-Batterien nicht leer sind. Wenn die LED nicht grün leuchtet, bitten Sie Ihren Händler um Informationen zu Garantie und Kundendienst. |

| Problem | Lösung |
|--|---|
| | <p>Falls der Visit-Empfänger reagiert und eine Mitteilung auf Ihrem Mobilgerät erscheint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie die Telefoneinstellungen Es gibt einige Telefoneinstellungen, die verhindern, dass Anrufe und Mitteilungen an den Transceiver weitergeleitet werden. Halten Sie sich an die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Einstellungen zu ändern. <p>Falls der Visit-Empfänger reagiert und keine Mitteilung auf Ihrem Mobilgerät erscheint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie die Bluetooth-Verbindung Überprüfen Sie zunächst die Bluetooth-Verbindung auf dem Startbildschirm der App. Wenn das Haus-Symbol oben rechts rot ist, probieren Sie folgendes aus: <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktiv ist Wischen Sie, um das Mitteilungszentrum / Panel zu öffnen und tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol, um es einzuschalten. 2. Schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein Wischen Sie, um das Mitteilungszentrum / Panel zu öffnen und tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol, um es aus- und wieder einzuschalten. 3. Das Herunterfahren der Bellman Visit-App erzwingen Versuchen Sie, ein Herunterfahren der App zu erzwingen und starten Sie sie erneut. Bitte beachten Sie, dass es nicht ausreicht, die App einfach zu schließen. 4. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Dritt-Apps Verwenden Sie Dritt-Apps wie Facebook, Messenger, Skype, WhatsApp, WeChat oder Google Hangouts? Je nach Modell kann es sein, dass Ihr Mobilgerät Mitteilungen für Anrufe und Mitteilungen nicht an Ihr Visit-System weiterleitet. Wir schlagen vor, dass Sie die App testen, indem Sie jemanden bitten, Sie anzurufen oder Ihnen über die App eine Mitteilung zu schicken. Falls Ihr Visit-Empfänger nicht reagiert (auch nicht über das Mitteilungssystem des Mobilgeräts oder wenn Mitteilungskarten aktiviert sind) kann es sein, dass die Dritt-App nicht kompatibel ist. <p>Falls der Visit-Empfänger nicht reagiert, probieren Sie Folgendes aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie die Batterieleistung Achten Sie darauf, dass die Batterien auf Ihrem Visit-Empfänger nicht leer sind und / oder dass es an die Hauptstromversorgung angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie die Funktaste Achten Sie darauf, dass die Geräte auf dasselbe Frequenzband eingestellt sind, siehe Frequenzband ändern. 3. Gehen Sie in Visit-Reichweite Bewegen Sie den Visit-Empfänger näher an den Transceiver, um sicherzugehen, dass er sich im Visit-Funkbereich befindet. |
| Der Visit-Empfänger ist ohne ersichtlichen Grund aktiviert | <p>Möglicherweise ist ein weiteres Visit-System in der Nähe installiert, das Ihr System auslöst. Ändern Sie die Frequenz auf allen Visit-Geräten, um zu verhindern, dass dasselbe Frequenzband verwendet wird, siehe auch Frequenzband ändern.</p> |



Visit Babyruf-Sender

Tasten und Verbindungen

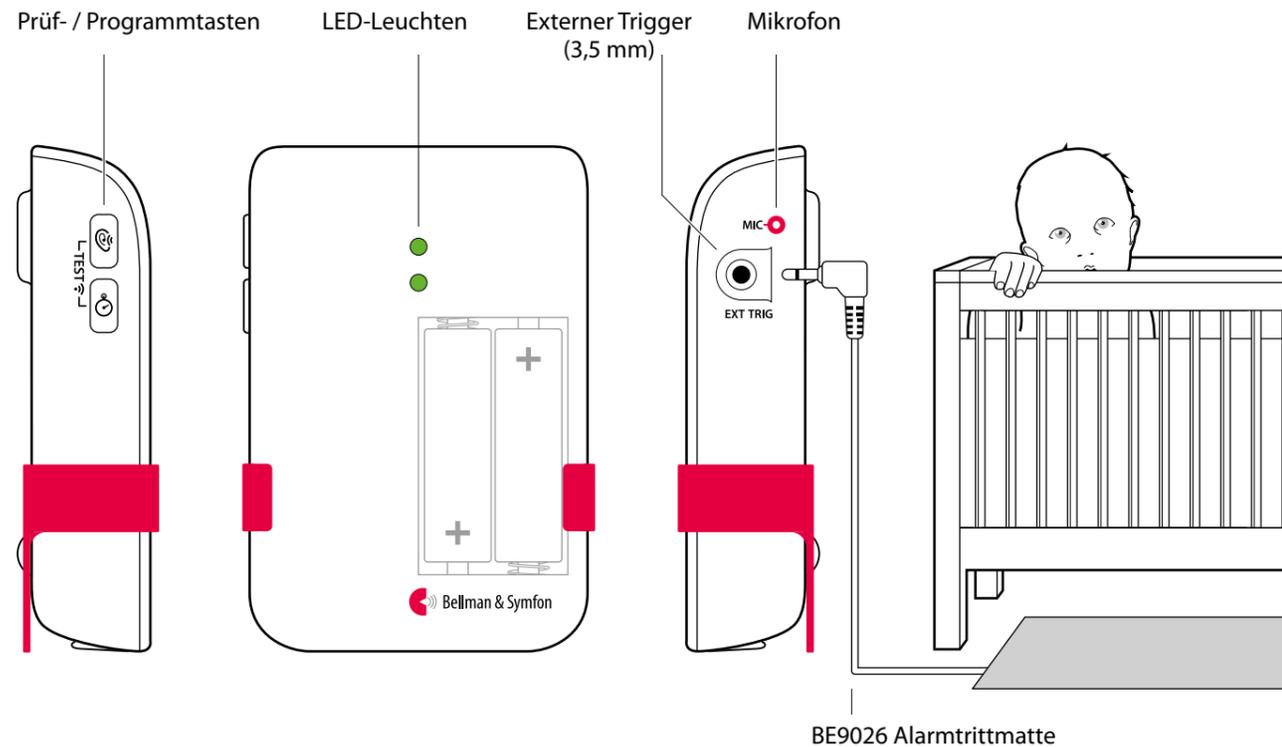

⚠ Stellen Sie stets sicher, dass sich der Babyruf-Sender außerhalb der Reichweite von Kindern befindet. Stellen Sie den Babyruf-Sender niemals im Bett oder Laufgitter des Kindes auf.

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1491 Visit Babyruf-Sender
- 2 × Alkaline-Batterien
- Standfuß
- Schraube und Wanddübel

Strom und Batterie

- Batteriestrom
2 × Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Stromverbrauch
Aktiv < 70 mA
Ruhezustand < 400 µA
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterien ca. 6 Monate
Lithium-Batterien ca. 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 100 mm
- Breite: 65 mm
- Tiefe: 27 mm
- Gewicht: 118 g, inkl. Batterien

Aktivierung

- Über das interne Mikrophon und die Prüftasten
- Zubehör Alarmtrittmatte

Einstellungen

- Empfindlichkeit: 65 dB, 75 dB, 85 dB
- Verzögerung: 30 s, 10 s, 1 s

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 90% (nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite


- Frequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: 50 - 250 m abhängig von den Eigenschaften des Gebäudes und der Kombination von Sendern und Empfängern.

Zubehör

- BE9026 Alarmtrittmatte
Benachrichtigt Sie, wenn Ihr Baby sein Bett verlässt

Inbetriebnahme des Babyruf-Senders

- 1 Ziehen Sie die Batterielasche heraus, um das Gerät zu starten. (Später können Sie auch die Prüftasten für drei Sekunden gedrückt halten, um es ein- oder auszuschalten).
- 2 Platzieren Sie den Babyruf-Sender auf dem Nachttisch oder befestigen Sie ihn mit beiliegender Schraube und Dübel an der Wand. Der empfohlene Abstand beträgt 0,5 bis 2,0 Meter (stets außerhalb der Reichweite des Kindes).

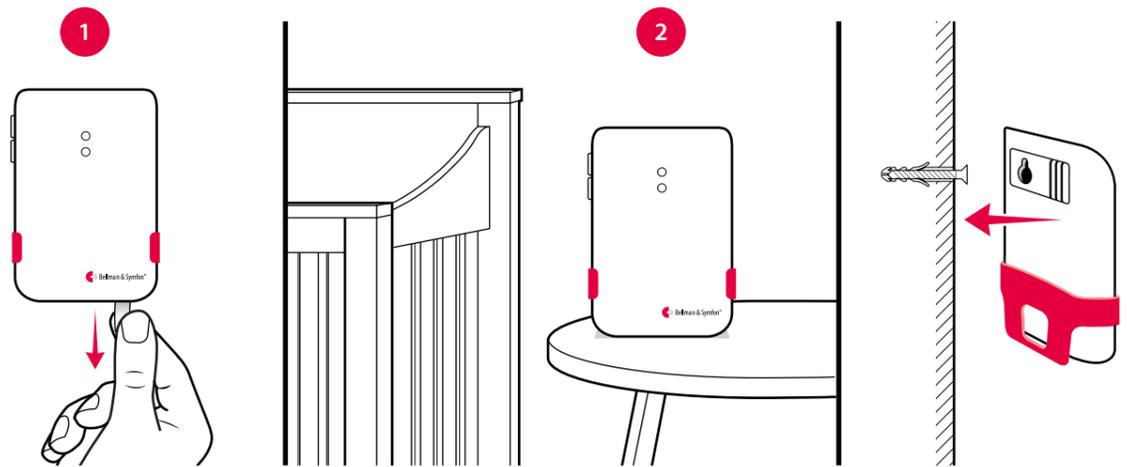


Prüfen der Verbindung

Mit der Prüftaste

- 1 Drücken Sie am Babyruf-Sender gleichzeitig beide Prüftasten. Die obere LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass ein Funksignal übertragen wird.
- 2 Die orangefarbene Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in folgender Tabelle.

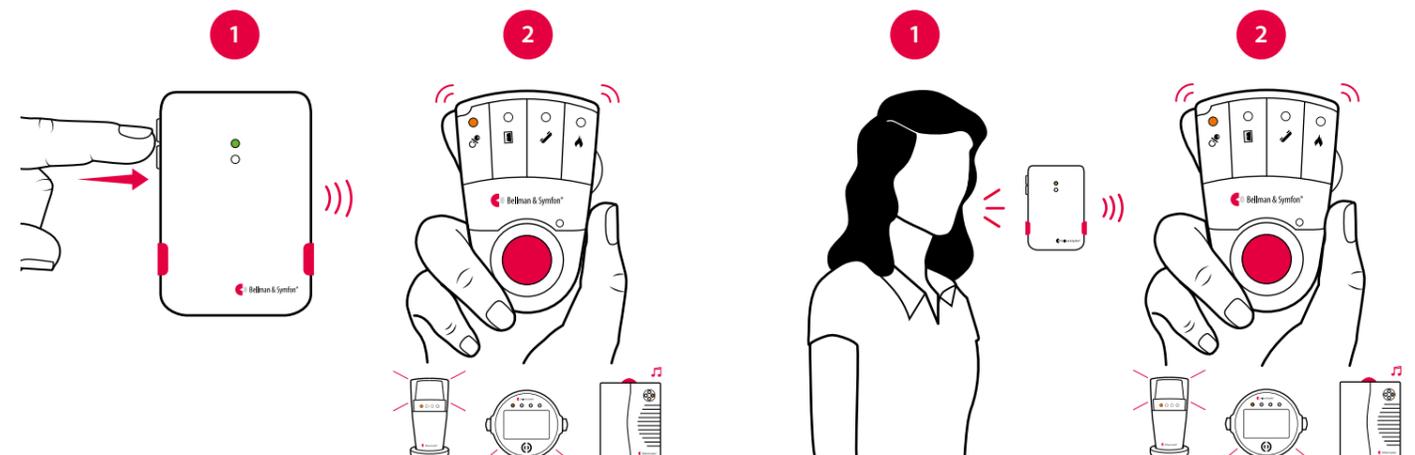

Mit der Stimme

- 1 Stellen Sie sich neben den Babyruf-Sender und machen Sie ein paar Geräusche. Die obere LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass das Geräusch bzw. Schall erkannt wird.
- 2 Die orangefarbene Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Funksignal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in folgender Tabelle.

Visit Babyruf-Sender



BE1491

HMV 13.99.04.0026


Einstellungen anpassen

Die Tasten für Empfindlichkeit und Verzögerung befinden sich auf der linken Seite des Babyruf-Senders. Wenn Sie eine Taste drücken, wird anhand der Farbe der zugehörigen LED die aktuelle Einstellung angezeigt. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Einstellung zu ändern.

- Der Babyruf-Sender wird trotz schreienden Babys nicht aktiviert: Empfindlichkeit erhöhen.
- Der Babyruf-Sender wird bereits bei leisen Geräuschen aktiviert: Empfindlichkeit verringern.
- Der Babyruf-Sender wird zu früh/spät aktiviert: Verzögerung entsprechend anpassen.

Empfindlichkeitseinstellungen Verzögerungseinstellungen

| | | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------------|------|--------|
| Empfindlichkeit | 65 dB | Rot | Verzögerung | 30 s | Rot |
| | 75 dB | Orange | | 10 s | Orange |
| | 85 dB | Grün | | 1 s | Grün |

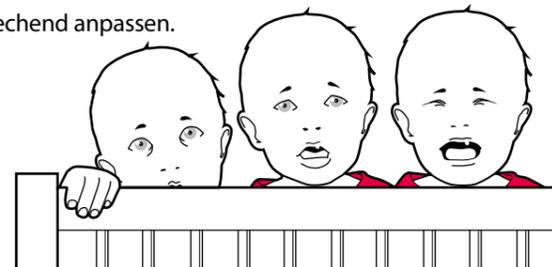

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn der Babyruf-Sender von der Stimme des Babys oder der Alarmtrittmatte aktiviert wird, passiert Folgendes:

- Die LED des Babyruf-Senders leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass es an den Empfänger sendet.
- Die Visit-LED am Empfänger leuchtet orangefarben auf und der Empfänger beginnt, in einer bestimmten Geschwindigkeit Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale auszusenden. Dies wird Signalmuster genannt. Der Babyruf-Sender und die Alarmtrittmatte geben das Signalmuster vor. Standardmäßig ist es dieses Muster:

| Babyruf-Sender | | Empfänger-Signalmuster | | | |
|------------------|-------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|
| Quelle | LED | LED | Ton | Vibration | Blitzlicht |
| Stimme des Babys | Grün, oben | Oranges Leuchten | Babymelodie | Schnell ■■■■■■ | Ja |
| Alarmtrittmatte | Grün, unten | Grünes Leuchten | 1×Türgong, tief | Langsam ■■■■ | Ja |

Signalmuster ändern

Wenn Sie mehr als ein Kind haben, können Sie für jeden Babyruf-Sender ein eigenes Signalmuster der Visit-LED einstellen. Dazu öffnen Sie einfach die vordere Abdeckung und stellen einen beliebigen Signalschalter auf die obere Position (Ein). Vergewissern Sie sich, dass alle anderen Schalter in der unteren Position (Aus) stehen.

| Babyruf-Sender | | | Empfänger-Signalmuster | | | |
|----------------|-----------------|---|------------------------|-------------|----------------|------------|
| Schalter | Quelle | | LED | Ton | Vibration | Blitzlicht |
| | Babyruf-Sender | 1 | Oranges Leuchten | Babymelodie | Schnell ■■■■■■ | Ja |
| | Alarmtrittmatte | 1 | Grünes Leuchten | Babymelodie | Schnell ■■■■■■ | Ja |
| | Babyruf-Sender | 2 | 2× oranges Blinken | Babymelodie | Schnell ■■■■■■ | Ja |
| | Alarmtrittmatte | 2 | 2× grünes Blinken | Babymelodie | Schnell ■■■■■■ | Ja |
| | Babyruf-Sender | 3 | 3× oranges Blinken | Babymelodie | Schnell ■■■■■■ | Ja |
| | Alarmtrittmatte | 3 | 3× oranges Blinken | Babymelodie | Schnell ■■■■■■ | Ja |
| | Babyruf-Sender | 4 | Oranges Blinken | Babymelodie | Schnell ■■■■■■ | Ja |
| | Alarmtrittmatte | 4 | Oranges Blinken | Babymelodie | Schnell ■■■■■■ | Ja |




Frequenzband ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich unter der Abdeckung des Babyruf-Senders.

So ändern Sie das Frequenzband:

- Entfernen Sie vorsichtig den Tischständer und öffnen Sie die vordere Abdeckung des Babyruf-Senders. Stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (Ein), um das Frequenzband zu ändern.
- Halten Sie die Prüf-/Funktionstaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Babyruf-Sender gleichzeitig beide Prüftasten, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dasselbe Frequenzband eingestellt sein.

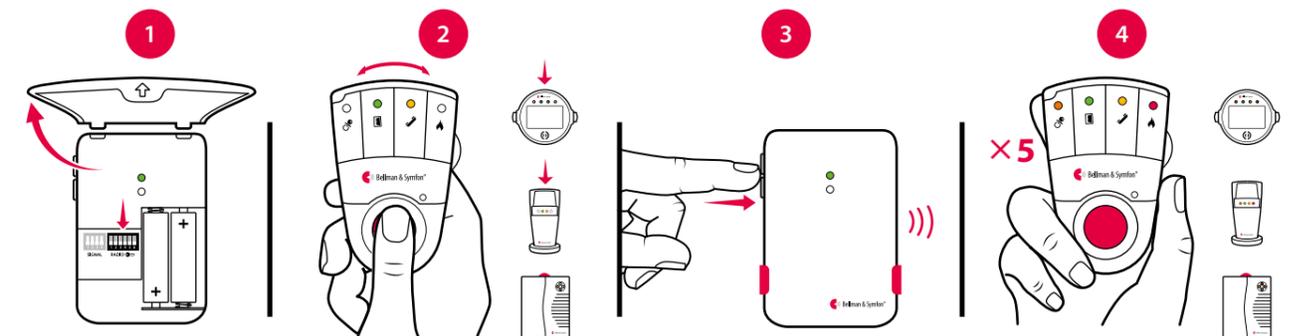

Fehlersuche

| Problem | Lösung |
|--|--|
| Die LEDs blinken einmal pro Minute orangefarben. | Ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA; LR6). |
| Die Babyruf-Sender-LED leuchtet grün auf, aber der Empfänger wird nicht aktiviert. | Überprüfen Sie die Batterien von Babyruf-Sender und Empfänger sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. Verringern Sie den Abstand zwischen Babyruf-Sender und Empfänger, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. Stellen Sie sicher, dass die Geräte auf dasselbe Frequenzband eingestellt sind, siehe Frequenzband ändern . |
| Die Babyruf-Sender-LED leuchtet nicht auf, obwohl das Baby schreit. | Verringern Sie den Abstand zwischen Baby und Babyruf-Sender oder erhöhen Sie die Mikrofon-Empfindlichkeit, siehe Einstellungen anpassen . Hinweis: Stellen Sie stets sicher, dass sich der Babyruf-Sender außerhalb der Reichweite von Kindern befindet. Stellen Sie den Babyruf-Sender niemals im Bett oder Laufgitter des Kindes auf. |
| Der Babyruf-Sender wird bereits bei leisen Geräuschen aktiviert. | Verringern Sie die Empfindlichkeit oder vergrößern Sie den Abstand des Babyruf-Senders zum Kinderbett, siehe Einstellungen anpassen . |
| Der Babyruf-Sender wird zu früh aktiviert. | Erhöhen Sie die Verzögerung. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen anpassen . |
| Der Babyruf-Sender wird zu spät aktiviert. | Verringern Sie die Verzögerung. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen anpassen . |
| Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert. | Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern . |


Visit Rauchmelde-Sender



BE1480

HMV 13.99.04.0040

Tasten und Steuerelemente

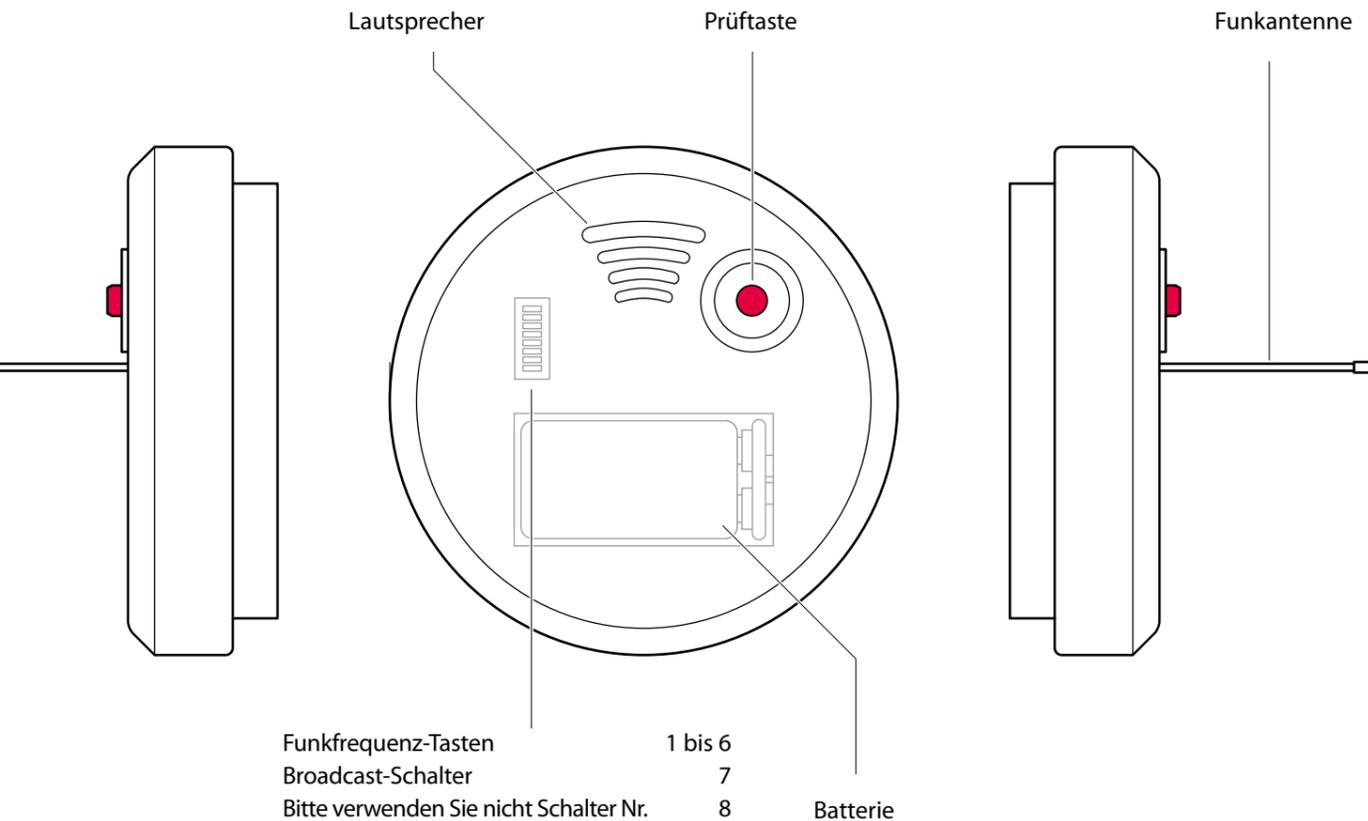

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1480 Visit Rauchmelde-Sender
- 1 × Alkaline- oder Lithiumbatterie (9V)
- Montageplatte
- Schrauben und Dübel

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 100 mm
- Breite: 100 mm
- Tiefe: 35 mm
- Gewicht: 110 g, inkl. Batterien

Strom und Batterie

- Batteriestrom
Duracell (9V; MN1604),
Energizer (522) oder
Ultralife (9V; U9VL-J; Lithium)
- Stromverbrauch
Aktiv < 40 mA
Ruhezustand < 10 µA
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterien ca. 3 Jahre
Lithium-Batterien ca. 6 Jahre

Sensortyp

- Optisch-thermaler Sensor mit
akustischem Alarm von > 85 dB(A)
bei 3 m

Aktivierung

- Mit der Prüftaste
- Mit dem integrierten Rauchmelder
- Mit dem integrierten Temperatursensor, wenn eine Temperatur von ca. 57 °C überschritten wird.

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 38 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit:
15% bis 90% (nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite


- Frequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: 50 - 250 m abhängig
von den Eigenschaften des
Gebäudes und der Kombination
von Sendern und Empfängern.

Gesetzliche Anforderungen

- BE1480 erfüllt die Norm EN 14604:
2005 für Rauchmelde-Sender

Installation des Rauchmelde-Senders

- 1 Entfernen Sie die Montageplatte und schließen Sie die Batterie an den Batterie-Druckknöpfen an, um das Gerät zu starten. Warten Sie ungefähr zehn Sekunden, während der Rauchmelde-Sender einen Selbsttest durchführt. Wenn die Prüftaste einmal blinkt, ist der Selbsttest abgeschlossen.
- 2 Befestigen Sie die Montageplatte mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Zimmerdecke. Bringen Sie ihn in einem Mindestabstand von 50 cm zu Wänden und anderen Hindernissen an, siehe Montageort und Anbringung.
- 3 Befestigen Sie den Rauchmelde-Sender durch Drehen im Uhrzeigersinn an der Montageplatte. Ziehen Sie die Antenne so heraus, dass sie nach unten gerichtet ist.

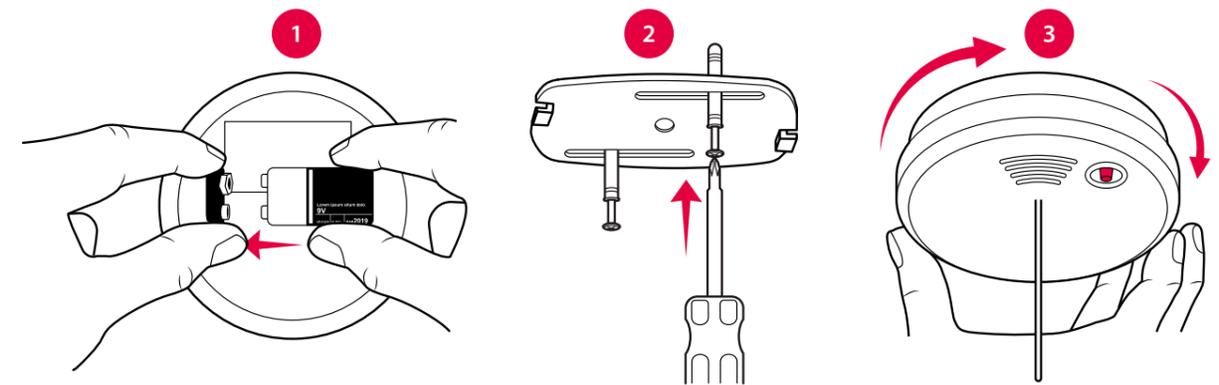


Prüfen der Verbindung

Mit der Prüftaste

- 1 Halten Sie die Prüftaste des Rauchmelde-Senders länger als eine Sekunde gedrückt. Der Rauchmelde-Sender gibt einen Piepton aus und überträgt ein Funksignal an den Empfänger.
- 2 Die rote Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Licht-, Ton- und/oder Vibrations-signale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Sobald Sie die Prüftaste des Rauchmelde-Senders loslassen, wird der Piepton nach einigen Sekunden ausgeschaltet.

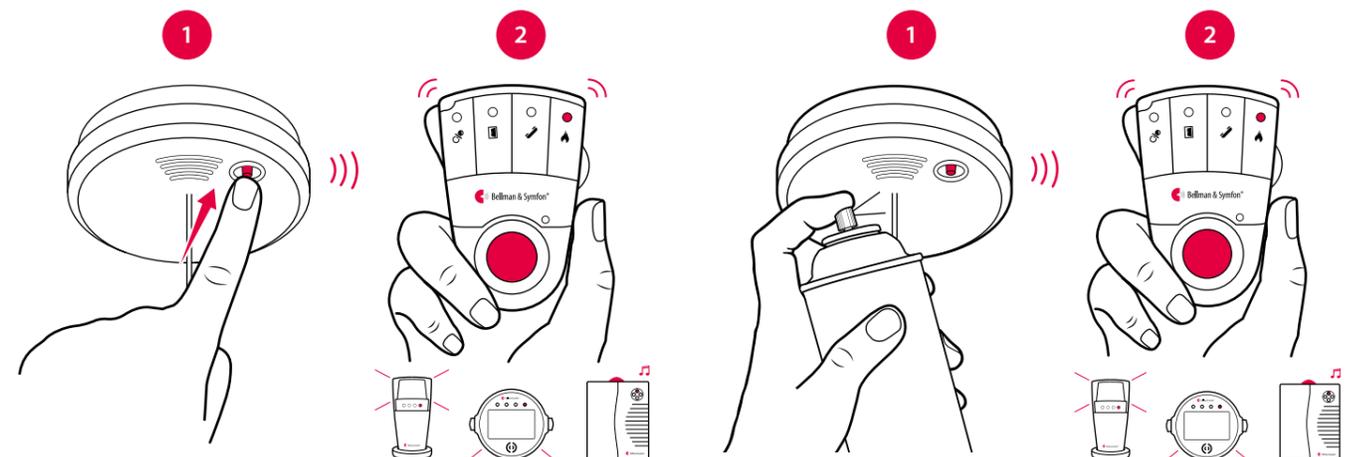

Mit dem Prüfaerosol-Spray für Rauchmelde-Sender

- 1 Sprühen Sie etwas Prüfaerosol-Spray in die Kammer und warten Sie fünf bis zehn Sekunden, bis der Rauchmelde-Sender einen Piepton ausgibt und ein Funksignal an den Empfänger sendet.
- 2 Die rote Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Licht-, Ton- und/oder Vibrations-signale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Der Rauchmelde-Sender gibt einen Piepton aus und sendet das Signal an den Empfänger, solange sich Aerosol in der Kammer des Rauchmelde-Senders befindet.

Visit Rauchmelde-Sender



BE1480

HMV 13.99.04.0040

Standardmäßiges Signalmuster

Die LED des Rauchmelde-Senders blinkt einmal pro Minute rot und zeigt damit an, dass er korrekt funktioniert. Je nach Alarm gibt es folgende Signalmuster:

| Rauchmelde-Sender | | | Empfänger-Signalmuster | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------|
| Alarmtyp | LED | Ton | LED | Ton | Vibration | Blitzlicht |
| ■ Feuer erkannt | Rotes Blinken | Feueralarm | Rotes Blinken | Feueralarm | Lang | ■□□ Ja |
| ■ Batterieladestand niedrig | 2× rotes Blinken | 1 Piepton pro Minute | Rotes Blinken alle 5 s | Kein Signal | Kein Signal | □□□□ Kein Signal |
| ■ Batterie leer | Rotes Blinken | 1 Piepton pro Sekunde | Rotes Blinken alle 5 s | 1× Feueralarm | Langsam | ■□□□ Kein Signal |

Verwendung des Broadcast-Modus

Wenn das Signal des Rauchmelde-Senders an alle Visit-Empfänger in Reichweite gesendet werden soll, müssen Sie den Broadcast-Modus aktivieren. Damit wird das Frequenzband außer Kraft gesetzt.

So aktivieren Sie den Broadcast-Modus:

- Stellen Sie den Funkfrequenzschalter Nr. 7 auf der Rückseite des Rauchmelde-Senders auf die obere Position (Ein), um den Broadcast-Modus zu aktivieren.

Hinweis: Aktivierung über die Prüftasten und Batteriewarnungen werden nur an Geräte mit demselben Frequenzband übertragen.

Verwendung des Toaster-Modus

Um Fehlalarme z. B. beim Kochen zu vermeiden, können Sie die Empfindlichkeit des Rauchmelde-Senders vorübergehend verringern.

So aktivieren Sie den Toaster-Modus:

- Drücken Sie kurz die Prüftaste. Der Rauchmelde-Sender gibt einen Piepton aus und blinkt zweimal gelb. Im Toaster-Modus blinkt die LED dauerhaft rot.
- Drücken Sie erneut die Prüftaste, um den Toaster-Modus zu deaktivieren. Der Rauchmelde-Sender gibt einen Piepton aus und blinkt dreimal gelb.

Hinweis: Nach zwanzig Minuten schaltet sich der Toaster-Modus automatisch aus.


Montageort und Anbringung

Befestigen Sie den Rauchmelde-Sender in der Mitte der Decke (außer in Schlafzimmern), wobei ein Mindestabstand von 50 cm zur Wand eingehalten werden muss. Wenn mehrere Schlafzimmer im Haus verteilt sind, empfehlen wir jeweils eigene Rauchmelde-Sender. Installieren Sie in mehrstöckigen Gebäuden mindestens einen Rauchmelde-Sender pro Etage.

Vermeiden Sie Küchen, Kamine und Garagen als Installationsorte, da Küchendunst, Wärmeentwicklung von Feuerstätten (wie Kamine) und Autoabgase zu Fehlalarmen führen können. Der Rauchmelde-Sender darf nicht in Feuchträumen, in der Nähe von Belüftungen/Ventilatoren oder in landwirtschaftlichen Gebäuden installiert werden.

Prüfung und Wartung

Führen Sie regelmäßig Überprüfungen des/der Rauchmelde-Sender/s durch, am besten einmal pro Woche (z. B. beim Putzen), aber mindestens einmal pro Monat. Prüfen Sie das Gerät immer umgehend nach Phasen längerer Abwesenheit (z. B. nach dem Urlaub). Mit einem feuchten Tuch reinigen. Saugen Sie Ihren Rauchmelde-Sender bei jedem Batteriewechsel mit einem weichen Bürstenaufsatz des Staubsaugers aus. Rauchmelde-Sender niemals überstreichen!

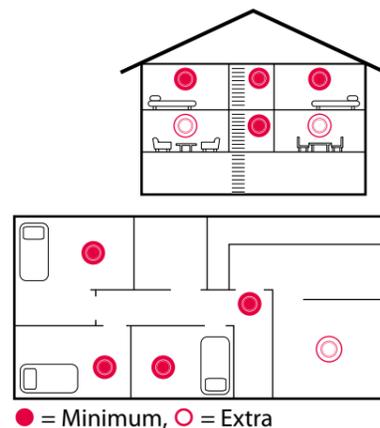


Frequenzband ändern


Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich auf der Rückseite des Rauchmelde-Senders.

So ändern Sie das Frequenzband:

- 1 Entfernen Sie die Montageplatte und stellen Sie einen der sechs Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein), um das Frequenzband zu ändern.
- 2 Halten Sie die Prüf-/Funktionstaste des Empfängers solange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Halten Sie die Prüftaste des Rauchmelde-Senders länger als eine Sekunde gedrückt, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

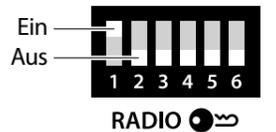

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten das gleiche Frequenzband eingestellt sein. Wenn der Broadcast-Modus aktiviert ist, reagieren alle Visit-Empfänger unabhängig von den Frequenzbandeinstellungen.

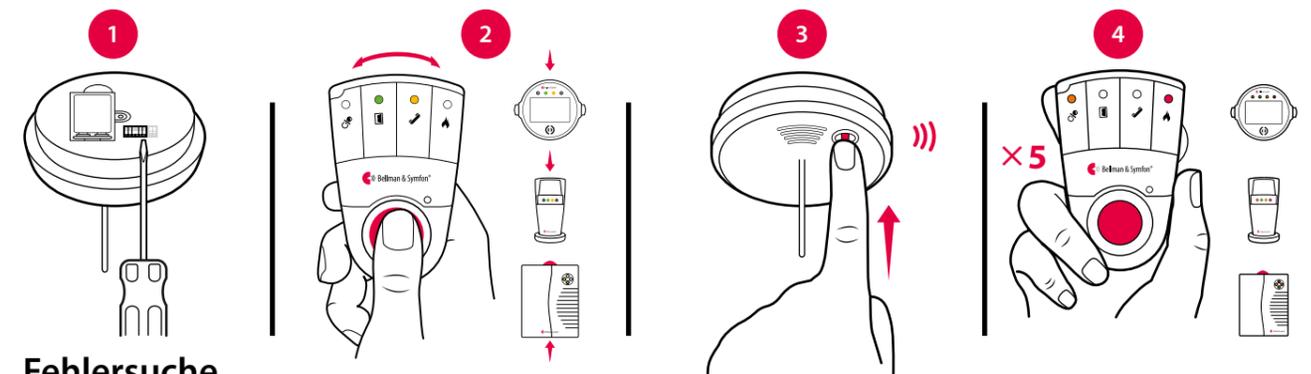


Fehlersuche

Die meisten Probleme lassen sich mit den nachstehenden Ratschlägen schnell beheben.

| Problem | Lösung |
|---|--|
| Es passiert nichts, wenn ich die Prüftaste drücke. | ■ Tauschen Sie die Batterie des Rauchmelde-Senders aus. Verwenden Sie eine Batterie vom Typ Duracell MN1604, Energizer 522 oder Ultralife U9VL-J. |
| Der Rauchmelde-Sender gibt einen Piepton aus, wenn ich die Prüftaste drücke, aber der Empfänger reagiert nicht. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stellen Sie sicher, dass die Antenne des Rauchmelde-Senders gerade nach unten ausgerichtet ist. ■ Überprüfen Sie die Batterien von Rauchmelde-Sender und Empfänger sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. ■ Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Rauchmelde-Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ■ Stellen Sie sicher, dass die Geräte auf das gleiche Frequenzband eingestellt sind, siehe Frequenzband ändern. |
| Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tauschen Sie die Batterie aus. Verwenden Sie eine Batterie vom Typ Duracell MN1604, Energizer 522 oder Ultralife U9VL-J. ■ Wenn das Problem weiter besteht, ist vermutlich in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern. |
| Der Empfänger gibt ohne ersichtlichen Grund Pieptöne aus. | ■ Der Rauchmelde-Sender ist defekt und muss zur Reparatur eingeschickt werden. |



Tasten und Bedienelemente

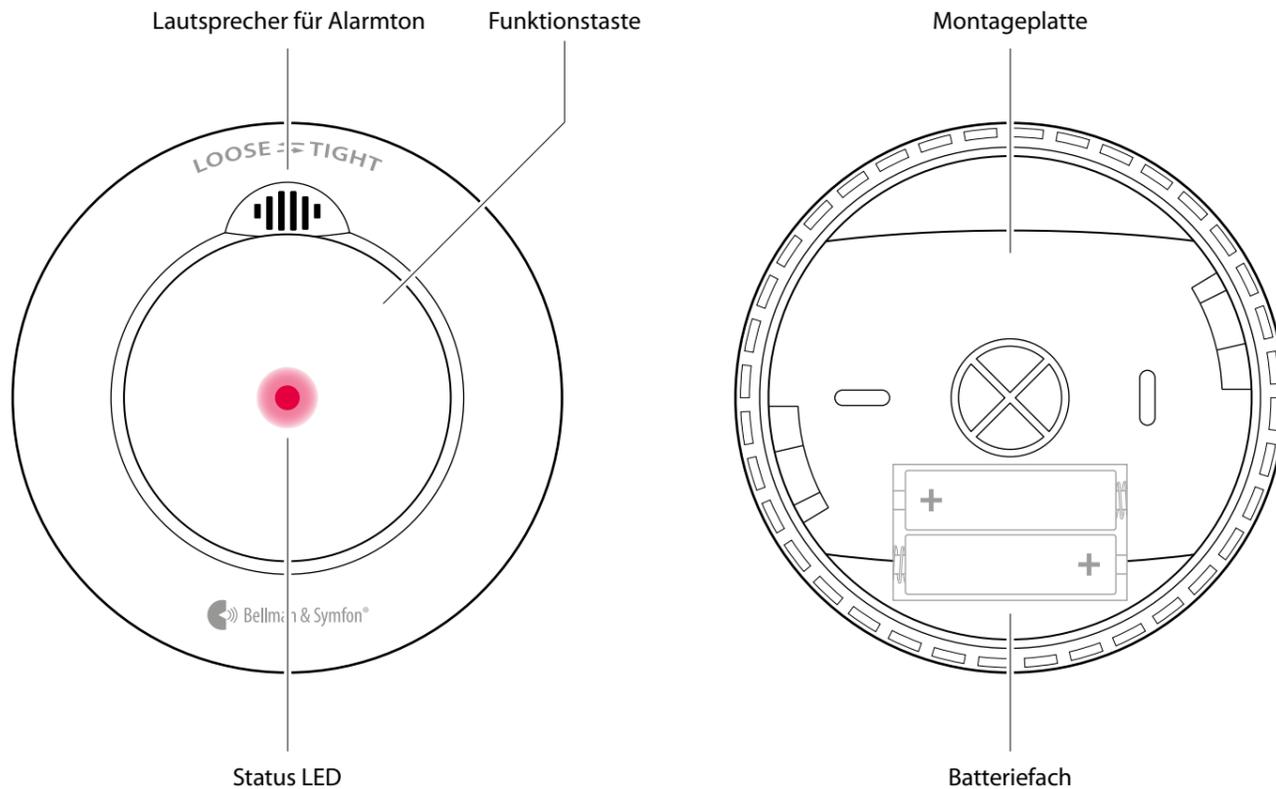

Technische Daten

Lieferumfang

- BE1481 Visit Rauchmelder
- 2 × 1,5V AA Lithiumbatterien
- 2 × Schrauben- und Dübelset
- Montageplatte
- Bedienungsanleitung

Strom und Batterie

- Batteriespannung
2 × 1,5V AA Energizer Lithium L91
- Stromverbrauch
Aktiv < 75 mA
Standby < 15 µA
- Batterielaufzeit
Minimum 5 Jahre

Maße und Gewicht

- Durchmesser: 120 mm
- Höhe: 37 mm
- Gewicht: 165 g, inkl. Batterien

Sensor

- Optothermale Rauch- und Hitzeerkennung Min 85 dB(A) @ 3m, Tonfrequenz: 3.2 kHz

Aktivierung

- Durch Funktionstaste (Test)
- Über den Rauchmelder
Rauchempfindlichkeit:
0.115 – 0.168 dB/m
- Über den Hitzemelder
Hitzeempfindlichkeit: 62 °C (+/- 8 °C)

Frequenz und Reichweite


- Frequenzband
868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 200 m (freies Feld).
Abhängig von den Eigenschaften des Gebäudes und der Kombination von Sendern und Empfängern.

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur:
4 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit:
15% bis 95%
(nicht kondensierend)

Installation des Rauchmelders


- 1 Entfernen Sie die Halterung vom Rauchmelder durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und setzen Sie die Batterien ein.
- 2 Befestigen Sie die Montageplatte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel an der Zimmerdecke. Stellen Sie sicher, dass sich der Rauchmelder mindestens 50 cm von Wänden und anderen Hindernissen entfernt befindet, siehe **Montageort und Anbringung**.
- 3 Bringen Sie den Rauchmelder an der Halterung an, indem Sie ihn bis zum Einrasten im Uhrzeigersinn drehen.

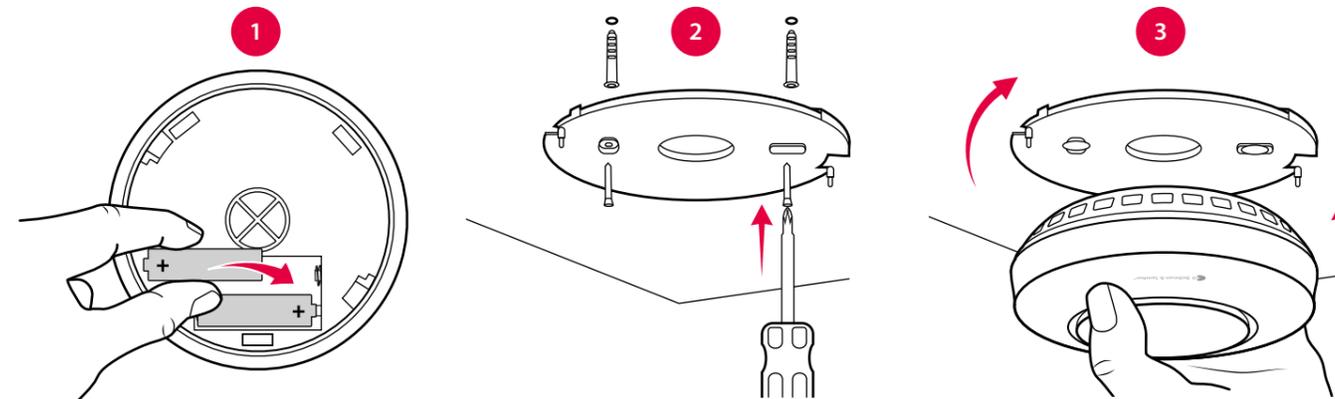

Montageort und Anbringung

Montieren Sie den Rauchmelder mittig an der Zimmerdecke der Schlafzimmer. Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zu Wänden ein. Es sollten in jedem Schlafzimmer/ Kinderzimmer und auf allen Fluchtwegen/Fluren Rauchmelder installiert sein. In Häusern mit mehreren Etagen ist mindestens ein Rauchmelder pro Etage/Flur erforderlich. Vorgaben der einzelnen Bundesländer beachten.


Rauchmelder sollten nicht in Küchen, in der Nähe von Kaminen oder Garagen angebracht werden, da Kochdämpfe und Abgase Fehlalarm auslösen können. Weiterhin dürfen Rauchmelder nicht in feuchten Räumen, in der Nähe von Ventilatoren, usw. oder in landwirtschaftlichen Gebäuden installiert werden.

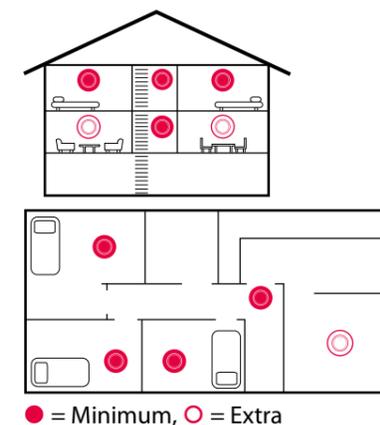

Prüfen der Verbindung

- 1 Halten Sie die Rauchmelder Funktionstaste gedrückt, bis der Alarm ertönt und die Statusanzeige zu blinken beginnt. Der Rauchmelder überträgt ein Funksignal an den Empfänger.
- 2 Die rote Visit LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Licht-, Ton- und/oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Der Rauchmelder erzeugt kurz nach dem Loslassen der Taste keinen Ton mehr und der Visit Empfänger schaltet sich in weniger als 1 Minute aus.

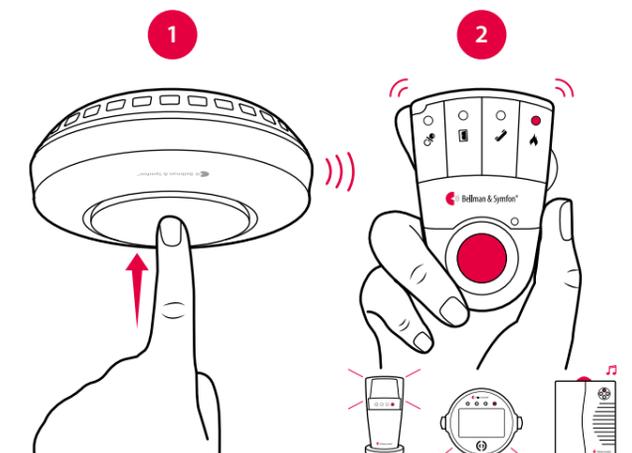



Signalmuster

Die Rauchmelder Statusanzeige blinkt alle 50 Sekunden rot und zeigt damit an, dass der Rauchmelder korrekt funktioniert. Je nach Alarmursache gibt es folgende Signalmuster:

| Rauchmelder | | | Empfänger Signalmuster | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| Ursache | Status LED | Ton | Visit LED | Ton | Vibration | Blitzlich |
| ▪ Rauch | Rotes Blinken | ■ ■ ■ ■ □ | Rotes Blinken | Feueralarm | Lang | Ja |
| ▪ Hitze | Rotes Blinken | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | Rotes Blinken | Feueralarm | Lang | Ja |
| ▪ Batterieladestand niedrig | Blinkt alle 50 s | Piept alle 50 s | Rotes Blinken | – | – | – |
| ▪ Gerät defekt | Blinkt alle 50 s | Piept alle 50 s | – | – | – | – |

Verwendung des Broadcast-Modus

Um ein Rauchmelder-Signal an *alle* Visit-Empfänger in Reichweite zu senden, aktivieren Sie den Broadcast-Modus.

Aktivierung des Broadcast-Modus

- Drücken Sie die Funktionstaste drei Mal in schneller Folge. Der Rauchmelder piept und blinkt drei Mal um anzuzeigen, dass der Broadcast-Modus aktiviert ist. Bitte beachten Sie, dass die Warnung für niedrigen Batterieladestand nur an Empfänger mit demselben Frequenzband übertragen wird. **Hinweis:** Im Broadcast-Modus kann der Alarm nicht mit Hilfe der Funktionstasten aktiviert werden. Verwenden Sie Rauchmelder-Aerosolspray.

Deaktivierung des Broadcast-Modus

- Drücken Sie die Funktionstaste drei Mal in schneller Folge. Der Rauchmelder gibt 2 Sekunden lang ein Ton- und Lichtsignal aus, um anzuzeigen, dass der Broadcast-Modus deaktiviert ist. Der Rauchmelder ist nun wieder auf das zuletzt gespeicherte Frequenzband eingestellt.

Stumm-Funktion

Verwendung der Stumm-Funktion

- Im Falle eines störenden Alarms halten sie die Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um sie vorübergehend stumm zu schalten. Die Statusanzeige blinkt zur Bestätigung alle 16 Sekunden rot auf. Aus Sicherheitsgründen stoppt der Stumm-Modus automatisch nach 10 Minuten.

Prüfung und Wartung

Überprüfen Sie den Rauchmelder und die Funkverbindung regelmäßig, vorzugsweise einmal wöchentlich, z.B. während des Saubermachens, mindestens jedoch einmal monatlich. Überprüfen Sie Rauchmelder unmittelbar nach einem Urlaub oder längerer Abwesenheit. Reinigen Sie den Rauchmelder mit einem feuchten Tuch und saugen Sie ihn mit einem weichen Bürstenaufsatz ab. Streichen Sie nicht mit Farbe über den Rauchmelder.

| Problem | Lösung |
|--|---|
| Es passiert nichts, wenn ich die Rauchmelder-Funktionstaste drücke. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie, dass die Batterien ordnungsgemäß eingelegt sind. ▪ Tauschen Sie die Batterien des Rauchmelders aus. Verwenden Sie ausschließlich AA Energizer Lithium L91 Batterien. ▪ Überprüfen Sie das Alter des Rauchmelders, beachten Sie das Etikett "Austauschdatum" auf dem Melder. |
| Der Rauchmelder piepst beim Drücken der Funktionstaste, aber der Visit-Empfänger reagiert nicht. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie die Batterien des Rauchmelders und des Visit-Empfängers und die Verbindungen. ▪ Verringern Sie den Abstand zwischen Visit-Empfänger und Rauchmelder um sicherzustellen, dass sie in der vorgegebenen Reichweite sind. ▪ Stellen Sie sicher, dass die Geräte auf dasselbe Frequenzband eingestellt sind, siehe Frequenzband ändern. |
| Der Visit-Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie, ob Dampf oder Rauch aus Küche oder Bad die Ursache des Fehlalarms sein können. ▪ Überprüfen Sie die Visit LED Signale für geringen Batterieladestand. Wenn sie blinken, wechseln Sie die Batterien des Rauchmelders. ▪ Wenn das Problem weiter besteht, ist vermutlich in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern. ▪ Überprüfen Sie, ob ein anderer Sender in Reichweite im Broadcast-Modus arbeitet. |
| Der Rauchmelder gibt ohne ersichtlichen Grund Pieptöne aus | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigen Sie den Rauchmelder von Spinnweben und Staub. Sollte das Problem weiterhin bestehen, tauschen Sie den Rauchmelder aus, bzw. wenden Sie sich an Ihren Fachhändler zur Überprüfung. |



Frequenzband ändern


Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes Bellman & Symfon System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Interferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern.

Systeme mit unterschiedlichen Arten von Sendern

Ändern Sie zunächst das Frequenzband an allen **anderen** Sendern im System mit den Radio.DIP.Schaltern, siehe die entsprechende Bedienungsanleitung. Denken Sie daran, dass an allen Visit.Sendern dasselbe Frequenzband eingestellt sein muss, um als Gruppe funktionieren zu können.


Schritt 1: Ändern des Frequenzbands vom BE1481 Rauchmelder

- 1 Zum Ausschalten des Rauchmelders entfernen Sie eine der Batterien und warten mindestens 30 Sekunden lang. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt während Sie die Batterie wieder einlegen. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt, bis die Statusanzeige zu blinken beginnt. Lassen Sie nun die Funktionstaste los. Die Statusanzeige blinkt schnell und zeigt damit an, dass der Rauchmelder bereit ist, das neue Frequenzband zu empfangen.
- 2 Drücken Sie innerhalb von 25 Sekunden die Funktionstaste eines **beliebigen anderen** Senders, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 3 Die Statusanzeige des Rauchmelders leuchtet konstant um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Drücken Sie die Funktionstaste zum Speichern des neuen Frequenzbands und um den Programmiermodus zu verlassen.

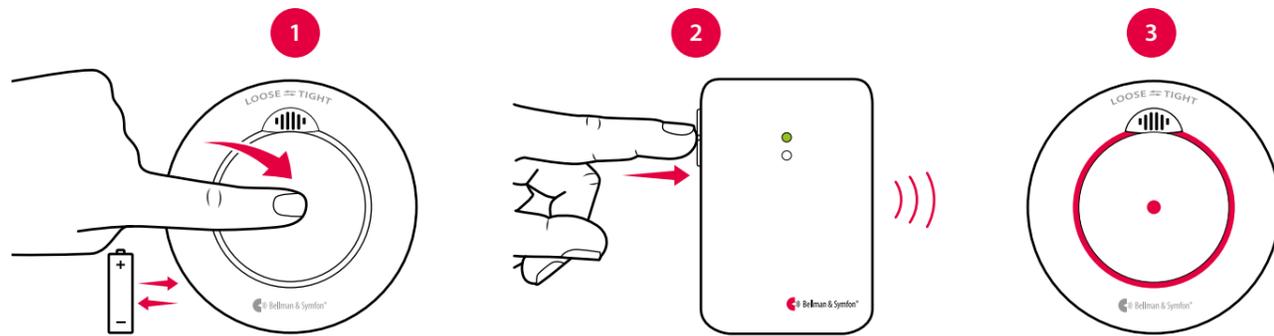

Schritt 2: Ändern des Frequenzbands von Visit-Empfängern

- 1 Halten Sie die Testtaste des Empfängers solange gedrückt bis die grüne und gelbe Visit LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Testtaste los.
- 2 Drücken Sie innerhalb von 25 Sekunden die Funktionstaste eines beliebigen Rauchmelders, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 3 Alle Visit LEDs am Empfänger blinken fünf Mal um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde.

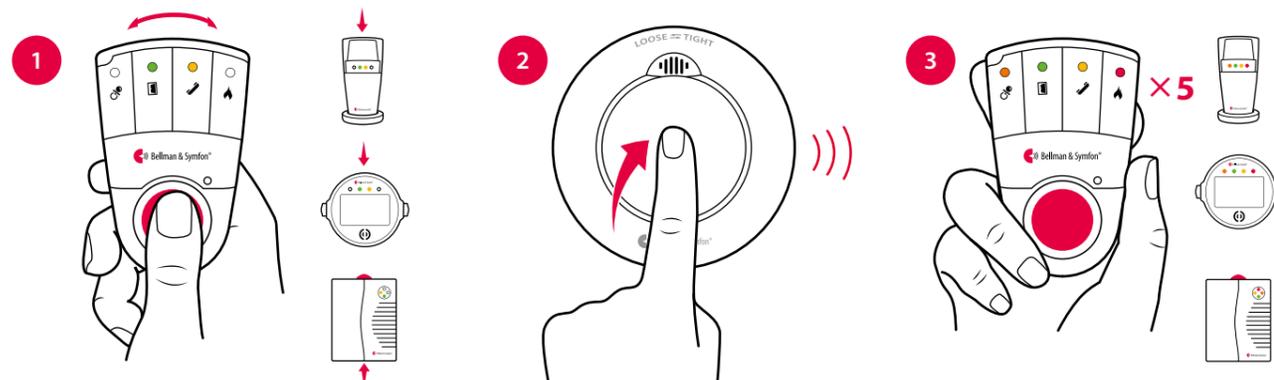


Frequenzband ändern

Systeme ausschließlich mit BE1481 Rauchmelder


Schritt 1: Ändern des Frequenzbands vom BE1481 Rauchmelder

- 1 Zum Ausschalten des Rauchmelders entfernen Sie eine der Batterien und warten Sie mindestens 30 Sekunden lang. Halten Sie die Funktionstaste während Sie die Batterie wieder einsetzen gedrückt. Halten Sie die Funktionstaste weiterhin gedrückt. Die Statusanzeige blinkt drei Mal bevor sie für 3 Sekunden schnell zu blinken beginnt. Lassen Sie die Funktionstaste innerhalb dieser 3 Sekunden los, um in den Programmiermodus zu wechseln.
- 2 Der Rauchmelder wird auf das Standard Frequenzband 0 gesetzt. Die LED leuchtet 4 Sekunden lang auf. Drücken sie innerhalb dieser 4 Sekunden die Funktionstaste und halten Sie sie gedrückt, um das nächste Frequenzband auszuwählen.
- 3 Frequenzband 1 ist jetzt ausgewählt. Zur Bestätigung erlischt die Statusanzeige kurz bevor sie wieder leuchtet. Drücken Sie die Funktionstaste innerhalb von 4 Sekunden, um zum nächsten Frequenzband zu wechseln. Es stehen 9 Frequenzbänder zur Auswahl. Wenn Sie nach Frequenzband 9 weitere auswählen wollen, wird das Gerät auf Frequenzband 0 zurückgesetzt.
- 4 Nach 4 Sekunden verlässt der Rauchmelder automatisch den Programmiermodus und die Statusanzeige erlischt. Führen Sie die oben genannten Schritte aus, um das Frequenzband an allen BE1481 Rauchmeldern in Ihrem Visit-System zu ändern.

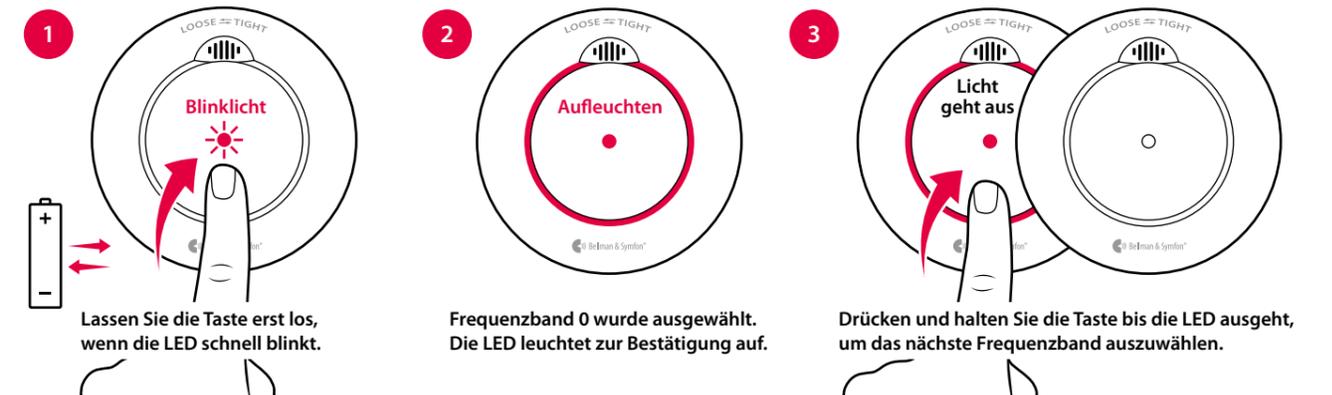


Schritt 2: Ändern des Frequenzbands von Visit-Empfängern

- 1 Halten Sie die Testtaste des Empfängers solange gedrückt, bis die grüne und gelbe Visit LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Testtaste los.
- 2 Drücken Sie innerhalb von 25 Sekunden die Funktionstaste eines beliebigen Rauchmelders, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 3 Alle Visit LEDs am Empfänger blinken fünf Mal um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde.

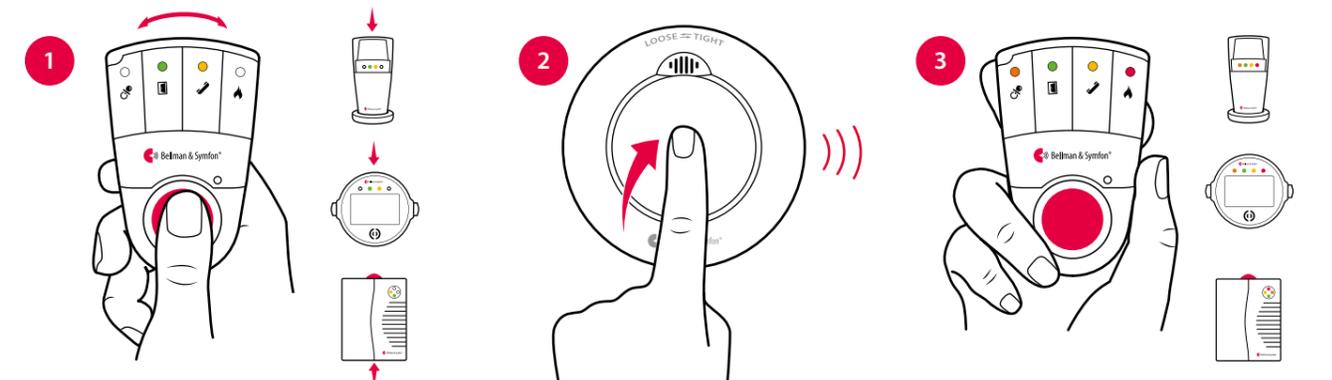

Visit Tischblitzlampe

Tasten und Steuerelemente

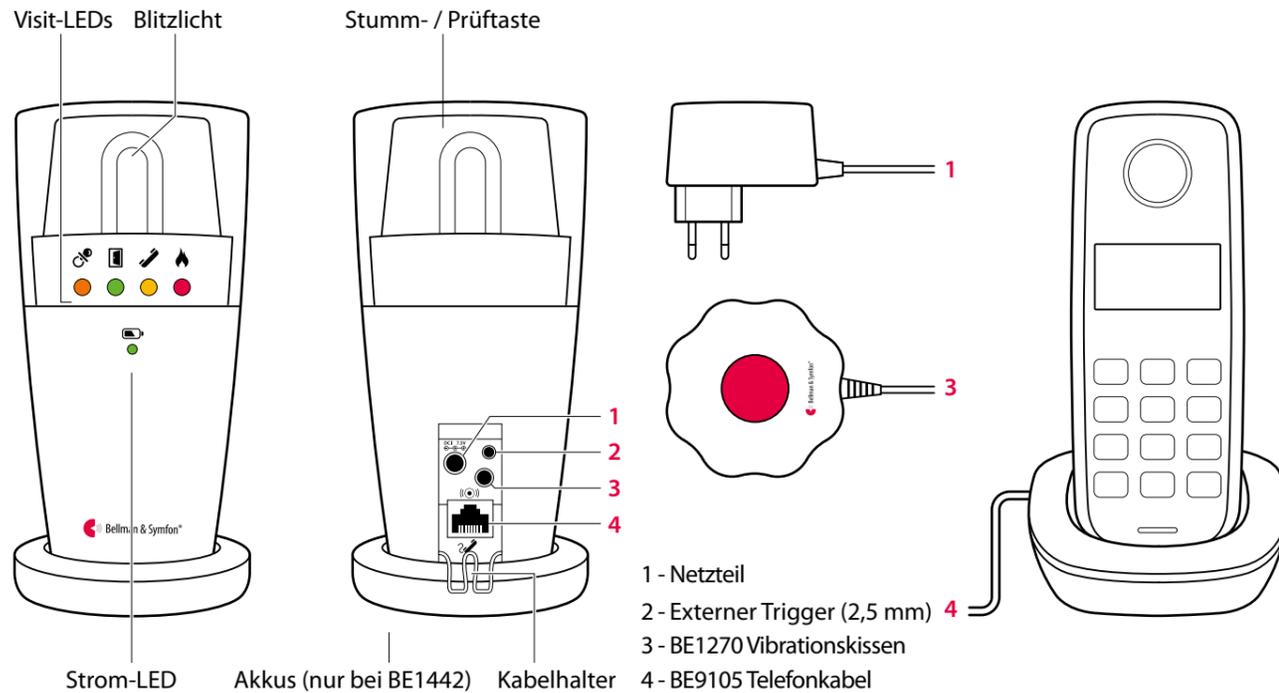

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1441 Tischblitzlampe oder BE1442 Tischblitzlampe mit Ausfall-Akku
- Stromversorgung
- 4 × Akkus (1,2 V; AAA; NiMH) (nur Modell BE1442)

Strom und Akku

- Netzstrom: 7,5 V DC / 1500 mA
Externes Netzteil
- Stromverbrauch: Aktiv: 750 mA, Ruhezustand: 8 mA
- Ausfall-Akkus (nur Modell BE1442)
4 × Akkus (1,2 V AAA NiMH)
- Betriebsdauer der Akkus ca. 48 h, wenn vollständig geladen

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit:
15% bis 90% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

- Höhe BE1441: 140 mm
BE1442: 155 mm
- Durchmesser BE1441: 70 mm
BE1442: 78 mm
- Gewicht 308 g

Visit-LEDs

Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol
Der Tür-Sender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefon-Sender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelde-Sender wurde aktiviert
- Die orangenen und roten LEDs blinken abwechselnd
Der CO-Alarm ist aktiviert

Zubehör

- BE9075 Wandhalterung
- BE1270 Vibrationskissen
- BE9105 Telefonkabel

Frequenz und Reichweite

- Frequenzband:
868,30 MHz
- Reichweite:
50 – 250 m abhängig von den Eigenschaften des Gebäudes und der Kombination von Sendern und Empfängern

Ausgang

- Integriertes Xenon-Licht mit ca. 30 Candela

Warnung! Blitzlichter können epileptische Anfälle hervorrufen.

Visit Tischblitzlampe


BE1441 | BE1442

HMV 13.99.04.2019 / HMV 13.99.04.2017



Erste Schritte

- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Empfänger und schließen Sie es an eine Steckdose an. Ziehen Sie die Batterielasche an der Unterseite heraus (nur BE1442). Stellen Sie den Empfänger auf einer flachen, ebenen Oberfläche auf oder installieren Sie ihn mit dem Wandhalterungs-Zubehör an der Wand (siehe separate Anweisungen).
- Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie einen Visit-Sender. Drücken Sie die Prüftaste/n des Senders.
- Am Empfänger leuchtet eine Visit-LED auf und der Empfänger beginnt, zu blinken. Wenn ein Vibrationskissen angeschlossen ist, vibriert dieser Alarm. Durch kurzes Drücken der Stumm-/Prüftaste wird die letzte Signalausgabe wiederholt. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

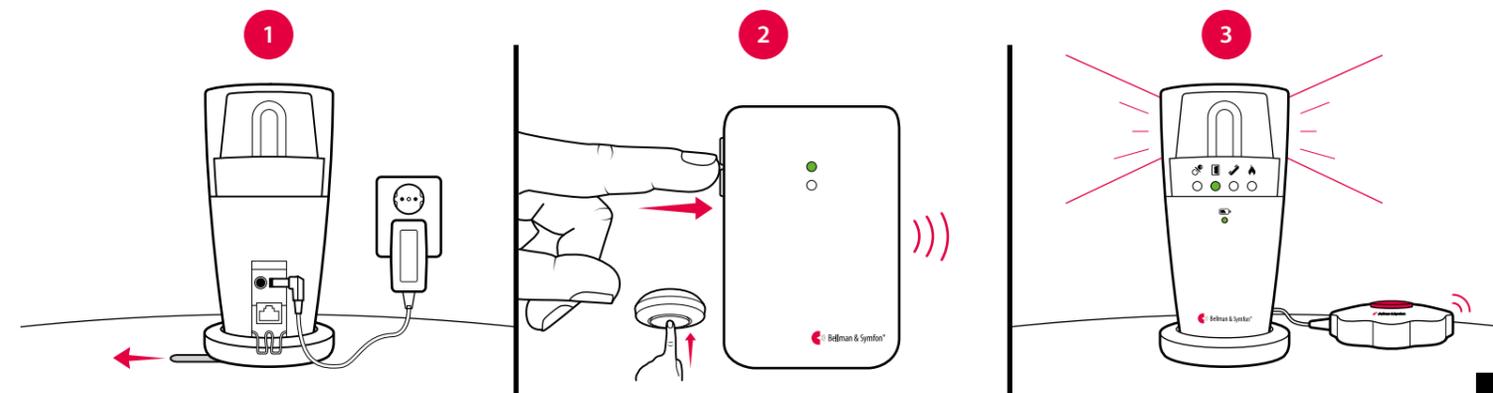

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn ein Sender aktiviert wird, leuchtet eine LED an der Tischblitzlampe auf und das Vibrationskissen beginnt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, das standardmäßig wie folgt eingestellt ist:

| Sender | Tischblitzlampe | | Vibrationskissen |
|--|-----------------|------------|------------------|
| Aktivierte Quelle | Visit-LED | Blitzlicht | Vibration |
| Tür-Sender / Druckknopf-Sender | Grün | Ja | Langsam ■■■■ |
| Telefon-Sender / angeschlossenes Telefon | Gelb | Ja | Mittel ■■■■ |
| Babyruf-Sender | Orange | Ja | Schnell ■■■■ |
| Rauchmelde-Sender | Rot | Ja | Lang ■■■■ |
| CO-Alarm | Orange und rot | Ja | Lang ■■■■ |

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann nur an den Sendern geändert werden. Siehe Signalmuster ändern für den jeweiligen Sender.

Strom-LED-Anzeigen

Wenn die Tischblitzlampe an den Netzstrom angeschlossen wird, leuchtet die Strom-LED grün auf. Das BE1442-Modell verfügt zudem über Ausfall-Akkus. Die Strom-LED zeigt Folgendes an:

Strom-LED

- Grünes Leuchten
- Grünes Blinken
- Rotes Leuchten
- Rotes Blinken

Status

- Die Tischblitzlampe ist an den Netzstrom angeschlossen. Ausfall-Akkus wurden erkannt.
- Die Tischblitzlampe ist an den Netzstrom angeschlossen. Es wurden keine Ausfall-Akkus erkannt.
- Die Tischblitzlampe läuft auf Ausfall-Akkus.
- Die Ausfall-Akkus sind fast leer.



Visit Tischblitzlampe


Frequenzband ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich an den Sendern.

So ändern Sie das Frequenzband:

- 1 Siehe **Frequenzband ändern** für den jeweiligen Sender um das Frequenzband zu ändern.
- 2 Halten Sie die Stumm-/Prüftaste auf der Oberseite des Senders so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Empfänger die Prüftaste/n, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dasselbe Frequenzband eingestellt sein.

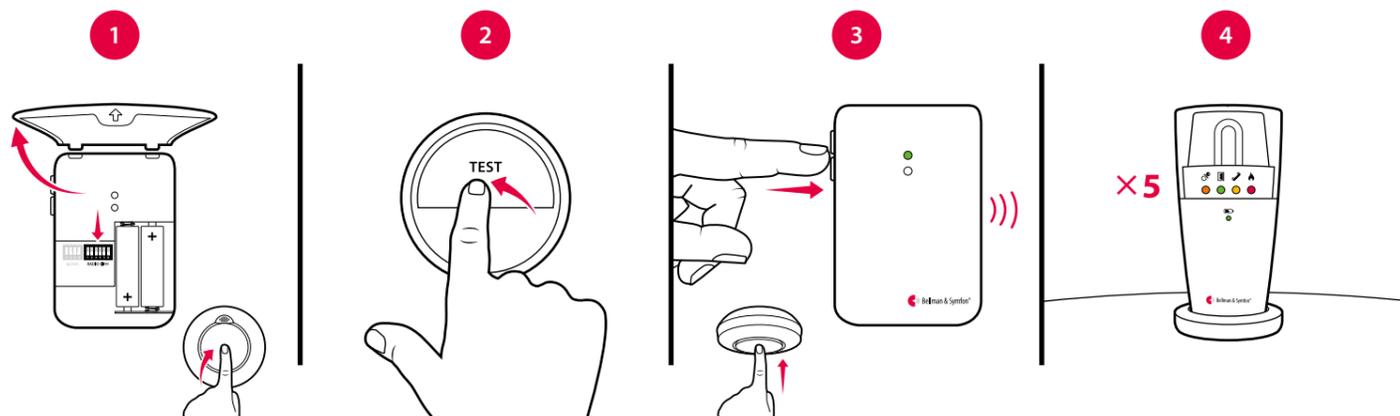

Zubehör

Die Tischblitzlampe kann mit dem folgenden Zubehör ergänzt werden:

- **BE1270 Vibrationskissen**
Weckt Sie mit Vibrationen unter dem Kissen oder der Matratze.
- **BE9105 Telefonkabel**
Mit dem Kabel können Sie den Empfänger mit Ihrem Festnetztelefon verbinden und sich so mit Blitzlichtsignalen benachrichtigen lassen, wenn das Telefon klingelt.
- **BE9075 Wandhalterung**



Blitzlicht ausrichten

Der Kopf der Tischblitzlampe ist drehbar, was eine einfache Ausrichtung des Lichts ermöglicht. So können Sie das Blitzlicht z. B. gegen eine Wand richten, wenn Sie es als zu stark empfinden. Für die Tischblitzlampe ist ebenfalls ein Silikon-Überzug in verschiedenen Farben erhältlich (Art.-Nr.: BE9164-BE9167).

Erweiterte Programmierung

Mit der erweiterten Programmierung können Sie das Signalmuster eines bestimmten Senders und für ein bestimmtes Ereignis sowie die angezeigten LED-Farben und das Vibrations-Signalmuster individuell nach Belieben anpassen. Die erweiterte Programmierung setzt das Frequenzband außer Kraft und verbindet die Geräte anhand der Seriennummer. Bitte beachten Sie, dass Rauchmelde- und CO-Sender aus Sicherheitsgründen nicht programmiert werden können.

Hinweis: Der Sender muss aktiviert werden, da er innerhalb des Systems darauf ausgelegt ist, das richtige Signal zu erzeugen. Dies bedeutet, dass Sie nicht immer die Sender-Prüftaste verwenden können (siehe **Standardmäßiges Signalmuster** für den jeweiligen Sender).

So programmieren Sie den Empfänger:

- 1 Halten Sie die Stumm-/Prüftaste des Empfängers gedrückt. Die grüne und die gelbe Visit-LED beginnen, abwechselnd zu blinken. Aktivieren Sie wie vorgesehen den gewünschten Sender, während Sie die Taste weiterhin gedrückt halten. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Blättern Sie durch die verschiedenen **Visit-LED-Optionen**, indem Sie am Empfänger die Stumm-/Prüftaste drücken. Wählen Sie die gewünschte Visit-LED-Farbe aus, indem Sie die Stumm-/Prüftaste so lange gedrückt halten, bis die Strom-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 3 Blättern Sie durch die verschiedenen **Vibrationssignal-Optionen**, indem Sie am Empfänger die Prüftaste drücken (Vibrationskissen erforderlich). Wählen Sie das gewünschte Vibrations-Signalmuster aus, indem Sie die Stumm-/Prüftaste so lange gedrückt halten, bis die Strom-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 4 Der Empfänger zeigt jetzt die neue Visit-LED-Farbe und das neue Vibrations-Signalmuster an. Drücken Sie kurz die Stumm-/Prüftaste, um die Demonstration zu beenden. Nach kurzer Zeit kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Erweiterte Programmierung löschen

Befolgen Sie das nachstehende Verfahren zum Löschen der erweiterten Programmierung.

- 1 Halten Sie die Stumm-/Prüftaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Drücken Sie die Stumm-/Prüftaste des Empfängers drei Mal in schneller Folge.
- 3 Alle LEDs blinken ca. zwei Sekunden lang und zeigen so an, dass die erweiterte Programmierung gelöscht wurde.

Fehlersuche


Die meisten Probleme lassen sich mit den nachstehenden Ratschlägen schnell beheben.

| Problem | Lösung |
|---|--|
| Der Empfänger scheint ausgeschaltet zu sein. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung (bzw. das Netzteil) richtig angeschlossen ist. ▪ Laden Sie die Ausfall-Akkus mindestens 24 Stunden lang auf (nur BE1442). |
| Die Strom-LED blinkt rot. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Ausfall-Akkus sind fast leer und die Stromversorgung (bzw. das Netzteil) ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzteil an und laden Sie die Ausfall-Akkus mindestens 24 Stunden lang auf. |
| Die Strom-LED blinkt grün. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Empfänger erkennt keine Ausfall-Akkus. Ziehen Sie an der Batterielasche, siehe Erste Schritte. |
| Der Empfänger reagiert nicht, wenn ein Sender aktiviert wird, funktioniert aber, wenn ich die Prüftaste drücke. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie die Batterien des Senders sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. ▪ Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ▪ Überprüfen Sie, ob der Empfänger auf dasselbe Frequenzband eingestellt ist wie die anderen Geräte im Visit-System, siehe Frequenzband ändern. |
| Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern. |
| Das Blitzlicht ist zu grell. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Richten Sie das Blitzlicht neu aus, indem Sie den Kopf schwenken, oder dämpfen Sie das Licht mit einem Silikon-Überzug. |



Visit tragbarer Empfänger

Tasten und Steuerelemente

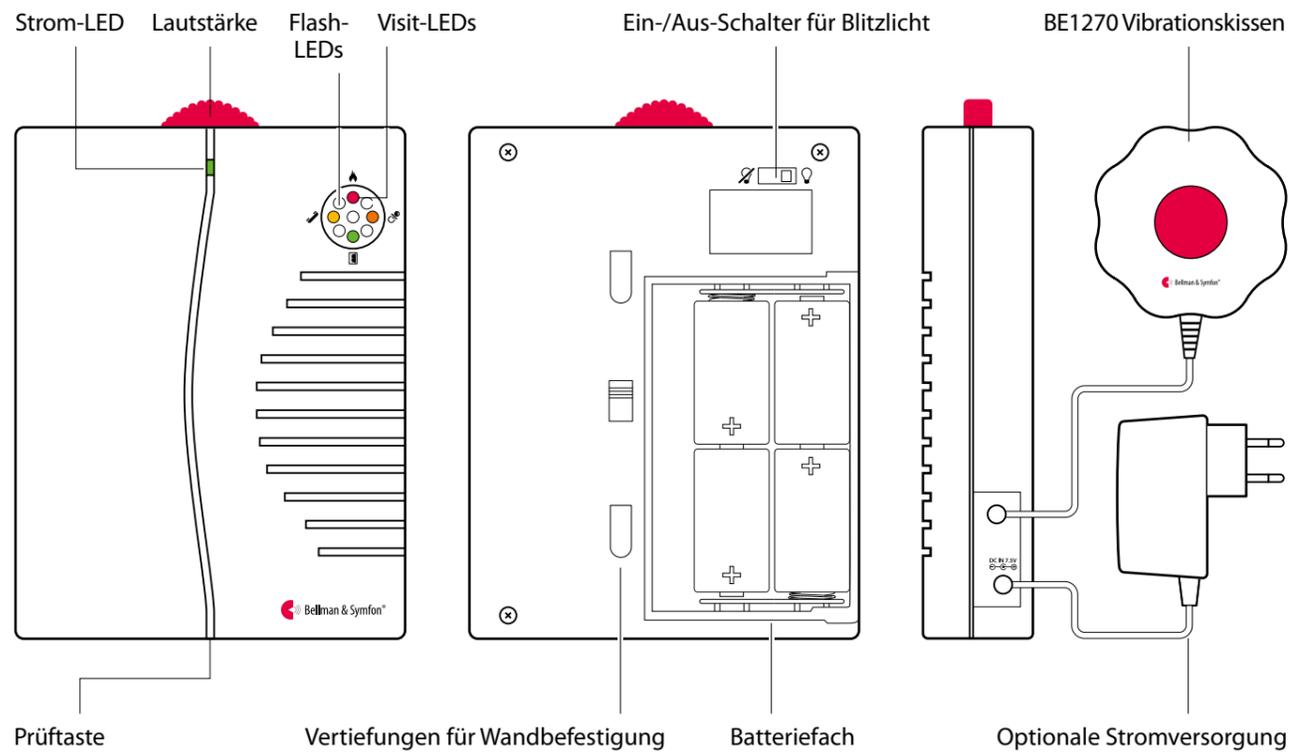

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1450 Tragbarer Empfänger
- 4 × Batterien (1,5 V; LR14)
- Wandhalterung
- Schrauben und Wanddübel

Strom und Batterie

- Netzstrom: 7,5 V DC / 1500 mA
Optionales Netzteil
- Batteriestrom: 4 × Alkaline-Batterien (1,5 V; LR14)
- Betriebsdauer: 2 bis 3 Jahre mit Alkaline-Batterien
- Stromverbrauch: Aktiv: 1000 mA, Ruhezustand: 0,1 mA

Zubehör

- BE1270 Vibrationskissen
- Bellman & Symfon Netzteil

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 165 mm
- Breite: 130 mm
- Tiefe: 36 mm
- Gewicht: 590 g, (inkl. Batterien)

Visit-LEDs

- Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:
- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
 - Grüne LED, Türsymbol
Der Tür-Sender wurde aktiviert
 - Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefon-Sender wurde aktiviert
 - Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelde-Sender wurde aktiviert
 - Die orangenen und roten LEDs blinken abwechselnd
Der CO-Alarm ist aktiviert

Ausgang

- Einstellbares Tonsignal
Max. 93 dBA bei 1 m, Frequenzbereich: 500 bis 1000 Hz
- Ausgang Vibrationskissen: 2,0 bis 4,0 VDC

Frequenz und Reichweite


- Frequenzband: 868,30 MHz
- Reichweite: 50 – 250 m abhängig von den Eigenschaften des Gebäudes und der Kombination von Sendern und Empfängern.

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 95% (nicht kondensierend)

Erste Schritte

- Schieben Sie das Batteriefach auf, legen Sie die Batterien ein und schließen Sie das Fach wieder. Stellen Sie den Empfänger auf einer flachen, ebenen Oberfläche auf oder installieren Sie ihn mit der beiliegenden Wandkonsole an der Wand.
- Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie einen Visit-Sender. Drücken Sie die Prüftaste/n des Senders.
- Am Empfänger leuchtet eine Visit-LED auf und der Empfänger beginnt, Blink- und Tonsignale auszugeben. Wenn ein Vibrationskissen angeschlossen ist, vibriert dieser Alarm. Durch kurzes Drücken der Prüftaste wird die letzte Signalausgabe wiederholt. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

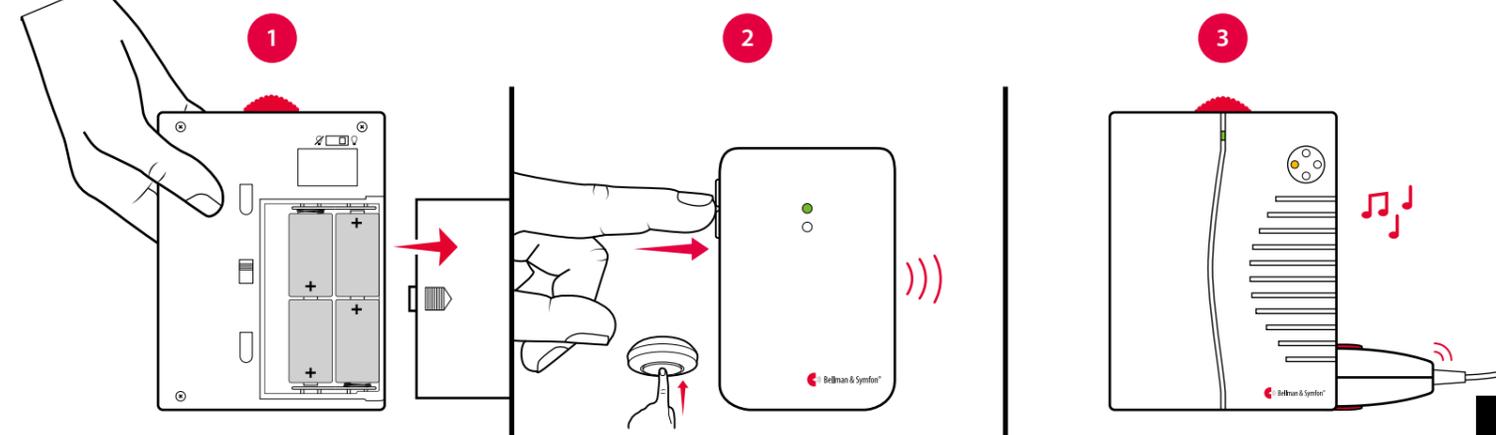

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn ein Sender aktiviert wird, leuchtet eine LED an der Tischblitzlampe auf, der Empfänger beginnt, Blitz- und Tonsignale auszugeben, und das Vibrationskissen beginnt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, das standardmäßig wie folgt eingestellt ist:

| Sender | Tragbarer Empfänger | | | Vibrationskissen |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|
| Aktivierte Quelle | Visit-LED | Ton | Blitzlicht | Vibration |
| Tür-Sender / Druckknopf-Sender | Grün | Türgong | Ja | Langsam ■□□□ |
| Telefon-Sender | Gelb | Klingelsignal | Ja | Mittel ■□■□ |
| Babyruf-Sender | Orange | Babymelodie | Ja | Schnell ■■■■■□ |
| Rauchmelde-Sender | Rot | Feueralarmsignal | Ja | Lang ■■■■□ |
| CO-Alarm | Orange und rot | Alarm Signal | Ja | Lang ■■■■□ |

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann nur an den Sendern geändert werden. Siehe **Signalmuster ändern** für den jeweiligen Sender.

Lautstärke und Blinklicht anpassen

Mit dem roten Lautstärkereglern auf der Oberseite des Empfängers können Sie die Lautstärke nach Wunsch anpassen. Die Lautstärke ist in einem Bereich von 0 bis 93 dBA (bei 1 m und einer Hauptfrequenz von 500 bis 1000 Hz) einstellbar. Mit dem Ein-/Aus-Schalter auf der Empfänger-Rückseite können Sie das Blitzlicht ein- und ausschalten.

Batterien ersetzen

- Wenn die Strom-LED bei Einschalten des Empfängers gelb leuchtet, sind die Batterien fast leer. So ersetzen Sie die Batterien:
- Schieben Sie die Batterieabdeckung auf. Tauschen Sie die alten Batterien durch vier neue Alkaline-Batterien (1,5 V; LR14) aus, siehe die Angaben des Batteriefachs für korrekte Positionierung.



Visit tragbarer Empfänger


Frequenzband ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich an den Sendern.

So ändern Sie das Frequenzband:

- 1 Siehe **Frequenzband ändern** für den jeweiligen Sender um das Frequenzband zu ändern.
- 2 Halten Sie die Prüftaste auf der Unterseite des tragbaren Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender die Prüftaste/n, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.


Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dasselbe Frequenzband eingestellt sein.

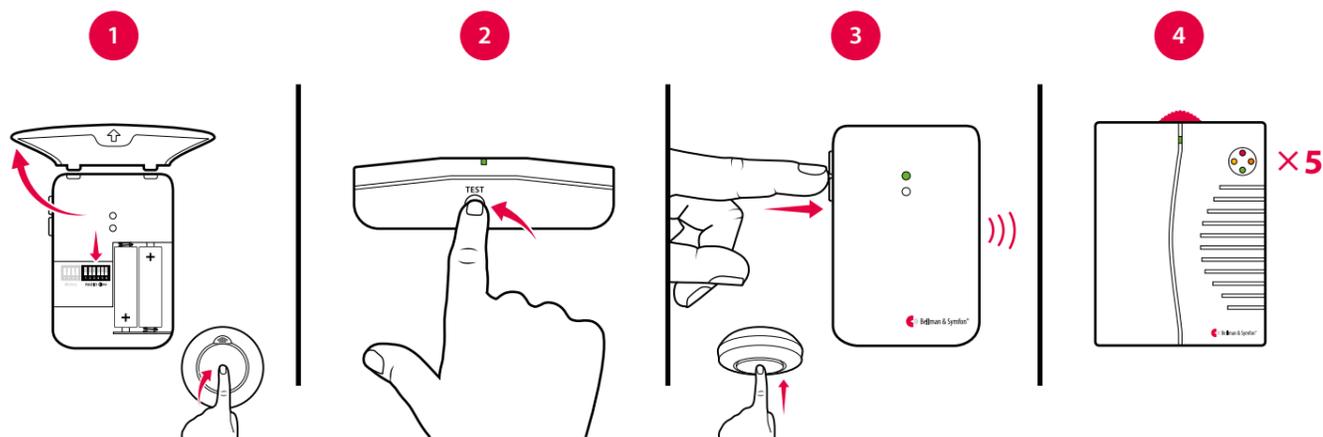

Zubehör

Der tragbare Empfänger kann mit dem folgenden Zubehör ergänzt werden:

- **BE1270 Vibrationskissen**
Weckt Sie durch Vibrationen, falls etwas passiert, während Sie schlafen. Schließen Sie das Vibrationskissen an den Empfänger an und schieben Sie es unter das Kopfkissen oder unter die Matratze Ihres Betts.
- **Bellman & Symfon Netzteil**
Wenn Ihr Empfänger immer am selben Platz steht, können Sie ihn an den Netzstrom anschließen und müssen sich keine Gedanken über Batterien machen.

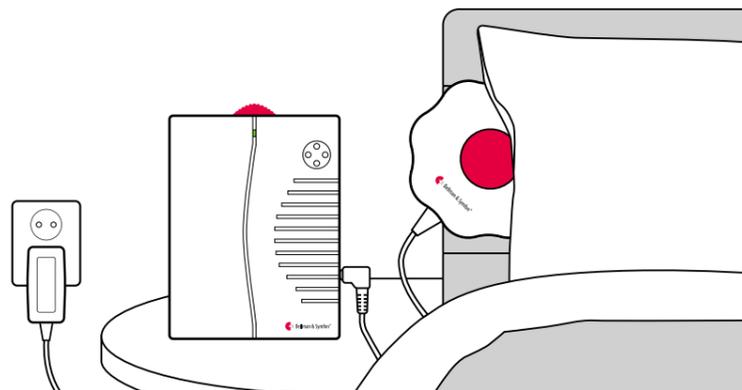

Erweiterte Programmierung

Mit der erweiterten Programmierung können Sie das Signalmuster eines bestimmten Senders und für ein bestimmtes Ereignis sowie die angezeigten LED-Farben und das Ton- und Vibrations-Signalmuster individuell nach Belieben anpassen. Die erweiterte Programmierung setzt das Frequenzband außer Kraft und verbindet die Geräte anhand der Seriennummer. Bitte beachten Sie, dass Rauchmelde-Sender und CO-Sender aus Sicherheitsgründen nicht programmiert werden können.

Hinweis: Der Sender muss aktiviert werden, da er innerhalb des Systems darauf ausgelegt ist, das richtige Signal zu erzeugen. Dies bedeutet, dass Sie nicht immer die Sender-Prüftaste verwenden können (siehe **Standardmäßiges Signalmuster** für den jeweiligen Sender).

So programmieren Sie den Empfänger:

- 1 Halten Sie die Prüftaste des Empfängers gedrückt. Die grüne und die gelbe Visit-LED beginnen, abwechselnd zu blinken. Aktivieren Sie wie vorgesehen den gewünschten Sender, während Sie die Taste weiterhin gedrückt halten. Die Strom-LED am Empfänger leuchtet gelb auf, um anzuzeigen, dass Sie sich im erweiterten Programmiermodus befinden. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Blättern Sie durch die verschiedenen **Visit-LED-Optionen**, indem Sie am Empfänger die Prüftaste drücken. Wählen Sie die gewünschte Visit-LED-Farbe aus, indem Sie die Prüftaste so lange gedrückt halten, bis die Strom-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 3 Blättern Sie durch die verschiedenen **Ton-Optionen**, indem Sie am Empfänger die Prüftaste drücken. Wählen Sie den gewünschten Ton aus, indem Sie die Prüftaste so lange gedrückt halten, bis die Strom-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 4 Blättern Sie durch die verschiedenen **Vibrationssignal-Optionen**, indem Sie am Empfänger die Prüftaste drücken (Vibrationskissen erforderlich). Wählen Sie das gewünschte Vibrations-Signalmuster aus, indem Sie die Prüftaste so lange gedrückt halten, bis die Strom-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 5 Der Empfänger zeigt jetzt die neue Visit-LED-Farbe sowie das neue Ton- und Vibrations-Signalmuster an. Drücken Sie kurz die Prüftaste, um die Demonstration zu beenden. Nach kurzer Zeit kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Erweiterte Programmierung löschen

Befolgen Sie das nachstehende Verfahren zum Löschen der erweiterten Programmierung.

- 1 Halten Sie die Prüftaste des Empfängers solange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Drücken Sie die Prüftaste des Empfängers drei Mal in schneller Folge.
- 3 Alle Visit-LEDs blinken ca. zwei Sekunden lang und zeigen so an, dass die erweiterte Programmierung gelöscht wurde.

Fehlersuche

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Der Empfänger scheint ausgeschaltet zu sein. | ▪ Die Batterien sind leer. Ersetzen Sie sie mit vier Alkaline-Batterien (1,5 V; LR14). |
| Bei Aktivierung des Empfängers leuchtet die Strom-LED gelb. | ▪ Der Batterieladestand ist niedrig. Ersetzen Sie sie mit vier Alkaline-Batterien (1,5 V; LR14). |
| Der Empfänger reagiert nicht, wenn ein Sender aktiviert wird, funktioniert aber, wenn ich die Prüftaste drücke. | ▪ Überprüfen Sie die Batterien des Senders sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. ▪ Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ▪ Überprüfen Sie, ob der Empfänger auf dasselbe Frequenzband eingestellt ist wie die anderen Geräte im Visit-System, siehe Frequenzband ändern . |
| Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert. | ▪ Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern . |
| Der Empfänger ist zu leise. | ▪ Stellen Sie die Lautstärke mit dem roten Lautstärkeregler auf der Oberseite des Empfängers lauter. |
| Der Empfänger gibt keine Blitzlicht-Signale aus. | ▪ Vergewissern Sie sich, dass der Blitzlichtsignal-Schalter auf der Rückseite des Geräts auf der ON- Position (= Ein) steht. |


Visit Pager-Empfänger



BE1470

HMV 13.99.04.4004

Tasten und Steuerelemente

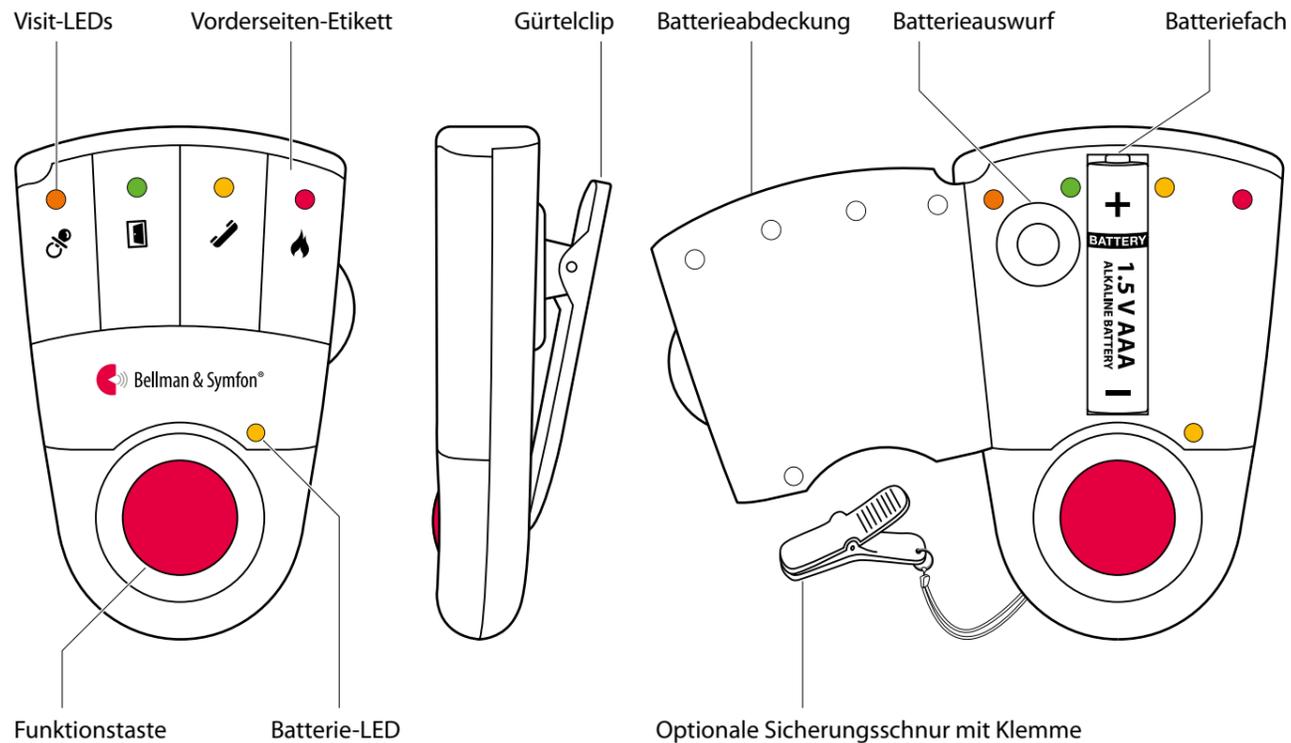

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1470 Visit Pager-Empfänger
- Sicherungsschnur mit Klemme
- Zweites Vorderseiten-Etikett
- Bedienungsanleitung

Strom und Batterie/Akku

- Netzstrom
7,5 V DC 1500 mA mit Ladegerät
- Batteriestrom
1 × Alkaline (1,5 V; AAA) oder nachladbarer NiMH-Akku (1,2 V; AAA)
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterie: 2 bis 3 Wochen
NiMH-Akku: ca. 1 Woche
- Stromverbrauch
Aktiv: 220 mA
Ruhezustand: ≤1 mA

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 86 mm
- Breite: 57 mm
- Tiefe: 29 mm
- Gewicht: 70 g, inkl. Batterien

Visit-LEDs

Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol
Der Tür-Sender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefon-Sender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelde-Sender wurde aktiviert
- Die orangenen und roten LEDs blinken abwechselnd
Der CO-Alarm ist aktiviert

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit:
15% bis 90% (nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite


- Frequenzband
868,30 MHz
- Reichweite
50 – 250 m abhängig von den Eigenschaften des Gebäudes und der Kombination von Sendern und Empfängern.

Zubehör

- BE1260 Pager-Ladegerät
- BE1270 Vibrationskissen

Erste Schritte

- Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie die Batterie ein und schließen Sie das Fach wieder. Befestigen Sie den Pager mit dem Gürtelclip an Ihrem Gürtel. Für zusätzliche Sicherung gegen Verlust können Sie die beiliegende Sicherungsschnur verwenden.
- Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie einen Visit-Sender. Drücken Sie die Prüftaste/n des Senders.
- Der Pager beginnt zu vibrieren und die Visit-LED leuchtet auf. Wenn während des Ladens ein Vibrationskissen angeschlossen ist, vibriert dieses. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

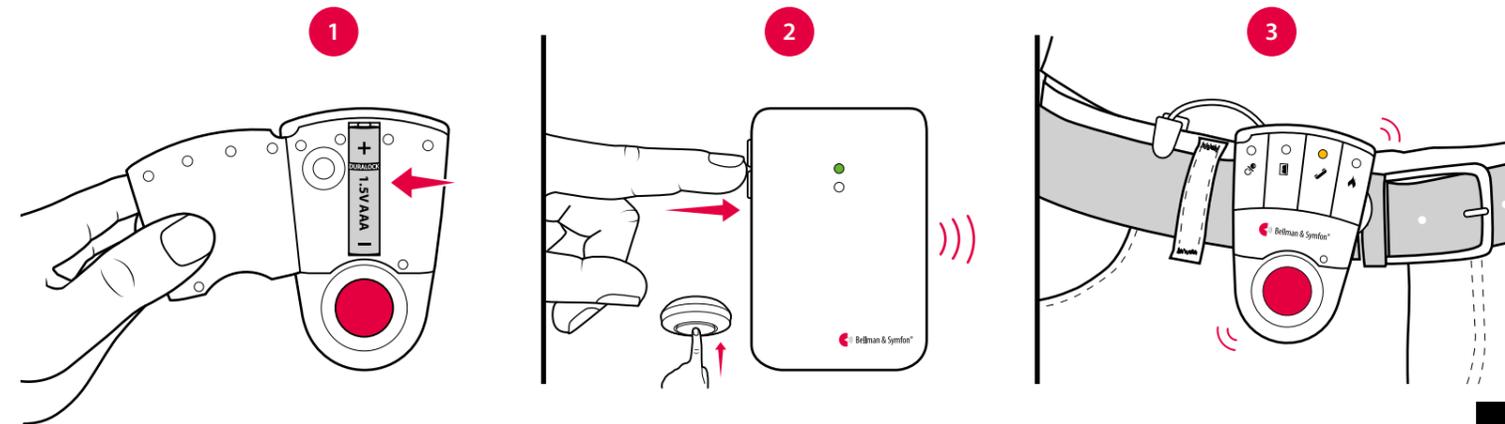

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn ein Sender aktiviert wird, leuchtet die LED am Pager auf und der Pager beginnt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, das standardmäßig wie folgt eingestellt ist:

Aktivierter Sender

- Tür-Sender
- Druckknopf-Sender
- Telefon-Sender
- Babyruf-Sender
- Rauchmelde-Sender
- CO-Alarm

Pager-LED

- Grün
- Grün
- Gelb
- Orange
- Rot
- Orange und rot

Pager- / Vibrationskissen Vibration

- Langsam ■□□□
- Langsam ■□□□
- Mittel ■□■□
- Schnell ■■■■■■
- Lang ■■■■□
- Lang ■■■■□

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann nur an den Sendern geändert werden. Siehe **Signalmuster ändern** für den jeweiligen Sender.

Vorderseiten-Etikett wechseln

Wenn Sie Visit für andere Zwecke verwenden möchten, können Sie das Vorderseiten-Etikett austauschen. So wechseln Sie das Etikett:

- Öffnen Sie das Batteriefach, ersetzen Sie das originale durch das beiliegende zweite Etikett und schließen Sie das Fach wieder.

Batterie ersetzen

Wenn die Batterie-LED beginnt, gelb zu blinken, ist die Batterie fast leer. So ersetzen Sie die Batterie:

- Öffnen Sie das Batteriefach und drücken Sie die Auswurfaste, um die Batterie zu entfernen. Legen Sie eine Alkaline-Batterie (1,5 V; AAA) oder einen nachladbaren NiMH-Akku (1,2 V; AAA) ein, wenn Sie das Ladegerät BE1260 verwenden.

Hinweis: Nutzen Sie niemals eine Batterie und das Ladegerät gleichzeitig.



Visit Pager-Empfänger


Frequenzband ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich an den Sendern.

So ändern Sie das Frequenzband:

- 1 Siehe **Frequenzband ändern** für den jeweiligen Sender um das Frequenzband zu ändern.
- 2 Halten Sie die Funktionstaste des Pagers solange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender die Prüftaste/n, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 4 Am Pager blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dasselbe Frequenzband eingestellt sein.

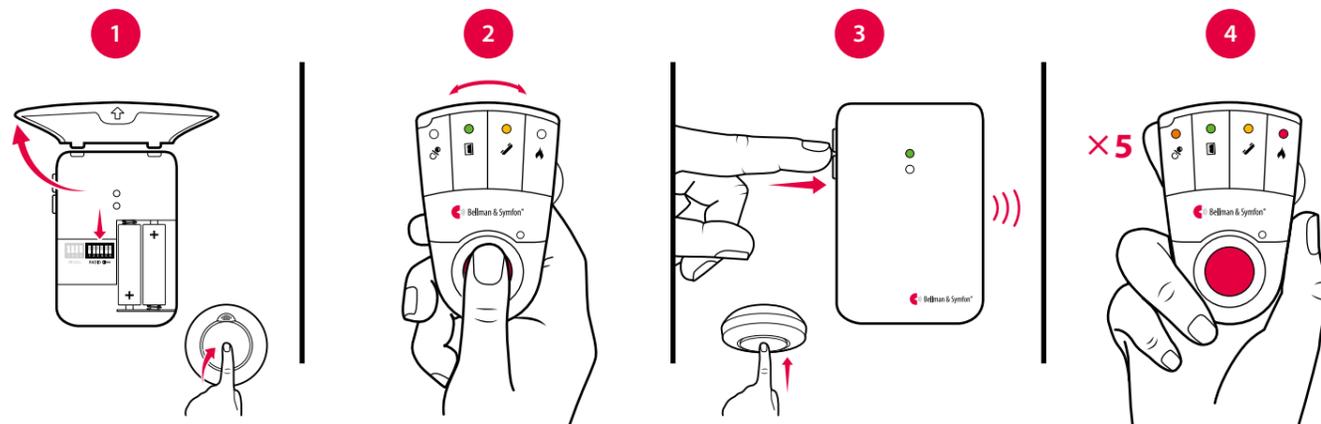

Pager-Zubehör


Der Pager kann mit dem folgenden Zubehör ergänzt werden:

BE1260 Pager-Ladegerät

Wenn Ihr Pager über Nacht aufgeladen wird, können Sie max. zwei Vibrationskissen anschließen. Bitte beachten Sie, dass der Pager während des Ladevorgangs nicht vibriert, die Visit-LED funktioniert jedoch wie gewohnt.

BE1270 Vibrationskissen

Weckt Sie durch Vibrationen, falls etwas passiert, während Sie schlafen. Schließen Sie das Vibrationskissen an das Pager-Ladegerät an und schieben Sie es unter das Kopfkissen oder unter die Matratze Ihres Betts.

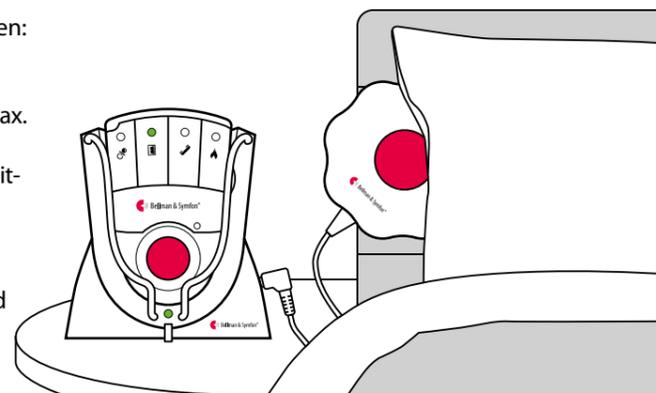

Warnung! Bei Verwendung des Pager-Ladegeräts dürfen Sie **AUSSCHLIESSLICH NACHLADBARE NiMH-Akkus** im Pager verwenden. Nicht-nachladbare Batterien laufen aus, wenn der Pager in das Ladegerät eingelegt wird, und die auslaufende Batteriesäure beschädigt die Elektronik. Daraus resultierende Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Erweiterte Programmierung

Mit der erweiterten Programmierung können Sie das Signalmuster eines bestimmten Senders und für ein bestimmtes Ereignis sowie die angezeigten LED-Farben und das Vibrations-Signalmuster individuell nach Belieben anpassen. Die erweiterte Programmierung setzt das Frequenzband außer Kraft und verbindet die Geräte anhand der Seriennummer. Bitte beachten Sie, dass Rauchmelde-Sender und CO-Sender aus Sicherheitsgründen nicht programmiert werden können.

Hinweis: Der Sender muss aktiviert werden, da er innerhalb des Systems darauf ausgelegt ist, das richtige Signal zu erzeugen. Dies bedeutet, dass Sie nicht immer die Sender-Prüftaste verwenden können (siehe **Standardmäßiges Signalmuster** für den jeweiligen Sender).

So programmieren Sie den Pager:

- 1 Halten Sie die Funktionstaste des Pagers gedrückt. Die grüne und die gelbe Visit-LED beginnen abwechselnd zu blinken. Aktivieren Sie wie vorgesehen den gewünschten Sender, während Sie die Taste weiterhin gedrückt halten. Die gelbe Batterie-LED am Pager leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Sie sich im erweiterten Programmiermodus befinden. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Blättern Sie durch die verschiedenen Visit-LED-Optionen, indem Sie am Empfänger die Funktionstaste drücken. Wählen Sie das gewünschte Visit-LED-Signalmuster aus, indem Sie die Funktionstaste so lange gedrückt halten, bis die Batterie-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 3 Blättern Sie durch die verschiedenen Vibrations-Optionen, indem Sie am Pager die Funktionstaste drücken. Wählen Sie das gewünschte Vibrations-Signalmuster aus, indem Sie die Funktionstaste so lange gedrückt halten, bis die Batterie-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 4 Der Pager zeigt jetzt die neue Visit-LED-Farbe und das neue Vibrations-Signalmuster an. Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um die Demonstration zu beenden. Nach kurzer Zeit kehrt der Pager in den normalen Modus zurück.

Erweiterte Programmierung löschen

Befolgen Sie das nachstehende Verfahren zum Löschen der erweiterten Programmierung.

- 1 Halten Sie die Funktionstaste des Pagers solange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Drücken Sie die Funktionstaste des Pagers drei Mal in schneller Folge.
- 3 Alle Visit-LEDs blinken ca. zwei Sekunden lang und zeigen so an, dass die erweiterte Programmierung gelöscht wurde.

Fehlersuche

Die meisten Probleme lassen sich mit den nachstehenden Ratschlägen schnell beheben.


| Problem | Lösung |
|---|--|
| Der Pager scheint ausgeschaltet zu sein. | <ul style="list-style-type: none"> Die Batterie ist leer. Ersetzen Sie sie mit einer Alkaline-Batterie (1,5 V; AAA). Wichtig! Wenn Sie ein Pager-Ladegerät haben, dürfen Sie ausschließlich nachladbare NiMH-Akkus (1,2 V; AAA) für den Pager verwenden. |
| Die Batterie-LED blinkt gelb. | <ul style="list-style-type: none"> Der Batterieladestand ist niedrig. Ersetzen Sie sie mit einer Alkaline-Batterie (1,5 V; AAA). Wichtig! Wenn Sie ein Pager-Ladegerät haben, dürfen Sie ausschließlich nachladbare NiMH-Akkus (1,2 V; AAA) für den Pager verwenden. |
| Der Pager reagiert nicht, wenn ein Sender aktiviert wird. | <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Batterien der Sender. Verringern Sie den Abstand zwischen Pager und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. Überprüfen Sie, ob der Pager auf dasselbe Frequenzband eingestellt ist wie die anderen Geräte im Visit-System, siehe Frequenzband ändern. |
| Der Pager wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert. | <ul style="list-style-type: none"> Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern. |



Visit Armband-Empfänger

i Dieser Artikel sollte nicht beim Schlafen getragen werden, da es durch Schweiß- und Wärmeeinwirkungen zu Beschädigungen kommen kann.

Tasten und Steuerelemente

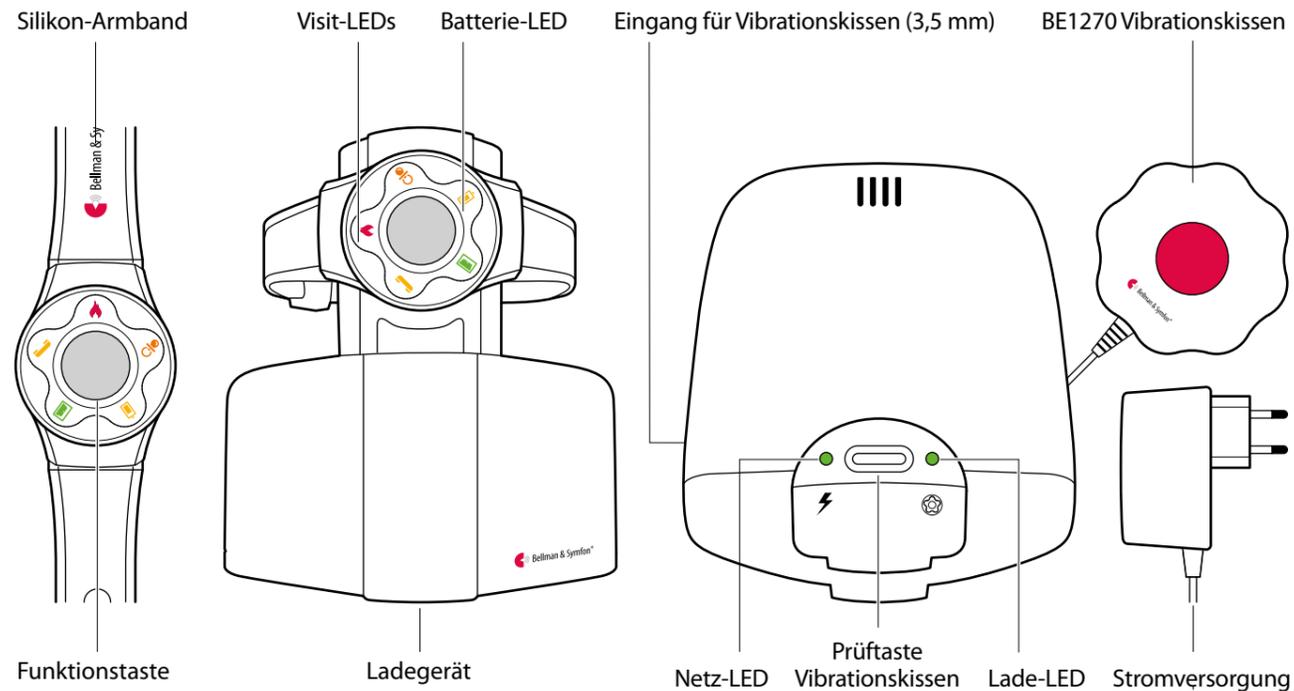

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1560 Visit-Armband-Empfänger
- BE1570 Ladegerät
- Elastisches Armband
- Stromversorgung

Strom und Akku

- Netzstrom: 7,5 V DC / 1500 mA
- Stromverbrauch
 - Empfänger: Aktiv: 100 mA, Ruhezustand: 3 mA
 - Ladegerät: Aktiv: 650 mA, Ruhezustand: 70 mA
- Batteriestrom
 - Empfänger: 1 × nachladbarer Knopfakku (1,2 V; V40H)
 - Ladegerät: 4 × nachladbare NiMH Akkus (1,2 V; NiMH)
- Operating and charging time
 - Receiver: ~30 h, Charging time: ~10 h
 - Charger: Battery charging time: ~24 h

Abmessungen und Gewicht

| | Empfänger | Ladegerät |
|---------|--------------------------|---|
| Höhe | 49 mm | 100 mm |
| Breite | 38 mm | 95 mm |
| Tiefe | 12 mm | 117 mm |
| Gewicht | 30 g, inkl. Batterien | 300 g, inkl. Batterien und Netzteil |

Frequenz und Reichweite

- Frequenzband: 868,30 MHz
- Reichweite: 50 – 100 m abhängig von den Eigenschaften des Gebäudes und der Kombination von Sendern und Empfängern.

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 90% (nicht kondensierend)

Visit-LEDS


- Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:
- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
 - Grüne LED, Türsymbol
Der Tür-Sender wurde aktiviert
 - Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefon-Sender wurde aktiviert
 - Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelde-Sender wurde aktiviert
 - Die orangenen und roten LEDs blinken abwechselnd
Der CO-Alarm ist aktiviert

Zubehör

- BE1270 Vibrationskissen

Erste Schritte

- Ziehen Sie die Batterielasche heraus und schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an. Die Netz-LED leuchtet grün auf. Legen Sie den Armband-Empfänger in das Ladegerät und laden Sie ihn mindestens 2 Stunden lang auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-LED grün.
- Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie einen Visit-Sender. Drücken Sie die Prüftaste/n des Senders.
- Der Empfänger beginnt zu vibrieren und die Visit-LED leuchtet auf. Wenn während des Ladens ein Vibrationskissen angeschlossen ist, vibriert dieser Alarm. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

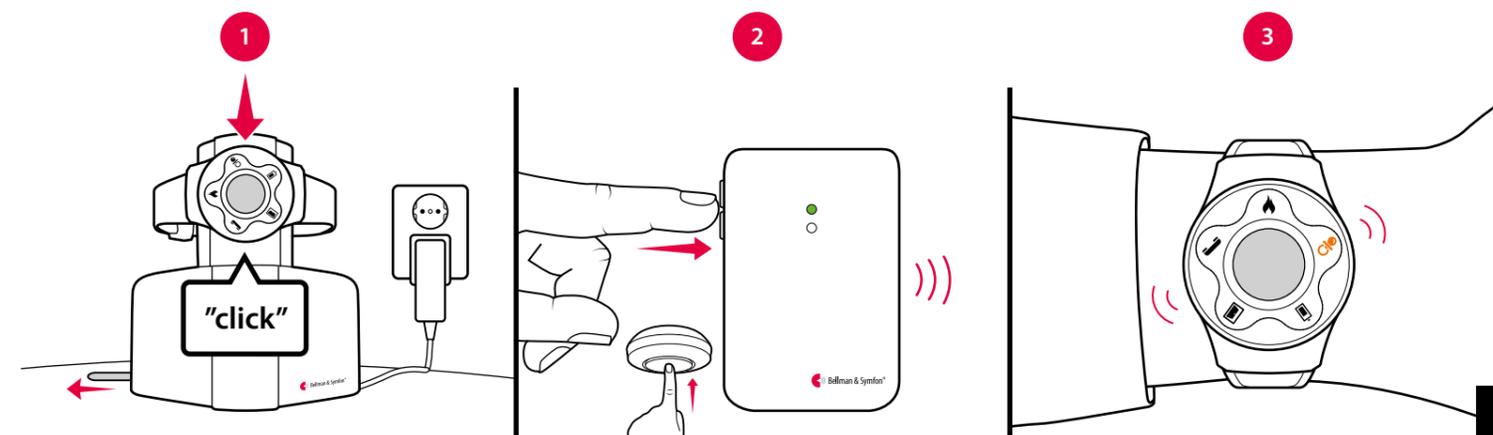

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn ein Sender aktiviert wird, leuchtet eine LED am Empfänger auf und der Empfänger beginnt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, das standardmäßig wie folgt eingestellt ist:

| Aktivierter Sender | Armband-Empfänger-LED | Armband-Empfänger-/Vibrationskissen- Vibration |
|--------------------|-----------------------|--|
| Tür-Sender | Grün | Langsam ■□□□ |
| Druckknopf-Sender | Grün | Langsam ■□□□ |
| Telefon-Sender | Gelb | Mittel ■□■□ |
| Babyruf-Sender | Orange | Schnell ■■■■■■ |
| Rauchmelde-Sender | Rot | Lang ■■■■□ |
| CO-Alarm | Orange und rot | Lang ■■■■□ |

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann nur an den Sendern geändert werden. Siehe Signalmuster ändern für den jeweiligen Sender.

LED-Anzeigen

Die Batterie-LED beginnt gelb zu blinken, wenn die Batterie des Armband-Empfängers fast leer ist. Die Ladedauer beträgt bis zu acht Stunden. Das Ladegerät verfügt über einen Ausfall-Akku und die Lade-LED zeigt Folgendes an:

| LED | Anzeige | Status |
|----------|-----------------|--|
| Lade-LED | Grünes Leuchten | Der Empfänger-Akku wird geladen. |
| Lade-LED | Grünes Leuchten | Das Ladegerät wird mit Netzstrom versorgt. |
| Lade-LED | Grünes Blinken | Das Ladegerät wird von den Ausfall-Akkus mit Strom versorgt. |



Visit Armband-Empfänger


Frequenzband ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich an den **Sendern**.

So ändern Sie das Frequenzband:

- 1 Siehe **Frequenzband ändern** für den jeweiligen Sender um das Frequenzband zu ändern.
- 2 Halten Sie die Funktionstaste des Armband-Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender die Prüftaste/n, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dasselbe Frequenzband eingestellt sein.

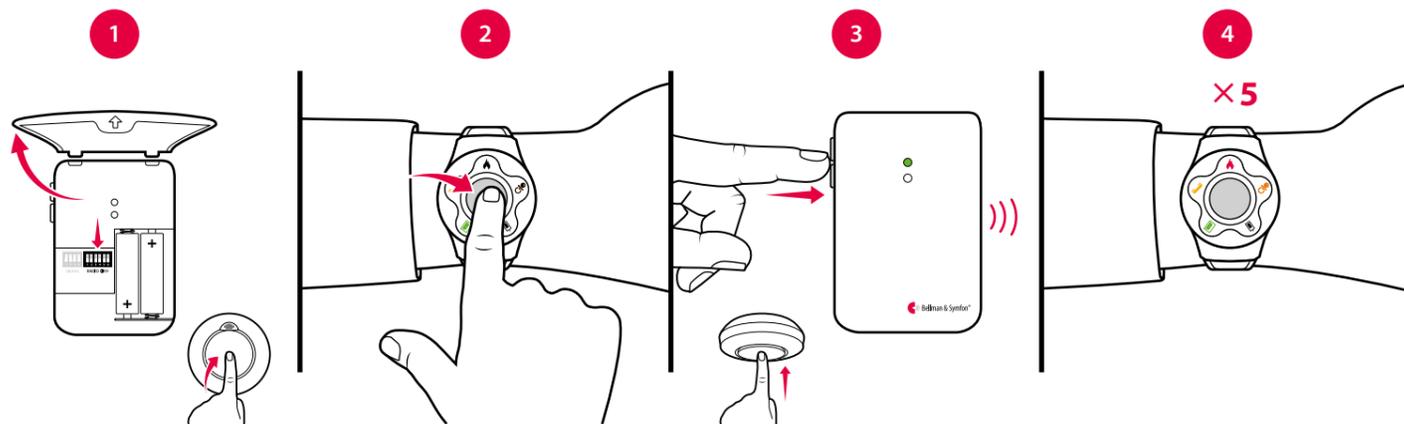

Zubehör


Der Armband-Empfänger kann mit dem folgenden Zubehör ergänzt werden:

BE1270 Vibrationskissen

Weckt Sie durch Vibrationen, falls etwas passiert, während Sie schlafen. Schließen Sie das Vibrationskissen an das Ladegerät an und schieben Sie es unter das Kopfkissen oder unter die Matratze Ihres Betts.

Hinweis: Das Vibrationskissen funktioniert nur, wenn sich der Armband-Empfänger im Ladegerät befindet. Der Empfänger vibriert nicht während des Ladevorgangs, die Visit-LED funktioniert jedoch wie gewohnt.

Drücken Sie die Vibrationskissen-Prüftaste auf der Oberseite des Ladegeräts, um die Vibration auszuprobieren.

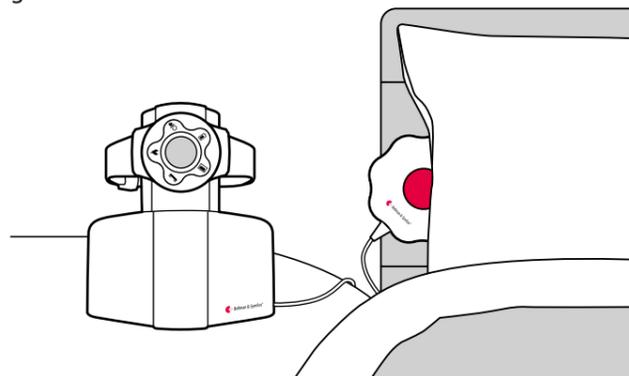

Warnung! Für Armband-Empfänger und Ladegerät dürfen **AUSSCHLIESSLICH NACHLADBARE Akkus (NiMH)** verwendet werden. Nicht-nachladbare Batterien laufen während des Ladens aus und die auslaufende Batteriesäure beschädigt die Elektronik von Armband-Empfänger und Ladegerät. Daraus resultierende Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Erweiterte Programmierung

Mit der erweiterten Programmierung können Sie das Signalmuster eines bestimmten Senders und für ein bestimmtes Ereignis sowie die angezeigten LED-Farben und das Vibrations-Signalmuster individuell nach Belieben anpassen. Die erweiterte Programmierung setzt das Frequenzband außer Kraft und verbindet die Geräte anhand der Seriennummer. Bitte beachten Sie, dass Rauchmelde-Sender und CO-Sender aus Sicherheitsgründen nicht programmiert werden können.

Hinweis: Der Sender muss aktiviert werden, da er innerhalb des Systems darauf ausgelegt ist, das richtige Signal zu erzeugen. Dies bedeutet, dass Sie nicht immer die Sender-Prüftaste verwenden können (siehe **Standardmäßiges Signalmuster** für den jeweiligen Sender).

So programmieren Sie den Armband-Empfänger:

- 1 Halten Sie die Prüftaste des Empfängers gedrückt. Die grüne und die gelbe Visit-LED beginnen, abwechselnd zu blinken. Aktivieren Sie wie vorgesehen den gewünschten Sender, während Sie die Taste weiterhin gedrückt halten. Die Batterie-LED am Empfänger leuchtet gelb auf, um anzuzeigen, dass Sie sich im erweiterten Programmiermodus befinden. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Blättern Sie durch die verschiedenen Visit-LED-Optionen, indem Sie am Empfänger die Funktionstaste drücken. Wählen Sie die gewünschte Visit-LED-Farbe aus, indem Sie die Funktionstaste so lange gedrückt halten, bis die Batterie-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 3 Blättern Sie durch die verschiedenen Vibrations-Optionen, indem Sie am Empfänger die Funktionstaste drücken. Wählen Sie das gewünschte Vibrations-Signalmuster aus, indem Sie die Funktionstaste so lange gedrückt halten, bis die Batterie-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 4 Der Armband-Empfänger zeigt jetzt die neue Visit-LED-Farbe und das neue Vibrations-Signalmuster an. Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um die Demonstration zu beenden. Nach kurzer Zeit kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Erweiterte Programmierung löschen

Befolgen Sie das nachstehende Verfahren zum Löschen der erweiterten Programmierung.

- 1 Halten Sie die Funktionstaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Drücken Sie die Funktionstaste des Empfängers drei Mal in schneller Folge.
- 3 Alle Visit-LEDs blinken ca. zwei Sekunden lang und zeigen so an, dass die erweiterte Programmierung gelöscht wurde.

Fehlersuche

Die meisten Probleme lassen sich mit den nachstehenden Ratschlägen schnell beheben.

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Der Empfänger scheint ausgeschaltet zu sein. | Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn mit einem VARTA-Akku (V40H; NiMH). |
| Die Batterie-LED blinkt gelb. | Der Akkuladestand ist niedrig. Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie das mit einem VARTA-Akku (V40H; NiMH). |
| Der Empfänger lädt nicht. | Überprüfen Sie, ob der Empfänger richtig im Ladegerät positioniert und die Stromversorgung (bzw. das Netzteil) richtig angeschlossen ist. Die Netz-LED und die Lade-LED sollten leuchten. Laden oder ersetzen Sie die Ausfall-Akkus durch vier nachladbare Akkus (1,2 V; NiMH) aus. |
| Der Empfänger reagiert nicht, wenn ein Sender aktiviert wird. | Überprüfen Sie die Batterien des Senders sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. Überprüfen Sie, ob der Empfänger auf dasselbe Frequenzband eingestellt ist wie die anderen Geräte im Visit-System, siehe Frequenzband ändern . |
| Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert. | Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern . |
| Das Vibrationskissen vibriert nicht. | Überprüfen Sie, ob das Vibrationskissen angeschlossen und der Empfänger im Ladegerät ist. |


Wecker Visit



BE1580

HMV 13.99.04.3016

Wecker Visit-Empfänger

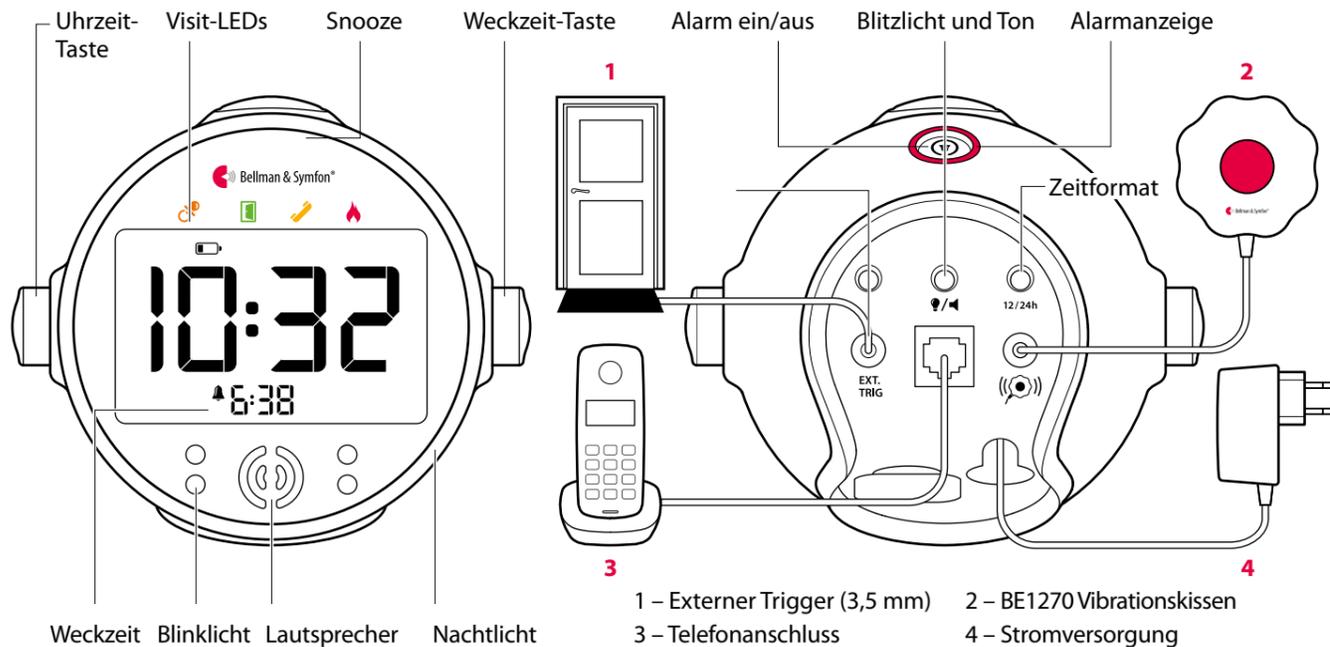

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1580 Wecker Visit
- BE1270 Vibrationskissen
- Stromversorgung
- 4 × Ausfall-Akkus (1,2 V; AAA; NiMH)

Strom und Akku

- Netzstrom: 7,5 V DC / 1,5A
Externes Netzteil
- Stromverbrauch: Aktiv: 850 mA,
Ruhezustand: 8 mA
- Ausfall-Akkus: 4 × nachladbare
Akkus (1,2 V AAA NiMH)
- Betriebsdauer der Ausfall-Akkus
ca. 24 h, wenn vollständig geladen
- Ladedauer der Ausfall-Akkus
ca. 10 h, wenn vollständig leer

Ausgangssignale

- Ton: 100 dB bei 10 cm, 950 Hz – 3 kHz
- Vier hochintensiv blinkende LEDs
- Stromversorgung
Vibrationskissen: 2,0 bis 4,0 VDC
Das Vibrationskissen vibriert

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 108 mm
- Breite: 121 mm
- Tiefe: 92 mm
- Gewicht: 390 g, inkl. Akkus

Visit-LEDs

Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol
Der Tür-Sender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefon-Sender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelde-Sender wurde aktiviert
- Die orangenen und roten LEDs
blinken abwechselnd
Der CO-Alarm ist aktiviert

Frequenz und Reichweite

- Frequenzband: 868,30 MHz
- Reichweite: 50 – 250 m abhängig
von den Eigenschaften des
Gebäudes und der Kombination
von Sendern und Empfängern.

Umgebung


- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur:
0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit:
15% bis 90%
(nicht kondensierend)

Zubehör

- BE1270 Vibrationskissen
- BE9026 Alarmtrittmatte
- BE9105 RJ11 Anschlusskabel

Erste Schritte

- Ziehen Sie die Batterielasche heraus und schließen Sie das Netzteil an den Blitzlichtwecker und an eine Steckdose an. Schließen Sie das Vibrationskissen an, schieben Sie es unter das Kissen oder die Matratze Ihres Bettes und stellen Sie den Blitzlichtwecker auf Ihren Nachttisch.
- Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie einen Visit-Sender. Drücken Sie die Prüftaste/n des Senders.
- Am Blitzlichtwecker leuchtet eine Visit-LED auf und der Blitzlichtwecker beginnt, Ton- und Blitzlichtsignale auszugeben. Das Vibrationskissen vibriert entsprechend des jeweiligen Signalmusters. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

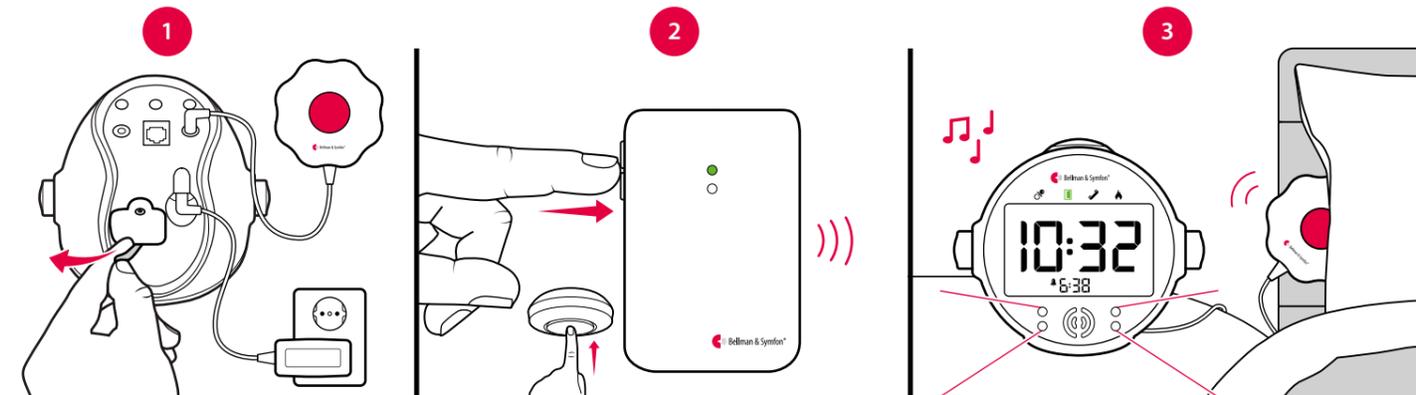

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn ein Sender aktiviert wird, leuchtet eine LED am Blitzlichtwecker auf, der Wecker beginnt, Blitzlicht- und Tonsignale auszugeben und das Vibrationskissen beginnt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, dieses ist standardmäßig wie folgt eingestellt:

| Sender | Blitzlichtwecker | | | Vibrationskissen |
|--|------------------|---------------|------------|------------------|
| Aktivierte Quelle | Visit-LED | Ton | Blitzlicht | Vibration |
| Tür-Sender / Druckknopf-Sender | Grün | Türgong | Ja | Langsam ■□□□ |
| Telefon-Sender / angeschlossenes Telefon | Gelb | Klingelsignal | Ja | Mittel ■□□□ |
| Babyruf-Sender | Orange | Babymelodie | Ja | Schnell ■■■■■□ |
| Rauchmelde-Sender | Rot | Feuersignal | Ja | Lang ■■■■□ |
| CO-Alarm | Orange und rot | Alarm Signal | Ja | Lang ■■■■□ |

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann nur an den Sendern geändert werden. Siehe **Signalmuster ändern** für den jeweiligen Sender.

Einstellungen

Blinklicht und Ton Ein/Aus

Drücken Sie wiederholt die mit gekennzeichnete Taste (Blinklicht und Ton Ein/Aus) auf der Rückseite des Blitzlichtweckers, um zwischen den Optionen zu wechseln. Beim Ausschalten des Blinklichts wird auf der Vorderseite des Blitzlichtweckers das Symbol und beim Stummschalten des Tons das Symbol angezeigt.

Stärke der Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die mit markierte Taste auf der Rückseite so oft, bis die gewünschte der 4 Helligkeitsstufen eingestellt ist. Stufe 5 ist permanentes Hintergrundlicht.

Zeitformat

Drücken Sie die mit **12/24h** gekennzeichnete Zeitformat-Taste auf der Rückseite des Blitzlichtweckers, um zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.

Wecker Visit




BE1580

HMV 13.99.04.3016


Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die **linke** Wähltaste und stellen Sie durch Drehen der Taste die Stunden ein. Um die Minuten einzustellen, wiederholen Sie den vorherigen Schritt. Zum Speichern der Einstellung erneut drücken.

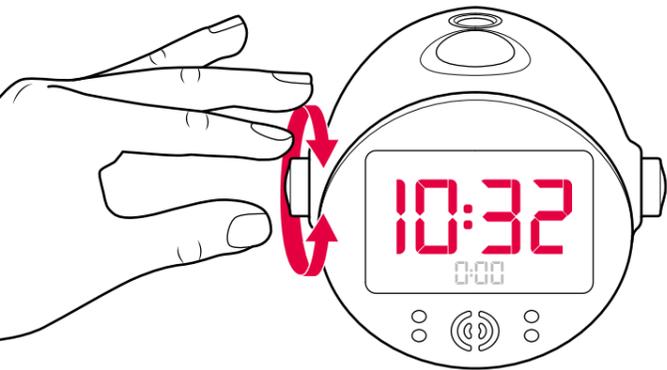


Weckzeit einstellen

Drücken Sie die **rechte** Wähltaste und stellen Sie durch Drehen der Taste die Stunden ein. Um die Minuten einzustellen, drücken und drehen Sie die Wähltaste erneut. Zum Speichern der Einstellung erneut drücken.

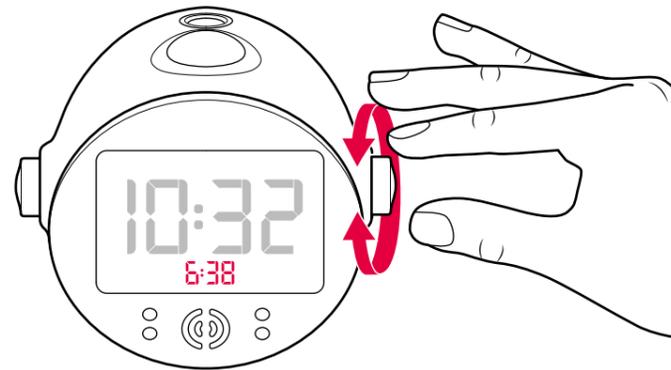


Weckzeit aktivieren

Drücken Sie die Taste Wecker Ein/Aus, um die Weckzeit zu aktivieren. Die Blitzlichtwecker-Anzeige leuchtet rot auf. Zum Deaktivieren der Weckzeit die Taste erneut drücken.

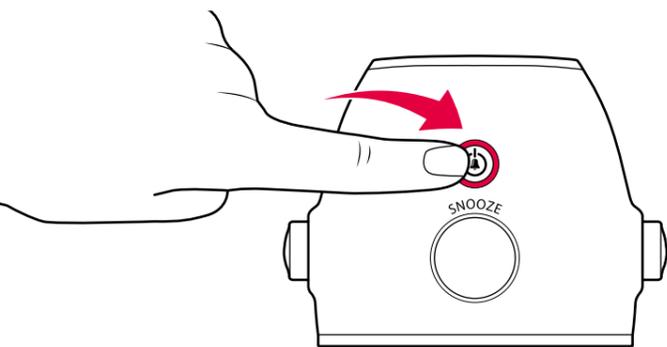

Verwendung von Schlummerfunktion (Snooze) und Nachtlcht

Drücken Sie kurz die Snooze-Taste, um den Alarm stummzuschalten (außer Feueralarm). Halten Sie die Snooze-Taste drei Sekunden gedrückt, um das Nachtlcht einzuschalten und kurz erneut um es wieder auszuschalten (geht nach 1 Std. automatisch aus).

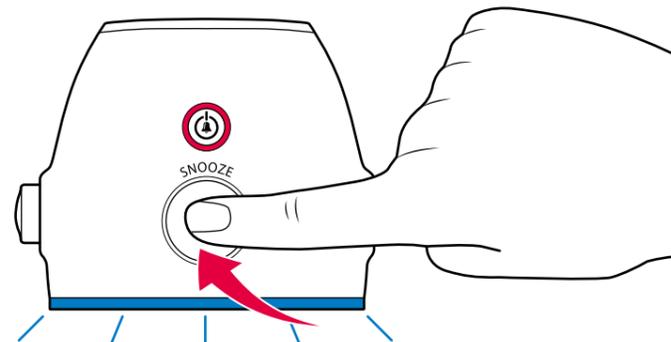

Wecker-Zubehör

Der Blitzlichtwecker kann mit dem folgenden Zubehör ergänzt werden:

- **BE1270 Vibrationskissen**
Schließen Sie das Gerät an den Vibrationskissen-Ausgang an und legen Sie es unter das Kissen, um sich mit Vibrationen wecken zu lassen, wenn der Wecker klingelt.
- **BE9026 Alarmtrittmatte**
Schließen Sie sie an den Ext.Trig.-Eingang des Blitzlichtweckers an, um benachrichtigt zu werden, wenn Ihr Partner das Bett verlässt.
- **BE9105 Telefonkabel**
Mit dem Kabel können Sie Ihr Festnetztelefon am RJ11-Eingang des Blitzlichtweckers anschließen und sich so benachrichtigen lassen, wenn das Telefon klingelt.




Frequenzband ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich an den **Sendern**.

So ändern Sie das Frequenzband:

- 1 Siehe **Frequenzband ändern** für den jeweiligen Sender um das Frequenzband zu ändern.
- 2 Halten Sie die Snooze-Taste des Blitzlichtweckers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender die Prüftaste/n, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 4 Am Blitzlichtwecker blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dasselbe Frequenzband eingestellt sein.

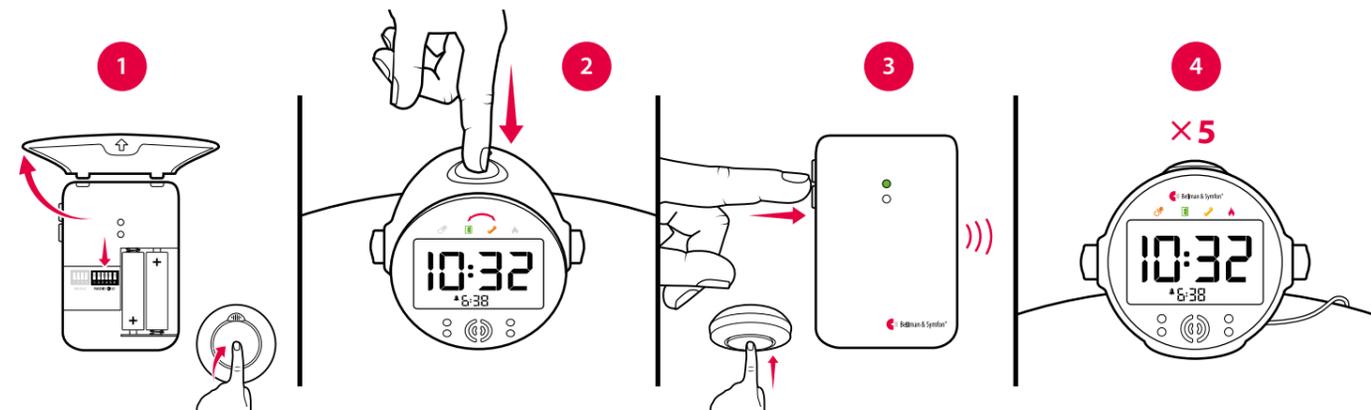

Fehlersuche


| Problem | Lösung |
|--|--|
| Der Blitzlichtwecker scheint ausgeschaltet zu sein. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung (bzw. das Netzteil) richtig angeschlossen ist. ▪ Laden Sie die Ausfall-Akkus einige Stunden lang auf. |
| Das  -Symbol auf der Vorderseite des Blitzlichtweckers beginnt, zu blinken. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Stromversorgung (bzw. das Netzteil) ist nicht angeschlossen und die Ausfall-Akkus sind fast leer. Schließen Sie das Netzteil an und laden Sie die Ausfall-Akkus einige Stunden lang auf. |
| Das  -Symbol wird auf der Vorderseite des Blitzlichtweckers angezeigt. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Empfänger erkennt keine Ausfall-Akkus oder enthält keine. Ziehen Sie an der Batterielasche, siehe Erste Schritte. |
| Der Blitzlichtwecker reagiert nicht, wenn ein Sender aktiviert wird. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie die Batterien des Senders sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. ▪ Verringern Sie den Abstand zwischen Blitzlichtwecker und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ▪ Überprüfen Sie, ob der Blitzlichtwecker auf dasselbe Frequenzband eingestellt ist wie die anderen Geräte im Visit-System, siehe Frequenzband ändern. |
| Der Blitzlichtwecker wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern. |
| Die Alarm-Lautstärke ist zu niedrig. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Lautstärke nimmt allmählich zu und erreicht mehr als 100 dB. ▪ Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab. |




Pager-Ladegerät

Tasten und Steuerelemente

Ladegerät-Halterungen

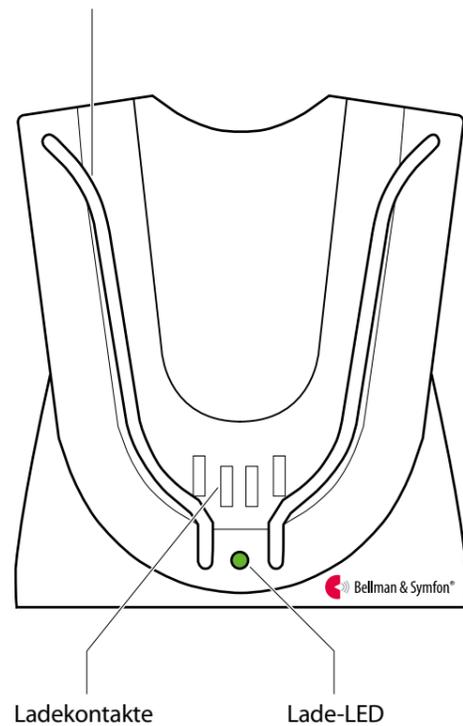

BE1270 Vibrationskissen

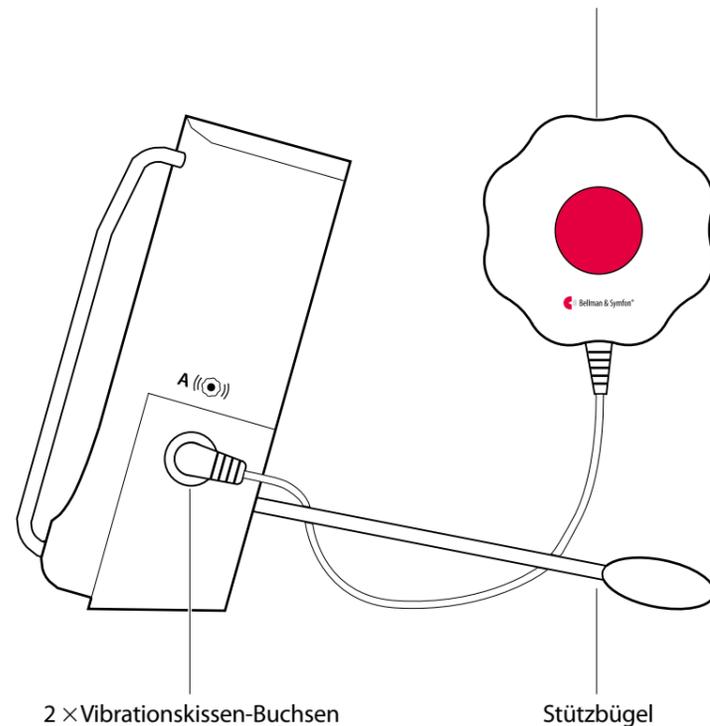

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1260 Pager-Ladegerät mit vorinstallierten Ausfall-Akkus
- Externes Netzteil
- 1 x nachladbarer Akku (1,2 V; NiMH) für den Pager
- Stützbügel, Schrauben und Dübel

Lade-LED

- Grünes Leuchten: Der Pager lädt.
- Kein Leuchten: Der Pager ist vollständig geladen oder das Netzteil ist nicht an den Netzstrom angeschlossen.

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 79 mm
- Breite: 88 mm
- Tiefe: 43 mm
- Gewicht: 200 g, inkl. Akkus und Netzteil

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch

Zubehör

- BE1270 Vibrationskissen
- Verbindet max. zwei Vibrationskissen

Strom und Akku

- Netzstrom: 8 VDC / 800 mA
- Batteriestrom: 4 x nachladbare Akkus (1,2 V NiMH)

Hinweis: Die Ausfall-Akkus müssen in einem Service-Center ausgetauscht werden.


- Ladedauer des Pagers
Normale Ladedauer: ca. 6 h
Mit leeren Ausfall-Akkus: ca. 24 h
- Strom für Vibration: 2,0 bis 4,0 VDC



Warnung! Bei Verwendung des Pager-Ladegeräts dürfen Sie **AUSSCHLIESSLICH NACHLADBARE NiMH-Akkus** im Pager verwenden. Nicht-nachladbare Batterien laufen aus, wenn der Pager in das Ladegerät eingelegt wird und die auslaufende Batteriesäure beschädigt die Elektronik. Daraus resultierende Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Erste Schritte

- Wichtig!** Ersetzen Sie die alte Alkaline-Batterie durch den beiliegenden nachladbaren Akku (1,2 V; NiMH).
- Bringen Sie die Stützbügel an der Rückseite des Ladegeräts an und stellen Sie es auf einer ebenen Fläche auf. Mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln können Sie es auch an der Wand befestigen.
- Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an und legen Sie den Pager in das Ladegerät. Während des Ladens leuchtet die Lade-LED grün und erlischt, sobald der Pager vollständig geladen ist. Schließen Sie das Vibrationskissen an und schieben Sie es unter das Kissen oder die Matratze Ihres Bettes.

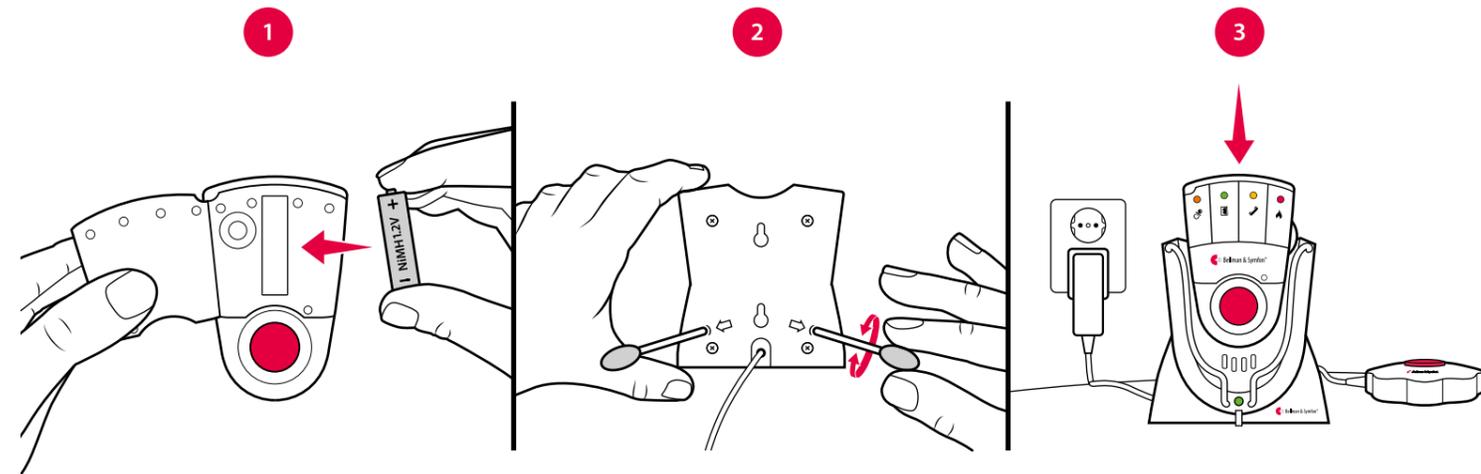

Prüfen der Verbindung

Hinweis: Laden Sie die Ausfall-Akkus 24 Stunden lang, bevor Sie sie für ein Vibrationskissen verwenden.

- Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie den Pager und einen Visit-Sender. Drücken Sie Prüftaste/n des Senders (siehe Prüfen der Funkverbindung des jeweiligen Senders).
- Wenn der Pager in das Ladegerät gelegt wird, leuchtet eine Visit-LED auf und das Vibrationskissen beginnt zu vibrieren. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

Fehlersuche

Die meisten Probleme lassen sich mit den nachstehenden Ratschlägen schnell beheben.

Problem

Der Pager lädt nicht, wenn er in das Ladegerät gelegt wird.

Wenn der Pager aktiviert wird, vibriert das Vibrationskissen nicht.

Lösung

- Überprüfen Sie, ob der Pager richtig im Ladegerät positioniert ist. Die Lade-LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass der Pager geladen wird.
- Wenn die Lade-LED nicht grün aufleuchtet, sind evtl. die Ausfall-Akkus leer. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose und laden Sie die Ausfall-Akkus auf.


- Überprüfen Sie, ob das Vibrationskissen richtig am Ladegerät angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob der Pager richtig im Ladegerät positioniert ist. Die Lade-LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass der Pager geladen wird.
- Wenn die Lade-LED nicht grün aufleuchtet, sind evtl. die Ausfall-Akkus leer. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose und laden Sie die Ausfall-Akkus auf.

Vibrationskissen



BE1270

Tasten und Verbindungen

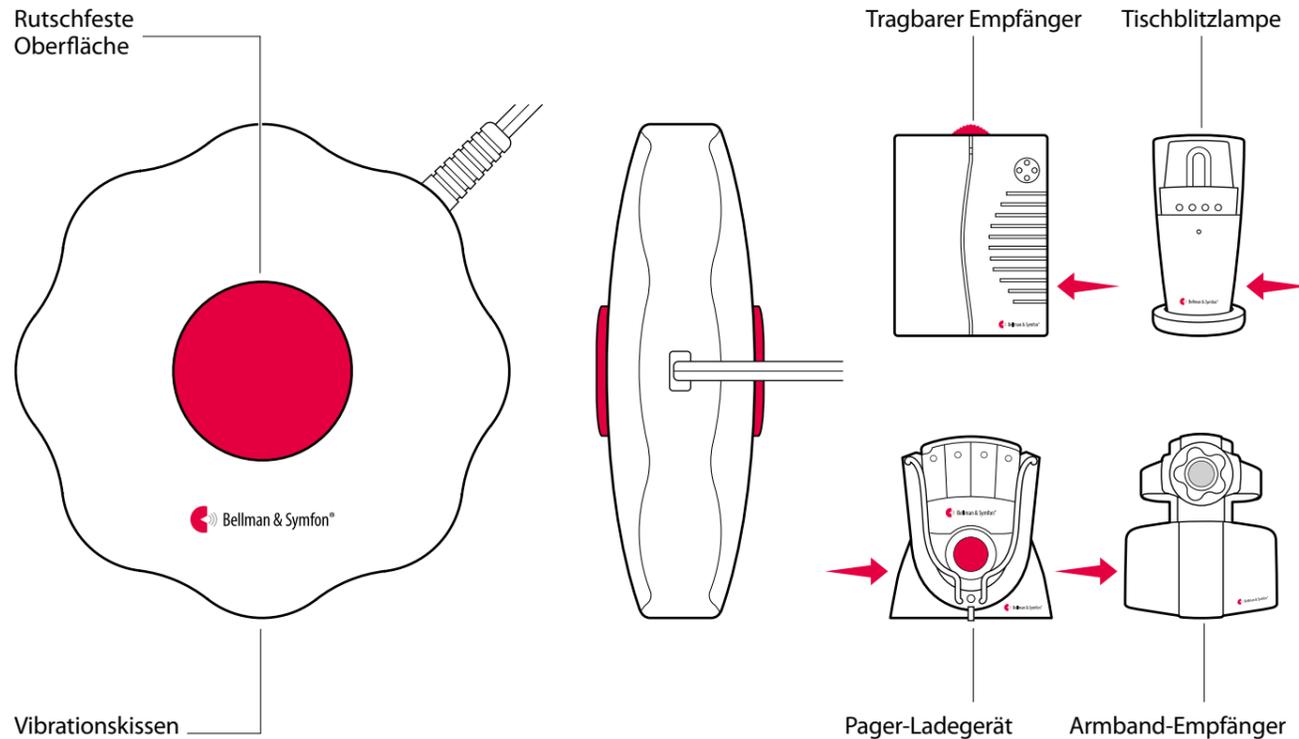

Technische Spezifikationen

Funktion

Weckt Sie mit Vibrationen unter dem Kissen oder der Matratze. Erfordert keine internen Batterien und kann an alle Visit-Empfänger, Ladezubehör und Stand-Alone-Wecker angeschlossen werden.

Lieferumfang

- BE1270 Vibrationskissen

Stromverbrauch

- Betriebsspannung: 2,0 – 4,0 V DC von einem Visit-Empfänger
- Stromverbrauch 250 – 750 mA

Kabel und Anschlüsse

- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 88 mm
- Breite: 88 mm
- Tiefe: 27 mm
- Gewicht: 120 g

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 90% (nicht kondensierend)

Wartung und Pflege

- Mit einem trockenen Tuch reinigen
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.

Kompatibilität

Das Vibrationskissen kann an die folgenden Produkte und Zubehör angeschlossen werden:

- BE1450 Visit tragbarer Empfänger
- BE1441 Visit Tischblitzlampe
- BE1442 Visit Tischblitzlampe mit Ausfall-Akkus
- BE1580 Wecker Visit
- BE1370 Wecker Pro
- Ladegerät für BE1570 Visit-Armband-Empfänger
- BE1260 Pager-Ladegerät




BE9075

Wandhalterung für Tischblitzlampe

Verwendung einer Tischblitzlampe

BE1441


- Verwenden Sie die Bohrschablone zum Markieren und Bohren der Montagelöcher für die Dübel bzw. Schrauben.
- Entfernen Sie mit einem Innensechskantschlüssel den Tischständer der Tischblitzlampe.
- Bringen Sie die Wandhalterung an der Wand an. Bringen Sie die Unterseite an und montieren Sie die Tischblitzlampe an der Wandkonsole.

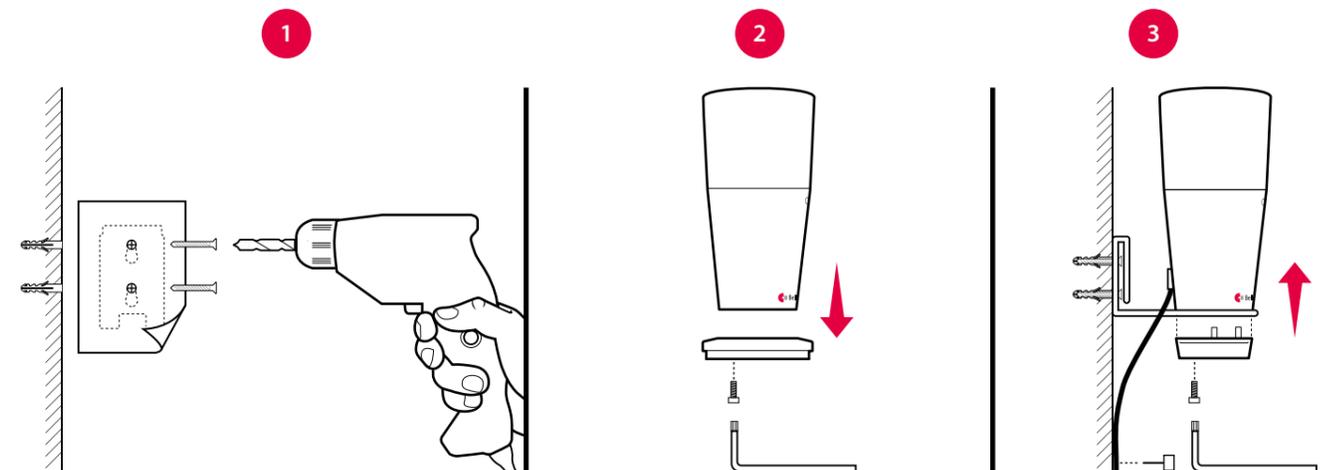

Verwendung einer Tischblitzlampe mit Ausfall-Akkus

BE1442

- Verwenden Sie die Bohrschablone zum Markieren und Bohren der Montagelöcher für die Dübel bzw. Schrauben.
- Entfernen Sie die rot markierte Schraube an der Unterseite der Tischblitzlampe.
- Bringen Sie die Wandhalterung an der Wand an. Bringen Sie die Schraube wieder an, um die Tischblitzlampe an der Wandkonsole zu befestigen.

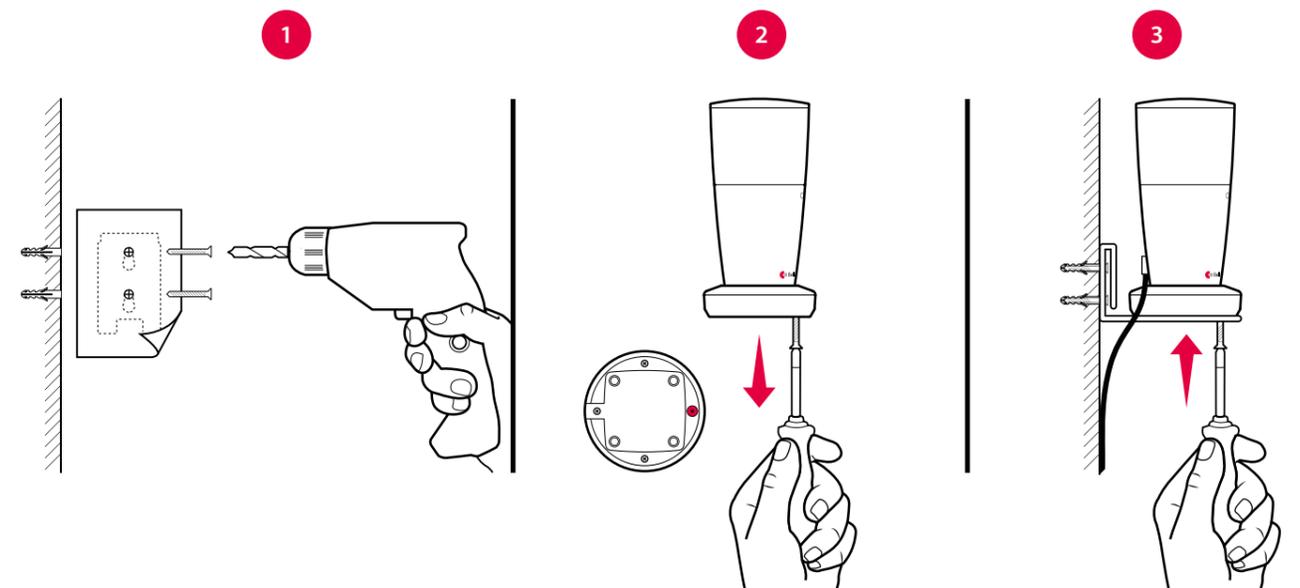

Visit-Zubehör


Magnetschalter

Überwacht die Eingangstür und die Fenster.

Bringen Sie den Magnetschalter am Tür- oder Fensterrahmen an und verbinden Sie ihn mit dem Telefon-Sender. Wenn die Magneten des Magnetschalters getrennt werden, sendet der Sender ein Signal an den Visit-Empfänger.

Technische Spezifikationen

- Abmessungen 25×62×13 mm
- Gewicht 25 g
- Anschluss Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge 0,5 m
- Unterbrecherkontakt
Switch ON (door opened) > 2 cm from the magnet
Switch OFF (door closed) < 1 cm from the magnet
- Farbe Weiß
- Umgebung Nur für den Innengebrauch

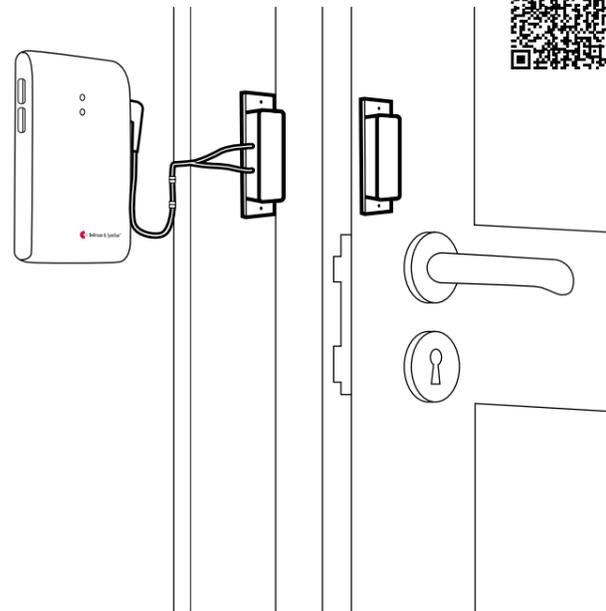

BE9023




Externes Mikrofon

Ermöglicht die Erkennung von zwei verschiedenen Türklingel-Signalen

Das externe Mikrofon kann mit dem Tür-Sender verwendet werden, wenn die externe Schallquelle zu weit vom internen Mikrofon entfernt ist oder wenn getrennte Informationen von Türklingel und Gegensprechanlage gewünscht sind.

Technische Spezifikationen

- Abmessungen 33×36×4 mm
- Gewicht 15 g
- Anschluss Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge BE9199: 2,5 m
- Mikrofontyp Piezoelektrisch
- Farbe Weiß
- Umgebung Nur für den Innengebrauch

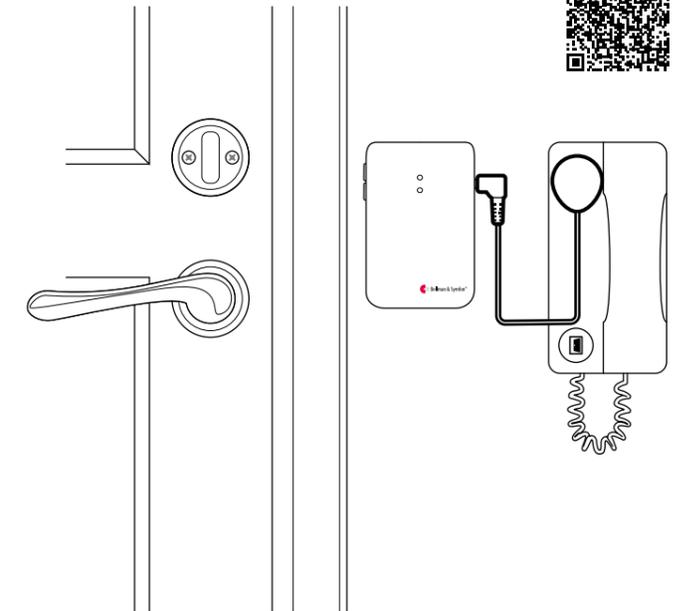

BE9199




Alarmtrittmatte

Benachrichtigt Sie, wenn jemand auf die Matte tritt.

Legen Sie die Alarmtrittmatte vor die Eingangstür oder vor das Bett und schließen Sie sie an den Telefon-Sender oder den Babyruf-Sender an, um benachrichtigt zu werden, wenn jemand ein Zimmer betritt oder das Bett verlässt.

Technische Spezifikationen

- Abmessungen 540×395×4,6 mm
- Gewicht 255 g
- Anschluss Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge 200 cm
- Staubdicht und gemäß IP65 versiegelt (nicht wasserdicht)

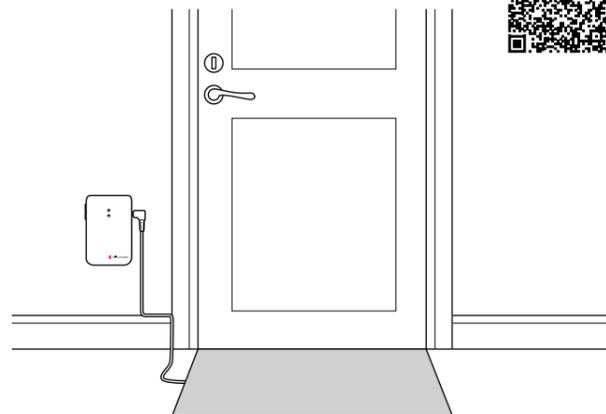

BE9026



Betrieb

- Kontakt Schließer (N/O)
- Kontaktwiderstand <100 Ω (abhängig vom Druck)
- Betriebsdruck Nenndruck >5 kg pro 50-mm-Platte.
- Temperaturbereich -15 °C bis 65 °C

Maximale Leistung/Grenzwerte

- Kontaktgrenzwert 10 VA
- Schaltspannung 25 VDC
- Schaltstrom 0,25 A DC Ohmsche Last
- Dauerstrom 0,25 A DC Ohmsche Last

Kabel für externen Trigger

Verbindet eine externe Trigger-Quelle mit Visit

Mit dem externen Trigger-Kabel wird eine externe Trigger-Quelle mit einem Visit-Produkt verbunden. Verwenden Sie es, um z. B. eine vorhandene Türklingel an den Telefon-Sender (BE1431 oder BE1433) anzuschließen und sich benachrichtigen zu lassen, wenn jemand die Türklingel läutet.


Technische Spezifikationen

- Gewicht 25 g
- Anschluss Stereo-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge 0,5 m
- Farbe Weiß

Spannung

- Ⓢ 2 bis 30 VDC
- 3 bis 24 VAC

Siehe den jeweiligen Visit-Produktabschnitt für detaillierte Informationen.

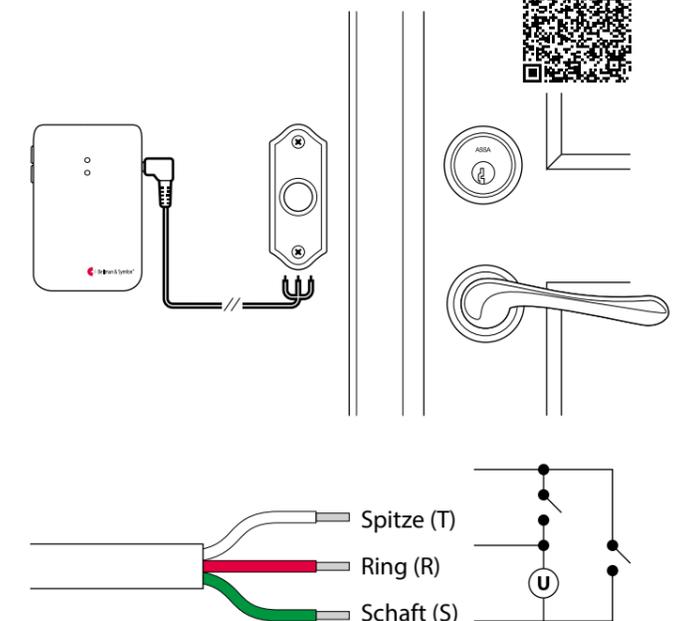

BE9253



Übersicht **Visit Lichtsignalanlage**

Wählen Sie Ihre eigene Kombination. Sie können sich selbst die optimale Lösung für Ihren Einsatzzweck, mit den größten Vorteilen für sich und Ihre Angehörigen, zusammenstellen.

Sender

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Telefon-Sender Art. Nr. BE1431 HMV 13.99.04.0025 | Telefon Transceiver BT Art. Nr. BE1433 HMV 13.99.04.5006 | Tür-Sender Art. Nr. BE1411 HMV 13.99.04.0027 | Babyruf-Sender Art. Nr. BE1491 HMV 13.99.04.0026 | Druckknopf-Sender Art. Nr. BE1420 HMV 13.99.04.0031 |

Sender



Rauchmelde-Sender
Art. Nr. BE1481
HMV 13.99.04.0040



CO-Melder
Art. Nr. BE1555



Visit Alarm Clock
Art. Nr. BE1580
HMV 13.99.04.3016



Pager Empfänger
Art. Nr. BE1470
HMV 13.99.04.4004



Armbandempfänger
Art. Nr. BE8102
HMV 13.99.04.1002

Empfänger



Tragbarer Empfänger
Art. Nr. BE1450
HMV 13.99.04.2001



Tischblitzlampe
Art. Nr. BE1441
HMV 13.99.04.2019



Tischblitzlampe
Art. Nr. BE1442
HMV 13.99.04.2017
MIT AUSFALL AKKU



Alarm Clock Pro
Art. Nr. BE1370
HMV 13.99.04.3015



Vibio
Art. Nr. BE1221
HMV 13.99.04.4003

Stand-Alone Produkte

Wecken & Benachrichtigen

Übersicht **Wecken & Alarmieren**

Für Zuhause und unterwegs die optimale Lösung



BE1580 / HMV 13.99.04.3016

Wecker Visit

Dieser Wecker ist Teil des Visit-Systems. Er weckt Sie wahlweise mit einem Alarm Ton, LED Blitzlicht und/oder Vibration durch das mitgelieferte Vibrationskissen, wenn es an der Tür klingelt, das Telefon läutet, das Baby Aufmerksamkeit benötigt oder wenn der Rauchalarm ausgelöst wird.

Lieferumfang

- ✓ BE1580 Wecker Visit
- ✓ BE1270 Vibrationskissen
- ✓ 4 x 1.2 V AAA NiMH-Akkus
- ✓ 7.5 V DC / 1000 mA Netzteil

Merkmale

-  **Lauter Ton**
Steigert sich bis zu 100 dB(A).
-  **Intensive Beleuchtung**
Weckt Sie mit LED Blitzen.
-  **Vibrationskissen**
Vibriert unter dem Kopfkissen.
-  **Nachtlicht**
Führt Sie zurück ins Bett.
-  **Ausfall-Akkus**
Arbeitet bei Stromausfall.

Alarmart

- Alarmton
- LED Blitzlicht
- Vibrationen vom Vibrationskissen

Visit Alarmart

- Orangefarbene LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender ist aktiviert
- Grüne LED, Tür-Symbol
Der Tür-Sender ist aktiviert
- Gelbe LED, Telefon-Symbol
Der Telefon-Sender ist aktiviert
- Rote LED, Feuer-Symbol
Der Rauchmelde-Sender ist aktiviert



BE1370 / HMV 13.99.04.3015

Wecker Pro

Dieser Wecker weckt Sie wahlweise mit einem ansteigendem Alarm Ton, LED Blitzlicht und/oder Vibration durch das mitgelieferte Vibrationskissen. Er ist einfach zu bedienen und hat zusätzliche Funktionen wie Nachtlicht, Ausfall-Akkus und einen direkten Telefonanschluss.

Lieferumfang

- ✓ BE1370 Wecker Pro
- ✓ BE1270 Vibrationskissen
- ✓ 4 x 1.2 V AAA NiMH-Akkus
- ✓ 7.5 V DC / 1000 mA Netzteil

Merkmale

-  **Lauter Ton**
Steigert sich bis zu 100 dB(A).
-  **Intensive Beleuchtung**
Weckt Sie mit LED Blitzen.
-  **Vibrationskissen**
Vibriert unter dem Kopfkissen.
-  **Nachtlicht**
Führt Sie zurück ins Bett.
-  **Ausfall-Akkus**
Arbeitet bei Stromausfall.

Alarmart

- Alarmton
- LED Blitzlicht
- Vibrationen vom Vibrationskissen

Hinweis: Dieser Wecker ist eine reine Stand Alone Variante und kann nicht mit der Visit Lichtsignalanlage genutzt werden!



BE1221 / HMV 13.99.04.4003

Vibio

Vibio ist ein kabelloses Vibrationskissen, das über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon verbunden wird. Über die kostenlose App können Sie mehrere Alarme erstellen, die Vibrationsstärke auswählen oder die Benachrichtigungen von Anrufen und/oder SMS aktivieren.

Lieferumfang

- ✓ BE1221 Vibio Vibrationskissen
- ✓ USB-Ladekabel

Merkmale

-  **App gesteuert**
Passen Sie Ihre Alarme an.
-  **Starke Vibrationen**
Weckt selbst Tiefschläfer.
-  **Bluetooth 5**
Zuverlässige Kommunikation.
-  **Benachrichtigung**
Für Anrufe und SMS.
-  **Einstellen und vergessen**
Funktioniert ohne das Handy.

Alarmart

- Vibration
Stärke über App einstellbar

App Installation

Laden Sie die Vibio-App von dem App Store® oder Google Play™ herunter und folgen Sie den Installationsanweisungen.





Wir machen den Unterschied für Schwerhörige und gehörlose Menschen. Wir bieten Lösungen an, die ein sicheres, unabhängiges und sozial aktives Leben ermöglichen. Unser weltweiter Hauptsitz befindet sich in Gothenburg, Schweden, und wir verfügen über regionale Niederlassungen und ein zugelassenes Partnernetzwerk in Europa, im Asiatisch-Pazifischen Raum und in Nordamerika.



Produzent

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com

Örtliches Büro

Bellman & Symfon Deutschland GmbH
Mehlbachstrift 6
21339 Lüneburg
t: +49 (0)4131 28 48 333
f: +49 (0)4131 28 46 578
Email: info@bellman.de



Revision: Visit_001ART011-DE
Ausgabedatum: 2023-04-11
TM and © 2023 Bellman & Symfon AB.
Alle Rechte vorbehalten



bellman.com