

# Visit polsontvanger

BE8102



 Bellman & Symfon®



## Functies

### Discrete trillingen

Stil en niet opdringerig

### Duidelijke signaalidentificatie

Gebruikt leds en trillingspatronen

### Comfortabel om te dragen

Huidvriendelijk materiaal

### Makkelijk aan te passen

Verwisselbaar polsbandje

### Lader meegeleverd

Uitgerust met een jack-aansluiting voor het trilalarm

## Aan je zijde, dag en nacht.

De trilarmband van Bellman & Symfon maakt deel uit van het Visit smart home-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden. Hij waarschuwt u zachtjes met trillingen wanneer de deurbel of de telefoon overgaat, wanneer uw baby u nodig heeft of wanneer er brand ontstaat.

De trilarmband is uitgerust met een siliconen polsbandje dat huidvriendelijk is en gedragen kan worden als een gewoon polshorloge. Hij bevat duidelijke pictogrammen die in

verschillende kleuren oplichten, zodat u de waarschuwing gemakkelijk kunt herkennen. Gebruik hem in en om het huis om te weten wanneer er iets gebeurt dat uw aandacht vraagt.

De meegeleverde lader is voorzien van batterijback-up en een uitgang voor een trilalarm. Leg hem gewoon onder uw kussen of matras om met trillingen te worden gewaarschuwd als er 's nachts iets gebeurt.



# Technische specificaties



## Afmetingen en gewicht

	Ontvanger	Lader
Hoogte	49 mm, 1,9"	100 mm, 3,9"
Breedte	38 mm, 1,5"	95 mm, 3,7"
Diepte	12 mm, 0,5"	117 mm, 4,6"
Gewicht	27 g, 0,9 oz.	185 g, 6,5 oz.




## Knoppen en bedieningselementen

Polsontvanger



Siliconen polsbandje


Visit leds

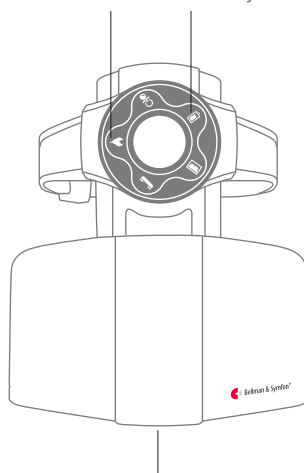

Lader

Batterij-led

Jack-aansluiting trilalarm

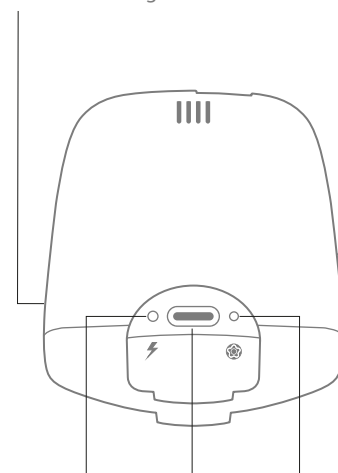


Energie

Testknop

Laden

Trilalarm

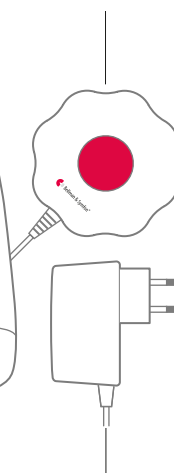

Adapter

## Functies

- Discrete waarschuwingen  
Produceert stille en niet opdringerige trillingen
- Duidelijke signaalidentificatie  
Gebruikt gekleurde leds en trillingspatronen
- Comfortabel om te dragen  
Rubberen polsbandje, huidvriendelijk
- Lader inbegrepen  
Uitgerust met een jack-aansluiting voor een trilalarm

## Frequentie en dekking

- Radiofrequentie: 315 MHz, 433,92 MHz of 868,3 MHz, afhankelijk van de regio
- Dekking: 50 - 250 m, afhankelijk van de radiofrequentie en de kenmerken van het gebouw

## Stroom en batterij

- Netstroom  
7,5 V DC/1500 mA met voedingseenheid
- Batterijvermogen  
Ontvanger: 1 x 1,2 V V40H oplaadbare batterij  
Lader: 4 x 1,2 V NiMH oplaadbare batterijen
- Stroomverbruik  
Ontvanger: Actief: 100 mA, inactief: 3 mA  
Lader: Actief 650 mA, inactief 70 mA
- Gebruiksduur en laadtijd  
Ontvanger: ~30 u, laadtijd: ~8 u  
Lader: Oplaaftijd back-upbatterij: ~ 24 uur

## In de doos

- BE1560 Visit trilontvanger met extra polsbandje
- BE1570 lader met stroomvoorziening

## Milieuvereisten

- Bedrijfstemperatuur: 0 ° tot 35 °C  
32 ° tot 95 °F
- Relatieve vochtigheid: 15% tot 90%  
(niet-condenserend)

## Visit indicatoren

De Visit leds geven normaal gesproken het volgende aan:

- Oranje led, fopspeensymbool  
De babyfoon is geactiveerd
- Groene led, deursymbool  
De deurzender is geactiveerd
- Gele led, telefoonsymbool  
De telefoonzender is geactiveerd
- Rode led, vuursymbool  
De rookmelder is geactiveerd

## Accessoires

- BE1270 trilalarm
- BE9086 externe activeringskabel

© 2020 Bellman & Symfon AB.  
Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE8102\_001DAS004

[bellman.com](http://bellman.com)