

請先閱讀

本手冊指導您如何使用和保養本 Microset 耳麥。確保您仔細閱讀本手冊，包括警告部分。如果您有其他問題，請聯絡您的經銷商。

關於 BE9129 Microset 耳麥

使用者群組

所有年齡層的人士。

預期使用者

想要控制調音和聆聽音量的使用者。

運作原理

音訊產品系列包括多種放大器和聲音傳送器，這些產品都是特別為了在嚴苛的環境下仍能提供聲音強化效果而開發。根據特定放大器或聲音傳送器的指定功能，可使用不同的麥克風來擷取直接聲音或增強環境聲音。

 本裝置無法恢復正常聽力，也無法預防或改善由器質性病變造成的聽力損害或耳聾。

開始使用

使用 Microset 耳麥進行隱密聆聽。將 Mino 放入內袋或使用皮帶夾，將耳機塞入耳朵，再使用衣襟式麥克風擷取聲音。



注意：為了達到最佳效能，請將衣襟式麥克風安裝在距離您下巴至少 30 公分 / 12 吋的地方。正常情況下，您自己的聲音也會被放大。

一般警告

本節包含有關安全、處理和操作條件的重要資訊。請妥善保存本說明書，以備日後使用。如果您只是安裝裝置，必須將此單張交給住戶。

 危險警告

- 若未遵循這些安全指示，可能會導致火災、觸電或其他傷害，或損壞裝置或其他財產。
- 請勿讓 3 歲以下兒童接觸本裝置。
- 請勿在任何熱源附近使用或存放本裝置，例如明火、散熱器、烤箱或其他會產生熱能的裝置。
- 請勿拆卸本裝置，否則有觸電的危險。篡改或拆卸本裝置將導致保固失效。
- 本裝置僅供室內使用。請勿將本裝置暴露於濕氣中。
- 保護裝置在儲存和運輸過程中不受震動。
- 防止纜線受到任何可能來源的損害。
- 請勿對本裝置進行任何變更或修改。請僅使用 Bellman & Symfon 原廠配件，以避免任何電擊。
- 連接的聆聽裝置具有非常強大的擴音器，如果不小心使用本產品，其音量可能會造成不適，嚴重時甚至會危及聽力。戴上耳麥之前，請務必將聲量調低至低音量！

 產品安全資訊

- 不遵守這些指示可能會導致裝置損壞，並使保固失效。裝置，並使保固失效。
- 請勿在禁止使用電子設備的區域使用本裝置。
- 本裝置只能由授權維修中心維修。
- 如果您的裝置遇到問題，請與購買點、當地的 Bellman & Symfon 辦公室或製造商聯繫。請造訪 **bellman.com** 以取得聯絡資訊。
- 請勿掉落您的裝置。掉落到硬物表面可能會損壞裝置。

操作條件

請在乾燥的環境中操作本裝置，溫度和濕度限制請參閱本說明書。如果裝置受潮或暴露於濕氣中，則不應再視為可靠，因此應予更換。

清潔

請使用不起毛的軟布。避免濕氣進入開口。請勿使用家用清潔劑、噴霧劑、溶劑、酒精、氨水或研磨劑。本裝置不需要消毒。

服務與支援

如果裝置出現損壞或無法正常運作，請按照使用者指南和本單張的指示操作。如果產品仍無法正常運作，請聯絡您當地的經銷商或辦事處，以取得有關服務和保固的資訊。

保固條件

Bellman & Symfon 保證本產品自購買日起 90 天內，不會因材料或製造過程的錯誤而產生任何瑕疵。本保證僅適用於正常的使用和服務狀況，不包括因意外、疏忽、誤用、未經授權的拆卸或污染而造成的損壞，無論其原因為何。本保證不包括意外及間接損害。此外，保固不包括天災，例如火災、水災、颶風和龍捲風。本保證賦予您特定的法律權利，您也可能擁有其他權利，這些權利因地區而異。某些國家或司法管轄區不允許限制或排除附帶或間接損害，或限制默示保證的期限，因此上述限制可能不適用於您。本保證是您作為消費者的法定權利的補充。上述保證不得更改，除非有本保證雙方簽署的書面文件。

符號說明

	表示製造商的序號，以便識別特定裝置。
	表示裝置製造商。
	此符號表示使用者需要參考使用說明。
	此符號表示在操作靠近符號位置的裝置或控制器時必須小心，或表示目前的狀況需要操作者注意或操作者採取行動，以避免不良後果。
	標示可以找到資訊的地方，尤其是在緊急情況下。
	表示裝置可安全暴露的溫度限制。
	表示裝置可安全接觸的濕度範圍。

技術規格

重量	17 公克, 0.6 盎司
電纜長度	95 公分, 3.1 英尺
連接器	3.5 mm 立體聲插頭
顏色	黑色
耳機規格	
靈敏度	113(±3) dB/mW (@ 1kHz)
頻率響應	50 Hz – 20 kHz
最大功率	10 mW
阻抗	32 Ω
麥克風規格	
類型	電容式麥克風
指向性	全方向
靈敏度	-47 (±3) dB
頻率響應	110 Hz 至 16 kHz
信噪比	>58 dB >58 dB
偏壓	最大 10 VDC
配置	此耳機可與下列個人放大器配置： BE2030 Mino
操作	溫度：0 – 35 攝氏度, 32 – 95 華氏度
包裝盒內	BE9129 Microset 耳麥

 詳細產品資訊，請參閱相應的使用手冊。