



SE Produktinformation

Läs detta först

Denna broschyr ger dig vägledning om hur du använder och innehåller din nya Trampmatta. Läs igenom denna broschyr noggrant, inklusive avsnittet **Varningar**. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din audionom.

Om BE9026-P02 Trampmatta

Avsett syfte

Det avsedda syftet med Visitsystemet är att varna döva och hörselskadade personer för viktiga signaler i hemmet.

Avsedd användargrupp

Den avsedda användargruppen består av personer i alla åldrar med mild till svår hörselnedsättning eller dövhet som behöver ljud-, syn- eller känsselförstärkning.

Avsedd användare

Den avsedda användaren är en person med mild till svår hörselnedsättning eller dövhet.

Funktionsbeskrivning

Visit varselbelyvningsystemet består av en uppsättning trådlöst anslutna sändare och mottagare som är placerade i hela hemmet. När en sändare upptäcker en aktivitet signalerar den till Visit Blixtmottagaren som varnar användaren med ljud, blixtar eller vibrationer. För att kunna använda systemet behöver du minst en sändare och en mottagare.

 Visit varselbelyvningsystem återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte en hörselnedsättning eller dövhet till följd av organiska tillstånd.

Allmänna varningar

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftsförhållanden. Behåll denna broschyr för framtida bruk. Om du bara installerar enheten måste denna broschyr ges till hushållsägaren.

Varningar för faror

- Om du inte följer dessa säkerhetsanvisningar kan det leda till brand, elektriska stötar eller andra personskador eller skador på enheten eller annan egendom.
- Förvara enheten oåtkomligt för barn under 3 år.
- Använd eller förvara inte enheten i närheten av värmekällor som öppen eld, element, ugnar eller andra enheter som alstrar värme.
- Ta inte isär enheten, det finns risk för elektriska stötar. Om enheten manipuleras eller demonteras upphör garantin att gälla.
- Skydda enheten mot stötar under förvaring och transport.
- Gör inga ändringar eller modifieringar på denna enhet. Använd endast original Bellman & Symfon tillbehör för att undvika elektriska stötar.
- Skydda kablarna från alla potentiella skadekällor.

Information om produktsäkerhet

- Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på enheten och göra garantin ogiltig.
- Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- Enheten får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Om en allvarlig incident inträffar i samband med den här enheten ska du kontakta tillverkaren och relevant myndighet.
- Om du stöter på andra problem med din enhet, kontakta inköpsstället, ditt lokala Bellman & Symfon-kontor eller tillverkaren. Besök bellman.com för kontaktinformation.
- Tappa inte enheten. Den kan skadas om den tappas på en hård yta.

Driftsförhållanden

Använd enheten i en torr miljö inom de temperatur- och fuktighetsgränser som anges i den här broschyren. Om enheten blir våt eller utsätts för fukt ska den inte längre betraktas som tillförlitlig och bör därför bytas ut.

Rengöring

Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik att få in fukt i öppningar. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel. Denna enhet kräver inte sterilisering.

Service och support

Om enheten verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska ska du följa anvisningarna i användarhandboken och den här broschyren. Om produkten fortfarande inte fungerar som avsett kontaktar du din lokala audionom för information om service och garanti.

Garantivillkor

Bellman & Symfon garanterar denna produkt under sex (6) månader från inköpsdatum mot eventuella defekter som beror på felaktigt material eller utförande. Denna garanti gäller endast under normala användnings- och serviceförhållanden och omfattar inte skador till följd av olyckshändelse, försummelse, felaktig användning, obehörig demontering eller kontaminering, oavsett orsak. Denna garanti omfattar inte oförutsedda skador eller följdskador. Garantin omfattar inte heller naturkatastrofer som brand, översvämning, orkaner och tornados. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på territorium. Vissa länder eller jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av tillfälliga skador eller följdskador, eller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti är ett tillägg till dina lagstadgade rättigheter som konsument. Ovanstående garanti får inte ändras annat än skriftligen och undertecknat av båda parter.

Symbolförklaring

	Anger att enheten är en medicinteknisk enhet.
	Anger en bärare som innehåller information om unik identifiering av enheten.
	Anger att produkten inte får kasseras som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.
	Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras.
	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska enheten kan identifieras.
	Anger tillverkaren av den medicintekniska enheten.
	Denna symbol anger att användaren bör läsa bruksanvisningen.
	Denna symbol anger att försiktighet är nödvändig vid användning av enheten eller kontrollenheten i närheten av där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver att operatören är medveten om eller vidtar åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.
	Att identifiera en plats där information kan hittas, särskilt i en nödsituation.
	Anger de temperaturgränser som den medicintekniska enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.
	Anger det luftfuktighetsintervall som den medicintekniska enheten kan exponeras för på ett säkert sätt.

Information om överensstämmelse

Härmed försäkras Bellman & Symfon att denna produkt i Europa överensstämmer med de väsentliga kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfons webbplats bellman.com.

Tekniska specifikationer

Vikt	255g
Mått	54 × 39 × 0,5 cm
Standard driftstryck	Nominellt 5 kg över 50 mm skiva
Färg	Svart
Kabellängd	2 meter
Anslutning	3,5 mm mono-kontakt
Driftförhållanden	Temp: -15° till 65° C Luftfuktighet: 15% – 90%, icke-kondenserande

Konfiguration Denna trampmatta kan konfigureras med följande sändare:

- Kompatibla sändare:**
- BE1431-868 Visit Telefonsändare
 - BE1433 Visit Mobilsändare
 - BE1491-868 Visit Babyvakt
 - BE1370-C Väckarklocka Pro
 - BE1580-868 Visit Väckarklocka

I lådan BE9026-P02 Trampmatta

 För detaljerad produktinformation, se motsvarande användarmanual.

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warrington,
Peterborough, PE8 6UT, UK



CH REP

Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone: +46 31 68 28 20
E-mail: info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE9026_012MAN1.0
Date of issue: 2025-03-04
© 2025 Bellman & Symfon AB.
All rights reserved.