

# Visit telefoonzender

BE1431



 Bellman & Symfon®



## Funcies

### Werkt voor de meeste telefoontypes

Zowel vaste als mobiele telefoons\*

### Meervoudige verbindingen

Drie aparte activeringsingangen

### Aanpasbare melding

Kies er een voor elke activering

### Duurzame energie

Levensduur van de batterij tot 10 jaar

### Beveiligde radioverbinding

Tot 250 m reikwijdte

\* Mobilele telefoonsensoraccessoire vereist

## Houd contact met uw dierbaren.

Deze telefoonzender van Bellman & Symfon maakt deel uit van het Visit smart home-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden. Hij kan worden gebruikt om zowel uw vaste telefoon als uw mobiele telefoon te detecteren, of zelfs een inkomend bericht op uw tablet (accessoire vereist).

### Hoe het werkt

Wanneer de telefoonzender is geactiveerd, signaleert deze de Visit ontvanger die u waarschuwt met geluid, flitsen of trillingen (afhankelijk van de ontvanger).

Hij is uitgerust met drie activeringen die, naast telefoondetectie, kunnen worden gebruikt voor:

- Een contactmat
- Een magnetisch contact
- Een bestaande deurbel, enz.

Met de telefoonzender kunt u, voor elke activering, een individuele waarschuwing kiezen en hij maakt gebruik van een robuuste radioverbinding die uw hele huis dekt. Hij is zeer eenvoudig in te stellen, nagenoeg onderhoudsvrij en werkt jarenlang op standaard batterijen.




# Technische specificaties

## Grootte en gewicht

- Hoogte: **100 mm, 4,0"**  
Breedte: **65 mm, 2,6"**  
Diepte: **27 mm, 1,1"**  
Gewicht: **120 g, 4,2 oz.** (incl. batterijen)



## Knoppen en aansluitingen

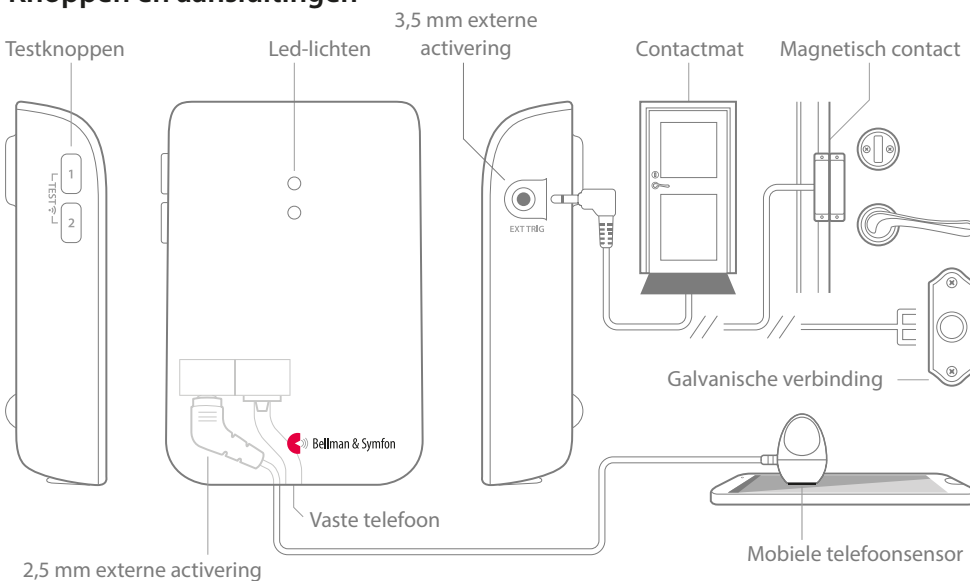

## Ingangen/uitgangen

- RJ11-ingang naar analogo telefoonnetwerk
- 2,5 mm externe activeringsingang voor de mobiele telefoonsensor
- 3,5 mm externe activeringsingang voor andere accessoires

## Activering

- De testknoppen en de vaste telefoon
- Een smartphone/tablet via de mobiele telefoonsensor
- De contactmat of een magnetisch contactaccessoire
- Een deurbel, enz. aangesloten aan de externe activering

## Frequentie en dekking

- Radiofrequentie: 315 MHz, 433,92 MHz of 868,3 MHz afhankelijk van de regio
- Dekking: 50 - 250 m, afhankelijk van de radiofrequentie en de kenmerken van het gebouw

## Stroom en batterij

- Stroomvoorziening  
Batterijvermogen 2 x 1,5 V AA lithium of alkaline
- Stroomverbruik  
Actief < 70 mA, inactief < 15  $\mu$ A

Gebruikstijd  
Alkaline ~ 5 jaar, lithium ~ 10 jaar

## Aantal radiotoetsen

- 64 standaard. Maximaal 256 met optionele software.

## Onderhoud en reiniging

- Onderhoudsvrij. Reinig met een droge doek.
- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
- Niet herbruikbaar.

## Milieueisen

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Temperatuur: 0 ° - 35 °C, 32 ° tot 95 °F
- Relatieve vochtigheid: 15% - 90% (niet-condenserend)

## In de doos

- BE1431 Visit telefoonzender
- 2 x 1,5 V AA alkalinebatterijen
- Klittenband voor wandmontage
- Alcoholdoekje
- Schroef en plug
- Gebruikershandleiding



## Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- BE9251 mobiele telefoonsensor
- BE9023 Magnetisch contact
- BE9024 contactmat
- BE9253 externe activeringskabel (3,5 mm aansluiting)

© 2020 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1431\_001DAS003

[bellman.com](http://bellman.com)