


Visit deurbelzender

BE1411

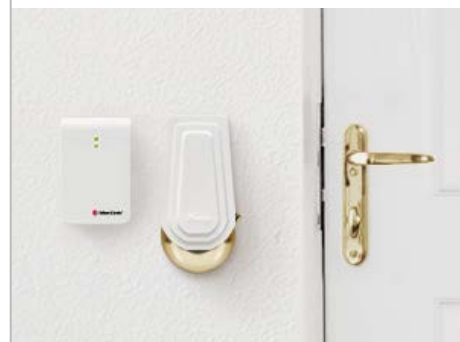

 Bellman & Symfon®



Functies

Flexibel

Detecteert de deurbel & de intercom

Betrouwbare detectie

Duale microfoontechnologie

Programmeerbaar

Leer het om elk geluid te herkennen

Duurzame energie

Levensduur van de batterij tot 10 jaar

Beveiligde radioverbinding

Tot 250 m reikwijdte

Weet wanneer uw gasten arriveren

Deze deurbelzender van Bellman & Symfon maakt deel uit van het Visit smart home-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden.

Hij herkent standaard de meeste deurbellen en intercoms en kan worden geprogrammeerd om vrijwel elk deurbelgeluid te herkennen.

Hoe het werkt

Wanneer de deurbelzender is geactiveerd, signaleert deze de Visit ontvanger die u waarschuwt met geluid, flitsen of trillingen (afhankelijk van de ontvanger).

Meervoudige activering

De deurbelzender kan worden geactiveerd door:

- De interne microfoon
- De ingebouwde elektromagnetische detector
- Het externe microfoonaccessoire
- Een galvanische verbinding met uw bestaande deurbel

De deurbelzender maakt gebruik van dubbele microfoontechnologie voor betrouwbare detectie en een robuuste radioverbinding die uw hele huis dekt. Hij is zeer eenvoudig in te stellen, nagenoeg onderhoudsvrij en werkt jarenlang op standaard batterijen.



Technische specificaties




Grootte en gewicht

- Hoogte: **100 mm, 4,0"**
Breedte: **65 mm, 2,6"**
Diepte: **27 mm, 1,1"**
Gewicht: **120 g, 4,2 oz (incl. batterijen)**



Knoppen en aansluitingen

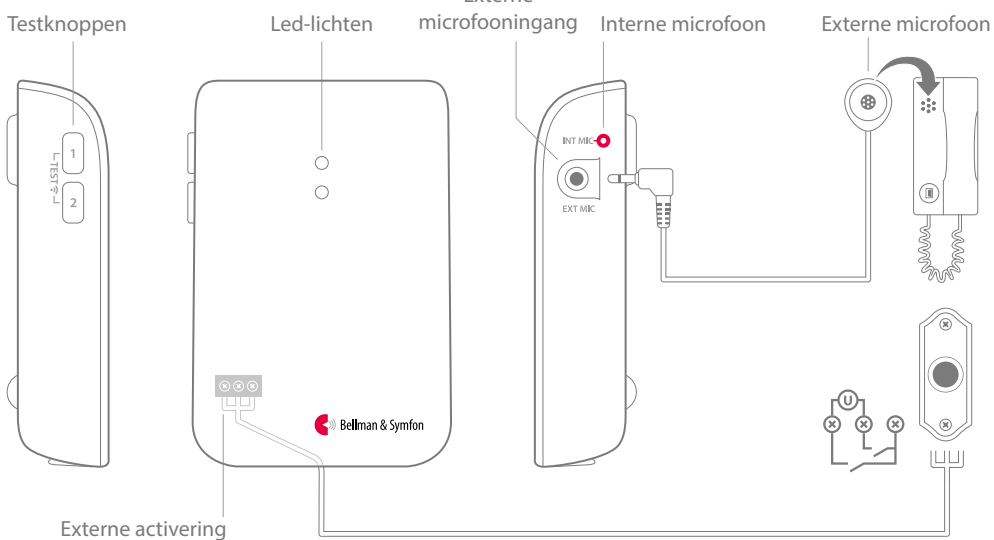

Ingangen/uitgangen

- Externe microfooningang
- Externe activeringsingang

Activering

- De testknoppen en de interne microfoon
- De ingebouwde elektromagnetische detector
- Het externe microfoonaccessoire
- De bestaande deurbel aangesloten aan de externe activering

Frequentie en dekking

- Radiofrequentie: 315 MHz, 433,92 MHz of 868,3 MHz afhankelijk van de regio
- Dekking: 50 - 250 m, afhankelijk van de radiofrequentie en de kenmerken van het gebouw

Stroom en batterij

- Stroomvoorziening
Batterijvermogen 2 x 1,5 V AA lithium of alkaline
- Stroomverbruik
Actief < 70 mA, inactief < 15 µA
- Bedrijfstijd
Alkaline ~ 5 jaar, lithium ~ 10 jaar

Aantal radiotoetsen

- 64 standaard. Maximaal 256 met optionele software.

Onderhoud en reiniging

- Onderhoudsvrij. Reinig met een droge doek.
- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
- Niet herbruikbaar.

Milieueisen

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
- Temperatuur: 0 ° tot 35 °C, 32 ° tot 95 °F
- Relatieve vochtigheid: 15% - 90% (niet-condenserend)

In de doos

- BE1411 Visit deurbelzender
- 2 x 1,5V AA alkalinebatterijen
- Klittenband voor wandmontage
- Alcoholdoekje
- Schroef en plug
- Gebruikershandleiding



Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- BE9199 Externe microfoon 2,5 m
- BE9200 Externe microfoon 0,75 m

© 2020 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1411_001DAS004

bellman.com