


ER20 XS Hörselskydd



ER20XS är hörselskydd med hög ljudkvalitet och mer likvärdig ljuddämpning över alla frekvenser. Musik och tal förblir tydliga, bara tystare, som att sänka volymen. ER20XS är återanvändbara och levereras med öronproppar i två storlekar för att passa alla.

Innehåll

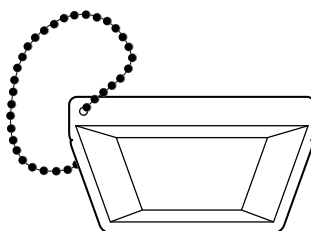


Fodral




Halssnöre

2 x Hörselskydd

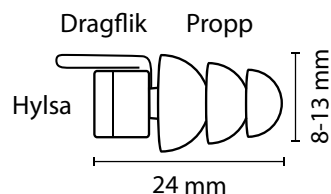

2 x Extra Proppar

Bruksanvisning ER20XS

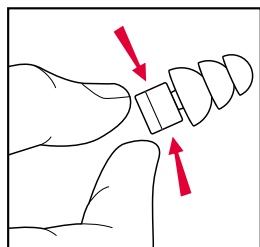

Isättning

- Håll hylsan mellan tumme och pekfinger.
- Dra försiktigt uppåt/utåt i ytterörat.
- För in proppen i hörselgången med en lätt vridande rörelse tills skyddet sitter bekvämt och sluter tätt.

Uttagning

- Ta ut hörselskyddet genom att vrida och samtidigt dra det utåt.
- Förvara dina hörselskydd i sitt fodral efter användning.

Skötsel




- Torka av med en fuktig trasa vid behov.
- Sänk inte ner hörselskydden i vatten.
- Rengör inte med starka kemikalier eller alkohol.

Viktigt

ER20XS är återanvändbara. Vid intensiv användning kan de försvagas och gå sönder. Byt ut var 3–6 månad.

Garanti

Garantin gäller i 2 år från dagen för köpet hos någon av våra återförsäljare. Garantianspråk kan endast göras hos återförsäljare mot uppvisande av originalkvitto. Garantin täcker inte normalt slitage eller skador orsakade av felaktig användning eller ljudläckage.

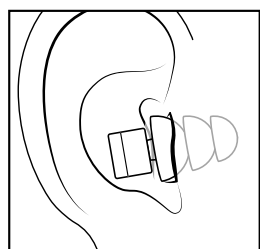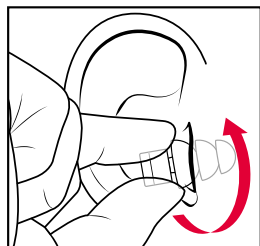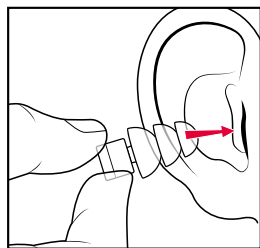

Varningar


- Hörselskyddet måste vara korrekt isatta och justerade dvs. försegla hörselgången helt, samt korrekt underhållna, för att uppnå förväntad dämpning och skydda hörseln.
- Använd hörselskydd kontinuerligt när ljudnivåerna är potentiellt skadliga.
- Säkerställ att hörselskydden ger tillräcklig dämpning för bullernivån i den aktuella miljön.
- Kontrollera hörselskydden regelbundet för att säkerställa dess funktion.
- Ta aldrig bort hylsan medan hörselskydden används.
- Att inte följa dessa varningar kan kraftigt försämra dämpningen och produktens skydd av hörseln.
- Om en halssnöre används, se till att den inte fastnar i något föremål i närheten.
- Denna produkt kan påverkas negativt av vissa kemiska ämnen.
- Plötslig eller snabb uttagning av öronpropparna från hörselgången kan skada trumhinnan.
- Ta inte ut öronpropparna genom att dra i halssnöret.

ER20 XS Hörselskydd


Montera halssnöre




1 Förstora öglan.

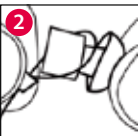

2 Trä öglan över skyddet.

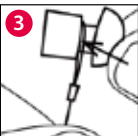


3 Placera öglan vid hylsan.

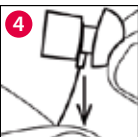


4 Dra åt öglan ordentligt.*

**Varning: Dessa hörselskydd skall inte användas i miljöer/situationer där det föreligger risk att halssnöret fastnar.*

Installera/ta bort dragfliken och byta storlek på propparna

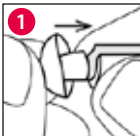


1 Ta bort proppen genom att dra och vrida försiktigt.

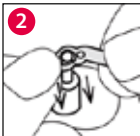

2 **Installera dragflik:** placera fliken på skaftet. Dra ner fliken tills den snäpper på plats.



3 **För att ta bort:** ta tag i fliken och dra uppåt.

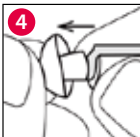

4 Sätt tillbaka propp av önskad storlek genom att trycka och vrida försiktigt.

Dämpningsdata

Frekvens, Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning, dB	14.8	10.4	14.2	17.7	18.9	21	20.9	30.3
Standardavvikelse, dB	3.7	3.2	3.9	4.2	4.2	4.2	3.0	6.2
Förväntat skyddsvärde, dB	11.1	7.3	10.3	13.5	14.7	16.8	18.0	24.0

- H** Genomsnittliga dämpningsegenskaper i högfrekvensspektrumet (> 2 kHz)
- M** Genomsnittliga dämpningsegenskaper i mellanfrekvensspektrumet (0,5–2 kHz)
- L** Genomsnittliga dämpningsegenskaper i lågfrekvensspektrumet (<0,5 kHz)
- APV** (antaget skyddsvärde) SNR (Single Number Rating): Genomsnittliga dämpningsegenskaper i standardfrekvensspektrumet.

H	M	L	SNR
20.6	18.4	15.4	20.2
2.7	3.4	3.2	2.8
18	15	12	17

Denna produkt uppfyller kraven i EN 352-2:2020 och PPE-förordning (EU) 2016/425.
Anmält organ ansvarigt för EU-typkontroll: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown
Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland

Intyg om överensstämmande: www.bellman.com/doc



Manufactured by /Tillverkad av:
Etymotic Research Inc.
1125 Remington Road
Schaumburg, IL 60173
United States

Imported by / Importerad av:
MedEnvoy Global BV,
Prinses Margrietplatsoen 33,
Suite 123, 2595 AM
The Hague, The Netherlands

Distributed by/ Distribuerad av:
Bellman & Symfon Europe AB
Södra Långebergsgatan 30,
436 32 Askim, Sweden

