




Väst_001ART012-SE

Pagerladdare

Knappar och reglage

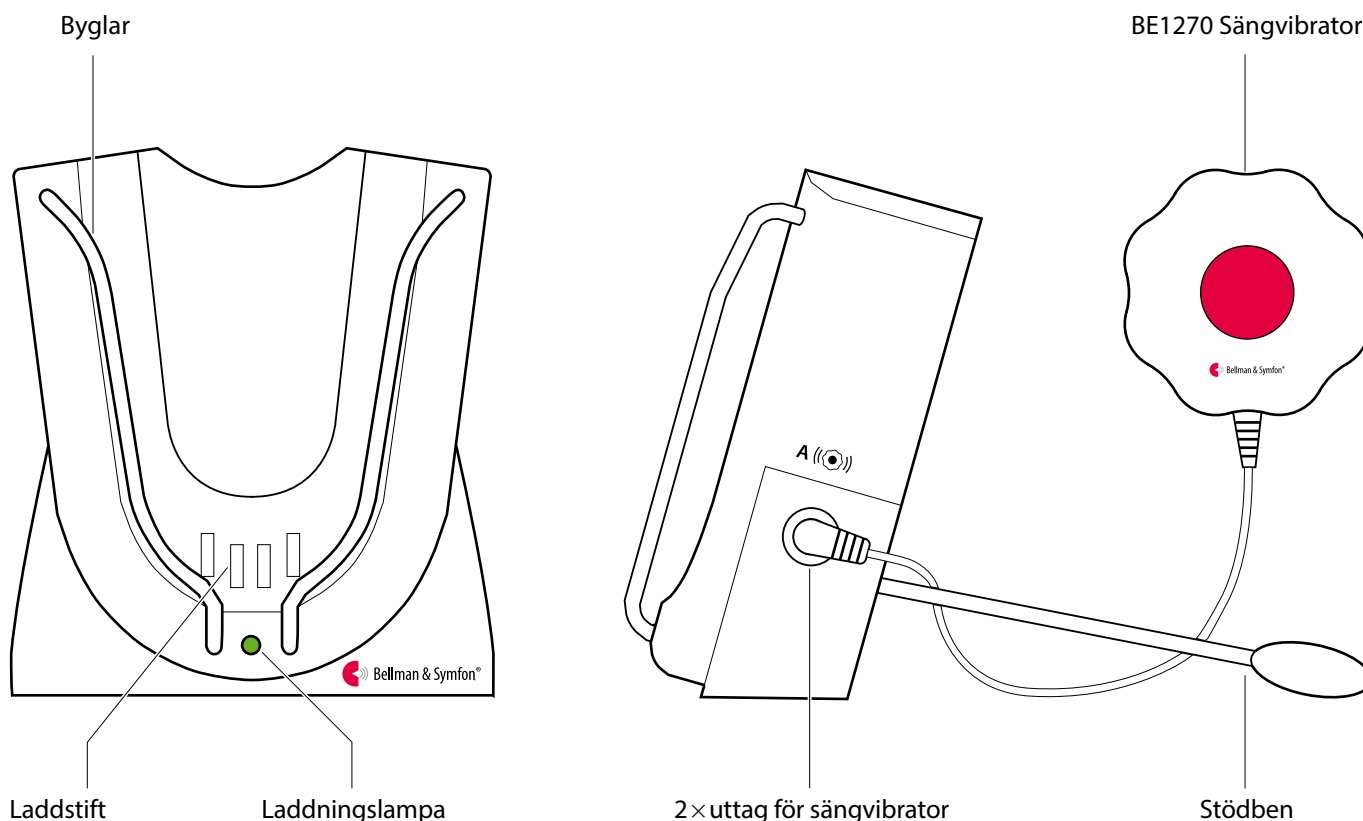

Teknisk information

I förpackningen

- BE1260 Pagerladdare med förmonterade reservbatterier
- Nätadapter
- 1 x 1,2 V NiMH uppladdningsbart batteri för pagern
- Stödben samt skruv och plugg

Statuslampa

- **Tänd:** Pagern laddas
- **Släckt:** Pagern är fulladdad eller nätadaptern är inte korrekt ansluten

Ström och batteri

- Strömförsörjning: 7,5 VDC / 1500 mA
- Batterireserv: 2 x 1,2 V NiMH uppladdningsbara

Notera:

Batterierna får endast bytas av auktoriserad servicepersonal.

- Laddningstid, pager
Normal laddningstid: ~ 6 h
Vid helt urladdat batteri: ~ 24 h
- Vibratorstyrka: 2,0 – 4,0 VDC

Storlek och vikt

- Höjd: 79 mm
- Bredd: 88 mm
- Djup: 43 mm
- Vikt: 200 g, inkl. batterier och adapter

Omgivning

- Endast för inomhusbruk

Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator
Laddaren har uttag för upp till två sängvibratorer




Varning! När pagerladdaren används skall **ENDAST UPPLADDNINGSBARA NiMH BATTERIER** användas i pagern. Standardbatterier kan börja läcka om de placeras i laddaren och kommer då att förstöra elektroniken. Den typen av skada täcks inte av garantin.

Pagerladdare

Komma igång

- Viktigt!** Ersätt det alkaliska batteriet i pagern med det bifogade 1,2 V NiMH uppladdningsbara batteriet.
- Skruva fast de två stödbenen på baksidan av laddaren och ställ den på en plan yta. Du kan också hänga den på väggen med medföljande skruv och plugg.
- Anslut nätadaptern till vägguttaget och sätt pagern i laddaren. Laddningslampan lyser grönt när pagern laddas och släcks när den är fulladdad. Anslut sängvibratoren (tillbehör) och lägg den under kudden eller madrassen.

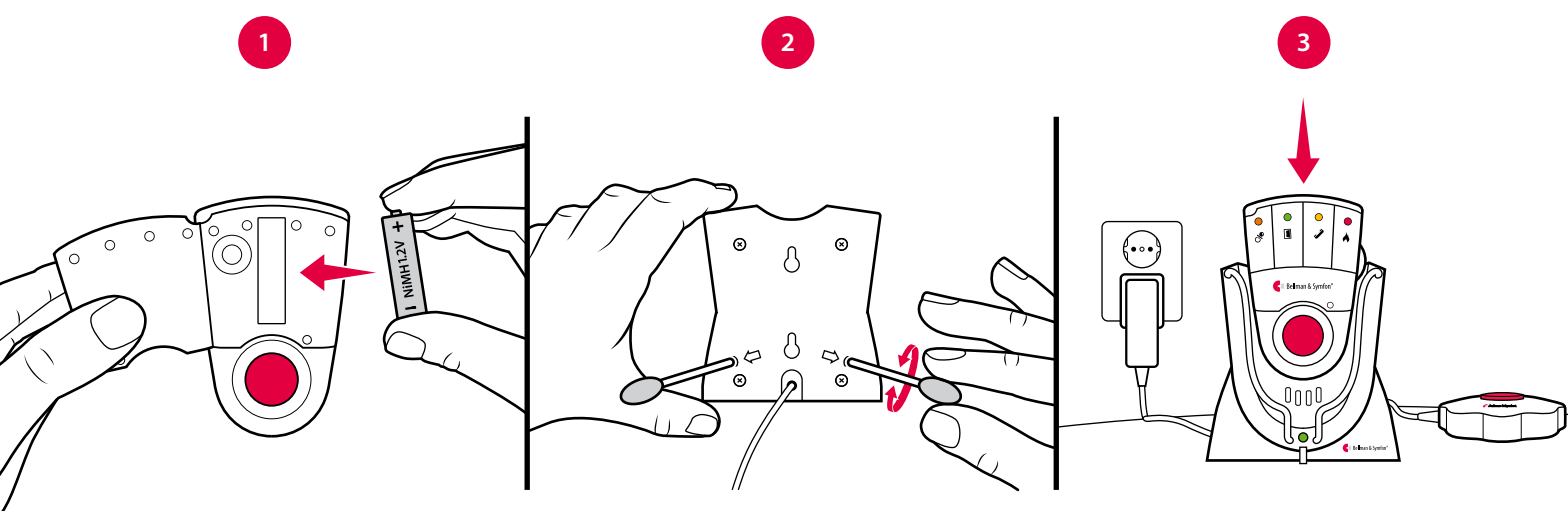

Testa anslutningen

Notera: Ladda reservbatteriet i minst 24 timmar innan du använder laddaren med en sängvibrator.

- För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp (se **Testa anslutningen** för respektive sändare).
- Om pagern sitter i laddaren, tänds en Visitlampa på pagern och sängvibratoren börjar vibrera. Om ingenting händer, se **Felsökning**.

Felsökning

De flesta problem med pagerladdaren kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:

Om	Gör så här
Pagern laddas inte trots att den sitter i laddaren	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att pagern är korrekt placerad i laddaren. Laddningslampan tänds i grönt för att visa att pagern laddar. Om laddningslampan inte tänds kan reservbatterierna vara urladdade. Anslut nätadaptern i vägguttaget för att ladda reservbatterierna.
Sängvibratoren vibrerar inte när pagern aktiveras	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att sängvibratoren är korrekt ansluten till pagerladdaren. Kontrollera att pagern är korrekt placerad i laddaren. Laddningslampan tänds i grönt för att visa att pagern laddar. Om laddningslampan inte tänds kan reservbatterierna vara urladdade. Anslut nätadaptern i vägguttaget för att ladda reservbatterierna.